

MONTERINGSANVISNING

Løftestenger



Beskrivelse	Artikkelnummer
Løftestenger	12738150

NOVA





Montering

Ta ut seteputa før du monterer løftestengene.

1. Plasser de fremre løftestengene som vist i figur 1. Løftestengene er merket **"Foran"**.
2. Plasser de bakre løftestengene som vist i figur 2. Løftestengene er merket **"Bak"**.
3. Før de bakre løftestengene inn i fremre.



**Påse at løftestengene
går i lås før du løfter.**

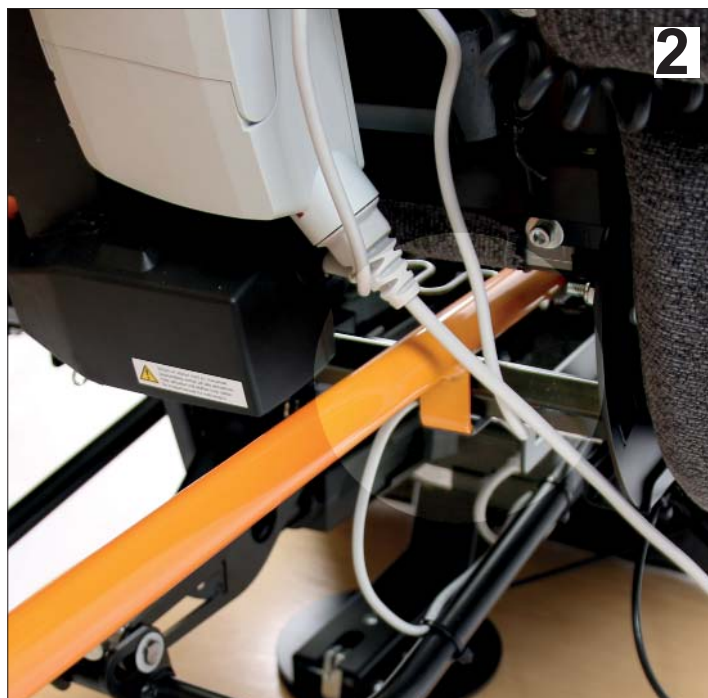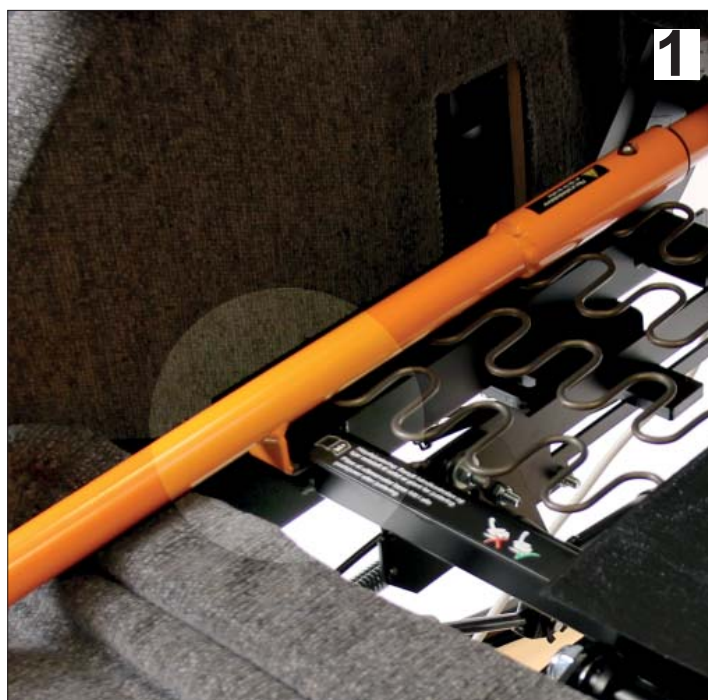

3





Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no