

MONTERINGSANVISNING

Sveiv for setehøydejustering





Beskrivelse

Sveiv for setehøydejustering

Artikkelnummer

12738155

NOVA

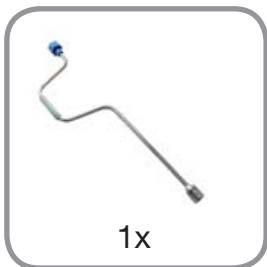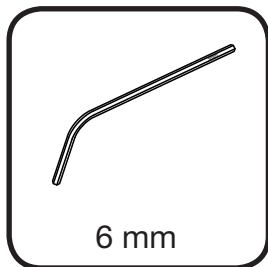

Innstilling av setehøyde

- Ta ut seteputen.
- Kjør seteløft til setet er plant.



- Løsne skruene **A** og skruen **E** slik at søylen **B** løper fritt.
- Måleskala **C** på søylen indikerer setehøyden i cm.
- Plasser sveiv for setehøydejustering i innvendig i rør **D** og skru stolen til ønsket høyde.
- Trekk til skruene **A**.




Det kan være nødvendig å etterjustere slik at setet blir plant og ikke heller mot høyre eller venstre.

- Skruen **E** plasseres i øvre eller nedre hull og skrus til slik at setet blir plant. Bruk eventuelt vater som hjelpemiddel. Det kan også være nødvendig å løsne skruene **A** for å gjennomføre denne justeringen.

Påse at alle skruer er strammet når du er ferdig med høydejusteringen.

⚠ Advarsel!

Juster fotbrett lengden etter at setehøyden er justert, se oppreisingsstolens brukermanual. Minimum klaring fra fotbrettet til sokkelen er 1 cm.

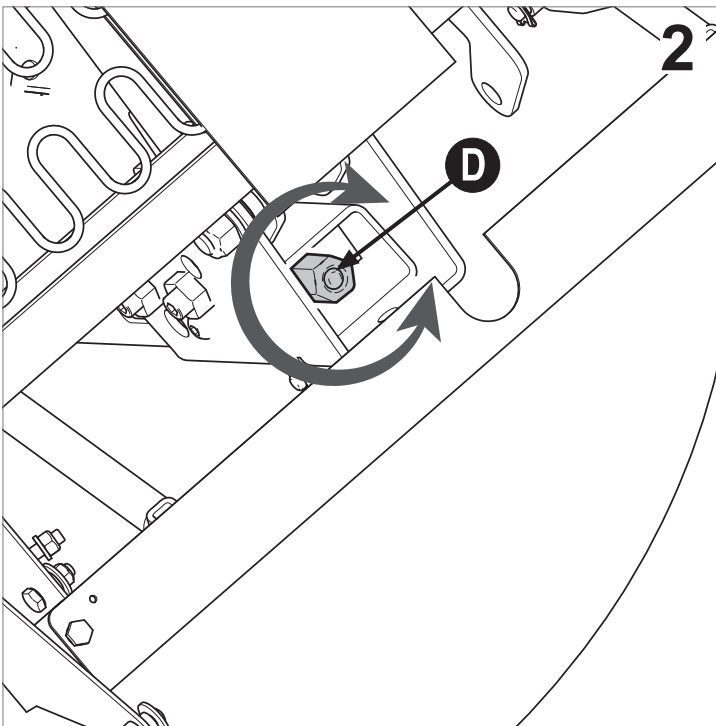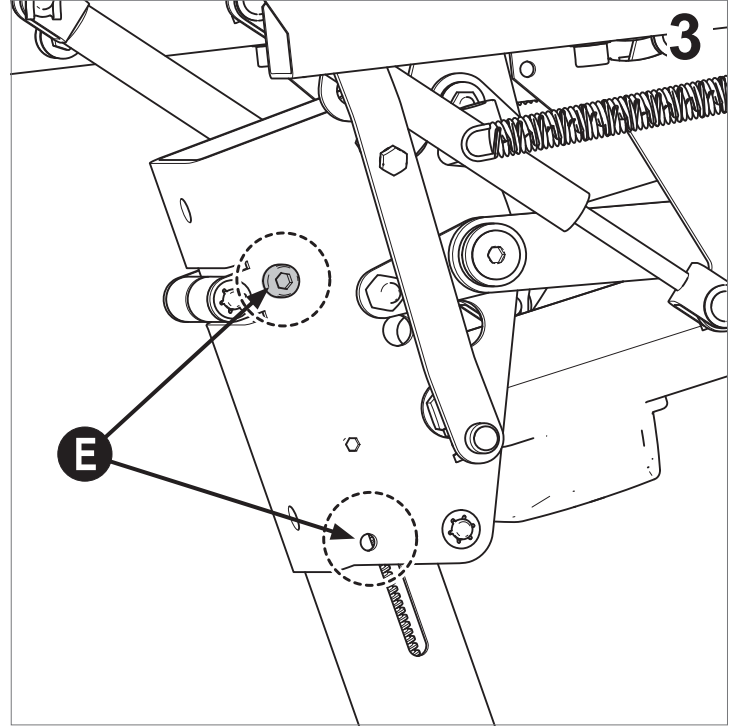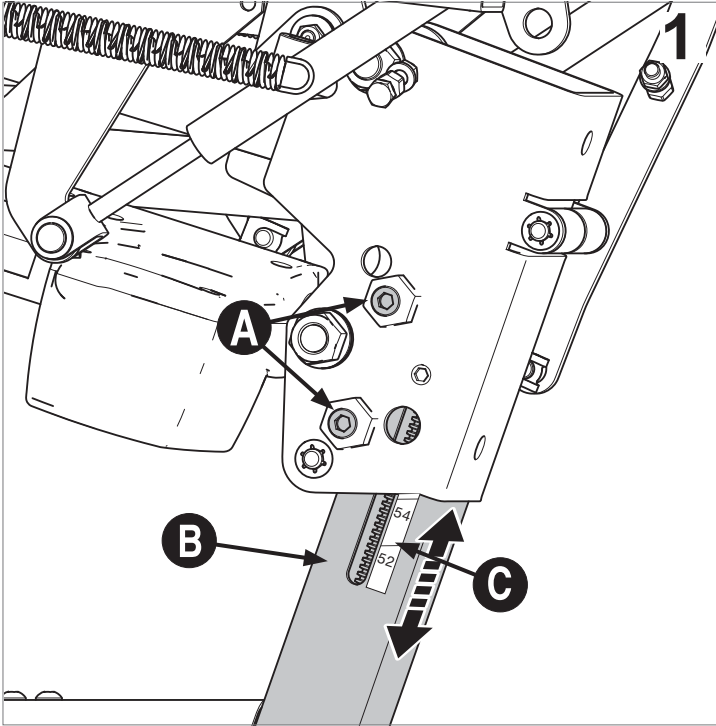



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no