




MONTERINGSANVISNING

Rygg

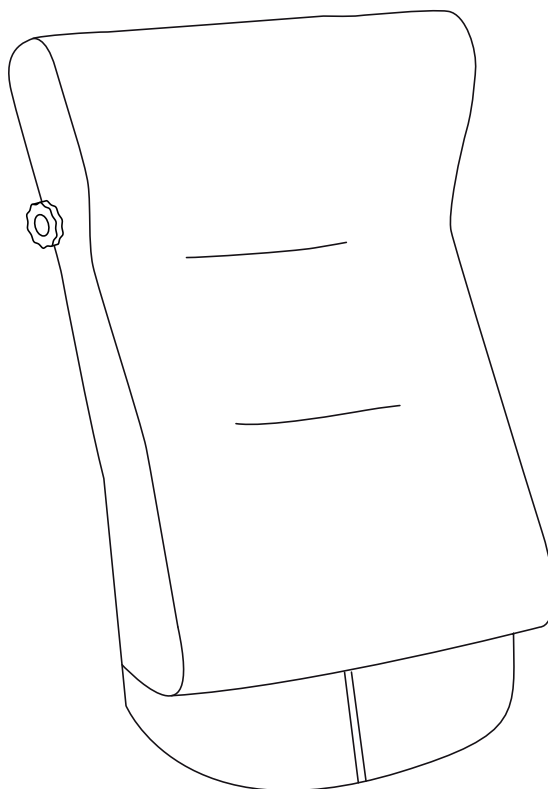

Beskrivelse			Artikkelnummer	
Rygg lav/standard/høy	høyde 88 cm	Skifergrått stoff	☐	12974000
Rygg lav/standard/høy	høyde 88 cm	Sort hud	☐	12984000
Rygg (std rygg: standard/høy)	høyde 80 cm	Skifergrått stoff	☐	12774000
Rygg (std rygg: standard/høy)	høyde 80 cm	Sort hud	☐	12784000
Rygg (std rygg: lav)	høyde 72 cm	Skifergrått stoff	☐	12874000
Rygg (std rygg: lav)	høyde 72 cm	Sort hud	☐	12884000
Rygg (std rygg: smal/standard)	høyde 80 cm	Skifergrått stoff	☐	12674000
Rygg (std rygg: smal/standard)	høyde 80 cm	Sort hud	☐	12684000
Rygg (std rygg: smal/lav)	høyde 72 cm	Skifergrått stoff	☐	12674005
Rygg (std rygg: smal/lav)	høyde 72 cm	Sort hud	☐	12684005


NOVA

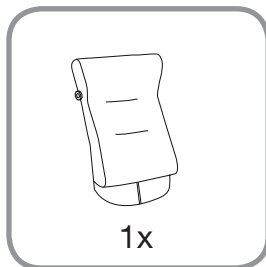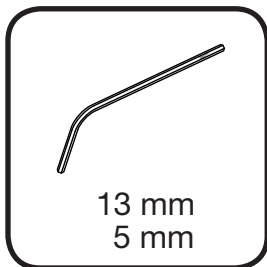

Demontering



Ta av armlenene.


1. Løsne ryggaktuatoren.
2. Skru ut de seks skruene **A**.
3. Skru av mutteren **B** og skru ut skruen **C** ut så langt at ryggen er løs. Ikke skru den helt ut. Gjenta på motsatt side. Ta av den gamle ryggen.

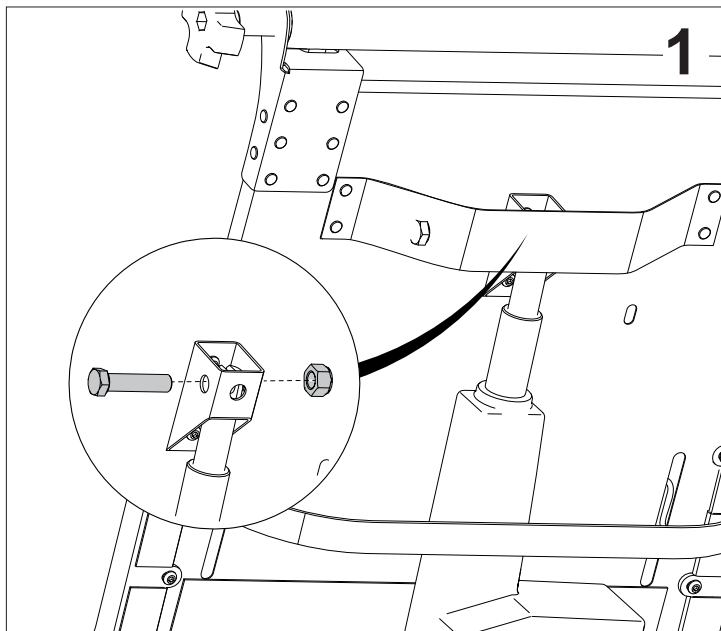

Montering

4. Monter den nye ryggen i motsatt rekkefølge og sett på armlenene.

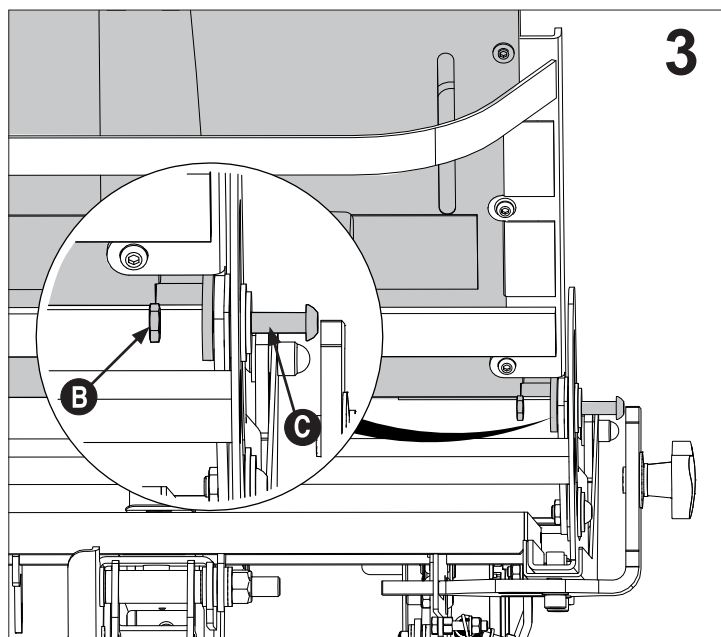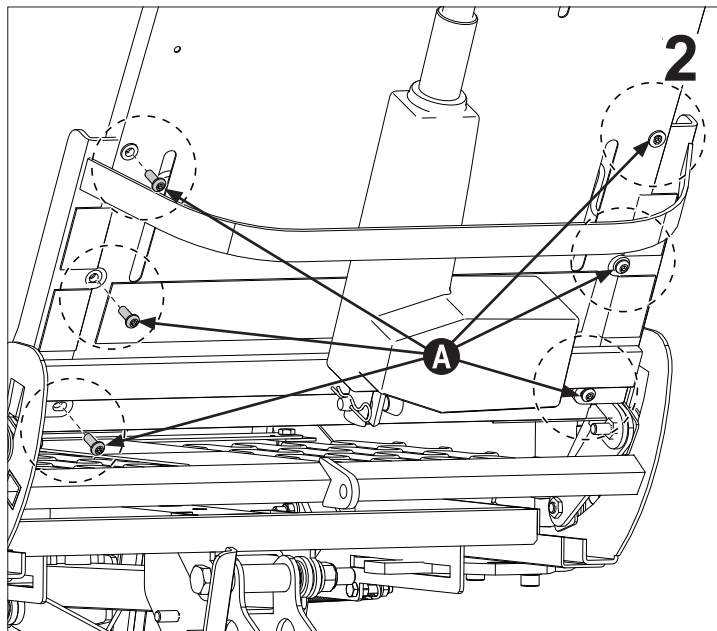

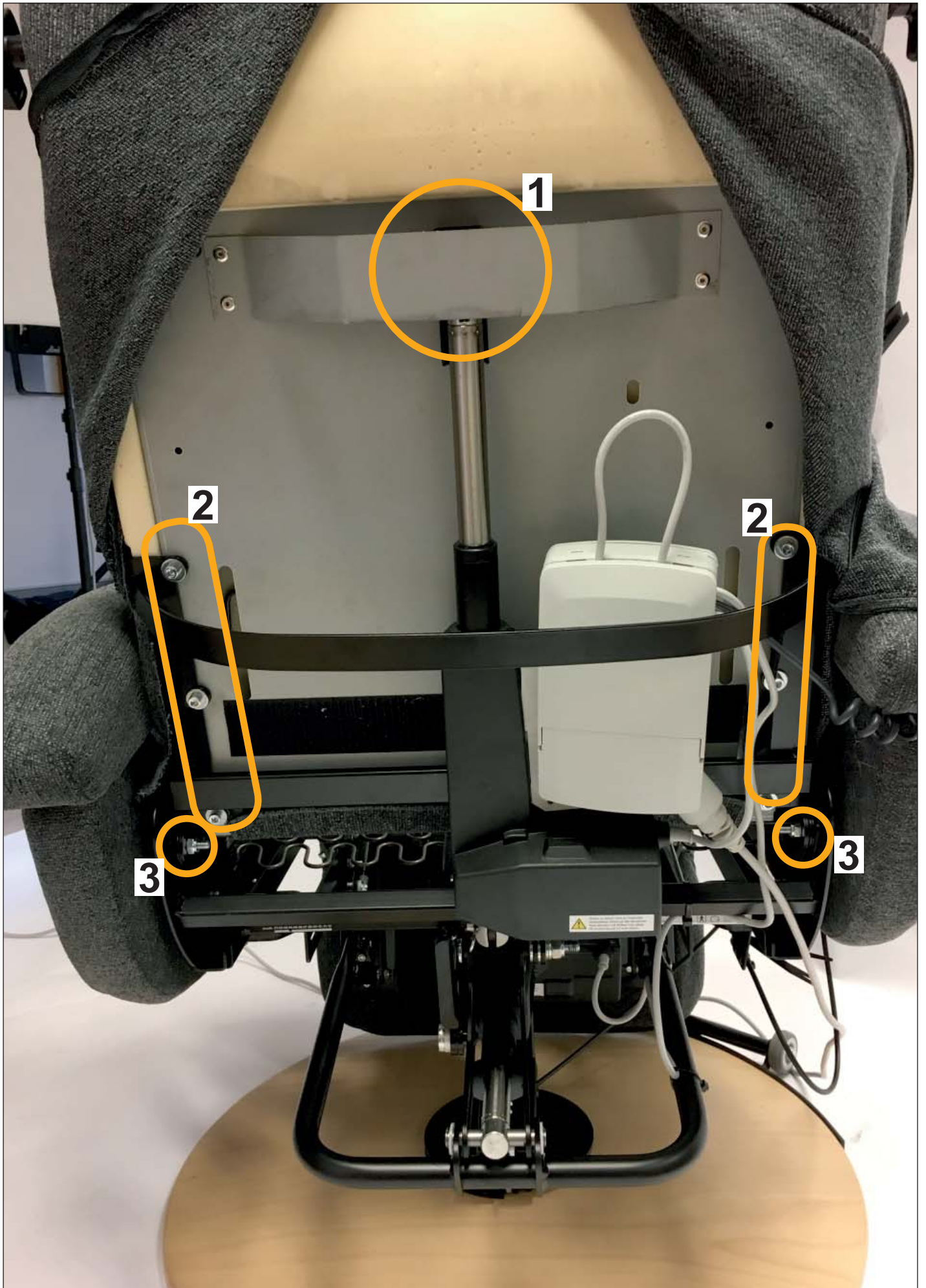



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no