


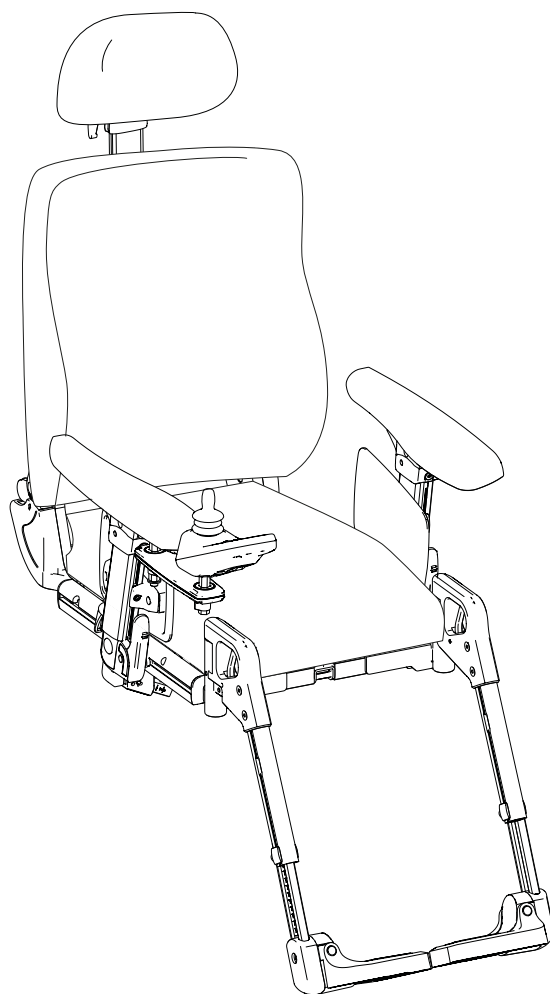

Sedeo Pro

Brukermanual


QUICKIE®

000690790.07

SUNRISE MEDICAL er ISO 13485-sertifisert, noe som garanterer kvalitet innen alle områder av konstruksjon og produksjon av denne rullestolen. Vist utstyr og tilbehør kan fås direkte på produktet eller etterbestilles.



Ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral, hvis du har spørsmål om bruk, vedlikehold eller sikkerhet av setesystemet. Hvis du ikke får svar fra terapeuten eller hjelpemiddelsentralen din, eller du har andre spørsmål, kan du skrive eller ringe til:

Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 Vestby

Norge

Telefon: +47 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no

Forhandlers underskrift og stempel



ISO 7010-M002
Du må lese igjennom
bruksanvisningen! (Blått ikon)

1.0 Informasjon for bruker	5	6.0 Manuelt og elektrisk seteutstyr	33
1.1 Denne brukermanualen	5	6.1 Manuelt seteutstyr	33
1.2 Ytterligere informasjon	5	6.2 (Elektrisk) seteutstyr	34
1.3 Symboler som brukes i denne brukermanualen	5		
2.0 Sikkerhet	6	7.0 Redusere setesystemets størrelse for transportformål	35
2.1 Symboler og merkelapper brukt på produktet	6	7.1 Setepute	35
2.2 Sikkerhet: Temperatur	6	7.2 Demontere ryggputen	35
2.3 Sikkerhet: Bevegelige deler	6	7.3 Hurtigutløsning av nedleggbar rygg	36
2.4 Sikkerhet: Kvelningsfare	6	7.4 Nedleggbar rygg med oppvippbare armlener	36
2.5 Sikkerhet: Bord	7	7.5 Nedleggbar rygg med oppvippbare armlener	36
3.0 Generell beskrivelse	7	7.6 Utsvingbare benstøtter	37
4.0 Sette opp setesystemet	8	7.7 Avtakbart armlene med enkel stolpe	37
4.1 Forhåndsinnstille setedybden	8	8.0 Vedlikehold og rengjøring	38
4.2 Forhåndsinnstille setebredden	9	8.1 Generelt vedlikehold	38
4.3 Forhåndsinnstille ryggen	10	8.2 Rengjøre setesystemet	38
4.4 Forhåndsinnstille oppvippbare armlener/avtakbare armlener med enkel stolpe	12	8.3 Hygiene ved gjenbruk av rullestolen:	38
4.5 Stille inn oppfellbare armlener som følger rygg	15	8.4 Generelle instruksjoner for rengjøring:	39
4.6 Forhåndsinnstilling multijusterbare armlener	16	8.5 Rengjøre ekstrautstyr:	39
4.7 Forhåndsinnstille setebredden	17	8.6 Rengjøre styrespakene:	39
4.8 Klesbeskytter	18	8.7 Oppbevaring	39
4.9 Forhåndsinnstille SEDEO Lite-armlener med enkel stolpe	18	9.0 Avhending	40
4.10 Forhåndsinnstille midtmontert benstøtte	19	10.0 Teknisk informasjon:	41
4.11 Forhåndsinnstilt sentermontert benstøtte	20	10.1 Gjeldende normer/standarder	41
4.12 Forhåndsinnstille midtmontert benstøtte	21	10.2 Teknisk informasjon: SEDEO Pro-setesystem	42
4.13 Forhåndsinnstille utsvingbare benstøtter	22	10.3 Teknisk informasjon: SEDEO Pro HD setesystem	44
4.14 Forhåndsinnstille nakkestøtten	23	11.0 Garanti	46
4.15 Forhåndsinnstille brakett for fast/utsvingbar styreboks	24		
4.16 Forhåndsinnstille lårstøtte	25		
4.17 Forhåndsinnstille sidestøtter	26		
4.18 Forhåndsinnstille utsvingbar knestøtte	27		
4.19 Forhåndsinnstille bøyler	27		
4.20 Hoftebelte/setebelte	28		
5.0 Bruke setesystemet	29		
5.1 Gå inn og ut av rullestolen (forflytting)	29		
5.2 Forberedelser for å forflytte deg ut av stolen forfra	29		
5.3 Forberedelser til å forflytte deg sideveis	30		
5.4 Nakkestøtte	31		
5.5 Utsvingbar brakett for styreboks	31		
5.6 Sidestøtter	31		
5.7 Knestøtte	32		
5.8 Lårstøtte	32		
5.9 Hemiplegi-armlene	32		
5.10 Høyde på kjørehåndtak	32		
5.11 Bøyler	32		

1.0 Informasjon for bruker

Takk for at du valgte en rullestol fra Sunrise Medical. Sunrise Medicals mobilitetsprodukter av høy kvalitet er konstruert for å gi deg større frihet og en enklere hverdag.

1.1 Denne brukermanualen

Ved hjelp av denne veiledningen kan du bruke og vedlikeholde setesystemet på en trygg måte. Denne brukermanualen er et tilleggsdokument til den generelle brukermanualen for rullestolen.

- Den generelle brukermanualen
- En brukermanual for setesystemet (dette heftet)
- En brukermanual for styreboksen

Det henvises til andre brukermanual når det er nødvendig i denne veiledningen, slik vist nedenfor:

 Generell brukermanual:	Henviser til den generelle brukermanualen for rullestolen.
 Styreboks:	Henviser til brukermanualen for styreboksen.
 Batterilader:	Henviser til brukermanualen for batteriladeren.

Ikke bruk rullestolen før du har lest igjennom og forstått all informasjon i hele brukermanualen (og alle de andre heftene)!

Hvis en av brukermanualene manglet da du mottok rullestolen, må du ta kontakt med din lokale Hjelpemiddelsentral umiddelbart. I tillegg til denne brukermanualen, følger det med en servicemanual for kvalifiserte teknikere.

1.2 Ytterligere informasjon

Vennligst ta kontakt med din lokale Hjelpemiddelsentral eller Sunrise Medical-representant dersom du har spørsmål om bruk, vedlikehold eller sikkerhet i forbindelse med rullestolen. Hvis du ikke får svar der eller dersom du har spørsmål om noe, kan du skrive eller ringe til Sunrise Medical på:

For informasjon om produktsikkerhet og tilbakekallelse av produkter, gå til www.SunriseMedical.no

1.3 Symboler som brukes i denne brukermanualen



FARE/ADVARSEL!

Potensiell fare for personskade, alvorlig personskade eller dødsfall




MERK/ADVARSEL!

Potensiell fare for produktskade.


Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det føre til personskade, produktskade eller miljøskade!

Merknad til personen og/eller pasienten: Dersom utstyret har vært involvert i en alvorlig hendelse, skal dette rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet i landet der personen og/eller pasienten bor.

Fig. 1.1

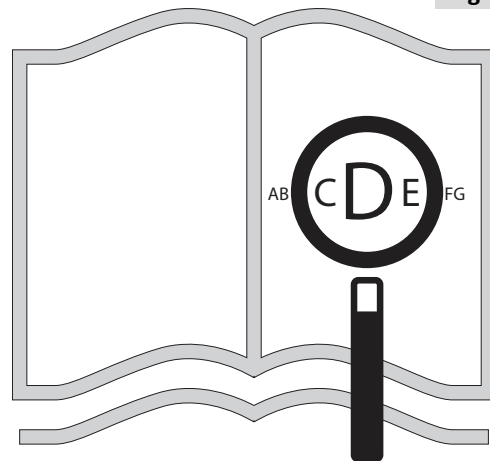

Hvis du er svaksynt kan dette dokumentet leses i PDF format på www.SunriseMedical.no

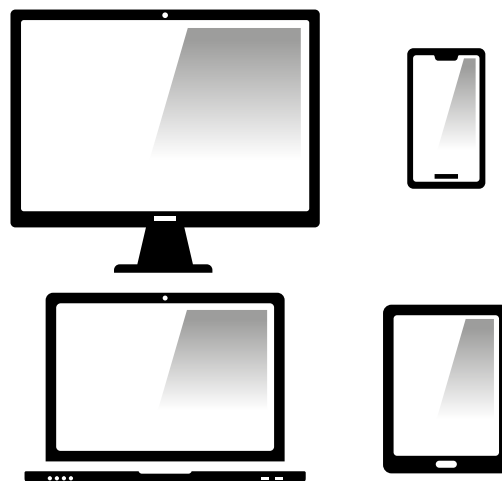

Alternativt kan du be om å få det med større skrift.



2.0 Sikkerhet

Følg instruksjonene ved siden av disse varselsymbolene nøye! Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det resultere i personskaade, produktskaade eller miljøskaade! Det er gitt sikkerhetsinformasjon i de relevante kapitlene.

2.1 Symboler og merkelapper brukt på produktet

Tegn, symboler og instruksjoner som er festet på rullestolen er en del av sikkerhetssystemet. De må aldri dekkes til eller fjernes. De må være festet på stolen og være leselige så lenge rullestolen er i bruk.

Skift ut eller reparer alle uleselige eller skadde merkelapper, symboler og instruksjoner umiddelbart. Ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral hvis du trenger hjelp.

Fig. 2.1: Advarsel – Fare for å klemme fingrene.

Fig. 2.2: Advarsel – Pass på at hurtigutløseren for setet er strammet forsvarlig til før du bruker rullestolen, spesielt i en bakke.

Fig. 2.3: Advarsel - Ikke kjør rullestolen i en bakke når seteryggen er lent bakover og/eller setet er i ståstilling

2.2 Sikkerhet: Temperatur



FARE/ADVARSEL!

- Pass på at rullestolen ikke står i direkte sollys over lengre tid når du ikke bruker den. Enkelte deler på rullestolen, slik som setet, seteryggen og armlenene, kan bli svært varme hvis de står i direkte sollys for lenge. Dette kan forårsake brannsåre eller allergiske reaksjoner i huden.

2.3 Sikkerhet: Bevegelige deler



FARE/ADVARSEL!

En rullestol er utstyrt med bevegelige og roterende deler. Hvis du eller andre kommer i kontakt med slike deler, kan det resultere i alvorlige personskader eller skade på rullestolen. Unngå derfor å komme i kontakt med bevegelige deler på rullestolen.

- Elektrisk tilt-in-space-justering
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk justering av seteryggen
- Utsvingbar brakett for styreboksen

2.4 Sikkerhet: Kvelningsfare



FARE/ADVARSEL!

Dette mobilitetsproduktet inneholder små deler som under enkelte forhold kan forårsake kvelningsfare for små barn.

Fig. 2.1

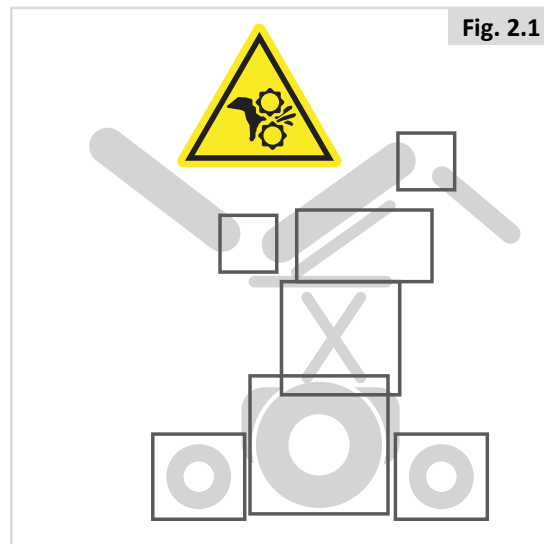


Fig. 2.2


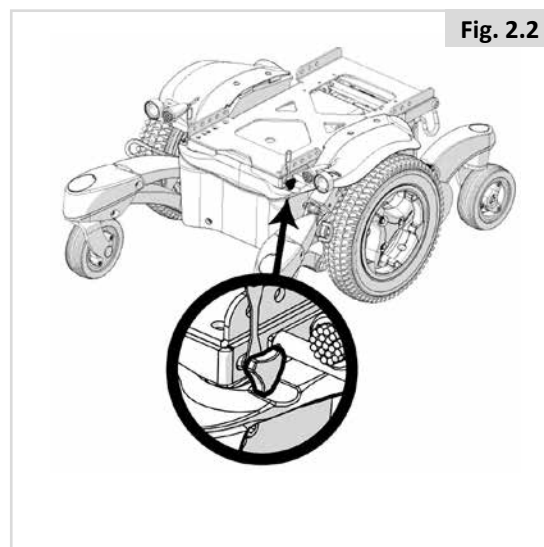


Fig. 2.3



2.5 Sikkerhet: Bord

Sikkerhet: Ventilatorbrett

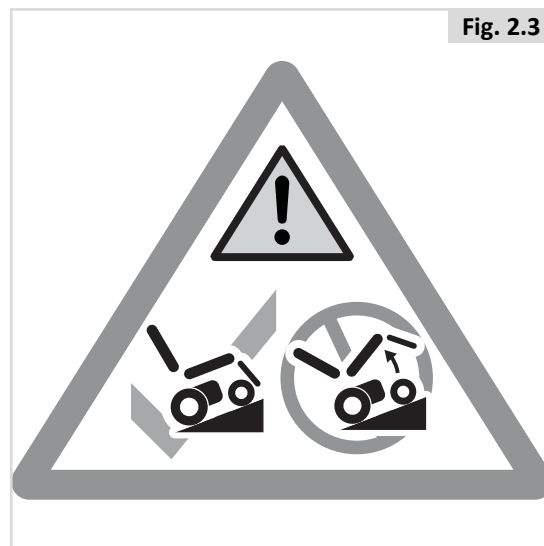

FARE/ADVARSEL!

Bruk av et ventilatorbrett kan påvirke rullestolens stabilitet og samlede vekt.

- Pass på at batteriene og ventilatoren er forsvarlig festet til brettet før stolen brukes.
- Gjør deg kjent med stolens økte størrelse før du kjører, for å forhindre potensielle kollisjoner.
- Når du aktiverer den justerbare seteryggen, pass på at området rundt ventilatorbrettet er fritt for hindringer.
- Vær oppmerksom på at det kan være fare for å klemme fingrene mellom ventilatorbrettet og seteryggen når ryggen er lent bakover.
- Ventilatorbrettet er kun konstruert til å holde ventilatorenheten og batteriene dens. Brettet er ikke konstruert til å holde en oksygenflaske o.l. Rullestolen kan bli ustabil dersom slike enheter oppbevares på brettet.
- Ventilatorbrettet må monteres og vedlikeholdes av en autorisert Sunrise Medical-forhandler.

Sikkerhet: Utsvingbart bord:



FARE/ADVARSEL!

- Tillatt maksimumsvekt for bordet er 2,5 kg.
- Bordet må ikke overbelastes, da det kan knekke eller gjøre stolen ustabil.
- Ikke legg tente sigaretter eller andre varme gjenstander på bordet, da dette kan deformere eller skade det.
- Pass på at armer, ben og klesplagg ikke er i veien når bordet monteres på rullestolen.

3.0 Generell beskrivelse

Rullestolen er utstyrt med et Sedeo Pro-setesystem. Sedeo Pro-setesystemet gir svært god støtte for brukerens hode, overkropp, armer og ben. Optimal kroppsstøtte betyr maksimal selvstendighet for brukeren av rullestolen.

Rullestolen må justeres av en kvalifisert spesialist. Feil justering av setet kan ha negative konsekvenser for sittestillingen.

Hovedkomponenter (Fig. 3.1):

1. Nakkestøtte
2. Joystick
3. Armlen
4. Setepute
5. Benstøtte
6. Ryggpute

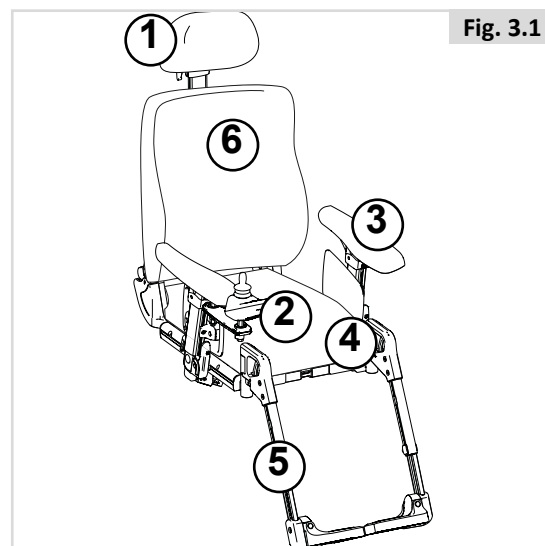


Fig. 3.1

4.0 Sette opp setesystemet

Det finnes ikke en gjennomsnittlig rullestolbruker. Derfor kan rullestolene fra Sunrise Medical forhåndsinnstilles for å passe bestemte behov til hver enkelt bruker.

Forhåndsinnstillingene gjøres én gang, første gang rullestolen skal brukes. Innstillingene må utføres av en kvalifisert tekniker, med mindre annet er uttrykkelig spesifisert.

Verktøy og kalibreringsmerker

En M5-unbrakonøkkel leveres med setesystemet. Denne kan brukes av en spesialist til å justere alle innstillingene i setesystemet. M5-unbrakonøkkelen er festet til rammen på stedet som er vist i Figur 4.1.



MERK/ADVARSEL!

Det er kalibreringsmerker på forskjellige deler i setesystemet. Fabrikkinnstillingene er vist.

4.1 Forhåndsinnstille setedybden

Dybde for ryggstøtte (Fig. 4.2):

1. Bruk en 5 mm unbrakonøkkel (sekskantnøkkel).
2. Skru opp de to skruene (A) nederst på seteplatene med et par omdreining.
3. Ryggen kan nå flyttes forover og bakover for å justere setedybden. Sikkerhetsstoppen vil forhindre at skyvedelene sklir helt fra hverandre.
4. Stram skruene på nytt.



MERK/ADVARSEL!

- Hvis det er behov for en større setedybde, sørg for at alle kablene er strukket før setet justeres mekanisk.
- Seteskinnen/seteplatene er tilgjengelige i to forskjellige størrelser: 400-520 og 460-560 mm. Velg seteskinnen som passer den justerte setedybden.
- Monter en ekstra setedybdeplate fra SD 530 mm for å oppnå mer stabilitet for den lange seteskinnen (Fig. 4.3).

Dybde for setepute (Fig. 4.4)

Bruk hullene i Fig. 4.4 for plassering av standard seteputer. Seteputen kan plasseres ett hakk lenger frem for å gi større setedybde.

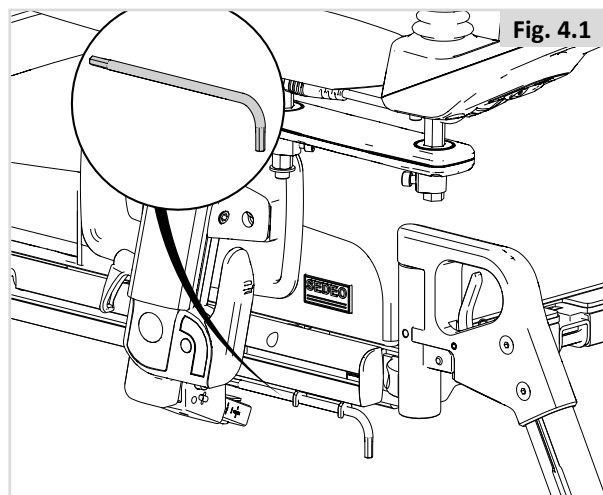


Fig. 4.1

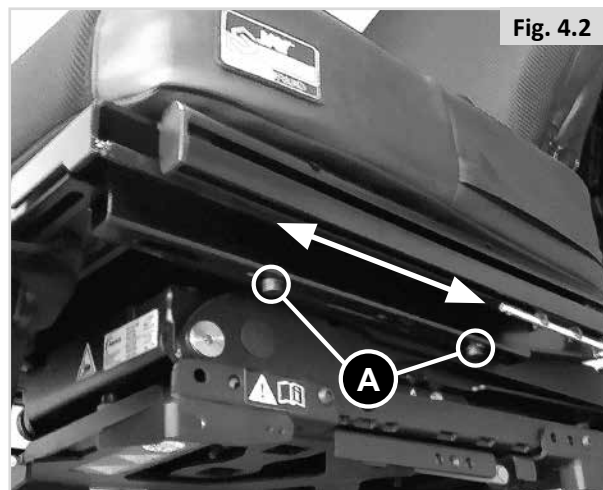


Fig. 4.2

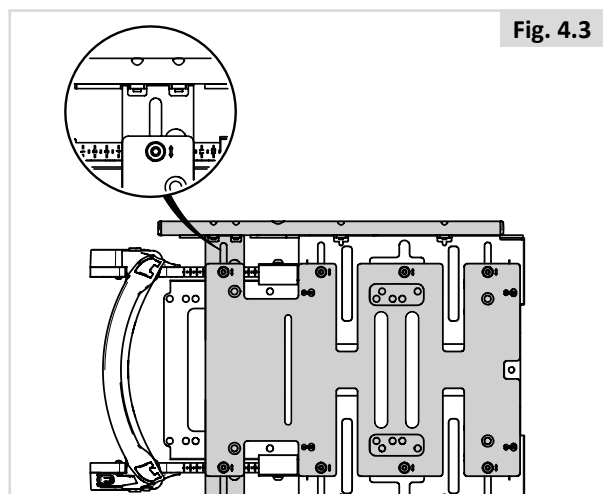


Fig. 4.3

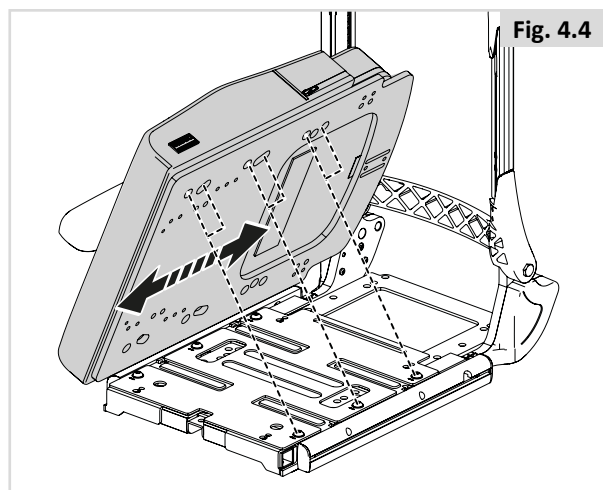


Fig. 4.4

4.2 Forhåndsinnstille setebredden


Bredde på oppvippbare armlener/avtakbare armlener med enkel stolpe (Fig. 4.5)

Kun finjusteringer kan gjøres på selve armlenet. For større justeringer må bredden på seteplaten også forhåndsjusteres.

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

⚠ MERK/ADVARSEL!

- Kontroller at den nye armlenstillingen ikke er i veien for noen av setestillingene.

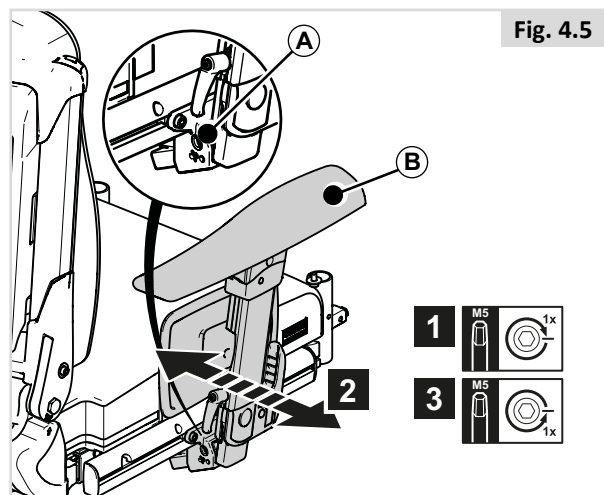


Breddejustering av multijusterbare og oppfellbare armlener som følger ryggen (Fig. 4.6)

1. Fjern to skruer (A)
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A).

⚠ MERK/ADVARSEL!

- Kontroller at den nye armlenstillingen ikke er i veien for noen av setestillingene. Hvis det finnes tilkoblede kabler, må du kontrollere lengden.

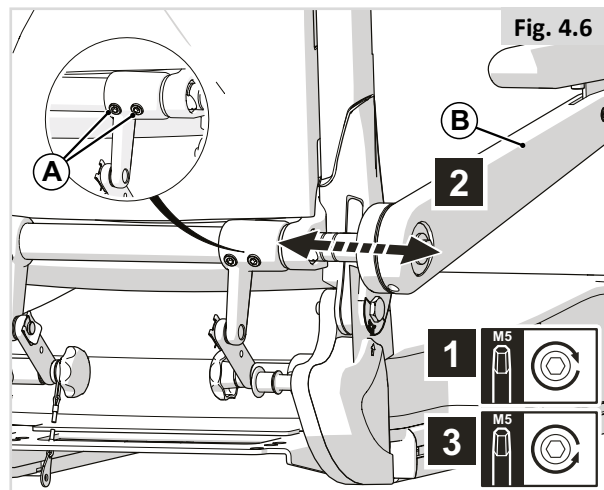


Bredde på seteplate (Fig. 4.7)

Løft seteputen av borrelåsremmene for å få tilgang til seteplatene.

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.


Setebredden indikeres av skalaene som ligger ved siden av hvert spor.

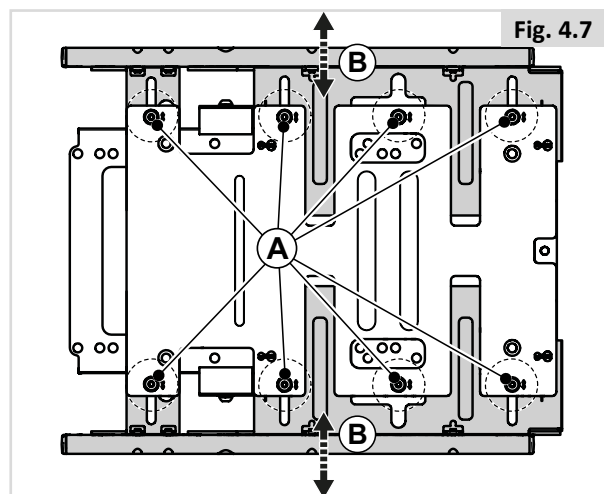

4.3 Forhåndsinnstille ryggen

Ryggvinkel (Fig. 4.8)

1. Vri på (A) for å justere (B).

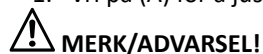

MERK/ADVARSEL!

Du må IKKE bruke elektrisk verktøy til å utføre denne justeringen.

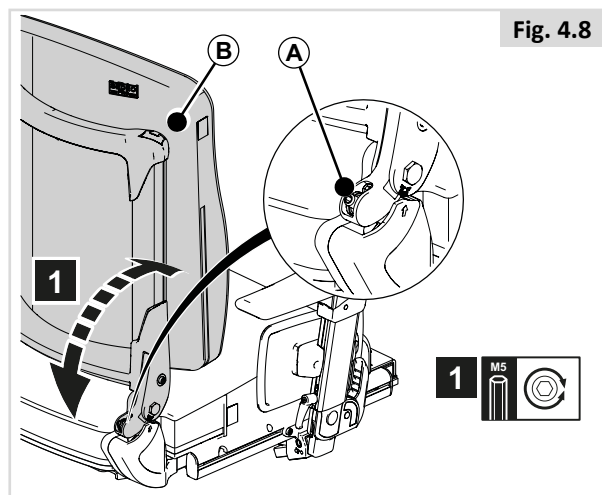


Fig. 4.8

Startposisjon for ryggvinkel på vinkelstillbar rygg (Fig. 4.9 - 4.10)

1. Juster ryggen til ønsket vinkel med styreenheten.
2. Fjern boltene (A+B), og rotér (C).
3. Fjern dekslet (D).
4. Skru ut to skruer for å fjerne aktuatordekslet (E).
5. Skru opp (F) med én omdreining.
6. Juster endestoppene til den maksimale stillingen.
7. Stram skruen (F).



MERK/ADVARSEL!

Du må holde i ryggen når boltene (B) er fjernet for å forhindre at ryggen faller forover eller bakover.

Rygghøyde for fast rygg (Fig 4.11)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

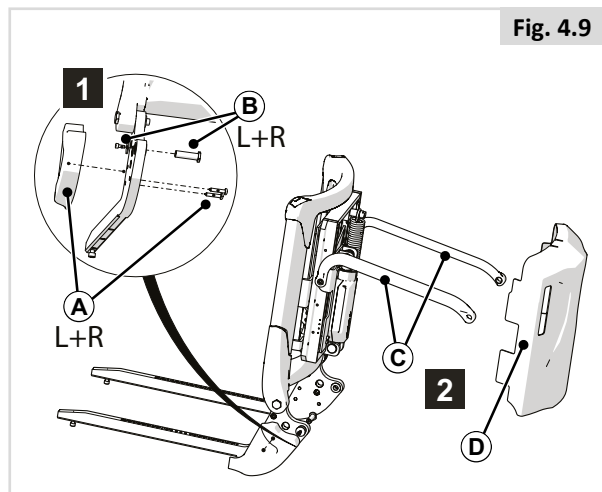


Fig. 4.9

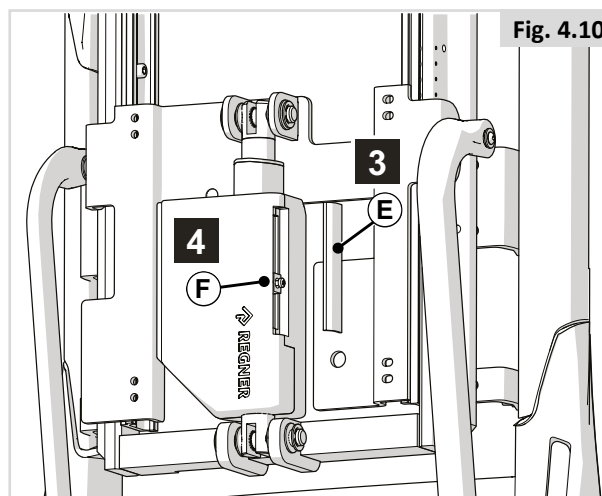


Fig. 4.10

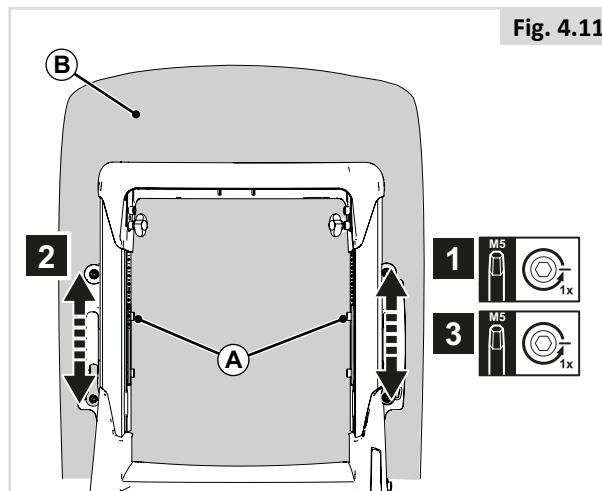


Fig. 4.11

Rygghøyde for tilbaketilt rygg (Fig 4.12)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Vinkel for rygg med fleksibel sidestøtte (Fig. 4.13)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Rygg med fleksibel krumming (Fig. 4.14)

Rullestolen har en polstret ryggstøtte som kan tilpasses personens ryggradskrumming, for å oppnå en komfortabel sittestilling og god stabilitet. Personen kan sitte i stolen når seteryggens krumming justeres.

1. Åpne glidelåsen.
2. Trykk på A for å løsne på stroppen.
3. Løsne eller stram hver stropp individuelt.
4. Slipp opp A for å opprettholde innstillingen av stroppen.

J3-rygg (Fig. 4.15)

 **MERK:** Jay 3-ryggstøtten kan brukes sammen med Sedeo Pro-setesystemet. Se brukermanualen for J3-ryggstøtten for informasjon om montering og justering.

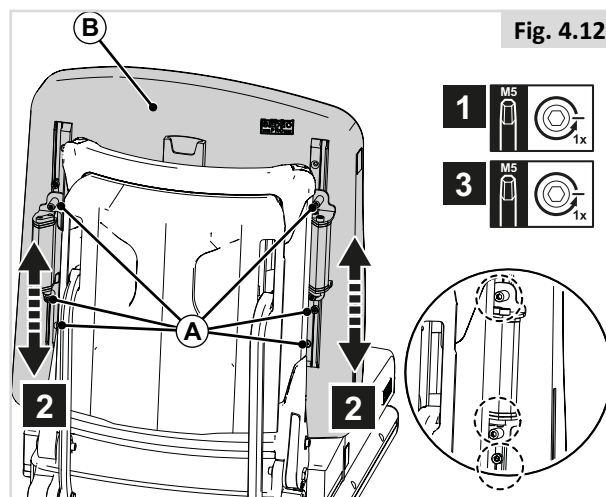


Fig. 4.12

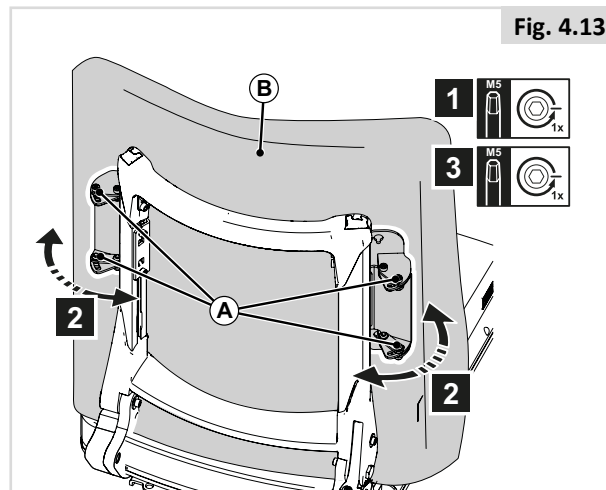


Fig. 4.13

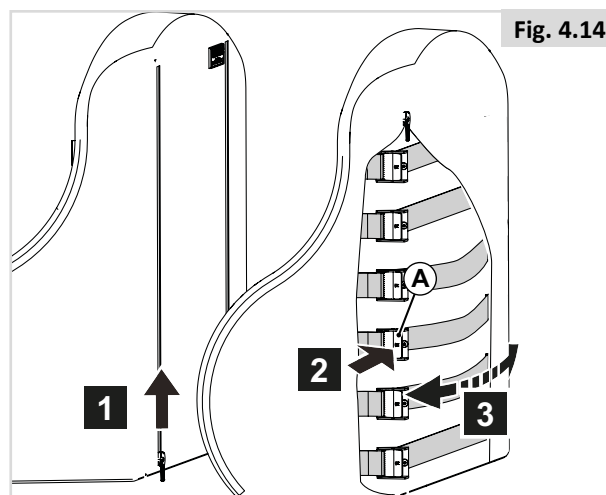


Fig. 4.14

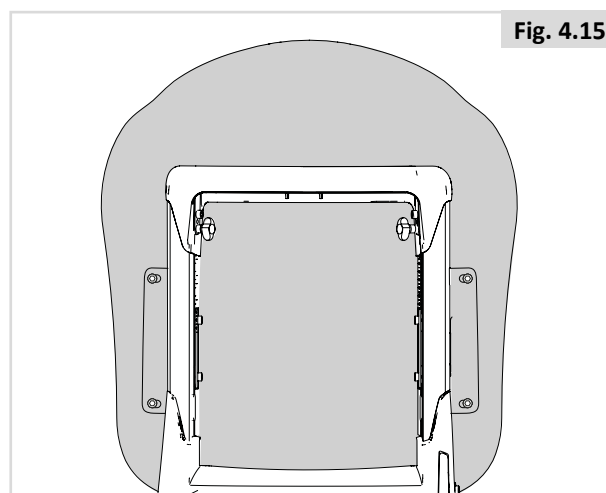


Fig. 4.15

4.4 Forhåndsinnstille oppvippbare armlener/ avtakbare armlener med enkel stolpe

Armlenhøyde (Fig. 4.16)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Sørg for at brukerens armer er godt støttet, uten at skuldrene skyves oppover.




Armlendybde (Fig. 4.17)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Plasser det oppfellbare armlenet lenger bakover for å få større plass til å forflytte deg sideveis inn og ut av rullestolen. Plasser armlenet lenger forover for å få større støtte når du forflytter deg inn og ut av stolen forfra.

Dybde på armlenepad (Fig. 4.18)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

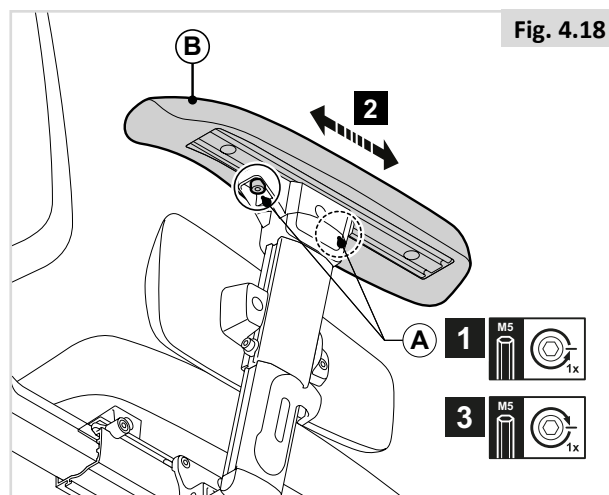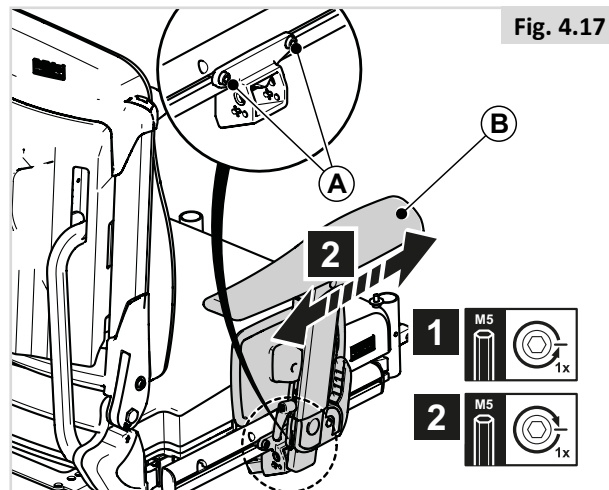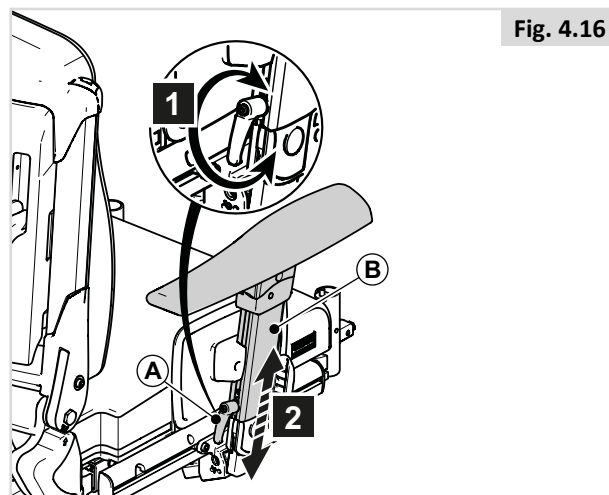

Bredde på armlenepad (Fig. 4.19-4.22)

Demontere:

1. Skru opp (A).
2. Fjern (B).
3. Skru opp (E) med én omdreining.
4. Fjern (F).

Montere:





1. Skyv (A) sammen med (B) eller (C) på (D).



MERK/ADVARSEL!

Pass på at kanten på terminalblokken kommer inn i åpningen.

1. Juster dybden på (A) og stram (E).
2. Plasser braketten for styreenheten.
3. Monter armlenet.

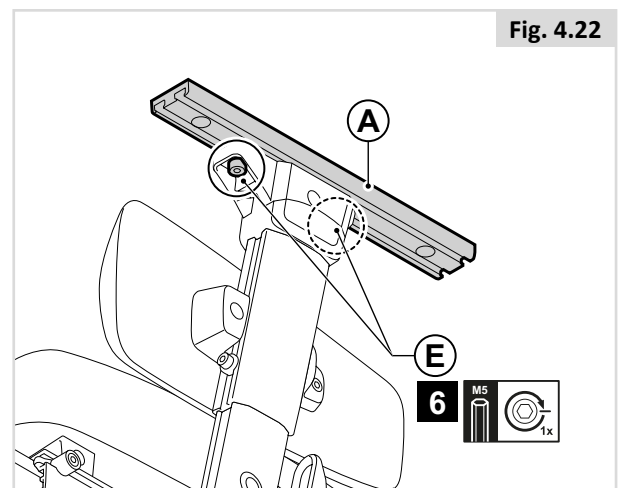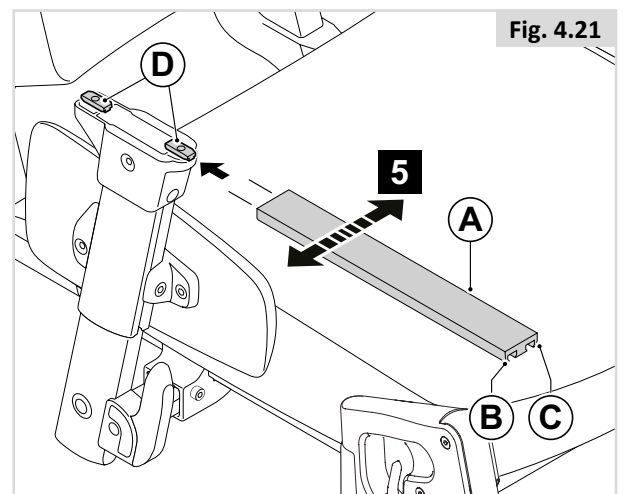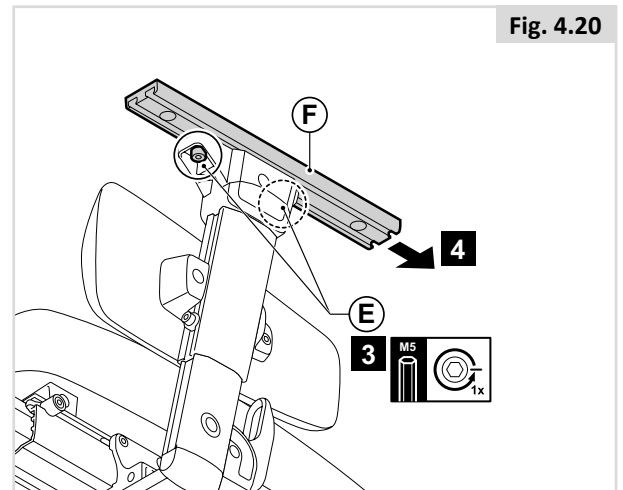
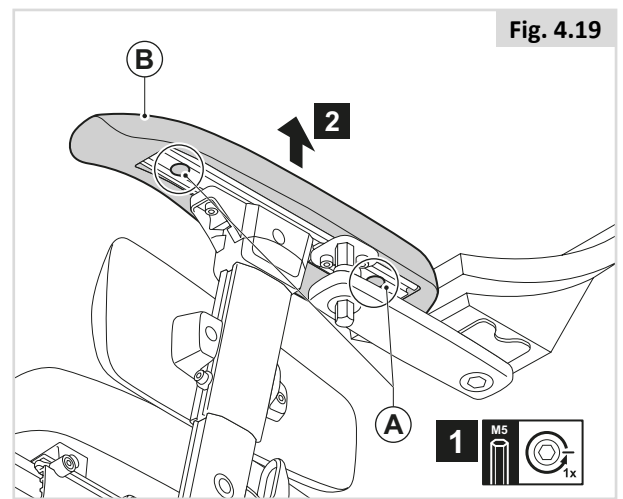


Armlenvinkel (Fig. 4.23)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Høyde på klesbeskytter (Fig. 4.24)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

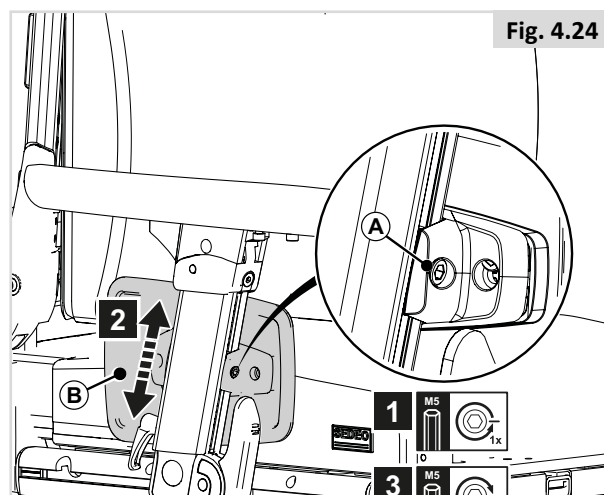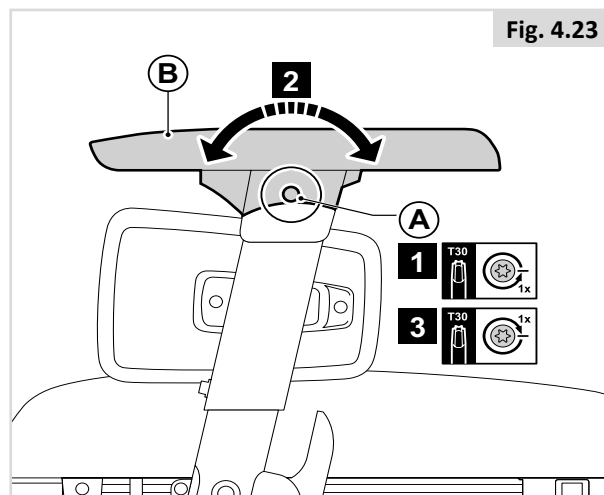

4.5 Stille inn oppfellbare armlener som følger rygg

Armlenhøyde

Både finjusteringer og grovjusteringer er en to-trinns prosess.

TRINN 1 (Fig. 4.25)

1. Vri på (A) for å justere (B).

TRINN 2 (Fig. 4.26)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram begge skruene på nytt.

Dybde på armlenepad (Fig. 4.27)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

MERK

For å få tilgang til den bakre skruen for den nedre armlenhøyden, skru opp skruene (A) slik vist i Fig. 4.24, og juster vinkelen på puten først.

FARE/ADVARSEL!

Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig strammet. Dersom en armlenpute er løs, kan den skli ned når du legger vekt på den.

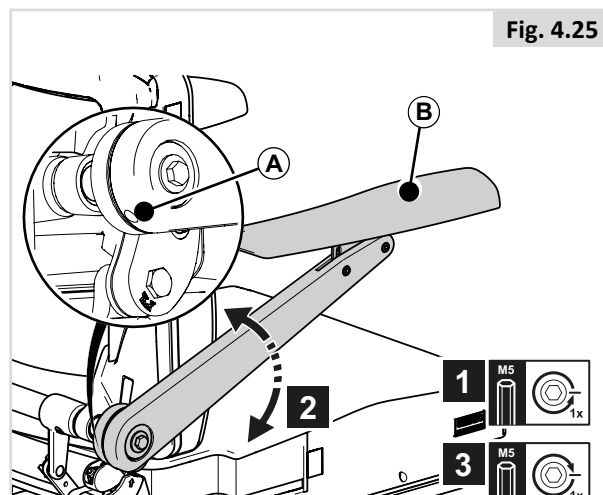


Fig. 4.25

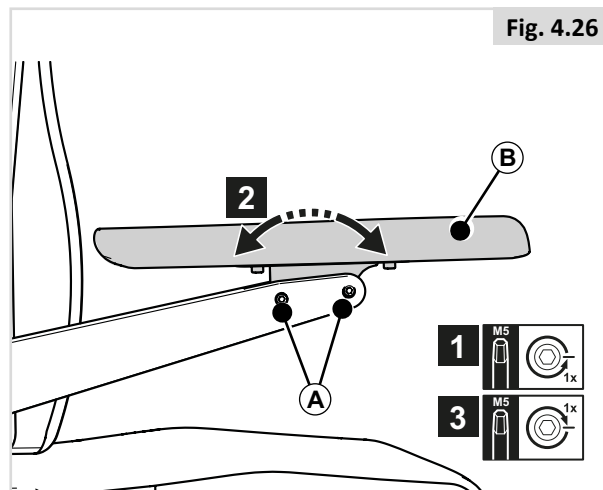


Fig. 4.26

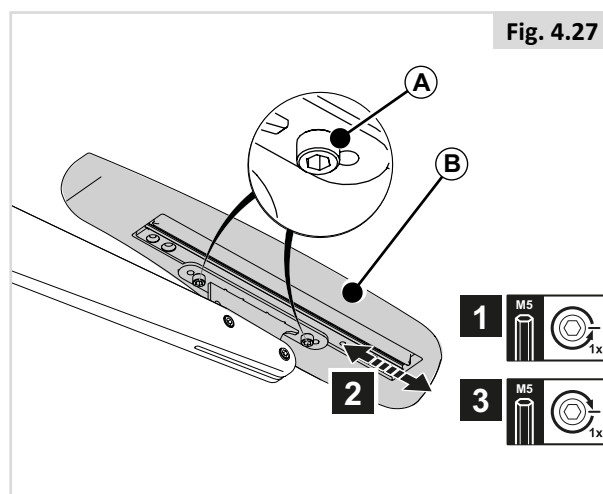


Fig. 4.27

4.6 Forhåndsinnstilling multijusterbare armlener

Armlenhøyde

Både finjusteringer og grovjusteringer er en to-trinns prosess.

Trinn 1 (Fig. 4.28)

1. Skru opp (A) for å justere (B).

Trinn 2 (Fig. 4.29)

2. Skru opp (A) for å justere (B).
3. Stram skruene A i Fig. 4.8 igjen med et dreiemoment på 30 Nm.

Dybde på armlenepad (Fig. 4.30)






1. Skru opp begge skruene (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) med et dreiemoment på 9 Nm.

Justere bredden mellom armlenene (Fig. 4.31 og 4.32)

1. Bruk en 8 mm sekskantnøkkel til å skru opp begge skruene (A) med én omdreining.
2. Juster (B) inn eller ut til ønsket stilling.
3. Stram (A) med et dreiemoment på 50 Nm.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig strammet. Dersom en armlenpute er løs, kan den skli ned når du legger vekt på den. Se vedlikeholdsprogram i avsnitt 7.1.

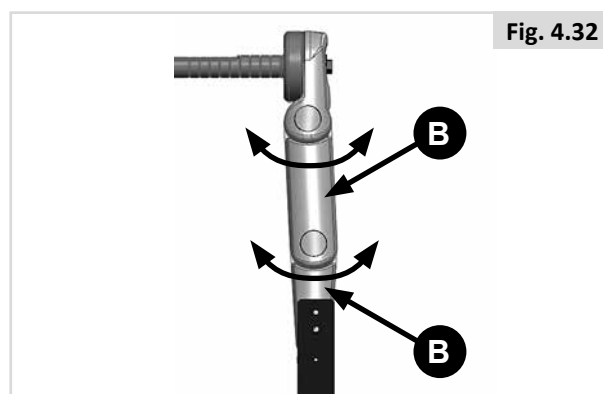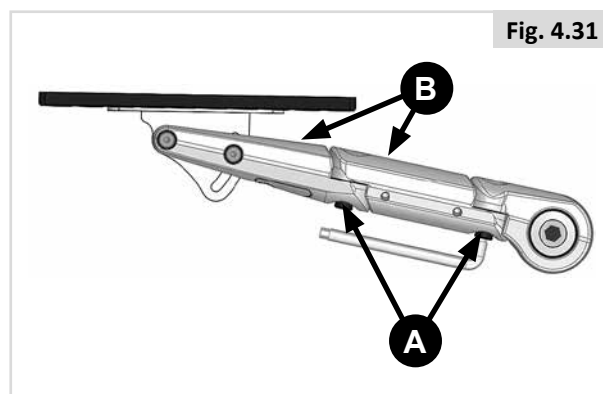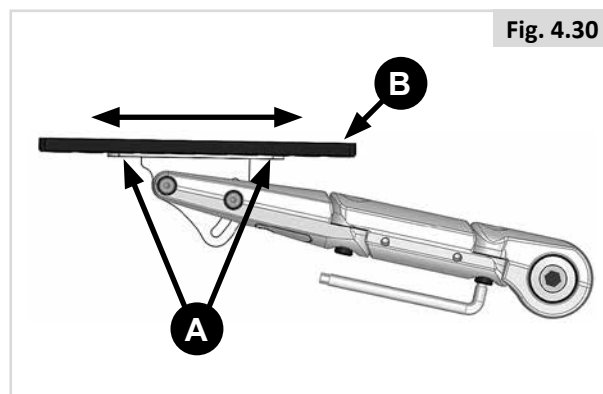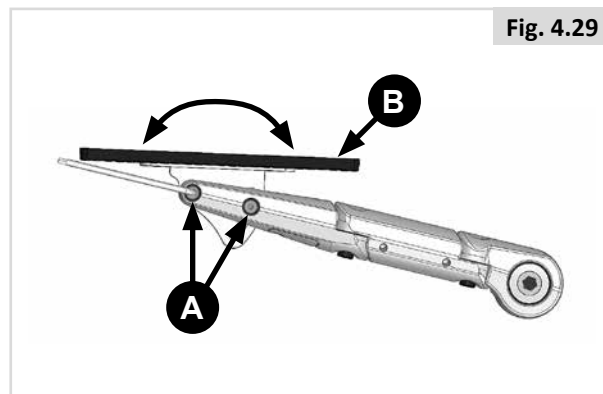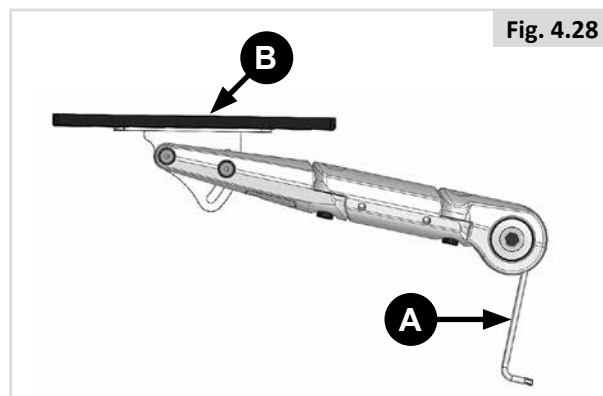

4.7 Forhåndsinnstille setebredden

Stille inn armlenbredden:

MERK: Armlenakselen kan flyttes ut, men dette skal kun gjøres dersom breddejusteringen av armlenet i Fig. 4.31 og 4.32 ikke er nok.

- Løsne de to skruene (5 mm sekskantnøkkel) på kryssrøret, som vist i Fig. 4.33 - A.
- Flytt mottakerbrakettene for armlenet til ønsket stilling.
- Stram skruene godt til før bruk.

ADVARSEL!

- Kontroller at den nye armlenstillingen ikke er i veien for noen av setestillingene.

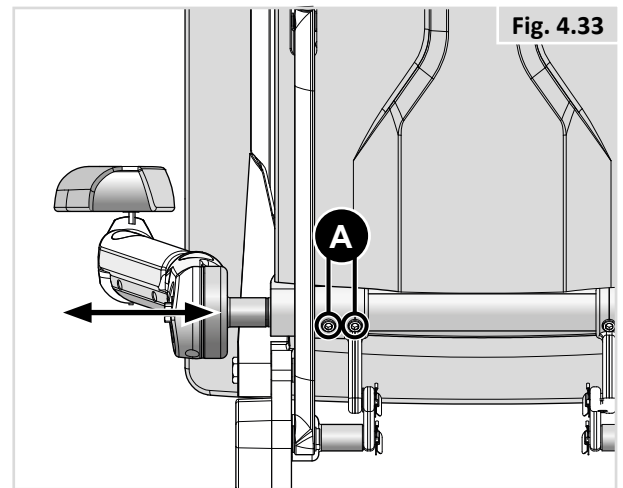


Fig. 4.33


4.8 Klesbeskytter

Høyde på klesbeskytter (Fig. 4.34)

1. Skru opp (A).
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Dybde på klesbeskytter (Fig. 4.35)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

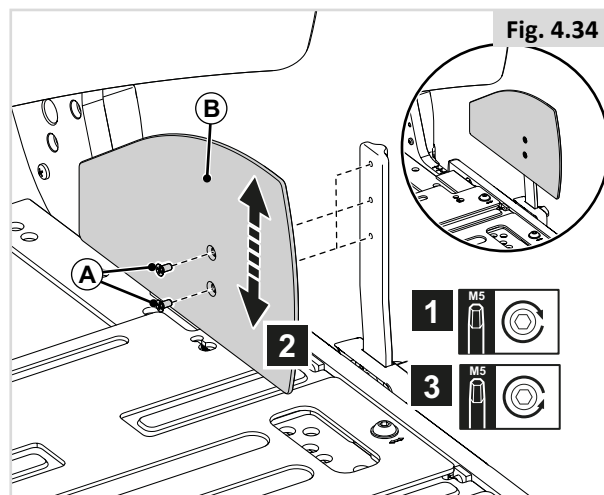




4.9 Forhåndsinnstille SEDEO Lite-armleener med enkel stolpe

Armlenhøyde (Fig. 4.36)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Armlendybde (Fig. 4.37)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Skru opp (B).
3. Juster (C) til ønsket stilling.
4. Stram (A) og (B).

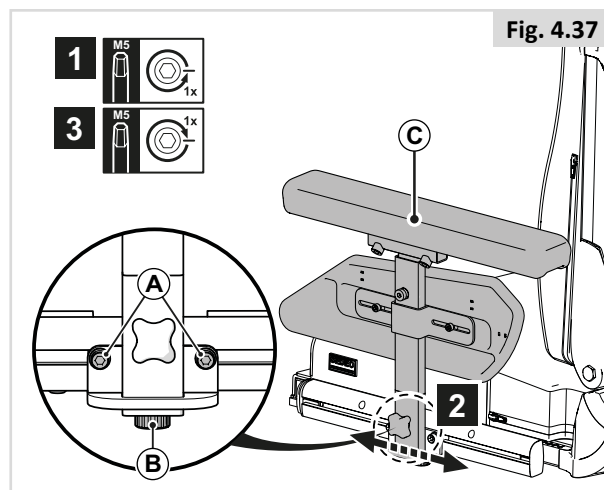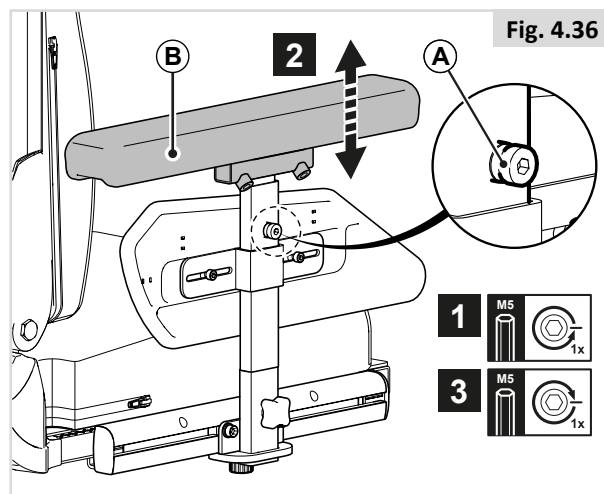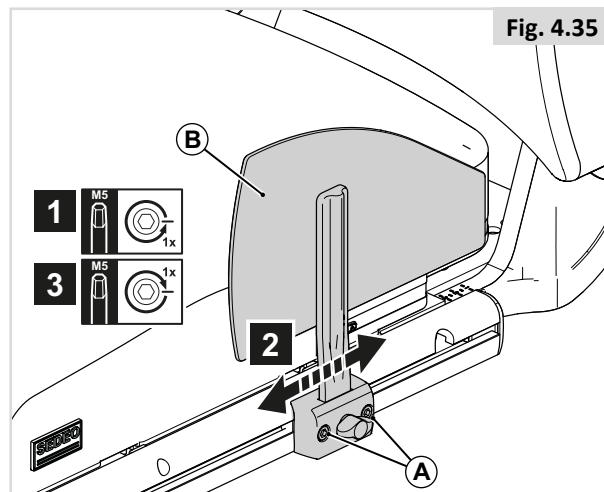

4.10 Forhåndsinnstille midtmontert benstøtte

Lengde for leggene (Fig. 4.38)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.



MERK/ADVARSEL!

Pass på at det er tilstrekkelig plass under (B) slik at rullestolen kan kjøre over hindringer.

Knevinkel (Fig. 4.39)

1. Skru opp (A) med to omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.



MERK/ADVARSEL!

Endre knehøyden eller knevinkelen hvis fotplaten berører svinghjulene.

Ankelvinkel (Fig. 4.40)

1. Vipp opp (A).
2. Vri (B) for å justere ankelvinkelen til ønsket stilling.
3. Legg ned (A).

Høyde på midtmontert leggstøtte (Fig. 4.41)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

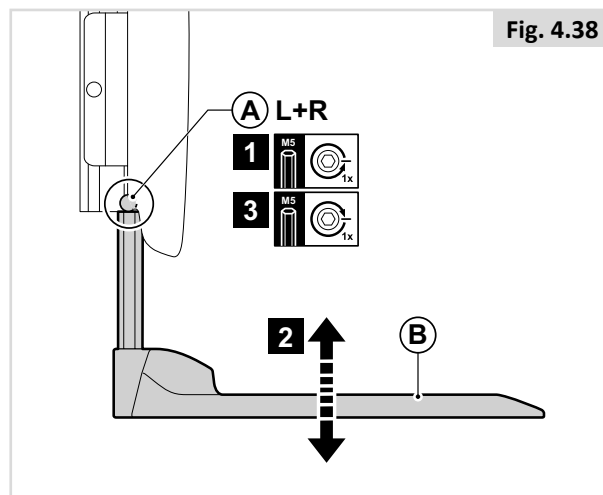


Fig. 4.38

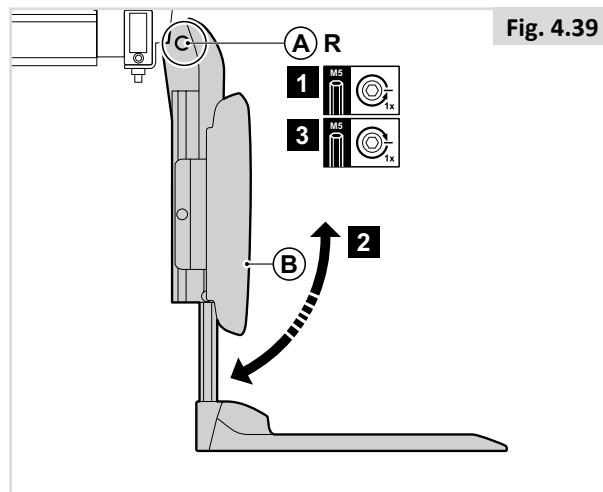


Fig. 4.39

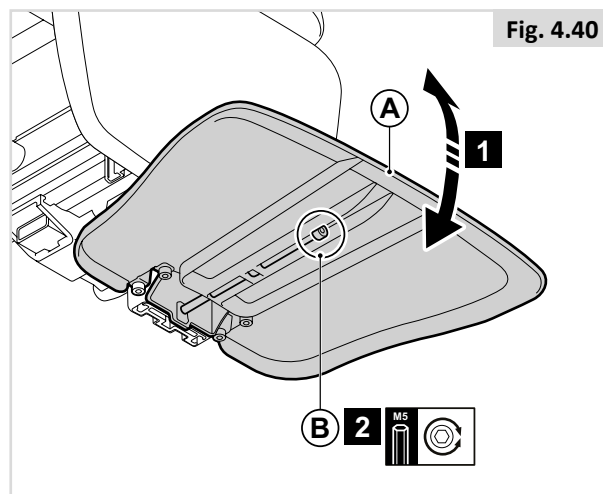


Fig. 4.40


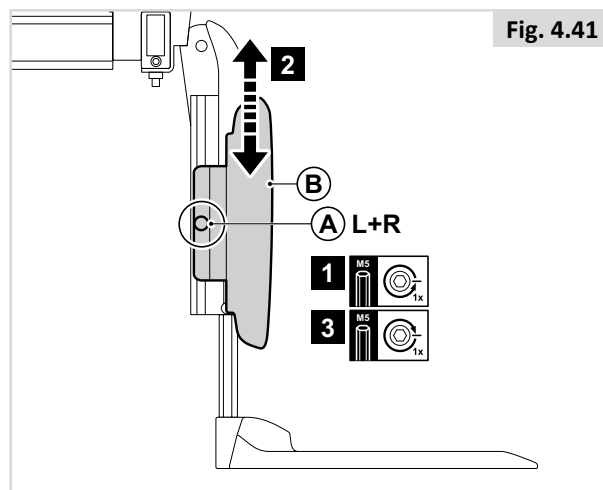


Fig. 4.41

4.11 Forhåndsinnstilt sentermontert benstøtte


Lengde for leggene (Fig. 4.42)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A).
4. Gjenta på den andre siden.

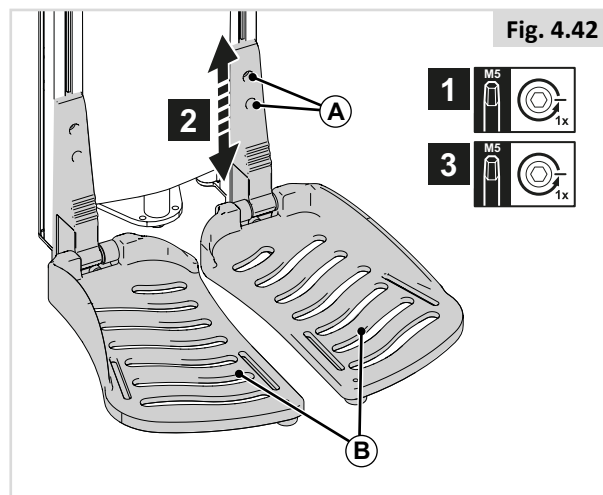

Ankelvinkel (Fig. 4.43)

1. Vipp opp (A).
2. Vri (B) for å justere ankelvinkelen til ønsket stilling (4 mm unbrakonøkkel).
3. Legg ned (A).

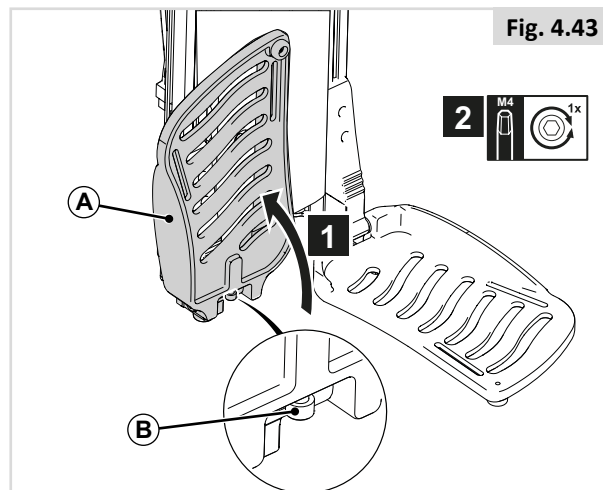

! FARE/ADVARSEL!


- Når justeringen er fullført og setet står i normal kjørestilling: Kontroller at det til enhver tid er en avstand på minst 25 mm mellom gulvet og fotplaten.
- Utfør denne testen når brukeren sitter i stolen og bruker benstøtten.
- Hvis benstøttene er stilt for lavt når rullestolen brukes, kan det skade brukeren, rullestolen eller omgivelsene.

Høyde på leggpute (Fig. 4.44)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (C) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Bredde på leggputen (Fig. 4.44)

4. Skru opp (B) med én omdreining.
5. Juster (C) til ønsket stilling.
6. Stram (B).

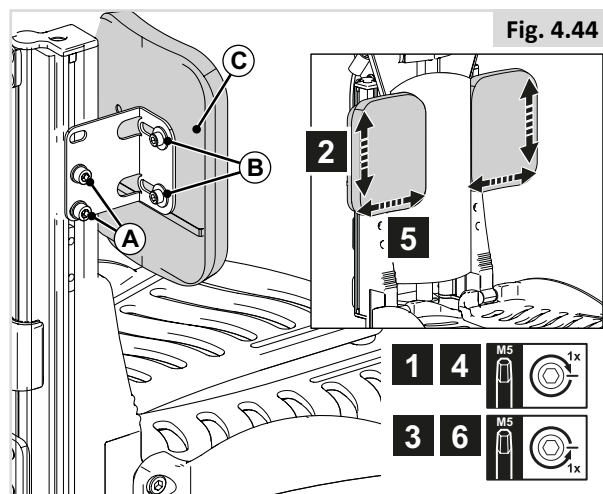

4.12 Forhåndsinnstille midtmontert benstøtte

FARE/ADVARSEL!

- Ta hensyn til stedet hvor rullestolen skal brukes, og vær forsiktig slik at du ikke skader bena dine når benstøttene forlenges.
- Pass alltid på at benstøttene eller fotplatene ikke er i veien for svinghjulene før du bruker rullestolen.
- Benstøttene må ikke under noen omstendigheter brukes til å løfte eller bære rullestolen.
- På lik linje med alle bevegelige deler, vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingrene dine, (Fig. 4.45).

Lengde for leggene (Fig. 4.46)

Vinkelen på den elektriske, midtmonterte benstøtten kan justeres fra 90° til 180° i forhold til gulvet. I tillegg kan lengden justeres med inntil 180 mm.

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.
4. Gjenta på den andre siden.

MERK/ADVARSEL!

Ved bruk av funksjonen «fotplate-til-gulv» (Fig. 4.47) vil det være montert en bryter. Høyden på bryteren (A) må justeres etter at legglengden er justert. Sørg for at hele kulen på bryteren er under den laveste kanten på benstøtten (B).

Ankelvinkel (Fig. 4.48)

1. Vipp opp (A).
2. Vri (B) for å justere ankelvinkelen til ønsket stilling (4 mm unbrakonøkkel).
3. Legg ned (A).

FARE/ADVARSEL!

- Når justeringen er fullført og setet står i normal kjørestilling: Kontroller at det til enhver tid er en avstand på minst 25 mm mellom gulvet og fotplaten.
- Utfør denne testen når brukeren sitter i stolen og bruker benstøtten.

Hvis benstøttene er stilt for lavt når rullestolen brukes, kan det skade brukeren, rullestolen eller omgivelsene.

Høyde på leggpute (Fig. 4.49)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (C) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Bredde på leggputen (Fig. 4.49)

1. Skru opp (B) med én omdreining.
2. Juster (C) til ønsket stilling.
3. Stram (B).

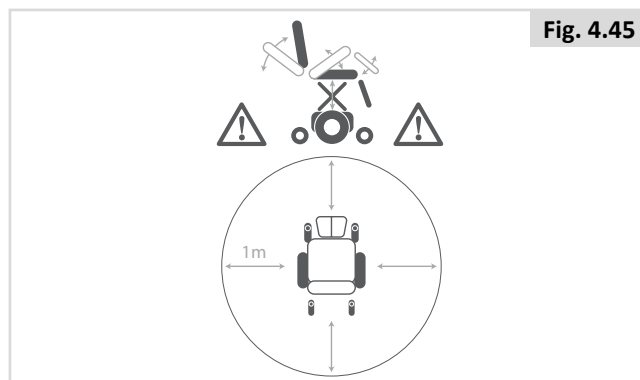


Fig. 4.45

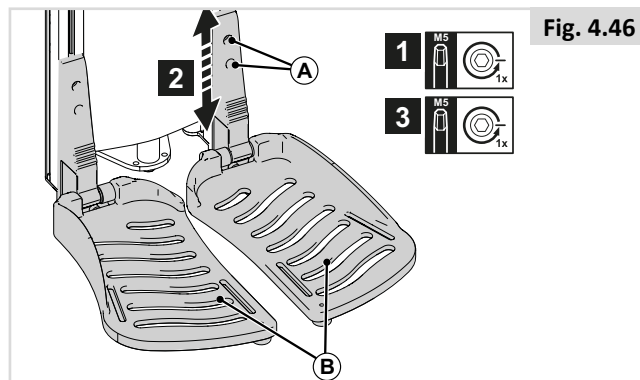


Fig. 4.46

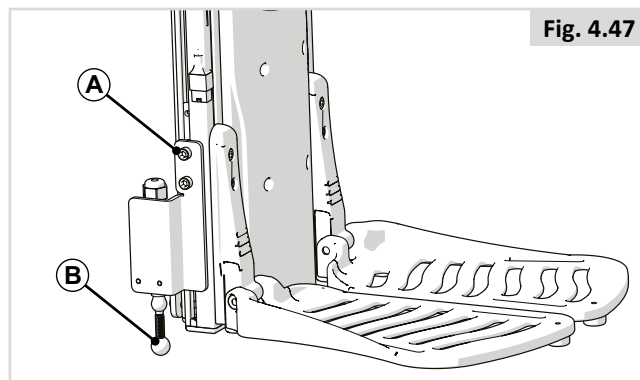


Fig. 4.47

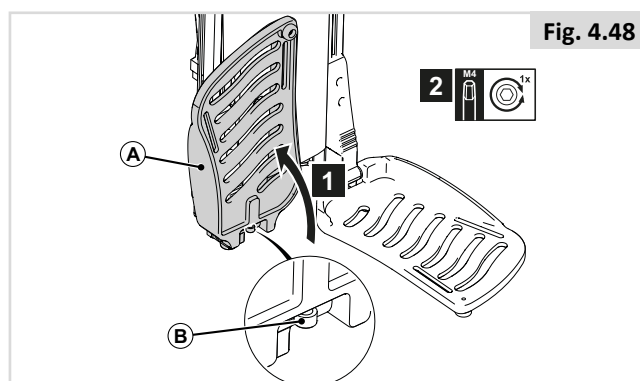


Fig. 4.48

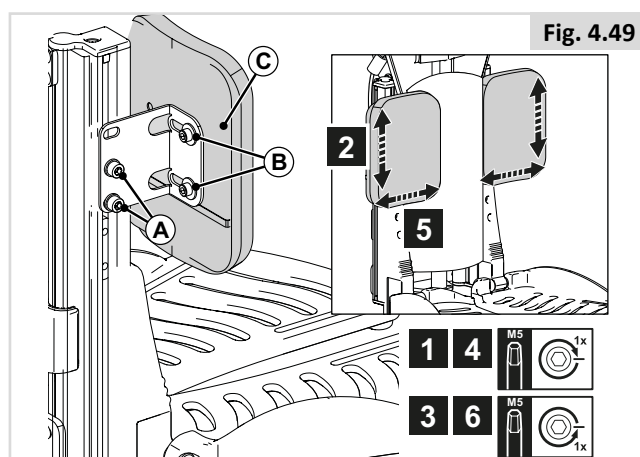


Fig. 4.49

4.13 Forhåndsinnstille utsvingbare benstøtter

Bredde på benstøtte (Fig. 4.50)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Lengde for leggene (Fig. 4.51)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

MERK/ADVARSEL!

Pass på at det er tilstrekkelig plass under (B) slik at rullestolen kan kjøre over hindringer.

Ankelvinkel (Fig. 4.52)

1. Skru opp (A) med et par omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.





Knevinkel for manuell/elektrisk hevbar benstøtte (Fig. 4.53)

Plasseringen av fotplatene kan endres ved å justere vinkelen for knærne.

1. Skru opp (A) med et par omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

MERK/ADVARSEL!

Endre knehøyden eller knevinkelen hvis fotplatene berører svinghjulene.

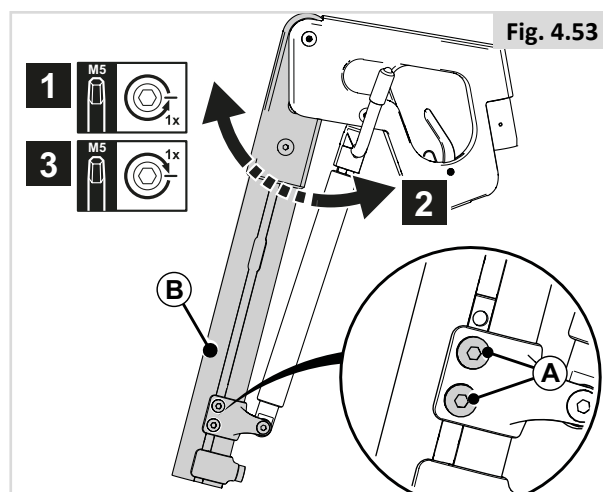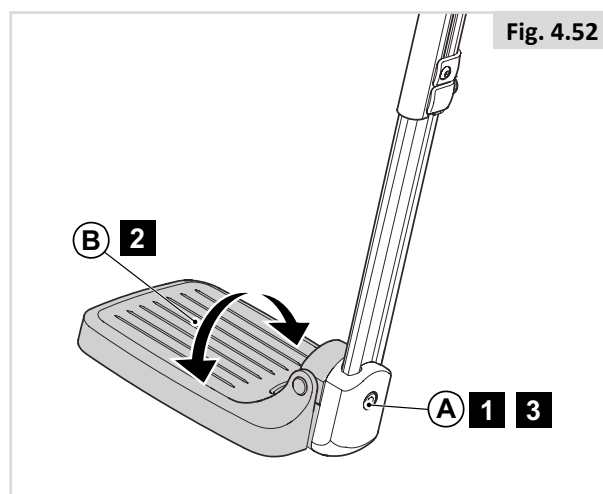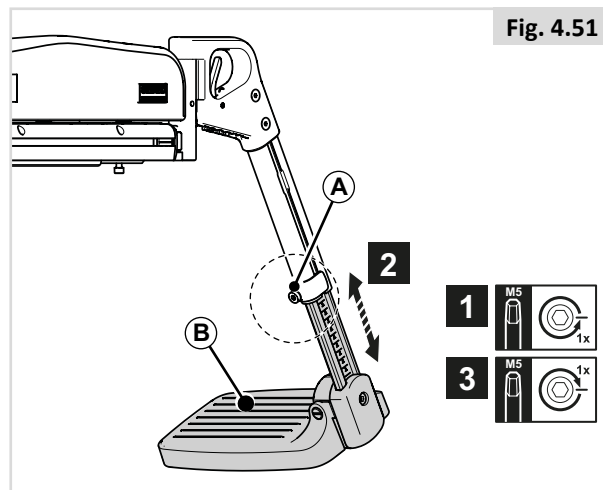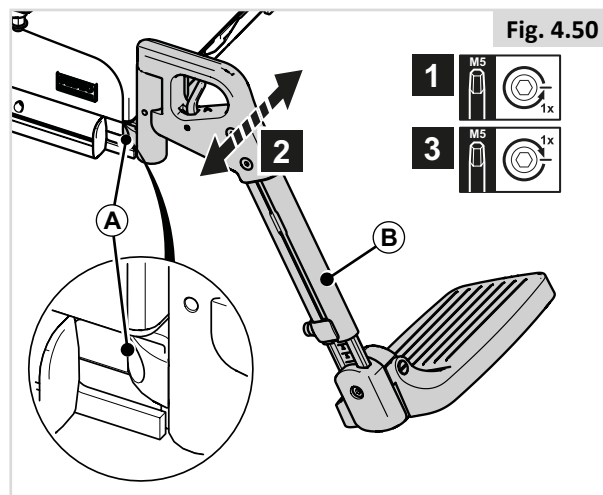

Høyde på leggpute (Fig. 4.54)


1. Skru opp (A) med et par omdreininger.
2. Juster (D) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Dybde på leggpute (Fig. 4.54)

4. Skru opp (B) med et par omdreininger.
5. Juster (D) til ønsket stilling.
6. Stram (B).

Bredde på leggputen (Fig. 4.54)

7. Skru opp (C) på baksiden av (D) med et par omdreininger.
8. Juster (D) til ønsket stilling.
9. Stram (C).

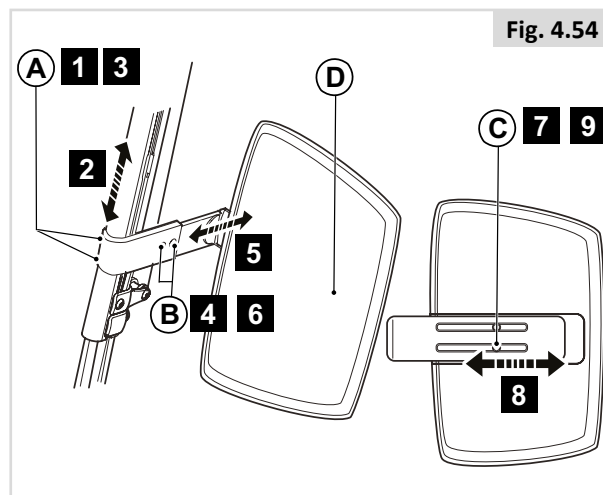


4.14 Forhåndsinnstille nakkestøtten

! FARE/ADVARSEL!

- Hvis en nakkestøtte er en del av ekstrautstyret som er valgt for personen/stolen, må stolen aldri brukes uten at nakkestøtten er påmontert.
- Bruk aldri rullestolen uten en nakkestøtte dersom personen skal sitte i rullestolen under transport i et kjøretøy.


Høyde på nakkestøtte (Fig. 4.55)

1. Skru opp (A) med et par omdreininger.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

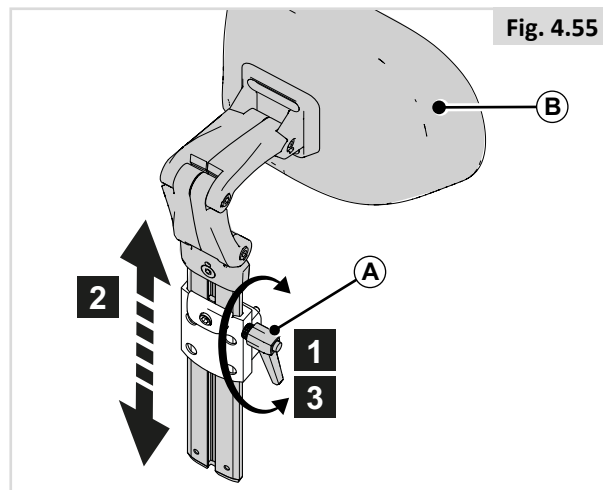

Minnestilling (Fig. 4.56)

1. Skru opp (C) med én omdreining.
2. Skyv (D) lengst mulig nedover.
3. Stram (C).

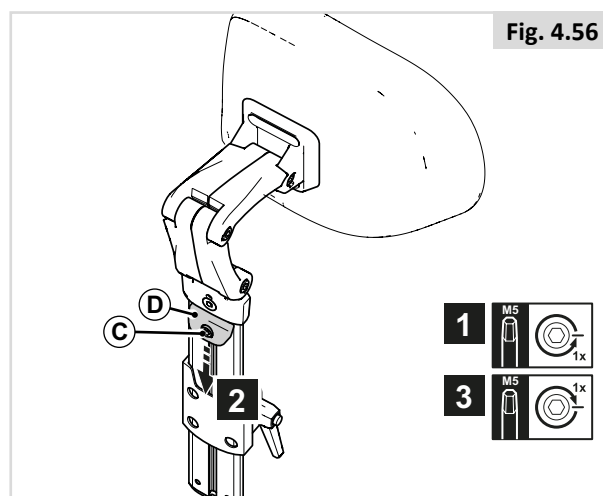


Plassering av nakkestøtte (Fig. 4.57)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.


! MERK/ADVARSEL!

Tilpass høyden på nakkestøtten og tilt nakkeputen etter behov.

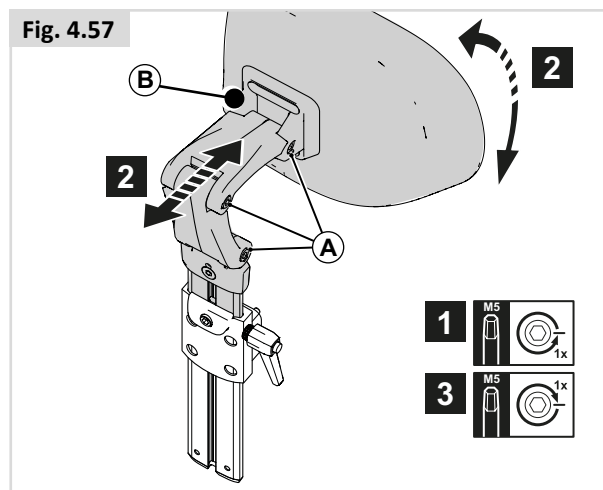

Breddeplassering av nakkestøtte (Fig. 4.58)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

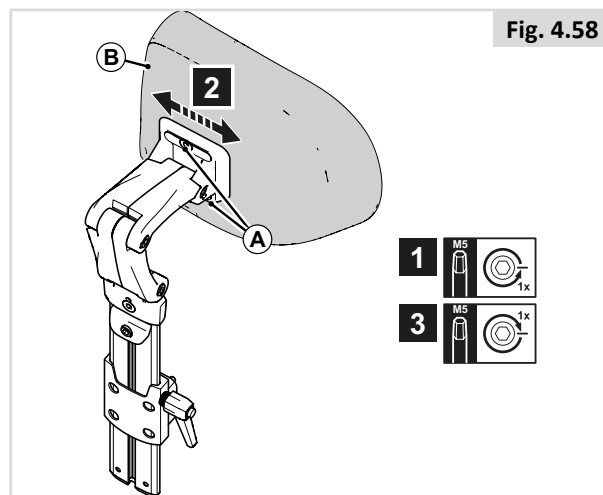

4.15 Forhåndsinnstille brakett for fast/utsvingbar styreboks

Dybde for styreboksen (Fig. 4.59)




1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Høyde for styreboksen (1) (Fig. 4.60)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Høyde for styreboksen (2) (Fig. 4.61)

1. Skru opp (C) med én omdreining.
2. Juster (D) til ønsket stilling.
3. Stram (C).

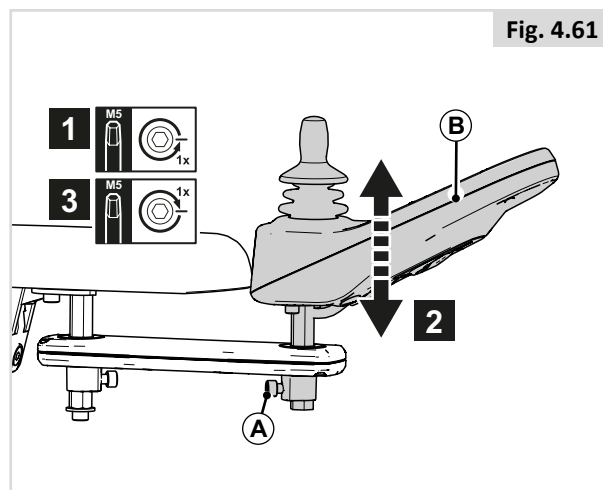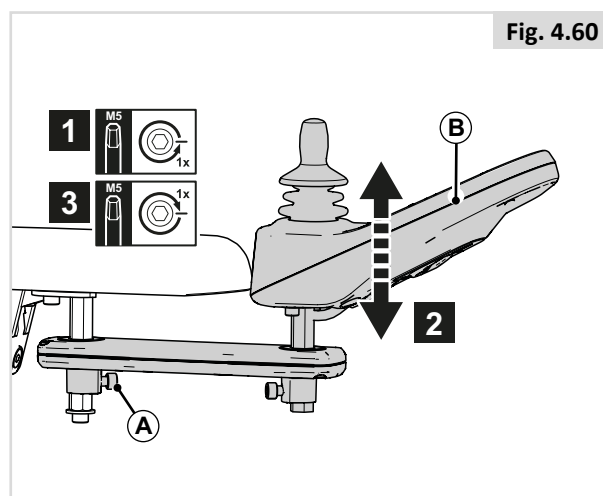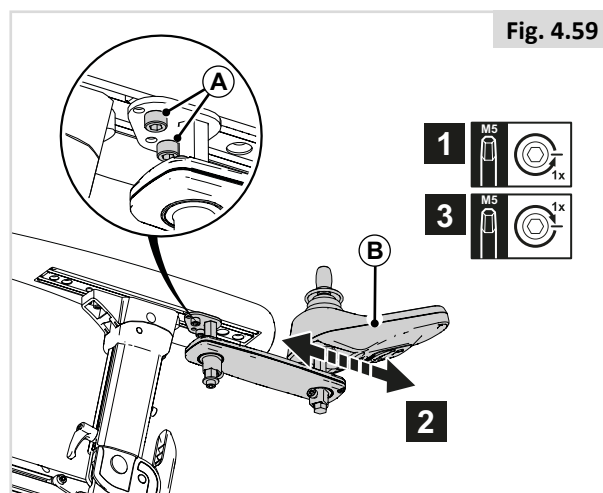

4.16 Forhåndsinnstille lårstøtte

Høyde på lårstøtte (Fig. 4.62)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Dybde på lårstøtte (Fig. 4.62)

1. Skru opp (A) med én omdreining og løft lårstøtten opp.
2. Skru opp de to skruene (B) med én omdreining.
3. Juster til ønsket stilling.
4. Stram (B), deretter (A).

Bredde på lårstøtte (Fig. 4.63)

1. Skru opp (C) med én omdreining.
2. Juster til ønsket stilling.
3. Stram (C).

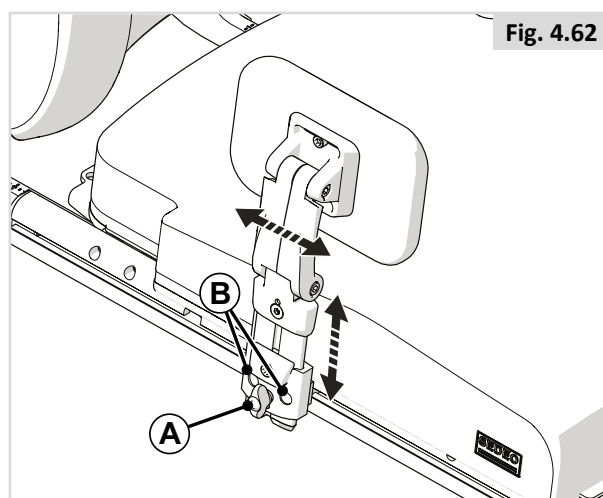


Fig. 4.62

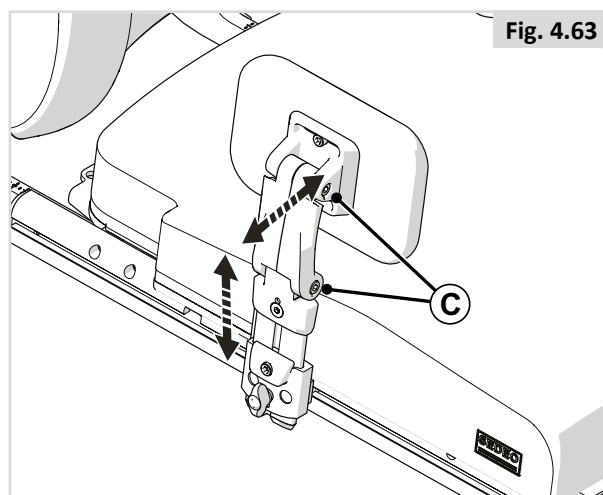


Fig. 4.63

4.17 Forhåndsinnstille sidestøtter

Bredde på sidestøtter (Fig. 4.64)

1. Skru (A) helt opp.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Høyde på sidestøtter (Fig. 4.65)





1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Dybde på sidestøtter (Fig. 4.66)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.
4. Skru opp (C) med én omdreining.
5. Juster (B) til ønsket stilling.
6. Stram (C).

Vinkel på sidestøtter (Fig. 4.67)


1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.
4. Skru opp (C) med én omdreining.
5. Juster (B) til ønsket stilling.
6. Stram (C).

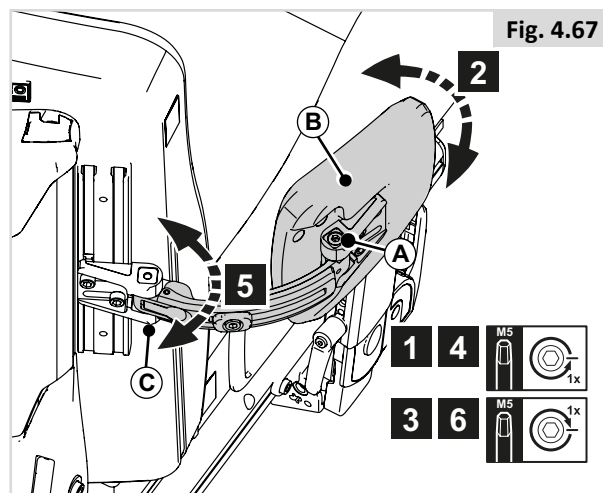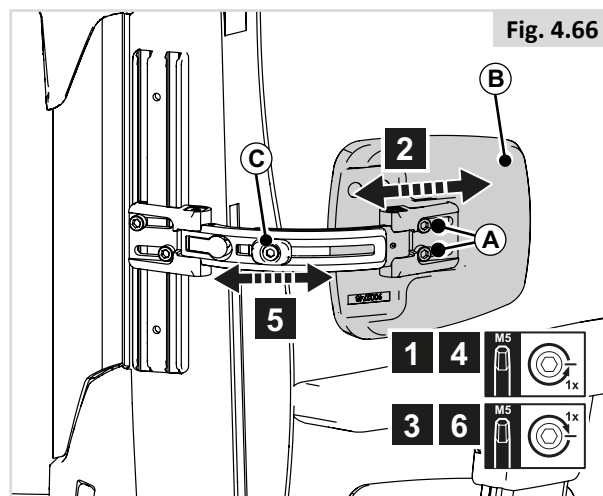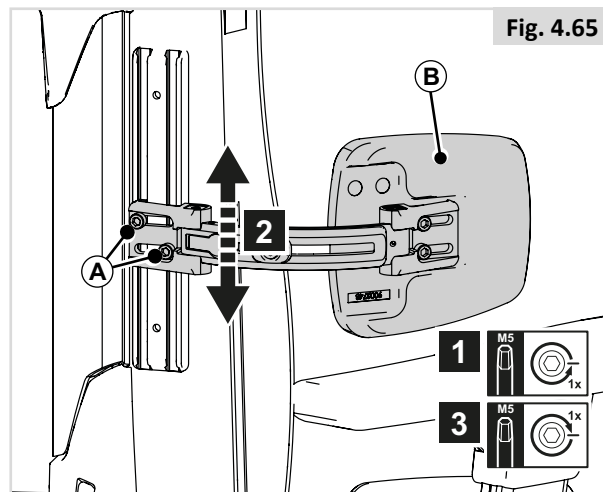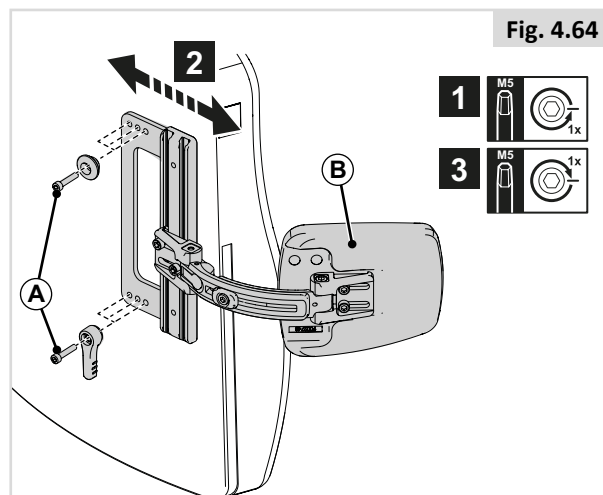

4.18 Forhåndsinnstille utsvingbar knestøtte

Dybde på knestøtte (Fig. 4.68)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

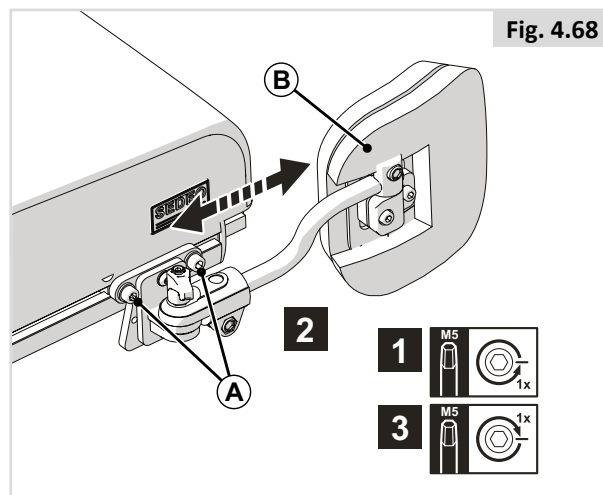



4.19 Forhåndsinnstille bøyle

Høyde på bøyle (Fig. 4.69)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

Dybde på bøyle (Fig. 4.70)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Juster (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.

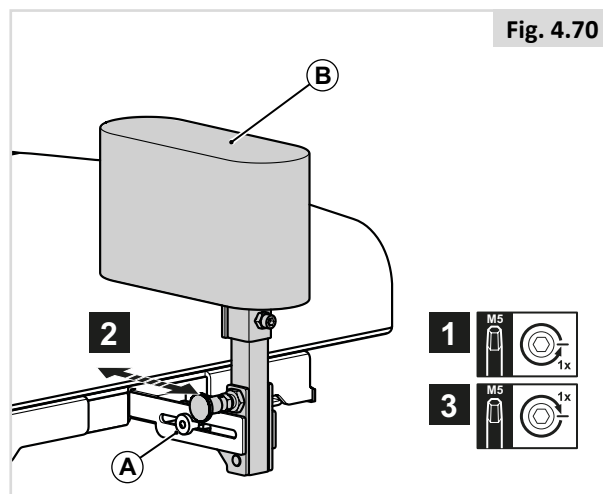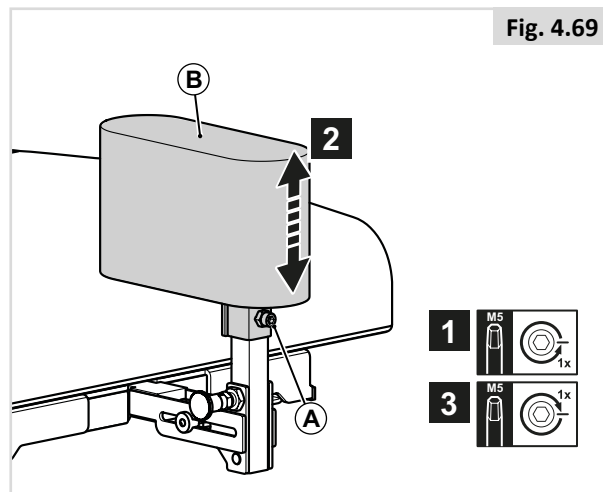

4.20 Hoftebelte/setebelte

FARE/ADVARSEL!

- Dette produktet skal kun brukes til å holde en enkelt person på plass i rullestolen.
- Hoftebeltene er ikke egnet for bruk under transport. Godkjente festesystemer skal da brukes.
- Hvis disse advarslene ikke overholdes kan det føre til alvorlig personskada eller dødsfall.
- Pleieren eller ledsageren må ha mottatt opplæring i riktig bruk av beltene.
- Hvis pleieren eller ledsageren ikke har mottatt riktig opplæring, kan det føre til forsinkelser i nødsituasjoner.

Montere et hoftebelte/posisjoneringsbelte

1. Fest (A) til seterammen ved bruk av en skrue på høyre og venstre side. (Fig. 4.72)

Plassere hoftebeltet på personen

- Juster hoftebeltet etter behov. Husk at avstanden mellom brukeren og beltet ikke skal være mer enn en håndsbredde for å oppnå størst mulig sikkerhet og komfort, (Fig. 4.68).
- Avstanden skal måles når hoftebeltet er normalt strammet, og det skal ikke være store avstander eller løkker.
- Hoftebeltet skal festes slik at beltet ligger i en vinkel på ca. 45 ° (Fig. 4.74), og justeres slik at personen ikke kan skli ned i setet.
- Plasser beltet løst rundt setet med åpningen i spennen plassert på høyre side for en venstrehendt bruker, og på venstre side for en høyrehendt bruker. Skyv de andre endene på beltet gjennom åpningen mellom ryggørene og ryggstøtten.

FARE/ADVARSEL!

- Kontroller alltid at hoftebeltet er festet og justert som det skal før bruk.
- Hvis beltet er for løst, kan personen skli ned i stolen og pådra seg alvorlige personskader.
- Kontroller hoftebeltet og festene regelmessig. Se etter slitasje eller skader. Skift ut deler om nødvendig.
- Under vedlikehold av stolen må du kontrollere at spennen åpnes og lukkes som den skal, samt at beltet eller plastbrakettene ikke er slitte eller skadde.
- Regelmessige kontroller/aktiviteter:
- På lik linje med alt plasseringsutstyr, er det nødvendig å foreta justeringer fordi personens sittestilling forandrer seg.
- Kontroller regelmessig at beltene er riktig tilpasset, slik at brukeren sitter trygt og komfortabelt i rullestolen.

Fig. 4.71

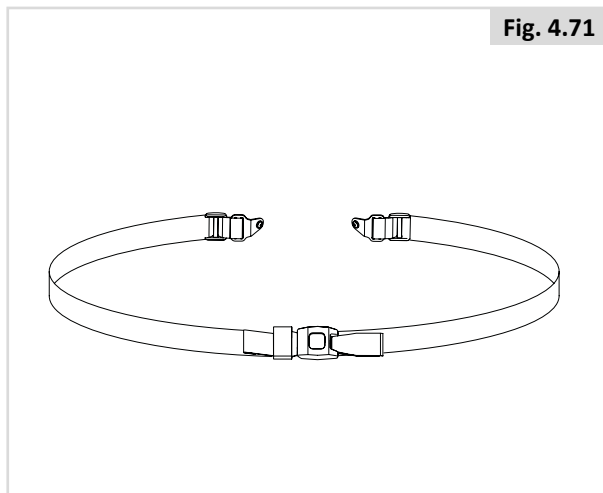


Fig. 4.72

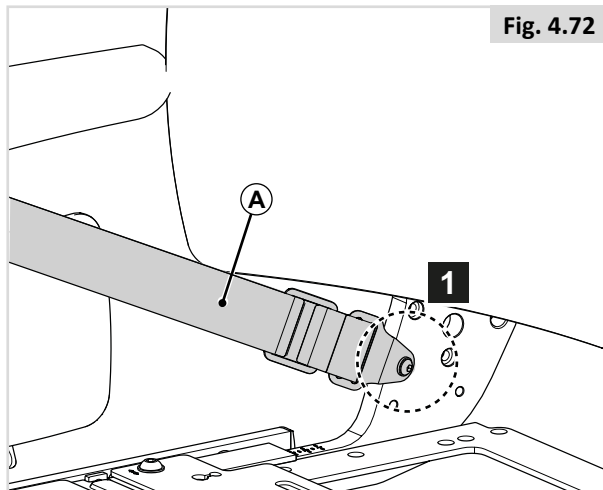


Fig. 4.73


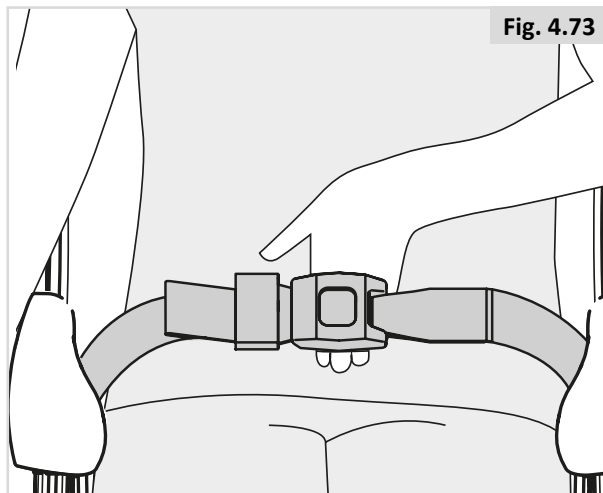


Fig. 4.74

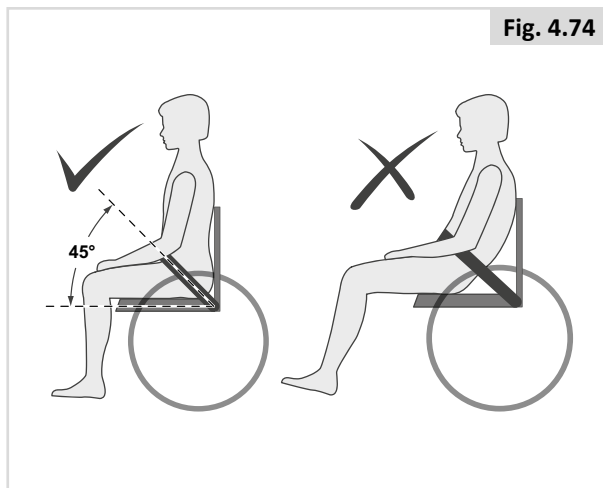

5.0 Bruke setesystemet

5.1 Gå inn og ut av rullestolen (forflytting)

Sunrise Medical anbefaler at du rådfører deg med terapeuten din slik at dere kan utarbeide en teknikk for forflytning inn og ut av rullestolen fra siden eller forfra, for å unngå fare for personskade.

FARE/ADVARSEL!

For å forhindre et fall:

- Sørg for at styringssystemet er slått av når du stiger inn og ut av rullestolen. Hvis du ikke gjør dette kan komme i kontakt med joysticken, slik at rullestolen flytter på seg når du ikke forventer det.
- Kontroller at frihjulsbryteren er stilt til «Drive» (kjøre)  Generell brukermanual.
- Roter svinghjulene foran på stolen slik at de peker forover.
- Samarbeid med legen/ergoterapeuten din for å lære trygge metoder for å forflytte deg inn og ut av rullestolen.
- Pass på at motorbremsene er koblet inn. Dette forhindrer at rullestolen beveger seg når du forflytter deg inn og ut av stolen.
- Det er farlig å forflytte seg alene. Det krever god balanse og smidighet. Husk at når du forflytter deg, vil det være et tidspunkt hvor setet ikke er rett under deg.
- Lær hvordan du skal plassere kroppen og støtte deg selv under forflytningen.
- La noen hjelpe deg til du er sikker på at du kan gjøre det på egenhånd.
- Ikke stå på fotplatene. Hvis du setter hele vekten din på fotplatene, kan rullestolen skades eller det kan oppstå farlige situasjoner hvor rullestolen tipper.
- Pass på at føttene dine ikke hefter seg fast i avstanden mellom fotplatene.


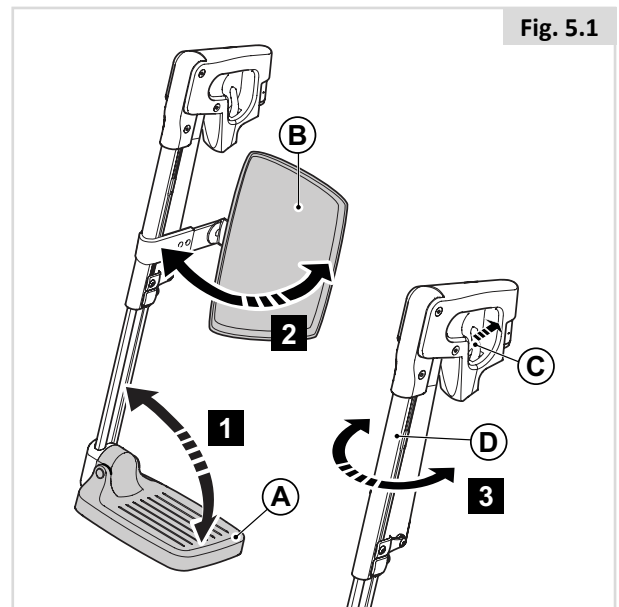


Fig. 5.2

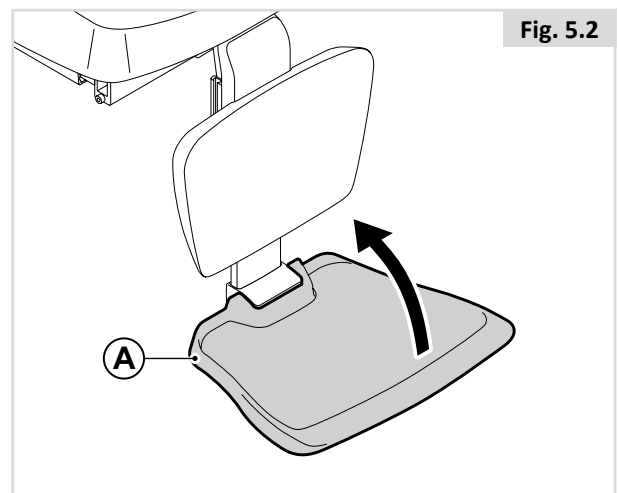

5.2 Forberedelser for å forflytte deg ut av stolen forfra

FARE/ADVARSEL!

Flytt rullestolen nærmest mulig setet du skal forflytte deg til.

Utsvingbare benstøtter (Fig. 5.1)


1. Vipp opp fotplatene (A).
2. Sving leggplatene (B) til siden (hvis i bruk).
3. Hvis det lar seg gjøre, sving (C) bakover og sving benstøttene (D) til siden.

Sentermontert benstøtte (Fig. 5.2)

1. Vipp opp (A).

Midtmontert elektrisk benstøtte (Fig. 5.3).

1. Vipp opp (A) (2 stk.).

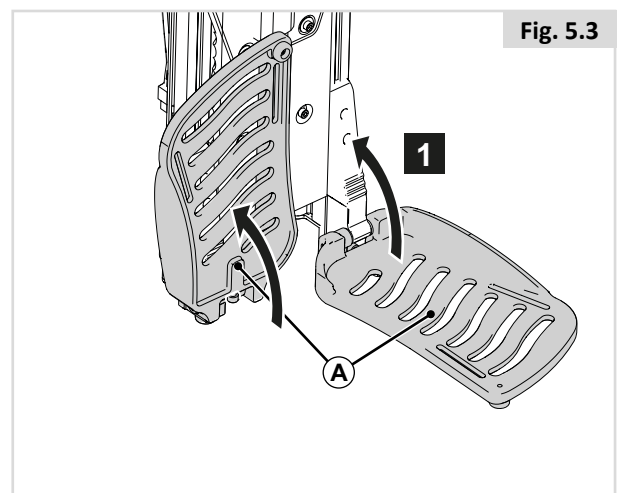

5.3 Forberedelser til å forflytte deg sideveis



FARE/ADVARSEL!

- Plasser rullestolen nærmest mulig setet du skal forflytte deg til. Om mulig, bruk et forflytningsbrett.
- Sett deg så langt bak på seteoverflaten som du kan. Dette vil forhindre at du bommer på setet eller faller.



MERK/ADVARSEL!

- Enkelte styreboksmønstre må svinges til siden.
- Fjern brettet før du vipper opp armlenet.
- Ikke len deg på armlenet når det vipper opp.

Oppvippbart armlene (Fig. 5.4)

1. Trykk på (A).
2. Vipp (B) opp og bakover.

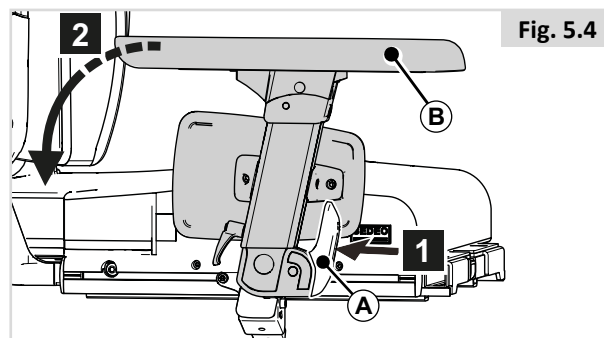


Fig. 5.4

Avtakbart armlene med enkel stolpe (Fig. 5.5)

1. Skyv (A) nedover.
2. Fjern (B).

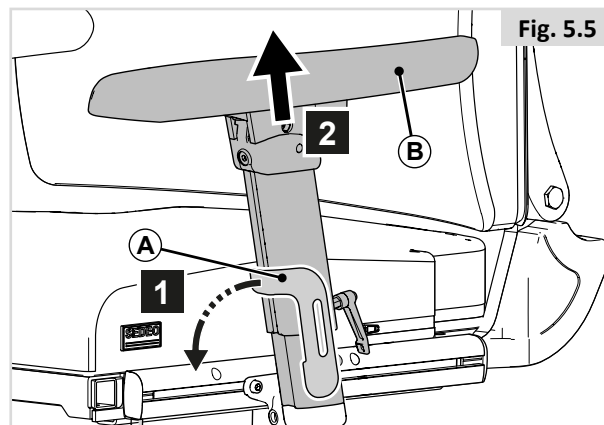


Fig. 5.5

Oppvippbart armlene (Fig. 5.6)

1. Vipp (B) opp og bakover.

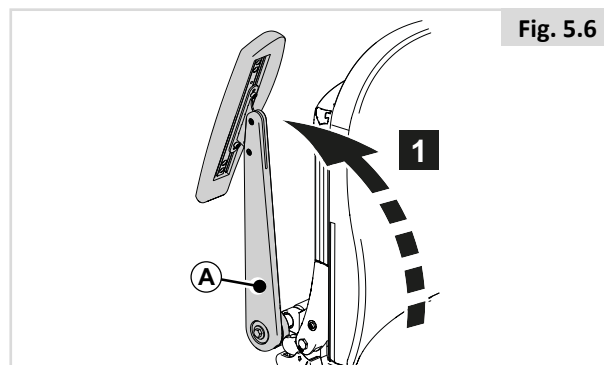


Fig. 5.6

Multijusterbare oppfellbare armlener som følger ryggen (Fig. 5.7)

1. Vipp (B) opp og bakover. (Fig. 5.6)
2. Lås armlenet i oppfelt stilling ved å vri låsen (B) innover. (Fig. 5.7)
3. For å frigjøre armlenet, vri låsen utover.

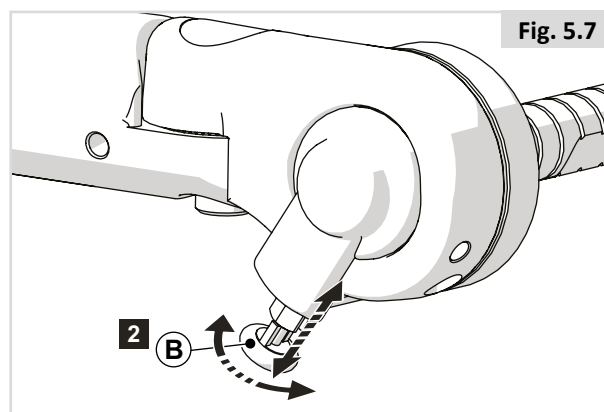


Fig. 5.7

Sedeo Lite-armlene med enkel stolpe (Fig. 5.8)

1. Skru opp (A).
2. Fjern (B).


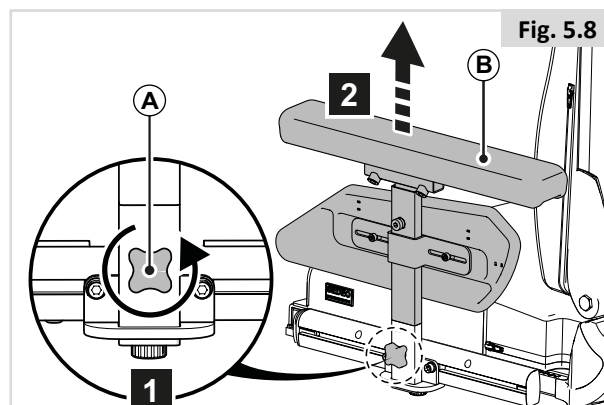


Fig. 5.8

5.4 Nakkestøtte

Montere/demontere nakkestøtten (Fig. 5.9)

1. Løft opp (A).
2. Skyv (B) ut av eller inn i (C).
3. Skyv (A) ned.

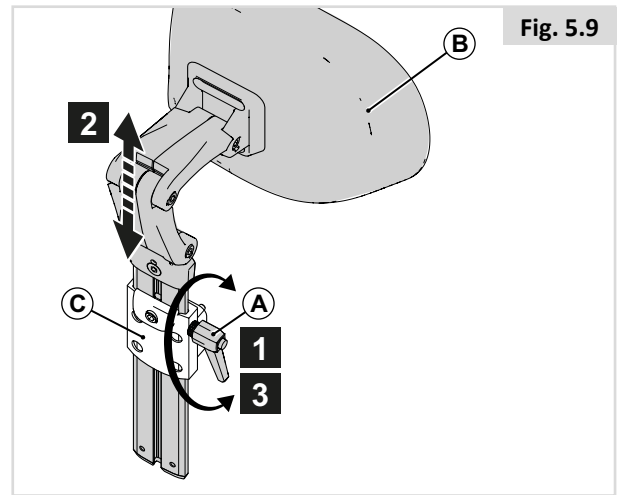

5.5 Utsvingbar brakett for styreboks



Joysticken er montert med en mekanisme som gjør at den kan låses i to stillinger forover. (Fig. 5.10)

Brakett for utsvingbar styreboks (Fig. 5.11).

1. Skyv (A) utover eller innover.
2. For å sette joysticken tilbake i normal stilling, skyver du den forover til den låses på plass (du hører et klikk).


⚠ MERK/ADVARSEL!

Stolen kan kjøres inntil et bord når du svinger ut braketten for styreboksen. Du vil fortsatt kunne bruke styreboksen fullt og helt.

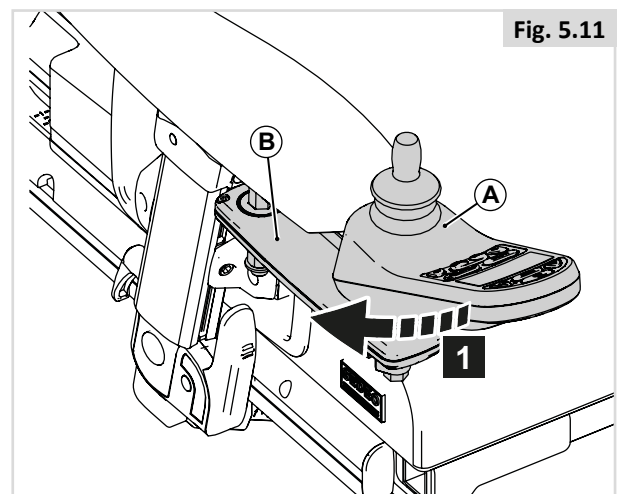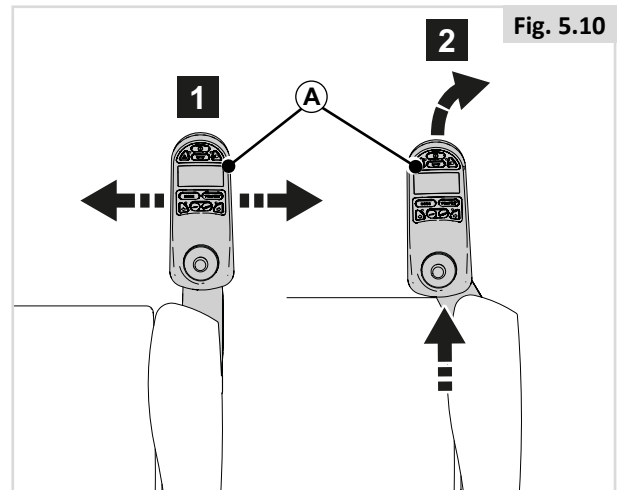


5.6 Sidestøtter (Fig. 5.12)

1. Trykk på A for å svinge ut (B).

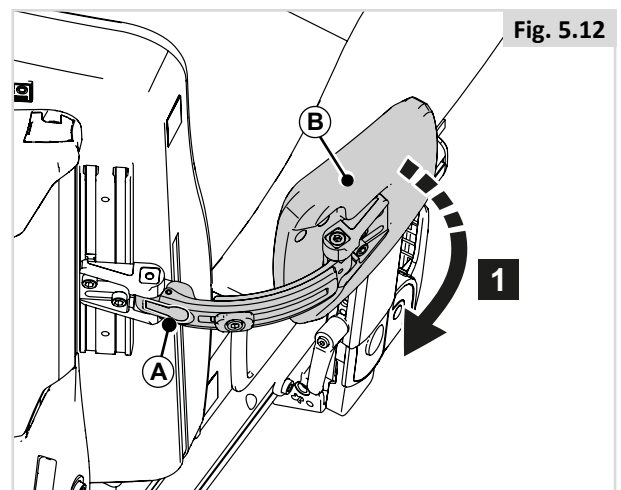


5.7 Knestøtte (Fig. 5.13)

1. Skru opp A for å svinge ut (B).

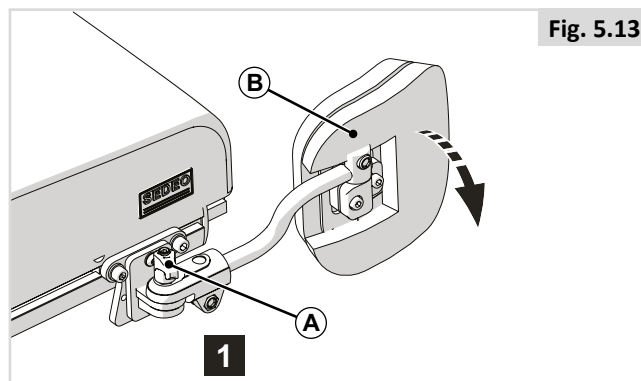

5.8 Lårstøtte (Fig. 5.14)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Fjern (B).

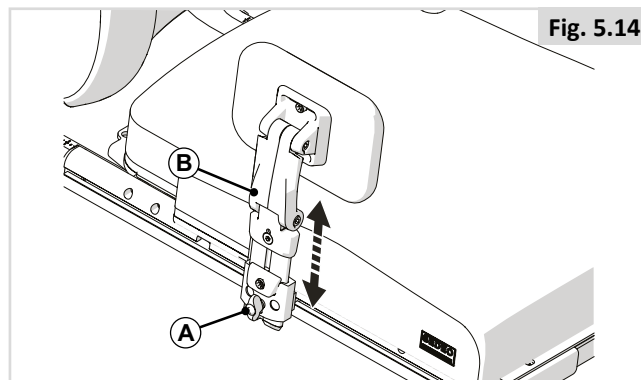


5.9 Hemiplegi-armlene (Fig. 5.15)

1. Trekk (A) ut av låst stilling og vri (B) til ønsket stilling.



MERK/ADVARSEL!

Kontroller at (B) er forsvarlig festet!

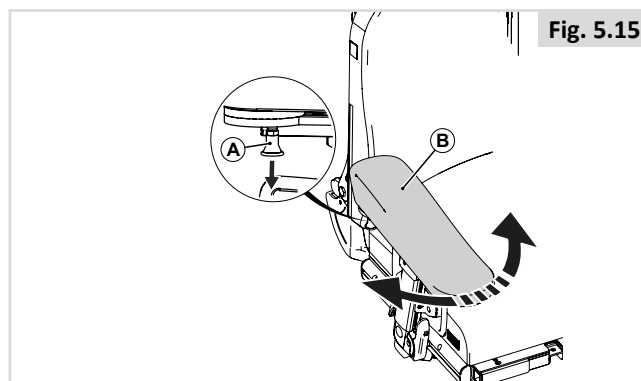


5.10 Høyde på kjørehåndtak (Fig. 5.16)

1. Skru opp (A) med én omdreining.
2. Skyv (B) til ønsket stilling.
3. Stram (A) på nytt.



FARE/ADVARSEL!

Ikke bruk kjørehåndtakene til å vippe hele stolen bakover (f.eks. for å kjøre over en fortauskant). Kjørehåndtaket er ikke beregnet til dette.

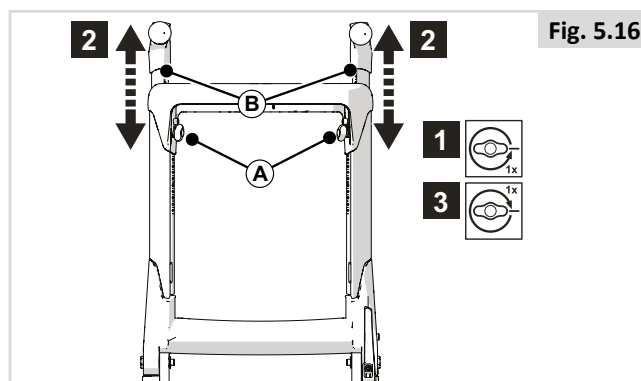

5.11 Bøyle (Fig. 5.17)

Vippe ned bøylene

1. Trekk (A) ut av låst stilling.
2. Vipp ned (B).
3. Slipp opp (A).


Vippe opp bøylene

1. Trekk (A) ut av låst stilling.
2. Vipp opp (B).
3. Slipp opp (A) i låst stilling.



MERK/ADVARSEL!

Kontroller at (B) er forsvarlig festet!

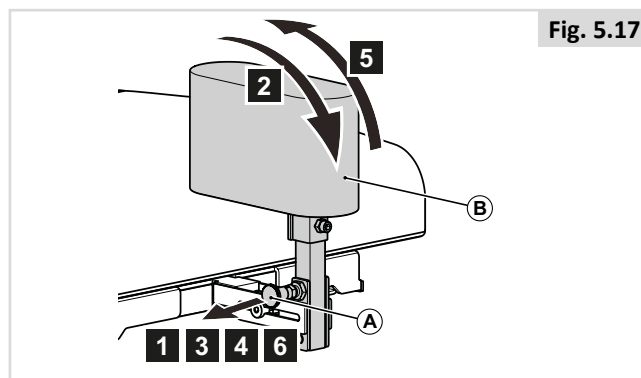

6.0 Manuelt og elektrisk seteutstyr

6.1 Manuelt seteutstyr

Manuell tilbakeleant rygg (av brukeren) (Fig. 6.1)

1. Klem på (A).
2. Len deg forover eller bakover for å justere (B) til ønsket stilling.



MERK/ADVARSEL!

Fortsett å klemme på (A).

3. Slipp opp (A).

Knevinkel for manuelt hevbare benstøtter (Fig. 6.2)

Vinkelen på komfort-benstøttene kan justeres individuelt.

1. Skyv håndtak (A) forover.
2. Løft benet.
3. Slipp opp håndtaket når benstøtten er i ønsket stilling.

Fig. 6.1


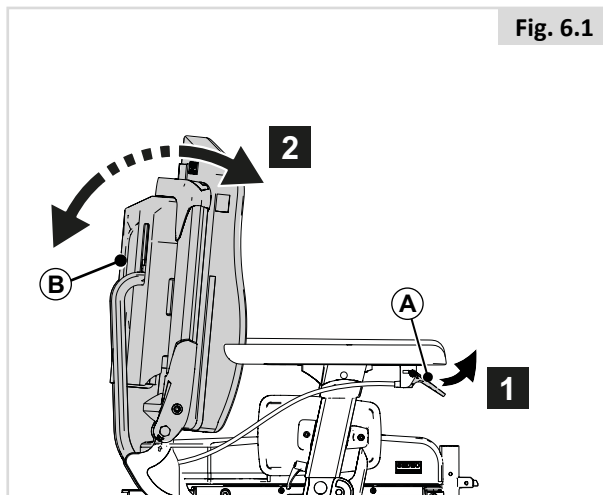


Fig. 6.2

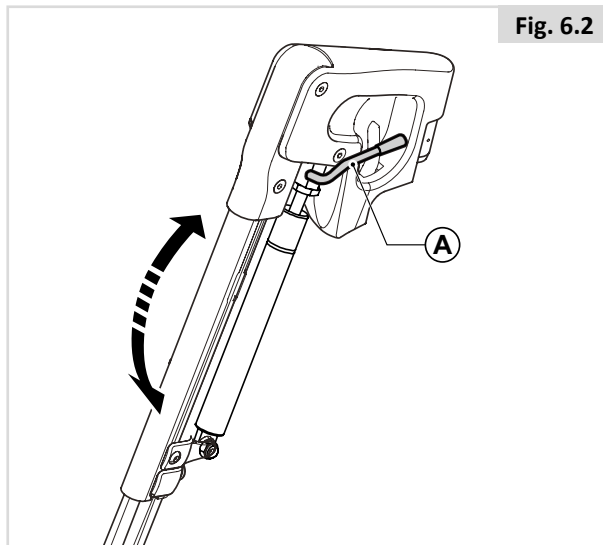

6.2 (Elektrisk) seteutstyr

Rullestolen kan utstyres med følgende mekaniske og/eller elektriske funksjoner for å regulere sittestillingen. Personen kan betjene funksjonene uten bruk av verktøy.

Elektrisk justerbart seteutstyr (Fig. 6.3 - Fig. 6.5).

Du finner informasjon om hvordan du bruker disse elektriske setefunksjonene i avsnittet  Styreboks:

1. Elektrisk tiltfunksjon
2. Elektrisk seteløft
3. Elektrisk regulering av seteryggen
4. Elektrisk heving/senking av benstøttene

Rullestolen kan være utstyrt med en funksjon som gjør at den kan kjøres i inntil 4,5 km/t med setet i hevet stilling. Denne funksjonen kalles C-Me. Rådfør deg med din autoriserte Sunrise Medical-forhandler i forhold til begrensninger i brukervekt og anbefalt konfigurasjon på stolen ved bruk av C-Me funksjonen. **Merk:** Brukervekten er begrenset til maks 136 kg i kombinasjon med C-Me-funksjonen.



FARE!

- Bruk av elektrisk regulerbare setefunksjoner kan påvirke rullestolens stabilitet.
- Bruk kun elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen står på flat mark! Forsøk aldri å betjene de elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen står på hellende underlag.
- Vennligst unngå kontakt med de elektriske aktuatorene når komponenten er i bevegelse. De elektriske mekanismene kan ha stort bevegelsesutslag. Det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene når komponentene er i bevegelse.
- Vær varsom ved kjøring når seteryggen er lent bakover eller når setet er hevet eller tiltet.
- Forsøk aldri å betjene noen av de elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen er i bevegelse.
- Forsøk aldri å benytte de elektriske funksjonene for seteløft eller tilt i nærheten av barn.
- Alle setefunksjoner kan programmeres til å beveges i motsatt retning. Gjør deg kjent med hvilken retning setet vil flytte seg før du betjener funksjonen.
- Vær oppmerksom på at løfte- og tiltemekanismene på stolen utgjør klemfare. Påse at klesplagg, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke kommer i kontakt med løfte-/tiltemodulene. Dette for å forhindre personskade.
- Kjør ikke opp ramper eller bakker når setet er hevet. Før du kjører opp eller ned en bakke, må setet senkes ned til standardstillingen og seteryggen rettes opp.
- Dette systemet vil automatisk redusere den maksimale kjørehastigheten til kryp- og/eller C-Me-modus ved enkelte grenser for de elektriske setefunksjonene. Det kan være flere kryp- og/eller C-Me-hastigheter, avhengig av stolens konfigurasjon.
- Les gjennom alle advarsler og retningslinjer som gjelder funksjonen før du benytter stolen i kryp- og/eller C-Me-modus. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan redusere risikoen for å falle eller velte, samt hvordan du kan identifisere miljøforhold som kan påvirke din trygghet når du benytter rullestolen med kryp- og/eller C-Me-hastighet.
 1. Ved bruk av krypmodus, både innendørs og utendørs, skal rullestolen kun benyttes på et flatt, jevnt og fast underlag.
 2. Du må aldri bruke rullestolen i krypmodus i ulendt terreng som for eksempel grus, gress, humpete underlag, ujevne fortau eller i bakker.
 3. Du må ALDRI heve setet når rullestolen brukes i nærheten av terrenotypene som er beskrevet ovenfor, eller på andre ujevne overflater.

Fig. 6.3

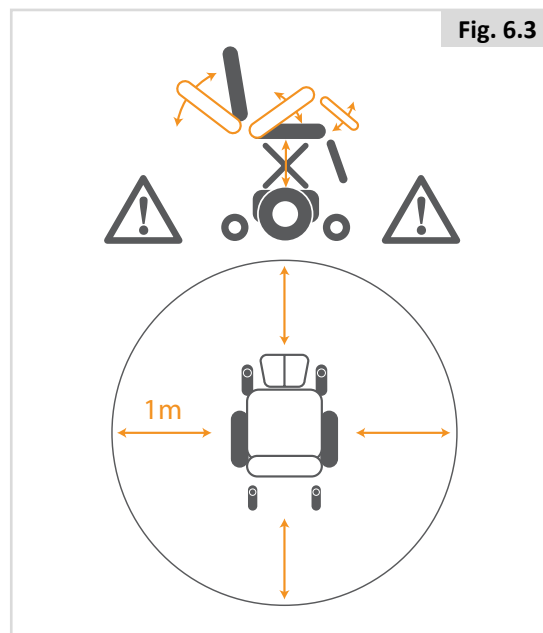


Fig. 6.4


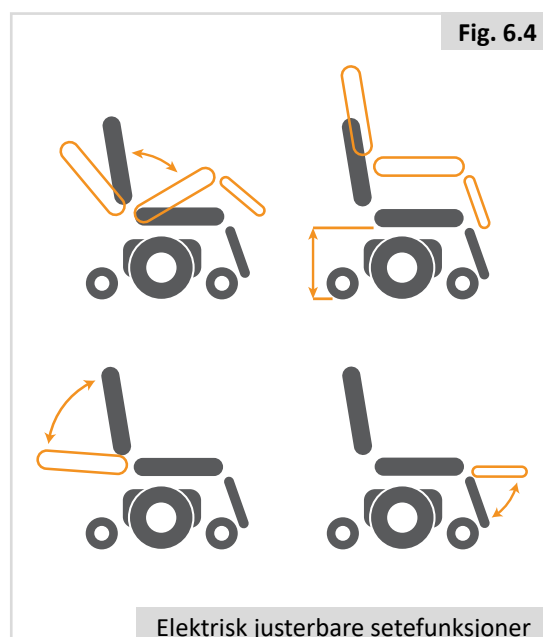


Fig. 6.5

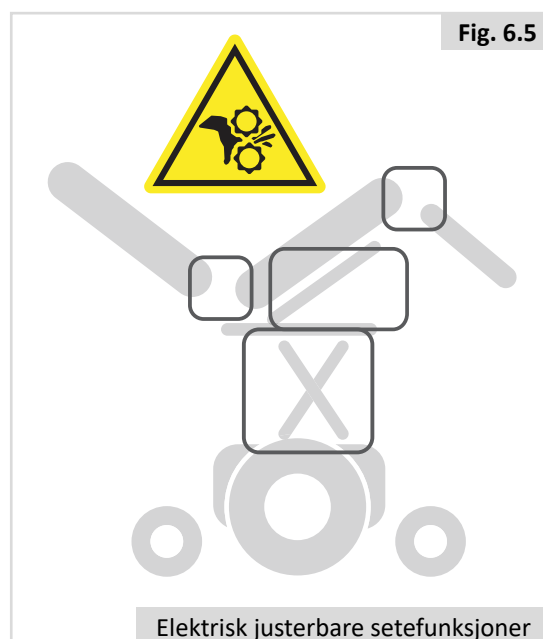

7.0 Redusere setesystemets størrelse for transportformål

FARE/ADVARSEL!

Rullestolen kan gjøres mindre når den skal transporteres uten at brukeren sitter i den. Alle avtakbare setekomponenter bør tas av stolen. Oppbevar slike komponenter på et trygt sted så de ikke kan forårsake personskade, produktskade, eller bli skadet selv.

7.1 Setepute

Demontere setet (Fig. 7.1)

1. Trekk (A) oppover.

Montere setet (Fig. 7.2)

1. Plasser (A) med hullene over boltene.

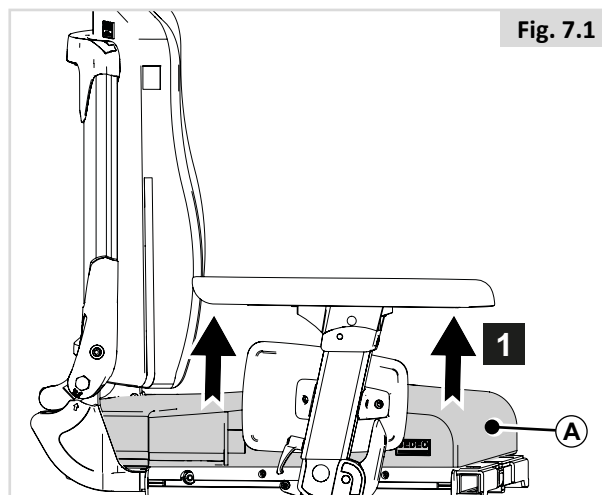


Fig. 7.1

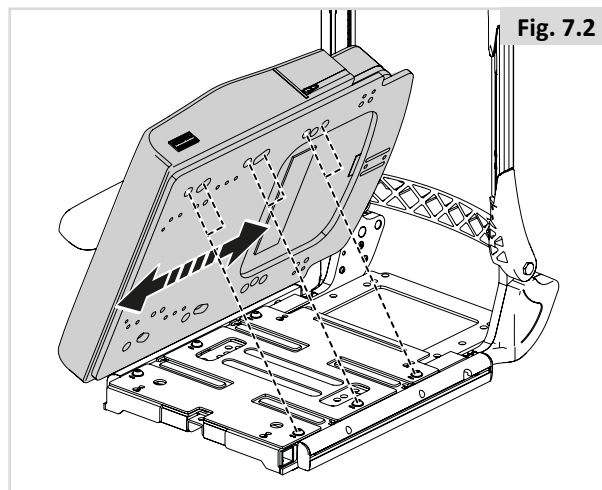


Fig. 7.2

7.2 Demontere ryggputen (Fig. 7.3)

1. Vri på (A) og (B).
2. Fra undersiden, trekk (C) forover og oppover, før du tar den ut.

Montere ryggputen (Fig. 7.3.1)

1. Hekt (A) bak (B).
2. Skru på (C).

ADVARSEL!

Kontroller at ryggputen er forsvarlig festet (håndtakene oppover).

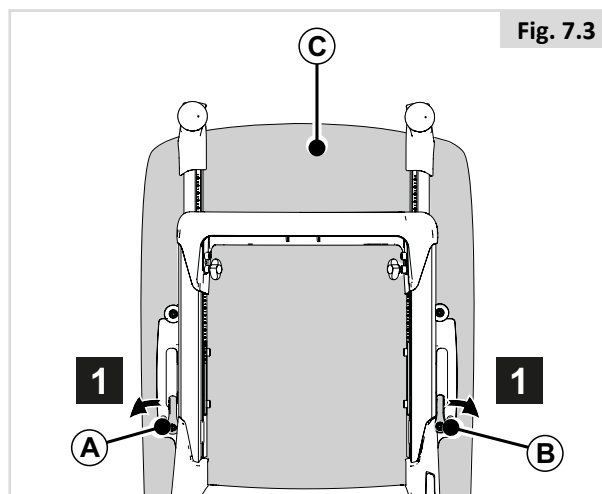


Fig. 7.3

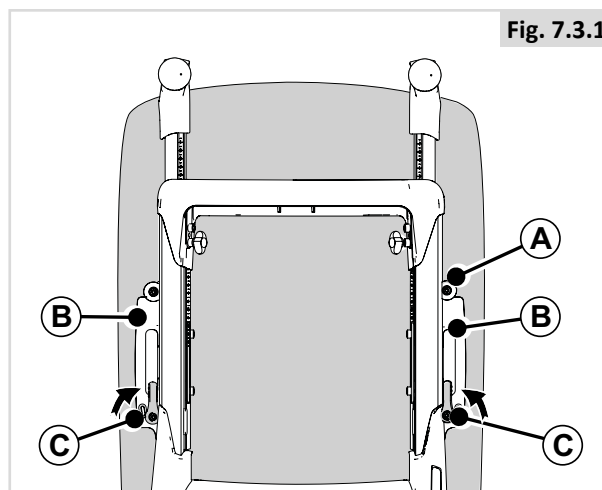


Fig. 7.3.1

7.3 Hurtigtutløsning av nedleggbar rygg (Fig 7.4)

Legge ryggen helt forover

1. Skru opp (A).
2. Legg (B) helt ned forover.



MERK/ADVARSEL!

Fjern først ryggputen og/eller armlenene, hvis nødvendig.

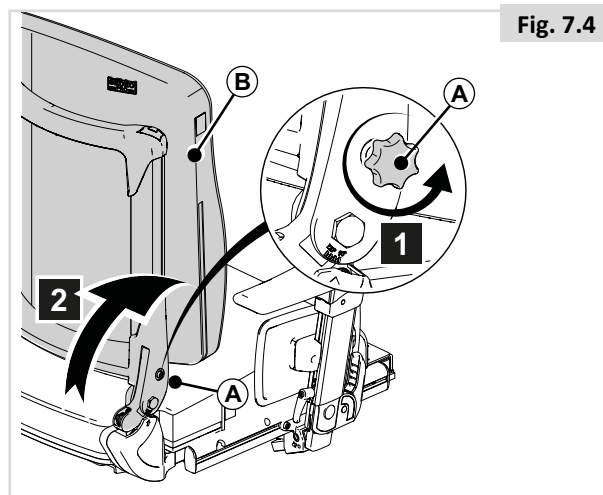


Fig. 7.4

7.4 Nedleggbar rygg med oppvippbare armlener (Fig. 7.5)

Legge ryggen helt forover

1. Fjern (A).
2. Vipp (B) opp og bakover.
3. Skru opp (C).
4. Legg (C) helt ned forover.



MERK/ADVARSEL!

Fjern først ryggputen, hvis nødvendig.

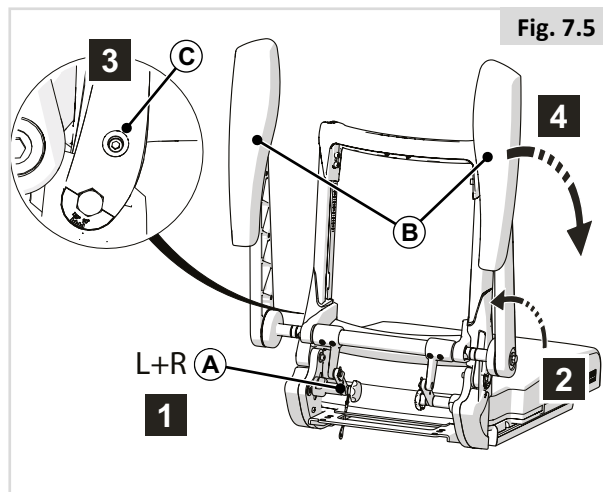


Fig. 7.5

7.5 Nedleggbar rygg med oppvippbare armlener (Fig. 7.6)

Legge ryggen helt forover

1. Fjern (A).
2. Vipp (B) opp og bakover.
3. Legg (C) helt ned forover.



MERK/ADVARSEL!

Fjern først ryggputen, hvis nødvendig.

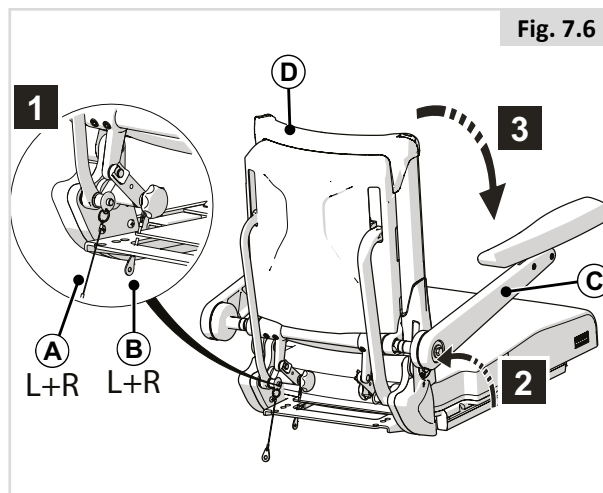


Fig. 7.6

7.6 Utsvingbare benstøtter (Fig. 7.7)

Demontere en utsvingbar benstøtte

1. Løsne leggstroppen.
2. Skyv sperren (A) bakover for å låse opp benstøtten.
3. Sving benstøtten utover.
4. Løft benstøtten (B) ut av braketten dens.

Du skal høre et klikk når du setter tilbake benstøtten. Dette indikerer at benstøtten er låst på plass.



Fare for å klemme fingrene (Fig. 7.8)



⚠ Advarsel!

Når den manuelt utsvingbare og hevbare benstøtten demonteres, må den bæres ved bruk av håndtaket som er konstruert til å demontere/bære benstøtten (A).

Hvis du holder fast i punkt B samtidig som spake C utløses, vil det være fare for å klemme fingrene.

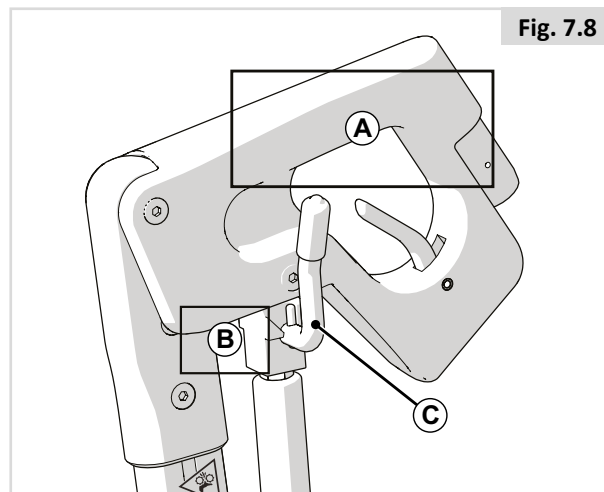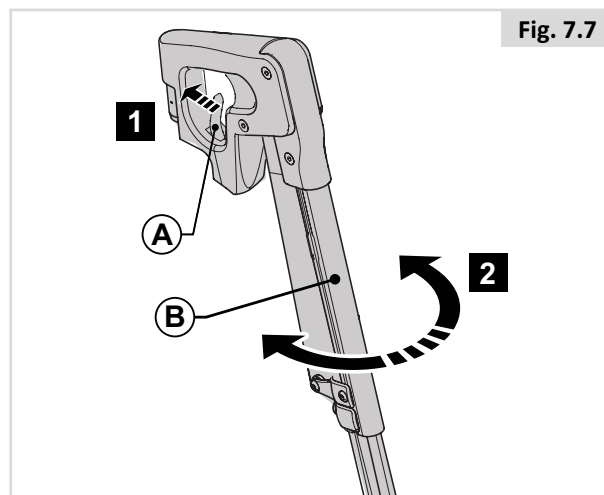



7.7 Avtakbart armlene med enkel stolpe

Demontere armlenet (Fig. 7.9)

1. Skyv (A) nedover.
2. Fjern (B).

Montere armlenet (Fig. 7.10)

1. Skyv (A) på (B).
2. Skyv (C) oppover.

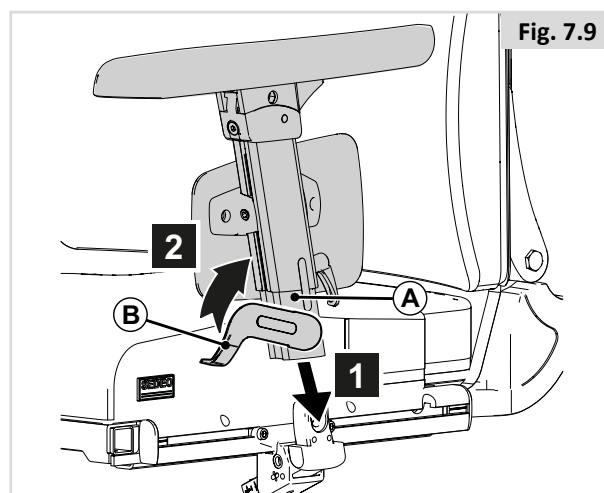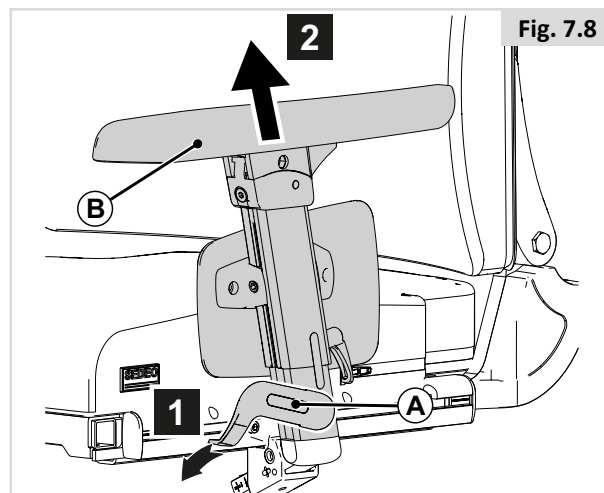

8.0 Vedlikehold og rengjøring

8.1 Generelt vedlikehold

- Alle festeanordninger bør kontrolleres hver måned for å forvisse deg om at bolter eller andre komponenter ikke er slitte, løse eller skadde.
- Løse festeanordninger må strammes i henhold til monteringsinstruksjonene.
Se tabellen nedenfor for riktige dreiemomenter.

Festeanordning	Vridningsmoment (Nm)
M6 bolt / skrue	9 - 10

Merk: Det er nødvendig å bruke en momentnøkkel til dette.

- Kontroller hver måned at ingen av stroppene eller reimene er frynsete, har sømmer som er raknet, eller viser andre tegn til slitasje og skade. Ikke bruk beltet dersom det er antydning til feil eller slitasje.
- Brystbelter må skiftes ut ved første antydning til skade og/eller slitasje.
- Hvis du oppdager en skadd eller løsnet komponent, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret og kontakte din lokale hjelpemiddelsentral for å få komponenten skiftet ut.
- Kontroller at alle borrelåsremser er forsvarlig festet når de er trykket sammen.
- Pass på å fjerne lo, hår o.l. fra borrelåsremmene, da det kan påvirke festeevnen.

8.2 Rengjøre setesystemet

Du må tørke over rullestolen én gang i uken med en lett fuktig (ikke våt) klut. Hvis det har samlet seg støv eller lo rundt aktuatorene, må du blåse eller tørke det bort.



MERK/ADVARSEL!

Tørk av alle deler som har blitt våte eller fuktige etter rengjøring, eller hvis rullestolen har blitt brukt i fuktige omgivelser.



FARE/ADVARSEL!

Hvis rullestolen skal brukes av mer enn en person, må stolen vaskes/desinfiseres nøye for å unngå kryssinfeksjon.

8.2.2 Kontrollere og rengjøre setet



FARE/ADVARSEL!

Rift, fordypninger, slitasje og løst trekk, spesielt på steder i nærheten av metall, kan føre til dårlig kroppsholdning eller mindre komfort og trykkavlastning.

Rengjøringsinstruksjoner for setet:

Putetrekket kan vaskes dersom det er en vaskeanvisning på innsiden av trekket. Følg instruksjonene på vaskeanvisningen. Husk å ta ut skuminnlegget og lukke borrelåsene før trekket vaskes!



ADVARSEL!

Ikke bruk organiske løsemidler slik som fortynningsvæske, lettbensin eller white spirit.

Ikke bruk kjemisk rens til å rengjøre trekket. Trekket må ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

På overflater hvor trekket ikke kan tas av, må trekket rengjøres regelmessig for å forhindre oppbygging av smuss. Tørk over med en klut fuktet med såpe og vann. Fortynnede desinfeksjonsmidler kan også brukes i henhold til produsentens instruksjoner. Pass på at overflatene skylles godt med rent vann og tørkes helt.

8.3 Hygiene ved gjenbruk av rullestolen:

Rullestolen må rengjøres grundig før den skal brukes av andre. Toutes les surfaces entrant en contact avec le nouvel utilisateur doivent être désinfectées.

For å gjøre dette må du bruke et egnet desinfeksjonsmiddel for hurtig alkoholbasert desinfisering av medisinske produkter og utstyr.

Følg produsentens bruksanvisning nøye.



MERK/ADVARSEL!

- Bruk aldri løsemidler, blekemidler, slipemidler, syntetiske rengjøringsmidler, bonevoks eller midler på sprayboks.
- Fortynnede desinfeksjonsmidler kan brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Pass på at overflatene skylles godt med rent vann og tørkes helt etter rengjøring.

8.4 Generelle instruksjoner for rengjøring:



MERK/ADVARSEL!

- Du bør fjerne flekker på setet så raskt som mulig.
- Etter lengre tids bruk, skal setetrekket rengjøres ved bruk av et standard tørt skumrensemiddel.
- Du må alltid rengjøre hele overflaten, ikke bare deler av det, for å forhindre at kantene på trekket blir skitne. Jo lenger du venter med å fjerne flekker, desto vanskeligere vil det være å fjerne dem.
- Unngå å skrubbe hardt med vannholdige rengjøringsmidler. Dette vil gjøre setetrekket rutt.
- Flekker (f. eks. øl, blod, cola, rødvin osv.) kan fjernes ved bruk av et skumbasert rengjøringsmiddel eller med et mildt vaskemiddel.
- Følg bruksanvisningene for trekket du bruker på stolen når du skal rengjøre det.
- Trekket skal tørke i minst 48 timer etter at det er rengjort med et skumrensemiddel.
- Fettflekker (f. eks. kulepenn, leppestift, tyggegummi osv.). Bruk et flekkfjerningsmiddel. Gni forsiktig over flekken med en ren klut fuktet med flekkfjerningsmidlet.
- Bruk kun en liten mengde flekkfjerningsmiddel.
- Test middelet på et lite område først.
- Trekket må ikke gjennombløtes, da det kan skades av flekkfjerningsmiddelet.
- Unngå kraftig friksjon på de trykte målene, f.eks. pilene på seteplaten og målet for justering av setebredde.
- Bruk aldri en vannslange eller en høytrykkspyler til å rengjøre rullestolen med.



FARE/ADVARSEL!

- Les alltid etiketten på alle typer rengjøringsmidler som skal brukes.
- Følg alltid instruksjonene nøye.

8.5 Rengjøre ekstrautstyr:

- Alle deler/tilbehør, slik som utsvingbare brett, skal rengjøres med en fuktig klut.
- Alle belter, nakkestøtter, armlener, klesbeskyttere, leggstøtter, hoftebelter og kneputer skal rengjøres med en fuktig klut.

8.6 Rengjøre styrespakene:

Dersom styreboksen på rullestolen er skitten, kan du tørke over den med en fuktig klut og et fortynnet desinfeksjonsmiddel til den er ren.



FARE/ADVARSEL!

- Dette er spesielt viktig dersom rullestolen skal brukes av flere personer, for å forhindre krysskontaminasjon.
- Sørg for at alle brett, joysticker (alle typer), nakkestøtter og brytere (alle typer) rengjøres ved bruk av et mildt desinfeksjonsmiddel og en ren klut, for å forhindre fare for kryssinfeksjon. Ta av og rengjør munnstykker og slanger regelmessig, for å holde slikt utstyr rent og funksjonelt.
- Pass på at rullestolen er slått av før du rengjør den.

8.7 Oppbevaring

For å holde trekket og andre deler på rullestolen i god stand, bør de oppbevares på steder med romtemperatur.




FARE/ADVARSEL!

- Rullestolen må aldri oppbevares i direkte sollys, utendørs eller i fuktige omgivelser.
- Direkte sollys kan falme trekket og plastdelene på stolen, i tillegg til å gjøre metalldelene på stolen svært varme.

9.0 Avhending

Symbolet betyr at produktet skal avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall i samsvar med lokale lover og forskrifter. Når produktets levetid er over må du ta det med til din Hjelpemiddelsentral, dersom de er eier av produktet. Innsamling og gjenvinning av ditt produkt vil bidra til bevaring av naturressurser, og det sikrer at delene blir resirkulert på en miljøvennlig måte.

Hjelpemiddelsentralen er den rettslige eieren av produktet og skal sørge for at det avhendes i henhold til overstående anbefalinger.

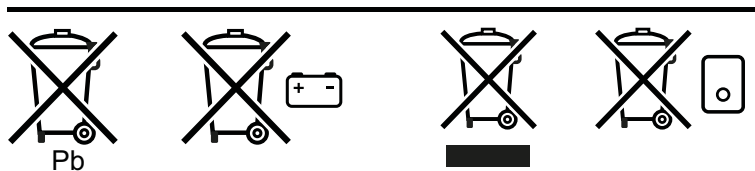

Følgende informasjon beskriver materialene som er brukt i rullestolen, med henblikk på deponering eller resirkulering av stolen og dens emballasje.

I tillegg kan det være bestemte, lokale forskrifter om resirkulering og deponering som du må ta hensyn til når du deponerer rullestolen. (Forskriftene kan inkludere rengjøring eller dekontaminasjon av rullestolen for deponering).


Aluminium: Svinghjulsgafler, hjul, klesbeskyttere for rammen.

Stål: Festeordninger, hurtigkoblinger

Plast: Håndtak, rørstoppere, svinghjul og hjul/dekk

Emballasje: Lavdensitets-polyetylenpose, pappkartong

Deponering eller gjenvinning skal gjøres via en lisensiert agent eller på en autorisert avfallsplass. Alternativt kan rullestolen leveres inn hos forhandleren for deponering.

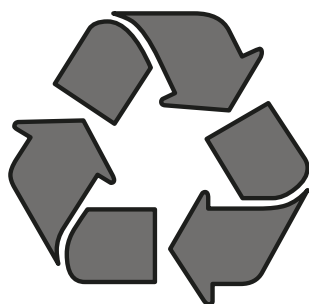

10.0 Teknisk informasjon:

10.1 Gjeldende normer/standarder

EN-ISO10993-5: 2009	Biologisk vurdering av medisinsk utstyr.
EN 1021 1&2	Vurdering av antennerlige stoffmøbler. Antenningskilde: tilsvarende ulmende sigarett/ fyrstikk.

10.2 Teknisk informasjon: SEDEO Pro-setesystem

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Justering av setevinkel				
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	0° - 30°		-5° - 25°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	-5° - 25°		0° - 30°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	0° - 50°		-5° - 45°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	-5° - 45°			
Effektiv setedybde	400 mm	580 mm	15,7"	23,6"
Effektiv setebredde	380 mm	560 mm	15"	22"
Høyde fra gulv til sete Filtermodul (uten elektrisk tilt-in-space, ingen heving av setet)				
pos. 1 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	415 mm		16,3"	
pos. 2 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	440 mm		17,3"	
pos. 3 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	465 mm		18,3"	
pos. 4 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	490 mm		19,3"	
Elektrisk tilt og heving av setet (300 mm)				
pos. 1 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	415 mm	715 mm	16,3"	28,1"
pos. 2 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	440 mm	740 mm	17,3"	29,1"
pos. 3 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	465 mm	765 mm	18,3"	30,1"
pos. 4 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	490 mm	790 mm	19,3"	31,1"
Ryggvinkel				
Verktøy for vinklejusterbar rygg	90° - 120°		90° - 120°	
Elektrisk ryggvinkling	90° - 130°		90° - 130°	
Elektrisk vinkling av seteryggen uten forskyvning	90° - 150°		90° - 150°	
Rygghøyde (fra seteplaten til toppen av ryggputen)	530 mm	720 mm	20,9"	28,3"
Oppvippbart armlen/avtakbart armlen med enkel stolpe				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	260 mm	380 mm	10,2"	15"
Armlenbredde (på seterammen)	-20 mm	+20 mm	-0,8"	+0,8"
Bredde på armlenepad (på armlenprofil)	-20 mm		-0,8"	
Armlendybde (på seteramme med kort seteskinne)	250 mm		10,8"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	100 mm		3,9"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Tilbakelemt, oppvippbart armlen				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Bredde på armlenepad (på armlenprofil)	-20 mm		-0,8"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	140 mm		5,5"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Multijusterbare og oppfellbare armlener som følger ryggen				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	180 mm	370 mm	7,1"	14,6"
Bredde på armlenepad (multijusterbart)	110 mm		4,3"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	100 mm		4,0"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Sentermontert benstøtte				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Knevinkel	70° - 120°		70° - 120°	
Ankelvinkel	+20° - -40°		+20° - -40°	

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Elektrisk midtmontert benstøtte				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	360 mm	540 mm	14,2"	21,2"
Knevinkel	90° - 180°		90° - 180°	
Maks lengdekompensasjon	260 mm		10,2"	
Ankelvinkel	+35° - -15°		+35° - -15°	
Utsvingbare benstøtter				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knevinkel	70°		70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Utsvingbare benstøtter, manuelt hevbare/elektrisk hevbare				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knevinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Feste for justerbar SEDEO-nakkestøtte				
Høydejusteringer for nakkestøtte	170 mm		6,7"	
Dybdejusteringer for nakkestøtte	200 mm		7,9"	
Vinkel på nakkestøtte (vertikal)	-45° - +45°		-45° - +45°	
Bredde på nakkestøtte	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Sidestøtter				
Breddejusteringer for sidestøtter	90 mm		3,5"	
Høydejusteringer for sidestøtter	170 mm		6,7"	
Dybdejusteringer for sidestøtter	45 mm		1,8"	
Bøyle				
Bøylehøyde (fra seteplate til toppen av ryggputen)	170 mm	250 mm	6,7"	9,8"
Dybdejusteringer for bøyle	65 mm		2,5"	
Høydejusteringer for kjørehåndtak	140 mm		5,5"	

10.3 Teknisk informasjon: SEDEO Pro HD setesystem

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Justering av setevinkel				
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	0° - 30°		-5° - 25°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	-5° - 25°		0° - 30°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	0° - 50°		-5° - 45°	
Elektrisk tilt med justering av tyngdepunkt valgfritt	-5° - 45°			
Effektiv setedybde	460 mm	560 mm	18"	22"
Effektiv setebredde	500 mm	660 mm	20"	26"
Høyde fra gulv til sete				
Filtermodul (uten elektrisk tilt-in-space, ingen heving av setet)				
pos. 2 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	440 mm		17,3"	
pos. 3 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	465 mm		18,3"	
pos. 4 60 eller 80 Ah-batterier 0° setevinkel	490 mm		19,3"	
Ryggvinkel				
Verktøy for vinklejusterbar rygg	90° - 120°		90° - 120°	
Elektrisk ryggvinkling	90° - 130°		90° - 130°	
Rygghøyde (fra seteplaten til toppen av ryggputen)	500 mm	620 mm	20"	24"
Oppvippbart armlen/avtakbart armlen med enkel stolpe				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	260 mm	380 mm	10,2"	15"
Armlenbredde (på seterammen)	-20 mm	+20 mm	-0,8"	+0,8"
Bredde på armlenepad (på armlenprofil)	-20 mm		-0,8"	
Armlendybde (på seteramme med kort seteskinne)	250 mm		10,8"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	100 mm		3,9"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Tilbakelent, oppvippbart armlen				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Bredde på armlenepad (på armlenprofil)	-20 mm		-0,8"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	140 mm		5,5"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Multijusterbare og oppfellbare armlener som følger ryggen				
Høyde på armlenepad (fra seteplaten til toppen av armlenepad)	180 mm	370 mm	7,1"	14,6"
Bredde på armlenepad (multijusterbart)	110 mm		4,3"	
Dybde på armlenepad (på armlenprofil)	100 mm		4,0"	
Vinkel på armlenepad (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Sentermontert benstøtte				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Knevinkel	70° - 120°		70° - 120°	
Ankelvinkel	+20° - -40°		+20° - -40°	
Elektrisk midtmontert benstøtte				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	360 mm	540 mm	14,2"	21,2"
Knevinkel	90° - 180°		90° - 180°	
Maks lengdekompensasjon	260 mm		10,2"	
Ankelvinkel	+35° - -15°		+35° - -15°	

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Utsvingbare benstøtter				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knevinkel	70°		70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Utsvingbare benstøtter, manuelt hevbare/elektrisk hevbare				
Lengde for leggene (fra seteplaten)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knevinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Feste for justerbar SEDEO-nakkestøtte				
Høydejusteringer for nakkestøtte	170 mm		6,7"	
Dybdejusteringer for nakkestøtte	200 mm		7,9"	
Vinkel på nakkestøtte (vertikal)	-45° - +45°		-45° - +45°	
Bredde på nakkestøtte	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Sidestøtter				
Breddejusteringer for sidestøtter	90 mm		3,5"	
Høydejusteringer for sidestøtter	170 mm		6,7"	
Dybdejusteringer for sidestøtter	45 mm		1,8"	
Bøyle				
Bøylehøyde (fra seteplate til toppen av ryggputen)	170 mm	250 mm	6,7"	9,8"
Dybdejusteringer for bøyle	65 mm		2,5"	
Høydejusteringer for kjørehåndtak	140 mm		5,5"	

11.0 Garanti

DENNE GARANTIE VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE PÅVIRKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

Sunrise Medical* gir sine kunder en garanti, slik beskrevet i garantibetingelsene, for rullestolen. Garantien dekker følgende.

Garantibetingelsene:

1. Dersom en del eller deler på rullestolen må repareres eller skiftes ut på grunn av produksjons- og/eller materialfeil i løpet av 2 år, eller 5 år for ramme og rammekryssrør etter levering av produktet, vil den skadde delen eller delene repareres eller skiftes ut uten omkostninger for kunden. Garantien dekker kun produksjonsfeil.
2. For å bruke garantien, vennligst ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen og oppgi nøyaktig informasjon om feilen og hvordan den har oppstått.
Dersom du bruker rullestolen utenfor områdene som er dekket av Sunrise Medicals verksteder, vil reparasjoner og utskifting av deler utføres av et annet verksted som er godkjent av produsenten. Rullestolen må repareres av et godkjent Sunrise Medical-verksted (Servicepartner).
3. Deler som er reparert eller skiftet ut ved bruk av denne garantien vil være dekket av rullestolens gjenværende garantiperiode i henhold til disse garantibetingelsene slik fastsatt i punkt 1.
4. Reservedeler som kunden har betalt for vil ha en garanti på 12 måneder (fra den/de ble montert) i henhold til disse garantibetingelsene.
5. Denne garantien kan ikke brukes dersom reparasjon eller utskifting av deler er et direkte resultat av følgende årsaker:
 - a. Normal slitasje, inkludert batterier, armlenepads, trekk, dekk, brems, osv.
 - b. Overbelastning av produktet. Kontroller CE-etiketten for informasjon om den maksimale brukervekten.
 - c. Produktet eller en del av den ikke har blitt ivaretatt eller vedlikeholdt i samsvar med produsentens anbefalinger, slik beskrevet i brukermanualen og/eller servicemanualen.
 - d. Det er brukt deler som ikke er klassifisert som originaldeler.
 - e. Produktet eller del av det er blitt skadet pga. uforsiktighet, ulykke eller feil bruk.
 - f. Det er utført endringer/modifiseringer på produktet eller deler som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
 - g. Det er utført reparasjoner før Sunrise Medicals kundeservice har blitt informert om dette.
6. Denne garantien er gjenstand for lover og/eller avtaler gjennom f.eks. egne kontrakter i det landet hvor produktet ble kjøpt fra Sunrise Medical.

* Betyr forhandleren/leverandøren som Sunrise Medical-produktet ble kjøpt fra.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



OM_Sedeo Pro VAVE_EU_NO_
RevF_2024-05-14