




## CIRRUS G5

Cirrus G5

Quick Guide

### Monteringsvejledning

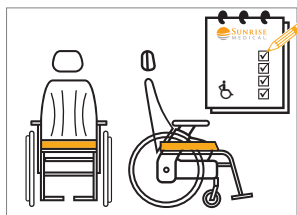


Kørestolen leveres i sædebredde 39-54 cm og i sædedybde 44-50 cm (glidende sæde +/- 5 cm). Sørg for, at den kørestol du har modtaget har de korrekte mål i henhold til din ordre. Du kan finde kørestolens mål afmærket på krydset under sædet.




Kørestolen leveres komplet. Det eneste du skal gøre, er at folde ryggen og montere armlænen og benstøtterne.

- Fold ryggen op og sæt boltene i **A**
- Monter armlænen og benstøtterne
- Læg siddepuden (tilbehør) på plads, og sørg for at den ligger rigtigt på sædepladen.

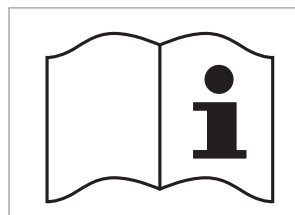

For din egen sikkerhed og for at få mest ud af din nye kørestol anbefaler vi, at du læser vejledningen omhyggeligt, inden du tager kørestolen i brug.

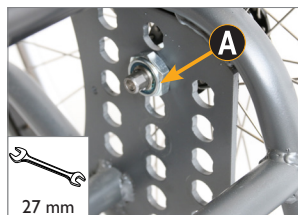

### Sædehøjde bagved og balancepunkt

Sædehøjden kan justeres fra 47-52 cm (44,5-49,5 cm uden glidesæde) (38-55 cm ved at bytte dele).

Tyngdepunktet kan justeres for at tilpasse køreegenskaberne for den enkelte.


- Løsn møtrikken **A**
- Flyt bøsningen til det ønskede hul.
- Monter møtrikken og spænd til

### Sædehøjden foran

Sædehøjde foran justeres med samme intervaller som sædets højde bagtil.

Sædehøjde foran kan ændres på forskellige måder:

- Skift til større eller mindre svinghjul
- Skift til kortere eller længere svinghjulsgafler
- Flyt svinghjulet op eller ned

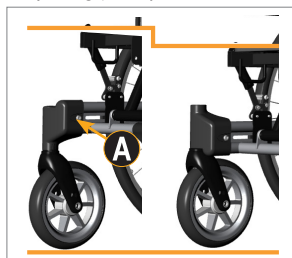

### Svinghjulsofhæng


- Skru skruen ud **A**
- Afmonter gaffel og hjul
- Drej svinghjulsofhængen 180° og monter det på den modsatte side.
- Monter gaffel og hjul
- Spænd skruen **A**

- i svinghjulets gaffel (afhængigt af svinghjulets størrelse)
- Drej svinghjulsofhæng 180° og flyt det til den modsatte side
- Tilføj eller fjern afstandsstykker mellem svinghjulsofhæng og gaffel



### Tilføj eller fjern afstandsstykker


- Afmonter gaffel og hjul
- Tilføj eller fjern afstandsstykker **A**
- Monter gaffel og hjul

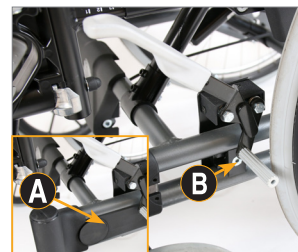

### Justering af bremsen

Efter justering af sædehøjde bagved eller tyngdepunkt er det vigtigt at kontrollere og / eller justere bremsen.

- Fjern dækslet **A**
- Løsn skruen **B**
- Juster bremsen i sporet til den ønskede position. Den korrekte afstand mellem bremseklosets og hjulet er ca. 5 mm, når bremsen ikke er aktiveret

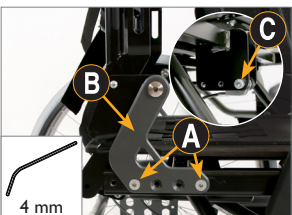

### Sædedybde

Sædedybden kan justeres i tre trin 44, 47 og 50 cm ved at flytte ryggen **B** frem eller tilbage. Glidesædet giver yderligere +/- 5 cm i sædedybde.

- Fold ryggen ned, så den hviler mod sædet.
- Skru skrue **A** ud på begge sider af kørestolen. Flyt rygbeslagene til den ønskede position og skru boltene på igen. Der skal altid være et eller to åbne huller mellem boltene.
- Fjerne skruen til gasdæmperen/aktuatoren **C** og flyt den til hullet svarende til hullerne i rygbeslaget.






### Hovedstøtte

Hovedstøtten kan indstilles i højde, dybde og vinkel.

- Løsn låsehåndtagene **A**, juster til ønsket dybde og vinkel, og spænd håndtagene
- Løsn låsestroppen **B**, hævet eller sænk nakkestøtten til den ønskede position, og spænd låsestroppen igen.



- Puden har indbyggede bånd, **C** som kan reguleres for at give optimal støtte til hovedet.

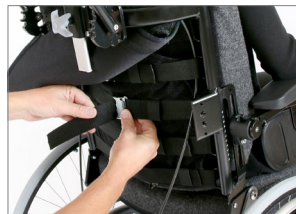


### Rygdinstillinger

En velpolstret rygpude giver god komfort over tid. Bælterne i ryggen kan justeres, så du opnår maksimal støtte og komfort. Du kan få fat i velcrostropperne ved at justere ryglænet på bagsiden af ryggen.



**CIRRUS GS**

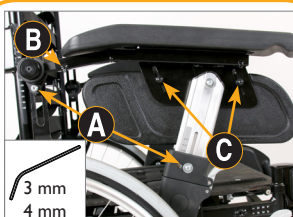


### Justering af armlæn

Armlænene, der følger ryggen ved ryglænets indstilling, kan justeres i højde, dybde og vinkel for optimal støtte af armene.

- Juster højden ved at løсне skruerne **A**, hævet eller sænk armlænet til den ønskede position og spænd skruen igen. Brug måle skalaerne som vejledning.
- Juster dybden ved at løсне skruen **B** og skubbe armlænet til den ønskede position.

Når armlænet er indstillet til den ønskede position, skal du flytte sædebeskytteren for at undgå åbninger mod hjulet.

- Løsn skruerne **C**, træk /skub sædebeskytteren til den ønskede position og spænd skruerne igen

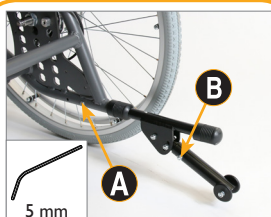

### Justering af tipsikring

Justér tipsikringen efter at have ændret sædehøjden eller tyngdepunktet på stolen.

- Skru skruerne ud **A**. Træk eller skub tipsikringen til den rette vandrette position. Sæt skruerne i igen og spænd til.
- Skru skruerne af **B**. Træk eller skub tipsikringen til den rette lodrette position. Sæt skruerne i igen og spænd til igen. (Illustrationen kan afvige i forhold til tipsikringen som er monteret på kørestolen)



### Benstøtte længde

Længden ned til fodstøtten kan justeres trinløst.

- Løsn fastgørelsesskruen **A** ca 5 mm. Juster benstøtten til ønsket længde og spænd skruen igen
- Brug måleskalaen som vejledning


## Brug af kørestolen



### Tilt og rygvinkel


Sæde og ryglæn giver brugeren mulighed for at ændre brugerens position i løbet af dagen. Ryg- og sædevinklerne er placeret på kørebøjlen.

- Juster rygvinklen ved hjælp af højre håndtag.
- Vip sædet med venstre håndtag.

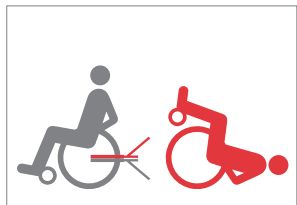

### Tipsikring med tippedal

Tipsikring forhindrer at kørestolen vipper bagover. Sørg altid for, at anti-tip-funktionen er aktiveret, når kørestolen er i brug. Deaktiver tipsikringen, når du kører over kanter eller lignende. Sæt derefter en fod på tippedalene, mens du trykker ned på skubehåndtagene. Sørg for at aktivere anti-tip enheden, når du har passert forhindringen.

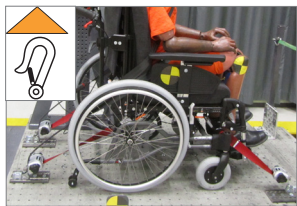

### Kollisionstest

Kørestolen kan bruges til som passagersæde i en bil og er godkendt i henhold til ISO 7176-19.


På kørestolen er de markert fire fastgørelsespunkter, der skal bruges til fastspænding i motorkøretøjer.



### Glidesædet

Brug glide funktionen til at justere sædedybden og for en lettere og mere skånsom forflytning af brugeren til/fra kørestolen.


- Sæt sædet i vandret position.
- Skub håndtaget **A** bagover samtidig med du tager fat i håndtaget **B** og træk eller skuber sædet til den ønskede position.

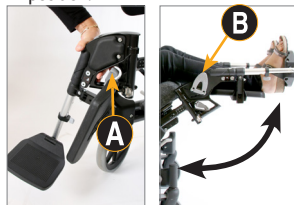

### Vinkeljusterbare benstøtter

Benstøtterne er svingbare og aftagelige for lettere forflytning til og fra kørestolen

- Benstøtten frigives ved at dreje håndtaget **A** ind eller ud.
- Benstøtten kan løftes lige op og fjernes fuldstændigt, hvis det ønskes. For at sætte benstøtten på igen, udføres handlingen i omvendt rækkefølge. Håndtaget **A** låses automatisk.
- Juster benstøttevinklen ved at svinge armen ud **B** og juster til den ønskede position. Lås vinklen ved at skubbe håndtaget.

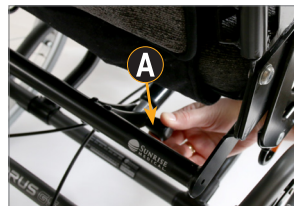


### Fold stoleryggen op og ned

Stoleryggen er let at folde ned

- Vip stolen fremad.
- Fjern armlænene.
- Træk splitten ud **A** og fold ryggen ned.

Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at folde ryggen op.

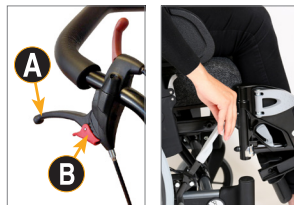

### Ledsagerbremse

- Klem bremsehåndtaget **A** for at bremse.
- Skub løftehåndtaget **B** væk fra dig for at sætte bremsen i låst stilling, når du parkerer. Klem trækstangen for at løsne bremsen.

### Bremser - brugerbetjente

⚠ De brugerbetjente bremsere er kun designet til at holde stolen, når den står stille. De må ikke bruges som kørebremser.



Sunrise Medical AS  
Park Allé 289G  
2605 Brøndby  
T: +45 70 22 43 49

E: [info@sunrisemedical.dk](mailto:info@sunrisemedical.dk)  
[www.sunrisemedical.dk](http://www.sunrisemedical.dk)

📖 Læs mere om bilsikkerhed i kørestolens brugsanvisning