


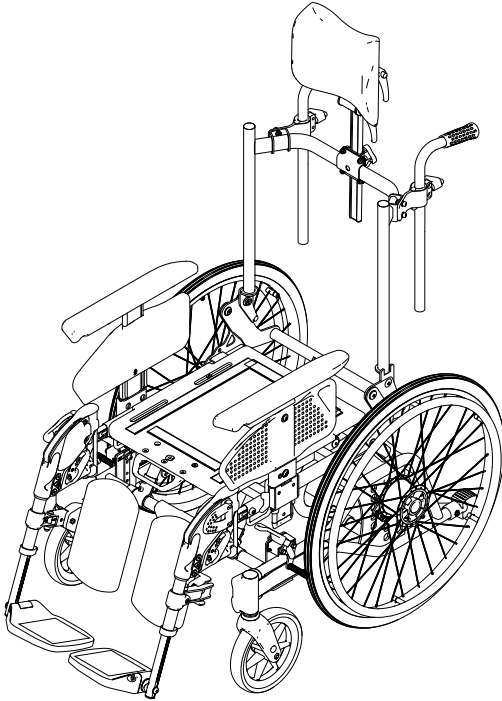

Onderstel

MB3172-NL

Cirrus G5 Base

Gebruikershandleiding

Neem contact op met uw plaatselijke erkende Sunrise Medical dealer, indien u vragen heeft over het gebruik, onderhoud of de veiligheid van uw rolstoel. Indien u niet weet of zich een goedgekeurde dealer in uw omgeving bevindt, of indien u andere vragen hebt, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met:

Sunrise Medical
Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Nederland
T: +31 (0) 492 593 88 88
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

© 2018 Sunrise Medical

Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding verstrekte informatie mag in geen enkele vorm door afdruk, fotokopieën, microfilm, of op welke wijze dan ook (elektronisch of mechanisch) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunrise Medical worden gereproduceerd en/of gepubliceerd.

De informatie wordt verstrekt op basis van algemene gegevens betreffende de constructie zoals deze bekend zijn ten tijde van de publicatie van deze handleiding. Sunrise Medical voert een beleid van voortdurende verbetering en houdt zich het recht voor veranderingen en aanpassingen door te voeren.

De verstrekte informatie geldt voor het product in de standaarduitvoering. Sunrise Medical kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit specificaties van het product dat afwijkt van de standaardconfiguratie. Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van de configuratie van uw product.

De beschikbaar gestelde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; Sunrise Medical kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de informatie of de gevolgen hiervan.

Sunrise Medical accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werk uitgevoerd door derden.

Door Sunrise Medical gebruikte namen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen volgens de wetgeving inzake de bescherming van handelsnamen niet als beschikbaar worden beschouwd.

1	Inleiding	6
1.1	Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoelonderstel	6
1.2	Aanpassen van de rolstoelonderstel	6
1.3	Voor meer informatie	6
1.4	Betekenis van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt	6
2	Veiligheid	7
3	Algemene beschrijving	8
3.1	Montage	8
3.2	Belangrijkste onderdelen	8
3.3	Bedoeld gebruik en de bedoelde gebruikersomgeving	9
3.4	De gebruiker	9
4	Gebruik van het ortheseonderstel	10
4.1	Quick release assen	10
4.2	Duwstang - in hoogte verstelbaar	10
4.3	Armsteunen, verwijderen en bevestigen	11
4.4	Naar buiten zwenken/bevestigen/verwijderen van de beensteunen	12
4.5	Aanpassen van de hoek van de beensteun en de kuitondersteuning - Hoekverstelbare beensteun	12
4.6	Bevestiging van orthese	13
4.7	Adapterplaat	13
4.8	Gebruik van de remmen	14
4.9	Gebruik van de begeleidersrem	14
4.10	Trapdop/anti-tip	14
4.11	Wijzigen van de zitpositie door de rugleuning en zithoek aan te passen	15
4.12	Verplaatsing in en uit de rolstoel	16
4.13	Op of afgaan van obstakels, trappen	17
4.14	Op of afgaan van obstakels	17
5	Instellingen	18
5.1	De zittinghoogte instellen	19
5.2	Matrix zithoogte	21
5.3	Aanpassen van de remmen	24
5.4	Aanpassen van de anti-tip	24
5.5	Aanpassen van de neksteun	25
5.6	Aanpassen van de lengte van de beensteunen - Hoekverstelbare beensteunen	26
5.7	Aanpassen van de hoek van de vaste beensteunen	26
5.8	Voetenplaat - Aanpassing hoek	26
5.9	Aanpassen van de zitdiepte/lengte bovenbeen door de bevestiging van de beensteun te verplaatsen	27
5.10	Aanpassen van de zitdiepte/het zwaartepunt	28
5.11	Aanpassen van de hoogte van de armsteun	29
5.12	Hoogte zijschot	29
5.13	Aanpassen van de diepte van de armsteunen	29
5.14	Bevestigen van de heupgordel (accessoire)	30

6	Vervoer.....	31
6.1	Transport zonder persoon in de rolstoel	31
6.2	De rugleuning omhoog of naar beneden vouwen	32
6.3	De rolstoel als passagiersstoel in een auto	33
6.4	Vastmaken van de veiligheidsgordel:	34
7	Onderhoud	37
7.1	Reinigen van het frame	37
7.2	Reinigen van de zitting en de hoezen van de rugleuning	37
7.3	Omstandigheden waardoor de rolstoel kan beschadigen	37
7.4	Schroeven en moeren	37
7.5	Gereedschappen voor service en aandrijfwielen	37
7.6	Quick-release-as van de wielen	37
7.7	Aanbevolen luchtdruk	37
7.8	Gereedschappen voor aanpassingen	38
7.9	Na 6 maanden controleren, daarna jaarlijks	38
7.10	Reparaties	38
7.11	Langetermijnopslag (langer dan vier maanden)	38
7.12	Wisselen van opgepompte banden	39
8	Technische specificaties en afmetingen.....	40
8.1	Levensduur	41
8.2	Afvalverwerking	41
9	Markeringen op de rolstoel.....	42
10	Garantie.....	43
11	Accessoires	44
12	Bijkomende Informatie.....	45

1 Inleiding

1.1 Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoelonderstel

Kwaliteit en functionaliteit zijn voor alle rolstoelen in de Sunrise productseries van het grootste belang.

Voor uw eigen veiligheid, en om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen van uw nieuwe rolstoel, adviseren we u om, voor u de rolstoel gebruikt, deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen.

1.2 Aanpassen van de rolstoelonderstel

Er bestaat geen gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom kunnen rolstoelen van Sunrise Medical worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. De instellingen die in hoofdstuk "4 Gebruik van het ortheseonderstel" op page 10 worden genoemd, kunnen door de gebruiker worden uitgevoerd. Alle overige aanpassingen die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, dienen door, of in overleg met, gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

1.3 Voor meer informatie

Als u visueel gehandicapt bent, kunt u dit document op www.SunriseMedical.com in Pdf-formaat bekijken. Ook is de tekst op verzoek in groot lettertype beschikbaar.

Voor informatie over veiligheidswaarschuwingen of terugroepacties (ook bekend als terughaalacties of corrigerende acties), gaat u naar www.SunriseMedical.nl

Heeft u vragen over het gebruik, het onderhoud of de veiligheid van uw rolstoel, neem dan contact op met uw plaatselijke erkende dealer van SUNRISE MEDICAL. Is er geen erkende dealer in uw regio of hebt u vragen, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met Sunrise Medical.

1.4 Betekenis van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Opmerking!

Aanduiding mogelijke problemen voor de gebruiker.

⚠ Opgelet!

Advies voor de gebruiker om schade aan het product te voorkomen.

⚠ Waarschuwing!

Waarschuwingen voor de gebruiker om persoonlijk letsel te voorkomen.

Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

Symbolen in afbeeldingen

In iedere afbeelding worden iconen en nummers vermeld om aan te geven wat er gedaan moet worden en in welke volgorde.

2 Veiligheid

Waarschuwing!

- Ga niet op de voetplaten staan, of oefen geen grote druk uit op de voetplaten.
- Een rolstoel moet worden gezien als een vervanging voor het lopen. Gebruikers moeten zich daarom tussen voetgangers bewegen, niet op wegen of in straten met gemotoriseerd verkeer. Gebruik reflectoren wanneer u de rolstoel buiten gebruikt.
- Wanneer u een transfer naar of uit de rolstoel maakt, let er dan op dat u op een zo stabiel en vlak mogelijke ondergrond staat. Om er zeker van te zijn dat de rolstoel niet beweegt wanneer u dat niet wilt, controleert u of de rem is geactiveerd en vergrendeld.
- Het maximale gebruikersgewicht voor de Cirrus G5 Onderstel is 135 kg.
- U moet de rolstoel regelmatig visueel controleren om u ervan te verzekeren dat alle schroeven, bouten en andere bevestigingsmaterialen goed vast zitten.
- Controleer bij gebruik van de rolstoel altijd of de anti-tip in de correcte positie staat.
- De zitting en wielposities kunnen zodanig worden aangepast dat instelling buiten de veilige limiet valt. Als de stoel wordt aangepast, zoals het verplaatsen van de aandrijfwielen of de zwenkwielen aan de voorzijde, het wijzigen van de hoogte van de rugleuning, etc., kan dit de rijeigenschappen, het evenwicht en het kantelpunt van de rolstoel beïnvloeden. Wees met name voorzichtig wanneer u de rolstoel voor het eerst na een aanpassing weer gebruikt.
- Vermijd aanpassingen of wijzigingen aan de rolstoel die van invloed kunnen zijn op in de constructie van de rolstoel ingebouwde veiligheid.
- Voor transfers naar en uit de rolstoel wordt assistentie door gekwalificeerde begeleiders aanbevolen.
- Zorg ervoor dat kleding, bagage en andere losse artikelen niet in de wielspaken verstrikt raken.
- Wees alert op het mogelijke gevaar van letsel door beklemming: steek uw vingers niet tussen de zijschotten en het wiel, tussen het wiel en de remmen, tussen de hoepel en het wiel, tussen de bewegende delen op de hoekverstelbare beensteun en tussen het zijframe en de bevestigingen van de beensteun bij het kantelen.
- Als het nodig is om tijdens het gebruik van de rolstoel de voorzijde van de rolstoel op te tillen om over een obstakel te rijden, doe dit dan nooit door uitsluitend de duwhandvatten naar beneden te duwen. Zet uw voet op de trapdop en oefen tegelijkertijd enige druk uit op de duwhandvatten.
- Door lange tijd in een rolstoel te zitten neemt de kans op decubitus toe. Als er sprake is van een hoog risico op decubitus, adviseren we het gebruik van een speciaal zitkussen om dit te voorkomen. Voordat u een anti-decubituskussen gebruikt, dient u de leverancier te raadplegen of dit kussen op een vlak zitoppervlak gebruikt kan worden.
- Wanneer de rolstoel langdurig blootgesteld wordt aan direct zonlicht, kunnen sommige onderdelen (bijv. frame, beensteunen, remmen, zijkant) heet worden (>41°C).
- Met het oog op de veiligheid moet de zitplaat altijd op de juiste wijze worden bevestigd aan de adapterplaat of de trapezevormige plaat.

3 Algemene beschrijving

3.1 Montage

De rolstoelonderstel wordt compleet geleverd. U hoeft alleen maar:



- De rugleuning omhoog te vouwen, zie page 32
- De beensteunen te monteren, zie page 12

3.2 Belangrijkste onderdelen

Om deze handleiding goed te begrijpen, is het van belang dat u de gewone termen kent die worden gebruikt om de verschillende onderdelen van de rolstoel te worden beschrijven. Bestudeer de bovenstaande tekening en maak een aantekening van de relevante onderdelen op uw rolstoel.

De uitrusting van uw rolstoel kan enigszins afwijken van dat wat er in afbeelding 1 wordt getoond. Als de rolstoel is ingesteld om door een begeleider te worden voortbewogen, heeft de stoel andere wielmaten en voor de begeleider een remhendel op de duwhandvatten.

- | | |
|----------------------------------|--|
| A Rugleuning en rugkussen | J Asplaat |
| B Armsteun | K Rem |
| C Zijschot | L Lagerbehuizing voor zwenkwiel |
| D Zitframe en zitkussen | M Voorvork |
| E Beensteun | N Zwenkwiel |
| F Voetplaat | O Hoofdsteun |
| G Duwhandvat | |
| H Aandrijfwiel | |
| I Hoepel | |

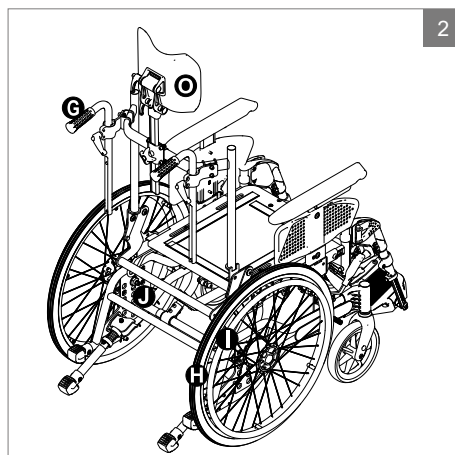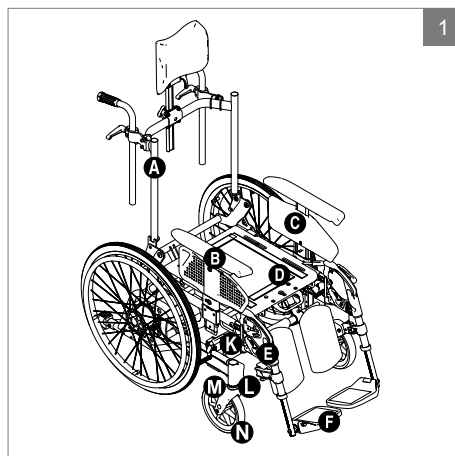

3.3 Bedoeld gebruik en de bedoelde gebruikersomgeving

De Cirrus G5 Onderstel is zowel binnens- als buitenshuis te gebruiken.

3.4 De gebruiker

Deze rolstoel is bedoeld voor personen met een lichamelijke handicap en als een hulpmiddel voor hen die moeite hebben met lopen. Een orthese moet direct op de zitplaat of adapterplaat worden geschroefd. Gebruikers die de rolstoel zelf kunnen voortbewegen, sturen en remmen en daarbij de rolstoel onder controle houden, kunnen de rolstoel zonder begeleider gebruiken. Het maximale gebruikersgewicht is 135 kg. Het maximale gebruikersgewicht bestaat uit het gewicht van de gebruiker en het gewicht van de orthese en accessoires. De inhoud van de gebruikershandleiding moet voor ingebruikname van de rolstoel bij de gebruiker bekend zijn.


4 Gebruik van het ortheseonderstel

4.1 Quick release assen

De rolstoel is uitgerust met een quick-release-as op de aandrijfwielen. Om het wiel te verwijderen of bevestigen, drukt u op de knop in het midden van het aandrijfwiel.

Opmerking!

Wanneer de bout van het wiel volledig in de behuizing valt, springt deze knop ongeveer 5 mm uit het wiel. Controleer of het wiel goed vastzit door te controleren of de knop 5 mm naar buiten is gekomen.

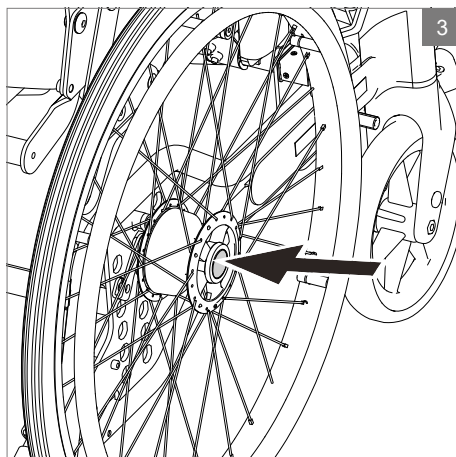

4.2 Duwstang - in hoogte verstelbaar


Aanpassen van de hoogte van de duwstang

- Maak de vergrendelingshendels los **A** en trek of duw de duwstang tegelijkertijd omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte.
- Draai de vergrendelingshendels weer vast.

Verwijderen van de duwstang

Voor extra veiligheid is de duwstang in de hoogste positie voorzien van een klikvergrendeling.

- Om de duwstang te verwijderen, trekt u deze naar de hoogste positie en knijpt in de klikvergrendeling **B**.

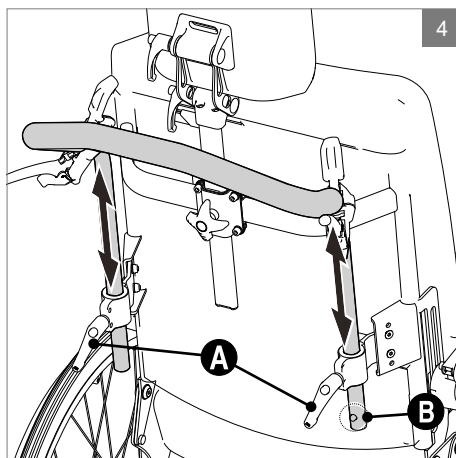

⚠ Waarschuwing!


Oefen geen druk uit op de duwstang wanneer u een stoep op of af gaat. Plaats één voet op de trapdop om de rolstoel te kantelen terwijl u met de duwstang stuurt. Zie “4.14 Op of afgaan van obstakels” on page 17.

4.3 Armsteunen, verwijderen en bevestigen

- De armsteunen kunnen worden verwijderd door ze recht omhoog te tillen.
- Om de armsteunen te bevestigen voert u de procedure omgekeerd uit.

⚠ Waarschuwing!

Wees bij het verwijderen van de armsteun alert op het mogelijke risico dat uw vingers of kleding in het wiel beklemd raken.

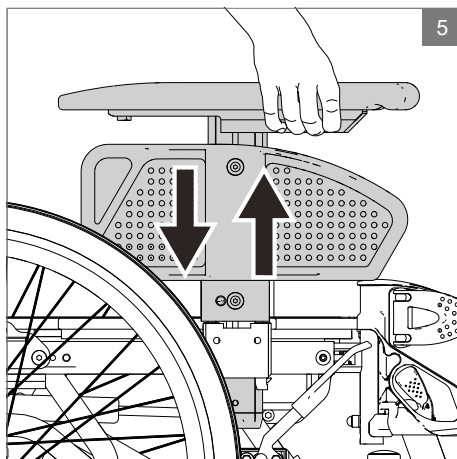



4.4 Naar buiten zwenken/ bevestigen/verwijderen van de beensteunen

De procedure is hetzelfde voor vaste en hoekverstelbare beensteunen.

De beensteunen kunnen naar binnen of buiten worden gezwenkt of worden verwijderd om transport en transfers in/uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteunen kunnen worden ontkoppeld door de hendel **A** naar binnen of buiten te draaien.

Indien gewenst, kan de beensteun volledig worden verwijderd door hem recht omhoog te tillen. Om de beensteun weer terug te plaatsen voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit; de hendel vergrendelt automatisch.

De volledige beensteun kan inclusief bevestigingen worden verwijderd, zie "5.9 Aanpassen van de zitdiepte/lengte bovenbeen door de bevestiging van de beensteun te verplaatsen" op page 27.

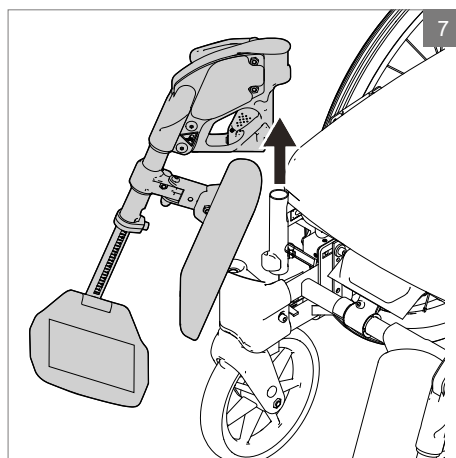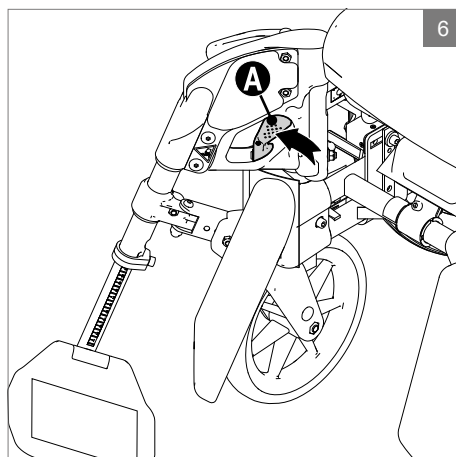

4.5 Aanpassen van de hoek van de beensteun en de kuitondersteuning - Hoekverstelbare beensteun


Aanpassen van de hoek van de beensteun

De beensteunen kunnen afzonderlijk worden aangepast.

- Maak de hendel **A** los
- Verstel naar de gewenste hoek en draai de hendel **A** weer vast

Aanpassen van de kuitondersteuning

De kuitondersteuning **B** kan in diepte en in zijwaartse richting worden aangepast.

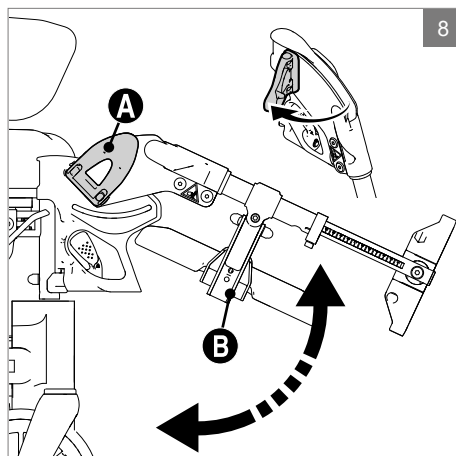

⚠ Waarschuwing!

Gevaar voor beknellen!

4.6 Bevestiging van orthese

Het Cirrus G5 Onderstel kan met behulp van een trapezovormige adapter worden voorzien van een orthese. Plaats de orthese altijd op het juiste zwaartekrachtspunt. De houder wordt met zes schroeven op de zitplaat bevestigd en verbindt de orthese met de basis. Het bovenste deel **B** wordt aan de orthese bevestigd. Om het bovendeel los te maken, beweegt u de rode hendel zijwaarts **A**. Om de orthese vast te maken, laat u het bovenste deel in de houder glijden totdat hij hoorbaar op zijn plaats 'klikt'.

⚠ Waarschuwing

Controleer voordat u de rolstoel gebruikt, altijd of de vergrendeling van de orthese goed functioneert.

De trapezovormige adapter kan alleen goed functioneren als hij op de juiste wijze is bevestigd.


⚠ Opgelet

Gebruik uitsluitend originele, door Sunrise Medical goedgekeurde onderdelen/goedgekeurd bevestigingsmateriaal.

⚠ Waarschuwing

Uitsluitend met een correct aangepaste trapezovormige adapter kan een veilige toepassing worden gegarandeerd.

Voor de stabiliteit en om te voorkomen dat de zitting kantelt, is de juiste aanpassing van het zwaartekrachtspunt erg belangrijk.

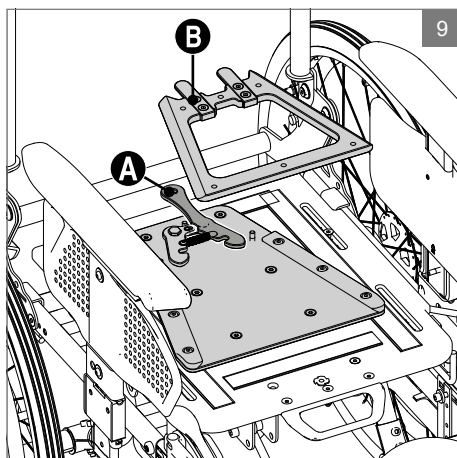


4.7 Adapterplaat

1. Haak lipjes **A** vast onder de tabs **B**.
2. Zet vast met twee schroeven **C** aan beide zijden.

⚠ Waarschuwing!

De adapterplaat kan alleen goed functioneren als hij op de juiste wijze is bevestigd.

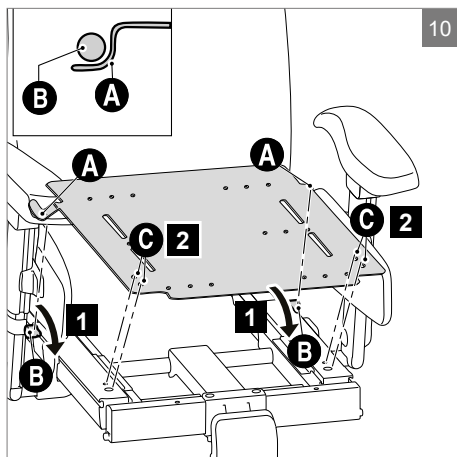


4.8 Gebruik van de remmen

Trek de remhendel naar u toe om de rem in te schakelen.


⚠ Waarschuwing:

De rem is uitsluitend ontworpen om de rolstoel in positie te houden wanneer deze stil staat. De rem mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt als rem tijdens het rijden.

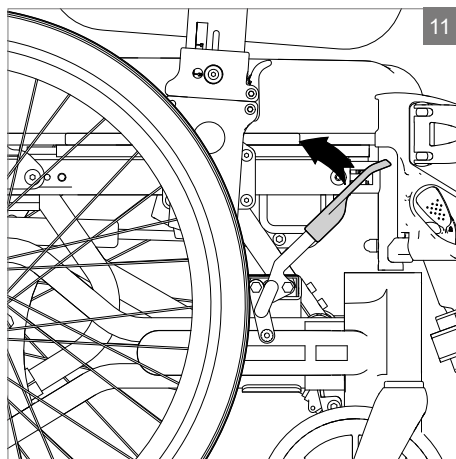

4.9 Gebruik van de begeleidersrem

- Knijp in de remhendel **A** om de snelheid te verminderen.
- Duw de hendel **B** om de parkeerrem te activeren. Knijp in de remhendel **A** om de parkeerrem te ontgrendelen.

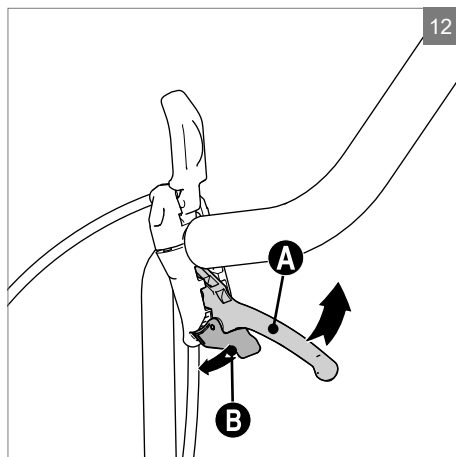

4.10 Trapdop/anti-tip


De anti-tip is standaard zodanig afgesteld dat het mogelijk is om over drempels en dergelijke heen te rijden.

⚠ Waarschuwing

Controleer bij gebruik van de rolstoel altijd of de anti-tip in de correcte positie staat.

De anti-tip wordt in positie gebracht door hem achterwaarts te draaien.

De trapdop is bereikbaar wanneer de anti-tip naar binnen of buiten is gedraaid.

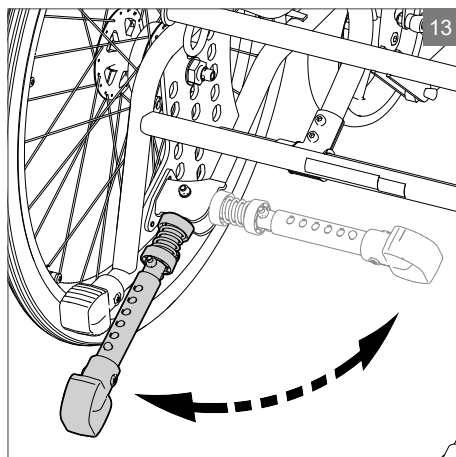

4.11 Wijzigen van de zitpositie door de rugleuning en zithoek aan te passen

- Pas de hoek van de rugleuning aan met de rechter stelhendel.
- Kantel de rolstoel met de rechter stelhendel.



Opmerking!

Voor een veilige aanpassing van de zitpositie moet de begeleider het duwhandvat stevig met één hand vastpakken en de stelhendels met de andere hand bedienen.

⚠ Waarschuwing!

De rolstoel kan instabiel worden wanneer de rugleuning en zitting in de meest naar achteren geplaatste positie worden gekanteld. Wanneer de zitpositie naar achteren wordt versteld, moet de anti-tip worden gebruikt.

Let op dat handen of andere lichaamsdelen niet beklemd raken wanneer de stoel wordt gekanteld.

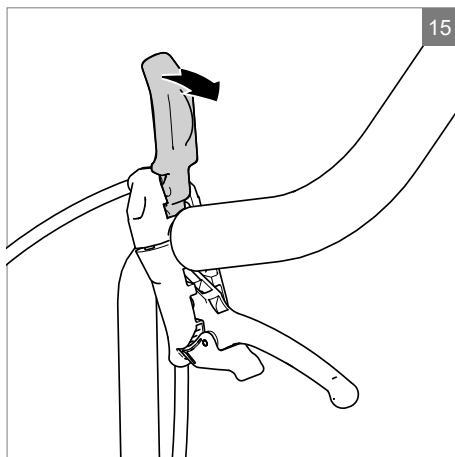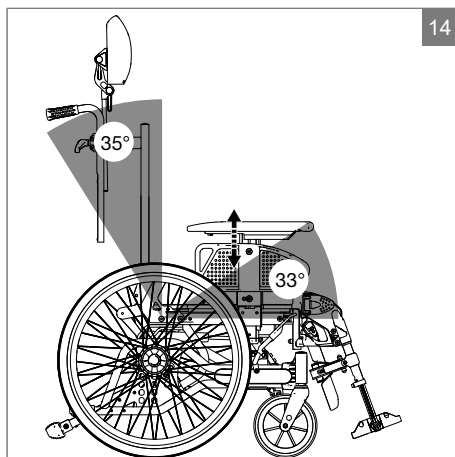

4.12 Verplaatsing in en uit de rolstoel

- Activeer de remmen
- Zwenk de beensteunen naar buiten of verwijder ze.
- Kantel de rolstoel voorwaarts
- De gebruiker kan nu in of uit de rolstoel worden verplaatst door hem/haar handmatig of met een personenlift in of uit de rolstoel te tillen. Wanneer de gebruiker kan staan, kan hij/zij voorwaarts uit de rolstoel komen.

Voor zijwaartse verplaatsing moet de armsteun omhoog worden geklapt of worden verwijderd.



4.13 Op of afgaan van obstakels, trappen

Als de rolstoel wordt opgetild terwijl de gebruiker erin blijft zitten, moeten de aanbevolen tilpunten worden gebruikt. Deze staan op de rolstoel aangegeven.


De kruisstang **A** op de rugleuning en het zitframe **B** vormen de tilpunten.

Om een betere tilpositie te hebben, kunnen begeleiders de zijde waar ze tillen, afwisselen.

⚠ Waarschuwing!

Til de rolstoel niet op aan:

- De armsteunen
- De hoekverstelbare beensteunen
- De bevestigingen van de beensteunen
- De hoekverstelbare duwstang

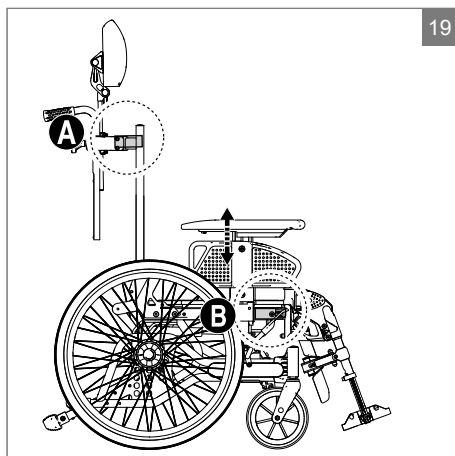

4.14 Op of afgaan van obstakels


Stoepranden

Klap, als het nodig is, de anti-tip omhoog of naar binnen.

Wanneer u een stoep op of af gaat, plaatst u één voet op één van de trapdoppen **A** terwijl u met de duwstang stuurt. Kantel, waar nodig, de rolstoel naar achteren om ruimte te krijgen tussen het obstakel en de beensteunen.

Steil terrein

Wanneer de rolstoel regelmatig in heuvelachtig terrein wordt gebruikt, adviseren we, waar van toepassing, een aparte rem voor de begeleider te installeren.

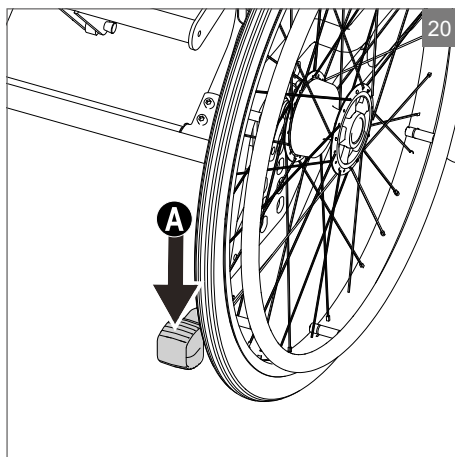

5 Instellingen

Er bestaat geen gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom kunnen rolstoelen van Sunrise Medical worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker.


Daarbij maken we een onderscheid tussen rolstoelinstellingen en opties om de rolstoel aan te passen. Instellingen worden slechts éénmaal uitgevoerd en dit moet door een gekwalificeerde specialist worden gedaan, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven. Aanpassingsopties kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor deze aanpassingen zijn geen gereedschappen nodig.

Voor een overzicht van gereedschappen om instellingen uit te voeren, zie "7.8 Gereedschappen voor aanpassingen" on page 38.

Waarschuwing!

Wijzigingen aan de technische specificaties van de rolstoel zijn niet toegestaan.

Aanpassingen aan de rolstoel of onderdelen daarvan zijn niet toegestaan.

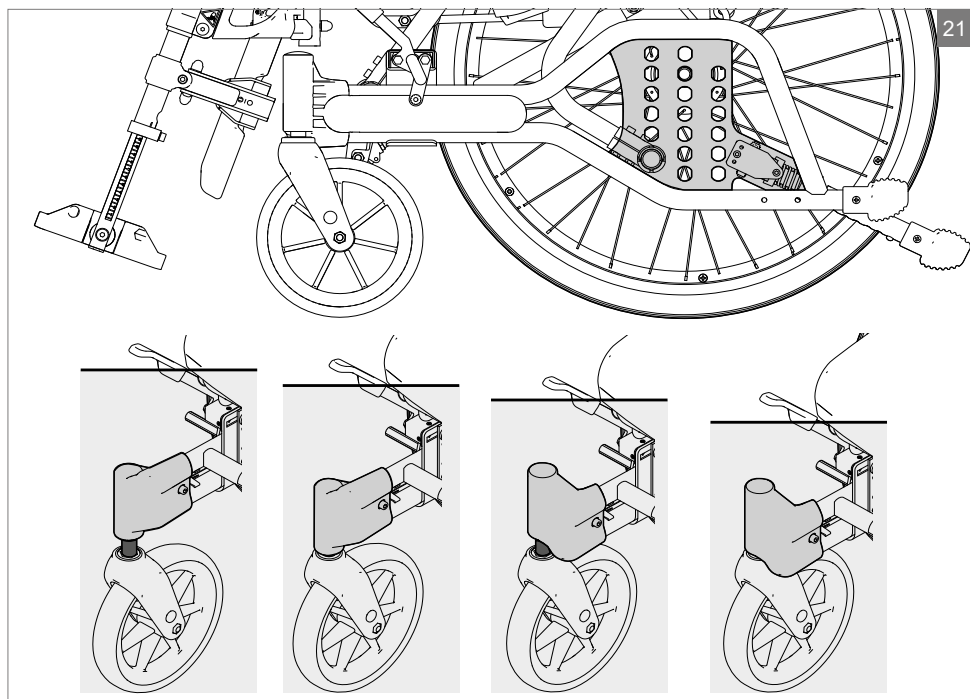

5.1 De zittinghoogte instellen

De zithoogte kan gemakkelijk worden aangepast. De verschillende manieren om de zithoogte aan te passen, zijn van invloed op de mogelijkheid om obstakels te overwinnen en op de rol eigenschappen van de rolstoel.

De gaten in het asplaat geven corresponderende verstelmogelijkheden aan voor de achterwielen. Als er verdere aanpassingen nodig zijn, kunnen andere wielmaten worden gebruikt.

⚠ Waarschuwing!

Pas de Cirrus G5 niet zodanig aan dat u verschillende zithoogtes aan de voor- en achterkant hebt, omdat dit het evenwichtspunt en de rijeigenschappen kan beïnvloeden.

De zithoogte kan per 10 cm (4 hoogtes) worden aangepast zonder dat het noodzakelijk is om de wielen of wielvorken te wijzigen. De kogellager van de vork kan worden omgedraaid en er kunnen pasringen worden toegevoegd voor verschillende hoogtes aan de voorzijde.


Aanpassen van de zithoogte achterzijde en het zwaartepunt

De zithoogte achterzijde kan hoger of lager worden ingesteld door het wiel hoger of lager op het frame te plaatsen.

Als u wilt dat de rolstoel gemakkelijker rijdt, kunt u de aandrijfwielen naar voren verplaatsen.

Als u wilt dat de rolstoel stabiel rijdt en niet zo snel kantelt, kunt u de aandrijfwielen naar achteren verplaatsen.

- Draai de bevestigingsmoer **A** op het wiel enkele malen rond, draai de behuizing **B** 90° en verplaats het wiel naar het gewenste gat.
- Draai de behuizing 90° terug en draai de bevestigingsmoer weer goed vast

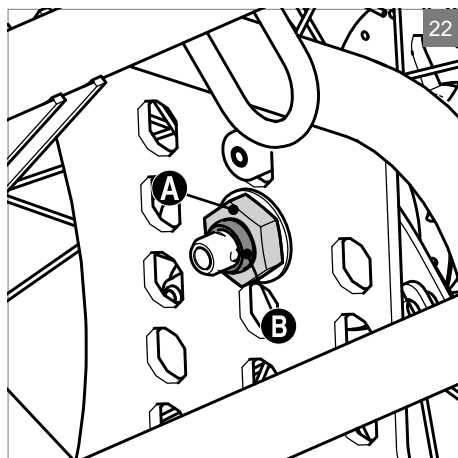


⚠ Waarschuwing!

Vergeet niet de remmen en de anti tip aan te passen nadat u de zithoogte en het zwaartepunt hebt gewijzigd.

Opmerking!

Wanneer u de zithoogte en het zwaartepunt aanpast, moet u beginnen met het aanpassen van de aandrijfwielen, gevolgd door de hoogte van de zwenkwielen.

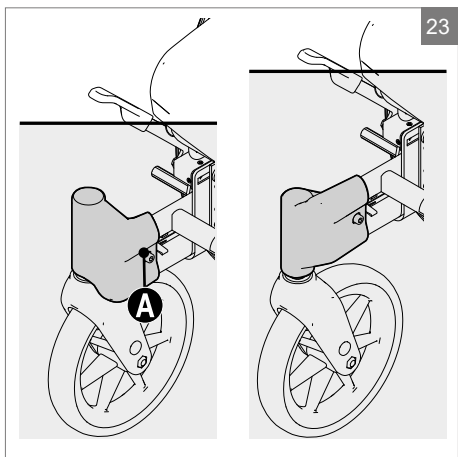


De zithoogte voorzijde aanpassen door de lagerbehuizing te draaien

- Draai de schroef **A** los.
- Haal het wiel en de vork los.
- Draai de lagerbehuizing om.
- Zet het wiel en de vork weer in elkaar.
- Draai de schroef **A** aan.


De zithoogte voorzijde aanpassen door pasringen toe te voegen/te verwijderen



- Haal het wiel en de vork los.
- Voeg pasringen toe of verwijder ze **B**.
- Zet het wiel en de vork weer in elkaar.

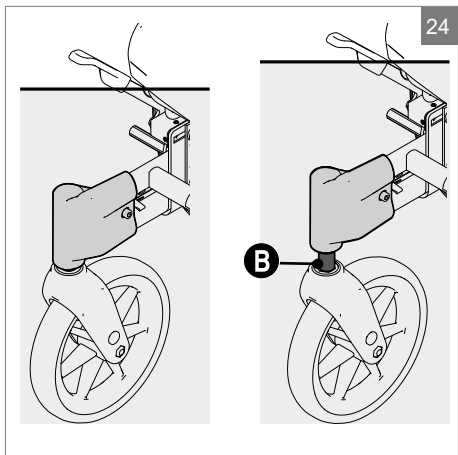

5.2 Matrix zithoogte

Positie achterwiel 20"										Configuratie voorwiel 5", 6", 8"																		25																
										A		B			C			D			E			F			C			D			E			F								
a b c										20"		5"			20"			6"			20"			6"			20"			6"			20"			6"			20"			6"		
1 2 3 4 5 6 7										a b c		a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c					
										1 1 A		2			3 3 3 C			4 4 4 D			5 5 5 E			6 6 F			7 7 G			8 8 H			9 9 I			10 10 J								
Vaste zitting										a b c		a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c			a b c					
Schuif-zitting										1 1 A		2 2 2 B			3 3 3 C			4 4 4 D			5 5 5 E			6 6 F			7 7 G			8 8 H			9 9 I			10 10 J								
375										400		425			450			475			500			525			550			575			600			625								
400										425		450			475			500			525			550			575			600			625			650								
425										450		475			500			525			550			575			600			625			650			675								
450										475		500			525			550			575			600			625			650			675			700								
475										500		525			550			575			600			625			650			675			700			725								
500										525		550			575			600			625			650			675			700			725			750								
525										550		575			600			625			650			675			700			725			750			775								
550										575		600			625			650			675			700			725			750			775			800								

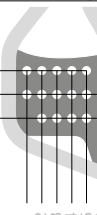Configuratie voor wiel 5", 6", 8"										26			
Positie achterwiel 22"	a b c 	B	C	D	E	F	C	D	E	F			
													
	Vaste zitting	Schuifzitting	22"	5"	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	8"	8"
			a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c
	400												
	425												
	450												
	475												
	500												
	525												
550													

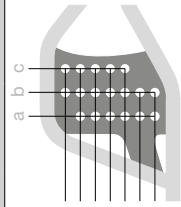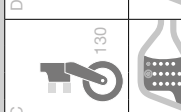Configuratie voorwiel 6", 8"												27"		
Positie achterwiel 24"			C			D			E			F		
														
														
Vaste zitting			24"			6"			24"			6"		
Schuif-zitting			a b c			a b c			a b c			a b c		
425			1			C								
450														
475														
500														
525														
550														
Zithoogte (mm)			a b c			a b c			a b c			a b c		
			1			C								
						</								

Andere manieren op de hoogte voorzijde zitting aan te passen

Het zwenkwiel in de vork in een hogere of lagere positie zetten.

- Door het zwenkwiel in de vork in een hogere positie te zetten, gaat de zitting naar beneden. Door het zwenkwiel in een lagere positie te zetten, gaat de zitting omhoog.

Grotere of kleinere zwenkwielen gebruiken

- Door een kleiner zwenkwiel te gebruiken, gaat de zithoogte omlaag, door een groter zwenkwiel te gebruiken, wordt de zithoogte verhoogd. Een kleiner zwenkwiel levert een kleinere draaicirkel op. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in krappe ruimtes over obstakels heen te rijden. Daarnaast krijgen de benen meer ruimte. Een groter zwenkwiel vergroot de draaicirkel, maar verbetert ook het vermogen om op ongelijke ondergrond over obstakels te rijden.


Een langere of kortere voorvork gebruiken

- Een kortere voorvork verlaagt de zithoogte en levert een kleinere draaicirkel op. Daarmee wordt het gemakkelijker om in krappe ruimtes over obstakels heen te rijden. Ook krijgen de benen meer ruimte. Een langere voorvork vergroot de zithoogte en maakt het mogelijk verschillende zwenkwielen te gebruiken.

5.3 Aanpassen van de remmen

Doorgaans hoeven de met de rolstoel meegeleverde remmen niet te worden aangepast.

- Maak de schroef **A** los.
- Plaats de hele rem in de sleuf naar de gewenste positie.
- De juiste afstand tussen het remblok en het wiel bedraagt ongeveer 5 mm.
- Draai de schroef weer aan.

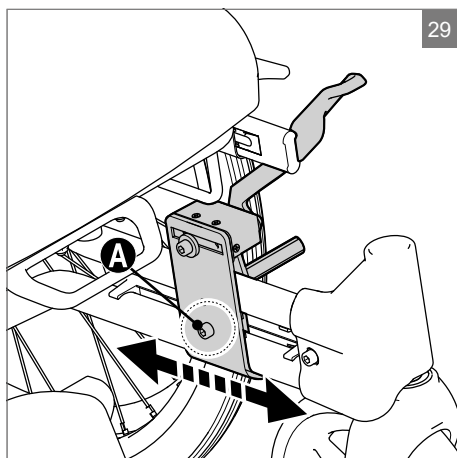

5.4 Aanpassen van de anti-tip

Aanpassing van de anti-tip bij wijziging van het zwaartekrachtspunt van de rolstoel. Vanaf de vloer gemeten mag de afstand naar het uiteinde van de anti-tip max. 35 mm bedragen.



Lengteaanpassing

- Druk op de klikvergrendeling **A**.
- Trek of duw de anti-tip in de juiste positie.

Aanpassing hoek

De anti-tip kan in drie verschillende hoeken worden gezet.

- Maak de schroef **B** los.
- Draai de schroef **C** los. Plaats de schroef **C** naar het gat dat de gewenste hoek oplevert. Draai **B** en **C** weer aan.

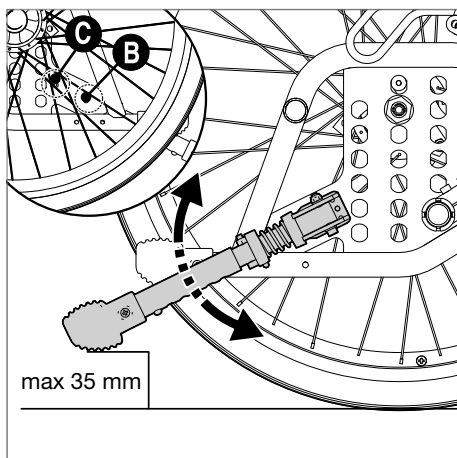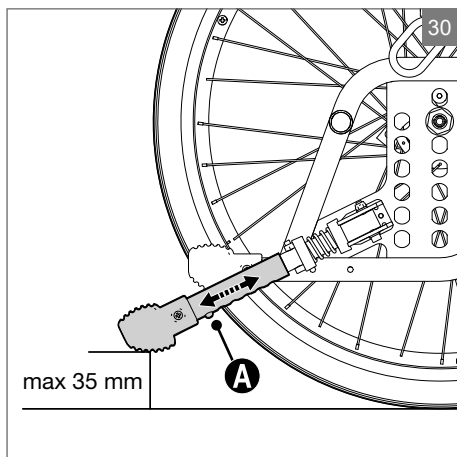

5.5 Aanpassen van de neksteun

Aanpassing diepte en hoek



- Maak de vergrendelingshendels **A** los, doe de aanpassing en draai de vergrendelingshendels weer vast.

Aanpassing hoogte

- Draai de vergrendelingsknop **B** los, doe de neksteun omhoog of omlaag, en draai de vergrendelingsknop weer vast.


Aanpassen van de kromming (alleen bij Comfort hoofdsteen met banden)

- Pas de geïntegreerde banden aan voor laterale ondersteuning en extra diepte-ondersteuning.

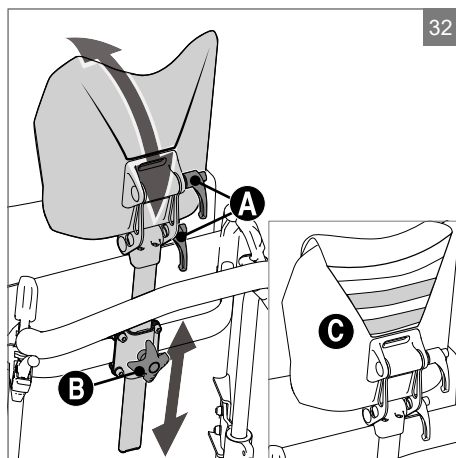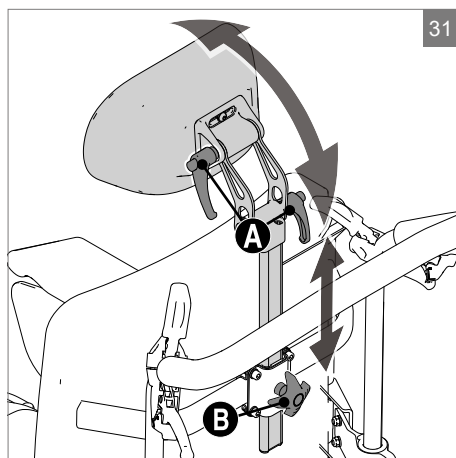


5.6 Aanpassen van de lengte van de beensteunen - Hoekverstelbare beensteunen

- De beensteunen zijn voorzien van een lineaire schaalverdeling **A**, waarmee u de juiste lengte kunt instellen.
- Om de lengte van de beensteunen aan te passen, draait u de schroef **B** los.
- Stel de beensteunen in op de gewenste lengte en draai de schroef weer vast.

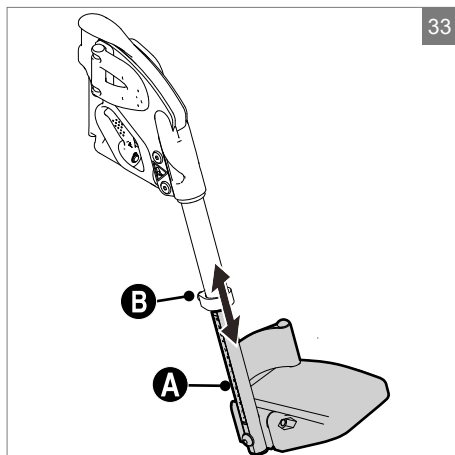


5.7 Aanpassen van de hoek van de vaste beensteunen

- Draai de moer **A** los.
- Trek of duw de beensteun in de gewenste hoek.
- Plaats de bout in het gewenste gat en draai hem aan

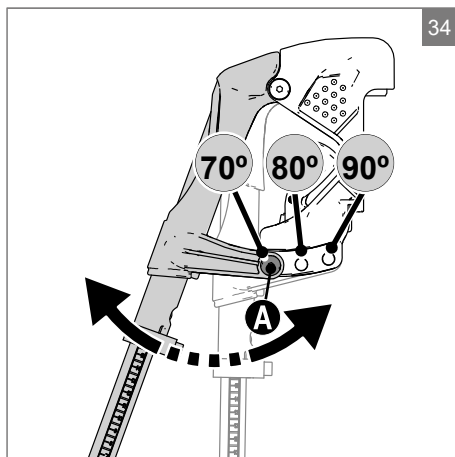

5.8 Voetenplaat - Aanpassing hoek

- Maak de schroef **A** los.
- Verstel naar de gewenste hoek en draai de schroef weer aan.

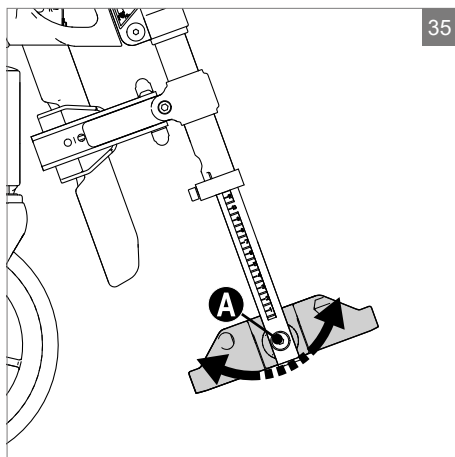

5.9 Aanpassen van de zitdiepte/ lengte bovenbeen door de bevestiging van de beensteun te verplaatsen

De diepte van de bevestiging van de beensteun kan worden aangepast, of de beensteun kan worden verwijderd.


- Draai de schroef **A** met behulp van een 4 mm inbussleutel los.
- Trek of duw de beensteun in de gewenste positie.
- Draai de schroef weer aan.

⚠ Waarschuwing!

De bevestiging van de beensteun mag niet meer dan 8 cm worden uitgetrokken.

Verwijder de bevestiging van de beensteun

- Draai **A** los met behulp van een 4 mm inbussleutel.
- Trek de bevestiging van de beensteun naar buiten.

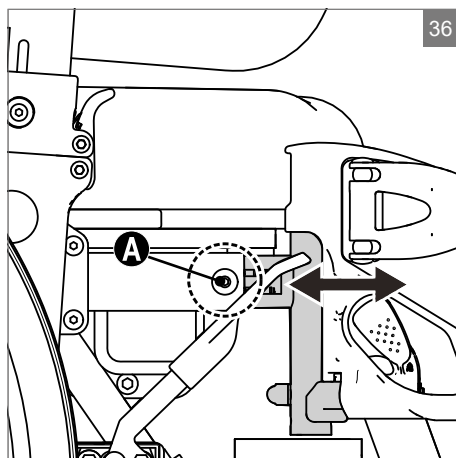

5.10 Aanpassen van de zitdiepte/ het zwaartepunt



In aanvulling op de schuifzitting, kan de zitdiepte in 3 stappen van 30 mm worden aangepast door de bevestigingsbeugels van de rugleuning **B** naar voren of achteren te verplaatsen.

- Maak de bouten **A** aan beide zijden van de rolstoel los. Plaats de beugels in de gewenste positie en draai de bouten weer aan. Er moeten altijd één of twee gaten tussen de bouten open blijven.
- Draai de gasveerbout/moer **C** los en verplaats deze naar het gat dat overeenkomt met de gaten voor de bevestigingsbeugel van de rugleuning.
- Wanneer de voorste positie van de bevestigingsbeugel van de rugleuning wordt gebruikt, moet de bout/moer **C** naar het achterste gat worden verplaatst.

⚠ Waarschuwing!


Een aanpassing van het zwaartepunt kan van invloed zijn op de rijeigenschappen, de balans en het kantelpunt van de rolstoel.

Wees met name voorzichtig wanneer u de rolstoel voor het eerst na een aanpassing weer gebruikt.

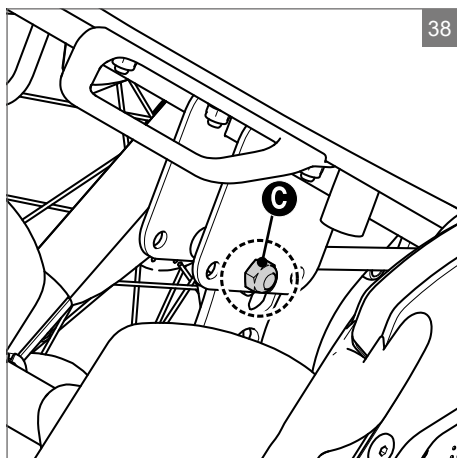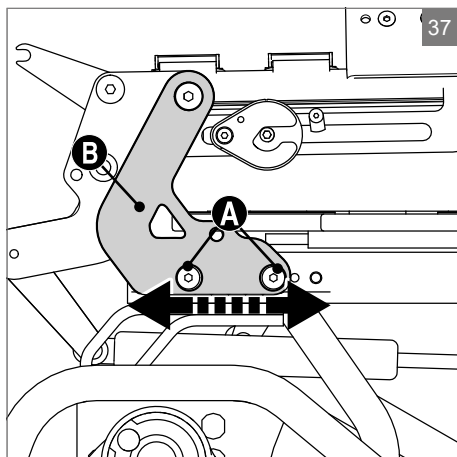

5.11 Aanpassen van de hoogte van de armsteun


- Om de hoogte van de armsteun aan te passen, schroeft u schroef **A** los. Zet de armsteun hoger of lager naar de gewenste positie.
- Kijk naar de schaalverdeling **B** om voor beide armsteunen op dezelfde hoogte uit te komen. Op de schaalverdeling ziet u het aantal centimeters van de zitting naar de bovenkant van de armsteun. Draai de schroef weer aan.

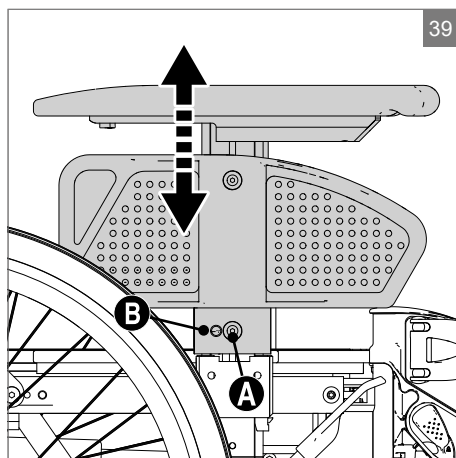

5.12 Hoogte zijschot

Wanneer de armsteun in de gewenste positie is gezet, kan het zijschot worden verplaatst om te voorkomen dat er een opening naar het wiel ontstaat.


- Draai de schroef **C** los en duw het zijschot omhoog of omlaag.
- Draai de schroef weer aan.

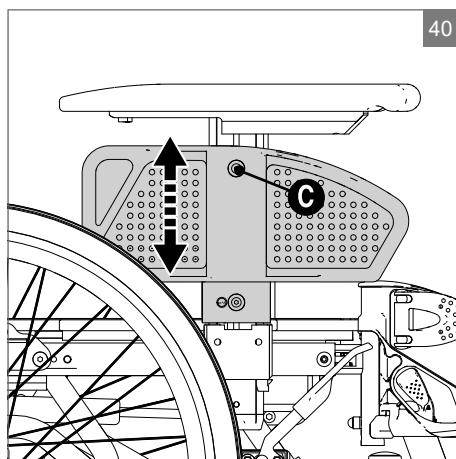

5.13 Aanpassen van de diepte van de armsteunen

Pas de diepte van de armsteunen aan door de kussens van de armsteun naar voren of naar achteren te verplaatsen.

- Draai de schroeven **D** met behulp van een 10 mm steeksleutel los.
- Duw de kussens van de armsteun voorwaarts/achterwaarts naar de gewenste positie en draai de schroeven weer aan.


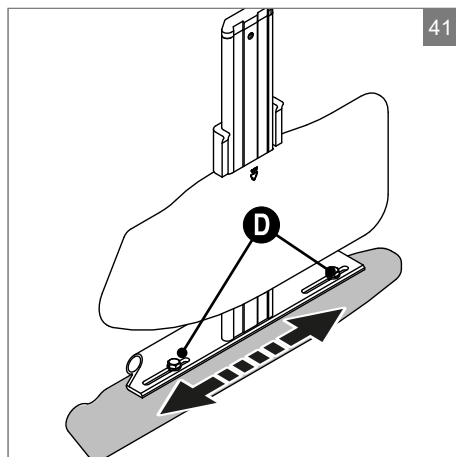


5.14 Bevestigen van de heupgordel (accessoire)


- Bevestig de heupgordel zoals in de tekening wordt getoond.
- Controleer of de heupgordel goed aan de rolstoelgebruiker is aangepast. De gordel moet stevig over de heup liggen in een hoek van ongeveer 45° ten opzichte van de plaats waar hij op de rolstoel is bevestigd.
- Controleer steeds of de gordel schoon is en het vergrendelingsmechanisme goed werkt. De gordel en het vergrendelingsmechanisme kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

⚠ Waarschuwing!

Wanneer de gordel over de heup tegen de zachte huid van de maag wordt geplaatst, kan dit leiden tot een verkeerde zitpositie waarbij de gebruiker in de rolstoel naar voren glijdt.

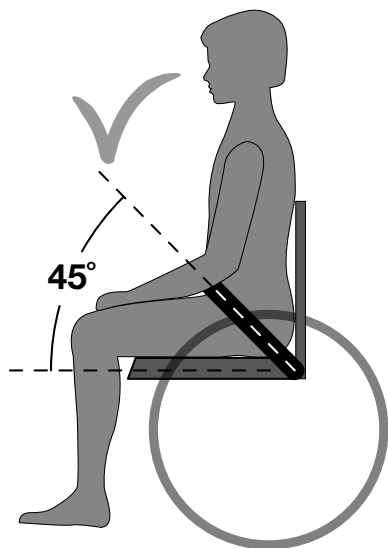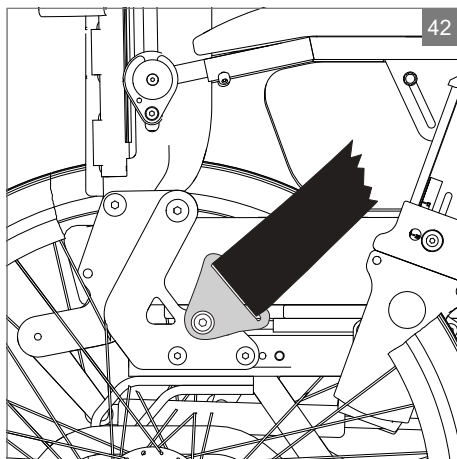

Juiste plaatsing van de gordel

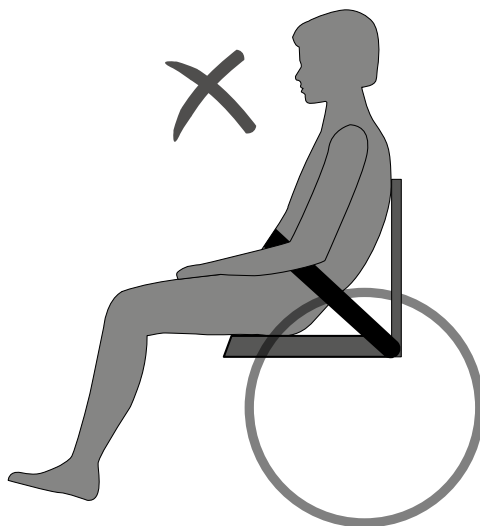

Onjuiste plaatsing van de gordel

6 Vervoer

6.1 Transport zonder persoon in de rolstoel

De rolstoel kan over land en/of door de lucht worden vervoerd.

De delen van de rolstoel die gemakkelijk losgemaakt kunnen worden, moeten voor transport van de rolstoel worden verwijderd.


- Armsteunen
- Beensteunen
- Achterwielen
- Hoofdsteun

Nadat de rolstoel in het voertuig is gezet, moet hij met een volgens ISO 10542 goedgekeurd bevestigingssysteem dat geschikt is voor het gewicht van die bepaalde rolstoel inclusief opties, worden vastgezet.

⚠ Opgelet!

Zorg ervoor dat onderdelen die los kunnen raken, goed vastgemaakt zijn aan uw rolstoel. Of verpak ze afzonderlijk met naamstickers, zodat ze tijdens het laden en lossen niet verloren gaan.

Zie "6.3 De rolstoel als passagiersstoel in een auto" on page 33 voor het gebruik van de Cirrus G5 als passagiersstoel in een gemotoriseerd voertuig.

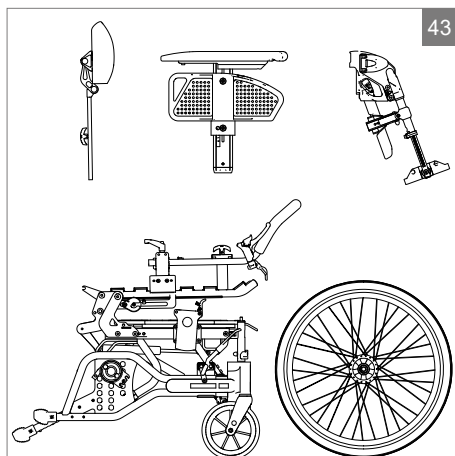

6.2 De rugleuning omhoog of naar beneden vouwen

De rugleuning omlaag vouwen


- Kantel de rolstoel voorwaarts.
- Verwijder de armsteun.
- Maak het klittenband los dat de bedrading bij elkaar houdt.
- Trek de bout **A** eruit en vouw de rugleuning naar beneden


Terugvouwen van de rugleuning

Deze procedure voert u omgekeerd uit om de rugleuning weer omhoog te trekken.

Opgelet!

Plaats de kabels bij het terugvouwen van de rugleuning zoals in de afbeelding wordt getoond.

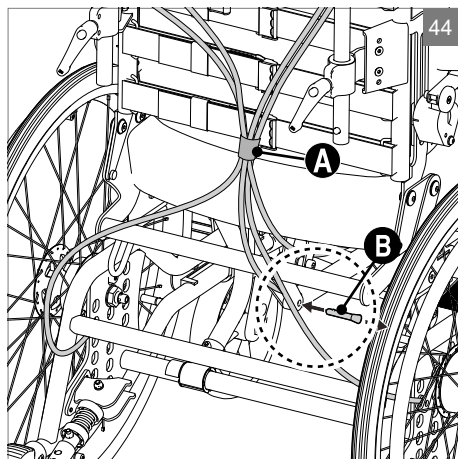

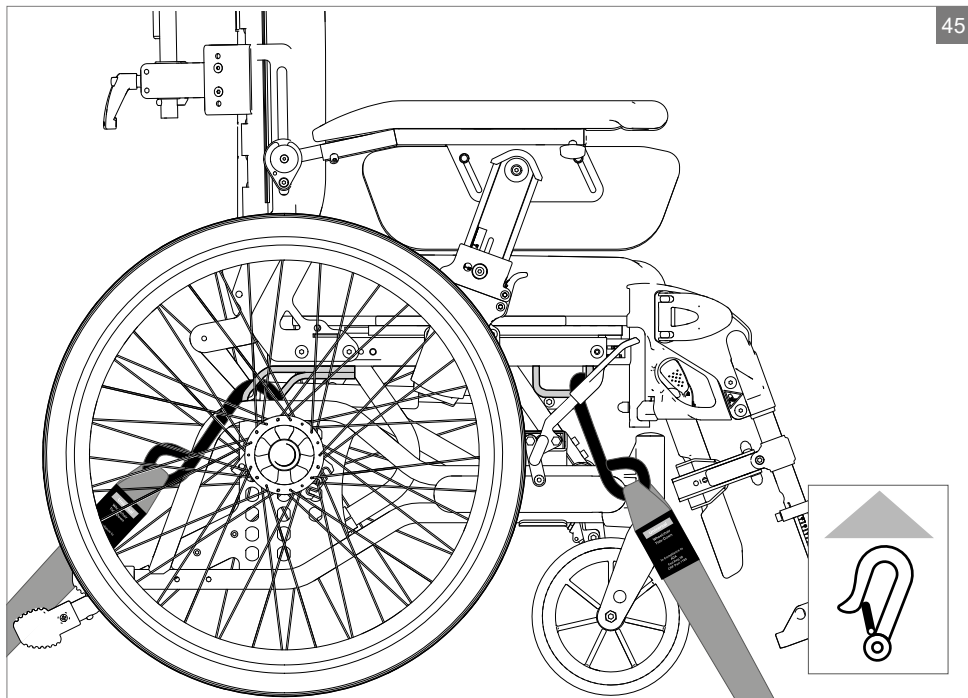

Op de Cirrus G5 zijn vier punten gemarkeerd die gebruikt moeten worden als de rolstoel geborgd wordt.

6.3 De rolstoel als passagiersstoel in een auto

Waar mogelijk, verdient het de voorkeur dat rolstoelgebruikers naar een autostoel worden overgeplaatst en de door de autofabrikant geïnstalleerde gordels gebruiken. De rolstoel kan in dat geval in de laadruimte worden geplaatst, of tijdens de reis in het voertuig worden vastgezet.

De rolstoel kan als passagiersstoel in een auto worden gebruikt en is volgens ISO 7176/19 getest.

Als de rolstoel als passagiersstoel wordt gebruikt, moet hij in voorwaartse richting worden geplaatst (de gebruiker moet naar voren kijken). De rolstoel moet worden vastgezet met het bevestigingssysteem waarvoor hij is getest;



- een 4-puntsbevestigingssysteem. Het systeem is een compleet systeem dat zowel de rolstoel als de gebruiker aan de auto vastzet. Hiervoor moeten in de auto bevestigingsrails worden gemonteerd.
- Veiligheidsgordels voor gebruiker: 3-punts schouder- en heupgordel.

⚠ Waarschuwing!

Sunrise doet afstand van al haar verantwoordelijkheid in het geval dat de Cirrus G5 als passagiersstoel in een auto wordt gebruikt waarbij een ander dan het hierboven genoemde bevestigingssysteem wordt gebruikt.

6.4 Vastmaken van de veiligheidsgordel:

- De heupgordel moet met een steile hoek worden bevestigd; tussen 30° en 75°.
- De schoudergordel wordt over de schouder en borst bevestigd.
- De veiligheidsgordel moet zo strak mogelijk over het lichaam worden bevestigd en mag niet gedraaid zitten.
- Controleer of de gordel niet door onderdelen van de rolstoel, zoals armsteunen en wielen, van het lichaam wordt afgehouden. Zie afbeeldingen 46 en 47 voor de juiste houding.
- De rolstoel mag bij gebruik als passagiersstoel in een auto niet achterwaarts worden gekanteld.

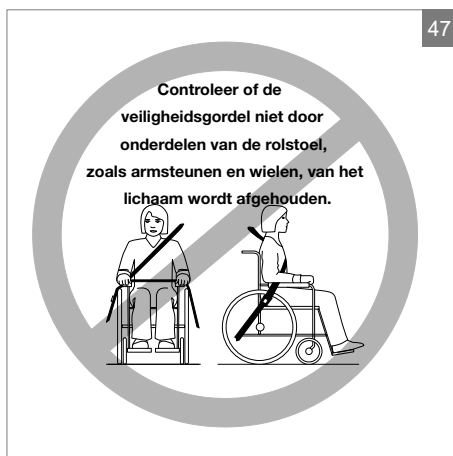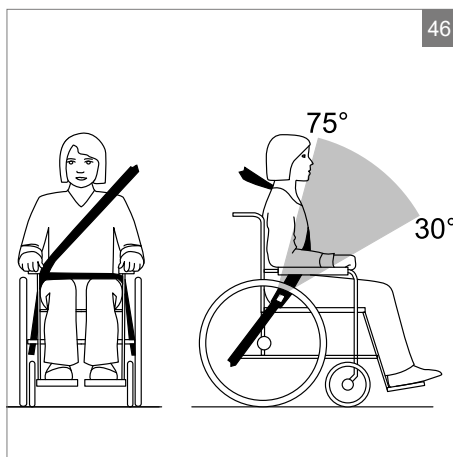

WAARSCHUWING

- a) De rolstoel moet in voorwaartse richting worden geplaatst en vastgezet volgens de instructies van de fabrikant van het bevestigingssysteem.
- b) Deze rolstoel is goedgekeurd voor gebruik in auto's en voldoet aan de vereisten van transport in voorwaartse richting en frontale botsingen. De rolstoel is niet voor andere posities in een voertuig getest.
- c) De rolstoel is dynamisch, in voorwaartse richting geplaatst, getest, waarbij de gebruiker met een schouder- en heupgordel (3-puntsveiligheidsgordels) was vastgezet. Getest volgens ISO 7176-19.
- d) Om het risico op letsel aan hoofd of borst in geval van een botsing met onderdelen van een auto te verkleinen, moeten de heup- en schoudergordel beiden worden gebruikt.
- e) Om het risico op letsel voor de gebruiker te verminderen, moeten werkbladen die op de rolstoel zijn gemonteerd, maar die niet zijn ontworpen met het oog op veiligheid tijdens een botsing:
 - Worden verwijderd en apart in het voertuig worden vastgezet, of aan de rolstoel worden vastgemaakt, maar met energie-absorberend materiaal tussen de tafel en de gebruiker.
- f) Waar mogelijk moeten andere rolstoelaccessoires aan de rolstoel worden vastgemaakt, of van de rolstoel worden verwijderd en tijdens transport elders in de auto worden vastgezet. Dit dient op een zodanige wijze te gebeuren dat ze in geval van een botsing niet los kunnen raken en letsel bij de gebruiker kunnen veroorzaken.
- g) Ondersteunend en positioneringsmateriaal moeten niet als veiligheidsuitrusting/gordels worden beschouwd, tenzij ze volgens de vereisten van ISO 7176/19-2008 zijn gelabeld.
- h) Voordat de rolstoel na een botsing (hoe licht of zwaar dan ook), weer in gebruik wordt genomen, moet deze door een vertegenwoordiger van de fabrikant worden geïnspecteerd.

- i) Er mag niets worden gewijzigd aan of vervangen van de constructieve elementen of delen van het frame, of aan de verankeringspunten/bevestigingspunten op de rolstoel voor vervoer in een auto, zonder voorafgaand overleg met de fabrikant.

7 Onderhoud

Het onderhoud dat in dit hoofdstuk wordt beschreven, kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Overig onderhoud moet door gekwalificeerd personeel bij uw lokale leverancier, of bij de zorgwinkel worden uitgevoerd. Voor meer informatie over reparaties en onderhoud, kunt u contact opnemen met de zorgwinkel in uw gebied.

7.1 Reinigen van het frame

Het frame moet regelmatig met water en een milde zeep worden gereinigd. Als het frame erg vies is, kan een schuurmiddel worden gebruikt. Indien noodzakelijk, kan het frame worden afgespoeld met een hogedrukspuit. Richt daarbij niet rechtstreeks op de kogellagers. Droog de rolstoel na het reinigen, of wanneer hij buiten in de regen is gebruikt, zorgvuldig af. Als u een schuurmiddel hebt gebruikt, moet u daarna alle bewegende delen smeren.

7.2 Reinigen van de zitting en de hoezen van de rugleuning

De hoezen kunnen in de wasmachine op 60 °C worden gewassen. Zie ook de wasinstructies op de verschillende stoffen. Gebruik om te desinfecteren een goedgekeurd chemisch desinfecterend middel. Desinfecteer niet door middel van warmtebehandeling.

7.3 Omstandigheden waardoor de rolstoel kan beschadigen

De rolstoel moet niet worden gebruikt bij temperaturen beneden -35 °C of boven 60°. Er zijn geen vereisten gespecificeerd in verband met vochtigheid en luchtdruk. Er zijn geen andere vereisten gespecificeerd voor opslag.

7.4 Schroeven en moeren

Schroeven en moeren kunnen in de loop der tijd los raken. Vergeet daarom niet om deze regelmatig te controleren en indien nodig, weer vast te draaien. Er kan eventueel een borgmiddel als Blue Locktite (nr. 243) worden gebruikt. Als een borgmoer werd verwijderd, verliest hij iets van zijn zekerende eigenschappen en moet worden vervangen.

7.5 Gereedschappen voor service en aandrijfwielen

De aandrijfwielen zijn voorzien van spaken. Deze moeten worden gesteld als ze los raken. Vraag een plaatselijke fietshandel of de dichtstbijzijnde zorgwinkel.

7.6 Quick-release-as van de wielen

Quick-release-as van de wielen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Controleer of de kogellagers naar tevredenheid functioneren. De as en de kogellagers moeten regelmatig worden schoongemaakt en met olie worden gesmeerd.

7.7 Aanbevolen luchtdruk

De rolstoel kan met massieve of luchtwielen worden geleverd.

Zoek het juiste type en de juiste maat aandrijf wiel of zwenkwiel, en lees vervolgens de aanbevolen maximum luchtdruk uit de tabel af. NB: een hard opgeblazen band laat de rolstoel gemakkelijker rollen, terwijl een lagere luchtdruk een zachtere rijervaring biedt.

Voor een optimale rijervaring moet de luchtdruk regelmatig worden gecontroleerd.

	kPa	Bar	PSI
Aandrijfwielen, luchtbanden	350	3,5	50
Aandrijfwielen, hoge druk	630	6,3	90
Zwenkwiel, 6" luchtbanden	250	2,5	35
Zwenkwiel, 8" luchtbanden	250	2,5	36

7.8 Gereedschappen voor aanpassingen

Aanpassing van:	Gereedschap:
Remmen	Inbussleutel 5 mm
Anti-tip	Inbussleutel 4 mm
Lengte onderbeen	Inbussleutel 5 mm
Hoek vaste beensteun	Inbussleutel 4 mm
Voetenplaten	Inbussleutel 5 mm
Hoogte armsteun	Inbussleutel 4 mm
Diepte armsteun	Inbussleutel 4 mm
Zitdiepte	Inbussleutel 5 mm, Steeksleutel 13 mm
Zithoogte voorzijde	Inbussleutel 5 mm
Positie aandrijfwielen	Steeksleutel 24 mm

7.9 Na 6 maanden controleren, daarna jaarlijks

- Controleer of de rem correct werkt. Pas, indien nodig, aan
- Controleer of de banden in goede conditie zijn, zonder schade aan de zijkanalen
- Controleer of de rolstoel schoon is en of alle bewegende delen correct functioneren
- Controleer of er geen speling zit in de wielvork van het zwenkwiel aan de voorzijde
Pas, indien nodig, aan De as moet vrij kunnen ronddraaien, maar er mag geen speling zijn in een opwaartse/neerwaartse richting
- Controleer het frame en de wielbevestigingen op defecten en scheuren
- Controleer en pas, indien nodig, alle geschroefde verbindingen aan
- Controleer alle kabels visueel op beschadigingen
- Controleer of de kantelfunctie en rugleuning correct functioneren Pas, indien nodig, aan

7.10 Reparaties

Los van kleine reparaties aan de lak, wisselen van (binnen)banden, en verstellen van de remmen, moeten alle reparaties door gekwalificeerd personeel bij uw lokale leverancier, of bij de zorgwinkel worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over reparaties en onderhoud, kunt u contact opnemen met de zorgwinkel in uw gebied.

7.11 Langetermijnopslag (langer dan vier maanden)


- Binnenshuis in een koele, droge plaats opbergen
- Tijdens de opslagperiode mag de omgevingstemperatuur niet lager dan -20°C of hoger dan +65°C zijn.
- Aanbevolen vochtigheid: 15% - 93%.
- Geen beperkingen op luchtdruk.

7.12 Wisselen van opgepompte banden

Opgepompte banden zijn accessoires.

Verwijderen van de band

- Neem het wiel af, laat de band leeglopen door de kleine pin in het ventiel in te drukken, of door het ventiel volledig los te schroeven
- Controleer of de rand van de band goed naar beneden zit aan de binnenzijde van de velg **A**
- Buig de rand van de band over de rand van de velg. Gebruik eventueel een speciale bandenlichter **B**. Let goed op dat de binnenband niet tussen de bandenlichter en de rand van de velg beklemd raakt.

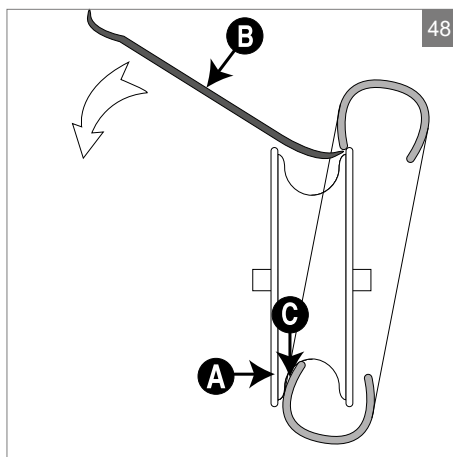

Bevestigen van de band

- Plaats de binnenband in de nieuwe band en smeer op de rand van de band **C** iets om de weerstand te verminderen (talkpoeder, zeep)
- Controleer of de rand van de band aan één kant van de velg goed binnen in de velg zit. Buig de rand van de band over de rand. Let goed op dat de binnenband niet beklemd raakt.
- Pomp de band op tot de juiste spanning en bevestig het wiel weer op de rolstoel.

8 Technische specificaties en afmetingen

CE SUNRISE MEDICAL verklaart als fabrikant dat dit product voldoet aan de EU-verordening Medische hulpmiddelen (2017/745).

De rolstoel wordt standaard afgeleverd in verschillende zithoogtes en zitbreedtes. De hoogte die het best past bij de gebruiker hangt van twee factoren af: De lengte van de gebruiker en hoe de rolstoel wordt gebruikt. Vraag uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecenter als u niet zeker weet of u de juiste hoogte en breedte hebt. (Tenzij anders aangegeven, zijn afmetingen in millimeter gespecificeerd.

Gegeven afmetingen kunnen +/- 10 mm variëren.)

Breedte zitsysteem	390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾
Zitdiepte	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm schuivend zitsysteem)
Hoogte zitting (zonder kussen)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm inclusief rails zitsysteem)
Hoogte rugleuning	550, 650 mm
Totale hoogte	1100 mm
Totale breedte (met trommelrem)	Breedte zitsysteem + 24 cm
Totale lengte	1150 mm
Hoogte voor transport	945 mm
Breedte voor transport	595 (Breedte zitting 390)
Lengte voor transport	850 mm
Gewicht voor transport	30.3 kg (Breedte zitting 540)
Max. helling voor parkeerremmen	7°
Gewicht van de rolstoel	48 kg (Breedte zitting 540)
Max. gebruikersgewicht	135 kg
Ontbrandbaarheid	Stoffen materialen zijn getest en goedgekeurd volgens: NS-EN 1021-2:2006 Ontbrandingsbron: Lucifervlam of gelijkwaardig

1) De rolstoel met zitbreedte 540 mm overschrijdt de maximum afmetingen voor toegang tot openbare ruimtes en is mogelijk niet geschikt voor transport in openbaar vervoer, zoals treinen en bussen, of om toegang te krijgen tot openbare faciliteiten zoals toiletten.

8.1 Levensduur

De rolstoel en de meeste bevestigingen zijn vervaardigd uit staal, een speciale aluminiumlegering en plastic. De rugleuning en zithoezen zijn gemaakt van vlamvertragende materialen. De rolstoel kan naar keuze worden geleverd met massieve/luchtbanden voor de zwenkwielen en aandrijfwielen.

Onder normale omstandigheden en wanneer onderhoud volgens voorschriften wordt uitgevoerd, is de verwachte levensduur van de rolstoel ongeveer zeven jaar.

8.2 Afvalverwerking

Afval van verpakkingsmateriaal en onderdelen van de rolstoel, en ook de rolstoel zelf, kunnen als gewoon afval worden behandeld. De hoofdbestanddelen van de rolstoel zijn staal, aluminium en plastic, materialen die geschikt zijn voor recycling. Het plastic en karton van de verpakking kan worden gerecycled.

9 Markeringen op de rolstoel

Opmerking!

De markeringen, symbolen en instructies die op de rolstoel zijn bevestigd, mogen nooit worden verwijderd of afgedekt. Deze veiligheidskenmerken moeten tijdens de hele levensduur van de rolstoel aanwezig en duidelijk leesbaar zijn. Markeringen, symbolen of instructies die onleesbaar of beschadigd zijn, moeten direct worden vervangen of gerepareerd. Neem contact op met uw dealer als u hulp nodig hebt

- A. Productnaam
- B. Sticker

Breezy Cirrus G5	Productnaam
	Maximale veilige helling indien anti-tip aanwezig. Hangt af van instellingen van de rolstoel en lichaamspostuur en fysieke capaciteiten van de gebruiker.
	Breedte zitsysteem
	Diepte (maximaal)
	Maximale belasting
	CE-keurmerk
	Gebruikershandleiding
	Crashtest uitgevoerd
	Productiedatum
	Serienummer
	Dit symbool betekent Medisch apparaat

- C. Markering voor tilpunten
- D. Let op beklemming
- E. Verankeringspunten auto

A

CIRRUS G5

B

SUNRISE
MEDICAL

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch Germany

yyyy.mm.dd

TYPE:
Cirrus G5 Base

Manual Wheelchair



:XXXXXXXXXXXXXX

XXX kg

X"

XX cm

XX cm

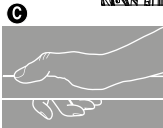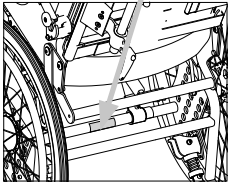

10 Garantie

DEZE GARANTIE DOET OP GEEN ENKELE WIJZE AFBREUK AAN UW RECHTEN.

Sunrise Medical* biedt haar klanten een garantie op rolstoelen, zoals bepaald in de garantievoorwaarden die het onderstaande dekken.

Garantievoorwaarden:

1. Indien een onderdeel of onderdelen van de rolstoel binnen 24 maanden gerepareerd of vervangen moet(en) worden als gevolg van een fabricagefout en/of gebrek in het materiaal, of voor het frame en vouwframe binnen 5 jaar na levering aan de klant, wordt het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen kosteloos gerepareerd of vervangen. De garantie geldt slechts voor fabricagefouten.
2. Om de garantie ten uitvoer te brengen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sunrise Medical met de exacte gegevens over het probleem. Indien u de rolstoel gebruikt buiten het gebied dat wordt gedekt door de klantenservice van Sunrise Medical, wordt de reparatie of vervanging uitgevoerd door een ander servicepunt welke door de fabrikant wordt aangewezen. De rolstoel moet worden gerepareerd door een door Sunrise Medical aangewezen servicepunt (dealer).
3. Voor onderdelen die binnen het bereik van deze garantiebepalingen zijn gerepareerd of vervangen, bieden we een garantie in overeenstemming met deze garantievoorwaarden voor de resterende garantieperiode voor de rolstoel in overeenstemming met punt 1.
4. Voor originele reserveonderdelen die op kosten van de klant zijn gemonteerd, geldt een garantieperiode van 12 maanden (na montage) in overeenstemming met deze garantiebepalingen.
5. Vorderingen op basis van deze garantie kunnen niet worden gedaan indien een reparatie of vervanging van een rolstoel of een onderdeel daarvan noodzakelijk is vanwege de onderstaande redenen:
 - a. Voor normale slijtage, zoals accu's, armleuningen, bekleding, banden, remschoenen, etc.
 - b. Bij overbelasting van het product; zie het EC-etiket voor het maximale gebruikersgewicht.
 - c. Het product of onderdeel is niet onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding en/of de onderhoudsinstructies.
 - d. Er zijn accessoires gebruikt die niet gespecificeerd zijn als originele onderdelen.
 - e. De rolstoel of het onderdeel is beschadigd door nalatigheid, ongeval of onjuist gebruik.
 - f. Er zijn veranderingen/wijzigingen aangebracht aan de rolstoel of onderdelen die afwijken van de specificaties van de fabrikant.
 - g. Reparaties zijn uitgevoerd voordat onze Klantenservice is geïnformeerd over de omstandigheden.
6. Deze garantie wordt beheerst door het recht van het land waarin het product van Sunrise Medical* werd aangekocht.

* Dit betekent de Sunrise Medical faciliteit waarvan het product werd aangekocht.

11 Accessoires

Aandrijf wiel en bevestiging aandrijf wiel

- Aandrijfwielen zijn in uiteenlopende maten en types verkrijgbaar: massief, hogedruk en luchtgevuld
- Hoepel
- Hoes
- Spaakbeschermers
- Aandrijfwielen 20", 22" en 24" met rem voor begeleider
- Transportwielen 16" met rem voor begeleider

Zwenkwiel en bevestiging zwenkwiel

- Zwenkwielen zijn er in uiteenlopende maten en types: massief en luchtgevuld
- Wielvork zwenkwiel in diverse maten

Beenondersteuning

- Diverse beensteunen en voetplaten
- Beensteunen met 70° en 90° hanger
- Amputatiesteun

Hoofdsteunen

Diverse hoofdsteunen

Armsteunen en zijschotten

- Hemiplegische armsteunen

Verschillende accessoires

- Krukkenhouder
- Tafel
- Diverse zitkussens
- Positioneringsgordel

Montage-instructies worden bij de accessoires meegeleverd.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde vestiging van Sunrise Medical of zorgwinkel voor accessoires en reserveonderdelen.

12 Bijkomende Informatie

Opmerking:

Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: Als dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan Sunrise Medical en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.

Built-4-Me speciale aanpassingen

Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld.

Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen

Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties op www.Sunrisemedical.nl Alle op de lijst vermelde combinaties zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en prestatievereisten, Artikel 14.1 van de EU-verordening voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

