

JAY®GS Pute



Viktig kundeinformasjon


MERK: Denne bruksanvisningen inneholder viktige instruksjoner som må gis til brukeren av dette produktet. Bruksanvisningen må ikke fjernes før produktet leveres til sluttbrukeren.



LEVERANDØR: Denne bruksanvisningen må gis til brukeren av dette produktet.

BRUKER: Les igjennom hele bruksanvisningen før du bruker dette produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

REGISTRERING AV GARANTI: For å aktivere garantien for dette produktet, fyll ut og send inn postkortet som er festet til brukerveiledningen og garantiheftet.

Brukerveiledning

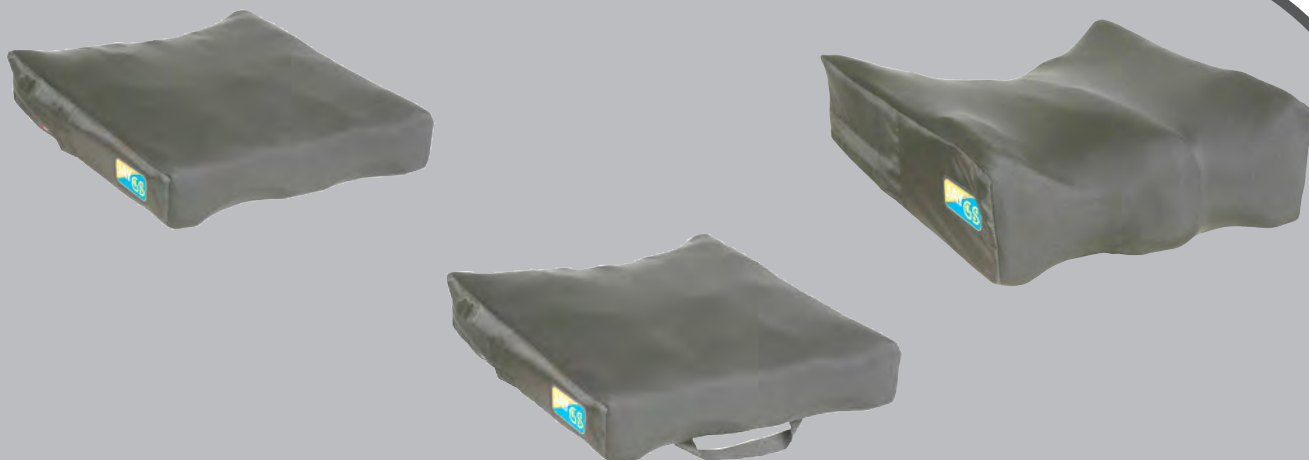

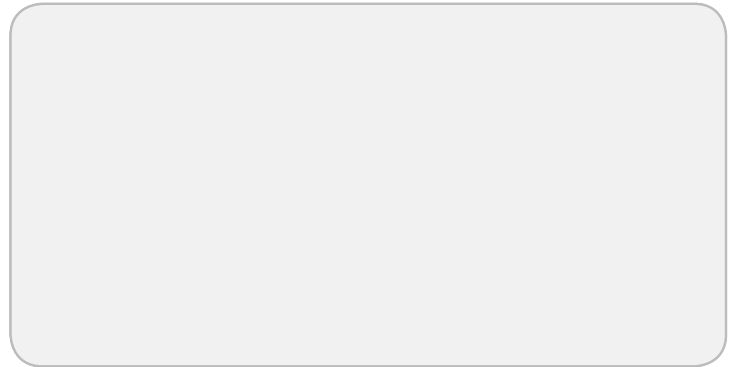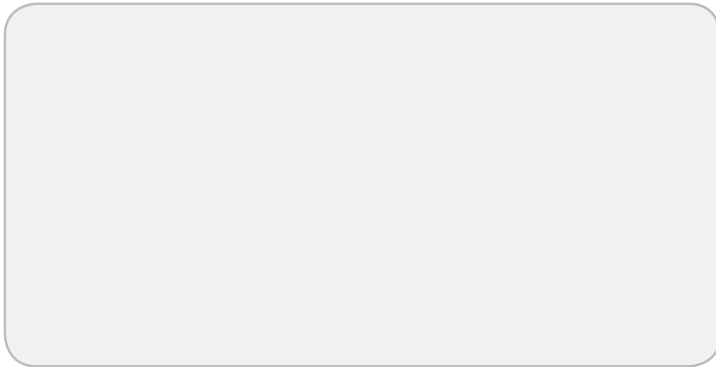

NORSK



70

ADVARSLER

70

MONTERING / JUSTERING

71

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING

74

RENGJØRINGSDIAGRAM

75

SETTE SAMMEN PUTEN


76

GARANTI

77

ANDRE JAY-PRODUKTER

77

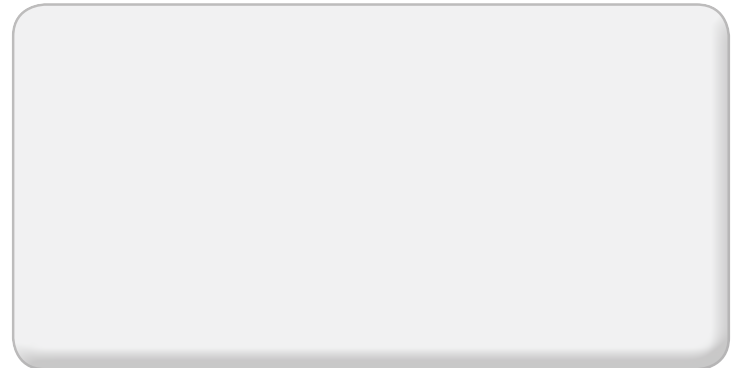

MERK:

Kontroller at ingen av delene har blitt skadet under transport. IKKE bruk produktet hvis det er tegn til skade. Ta kontakt med Sunrise Medical eller leverandøren din for ytterligere instruksjoner.

Sunrise Medical anbefaler at du rådfører deg med en lege eller en terapeut som har erfaring med puter og sittebehov, for å vurdere om en JAY GS-pute er egnet for ditt bruk.

Puter skal kun monteres av:

- en autorisert Sunrise Medical-forhandler
- en kvalifisert terapeut/lege som har mottatt riktig opplæring enten av Sunrise Medical eller våre godkjente partnere.

! GENERELLE ADVARSLER

- IKKE monter denne puten før du har lest igjennom og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen. Hvis du ikke forstår advarslene eller instruksjonene i denne bruksanvisningen, ta kontakt med en kvalifisert terapeut, lege, HMS eller leverandør, for å unngå fare for personskade og produktskade.
- Borrelåsene med hekter og løkker må ikke være fuktige over lengre perioder, da dette kan løse opp limet slik at de ikke virker som de skal.

INNLEDNING

JAY GS vokse- og sittestillingspute er utviklet for å gi komfortabel støtte, og samtidig tilfredsstillende de stadig endrede behovene som voksende brukere har.

Les disse instruksjonene nøye og oppbevar heftet for fremtidig referanse for å sikre riktig bruk av puten.

Maksimal brukervekt:

- 150 kg for alle størrelser.

! ADVARSEL

- Rullestolens tyngdepunkt kan påvirkes når det monteres en pute i stolen. Dette kan gjøre at stolen tipper bakover som kan forårsake eventuelle personskader. Du bør derfor alltid vurdere bruk av tippesikringer eller amputasjonsbraketter på rullestolen for å øke dens stabilitet.
- Før du skal sitte over en lengre periode, må du først prøve puten i et par timer mens en terapeut undersøker huden din, for å kontrollere at du ikke får røde trykkmerker. Du må kontrollere huden din daglig for røde merker. Røde trykkmerker er et klinisk tegn på begynnende trykksår. Hvis huden blir rød, slutt å bruke puten umiddelbart og ta kontakt med terapeuten eller legen din.
- JAY GS-puten er utviklet for å redusere faren for trykksår. Ingen puter kan derimot gi fullstendig trykkavlastning eller forhindre trykksår.

! ADVARSEL

- La aldri puten ligge utendørs om natten i temperaturer under 5 °C. La puten ha romtemperatur før du setter deg på den. Huden kan skades dersom du sitter på svært varme eller kalde overflater.
- La aldri skarpe gjenstander eller åpen ild komme i kontakt med puten.
- **HINDRINGER: Plasser ALDRI** materiale (kladder, løfteseler og lignende) mellom brukeren og puten, da dette vil redusere putens funksjon.
- **KORREKT PLASSERING AV PUTEN:** Puten må brukes med riktig side opp. Hvis trekket ikke brukes på riktige måte eller det er av feil størrelse, kan dette redusere eller eliminere putens funksjon samt øke faren for trykksår.

TILPASSING AV GS-PUTEN

Legg puten på setet i rullestolen.

MERK:

En fast underlagsstøtte, som f.eks. Jay justerbart fast sete eller fast seteinnlegg anbefales.

Ved bruk av en rygg med justerbar dybde i rullestolen, f.eks. JAY J3-rygg, skal den bakre delen av puten plasseres jevnt med den fremre delen på ryggørene.

Ved bruk av rygg med fast dybde, skal det lages innsnitt i de bakre hjørnene på putebasen, for å sikre at setedybden er 2,5 cm fra knehasene (se merkene på underlaget).

På denne måten kan den bakre delen på puten plasseres mellom ryggørene.

Plasser brukeren på puten slik at sitteknutene synker ned midt i oljemassen, mens lårene hviler komfortabelt på den fremre delen.

Bruk Jay GS-trykkavlastende oljepad for å oppnå så lavt gjennomsnittlig sittetrykk som mulig.

I tillegg bør benstøttene justeres lavt nok til at lårene hviler komfortabelt mot fremre delen av puten.

Puten skal være mellom 0 - 2,5 cm fra knehasene.

Vurder brukerens sittestilling.


- Er hoftene i plan?
- Er bena godt plassert?
- Er brukeren komfortabel?

Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er «nei», se avsnittet Tilbehør i dette heftet.

HVORDAN JAY GS-PUTEN «VOKSER»

JAY GS-puten vokser med barnet ved å plassere puten lengre fram på underlaget og opprettholde korrekt putelengde, evt med lårstøtte. Sitteknutene skal alltid synke ned midt i oljemassen!

JAY GS-puten vist sammen med andre deler i Vokse- og sittesystemet.

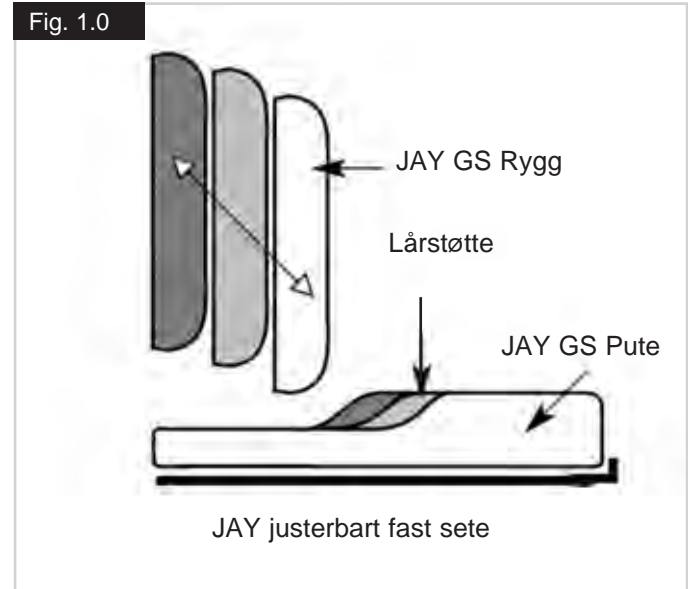

Etter hvert som brukeren vokser, forblir området under sitteknutene omtrent det samme, mens området under lårene forlenges bakover.

Lårstøtten (se Fig. 1.0) vil gi bedre støtte for bena, samtidig som den forhindrer at brukeren glir forover i setet.

FORLENGELSE AV PUTEN MED EN DYBDEJUSTERBAR RYGG I RULLESTOLEN

Begynn med å plassere brukeren foran på puten, med ryggen justert forover fra ryggørene. Etter hvert som brukeren vokser, justeres ryggstøtten bakover mot ryggørene. Dette gjør at brukeren kan sitte lengre bak i sittegropen, samtidig som korrekt setedybde opprettholdes.

En lårstøtte kan monteres foran sitteknutene, slik at sittegropen tilpasses og støtten for bena optimaliseres. Sitteknutene skal være mellom 2,5 til 5 cm bak fremre kant på sittegropen. Det følger én lårstøtte med puten. Flere kan bestilles ved behov.

Puten «vokser» med 2,5 cm hver gang en lårstøtte monteres.* Når ryggen er justert så langt bakover som mulig, kan puten flyttes forover for å forlenge den ytterligere. Den fremre kanten på GS-puten kan plasseres inntil 5 cm foran kanten på setetrekket, og fortsatt være stabil.

Bruk av JAY justerbart fast sete anbefales når GS-puten forlenges på denne måten. Dette gjør at puten lett kan plasseres i ønsket stilling på nytt etter at den er tatt ut av rullestolen.

FORLENGELSE AV PUTEN MED EN FASTMONTERT RYGG I RULLESTOLEN

Kutt de bakre hjørnene på GS-puten, slik at puten kan gli mellom ryggørene på rullestolen for å oppnå riktig setedybde. Riktig setedybde tilsvarer ca. én til to fingerbredder mellom knehasene og den fremre kanten på puten.

Etter hvert som brukeren vokser justeres puten framover, samtidig som du sørger for at sitteknutene hele tiden er plassert i sittegropen på puten, midt i oljemassen

Husk å opprettholde ønsket avstand mellom knehasene og den fremre delen på puten.

Når puten er justert framover med 2,5 cm eller mer*, monteres lårstøtten (medfølger) foran sitteknutene. På denne måten vil brukeren forhindres fra å skli forover på GS-puten. Den fremre kanten på GS-puten kan plasseres inntil 5 cm foran kanten på setetrekket, og fortsatt være stabil.

Bruk av JAY justerbart fast sete anbefales når GS-puten forlenges på denne måten. Dette gjør at puten lett kan plasseres i ønsket stilling på nytt etter at den er tatt ut av rullestolen.


Breddejustering av puten oppnås ved bruk av tilbehør. Hoftestøtter kan justeres innover med 2,5 cm på hver side, og deretter flyttes utover for å gi bedre plass bak på puten etter hvert som brukeren vokser. Bensamlere (abduktor) kan justeres innover med 2,5 cm på hver side, og deretter flyttes utover for å gi bedre plass foran på puten etter hvert som brukeren vokser.

Ved bruk av JAY trykkavlastende oljepad, anbefaler vi kun bruk av én lårstøtte.

MERK:

JAY GS-puten kan brukes med forskjellige rygger, avhengig av brukerens funksjonshemning. Prøv JAY J3-rygg for moderat aktive brukere. Prøv JAY Fit-rygg for rukere som trenger mye støtte. Utvidelse av sittesystemet er mulig med alle de ovennevnte produktene når de brukes sammen med GS-puten.

TILBEHØR TIL JAY GS-PUTEN

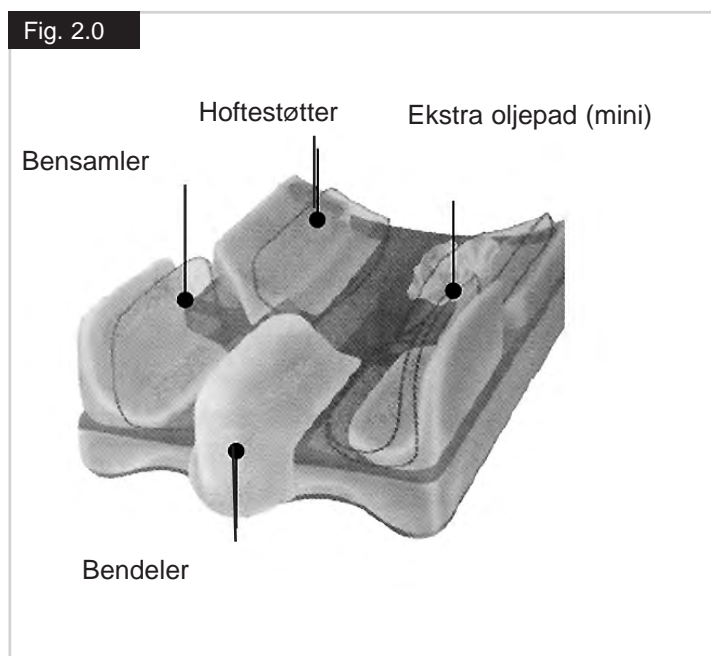

GS-puten kan brukes sammen med en rekke JAY-tilbehør, inkludert:

- 3D trykkavlastende oljepad (ikke vist) for betydelig forbedret trykkavlastning.
- Hoftestøtter for bedre plassering eller tilpasning av bredden på puten.
- Bensamlere (abduktorer) for å forhindre for stor abduksjon eller spredning av bena, eller for å justere bredden på puten.
- Små oljepader som kan kompensere for skjev stilling, eller for å gi bedre trykkavlastning og komfort.
- Et utvalg bendelere (abduktorer) for økt deling av bena.
- En 1 cm sittegruppoppygger (ikke vist) for å redusere hoftefleksjon for personer med begrenset bevegelighet.

MERK:

GS-puten med standard oljepad eller trykkavlastningspad kan brukes sammen med det meste av tilbehøret. Et større trekk anbefales ved bruk av store deler.

⚠ ADVARSEL!

Montering av tilbehør bør utføres med veiledning fra lege eller terapeut.

KONTROLLERE OM DU "SITTER IGJENNOM" PUTEN

Den standard JAY GS-puten har mindre oljemasse enn JAY@J2-puten, fordi den hovedsakelig er utformet for posisjon, komfort og kontroll av tonus. Hvis det er stor fare for skade på brukerens hud, bør trykkavlastningspaden brukes.

⚠ ADVARSEL!

Trykkavlastningspaden må kontrolleres for å forsikre om at brukeren ikke sitter gjennom oljemassen, som kan føre til rød eller skadet hud.


Maksimal brukervekt: 150 kg for alle størrelser

Evaluerer for å kontrollere at brukeren ikke sitter gjennom oljemassen (kun trykkavlastningspad):

- Plasser brukeren på puten uten trekk i 2 minutter.
- Løft brukeren av puten uten å komme borti oljemassen. Undersøk området der sitteknutene og halebeinet var plassert.
- Hvis oljemasse mellom bunnen i det nedtrykte området og underlaget er 1 cm eller mindre, er det nødvendig med mer oljemasse. Ekstra oljepader kan kjøpes hos din forhandler.
- Til GS-puter på 25 cm, 30 cm og 36 cm anvendes de små oljepadene.
- Til GS-puter på 40 cm og 46 cm anvendes standard oljepader.
- Når en oljepad skal brukes, plasseres den langs sidene på sittegroppen, under trykkavlastningspaden.
- Sett tilbake oljepaden over dem, og foreta en ny vurdering.

⚠ ADVARSEL!

- Røde trykkmerker er et klinisk tegn på begynnende trykksår.
- Kontroller huden regelmessig for røde merker.
- Hvis huden blir rød bør ikke puten brukes, og lege eller terapeut bør kontaktes umiddelbart.

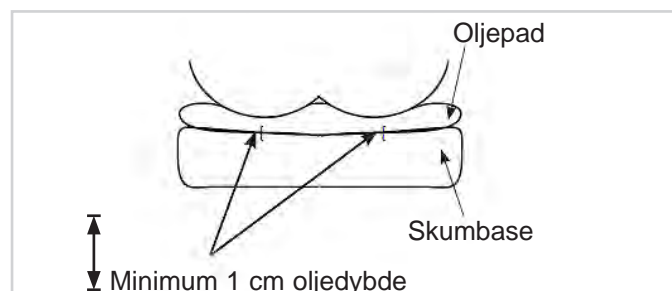

ENKELT VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Putens levetid kan forlenges ved hjelp av månedlig rengjøring og regelmessig vedlikehold. Vi anbefaler at du også kontrollerer putens deler under rengjøring.
- Kontroller at trekket ikke er slitt eller skadd. Skift ut trekket dersom det er revnet, slitt eller skadd på annen måte. Kontroller at oljepaden ikke er punktert eller er skadd på annen måte.
- Kontroller underlaget for å forsikre om at eventuelt tilbehør fortsatt er riktig plassert.
- Kontroller konsistensen på skummet i delene.
- Kontroller at oljemassen er jevnt fordelt i puten. Hvis massen er fastere på enkelte steder, kan den knas for å få tilbake sin normale konsistens. Du kan også ta kontakte med leverandøren din angående dette.
- Et inkontinestrekk vil redusere behovet for vasking.

KONTROLLERE OG RENGJØRE TREKKET

- Ta av trekket på puten og vring det.
- Maskinvask med varmt vann (maks. temperatur er 70 °C for mikroklimatiske og stretch-trekk, 60 °C for inkontinestrekk). La deretter trekket lufttørke.
- Trekket skal ikke strykes.

⚠ ADVARSEL

- Trekket skal ikke kjemisk renses, vaskes eller tørkes i industrimaskin.
- Trekket må ikke dampes i trykkoker/autoklaveres.
- Trekket må ikke blekes.
- Legg skuminnlegget tilbake i trekket når det er vasket og tørket. Pass på at den bakre delen på trekket er plassert mot den bakre delen på puten.
- Hvis puten brukes på en institusjon, skriv navnet til brukeren på trekkenes merkelapper ved bruk av en vannfast tusj. Dette vil sørge for at brukeren får tilbake sitt eget trekk etter vask.
- Bruk kun JAY-trekk på JAY-puter. Trekket er en viktig del for at du skal kunne synke ned i oljemassen for å oppnå best mulig trykkavlastning. Bruk av feil trekk vil påvirke putens design og funksjon.

RENGJØRE SKUMBASEN/BENSAMLERNE

Ta av trekket og oljepadsen fra skumbasen. Skumbasen kan desinfiseres ved å senke den ned i eller spray den med desinfeksjonsmiddel (se diagram på motsatt side). Tørk over delene med en ren klut. La delene lufttørke helt før du setter tilbake trekket.

⚠ ADVARSEL

Skumbasen må ikke legges i vann.

RENGJØRE OLJEPADEN

Ta det utvendige trekket av puten. Fjern oljepaden fra det indre trekket. Oljepaden kan desinfiseres ved å spray den med desinfeksjonsmiddel (se diagram på motsatt side). Tørk deretter delene med en ren, fuktig klut, før du tørker dem med en ren, tørr klut.






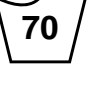
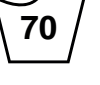
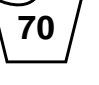
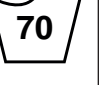
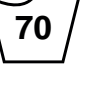



















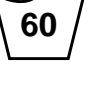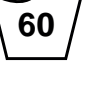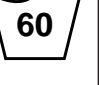




















⚠ ADVARSEL

- Senk aldri oljepaden ned i blekemiddel/klorin.
- Unngå kraftige rengjøringsmidler eller å skrubbe oljepaden, da dette kan skade paden og forårsake lekkasje.

Hvis det er tegn til slitasje på trekket, skuminnlegget, oljepaden eller andre deler, eller hvis du ser at putens konsistens er forringet, må du ta kontakt med forhandleren din eller Sunrise Medical for å få puten kontrollert.

VASKEANVISNINGER	
	Maskinvask i varmt vann (70 °C)
	Kun klorfritt blekemiddel.
	Lufttørkes
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

Godkjente rengjøringsmetoder for JAY-puter

Produkt	JAY Lite	JAY J3	J2 GS	JAY Easy Visco	JAY Soft Combi P	JAY Xtreme Active	JAY Basic	JAY Easy	JAY Balance
Yttertrek (mikroklimatisk og stretch)									
(1). Maskinvask 70°C 									
Utvendig trekk (inkontinens)									
(2). Maskinvask 60°C 									
Innertrekk									
(3). Desinfisering (spray og tørk)  eller vaskes på 60°C 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
Putebase (skumbase)									
(4). Varmesterilisering opp til 105 °C (1) 	✗	✗	✗	✗	✗				✗
Desinfisering (spray og tørk) 						✗	✗	✗	✗
(5). Desinfisering (nedsenking) 				✗	✗	✗	✗	✗	✗
Puteelementer									
Roho-luftinnlegg	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Posisjoneringsdeler	N/A			N/A	N/A		N/A	N/A	
Oljepad	N/A			N/A	N/A		N/A		
<p>1. 70 °C er den maksimale temperaturen som anbefales. 2. 60 °C er den maksimale temperaturen som anbefales. 3. Innertrekkene på Xtreme Active og Balance kan vaskes på 60 °C, samt sprayes og tørkes over med desinfeksjonsmiddel. Mulighet for misfarging ved vask på 60 °C, men trekkens funksjon vil ikke svekkes. 4. Varmesterilisering gjøres i en autoklav, som er en selvvlåsende maskin som steriliserer produkter med trykkdamp). 5. På lav temperatur (< 30°C).</p>									
Garantien vil være ugyldig dersom produktet skades fordi disse rengjøringsinstruksene ikke er overholdt eller hvis det er brukt feil rengjøringsmidler.									
Anbefalte desinfeksjonsmidler									
Alle desinfeksjonsmidler som er oppgitt og anbefalt av Robert Koch Institute: http://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html									

SETTE SAMMEN JAY GS-PUTEN ETTER RENGJØRING

1. Plasser eventuelt tilbehør som brukes på skumbasen. Fest oljepaden til skumbasen langs den ene siden på borrelåsen. Oljepaden festes deretter i midten langs borrelåsen, og til slutt på den andre siden på samme måte. Splitten foran på oljepaden skal festes jevnt midt på borrelåsen. Ved bruk av en 7,5 cm bendeler (abduktor), skal oljepaden festes til sidene på tilbehøret.
2. Kontroller puten for å se om det er tilstrekkelig oljemasse i den, slik beskrevet ovenfor.
3. Dra den fremre delen på trekket over puten først, og strekk deretter de bakre hjørnene ned og rundt basen.
4. Kontroller den øvre delen på trekket for å se at det er riktig plassert.
5. Trekket skal ikke henge ned mellom delene.

ADVARSEL

- Bruk kun JAY-trekk.
- Bruk av trekk som ikke er tilpasset puten kan ha en negativ virkning på JAY GS-putens funksjon.
- Bruk derfor kun JAY-trekk som er konstruert til å brukes med JAY GS-puten. (Ikke bruk ekstra trekk over JAY GS-trekk).

Hvis brukeren ikke er inkontinent, anbefaler vi å bruke det perspirasjonsreducerende trekket AirExchange™ når det er varmt. Inkontinensbestandige trekk er standard, slik at puten ikke må vaskes ved eventuell søling.

MERK:

Selv et tettsittende trekk vil etterlate ekstra folder med stoff under brukerens seteparti. Dette ekstra stoffet sørger for at trekket sitter godt uten trykk mot setepartiet.

MODIFISERING AV BASEN

JAY GS-basen kan lett modifiseres på fabrikken eller av din autoriserte leverandør for å dekke spesielle sittebehov.

Modifiseringene inkluderer:

- Spesialstørrelser.
- Forskjellige benlengder.
- Utskjæringer for nedsenkede eller vinklede seter.
- Utskjæringer bak på hjørnene for plassering mellom ryggryene på rullestolen.
- Andre spesialbehov.

ADVARSEL

- JAY GS-puten er hovedsakelig utformet for å gi god kroppsholdning og komfort.
- Hvis det er fare for at brukerens hud kan skades, og det er viktig med trykkavlastning, bør GS-trykkavlastningspaden brukes.
- Brukere med høy risiko for skade på huden bør evalueres nøye av en terapeut før GS-puten anskaffes.
- JAY GS-puten skal ikke erstatte stell av hud, god diett og renslighet.
- Enhver pute bør i tillegg prøves noen timer mens en terapeut eller lege kontrollerer huden, for å forvise om at det ikke utvikler seg røde trykkmerker.
- Hvis huden blir rød skal ikke puten brukes, og lege eller terapeut bør kontaktes.
- La aldri skarpe gjenstander eller åpen ild komme i kontakt med puten.
- Hvis puten ligger ute over natten ved temperaturer under 5 °C, bør puten varmes opp til romtemperatur før den tas i bruk. Huden kan skades hvis man sitter på svært varme eller kalde overflater.

2 ÅRS BEGRENSET GARANTI

Alle JAY GS-puter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle JAY GS-puter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at puten har blitt brukt på normal måte. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte puten uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på puten, eller putens avtakbare trekk. Det avtakbare trekket er garantert fritt for fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på seks (6) måneder fra kjøpsdato ved vanlig bruk. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av seks (6) måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte trekket uten omkostninger for kunden. Eventuelle krav eller reparasjoner skal gjøres gjennom din autoriserte forhandler. Med unntak av de bestemte garantiene som er beskrevet her, skal ingen andre garantier, inkludert indirekte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, gjelde.

TILLEGG TIL GARANTI OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Rådfør deg med helseterapeuten din for råd om riktig tilpasning, og les følgende informasjon nøye:

- Oljemassen i denne puten kan miste volum over tid.
- Tap av volum kan resultere i at du sitter igjennom oljemassen.
- I forbindelse med månedlig rengjøring og kontroll, må du kontrollere at puten har nok oljemasse (slik at du ikke sitter igjennom massen) og at den har jevn og myk konsistens. Se instruksjonene i avsnittet "Kontrollere at du ikke sitter igjennom oljemassen" i bruksanvisningen og garantibetingelsene. Hvis oljemassen virker fastere på enkelte steder, kan du kna den tilbake til sin opprinnelige konsistens.
- Hvis du sitter igjennom oljemassen, må du ta kontakt med terapeuten din. Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Sunrise Medical.

ANDRE JAY-PRODUKTER

JAY justerbart fast sete

JAY justerbart fast sete gir et solid underlag og god støtte. JAY GS-puten virker enda bedre på et fast underlag. JAYs justerbare faste sete erstatter rullestolens stoffsete med et lett avtakbart sete som kan justeres både i bredde, dybde, høyde og vinkel, for å dekke individuelle behov.

J3-rygg

J3-ryggen er lett, komfortabel og justerbar. Sidestøtter, vinkeljustering samt lett montering og demontering gjør J3-ryggen til den mest raffinerte ryggstøtten som er tilgjengelig i dag. En ryggstøtte har aldri vært viktigere.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood,
NSW 2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com

EC REP

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

