

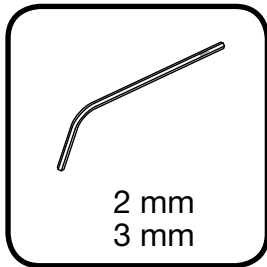


MONTERINGSANVISNING

Flytte svingutløser til motsatt side

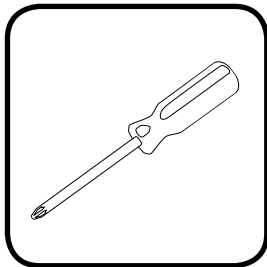


NOVA

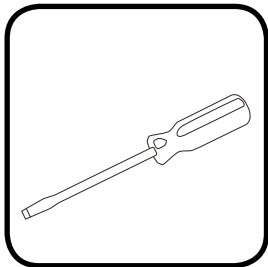

Illustrasjonene viser flytting av svingutløseren fra høyre til venstre. Fremgangsmåten er den samme ved flytting av svingutløser til motsatt side.



Kontroller Nova når monteringen er ferdig ved å kjøre stolen i alle posisjoner og teste svingutløseren.

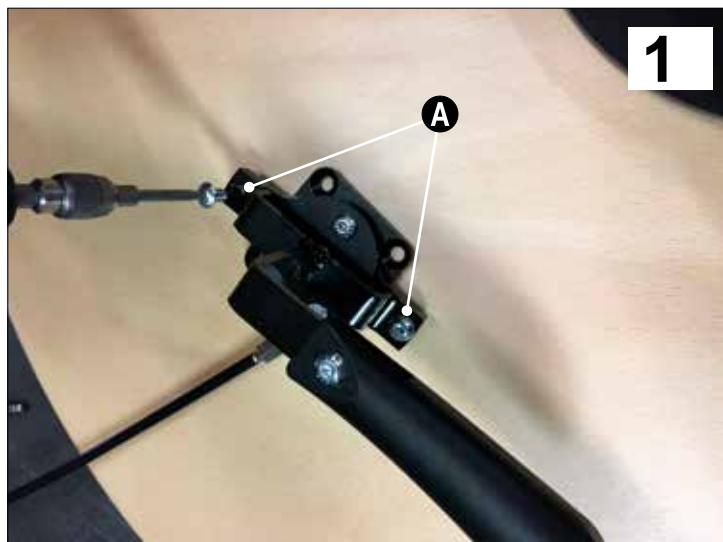


1. Før svingutløserhåndtaket kan monteres på motsatt side, må håndtaket snus. Skru ut skruene **A**.



2. Skru ut skruene **B**.




3. Snu vippeplaten **C** slik at den vender som i figur 3 for svingutløser på venstre side.

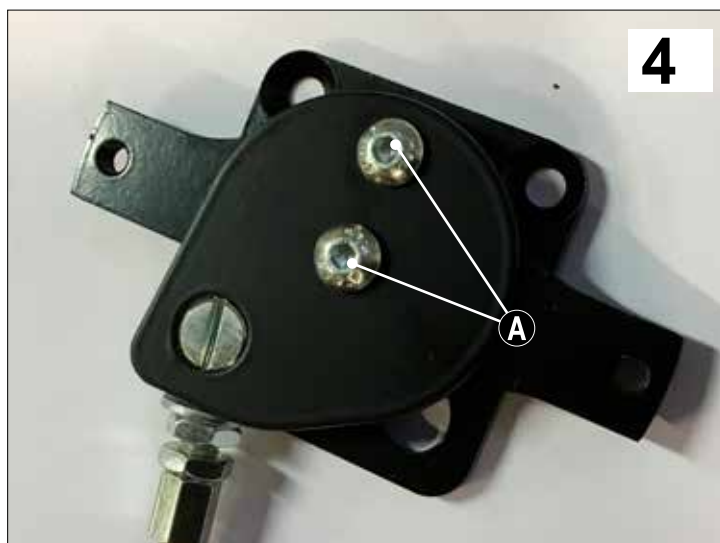


4. Skru inn skruene **A** igjen.



5. Tre svingutløserhåndtaket gjennom armlenstrekket fra undersiden.

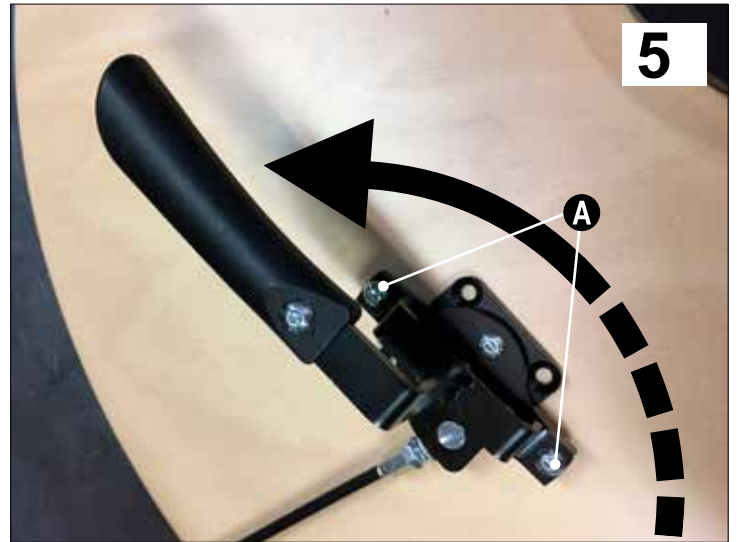

6. Snu håndtaket til motsatt side og skru inn skruene **A** igjen.

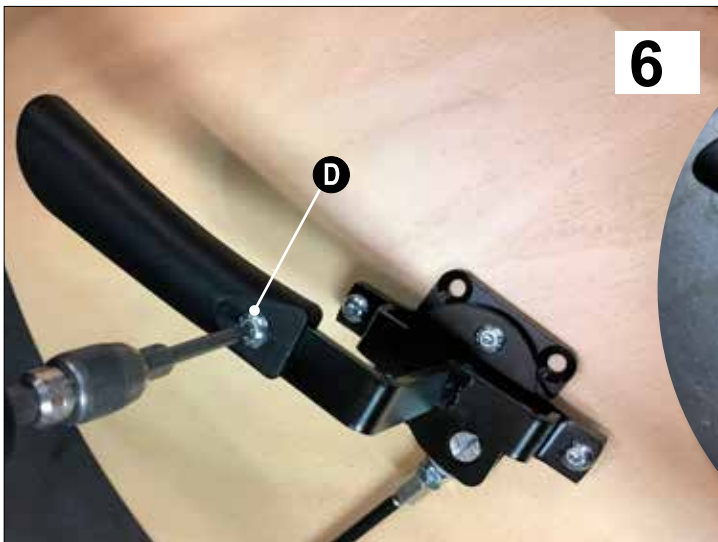

7. Når håndtaket er snudd, må selve grepet snus. Skru ut skruen **D** og snu grepet.



8. Monter svingutløseren på motsatt sidevange som vist i figur 7.

Merk: Vaieren skal gå uhindret i en bue bak foten. Påse at vaieren ikke får skarpe bøyer, da dette kan hindre låsing av svingen



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no