



247749 Rev. F

Switch-It® Dual Pro® Huvudstyrning Bruksanvisning

SUNRISE MEDICAL LISTENS

Thank you for choosing a Switch-It product. We want to hear your questions or comments about this manual, the safety and reliability of your system, and the service you receive from your Sunrise Medical authorized dealer. Please feel free to write or call us at the address and telephone number below:

SUNRISE MEDICAL (US) LLC

Customer Service Department
2842 N. Business Park Avenue
Fresno, CA 93727 USA
(800) 333-4000

Be sure register your product, and let us know if you change your address. This will allow us to keep you up to date with information about safety, new products, and options to increase your use and enjoyment of the product.

You can also register your product at:
www.SunriseMedical.com/register

FOR ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

Your Sunrise Medical authorized dealer knows your wheelchair best and can answer most of your questions about system safety, use, and maintenance.

For future reference, please fill in the following:

Dealer: _____

Address: _____

Telephone: _____

Serial #: _____ Date/Purchased: _____

YTTERLIGARE INFORMATION DU BÖR KÄNNA TILL

Ingen komponent i den här produkten tillverkades med naturgummilätex.



AVFALLSHANTERINGS- OCH ÅTERVINNINGSPUNKT

När produkten når slutet av sin livslängd, var vänlig ta den till en godkänd utsedd insamlings- och återvinningspunkt genom dina lokala eller statliga myndigheter. Den här produkten är tillverkad av en mängd olika material. Produkten får inte avyttras som vanligt hushållsavfall.


Du bör kassera produkten på rätt sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar. De flesta material som används vid tillverkning av denna produkt är helt återvinningsbara.

Separat insamling och återvinning av din produkt vid tidpunkten för avyttringen kommer att hjälpa till att bevara naturresurser och säkerställa att rullstolen avyttras på ett sätt som skyddar miljön.

Innan du kasserar produkten enligt rekommendationerna ovan bör du förvissa dig om att du är produktens lagliga ägare.



www.SunriseMedical.com/register

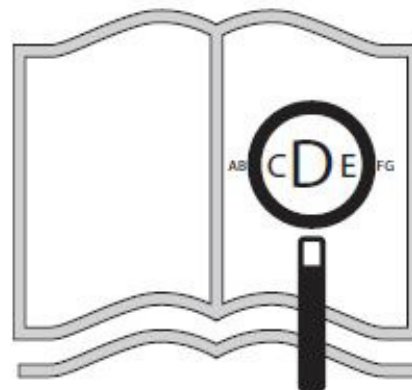

Om du är synskadad kan
detta dokument visas
i PDF-format på
www.SunriseMedical.se



Återförsäljarens underskrift och stämpel

OBS: Kontrollera att alla delar är oskadade. ANVÄND EJ produkten om något är skadat. Kontakta din Hjälpmedelscentral/Sunrise Medical för ytterligare instruktioner.

! VARNING!

Installera INTE produkten innan du först noga läst och förstått denna manual. Om du inte kan förstå varningarna, försiktighetsanvisningarna och anvisningarna kontaktar du din Hjälpmedelscentral eller auktoriserad Sunrise Medical-återförsäljare - annars kan skador uppstå.

! VARNING!



Denna enhet kan påverkas av elektromagnetisk interferens (EMI) och radiofrekvensstörningar (RFI).

1. Radiovågskällor såsom radiostationer, TV-stationer, amatörradio (HAM) sändare, komradio och mobiltelefoner kan påverka hanteringen.
2. Om oavsiktlig rörelse eller bromsutlösning sker, stäng AV elrullstolen och manövrera inte före inspektion, reparation och/eller utbyte.
3. Om stolen fungerar på ett oberäkneligt sätt, stäng AV rullstolen och manövrera inte före inspektion, reparation och/eller utbyte.
4. Om joystickens skaft är skadat kan det medföra att stolen fungerar oregelbundet, stäng AV elrullstolen och manövrera inte före inspektion, reparation och/eller utbyte.
5. Om någon av enhetens kablar blir trasiga, skurna eller fränkopplade på något sätt, stäng AV strömmen och manövrera inte före inspektion, reparation och/eller utbyte.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE

Gratulationer till ditt val av en Switch-It-produkt. Sunrise Medicals mobila kvalitetsprodukter är designade för att förstärka ditt oberoende och göra ditt vardagsliv enklare.

Som en del av vårt pågående produktförbättringsinitiativ, förbehåller Sunrise Medical sig rätten till ändringar av specifikationer och design utan föregående meddelande.


Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda och underhålla din produkt på ett säkert sätt.

Lämpliga användare: Brukaren

Reglagen för elrullstolar är endast avsedda för en brukare som inte kan gå eller har begränsad rörlighet och därför kräver en elrullstol för egen personlig användning inomhus och utomhus. Körning av en elektrisk rullstol kräver kognitiva, fysiska och visuella färdigheter. Brukaren måste kunna beräkna och korrigera resultatet av de åtgärder som tas när rullstolen används.

Brukaren måste informeras om innehållet i den här bruksanvisningen innan den kör rullstolen. Dessutom måste brukaren av rullstolen få en grundlig instruktion av en kvalificerad specialist innan han eller hon kör på egen hand. De första gångerna i rullstol bör utövas under överinseende av en instruktör/rådgivare.

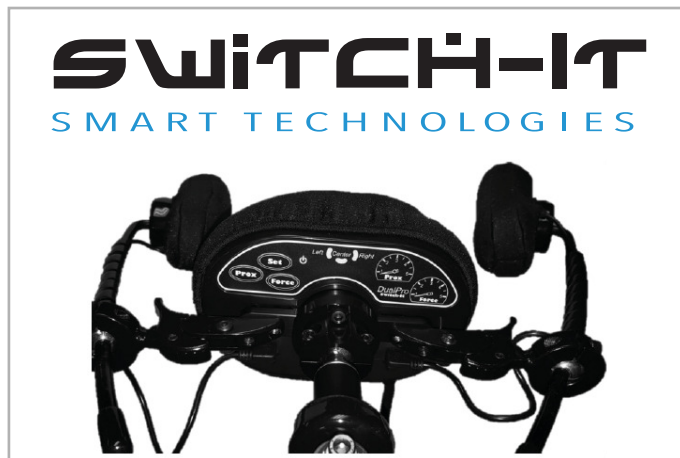

A. Beskrivning

Dual Pro® är en fullt justerbar, proportionell huvudstyrning med en "On Board Programming" funktion vilken möjliggör finjusterade justeringar och anpassningar som ger brukaren en lättanvänd, precis och intuitiv körupplevelse. DualPro® använder en kombination av närhets- och kraftsensorteknologier. Denna patenterade teknologi gör det möjligt för brukaren att manövrera sin rullstol med hjälp av alla rullstolens hastighets- och accelerationsparametrar som kan anpassas. Denna justeringsnivå kan inte uppnås genom traditionell huvudkontroll. DualPro® finns tillgänglig med långsmala (facial pads) eller runda (spot pads) dynor.


Den avsedda livslängden för denna produkt är 5 år.

B. Tekniska specifikationer


- Alternativ kontrolltyp: Proportionell
- Aktiveringstyp: Närhet (Proximity) och kraft (Force)
- Aktiveringsyta:
 - DPA: 4-in x 2-in (100 mm x 50 mm)
 - DPP: 2-in x 1-in (50 mm x 25 mm)
- Aktiveringskraft: Justerbar
- Avkänningsavstånd: 10 mm
- Feedback: Elrullstolrörelse
- Kontakttyp: D-Sub 9-anslutning till rullstolsdisplay
- Dual Pro-mått för dyna (Fig. 1- Fig. 3):
 - Bakre dyna (back pad): 6,5-in x 4,75-in (165 mm x 120 mm)
 - Långsmala (facial pads) dynor: 5-in x 1,5-in (127 mm x 38 mm)
 - Runda (spot pads) dynor: 63,6 mm diameter

C. Kompatibilitet


- Penny & Giles R-Net elektronik: Omni-modul krävs
- Curtis Electronics Enable 50: Förbättrad display krävs
- Dynamiska kontroller DX2: Switch-It DX Dongle (DXD) krävs

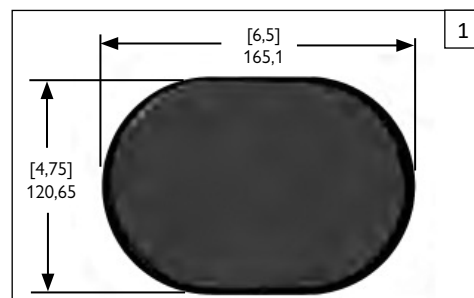

Dual Pro back pad (DPA och DPP-versioner)

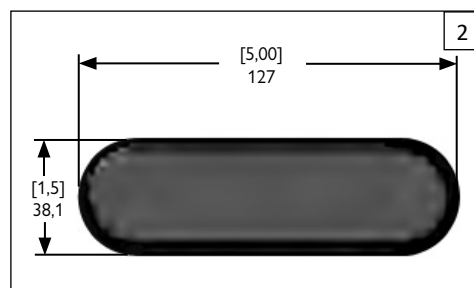

Dual Pro (DPA-version) side facial pad

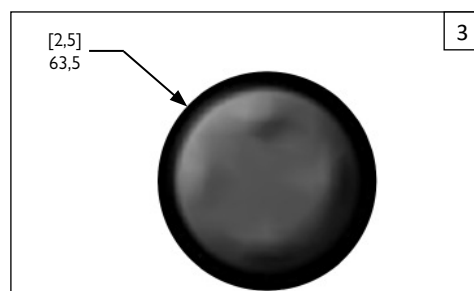

Dual Pro (DPP-version) side spot pad

Huvudfunktioner

Unikt för DualPro är möjligheten att programmeras för att agera som:

- A **switchad kontroll**, som fungerar baserat på avståndet från huvudet till sensorn.
- Ett **proportionellt reglage** som fungerar baserat på den kraft eller det tryck som appliceras på sensorn.
- En kombination av både **switchade och proportionella reglage**, vilket ger en exakt och intuitiv körupplevelse (Fig. 4).

Dual Pro är en äkta proportionerlig körkontroll som, precis som en gaspedal och ratt, erbjuder ett fullt urval av acceleration och fartminskning, 360 graders vändnings- och girningskontroll.

Dual Pro har tre 1/8-tums jackportar (kallas "SmartJacks") för externa switchar: läge (mode), tillbaka och en till/från switch. Dessa är placerade längst ned på huvuddynans baksida och är kompatibla med vanliga elektroniska och mekaniska switchar med ett mono- eller stereo-uttag (dvs äggformad switch, micro lite switch etc.). Några av de mest populära konfigurationerna inkluderar en närhetssensor som monteras i en böjlig svanhals (Fig. 5), och en piko-switch monterad på en svängarm (Fig. 6).

E. Känslighet




Dual Pro kan programmeras bekvämt från den huvuddynans baksida på huvudkontrollen (Fig. 8) vilket möjliggör enkla inställningar och justeringar på fältet med klienten i rullstolen. Varje dyna på Dual Pro har en inställning för kraft och närhetskänslighet: fler lampor på kraft (Force) innebär att mer kraft krävs för att nå full hastighet, och fler lampor på närhet (Prox) innebär att brukaren kommer att uppnå högre hastighet när närhetssensorn utlöses.

Vi rekommenderar att inställningarna för stolens hastighet är inställda på 100% och finjusteringar görs genom de individuella inställningarna för Dual Pro-dynan. Det beror på att Dual Pro kommer att skicka en signal till stolen i procentandel av full hastighet. Varje lampa på "Force/Prox" displayen motsvarar omkring 20% av den programmerade hastigheten för den profilen.

F. Kalibrering

Dual Pro har en tilsensor som avaktiverar den bakre huvuddynan om brukaren placeras i ett tryckavlastande läge. Den vinkel i vilken tilsensorn aktiveras kan också justeras och bör vara ungefär halvvägs mellan en god ryggstödvinkel i körställning och en god ryggstödvinkel i tryckavlastande läge (Fig. 7).

1. Normal körvinkel
2. Aktivering av tilsensor – huvuddynans baksida avaktiverad
3. Tryckavlastningsvinkel
4. Inställning av inaktivering av den bakre huvuddynans vinkel:
 - a. Luta stolen till den vinkel där du vill att ryggplattan ska bli inaktiv.
 - b. Håll ned SET-knappen på DualPro och starta om stolen
 - c. När stolen lutar bakåt förbi den här vinkeln blir den bakre huvuddynan inaktiv.
 - d. När den bakre huvuddynan är inaktiv blinkar den blå strömindikatorn.
5. Så här avaktiverar du den här funktionen:
 - a. Håll ned "Crawl" eller "Prox" knappen.
 - b. Återstarta stolen medan du håller ned knappen.
 - c. Denna funktion är nu avaktiverad.

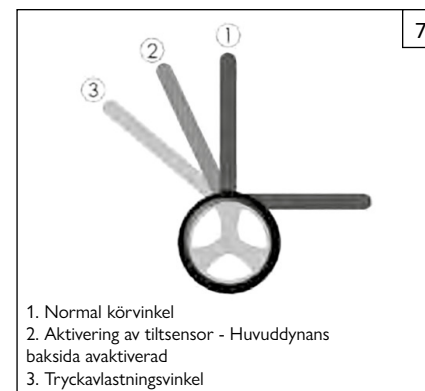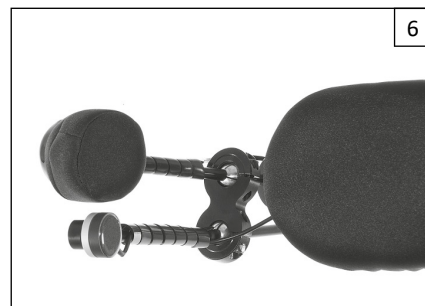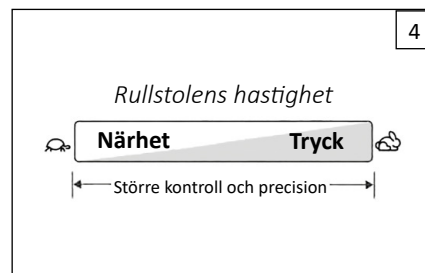

G. Känslighet för körning framåt

Dual Pro kan enkelt programmeras för att justera känsligheten för körning framåt. Detta gör det möjligt för brukaren att centrera elrullstolens framåtkörning.

Justering av körriktning framåt:

- Vid normal användning av rullstolen håller du fast knapparna Set och Prox på huvuddynans baksida. Dual Pro är nu i rätt läge för att justera känsligheten för körning framåt.
- LED-indikatorerna för vänster och höger sida i huvuddynans bakre del blinkar kontinuerligt. I detta tillstånd kan knapparna för Force och Prox användas för att justera körriktningen.
 - Force-knappen justerar körriktningen till höger.
 - Prox-knappen justerar körriktningen till vänster.
 - Justering av körriktningen visas på huvuddynans bakre del via Force- och Prox LED-indikatorerna.
 - Inställningar mer till höger visar en LED-indikator på Force-mätaren.
 - Högre värden för den högra körriktningen kommer att få Force-mätarens LED-indikator att blinka.
 - Det finns totalt tio inställningar för den framåtriktade körriktningen som relaterar till högerställda körriktningar. Den lägsta högerställda körriktningen visar en Force-mätarindikator med fast sken vid siffran 1. Den högsta högerställda körriktning visar en Force-mätar-indikator med blinkande sken vid siffran 5.
 - Inställningar mer till vänster kommer att ha en LED-indikator som visar Prox-mätaren.
 - Högre värden för den vänstra körriktningen kommer att få Prox-mätaren att blinka.
 - Det finns totalt tio inställningar för den framåtriktade körriktningen som gäller för vänsterställda körriktningar. Den lägsta vänsterställda körriktningen visar Prox-mätarens indikator med fast sken vid nummer 5. Den högsta vänsterställda körriktningen visar Prox-mätarens indikator som blinkar vid nummer 1.
 - Med en neutral körriktning har ingen mätare en aktiv LED-indikator.
 - Standardriktningen framåt är högerställd på nummer 4 med en LED-indikator med fast kraft.

Obs: Justering av inställningarna kommer inte att medföra "wrap", vilket innebär att vid den maximala högerställda riktningen kommer ett tryck på Force-knappen att medföra att riktningen kvarstår, likaså, vid den maximala vänsterställda riktningen kommer ett tryck på Prox-knappen att medföra att riktningen kvarstår.

- Den centrala dynan kan användas för att testa framåtriktningen. Vänster och höger sidodynor reagerar inte i det här läget, men den centrala dynan kan användas för att köra framåt med full proportionell kontroll.
- När önskad körriktning framåt har uppnåtts trycker du på Set-knappen för att återställa Dual Pro till normal drift.

VARNING!

Av säkerhetsskäl behöver du säkerställa att controller-inställningarnas prestanda testas av brukaren först långsamt och sedan gradvis ökas tills högsta önskade hastighet och acceleration har uppnåtts.

1. TOM	Längst till vänster														Standardinställning						Längst till höger
2. JUSTERING	10 vänster	9 vänster	8 vänster	7 vänster	6 vänster	5 vänster	4 vänster	3 vänster	2 vänster	1 vänster	Saknas	1 höger	2 höger	3 höger	4 höger	5 höger	6 höger	7 höger	8 höger	9 höger	10 höger
3. INDIKATOR	Prox 5 Blinkande grön	Prox 4 Blinkande grön	Prox 3 Blinkande grön	Prox 2 Blinkande grön	Prox 1 Blinkande grön	Prox 5 Fast grön	Prox 4 Fast grön	Prox 3 Fast grön	Prox 2 Fast grön	Prox 1 Fast grön	Ingen Prox eller Force lyser	Force 1 Fast röd	Force 2 Fast röd	Force 3 Fast röd	Force 4 Fast röd	Force 5 Fast röd	Force 1 Blinkande röd	Force 2 Blinkande röd	Force 3 Blinkande röd	Force 4 Blinkande röd	Force 5 Blinkande röd

H. Felsökning

Problem: Huvuddynans baksida ur funktion, vänster och höger dynors felsökning fungerar.

Vanlig orsak: Tiltssensor är aktiv. Kontrollera om driftsdisplayen blinkar BLÅTT. Om ja, avaktiveras huvuddynans baksida. Följ nedanstående steg.

Lösning: Avaktivera funktionen för tiltssensor.

- Tryck på Prox-knappen och håll den nedtryckt.
- Slå AV Omni eller förbättrad (Enhanced) display (fortsätt att hålla Prox-knappen nedtryckt).
- Slå PÅ Omni eller förbättrad (Enhanced) Display (fortsätt att hålla Prox-knappen nedtryckt).
- Släpp endast Prox-knappen när Omni eller förbättrad display är helt PÅSLAGNA.

Strömindikator-LED bör lysa kontinuerligt i BLÅTT.

Om ytterligare hjälp krävs, ring Sunrise tekniska support på 1.800.333.4000.

I. Underhållstips

Rullstolens livslängd är beroende av ett bra underhåll. För information om specifika inställningar, underhåll eller reparationer, kontakta din auktoriserade Sunrise Medical återförsäljare.

Hygienåtgärder för begagnade rullstolar:

Innan rullstolen återanvänds måste den förberedas noggrant. Alla ytor som brukaren kommer i kontakt med måste behandlas med desinficeringspray.

För att göra detta måste du använda ett desinfektionsmedel som godkänts/rekommenderats i ditt land, för snabb alkoholbaserad desinfektion av medicinska produkter och medicintekniska produkter, som måste desinficeras snabbt.

Var medveten om tillverkarens anvisningar för det desinfektionsmedel du använder.

Det är ofta svårt att åstadkomma fullgod desinficering på sömmar. Vi rekommenderar därför att du kasserar selen för att undvika mikrobakteriell kontaminering med aktiva ämnen enligt din lokala infektionsskyddslag.

Villkor För Säker Förvaring

- Produkterna bör förvaras på en torr plats, mellan 20 – 75% relativ luftfuktighet.
- Skydda mot direkt solljus och damm under långa perioder.
- Förvara inte i direkt värme. Förvara i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C
- Placera och stapla de förpackade produkterna enligt pilarna på förpackningen som visar "den här sidan upp".
- Om ett paket är högt och smalt och därför potentiellt instabilt, se till att det sitter fast ordentligt på pallen eller i hyllan för att förhindra att det faller ner.
- När förpackningen är markerad med "Stapla inte" så ska inget staplas ovanpå förpackningen.
- Produkten får aldrig förvaras utomhus och utsättas för väder och vind.

Garanti


Each Switch-It enheten inspekteras noggrant och testas för att ge bästa prestanda. Varje Switch-IT-enhet täcks av en begränsad, uttrycklig garanti.

1. Alla **elektroniska komponenter** omfattas av garantin i tolv (12) månader från leveransdatumet, förutsatt normal användning såvida de inte ändras eller skadas.
2. Alla **monterad hårdvara** omfattas av garantin i tolv (12) månader från leveransdatumet, förutsatt normal användning, , såvida de inte ändras eller skadas.
3. All **bärbara föremål** (skydd, dynor etc.) omfattas av garantin i tre (3) månader från leveransdatumet, förutsatt normal användning såvida de inte ändras eller skadas.

Garantianspråk ska behandlas via närmaste auktoriserade Sunrise Medical-återförsäljare. Ett returadministrationsnummer måste erhållas innan artikeln returneras för utvärdering, tillsammans med uppgifter om ärendet.

Artiklar som returneras för garantianspråk måste utvärderas av Switch-IT innan garantifastställande görs. Om en defekt i material eller utförande inträffar under garantiperioden och varan inte har modifierats eller skadats, kommer Switch-IT att, efter eget gottfinnande, omarbeta eller byta ut den utan kostnad.

Med undantag för uttryckliga garantier som ges här utesluts alla andra garantier, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet och garantier för lämplighet för ett visst ändamål. Uttryckligen för garantier beskrivna här, är alla andra garantier uteslutna. Åtgärder för överträdelse mot uttryckliga garantier här är begränsade till omarbetning eller utbyte av varorna. Skadestånd vid brott mot någon garanti kan under inga omständigheter innefatta några följdskador eller överstiga kostnaden för den felaktiga varan.

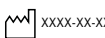Type:	Produktnamn/ SKU-nummer		Denna symbol betyder medicinsk utrustning
	Serienummer		Tillverkarens adress
 XXXX-XX-XX	Tillverkningsdatum		Europeisk auktoriserad representant
	CE-märkning		Ansvarig person i Storbritannien
	UKCA-märkning		Adress för representant från Schweiz
	Läs bruksanvisningen		Importörens adress

EXEMPEL

	Sunrise Medical (US) LLC 2842 Business Park Ave, Fresno, CA 93727	 YYYY-MM-DD
Type: Dual Pro Alternate Control	 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 69254 Malsch-HD / Germany	 MP-####
	 	
		

Sunrise Medicals ledningssystem är certifierat enligt ISO 13485 och ISO 14001.

Sunrise Medical har tilldelats ISO 13485-certifikatet, som bekräftar kvaliteten på våra produkter i varje steg, från FoU till produktion. Den här produkten uppfyller de standarder som anges i EU- och UK-föreskrifter.

Det stora utbudet av anpassningsmöjligheter och den modulära designen innebär att den kan användas av personer som inte kan gå eller har begränsad rörelseförmåga på grund av:

- Förlamning
- Förlust av extremiteter (benamputation)
- Benskada eller bendeformation
- Ledkontrakturer eller ledskador
- Sjukdomar som hjärt- och cirkulationsproblem, balansrubbingar eller kakexi samt för äldre personer som fortfarande har styrka i den övre delen av kroppen.

Rullstolen får inte användas vid:

- Perceptionsstörning
- Obalans
- Sittproblematik

OBS: Allmän rådgivning. Om du inte följer dessa anvisningar kan det resultera i fysiska skador, skador på produkten eller skador på miljön!

Om en incident i samband med enheten inträffar ska brukaren och/eller ska rapportera detta till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brukaren och/eller patienten är etablerad.



Som tillverkare försäkrar SUNRISE MEDICAL den här produkten överens stämmer med förordning för medicintekniska produkter (2017/745).

B4Me specialanpassningar

Sunrise Medical rekommenderar starkt att för att säkerställa att din B4Me-produkt fungerar, och fungerar på det sätt som tillverkaren avser; all användarinformation som medföljer din B4Me-produkt ska läsas och förstås innan produkten först används. Sunrise Medical rekommenderar också att användarinformationen inte kasseras efter att ha lästs, utan att den förvaras säkert för framtida referens.

Kombinationer av medicintekniska produkter

Det kan vara möjligt att kombinera denna medicintekniska produkt med en eller flera andra medicintekniska produkter eller andra produkter. Information om vilka kombinationer som är möjliga finns på www.Sunrisemedical.se. Alla angivna kombinationer har validerats för att uppfylla de allmänna kraven på säkerhet och prestanda, avsnitt 14.1 i förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.

Vägledning om kombinationen, till exempel montering, finns på www.SunriseMedical.se







Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
2842 N. Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com

EC REP



Website Address:
Orders.switchit@sunmed.com

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



©2023 Sunrise Medical (US) LLC
247749 Rev.F