



Spesialstyringer

000247771.09

Switch-It
DriveStation

Brukerveiledning

ADVARSEL!

Les nøye igjennom disse instruksjonene før produktet installeres. Hvis du ikke forstår eller følger instruksjonene for installasjon, inkludert alle advarsler, kan brukeren pådras personskade og garantien gjøres ugyldig. Hvis du har spørsmål om noe, ta kontakt med din nærmeste Sunrise Medical-avdeling (du finner kontakinformasjonen på baksiden av denne veiledningen).

MERK: Kontroller at ingen deler er blitt skadet under transport. IKKE bruk produktet hvis det er tegn til skade. Kontakt transportfirmaet/Sunrise Medical for ytterligere instruksjoner.

ADVARSEL

IKKE monter dette utstyret før du har lest igjennom og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen. Hvis du ikke forstår advarslene eller instruksjonene i denne bruksanvisningen, ta kontakt med en kvalifisert terapeut, lege, HMS eller leverandør, for å unngå fare for personskade og produktskade.

ADVARSEL



Dette utstyret kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) og radiofrekvensforstyrrelser (RFI).

- Radiobølggekilder, som radiostasjoner, TV-stasjoner, amatørradioer (HAM), toveisradioer og mobiltelefoner, kan påvirke motorisert styring.
- Hvis rullestolen utilsiktet flytter på seg eller stopper, slå stolen AV og ikke bruk den før den er kontrollert, reparert og/eller erstattet med en ny stol.
- Hvis rullestolen virker på uregelmessig måte, slå rullestolen AV og ikke bruk den før den er kontrollert, reparert og/eller erstattet med en ny rullestol.
- Hvis joystick-stangen er skadet, kan rullestolen virke på uregelmessig måte. Slå da rullestolen AV og ikke bruk den før den er kontrollert, reparert og/eller erstattet med en ny rullestol.
- Hvis kablene til utstyret er frynset, kuttet eller frakoblet på noen som helst måte, slå rullestolen AV og ikke bruk den før den er kontrollert, reparert og/eller erstattet med en ny rullestol.

Informasjon for bruker

Gratulerer med ditt nye Switch-It-produkt. Sunrise Medicals mobilitetsprodukter av høy kvalitet er konstruert for å gi deg større frihet og en enklere hverdag.

Fordi Sunrise Medical kontinuerlig forbedrer sine produkter, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel.

Denne brukerveiledningen

Ved hjelp av denne veiledningen kan du bruke og vedlikeholde produktet på en trygg måte.

An icon of an open book with a magnifying glass over the letters C, D, and E. The magnifying glass is positioned over the letter 'D', which is the largest. The letters 'C', 'D', and 'E' are visible, along with 'AB' to the left and 'FG' to the right.

Hvis du er synshemmet, kan dette dokumentet ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no

An icon of a computer setup including a monitor, a keyboard, and a mouse.

A. Produktbeskrivelse:

Switch-It DriveStation er en ergonomisk og proporsjonal håndholdt enhet (PS2-styreanordning) som er tilpasset for å brukes som en alternativ kjørekontroll. Ideell å bruke for barn. DRIVESTATION er konstruert slik at personer som er vant til å bruke spillkonsoller lett kan styre den elektriske rullestolen sin.

B. Teknisk informasjon:

- Alternative styringer: Proporsjonal eller brytere/digital
- Aktiveringstype: Bevegelse av joystick eller rullestolbevegelse
- Bevegelse av joystick: opp til 45 °
- Aktiveringskraft: 0,3 oz (10 g)
- Tilbakemelding:
 - ⌘ Proporsjonal kjøring med joystick
 - Skyving/bevegelse av joystickhåndtak
 - ⌘ Bryterbasert kjøring med handling- og/eller retningsputer
- Tilkoblingstype: D-Sub 9-tilkobling til rullestoldisplay
- Dimensjoner:
 - ⌘ Styreboks: 4" x 6" (102 x 152 mm)
 - ⌘ Adapterboks: 2,25" x 3,5" (57 x 89 mm)

C. Kompatibilitet:

- Penny & Giles R-Net-elektronikk: Omni er påkrevd
- Curtis Electronics Enable 50: Et utvidet display er nødvendig
- Dynamic Controls DX2: Switch-It DX Dongle (DXD) er nødvendig

D. Kompatibilitet for setefunksjonsprogrammer:

Brukere av Switch-It DriveStation kan velge mellom fem forskjellige programmer som gir tilgang til setefunksjoner. Standardprogrammet (enhet DS-0) gir tilgang til setefunksjoner via kjørekontrollen og programmering av rullestolen, på lik linje med en standard joystick, og det er kun nødvendig med en Omni-enhet eller et forbedret display.

Alternativt kan handlingsputen (trekant, firkant, sirkel og X) eller retningsputer programmeres til dedikerte setefunksjoner. Det finnes fire standardkonfigurasjoner for dette, og DriveStation er konfigurert for fire monopluggutganger for dedikert funksjonstilgang og nødvendig tilleggsstyr:

- Pride/Quantum - AAM er nødvendig
- Permobil - ICS-modul er nødvendig
- Sunrise Medical - kan spesialtilpasses, ring for pristilbud.

E. Hovedfunksjoner:

Switch-It DriveStation kan brukes både med proporsjonal og bryterbasert kjøring. Joystickhåndtakene kan brukes til proporsjonal kontroll, mens handlings- og/eller retningsputeknappene kan brukes til bryterbasert kjørek kontroll. Når joystickhåndtaket/tommelbryterne brukes til å kjøre rullestolen, kan begge håndtakene brukes. Det høyre håndtaket/tommelbryteren er derimot dominant.

Av-knappen er integrert i styreenheten, Figur 1. Denne knappen slår kun av styreenheten, den slår ikke av rullestolen. Du får tilgang til modus- og setefunksjoner via de høyre og venstre aktivitetsknappene foran på styreenheten, Figur 2.

Brukere av Switch-It DriveStation kan velge mellom fem forskjellige programmer som gir tilgang til setefunksjoner. Standardprogrammet (enhet DS-0) gir tilgang til setefunksjoner via kjørek kontrollen og programmering av rullestolen, på lik linje med en standard joystick. Alternativt kan handlingsputen (trekant, firkant, sirkel og X) eller retningsputer, Figur 1, programmeres til dedikerte setefunksjoner. Det finnes fire standardkonfigurasjoner for dette:

- DS-1: Retningsknapp for setefunksjoner, L1- og R1-knapper for denne modusen.
- DS-2: Retningsknapp for setefunksjoner, alle de fremre knappene er deaktivert.
- DS-3: Handlingsknapp for setefunksjoner, L1- og R1-knapper for denne modusen.
- DS-4: Handlingsknapp for setefunksjoner, alle de fremre knappene er deaktivert.

F. Feilsøking

Problem: Tommelbrytere på joysticken går ikke tilbake til midtstilling.

Vanlig årsak: Håndtakene på joysticken er skadet.

Løsning: Ta kontakt med din hjelpemiddelsentral eller Sunrise Medical.

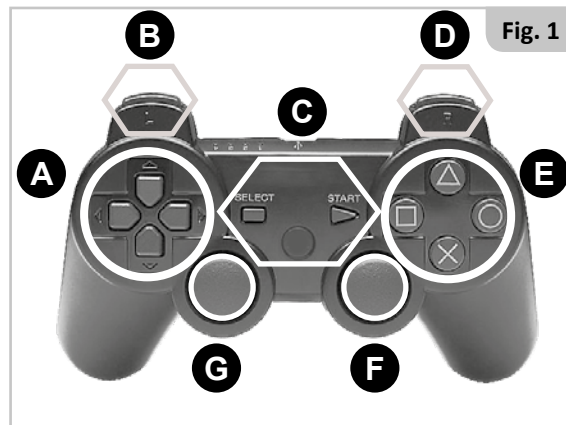


Fig. 1

- A** "D" -puten = OPP-NED-VENSTRE-HØYRE.
- B** L1 og L2.
- C** VELG-START-HJEM.
- D** R1 og R2.
- E** TREKANT-SIRKEL-FIRKANT-KRYSS
- F** HØYRE ANALOGE PINNE R3.
- G** VENSTRE ANALOGE PINNE L3.



Fig. 2

DENNE GARANTIE VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE PÅVIRKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

Sunrise Medical* gir sine kunder en garanti, slik beskrevet i garantibetingelsene. Garantien dekker følgende:

Garantibetingelsene:

1. Dersom en del eller deler på produktet må repareres eller skiftes ut på grunn av en produksjons- og/eller materialfeil innen 24 måneder, vil delen eller delene repareres eller skiftes ut gratis. Garantien dekker kun produksjonsfeil.
2. For å bruke garantien, vennligst ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen og oppgi nøyaktig informasjon om feilen og hvordan den har oppstått. Hvis du bruker produktet utenfor områdene som er dekket av et Sunrise Medical-verksted, vil reparasjon eller utskifting av deler gjøres av et annet verksted som er godkjent av produsenten. Produktet må alltid repareres av et verksted (forhandler) som er godkjent av Sunrise Medical.
3. For deler som er reparert eller byttet ut i samsvar med denne garantien, gir vi en garanti i henhold til disse garantibetingelsene for den gjenværende garantiperioden for produktet i samsvar med punkt 1.
4. Reservedeler som kunden har betalt for vil ha en garanti på 12 måneder (fra den/de ble montert) i henhold til disse garantibetingelsene.
5. Denne garantien kan ikke brukes til å reparere eller skifte ut deler på et produkt forårsaket av:
 - a. Normal slitasje, inkludert, men er ikke begrenset til, batterier, armleneputer, trekk, dekk, brems, osv.
 - b. Overbelastning av produktet. Kontroller CE-etiketten for informasjon om den maksimale brukervekten.
 - c. Produktet eller en del av den ikke har blitt ivaretatt eller vedlikeholdt i samsvar med produsentens anbefalinger, slik beskrevet i brukerveiledningen og/eller servicemanualen.
 - d. Det er brukt deler som ikke er klassifisert som originaldeler.
 - e. Produktet eller del av den er blitt skadet pga. uforsiktighet, ulykke eller feil bruk.
 - f. Det er utført endringer/modifiseringer på produktet eller deler som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
 - g. Det er utført reparasjoner før Sunrise Medicals kundeservice har blitt informert om dette.
6. Denne garantien er gjenstand for lover og/eller avtaler gjennom f.eks. egne kontrakter i det landet hvor produktet ble kjøpt fra Sunrise Medical.

* Betyr forhandleren/leverandøren som Sunrise Medical-produktet ble kjøpt fra.



INFORMASJON OM DEPONERING OG GJENBRUK

Når produktets levetid er over må du ta det med til en innleveringsplass eller en gjenvinningsstasjon som er godkjent av de offentlige eller lokale myndighetene dine. Dette sattesystemet er produsert ved bruk av en rekke forskjellige materialer og skal derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Du må kaste produktet på riktig måte i henhold til lokale lover og forskrifter. De fleste materialene som er brukt i dette produktet kan gjenvinnes.

Innsamling og gjenvinning av ditt produkt vil bidra til bevaring av naturressurser, i tillegg til å sikre at delene blir resirkulert på en miljøvennlig måte.

Kun den rettslige eieren av produktet skal sørge for at det deponeres i henhold til anbefalingene ovenfor.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood,
NSW 2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

EC REP



CE



 **SUNRISE**
MEDICAL®

247771_OM_Switch-It DriveStation_EU_NO_
RevA_2018-08-10