



 **MyWay**

My independence.
My freedom.
My choice.
My movement.
MyWay!

LECKEY[®]

Alla Leckey ci siamo appassionati allo studio di un prodotto che potesse dare ai bambini l'opportunità di aumentare il livello di inclusione sociale e accessibilità così da sfruttare al meglio le loro potenzialità. Per questo abbiamo realizzato il MyWay.

My Way è un deambulatore stabilizzatore che è stato studiato per supportare i bambini nell'esplorare, nell'interagire e nel partecipare alle attività quotidiane. Con MyWay i bambini diranno "sono pronto a partire, a modo mio! (My Way)"

Sono pronto a partire a modo mio!

MyWay!



Portare la riabilitazione della deambulazione in una nuova direzione



MyWay porta qualcosa di nuovo nel mondo della riabilitazione grazie anche alla sua imbragatura di supporto rivoluzionaria:

- L'imbragatura MyWay permette di mantenere la necessaria stabilità del capo, del tronco e degli arti inferiori, consentendo così al bambino di raggiungere la funzionalità del passo.
- La struttura e i supporti posturali dell'imbragatura MyWay permettono di adattarsi a bambini con diverse necessità cliniche, quali scoliosi, ipotono o movimenti distonici.
L'imbragatura MyWay abbraccia il bambino come fosse un corsetto così da aumentare le risposte sensoriali, ridurre movimenti involontari e offrire un ottimo comfort.
- L'imbragatura MyWay aiuta il bambino a vivere le sue esperienze dallo stesso punto di vista dei suoi coetanei migliorando lo sviluppo cognitivo, interattivo e sociale.
- Se il bambino non è in grado di effettuare i trasferimenti in maniera autonoma per portarsi in posizione eretta, è possibile utilizzare l'apposito bretellaggio per sollevatore che consente di trasportare il bambino dentro e fuori il telaio MyWay in completa sicurezza.

Grandi caratteristiche e benefici sia per i bambini che per gli assistenti

Caratteristiche del MyWay:

- Il telaio del MyWay è stato studiato per avere una forma completamente aperta! Utilizzando MyWay i bambini possono facilmente toccare, sentire, imparare, scoprire, interagire e giocare... la scelta è loro! Il telaio aperto anche posteriormente permette al terapeuta di avvicinarsi e lavorare sia col tronco che con gli arti inferiori del bambino massimizzando così i benefici terapeutici della riabilitazione.
- Le ruotine piroettanti sono multi-funzione infatti sono dotate di: freni, blocco direzionale, anti-retromarcia e resistenza regolabile. Tutto questo permette alle ruotine del MyWay di essere regolate ad hoc sulle esigenze del bambino.
- E' possibile regolare in angolazione e in altezza il supporto del tronco (sbilanciamento verso la posizione prona) così da favorire l'input al passo e la posizione ottimale per la mobilità di ogni bambino.
- Il telaio MyWay è pieghevole* così da ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto.

NB: *non valido per il MyWay misura 1, questo dovuto alle sue misure già ridotte



Scegliere il MyWay

La configurazione del MyWay parte con la scelta del telaio e dell'imbragatura. Poi è possibile aggiungere diversi accessori se richiesti.

- A. Sella
- B. Maniglioni estraibili
- C. Cinturini con guida per le caviglie
- D. Appoggiatesta
- E. Bretellaggi per sollevatore*
- F. Maniglione di spinta
- G. Cintura per accompagnatore**

La cintura per accompagnatore permette al caregiver di controllare i movimenti del telaio MyWay anche senza l'utilizzo delle mani, così da essere libero di poter dare al bambino un supporto in più se necessario. Inoltre permette di facilitare il passo e gli esercizi terapeutici del bambino, così da interagire nella maniera più corretta in ogni momento.

NB:

* (E) indica gli anelli sull'imbragatura per agganciare i bretellaggi per sollevatore

** Il maniglione di spinta (F) deve essere sempre scelto per utilizzare la cintura per accompagnatore (G)



Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e sui benefici clinici associati all'utilizzo del MyWay visita il sito internet e scarica il documento Know How MyWay.

www.leckeymyway.com

LECKEY[®]
KNOW
HOW



C'è sempre di più da scoprire, MyWay!

TELAIO MYWAY / DATI TECNICI

Misura del telaio	1	2	3
Età (anni)	1-5	4-11	9-16
Altezza dall'apice superiore dell'unità di supporto a terra (mm)	635 – 920	870 – 1190	1070 – 1490
Altezza dalla sella a terra (mm)	220 – 440	400 – 610	550 - 810
Portata massima (kg)	25	50	80
Peso del telaio (kg)	12 (nella misura 1 il telaio e l'unità di supporto superiore non sono separabili)	6,5	9,5
Peso dell'unità di supporto superiore (kg)		10,5	11
Larghezza del telaio (mm)	570	670	720
Lunghezza del telaio (mm)	720	850	1100

IMBRAGATURE MYWAY / DATI TECNICI

Misura	1	2	3	4	5	6
Età (anni)	1-4	2-6	5-9	8-12	12-15	16-18
Circonferenza del bacino (mm) (misurando la circonferenza 10mm sopra la cresta iliaca)	46-56	50-60	55-65	60-70	70-80	80-90
Colori	Viola	Verde	Blu	Rosso	Arancione	Grigio



Ora puoi farlo
a modo tuo,
in MyWay!

1. Gioca con gli amici
2. Scopri nuovi ambienti
3. Vai e Divertiti!
4. Prendi parte a nuove attività
5. Accedi ad un mondo di possibilità
6. Esplora!





 **MyWay**

 **SUNRISE
MEDICAL.**

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.

LECKEY[®]

LS901-01