


TEKNISK MANUAL

Laser - justere tidsintervall





GEMINO

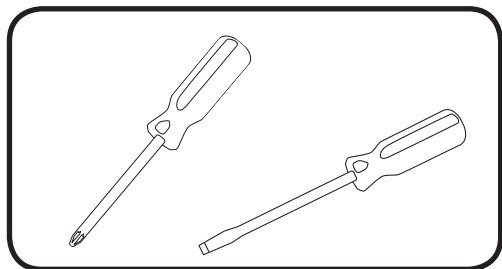


Åpne batteriboksen ved å skru ut de fire skruene med en liten stjernetrekker.



Fjern batteriene (3x)

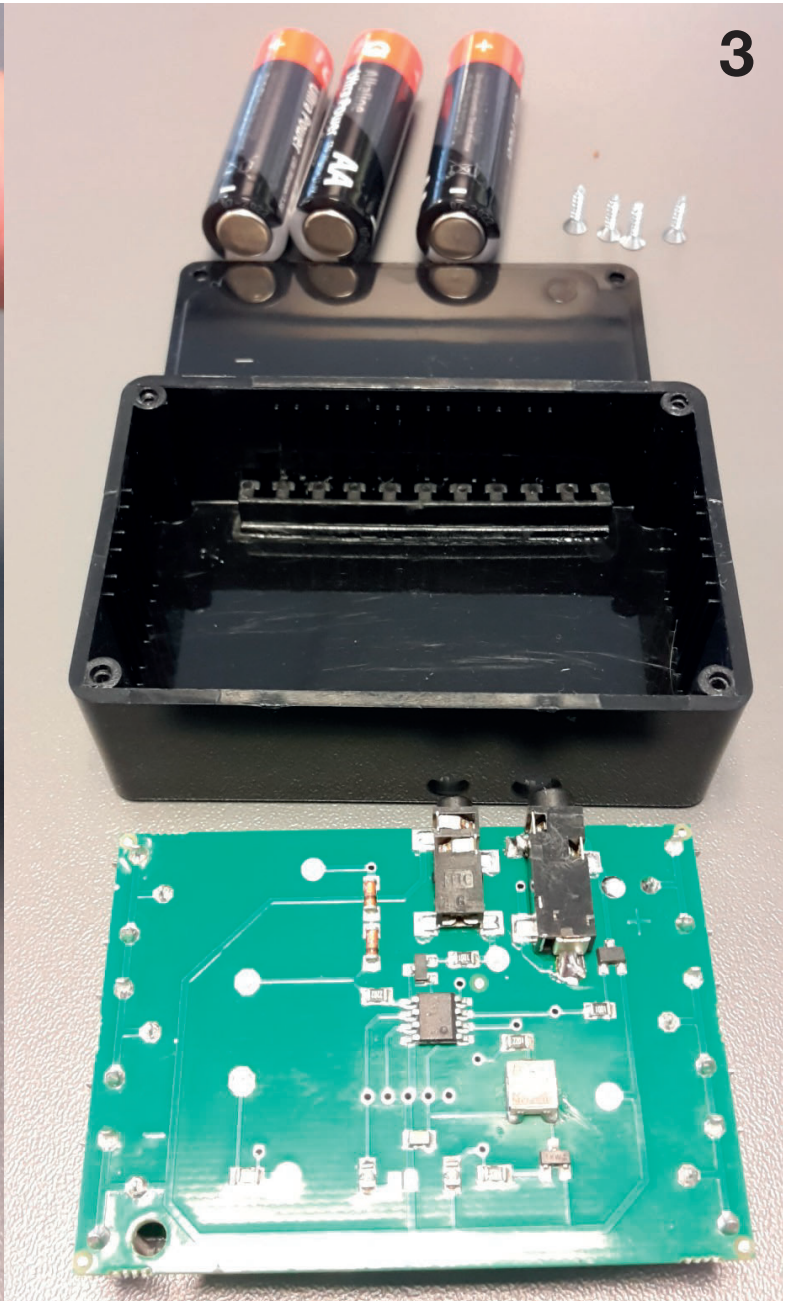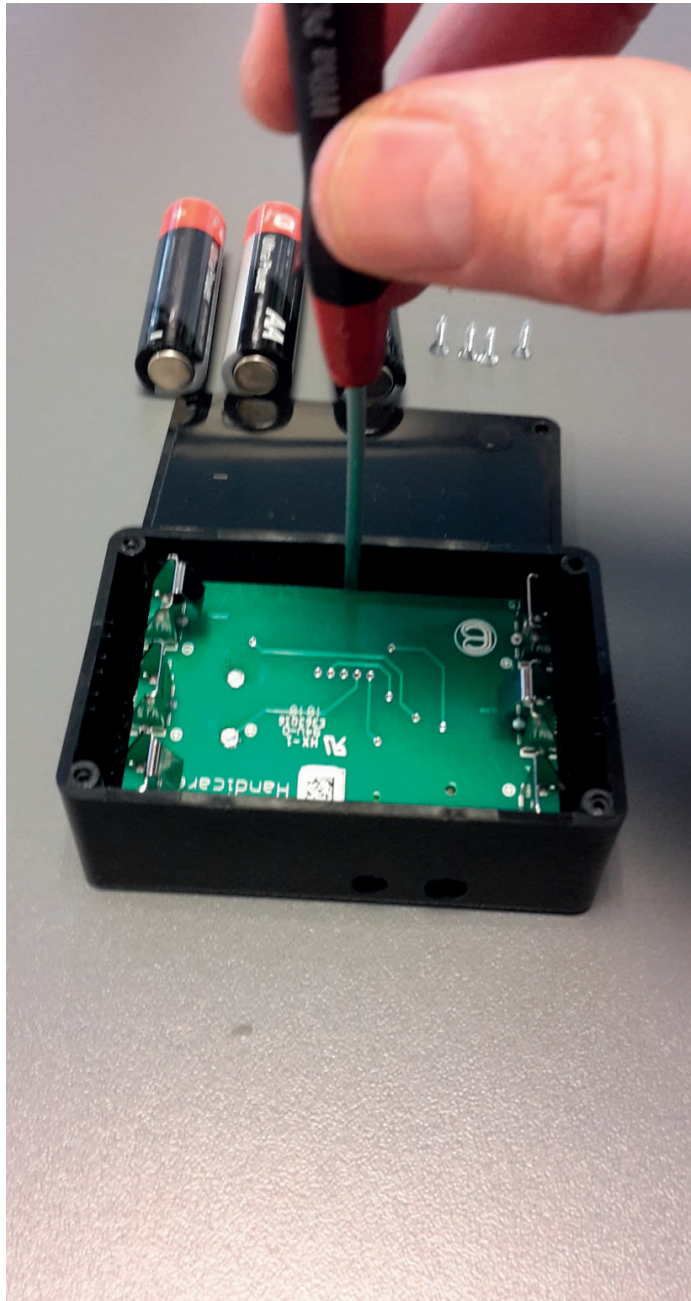

Bruk en liten flattrækker til å løfte opp kretskortet. Påse at du løfter kortet fra siden som vist på bildet, ellers vil det være umulig å løsne tilkoblingspluggene.

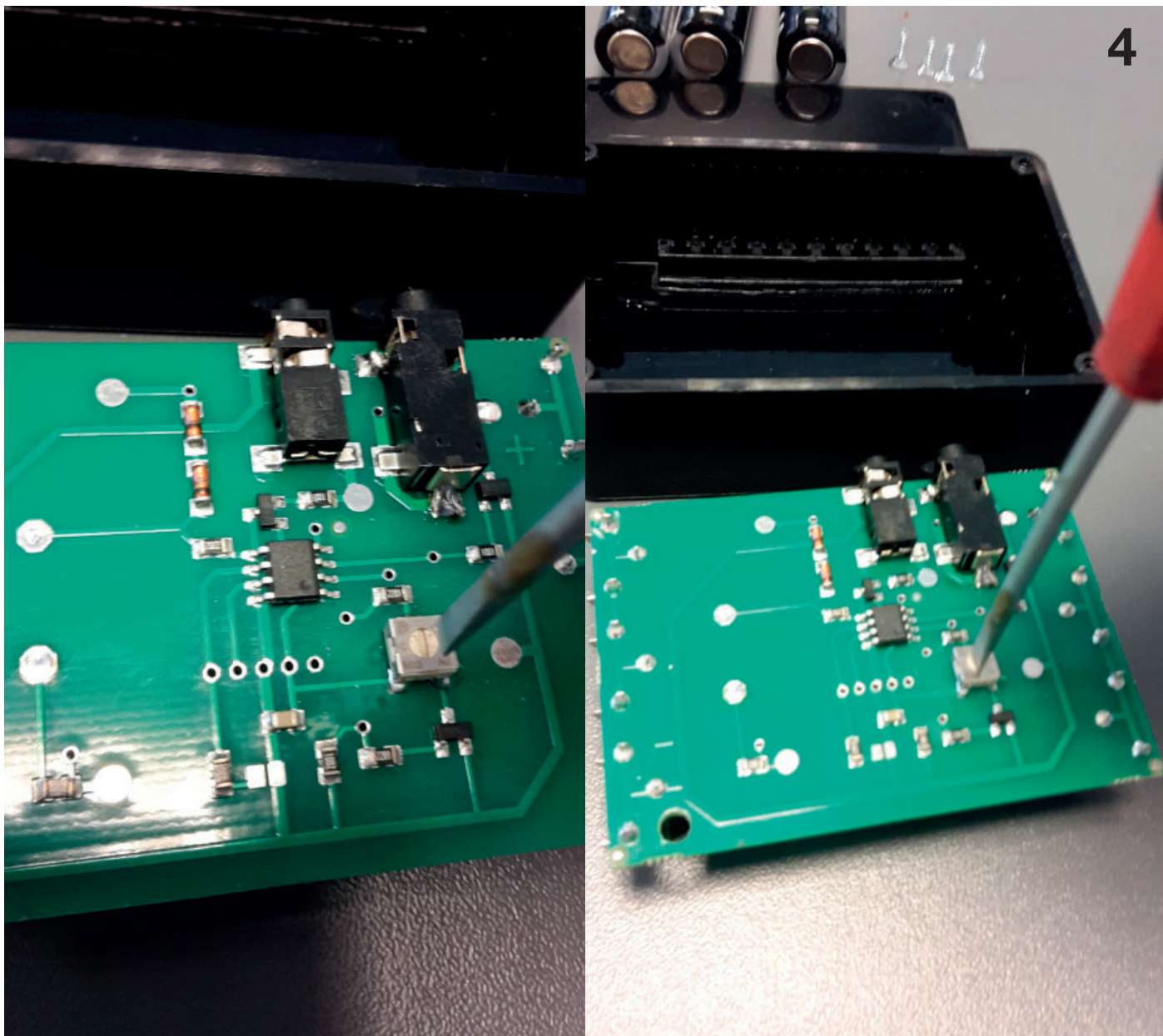

Bruk en flattrekker til å justere tidsintervallet ved å stille inn potesiometeret. Med kretskortet plassert som på bildet, vil du forlenge tiden laseren lyser ved å vri med klokken.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no