

MANUELL
RULLSTOL

QUICKIE®



Xenon² SA


QUICK GUIDE

Bilder och utrustning kan skilja sig något från standardutförandet




Rullstolen levereras komplett. Fäll upp ryggen, om den är i nedfällt läge. Sätt sittdynan (tillbehör) på plats, se till att den ligger åt rätt håll.

För din egen säkerhet och för att få ut det mesta av funktionerna i din nya rullstol, rekommenderar vi att du läser den fullständiga bruksanvisningen innan du börjar använda rullstolen.

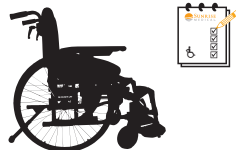

Rullstolen levereras i sittbredder i intervallet 32-50 cm och sittdjup 34-50 cm. Se till att rullstolen du har fått har rätt mått enligt din beställning. Uppgifter om rullstolens dimensioner är markerade på rullstolens ram, under sätet.

Fig. 6.4.2

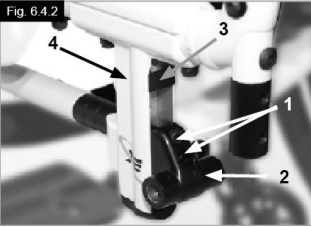

Justera sitthöjden:

Lättviktsblock


För att ändra sitthöjden:

Ta bort gummilisterna (3) från slitsen bak på axelstaget. Lossa skruvarna (1) med en insexnyckel. Placera hjulfästet (2) på axelstaget (4) i önskad sitthöjd (Fig. 6.4.2).

För att uppnå lägsta sitthöjd monteras hjulfästet upp och ner.

Dra åt insexskruvar (1) till 8 Nm.
Sätt tillbaka gummilisterna.

Fig. 6.4.3

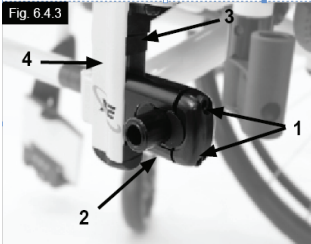

Standardblock

För att justera sitthöjden:

Ta bort gummilisterna (3) från slitsen bak på axelstaget. Lossa skruvarna (1) med en insexnyckel. Placera hjulfästet (2) på axelstaget (4) i önskad sitthöjd (Fig. 6.4.3). Dra åt insexskruvar (1) till 8 Nm. Sätt tillbaka gummilisterna.



Bromsjustering


För att justera bromsen, lossa skruvarna som håller fast den.

Skjut bromsen framåt eller bakåt tills avståndet till hjulet är lagom och enligt specifikation. Dra sedan åt skruvarna igen. Tänk på att lufttrycket i däcket påverkar bromsförmågan så pumpa däckerna innan bromsen justeras in.



Vinkel på länkhjulet

Du kan kontrollera att båda gafflarna är inställda parallellt genom att räkna de tänder som är synliga på båda sidor. Efter justering av länkhjuls-gafflarna vill tänderna tillhandahålla en säker position, och kan justeras upp till 16° i steg av 2°. Använd den platta sidan på främre sidan av länkhjuls-gaffeln för att kontrollera att vinkeln är rätt mot underlaget. Denna patenterade design gör att länkhjuls-gaffeln kan vridas, så att den är i rätt vinkel mot marken när sitsvinkeln ändras. Justering av bromsarna: Efter justering av sitthöjden bak eller balanspunkt, är det viktigt att kontrollera och/eller justera bromsarna.

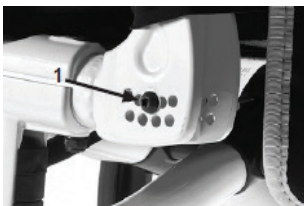

Justera ryggstödet

För att justera ryggstödets vinkel, lossa och ta bort skruven (1). Flytta till önskat läge, ställ tillbaka skruven i rätt läge och dra åt med specificerat vridmoment.



De flesta inställningarna kan göras när brukaren sitter i stolen.




Att fälla ihop rullstolen

Ta först bort sittdynan från rullstolen och fäll upp fotplattan. Ta tag i mitten på baksidan av sätet (Fig. 4.1), och dra upp tills låset (Fig.4.2) "klickar" på plats.



Att fälla ut rullstolen

Pressa frigöringsspaken (fig. 4,3) nedåt, och skjut isär de båda ramhalvorna. Pressa sitsröret nedåt (se figur). Rullstolen är nu uppfälld. Klicka sitsröret på plats i ramen. Detta kan underlättas genom att tippa rullstolen över på en sida, så att vikten avlägsnas från ett av bakhjulen. Var försiktig så att du inte får fingrarna i kläm mellan korset och ramen. Lägga tillbaka sittdynan. (Fig. 4,4).

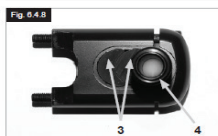

Tyngdpunktsinställning för standardblock

Justering kan utföras direkt vid drivhjulsnästen (endast standardblock) genom att skifta position på de halvmåneformade brickorna från ena sidan till den andra. 3 positioner är möjliga (Fig. 6.4.6 till Fig. 6.4.8). Med hjälp av snabbkopplingsaxeln tar du loss hjulen ur kambringshylsan (4). Lossa skruvarna (1) med en insexnyckel. Ta bort ändbiten (2) från blocket och placera de halvmåneformade brickorna (3) enligt önskad tyngdpunkt. Sätt på locket och dra åt insexskruvarna (1) till 8 Nm.



Justera benstödet

Genom att lossa skruven (1), kan du justera längden på fotstödet för att matcha längden på benet. Dra åt efteråt.



Quick-release bakhjul

Tryck på knappen i mitten av drivhjulet för att ta av eller sätta på hjulet.

⚠ Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att se till att knappen hoppar ut ca 5 mm när hjulbulten är helt inuti hylsan.



Tippskydd

Tippskydden ger ytterligare skydd.
Tippskydden förhindrar bakåttipping.

Tippskydden kan flyttas nedåt. Det bör vara ett avstånd på 3-5 cm mellan tippskydden och underlaget. Beroende på modell kan du behöva svänga undan eller ta av tippskydden när stolen körs upp eller ner från höga hinder (t.ex. en trottoarkant).

Kraschtestad

Rullstolen kan användas som passagerarsäte i en bil och har godkänts enligt ISO 7176-19.

📖 Läs mer om säkerhet i bil i rullstolens bruksanvisning.