

# Q400<sup>®</sup> SERIES

Advanced Outdoor/Indoor Performance



Wózki z napędem elektrycznym  
z serii Q

Zaawansowana technologia dostosowana do indywidualnych potrzeb



Q400 R



Q400 M



Q400 F

To jest wyrób medyczny. Używaj go  
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



# ZAANSOWANA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH

Modele QUICKI®, SEDEO®, JAY®, WHITMYER® i SWITCH-IT® to najszerszy wybór innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie wózków z napędem elektrycznym najwyższej jakości, tworzonych pod kątem indywidualnych potrzeb klinicznych bądź wymogów stylu życia.





# MOC QUICKIE

Pełny zakres wózków elektrycznych, od podstawowej mobilności po kompleksową rehabilitację. Cokolwiek potrzebujesz - bez kompromisów.

POTRZEBY KLINICZNE



Q50

SIEDZISKA  
TAPICERKOWE

PODSTAWY  
RWD



Q100

SIEDZISKA  
TAPICERKOWE

PODSTAWY  
RWD



Q200

SIEDZISKA  
TAPICERKOWE

PODSTAWY  
RWD



Q300

SIEDZISKA  
SEDEO PRO  
SEDEO LITE  
KIDS SEAT  
TEENS SEAT

PODSTAWY  
MWD  
RWD



Q400

SIEDZISKA  
SEDEO PRO  
SEDEO LITE

PODSTAWY  
MWD  
FWD  
RWD



Q500

SIEDZISKA  
SEDEO PRO  
SEDEO LITE

PODSTAWY  
MWD  
FWD  
RWD  
HWD



Q700

SIEDZISKA  
SEDEO PRO  
SEDEO PRO ADV.  
SEDEO PRO HD

PODSTAWY  
MWD  
FWD  
RWD



Q700-UP

SIEDZISKA  
SEDEO PRO ADVANCED

PODSTAWY  
MWD  
FWD

□ RWD: Napęd na oś tylną □ MWD: Napęd na oś środkową □ FWD: Napęd na oś przednią □ HWD: Napęd Hybrid

Nie wszystkie siedziska można łączyć ze wszystkimi podstawami. Proszę zapoznać się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o możliwych kombinacjach siedziska/podstawy.

WYDAJNOŚĆ PODSTAWY


# PREZENTACJA SERII Q400



Mając do wyboru trzy podstawy napędowe, dwa systemy siedzeń: wysoce konfigurowalny SEDEO® PRO i wielostopniowo regulowane siedzisko SEDEO® LITE (oba obejmują JAY i WHITMYER) oraz szereg elementów sterujących SWITCH-IT, możesz dostosować Q400 do swoich indywidualnych potrzeb.

NAPĘD NA OŚ TYLNA

**Q400<sub>z</sub>**  
**SEDEO PRO**

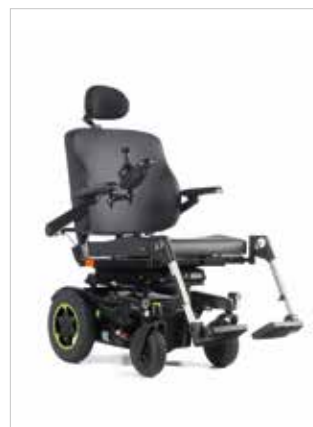

NAPĘD NA OŚ ŚRODKOWĄ



NAPĘD NA OŚ PRZEDNIĄ



**Q400<sub>z</sub>**  
**SEDEO LITE**



# DO JAZDY W TERENIE I W POMIESZCZENIACH

Dzięki możliwości wyboru jednej z trzech podstaw, bardzo elastycznego siedziska SEDEO® PRO lub w pełni regulowanego siedziska SEDEO LITE, model Q400 można dostosować do własnych potrzeb klinicznych bądź wymogów stylu życia.



## PODSTAWY NAPĘDOWE

Q400 M: Napęd na oś środkową

Q400 R: Napęd na oś tylną

Q400 F: Napęd na oś przednią

## SYSTEMY SIEDZISK

SEDEO PRO

SEDEO LITE

JAY i WHITMYER

## STEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

Sterowanie VR2

Sterowanie RNET

Sterowniki SWITCH-IT

System montażu LINK-IT

## WYJĄTKOWY STYL

STYLOWY DESIGN i wybór kolorów

# WYBIERZ PODSTAWĘ Z NAPĘDEM NA OŚ PRZEDNIĄ, TYLNAŁ LUB ŚRODKOWĄ

|                             | Q400 R                                                  | Q400 M               | Q400 F               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rodzaj napędu               | Napęd na oś tylną                                       | Napęd na oś środkową | Napęd na oś przednią |
| Promień skrętu              | 950 mm                                                  | 560-630 mm           | 735 mm               |
| Koła napędowe               | 13" - 14"                                               | 13"                  | 13" - 14"            |
| Kółka samonastawne          | 9"                                                      | 7"                   | 9"                   |
| Prędkość maks.              | 10 km/h                                                 | 10 km/h              | 10 km/h              |
| Akumulatory                 | 50 Ah, 60 Ah, 80 Ah                                     | 50 Ah, 60 Ah, 80 Ah  | 50 Ah, 60 Ah, 80 Ah  |
| Maks. szerokość zawracania  | 1258 mm                                                 | 1100 mm              | 1240 mm              |
| Maks. kąt podjazdu          | 10°                                                     | 8°                   | 8°                   |
| Maks. wysokość krawężnika   | 100 mm z KC<br>80 mm bez KC                             | 50 mm                | 70 mm                |
| Opcje kolorystyczne         | 3 kolory                                                | 3 kolory             | 3 kolory             |
| Maks. zasięg (iso 7176-4)   | 40 km                                                   | 40 km                | 40 km                |
| Min. wys. siedz. od podłoża | 415 mm z przchyleniem siedziska (z akumulatorami 60 Ah) |                      |                      |

Wszystkie podstawy Q400 doskonale sprawdzają się na zewnątrz, dzięki 2-biegunowemu silnikowi i amortyzowanemu zawieszeniu kół z elastomerów gwarantującemu komfort jazdy. Z prędkością jazdy do 10 km/h i akumulatorami o pojemności do 80 Ah wózek świetnie sprawdza się poza domem.

## Q400 R

### Napęd na oś tylną

Napęd na oś tylną to stabilna podstawa i sprawne pokonywanie krawężników. Zapewnia bezproblemowe prowadzenie wózka, co wiąże się z dobrą kontrolą za pomocą urządzeń sterowania nieproporcjonalnego.



Wybór podstawy napędowej wpływa na działanie wózka w różnych sytuacjach i środowiskach. QUICKIE Q400 oferuje pełen wybór podstaw, aby każdy użytkownik mógł wybrać najlepszą opcję dostosowaną do osobistych preferencji, doświadczenia, stanu zdrowia, stylu życia i potrzeb środowiskowych.

### Q400 M

#### Napęd na oś środkową

Napęd na oś środkową zapewnia niezrównaną zwrotność, zajmując przy tym mniej miejsca niż napęd na koła przednie lub tylne. Oznacza to także najmniejszy promień skrętu oraz ogromną intuicyjność jazdy



### Q400 F

#### Napęd na oś przednią

Podstawa z napędem na oś przednią gwarantuje bezproblemową jazdę na zewnątrz, dobrą zwrotność w pomieszczeniach oraz największą stabilność na stromych pochyłościach. Wymaga jednak od użytkownika większego doświadczenia.





# Q400 M

## NAPĘD NA OŚ ŚRODKOWĄ

Podstawa QUICKIE Q400 M zapewnia zarówno doskonałą zwrotność w pomieszczeniach, jak i bezproblemową jazdę na zewnątrz. Silniki w połączeniu z 6-kołowym amortyzowanym zawieszeniem i technologią QUICKIE Anti-pitch zapewniają wyjątkowo komfortową i bezpieczną jazdę.

### DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ W POMIESZCZENIACH

Możliwość przejeżdżania przez wąskie drzwi, jeżdżenia windą i poruszania się w ciasnych przestrzeniach dzięki niewielkiemu promieniowi skrętu i kompaktowym wymiarom podstawy. Łatwe przesiadanie się z wózka i na wózek, prosty dostęp do pojazdów i możliwość siadania przy stole dzięki siedzisku umieszczonemu niżej niż kiedykolwiek wcześniej - od 41,5 cm nad ziemią w przypadku wersji z elektrycznym podnoszeniem i przechylaniem.





# ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ W TERENIE



## AMORTYZOWANE ZAWIESZENIE WSZYSTKICH KÓŁ

Użytkownik może się cieszyć płynną i stabilną jazdą nawet po nierównym terenie dzięki opatentowanemu amortyzowanemu zawieszeniu QUICKIE - sześć kół z niezależną amortyzacją łagodzi wszelkie wstrząsy. Zawieszenie to pozwala też pokonywać krawężniki o wysokości do 50 mm i zapewnia maksymalną przyczepność nawet w trakcie wjeżdżania na zbocza o nachyleniu do 8 stopni.



## TECHNOLOGIA ANTI-PITCH

Technologia QUICKIE Anti-pitch zapobiega zsuwaniu się z pochyłości, a umieszczenie całego ciężaru użytkownika nad kołem napędowym maksymalizuje przyczepność wózka i bezpieczeństwo jadącego.



## MAKSYMALNA SWOBODA

Niezawodne silniki 2-biegunowe umożliwiają jazdę z prędkością 6 i 10 km/h, a akumulatory o pojemności 50, 60 lub 80 Ah maksymalizują zasięg wózka, dzięki czemu z Q400 M można podróżować bez obaw.

PODSTAWY NAPEŁDOWE

# Q400 F

## NAPĘD NA OŚ PRZEDNIĄ

Niewielka odległość siedziska Q400 F od podłoża wynosząca 415 mm zapewnia dobry dostęp do pojazdów przystosowanych do przewozu wózków, stołów itd.

### DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ W POMIESZCZENIACH

Q400 F, z przywiedzionymi ramionami kółek, jest responsywny i oferuje dobrą zwrotność do użytku w pomieszczeniach.





# ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ W TERENIE

Q400 F charakteryzuje trwała konstrukcja z zaawansowanym zawieszeniem kół napędowych i silnikami dużej mocy, co przekłada się na płynną i stabilną jazdę w każdych warunkach.




## ZAAWANSOWANE ZAWIESZENIE KOŁA NAPĘDOWEGO

Dzięki zawieszeniu kół napędowych z elastomerów Q400 F zapewnia wygodną jazdę.



## MAKSYMALNA SWOBODA

Niezawodne silniki 2-biegunowe umożliwiają jazdę z prędkością 6 i 10 km/h, a akumulatory o pojemności 50, 60 lub 80 Ah maksymalizują zasięg wózka, dzięki czemu z Q400 F można podróżować bez obaw

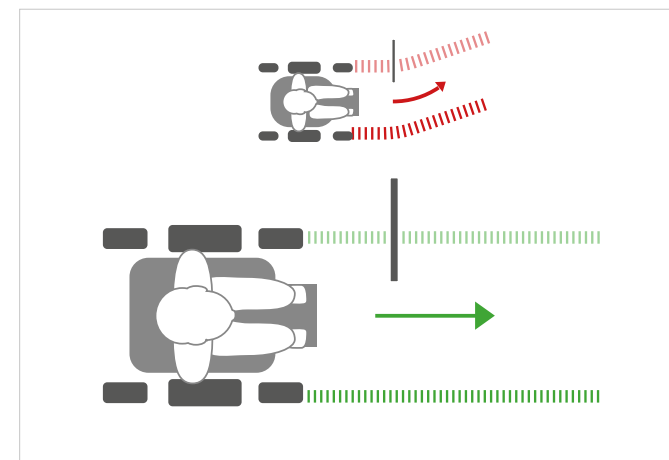

## UTRZYMYWANIE KIERUNKU JAZDY ZA POMOCĄ ŻYROSKOPOWEJ KONTROLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje nawet najmniejsze odstępstwa od wybranego kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjne sterowanie jazdą, zmniejsza liczbę fizycznych lub kognitywnych działań koniecznych do utrzymania kierunku jazdy, dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca (szczególnie w przypadku korzystania ze specjalnych sterowników).

# Q400 R

## NAPĘD NA OŚ TYLNA

Niewielka odległość siedziska Q400 R od podłoża wynosząca 415 mm zapewnia dobry dostęp do pojazdów przystosowanych do przewozu wózków, stołów itd.

### PROSTA I INSTUICYJNA OBSŁUGA

Dzięki umiejscowieniu kół napędowych, Q400 R zapewnia intuicyjną jazdę i jest prosty w obsłudze.





# ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ W TERENIE

Trwała konstrukcja Q400 R połączona z niezawodnym elastomerowym amortyzowanym zawieszeniem kół, zapewniają łatwą i wygodną jazdę w każdych warunkach.




## ZAAWANSOWANE ZAWIESZENIE KOŁA NAPĘDOWEGO

Dzięki zawieszeniu kół napędowych z elastomerów Q400 R zapewnia wygodną jazdę.



## MAKSYMALNA SWOBODA

Niezawodne silniki 2-biegunowe umożliwiają jazdę z prędkością 6 i 10 km/h, a akumulatory o pojemności 50, 60 lub 80 Ah maksymalizują zasięg wózka, dzięki czemu z Q400 R można podróżować bez obaw

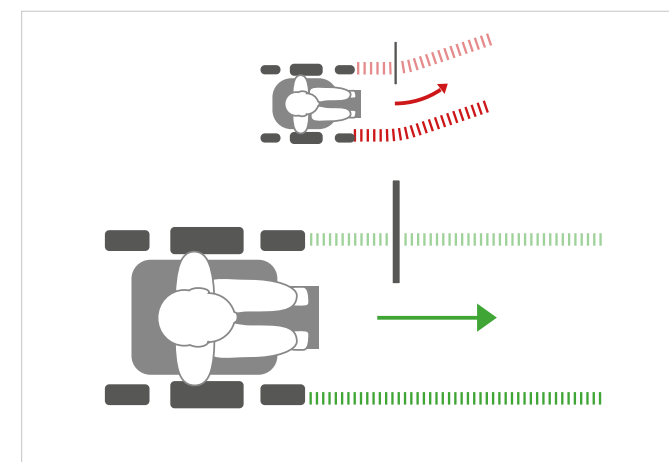

## UTRZYMYWANIE KIERUNKU JAZDY ZA POMOCĄ ŻYROSKOPOWEJ KONTROLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje nawet najmniejsze odstępstwa od wybranego kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjne sterowanie jazdą, zmniejsza liczbę fizycznych lub kognitywnych działań koniecznych do utrzymania kierunku jazdy, dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca (szczególnie w przypadku korzystania ze specjalnych sterowników).

# WYBIERZ SIEDZISKO: SEDEO PRO lub SEDEO LITE

|                                 | SEDEO PRO                  | SEDEO LITE         |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Potrzeby kliniczne użytkownika  | Średnie do wysokich        | Niskie do średnich |
| Szerokość siedziska             | 380-560 mm                 | 385-510mm          |
| Głębokość siedziska             | 400-560 mm                 | 410-560mm          |
| Wysokość oparcia                | 440-560 mm                 | 460-510mm          |
| Możliwość konfiguracji          | Wysoka                     | Średnia            |
| Funkcja pionizacji              | —                          | —                  |
| Pozycja leżąca                  | —                          | —                  |
| Programowane siedzisko          | —                          | —                  |
| Elektryczne odchylenie oparcia  | 90°/150°-90°/150° Biomech. | 85°/120°           |
| Oparcie Anti-shear              | 100 mm (opcjonalnie)       | —                  |
| Przypomnienia o zmianie pozycji | —                          | —                  |
| Kąt przechyłanie siedziska      | 30°/50°                    | 30°/50°            |
| Winda                           | 300 mm                     | 300 mm             |
| Kompatybilność z JAY i WHITMYER | ✓                          | ✓                  |
| Aplikacja Remote Seating        | —                          | —                  |
| Maks. waga użytkownika          | 160 kg                     | 136 kg             |





## SEDEO PRO

Wysokiej klasy, w pełni regulowana rama siedziska z wieloma opcjami konfiguracji i dużym wyborem wygodnych poduszek i opcji pozycjonowania. Dzięki szerokiej ofercie podłokietników, poduszek podłokietników, podnóżków, poduszek do siedzenia i oparcia, zagłówków i akcesoriów do pozycjonowania, SEDEO PRO zapewnia dużą wszechstronność i łatwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników.



## SEDEO LITE

Wielostopniowa regulacja ramy siedziska z odchylanym oparciem. Sedeo Lite jest przeznaczony dla użytkowników o średnich i niskich potrzebach klinicznych, wymagających regulowanego systemu siedzenia. Oferuje odchylane oparcie z opcjonalnymi wygodnymi poduszkami i odchylanym podłokietnikiem. Oparcie, podłokietniki i podnóżki można dopasować do użytkownika. Rama siedziska zawiera szynę dającą możliwość montażu dodatkowych akcesoriów.





# SEDEO PRO

System siedzenia SEDEO PRO łączy elastyczną ramę siedziska oferującą liczne opcje konfiguracji z ogromnym wyborem możliwości podparcia i pozycjonowania, w tym szeroką ofertą poduszek i oparć SEDEO PRO opracowanych z myślą o umiarkowanych lub wysokich potrzebach klinicznych.

SEDEO PRO zapewnia wygodę użytkowania i zwiększa niezależność użytkownika w codziennym życiu.

## SZYBKA I ŁATWA REGULACJA

Rama SEDEO PRO jest niezwykle elastyczna i w pełni regulowana. Wszelkie regulacje można wykonać w szybki i prosty sposób za pomocą jednego narzędzia, nawet gdy użytkownik siedzi na wózku. Ramę można łatwo dostosować i zmodyfikować pod kątem zmieniających się potrzeb użytkownika.

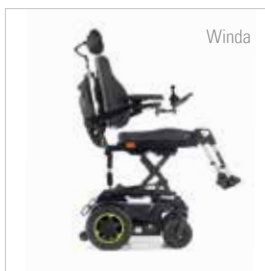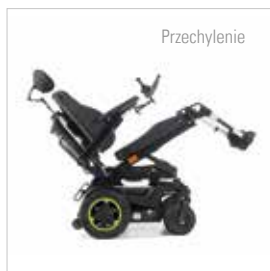



# SIEDZISKO, KTÓRE W PEŁNI DOSTOSOWUJE SIĘ DO UŻYTKOWNIKA



## Oparcie Anti-shear

Odkryj nowe elektrycznie odchylane oparcie ze 100 mm zabezpieczeniem przed siłami ścinania – dzięki niemu użytkownik nie zsuwa się z poduszki. Dodatkowo SEDEO PRO jest dostępny ze stałym oparciem lub dwoma innymi opcjami odchylanego oparcia: mechanicznym i z siłownikami.

## Odchylany podnóżek z regulacją kąta

Elektryczny podnóżek z regulacją kąta i długości pozwala uzyskać optymalną pozycję. Dostępny jest w wersji montowanej centralnie i odchylanej. Ponadto można wybrać podnóżek ze standardowym montażem centralnym, odchylany 70° lub odchylany z manualną regulacją kąta.

## Elastyczna poduszka oparcia

System SEDEO PRO oferuje szeroki wybór poduszek siedziska i oparcia, w tym elastyczną poduszkę oparcia z regulowanymi paskami i pelotami bocznymi, co zapewnia wyjątkową wygodę i ułatwia pozycjonowanie.

## Elementy pozycjonujące

Dostępnych jest także wiele elementów pozycjonujących, takich jak zagłówki SEDEO i WHITMYER, odchylane boczne peloty piersiowe oraz peloty udowe lub kolanowe. Wszystkie elementy pozycjonujące łatwo odchylić lub zdjąć.

## Odchylane podłokietniki

Łatwe w obsłudze odchylane podłokietniki zapewnia wolną przestrzeń do przesiadania się. Możesz wybrać wersję wyjmowaną lub rozkładaną. Dostępne również: Zdejmowany podłokietnik z pojedynczym słupkiem. Wszystkie kompatybilne z 5 opcjami podłokietników.



# SEDEO LITE

SEDEO LITE zapewnia wygodę użytkowania i zwiększa niezależność użytkownika w codziennym życiu. W pełni regulowana rama siedziska, służąca dodatkowym rozwiązaniom montażowym boczna poręcz oraz szeroki wybór opcji opracowano z myślą o użytkownikach o niewielkich i umiarkowanych potrzebach klinicznych.

## SZYBKA I PROSTA REGULACJA

Wszystkie regulacje SEDEO LITE można wykonać w bardzo szybki i łatwy sposób dzięki zrozumiałym skalom i przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Części można regulować, przesuwając lub obracając, aby zapewnić najlepsze wsparcie dla użytkownika i dostosować je do zmieniających się potrzeb.

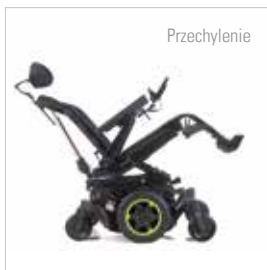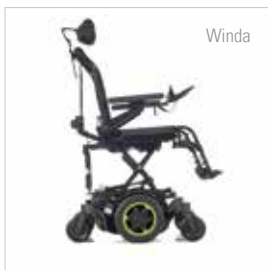

# SIEDZISKO Z WIELOSTOPNIOWĄ REGULACJĄ



## OPARCIE Z OPCJONALNYMI WYGODNYMI PODUSZKAMI

SEDEO LITE oferuje regulowaną tapicerkę z regulacją wysokości i naprężenia oraz szereg opcjonalnych wygodnych poduszek, w tym dwie poduszki siedziska i cztery poduszki oparcia z regulowanymi paskami i różne kontury dla lepszego komfortu i pozycjonowania.

Poduszki i oparcia JAY są również kompatybilne z ramą SEDEO LITE, aby zaspokoić wyższe potrzeby kliniczne.

## ODCHYLANE PODŁOKIETNIKI

Łatwe w obsłudze odchylane podłokietniki ułatwiają transfer na wózek/z wózka. Można wybrać wersję zdejmowaną lub odchylaną. Wszystkie wersje są kompatybilne z różnymi poduszkami odłokietników.

## ODCHYLANE PODNÓŻKI Z KOMPENSACJĄ DŁUGOŚCI

Odchylany podnóżek z kompensacją długości pozwalają uzyskać optymalną pozycję. Dostępna jest również szeroka gama odchylanych i mocowanych centralnie podnóżków, zarówno w wersjach podnoszonych manualnych, jak i elektrycznie. Od prostej wersji do odchylanego podnóżka SEDEO LITE z wieloma dodatkowymi opcjami.

## ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA ZAGŁÓWKA

Zintegrowane mocowanie zagłówka zapewnia nowy standard w zakresie regulacji i wzornictwa. Kompatybilny z zagłówkami SEDEO i WHITMYER.

## ELEMENTY POZYCJONUJĄCE I ZINTEGROWANA SZYNA SIEDZISKA

Dostępnych jest wiele elementów pozycjonujących, takich jak odchylane peloty boczne klatki piersiowej czy peloty ud i kolan. Wszystkie te części są łatwo odchylane i odpinane. Zintegrowana szyna siedziska daje wiele opcji montażu różnorodnych elementów pozycjonujących.





# JAY i WHITMYER

## OPCJE POZYCJONOWANIA

Szeroki wybór zagłówek WHITMYER i poduszek JAY kompatybilnych z ramą SEDEO PRO i SEDEO LITE pozwala sprostać wysokim wymagom klinicznym i zapewnić użytkownikowi możliwie najlepsze siedzisko.




### ZAGŁÓWKI WHITMYER

Stworzone z myślą o różnych potrzebach użytkownika: od podstawowego podparcia po wielopunktową kontrolę. Zagłówki WHITMYER oferują poduszki w wielu różnych kształtach i rozmiarach, tak by zapewnić jak najlepsze pozycjonowanie głowy i wygodę.

### PODUSZKI I OPARCIA JAY

Poduszki i oparcia JAY, stworzone z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i wygodzie, nie wymagają wielu czynności konserwacyjnych, można je łatwo dostosować do własnych potrzeb i dostępne są w wielu wersjach.

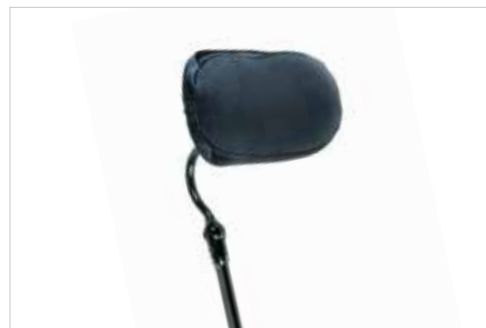



STEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

## KONTROLA W ZASIĘGU PALCA

Seria Q400 i jej zaawansowana technologia sterowania zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę nad sytuacją. Możliwe jest sterowanie nie tylko Q400, ale także urządzeniami domowymi, telefonem i komputerem.

**SEDEO**  
==LITE==



# VR2 i R-NET ZAAWANSOWANE JOYSTICKI

Każdy wózek Q400 wyposażony jest w niezawodne sterowanie VR2 i zaawansowany joystick R-Net. Duży, czytelny wyświetlacz HD i łatwe w obsłudze przełączniki zapewniają intuicyjną obsługę.

## ŁĄCZNOŚĆ

Bezproblemowa kontrola nad otoczeniem za pomocą zintegrowanej funkcji podczerwieni. Dzięki joystickowi można sterować kinem domowym, telewizorem, odtwarzaczem DVD, stacjami dokującymi i innymi urządzeniami.

## BLUETOOTH i IDRIVE

Dzięki tej przydatnej funkcji dodatkowej, można sterować telefonem, komputerem, tabletem oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth lub iDrive.

## OPATENTOWANE PRZYCISKI QUICKIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA

Opatentowana funkcja programowania przycisków Quickie pozwala dowolnie ustawiać działanie przycisków joysticka. Przyciskom można przypisać także dodatkowe funkcje (aktywowane dłuższym przytrzymaniem przycisku), dzięki czemu użytkownik ma szybszy i prostszy dostęp do często używanych funkcji, bez konieczności użycia joysticka.



# SWITCH-IT


## INNOWACYJNE STEROWANIE

---

Wygodny dostęp do 5 programowalnych położeń za pomocą Ctrl+5 – doskonałe połączenie z siedziskiem Memory. Użytkownik może przejść bezpośrednio do wymaganej funkcji, naciskając przycisk.

### ALTERNATYWNE STEROWANIE NAPĘDEM

Jeżeli sterowanie za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, alternatywne sterowanie napędem pozwala doświadczyć pełni możliwości i korzyści oferowanych przez napęd wózka.

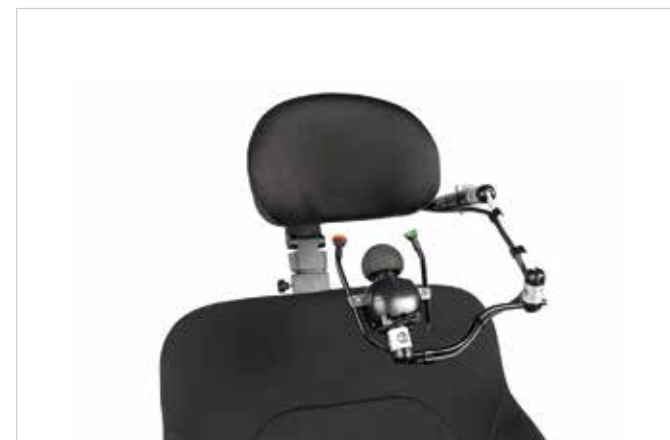

# LINK-IT SYSTEM MOCOWANIA

Konieczne są dodatkowe przełączniki lub elementy sterowania? To żaden problem, wystarczy je podłączyć za pomocą uniwersalnego systemu Link-It.

Dzięki zastosowaniu różnych dostępnych modułów i drążków, można stworzyć nieskończoną liczbę rozwiązań, dostosowanych do każdych potrzeb. Link-It to nie tylko łatwy montaż, ale także minimalistyczne wzornictwo współgrające z oszczędną estetyką Twojego wózka, mimo dodatkowych elementów. Kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, przełącznik przy nagłówku? Link-It – po prostu go podłącz.










DESIGN I WYGLĄD

## WYJĄTKOWY STYL

Seria Q400 to nowy wymiar stylu. Matowe czarne wykończenie podwozia, ukryte przewody i części w połączeniu z elegancką tapicerką przekładają się na atrakcyjny, nowoczesny wygląd.

### Masz ochotę na zmianę?

Seria Q400 dostępna jest ze wstawkami w 4 nowoczesnych kolorach, które stanowią doskonałe uzupełnienie atrakcyjnej matowej czerni nadwozia. Wystarczy zmienić wstawkę. Stylizacja wózka elektrycznego nigdy nie była prostsza.

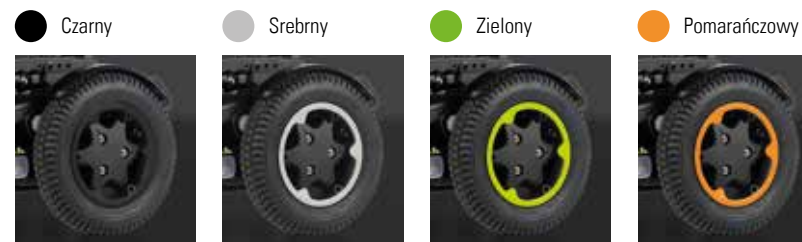

# DANE TECHNICZNE / Q400 R - Q400 M - Q400 F Z SEDEO PRO I SEDEO LITE

|                        | Q400 R/M/F<br>z/SEDEO PRO | Q400 R/M/F<br>z/SEDEO LITE |                            | Q400 R              | Q400 M              | Q400 F              |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                           |                            | Maks. prędkość             | 10 km/h             | 10 km/h             | 10 km/h             |
| Maks. waga użytkownika | 136 kg                    | 136 kg                     | Akumulatory                | 50 Ah; 60 Ah; 80 Ah | 50 Ah; 60 Ah; 80 Ah | 50 Ah; 60 Ah; 80 Ah |
| Szerokość siedziska    | 385-510 mm                | 385-510 mm                 | Elektronika                | VR2, R-Net          | VR2, R-Net          | VR2, R-Net          |
| Głębokość siedziska    | 410-560 mm                | 410-560 mm                 | Średnica zawracania        | 950 mm              | 560-630 mm          | 735 mm              |
| Wysokość siedziska     | 415-490 mm                | 415-490 mm                 | Maks. szerokość zawracania | 1258 mm             | 1100 mm             | 1240 mm             |
| Wysokość opracia       | 440-620 mm                | 460-510 mm                 | Maks. kąt podjazdu         | 10°                 | 8°                  | 8°                  |
| Wysokość całkowita     | Maks. 1400 mm             | Maks. 1400 mm              | Maks. wys. krawężnika      | 80 mm (100 mm z KC) | 50 mm               | 70 mm               |
| El. odchylane oparcie  | 90°-150°                  | 85°-120°                   | Koła napędowe              | 13" - 14"           | 13"                 | 13" - 14"           |
| Kąt siedziska          | 30°/50°                   | 30°/50°                    | Kółka samonastawne         | 9" - 10"            | 7"                  | 9"                  |
| Oparcie Antishear      | 100 mm (opcjonalnie)      | –                          | Opcje kolorystyczne        | 4 kolory            | 4 kolory            | 4 kolory            |
| Funkcje siedziska      | Przech., winda, odchyl.   | Przech., winda, odchyl.    | Maks. zasięg (ISO 7176-4)  | Maks. 40            | Maks. 40            | Maks. 40            |
|                        |                           |                            | Szerokość całkowita        | 640 mm              | 610-620 mm          | 640 mm              |
|                        |                           |                            | Długość całkowita          | Maks. 1370 mm       | Maks. 1130 mm       | Maks. 1340 mm       |
|                        |                           |                            | Waga wózka                 | od 130 kg           | od 130 kg           | od 130 kg           |



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

Więcej informacji na temat pełnych specyfikacji, osprzętu opcjonalnego i akcesoriów można znaleźć na formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical.

Z myślą o osobach niedowidzących niniejszy dokument udostępniono w formacie PDF na stronie [www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)



Producent:  
Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4, Germany  
D-69254 Malsch / Heidelberg  
Tel. +49 (0)7253 980-0