



260204-DK Rev. D

Switch-It[®] CTRL+5[®]
Brugervejledning

SUNRISE MEDICAL LYTTER

Vi takker dig for at have valgt et Switch-It-produkt. Vi ønsker at høre dine spørgsmål eller kommentarer til denne vejledning, sikkerheden og pålideligheden af dit produkt og den service, du modtager fra din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Du er velkommen til at skrive eller ringe til os på den adresse og telefonnummer, der findes nedenfor:

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
DK-2630 Taastrup
Tlf. 70 22 43 49

E-mail: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk



www.SunriseMedical.com/register

Sørg for at registrere dit produkt, og giv os besked, hvis du ændrer din adresse. Dette vil give os mulighed for at holde dig opdateret med oplysninger om sikkerhed, nye produkter og gøre din oplevelse bedre.

Du kan også registrere dit produkt på: www.SunriseMedical.com/register

FOR SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Din Sunrise Medical autoriserede forhandler har det bedste kendskab til din kørestol og kan besvare de fleste spørgsmål om produktsikkerhed, brug og vedligeholdelse.

For fremtidig reference, bedes du udfylde følgende:

Forhandler: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Serienr.: _____ Dato/Købt: _____

YDERLIGERE OPLYSNINGER DU BØR VIDE

Ingen af denne stols komponenter er fremstillet af naturgummilatex.


**BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSESINFORMATION**

Når dette produkt skal bortskaffes, skal du tage det til et godkendt opsamlingssted eller genbrugsstation. Dette produkt er fremstillet af forskellige materialer. Dit produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.


Du skal bortskaffe dit produkt korrekt i henhold til lokale love og bestemmelser. De fleste materialer, der bruges i konstruktionen af dette produkt, er fuldt ud genanvendelige.

Den separate indsamling og genanvendelse af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil bidrage til at bevare de naturlige ressourcer og sikre, at det bortskaffes på en måde, der beskytter miljøet.

Sørg for, at du er den retmæssige ejer af produktet, inden du sørger for bortskaffelse i henhold til ovenstående anbefalinger.

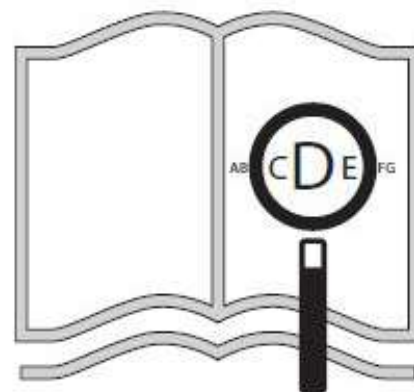

Hvis du har nedsat syn,
kan dette dokument
ses i PDF-format på
www.SunriseMedical.dk

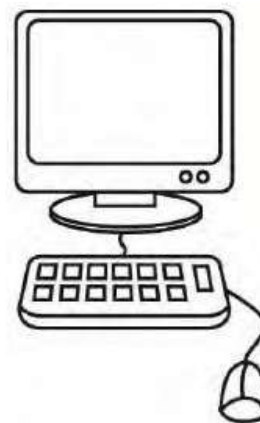

Sunrise Medical ApS underskrift og stempel

BEMÆRK: Efterse alle delene for at sikre, at der ikke er opstået skader under forsendelsen. Hvis der er tegn på skader, må du IKKE anvende produktet. Kontakt fragtselskabet/Sunrise Medical for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Dette produkt må IKKE monteres, før du har læst denne vejledning og sikret dig, at du forstår alle oplysningerne. Hvis du ikke forstår betydningen af de enkelte advarsler, forholdsregler og anvisninger, bedes du kontakte sundhedsfagligt personale eller en autoriseret Sunrise Medical-forhandler. Ellers kan der opstå risiko for personskader eller materielle skader.



Denne enhed kan påvirkes af elektromagnetisk interferens (EMI) samt radiofrekvent interferens (RFI). Hvis du mener, produktet har været ude for elektromagnetisk eller radiofrekvent interferens bedes du straks kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.

1. Radiobølgekilder såsom radiostationer, tv-stationer, amatørsendere, tovejs-radioer og mobiltelefoner kan have en indvirkning på den elektriske styring.
2. Hvis der sker en utilsigtet bevægelse, eller bremserne aktiveres, slukkes der for den elektriske kørestol, og den må ikke betjenes igen, før den er blevet inspiceret, repareret og/eller udskiftet.
3. Hvis kørestolen opfører sig ustabil, slukkes der for den elektriske kørestol, og den må ikke betjenes igen, før den er blevet inspiceret, repareret og/eller udskiftet.
4. Hvis joysticket er beskadiget, kan det få kørestolen til at opføre sig ustabil, og der slukkes for den elektriske kørestol, som ikke må betjenes igen, før den er blevet inspiceret, repareret og/eller udskiftet.
5. Hvis enhedens kabler bliver flossede, får revner eller frakobles på nogen måde, slukkes der for den elektriske kørestol, og den må ikke betjenes igen, før den er blevet inspiceret, repareret og/eller udskiftet.

Generelle advarsler

ADVARSEL!

1. Du må ikke åbne eller pille ved huset til CTRL+5®. Hvis der pilles ved huset, kan det beskadige det indvendige kredsløb.
2. Der må ikke pilles ved fastgørelsesanordningerne på CTRL+5, medmindre der udføres rutinemæssig vedligeholdelse.
3. Sørg for, at udstyret til montering er spændt manuelt til.
4. Tjek udstyret til montering hver måned for at sikre, at det er spændt manuelt til.
5. Ledningsnettet fra CTRL+5 må ikke være løst eller være en hindring for sædefunktionerne. Sørg for, at ledningerne ikke klemmes, når den elektriske kørestol aktiveres.
6. Dette produkt er beregnet til en enkelt bruger.
7. Der skal altid anvendes dele og/eller tilbehør, der er blevet anbefalet eller godkendt af Sunrise Medical, når denne kørestol serviceres.
8. Træk aldrig i kablerne. Dette kan resultere i, at trådene knækker inden i stik eller ledningsnet. Hvis du skal afkoble et stik eller en forbindelsesdel, skal der tages fat i selve stikket eller forbindelsesdelen.
9. Hvis der ved et uheld trykkes på en knap på CTRL+5, bliver denne funktion aktiv.
10. Der er ikke noget udstyr til montering, der må genbruges, inklusive fastgørelsesanordninger.
11. Produktets mærkater kan falde af pga. miljømæssige påvirkninger, herunder varme, sol eller fugt. Kontakt din autoriserede Sunrise Medical-forhandler for at få et nyt mærkat, hvis dette sker.
12. Sørg for, at den elektriske kørestol er slukket, når den ikke er i brug.
13. Sørg for, at den elektriske kørestol er slukket, når der betjenes et motorkøretøj.
14. Sørg for ikke at ramme noget, læne dig op ad eller hænge ting fra din CTRL+5.
15. Du må ikke bruge din kørestol i brusebadet, i en pool eller anden vandmasse.
16. Undgå kraftig fugt (du må f.eks. ikke efterlade din enhed i et fugtigt badeværelse, mens du tager brusebad).
17. Tør din enhed af med det samme, hvis den bliver våd eller fugtig, eller hvis du bruger vand til rengøre den med.
18. Undgå kontakt med salt eller saltholdige forhold, da dette kan beskadige enheden.

Oplysninger til brugeren

Tillykke med dit nye Switch-It-produkt. Sunrise Medicals kvalitetsprodukter er designet til at forbedre din uafhængighed og gøre din hverdag nemmere.


Som en del af vores igangværende produktforbedringsinitiativ, forbeholder Sunrise Medical sig retten til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel.

Denne brugermanual

Denne brugervejledning vil hjælpe dig med at anvende og vedligeholde dit produkt på sikker vis.

Forhandler: Denne vejledning skal gives videre til brugeren af enheden.

Bruger: Før du bruger denne enhed, skal du læse hele vejledningen og opbevare den til fremtidig brug.

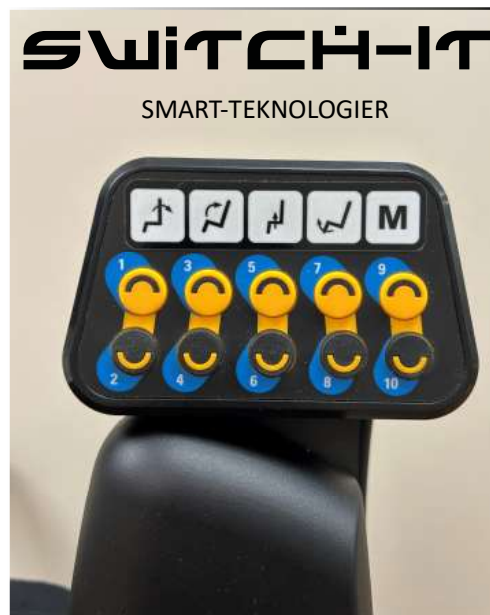

Sikkerhedsadvarsler

Sikkerhed: Temperatur

⚠ ADVARSEL!

1. Hvis du ikke anvender CTRL+5 i en længere periode, skal du sikre dig, at den ikke står, hvor den er udsat for direkte sollys. Visse dele af CTRL+5, såsom tastatur, kabel og hus, kan blive varme eller skøre, hvis de har været udsat for fuldt sollys i længere tid. Dette kan forårsage forbrændinger af huden eller gøre CTRL+5 ubrugelig.
2. Langvarig udsættelse for sollys kan resultere i, at produktets mærkater bliver misfarvede, ulæselige eller falder af.

Sikkerhed: Elektromagnetisk stråling

⚠ VIGTIGT!

En standardversion af din CTRL+5-enhed er blevet testet mht. de gældende regler om elektromagnetisk stråling (EMC-krav). På trods af disse tests:

Kan det ikke udelukkes, at elektromagnetisk stråling kan have en indvirkning på din CTRL+5.

For eksempel:

1. Mobiltelefoner.
2. Stort medicinsk udstyr.
3. Andre elektromagnetiske strålingskilder.

Det kan ikke udelukkes, at CTRL+5 kan interferere med elektromagnetiske felter.

For eksempel:

1. Butiksdøre.
2. Alarmsystemer til erhverv og/eller bolig.
3. Elektriske garagedørsåbnere.

Hvis der opstår en elektromagnetisk interferens, kan det utilsigtet aktivere din enhed.

Hvis sådanne usandsynlige hændelser skulle opstå, beder vi dig om at underrette din autoriserede Sunrise Medical-forhandler herom straks.

Sikkerhed: Kvælningsfare

⚠ RISIKO!

Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.

Sikkerhed: Tildeling af betjeningsfunktioner

⚠ ADVARSEL!

Det er muligt at tildele en funktion til en inputkontrolfunktion (knap, stik) på dit siddesystem. Hvis en knap/stik blevet indstillet til at udføre en dobbelt eller anden funktion, skal du sørge for, at du ved, hvad de forskellige knapper/stik styrer.

Du bedes kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler eller Sunrise Medicals tekniske serviceafdeling, hvis du ikke modtager denne information. I modsat fald kan det resultere i skader på dit produkt eller ejendele og/eller personskaade.

⚠ ADVARSEL!

Hvis de elektriske sædefunktioner har fået tildelt låsefunktion (latch functionality), kan der trykkes på en hvilken som helst knap på CTRL+5 for at stoppe sædets bevægelse, der er igangsat via låsefunktionen (latch functionality). Desuden kan man trykke på tænd/sluk-knappen på stolens kontrolsystem, og det vil også stoppe alle af det elektriske sædes bevægelser i tilfælde af uønsket bevægelse.

⚠ ADVARSEL!

Før CTRL+5 tages i brug, skal det sikres, at brugeren er i stand til at trykke på knapperne på CTRL+5 for at stoppe enhver uønsket bevægelse af det elektriske sæde, der er igangsat af låsefunktionen (latch functionality), eller stemmeaktivering.

Sikkerhed: Stemmestyring

⚠ VIGTIGT!

Før du tænder for og bruger stemmegenkendelse, skal du sikre dig, at CTRL+5 er monteret på et tilgængeligt sted, hvor brugeren eller ledsageren kan trykke på knapperne eller vippekontakterne.

Sikkerhed: Omgivelser

⚠ VIGTIGT!

Før du aktiverer en elektrisk sædefunktion, skal du sikre dig, at den elektriske kørestol er fri for forhindringer, der kan begrænse eller forstyrre de elektriske sædebevægelser.

Vedligeholdelsesråd

Kørestolens levetid afhænger af, hvor godt den bliver vedligeholdt.

For oplysninger om specifikke indstillinger, vedligeholdelse eller reparationer bedes du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.

Opbevaringsråd

⚠ ADVARSEL!

1. Opbevar din enhed i et rent, tørt område. Hvis du ikke gør dette, kan delene ruste eller korrodere.
2. Før du bruger din enhed, skal du sikre dig at den fungerer korrekt.
3. Hvis du opbevarer enheden i mere end tre måneder, skal du få den inspiceret af en autoriseret Sunrise Medical-forhandler før brug.

Rengøring og desinfektion:

1. CTRL+5 skal tørres af en gang om ugen.
2. Hvis der sidder snavs, tørres den af med en let fugtig (ikke våd) klud.
3. Sørg, at du tørrer alle dele af på enheden før brug.
4. Sørg for, at du rengør din enhed regelmæssigt. Dette vil hjælpe dig med at finde løse eller slidte dele. Hvis du finder løse, beskadigede eller slidte dele, skal de udskiftes før brug.

⚠ VIGTIGT!

Sørg, at alle dele af enheden tørres grundigt, hvis den bliver våd eller fugtig ved f.eks. rengøring, eller hvis den anvendes i våde eller fugtige omgivelser.

⚠ VIGTIGT!

1. Der må ikke anvendes opløsningsmidler, klor, skuremidler, syntetiske rengøringsmidler, polérvoks eller midler i sprayform.
2. Der kan anvendes desinfektionsmidler, men kun i opløsninger svarende til producentens vejledning.
3. Sørg for at skylle overfladerne med rent vand og tørre dem grundigt.

Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel.

Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpulstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

Sikre opbevaringsforhold

- Produktet skal opbevares tørt og ved en relativ luftfugtighed på mellem 20 – 75 %.
- Beskyt mod direkte sollys og støv af længere varighed.
- Væk fra direkte varme og ved en temperatur på mellem 5 °C og 40 °C.
- Placér og stabl de emballerede produkter i henhold til pilene "denne side op" på emballagen.
- Hvis en pakke er høj og smal og derfor muligvis ustabil, skal du sørge for, at den er forsvarligt fastgjort på pallen eller i opbevaringssystemet, så den ikke vælter/falder.
- Der må ikke stables noget oven på de pakkede produkter, når etiketten med "Må ikke stables" ses på pakken.
- Produktet må aldrig opbevares udendørs og udsættes for vejr og vind.

Inspektion af systemet forud for brug

Udfør følgende før hver brug:

1. Sørg for, at den elektriske kørestol er tændt og opladet.
2. Sørg for, at knapperne er programmerede til de ønskede og tilsigtede funktioner.
3. Tryk på hver knap for at verificere, at den er programmeret til den tilsigtede funktionalitet.
4. Sørg for, at mærkaten over tastaturet matcher knappens funktionalitet.

A. Produktbeskrivelse

Switch-It CTRL+5 er en kontaktenhed, der kan sættes til PG Drives R-Net-systemet, og som muliggør en opsætning af maksimalt ti forskellige funktioner fordelt på ti diskrete knapper (hver kontakt styrer to knapper). CTRL+5-kontakterne er forprogrammerede fra fabrikken til standardværdier for aktuatorerne på stolene. Med Sunrise Medicals patenterede valgmulighed Tildeling af knapfunktioner kan man ændre den tildeling af knapfunktioner, der bedst passer hver enkelt bruger. Systemet tillader kun én CTRL+5-enhed på den samme elektriske kørestol.

Den forventede levetid for dette produkt er 5 år.

B. Tekniske oplysninger

1. Betjeningsenhed: Kontaktstyret/digital elektrisk kørestol. Kontrol af perifere funktioner.
2. Aktiveringstype: Mekanisk kontakt
3. Tilbagekobling: Aktivering af programmerede elektriske kørestolsfunktioner (dvs. sædefunktioner).
4. Stiktype: R-net-kabel (han) til databus forbindelsesklemmen på den elektriske kørestol
5. Omtrentlige mål: Bredde 108 mm x Højde 63,5 mm x Dybde 31,75 mm
6. USB-port på CTRL+5 giver op til 2,0 A ved 5 eller 9 V.
Bemærk: Hvis der skal bruges mobilkabler, der ikke er af typen USB-C, skal du bruge kompatible kabler, som er specielt egnede til opladning.

C. Kompatibilitet

1. Penny & Giles R-Net-elektronik påkrævet. Den elektriske kørestol skal have knapper med funktionstildeling.

D. Vigtige funktioner

Brugeren kan vælge mellem to forskellige CTRL+5-tastaturversioner: en flad version med trykknapper (Fig. 1) eller en med vippekontakter (Fig. 2).

Tilpasset adgang – Den patenterede teknologi med tildeling af knapfunktioner (valgmulighed) og programmering vha. kørestolsforhandlerens pc-programmeringsenhed og dongle giver brugeren direkte adgang til op til 10 forskellige funktioner.

CTRL+5 kan monteres på adskillige måder for praktisk adgang til sædefunktionsstyringen:

1. Armlænsmontering (forsidebillede).
2. Sædeskinneinstallation — monteres i stil med sædestyring i biler (Fig. 3).
3. Montering på ryglænsrør — for ledsagerbetjening af den elektriske kørestols udstyr (Fig. 4).

CTRL+5 har en indbygget USB-port til opladning eller tilkobling af perifert udstyr (Fig. 5). Strømmen er begrænset til 2,0 A, som er tilstrækkeligt til at oplade de fleste smartphones og tablets. Porten er også på en "grisehale", så den kan flyttes fra side til side afhængigt af brugerens præference.

USB-C-adapteren kan placeres, så adgangsporten kan være i enten venstre eller højre side af CTRL+5. Træk forsigtigt nedad i USB-C-adapteren, drej den 180°, når den er taget ud, og sæt den i igen.



E. System til stemmegenkendelse

CTRL+5 er udstyret med et stemmegenkendelsessystem, der gør det muligt at betjene knapperne med engelske stemmekommandoer.


Standardindstillingen fra fabrikken er, at CTRL+5 har stemmegenkendelsessystemet slukket. Nedenfor kan du se, hvordan du tænder det.

Ved at sige "Hello Sunrise" vil systemet vågne op og lytte efter en stemmekommando.

Bemærk, at lysene på CTRL+5 vil rulle i 8 sekunder for at vise, at CTRL+5 venter på en kommando.

Mens CTRL+5 lytter, skal du sige "Sunrise 1" til "Sunrise 10" for at vælge, hvilken knap der skal aktiveres i det forudindstillede tidsrum.

Knapperne på CTRL+5 er mærket fra 1 til 10 for at hjælpe med at identificere dem korrekt (fig. 6).

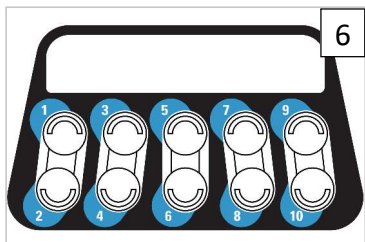

Når knappen er aktiveret, vil den være aktiv i et forudbestemt tidsrum, som er indstillet i programmeringen. Aktiveringsvarigheden kan justeres fra 6 sekunder til 30 sekunder i intervaller på 6 sekunder. Se nedenfor for detaljer om, hvordan du ændrer tidsvarighed og lydstyrke.

Indstil lydstyrkeniveau

Hold knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder (fig. 7).

For lydstyrkeniveauet skal du trykke på knap 3 for at øge lydstyrken og knap 4 for at mindske lydstyrken. Hver lysdiode vil indikere 20 %:

Antal lysdioder	Lydstyrkeniveau	Antal lysdioder	Lydstyrkeniveau
Ingen lysdioder	Lyd slået fra	3 lysdioder	60%
1 lysdiode	20%	4 lysdioder	80%
2 lysdioder	40%	5 lysdioder	100 %

Bemærk: Når lysdioderne lyser cyanfarvet, indikerer det, at du befinder dig i indstillingen for lydstyrke.

Når du har fundet den rette lydstyrke, skal du holde knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder for at vende tilbage til normal CTRL+5-betjening.

Tænd for stemmegenkendelse


Hold knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder (fig. 7).

Tryk på knap 7 for at tænde for stemmegenkendelsen. En LED-lampe vil lyse, hvilket angiver, at stemmegenkendelsen er blevet aktiveret. Aktiveringsens varighed er indstillet til 6 sekunder.

Hold derefter knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder for at vende tilbage til normal CTRL+5-betjening.

Indstil aktiveringsvarighed

Hold knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder (fig. 7).

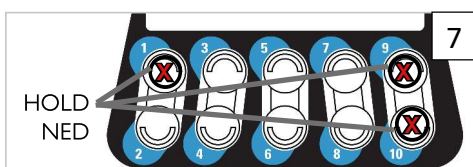

For aktiveringsvarigheden skal du trykke på knap 7 for at øge aktiveringsvarigheden og knap 8 for at mindske aktiveringsvarigheden.

Hver lysdiode viser 6 sekunders aktiveringsvarighed:

Antal lysdioder	Aktiveringsvarighed	Antal lysdioder	Aktiveringsvarighed
Ingen lysdioder	Aktivering er slået fra	3 lysdioder	18 sekunder
1 lysdiode	6 sekunder	4 lysdioder	24 sekunder
2 lysdioder	12 sekunder	5 lysdioder	30 sekunder

Bemærk: Når lysdioderne lyser lilla indikerer det, at du befinder dig i indstillingen for aktiveringsvarighed.

Når du har fundet den rette aktiveringsvarighed, skal du holde knapperne 1+9+10 nede i 3 sekunder for at vende tilbage til normal CTRL+5-betjening.

Stop-kontrol

Hvis du på noget tidspunkt, mens du bruger stemmeaktiveringskommandoer til de elektriske sædefunktioner, ønsker at stoppe sædet i at bevæge sig, skal du bare sige "Stop" eller trykke på en hvilken som helst knap, og CTRL+5 vil straks ophøre med at bevæge sig.

⚠ ADVARSEL!

Hvis CTRL+5 lytter efter stemmekommandoer, når det ikke er ønsket, skal du bare sige "Stop", så holder CTRL+5 op med at lytte.

⚠ ADVARSEL!

I tilfælde af uønsket bevægelse af det elektriske sæde skal du trykke på en vilkårlig knap på CTRL+5 eller sige "Stop", og sædet holder straks op med at bevæge sig. Desuden kan man trykke på tænd/sluk-knappen på stolens kontrolsystem, og det vil også stoppe alle af det elektriske sædes bevægelser i tilfælde af uønsket bevægelse.

Eksternt mikrofonstik

CTRL +5 er udstyret med et 3,5 mm audio-stik i bunden (fig. 8). Dette stik er til en eksternt mikrofon, der kan forbedre stemmegenkendelsen og din samlede oplevelse med CTRL+5.



Den eksterne mikrofon kan give bedre resultater i forskellige situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

Lav stemmevolumen: Det hjælper brugere, hvis stemmer ikke er høje nok til konsekvent at aktivere stemmekommandoer.

Støj fra omgivelserne eller miljøet: Det hjælper med at overvinde vanskeligheder med stemmekommandoer, når der er meget baggrundsstøj.

Nærhed til CTRL+5: Det er nyttigt, når CTRL+5 er placeret for langt fra brugeren eller plejepersonalet, eller hvis afstanden ændrer sig under sædebevægelser.

Brug af en eksternt mikrofon:

1. Tilslut mikrofonen: Sæt en kompatibel mikrofon i audio-stikket på 3,5 mm i bunden af CTRL+5.
2. Placer mikrofonen: For at opnå optimal ydeevne skal mikrofonen placeres i nærheden af kørestolsbrugeren eller omsorgspersonen.

Bemærk: Når en eksternt mikrofon er tilsluttet, deaktiveres CTRL+5's interne mikrofon automatisk.

F. Installation og programmering

Installer CTRL+5 på et sted, der er nemt at nå for den pågældende bruger. Kun en autoriseret Sunrise Medical forhandler må installere dette produkt.




Blinklys

Indikatorernes adfærd afhænger af sædemodulet i systemet.

- Med et intelligent sædemodul (ISM) er indikatorerne (fig. 9) grønne, gule eller røde.
 - Den gule farve angiver, at en kørselshindring er aktiv; grøn angiver, at der ikke er nogen kørselshindring og rød angiver, at en kørselsspærring er aktiv.
 - Når der ikke lyser NOGEN indikatorlamper, betyder det, at modulet endnu ikke er blevet parret med den elektriske kørestol. For parring: Sluk for den elektriske kørestols strøm og tænd den igen.
- Med en komplekst sædemodul (CxSM) er indikatorerne knyttet til knappen under dem (Fig. 9).
 - Når en knap er tildelt en anden funktion end siddeposition, vil indikatoren lyse hvidt konstant.
 - Når en knap er tildelt en lagret siddepositionsakse, og den akse kører, vil lyset blinke grønt.
 - Når en knap er tildelt en lagret siddepositionsakse, og der opstår en kørselsforhindring, skifter LED'en farve til kørselsforhindringsfarven, når aksen er standset.
 - Når en knap er tildelt en anden lagret siddepositionsakse end en lagret akse, skifter kørselsforhindringen farve, når forhindringen sker.
 - LED-farven er rød ved en kørselsspærring.
 - Når en knap tildeles til en sædepositionsakse, og ingen aktuator kanal i den akse har meddelt en kørselsforhindring, vil LED-farven være grøn.

Programmering af knapper med funktionstildeling

- Ændring af tildelingen af knapfunktioner på CTRL +5 må kun gøres af en autoriseret Sunrise Medical forhandler.
- Slut den elektriske kørestol til pc-programmeringsenheden vha. en programmeringsdongle.
- Læs kørestolen ind i programmeringsenheden ved at klikke på den blå pil-ned på værktøjslinjen vist til højre.
- Åbn Switch-It-mappen og det modul, som du ønsker at ændre. Figur 10 viser, at knap 1 på modul 1 styrer Profil op og Profil ned.
- Du ændrer dette ved at dobbeltklikke på den aktuelle tildeling. I dette tilfælde ville du dobbeltklikke på teksten "Profile Up". Dette bringer vinduet op som vist på Figur 11.
- Vælg nu den funktion, du ønsker for knappen, ved at klikke i afkrydsningsfeltet, hvorefter du klikker på OK.
- Fortsæt denne proces, indtil alle knapper har fået tildelt den ønskede funktion.
- Klik nu på knappen Upload, vist til højre.
- Sluk og tænd for kørestolen igen. Dine nye tildelinger opdaterede.

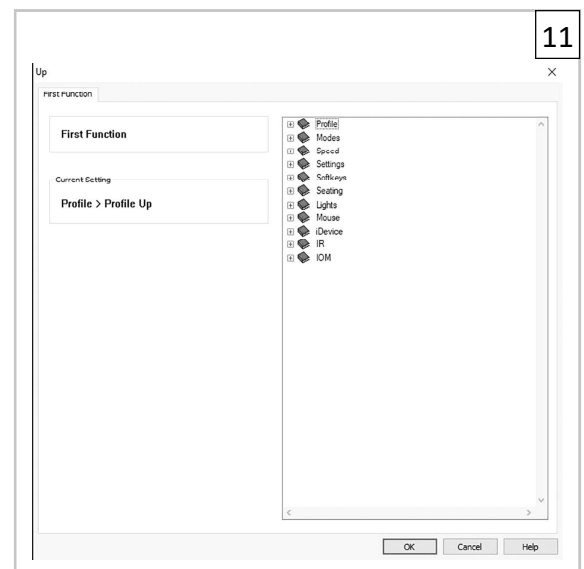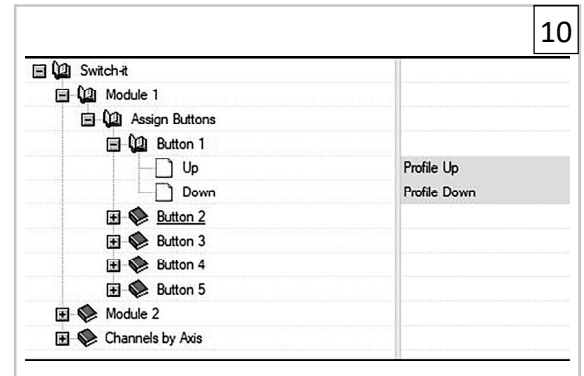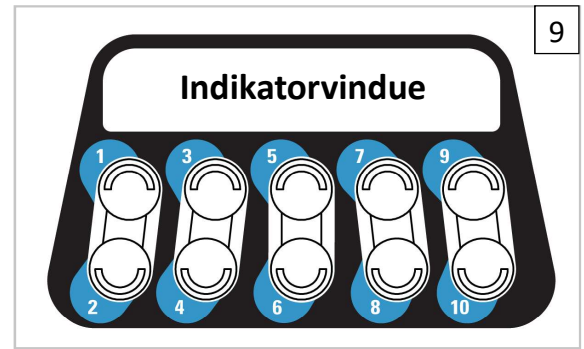

Forskellige konfigurationer tilbudt


1. Tryk på knapperne, der er markeret med et rødt "X" som vist på billedet, og de følgende knapper vil blive tildelt igen i henhold til nedenstående tabeller.



Sædestyring

Sædekonfigurationen styrer op til 5 forskellige sædefunktioner. Den første kontakt er tildelt akse 1 op og ned. Den anden er tildelt akse 2 hele vejen til akse 5 i henhold til nedenstående tabel.


1	2	3	4	5
Akse 1 op	Akse 2 op	Akse 3 op	Akse 4 op	Akse 5 op
Akse 1 ned	Akse 2 ned	Akse 3 ned	Akse 4 ned	Akse 5 ned

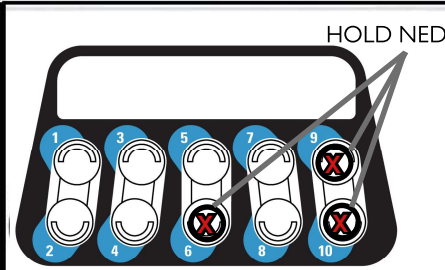

Access

Adgangskonfigurationen styrer 5 forskellige perifere enheder på kørestolen, herunder profiler, hastigheder, lys og drejeindikatorer.

1	2	3	4	5
Profil op	Hastighed op	Horn	Lygter	Venstre blinklys
Profil ned	Hastighed ned	Horn	Faresituationer	Højre blinklys

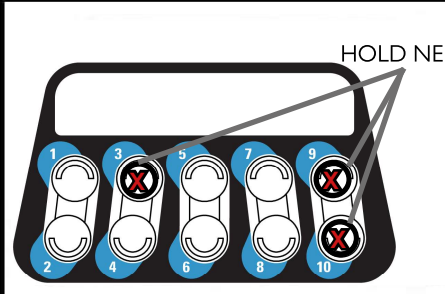


Hybrid

Hybridkonfigurationen styrer en kombination af 3 forskellige sædefunktioner, akse 1, 2 og 3. Denne konfiguration styrer også lysene og indikatorerne.

1	2	3	4	5
Akse 1 op	Akse 2 op	Akse 3 op	Lygter	Venstre blinklys
Akse 1 ned	Akse 2 ned	Akse 3 ned	Faresituationer	Højre blinklys

2. For at nulstille CTRL+5 tilbage til de hukommelsespositioner, der blev tildelt før ovenstående ændringer, skal du udføre følgende trin:
- a. Hold de to fjerneste knapper nede, og tryk derefter på den øverste knap i fjerde række som vist til højre. Dette vil give dig CTRL+5-funktionen tilbage, som den var før ændringen.

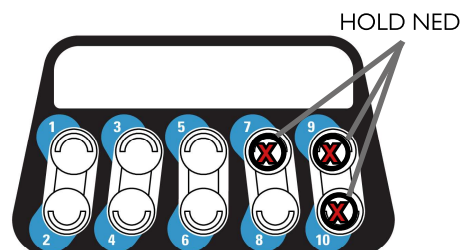

G. Problemløsning

Problem: Kørestolens timeglas vises på skærmen og går ikke væk.

Løsning:

1. Sørg for, at kun én CTRL+5 er forbundet til kørestolen. (Hvis den anden er til stede, skal du trække stikket ud og fjerne den anden CTRL+5).
2. Sluk for kørestolen.
3. Træk stikket ud af CTRL+5.
4. Tænd for kørestolen.
5. Timeglasset vises på displayet, indtil symbolet for 'Sluk' ses.
6. Sluk for kørestolen.
7. Sæt stikket i CTRL+5.
8. Sluk og tænd igen

Problem: Den nye tildeling af knapfunktioner er ikke indlæst i enheden.

Løsning:

1. Sluk for kørestolen.
2. Træk stikket ud af CTRL+5.
3. Sæt stikket i CTRL+5.
4. Sluk og tænd kørestolen igen og forsøg på ny at tildele knapfunktioner for at sikre, at de fungerer efter hensigten.

Problem: Kontrollamperne forbliver tændt, når kørestolen er slukket.

Løsning:

1. Sluk for kørestolen.
2. Træk stikket ud af CTRL+5.
3. Sæt stikket i CTRL+5.
4. Tænd for kørestolen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til din autoriserede Sunrise Medical-forhandler (kontaktoplysninger er at finde på bagsiden).

H. Garanti

Hver Switch-It-enhed er blevet omhyggeligt eftersat og afprøvet for at give optimal ydeevne. Alle Switch-It-enheder er dækket af en begrænset, udtrykkelig garanti.

1. Alle **elektroniske komponenter** er dækket af garantien i tolv (12) måneder fra forsendelsesdatoen, forudsat normal brug, medmindre de er ændret eller beskadiget.
2. Alle **monteringsdele** er dækket af garantien i tolv (12) måneder fra forsendelsesdatoen, forudsat at de anvendes normalt, medmindre de er ændret eller beskadiget.
3. Alle **dele, der kan slides** (dæksler, puder osv.) er dækket af garantien i tre (3) måneder fra forsendelsesdatoen, forudsat normal brug, medmindre de er ændret eller beskadiget.

Erstatningskrav i forbindelse med garantien skal ske via den nærmeste autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Der skal indhentes et returgodkendelsesnummer, før delen returneres til evaluering, sammen med oplysninger om problemet.

Dele, der returneres i forbindelse med et erstatningskrav, skal evalueres af Switch-It, før afgørelsen træffes. Hvis der opstår en defekt i materialer eller udførelse i garantiperioden, og delen ikke er blevet ændret eller beskadiget, vil Switch-It efter eget skøn reparere eller udskifte delen uden beregning.

Med undtagelse af udtrykkelige garantier fremsat i ovenstående er enhver anden garanti udelukket, herunder også stiltiende garantier for, at varen er salgbar samt formålsregnet. Der er ingen udtrykkelig garanti, bortset fra det, der beskrives heri. Godtgørelse for brud på den udtrykkelige garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af varen. Under ingen omstændigheder skal skadeserstatning, som følge af garantibrud, omfatte følgetab eller overstige anskaffelsesprisen på den uacceptable solgte vare.

Type:	Produktnavn/ SKU-nummer	MD	Dette symbol betyder medicinsk udstyr
SN	Serienummer		Producentens adresse
XXXX-XX-XX	Produktions dato	EC REP	EU-autoriseret repræsentant
CE	CE-mærkning	UK RP	Ansvarlig person i Storbritannien
UK CA	UKCA-mærke	CH REP	Adresse på repræsentant i Schweiz
	Se brugsanvisningen		Importørens adresse

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til EN ISO 13485 og ISO 14001.

SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til EN ISO 13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier fra udvikling til produktion. Dette produkt opfylder kravene i overensstemmelse med bestemmelser fra EU og UK. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt den modulbaserede konstruktion betyder, at produktet er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:


- Lammelse
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.
- Tab af lemmer (benamputering)
- Ledkontraktion/ledskader

Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes i tilfælde, hvor en eller flere af følgende situationer forringer den sikre drift:

- Ved synslidelser eller anden forstyrrelse af opfattelsesevnen
- Forstyrrelser i bevidstheds- eller opmærksomhedsevne
- Ukontrollerede, ufrivillige bevægelser eller ubalance, der ikke kan imødekommes
- Ustabil position i siddende stilling

BEMÆRK: Generelle brugerråd. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

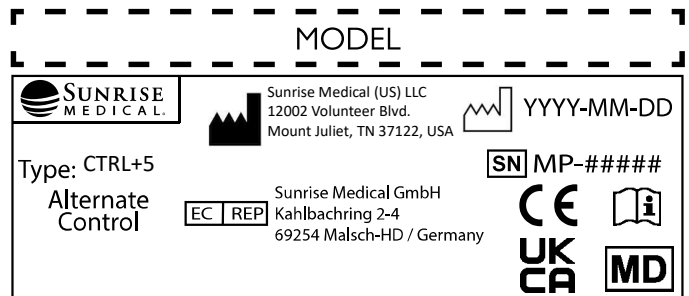

ISO 7010-M002 -
Brugervejledningen/
Dette hæfte skal
læses!
(Blåt ikon)

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.



Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at produktet overholder bestemmelserne i Forordningen om medicinsk udstyr (2017/745).

B4Me særlige ændringer

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt. Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Det kan være muligt at kombinere dette medicinske udstyr med andet medicinsk udstyr eller andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel: +41 (0)31 958 3838
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mount Juliet, TN 37122, USA
Tel: 1-800-333-4000
Fax: 1-800-300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de



Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Defensiedok 20
3433 NE Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8,
Canada
Phone: 1-800-263-3390
Fax: 1-800-561-5834
www.SunriseMedical.ca

Email:

Orders.switchit@sunmed.com



©2025 Sunrise Medical (US) LLC
260204-DK Rev. D 2025-8-21