

BRUKERVEILEDNING og tekniske spesifikasjoner



Pasientseng P3
Pasientseng P3 Vaskbar

Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Caretec

Produktene våre er designet for å gi omsorgspersoner og annet personale et ergonomisk og lett arbeidsmiljø, samtidig som brukeren får et komfortabelt sted å ligge.

Utviklingsarbeidet gjøres i nært samarbeid med både brukere og teknikere samt de ansvarlige for helsevesenet. Vi har valgt materialer, design og tekniske løsninger som gir deg

et høyt sikkerhetsnivå, et godt arbeidsmiljø og enkel bruk.

Produktet er testet av en tredjepart som garanterer at det oppfyller de spesifiserte standardene for bruksområdet i din virksomhet.

Ved å følge rådene våre i denne brukerhåndboken har du et produkt som vil fungere veldig bra i mange år fremover. Den siste informasjonen om våre produkter og tilbehør finner du alltid på: www.caretec.se

Garantiomfang

Caretec gir 3 års garanti på produksjonsfeil med mindre annet er avtalt i kontrakten. Caretec er ikke ansvarlig for skader og funksjonsfeil som oppstår på grunn av manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen. Krav som dekkes av garantien, skal fremsettes umiddelbart når det oppdages en feil.

Det må merkes med riktig serienummer og identifikasjonsnummer og rapporteres til leverandøren. Slitasjedeler er ikke inkludert i garantien.

Produsent:

caretec

Caretec AB Stenserydsvägen 3

SE-571 78 Forserum

Växel 010-3037300

E-post info@caretec.se

Webb www.caretec.se

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Caretec förbehåller sig rätten att ändra i användarhandboken då förändringar och uppdateringar sker av produkten. Besök vår webbsida för senaste version av användarhandboken.

Distributør Norge:



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: +47 66 96 38 00

F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no

Innholdsfortegnelse

Garantiomfang	2
Bruk- og sikkerhetsinstruksjoner	4
Produktbeskrivelse	5
Etikettforklaring	6
Installasjon	8
Funksjonskontroll	8
Endegavler på/av	9
Sidegrinder opp/ned	9
Montering og demontering av avtagbare sidegrinder	10
Montering av infusjonsstativ	11
Montering av løftebøyle/søsterhjelp	11
Funksjoner på håndkontrollen	12
Funksjoner på pleierpanel	12
Hurtignedfelling av ryggdel	13
Forlengelse av liggeflaten	13
Brems	14
Portørpedal	14
Sidegrindforlengelse	15
Jordingspunkt utjevning (plassering)	16
Strømkabeloppheng	16
Vedlikehold	17
Hjul/bremser	17
Løftesystem/liggeflater	17
Lås/sperremekanismer	17
El system	17
Rengjøring	17
Maskinvask	17
Manuell vasking og tørking	18
Vask og rengjøring av madrass	19
Produktinformasjon	20
Forskrifter	20
Produktets levetid	20
Tekniske data	20
Materialer	21
Tilbehør	21
Feilsøknings skjema	22
Tilbakestilling / nullstilling av elektronikk	23
Resirkulering/gjenbruk	24
Miljødeklarasjon	25
Serviceskjema	27

Bruk

Pasientseng P3 / Vaskbar pasientseng P3 er en elektronisk operert pasientseng, beregnet for bruk på sykehus eller andre helsetjenester der medisinsk tilsyn er nødvendig. Funksjonene til sengen er ment å gjøre det lettere å opprettholde eller forbedre pasientens tilstand.

Les hele brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledningen skal alltid være tilgjengelig for brukeren.

Sengen er designet og testet for bruk av mennesker som oppfyller følgende krav på sykehus eller avdelinger for langvarig pleie. Sengen er produsert i samsvar med den internasjonale standarden IEC EN 60601-2-52.

Sikkerhetskrav

Følgende krav må være oppfylt for at produktet skal anses som trygt for brukeren.

- Pasienten må ha en BMI som er 17 eller høyere.
- Pasienten må veie 40 kg eller mer.
- Pasienten må være 146 cm eller lenger.
- Bare tilbehør som er godkjent av Caretec, kan brukes sammen med sengen.
- Endring av produktet er ikke tillatt.
- Bare reservedeler og tilbehør i originalversjonen kan monteres på sengen.

Pasienter som IKKE oppfyller ovennevnte krav, kan bare bruke sengen etter nøye overveielse av omsorgsgiveren.


Sikkerhetsinstruksjon



- Det elektriske systemet er testet og godkjent i samsvar med gjeldende standarder, men det kan forekomme forstyrrelser mellom sengen og andre produkter. Øk avstanden mellom sengen og andre produkter for å redusere elektromagnetisk forstyrrelse.
- P3 må være koblet til en jordet stikkontakt.
- Sengen skal plasseres i sin laveste stilling når pasienten er uten tilsyn for å redusere risikoen for personskader i tilfelle et fall.
- Sidegrindforlenger (se Tilbehør) anbefales for urolige brukere.
- Farer kan oppstå hvis strømledningen håndteres uforsiktig eller utsettes for mekaniske påvirkninger som for eksempel klemming eller rykk.
- Kabler fra annet utstyr skal ikke plasseres ved siden av sengen. Imidlertid må det om nødvendig tas forholdsregler for å unngå at kablene blir presset inn i sengen.
- Hvis det trengs en tykkere madrass enn foreskrevet, bør sidegrindforhøyer brukes.
- Når du bruker funksjonene i sengen, må du sørge for at ingenting blir klemt av de bevegelige delene av sengen.

Produktbeskrivelse

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Brems pedal | 6. Setedel |
| Portør pedal | 7. Lårdel |
| 2. Sidegrind | 8. Leggdæl |
| 3. Hodegavel | 9. Håndkontroll |
| 4. Fotgavel | 10. Pleierpanel |
| 5. Ryggdæl | |


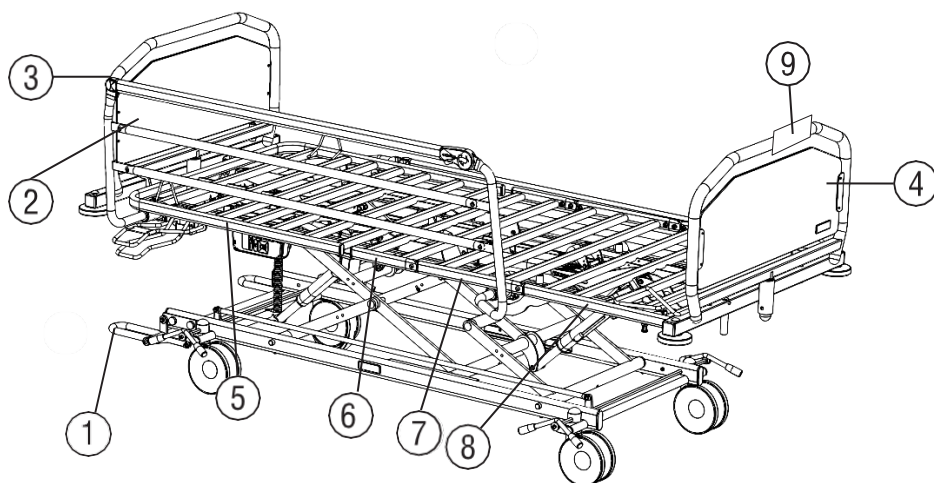


Etikettforklaring

Produksjons- og ID-etikett

Artikelnr: 85049



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Produsent | 9. Produksjonsdato |
| 2. LOT/Serienummer | 10. Safe Working Load (SWL) |
| 3. Artikkelnummer | 11. Pasientvekt |
| 4. Produkt | 12. Advarsel! Les brukerveiledningen før bruk |
| 5. Lydnivå | 13. Produktet er testet i henhold til type: B |
| 6. Belastning | 14. Strekkode inneholder info: produksjonsland, produsent, artikkelnummer, kontrollsiffer |
| 7. Nettspenning/maks strømforbruk | 15. Produktet er CE-merket |
| 8. IP-klasse | 16. Merking av at den er maskinvaskbar |
- (Gjelder vaskbar design)

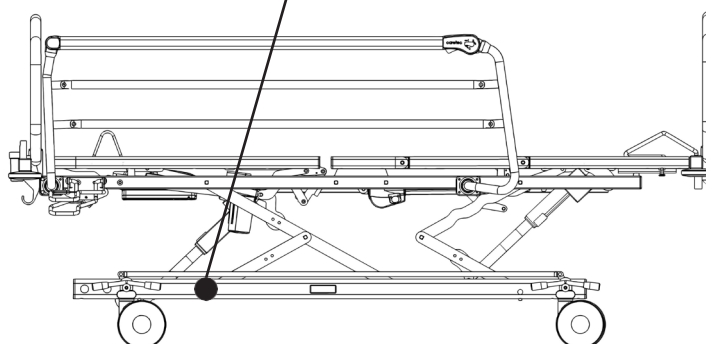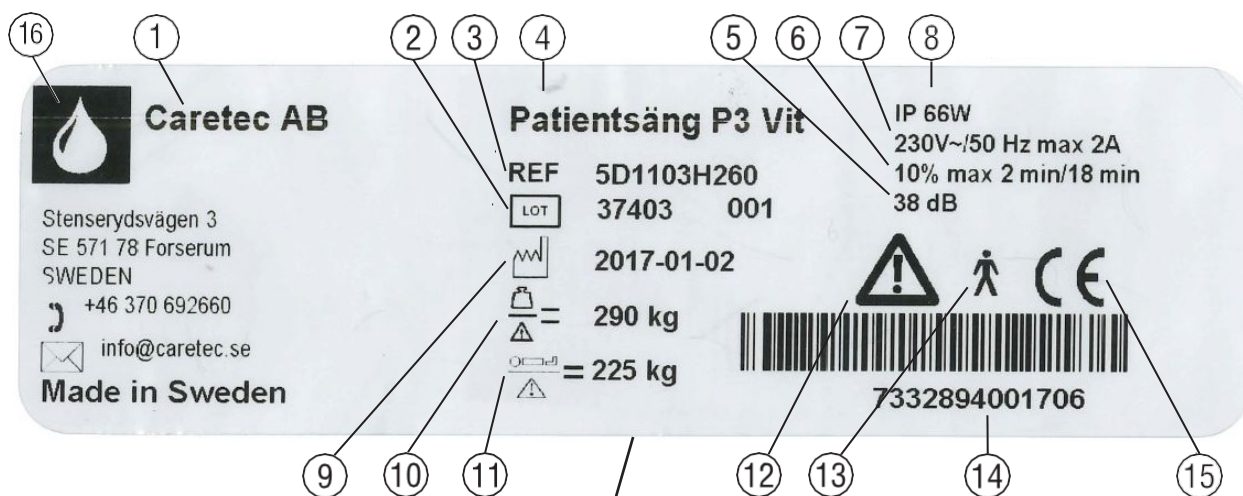

Hurtignedfelling av rygg


Viser liggeretningen.

Advarsel: Les brukerveiledningen.

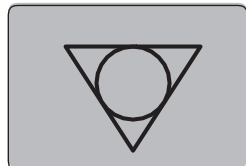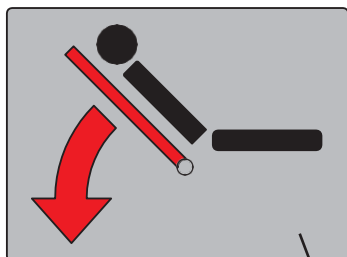


Jordingspunkt


Avtagbar sidegrind

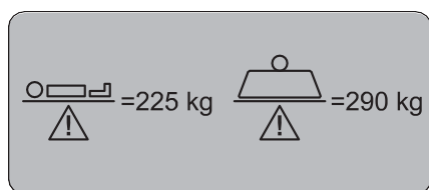

Instruksjoner for pasientens vekt SWL.

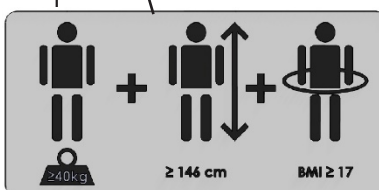


Merk at pasienten må ha en BMI som er 17 eller høyere. Pasienten må veie 40 kg eller mer. Pasienten må være 146 cm eller lenger.

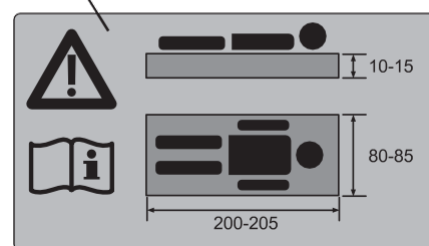

For instruksjoner om madrass størrelse: Les manualen.

Installasjon

- 1 Koble stikkkontakten til vegguttaket.
Sengen må alltid kobles til en stikkontakt for å forhindre at batteriet lades ut.
- 2 Flytt sengen til høyeste og laveste stilling for å kalibrere løftemotorene. Hvis sengen har vært strømløs og batteriet utladet, piper motorsystemet for å indikere at sengen må kalibreres.

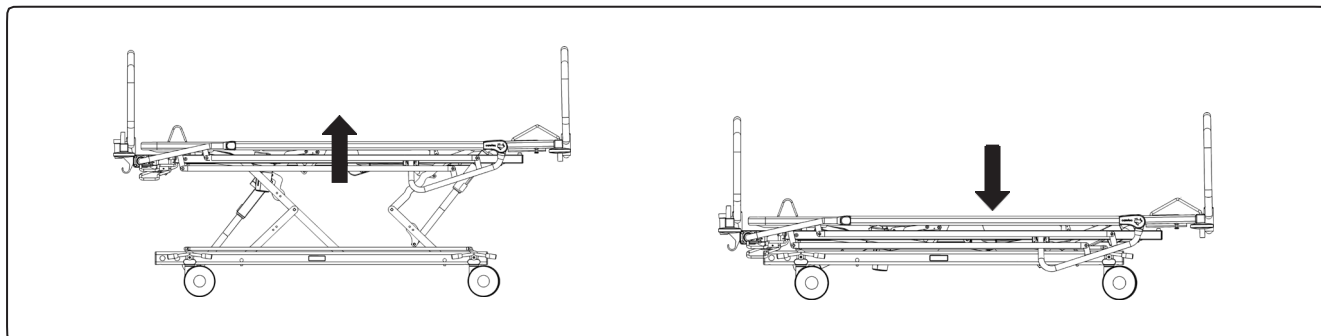

- 3 Utfør en funksjonskontroll. Se nedenfor.

Funksjonskontroll

Kontroller følgende:

- **Endegavler:** Skal gå lett og montere og demontere.
- **Sidegrinder:** Skal gå lett heves opp og senkes ned. Kontroller også at sidegrindens låsefunksjoner fungerer.
- **Håndkontroller:** Kontroller at håndkontrollenes samtlige funksjoner fungerer.
- **Hurtignedfelling av ryggdel:** Kontroller at hurtignedfellingene fungerer.
- **Bremser:** Kontroller at samtlige modus fungerer.




Strømledningen må ikke klemmes.



Plasser sengen minst 15 cm fra stikkontakten.


Endegavler på/av

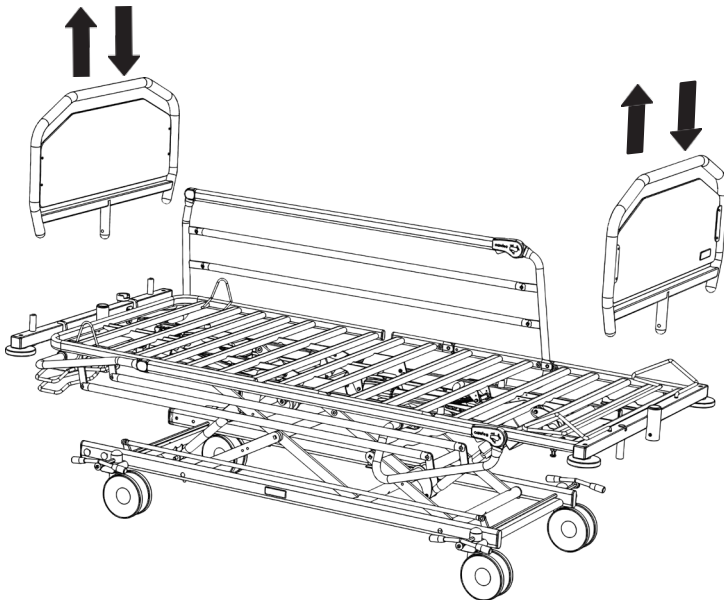


Sidegrinder

opp

- ① Løft opp toppen av sidegrinden slik at sidegrinden er i topposisjon.

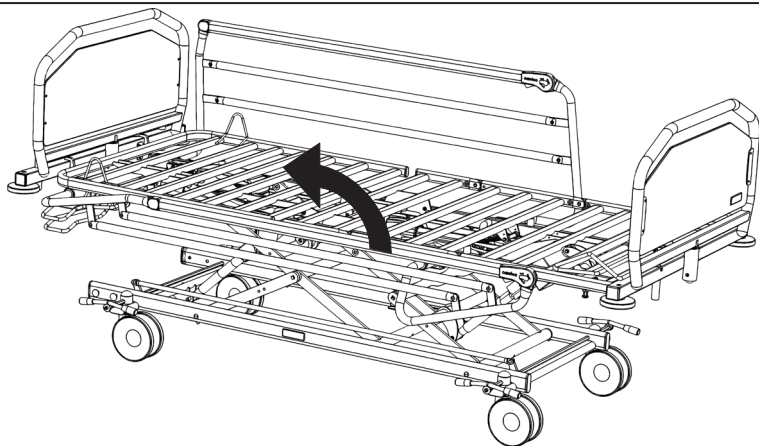


- ② Flytt sidegrinden frem og tilbake for å være sikker på at den er låst.

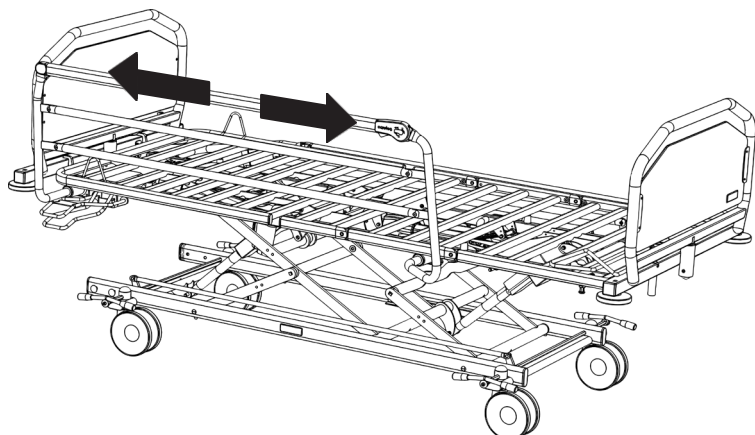


Ned

- ① Trekk sidegrinden tilbake.
- ② Trykk inn den røde knappen.
- ③ Senk sidegrinden ned.

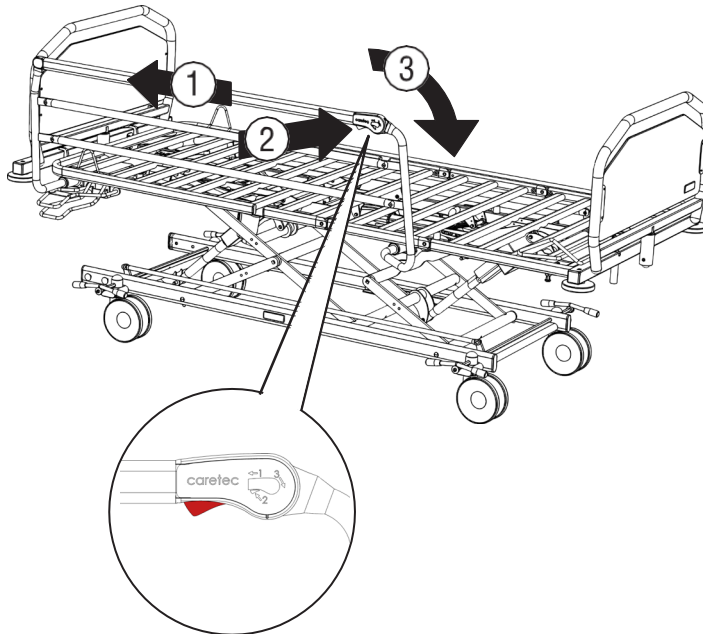


Montering og demontering av avtagbare sidegrinder

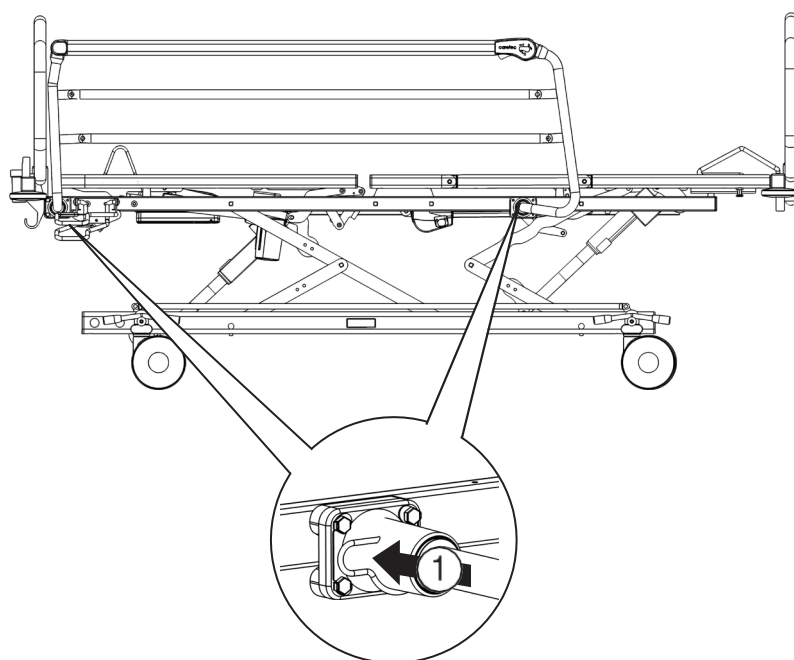


i

- ① Dra ut splinten for montering og demontering
- ② Trekk sidegrinden rett ut.


Montering av infusionsstativ

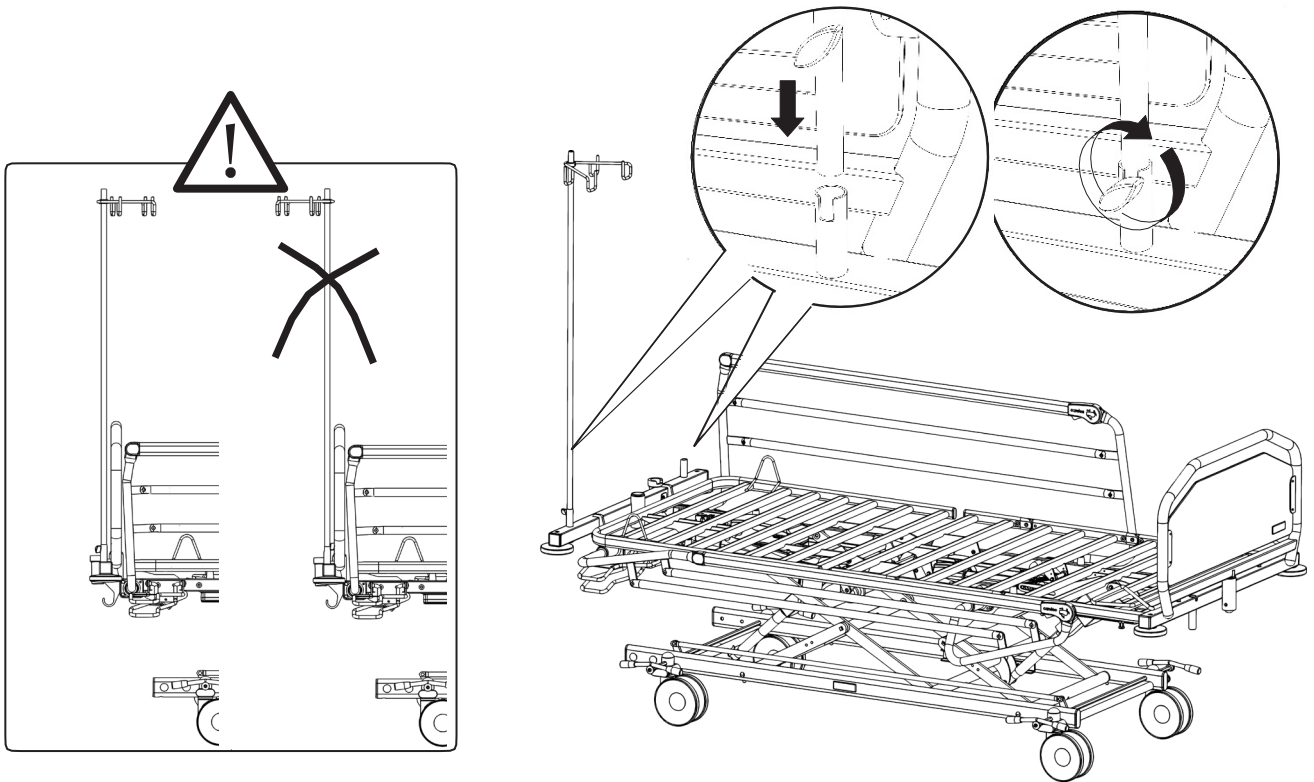


Montering av løftebøyle/søsterhjelp

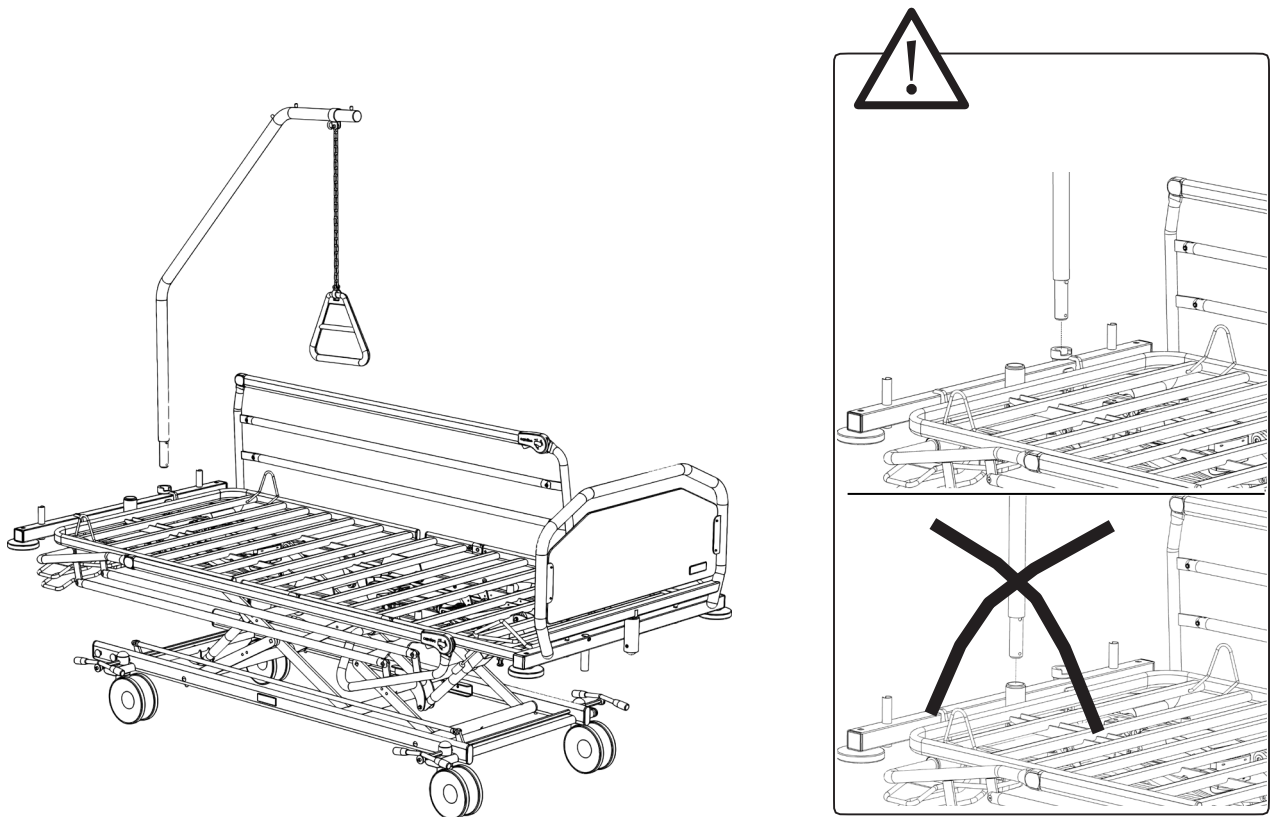

Funksjoner på håndkontrollen

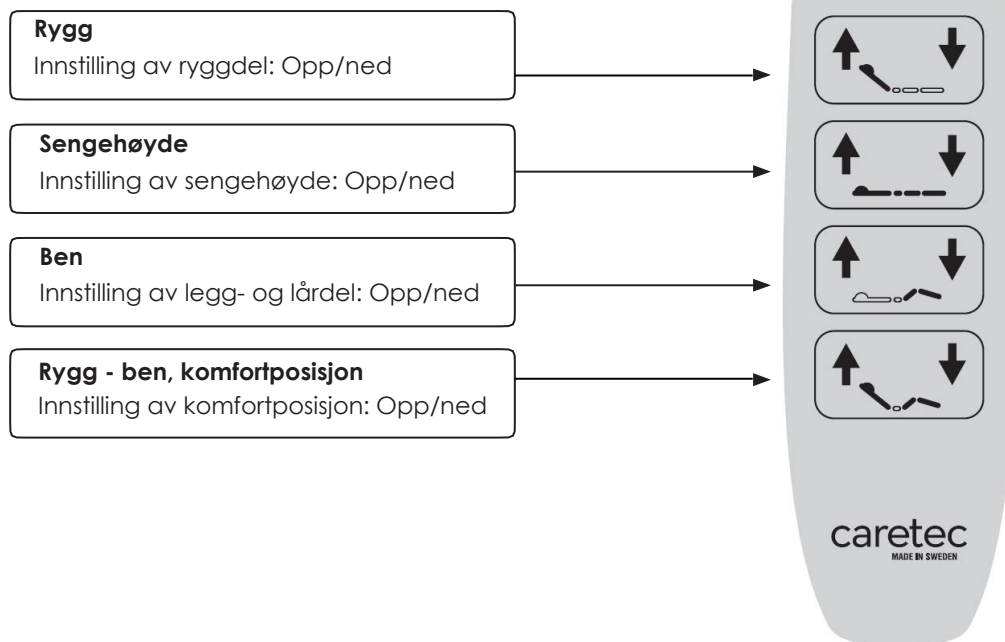


Funksjoner på pleierpanel

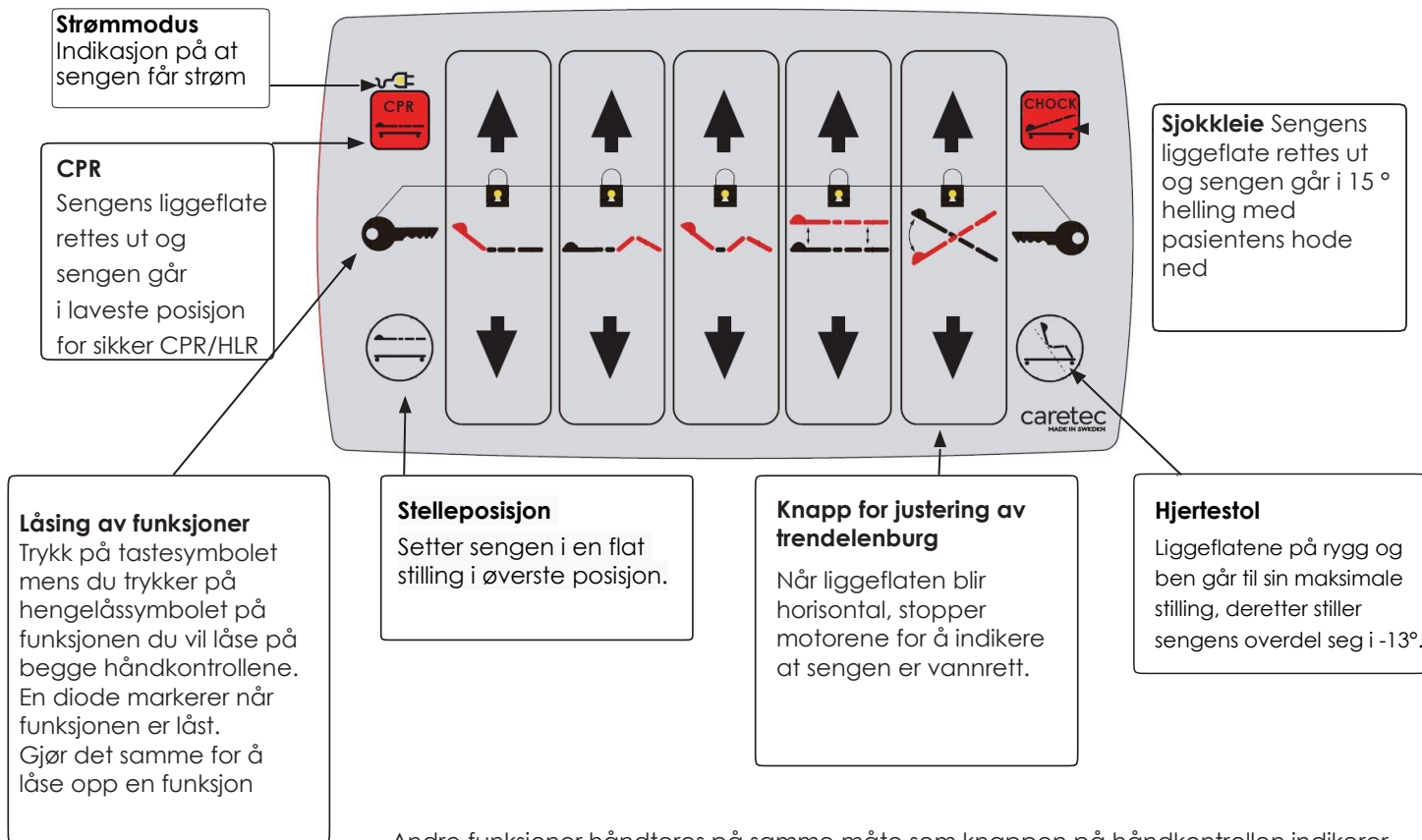


Andre funksjoner håndteres på samme måte som knappen på håndkontrollen indikerer.

Hurtignedfelling av ryggdel

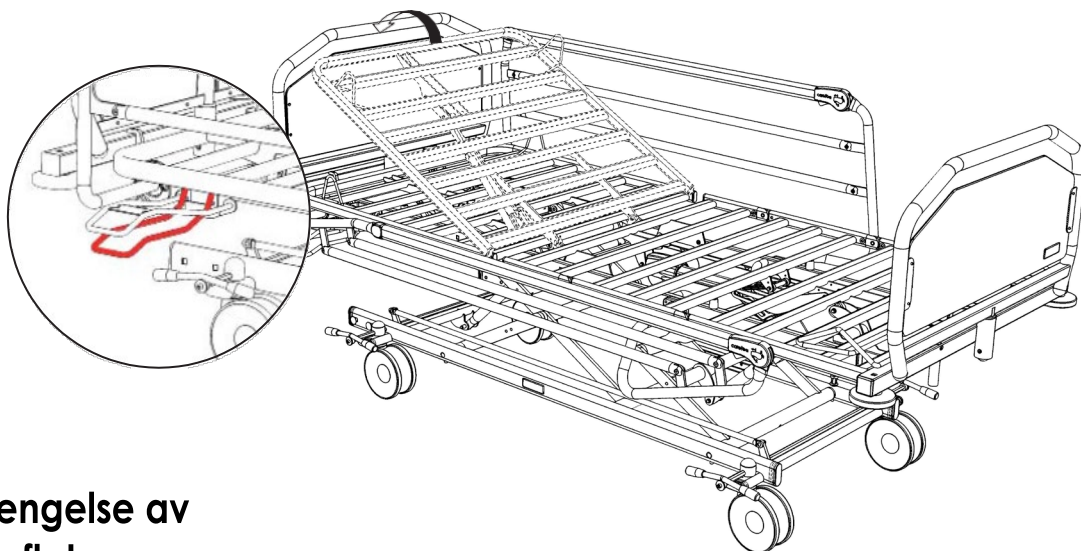

Forlengelse av liggeflaten

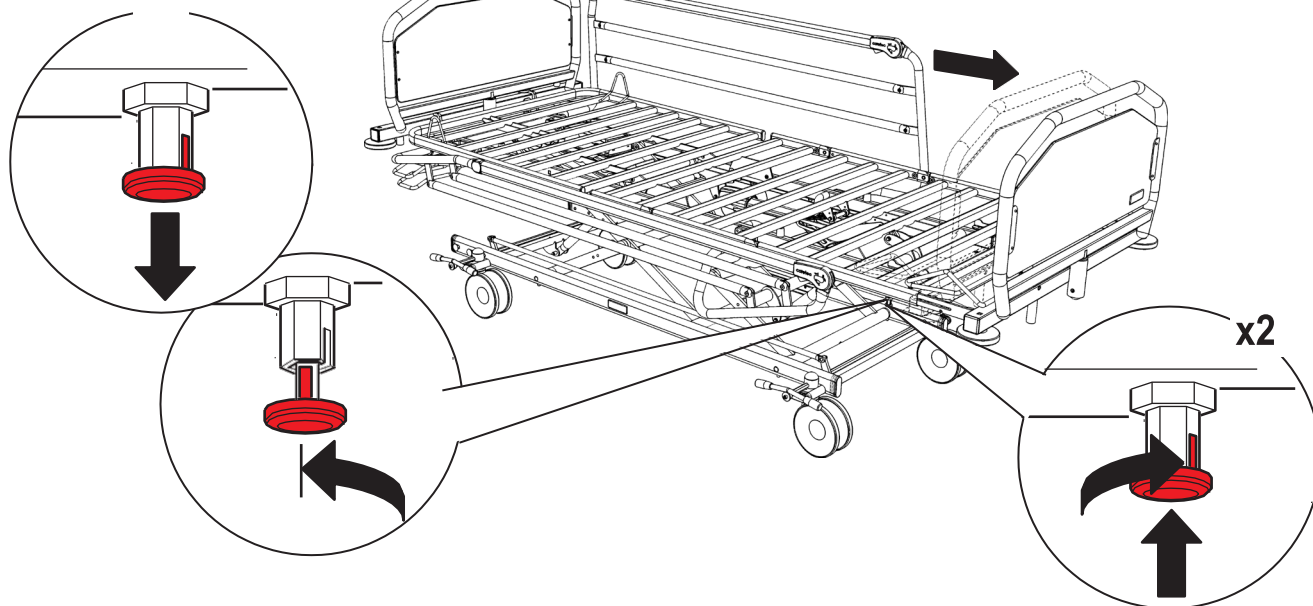

Madrassforlengelse skal brukes til sengeforlengelse.




Kontroller at forlengelsesdelen er låst.



Når du bruker tilbehør til sidegrindforlengelse, må ikke forlengelsesdelen brukes.


Brems

Rød pedal: alle hjul er bremset

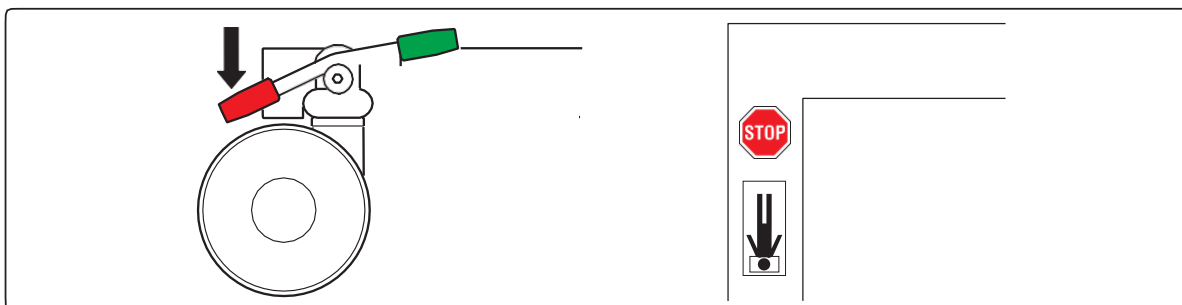


Grønn pedal: Retningsbrems og retningssperret hjul aktivert.

(Brukes for bedre stabilitet for lengre forflytninger.)

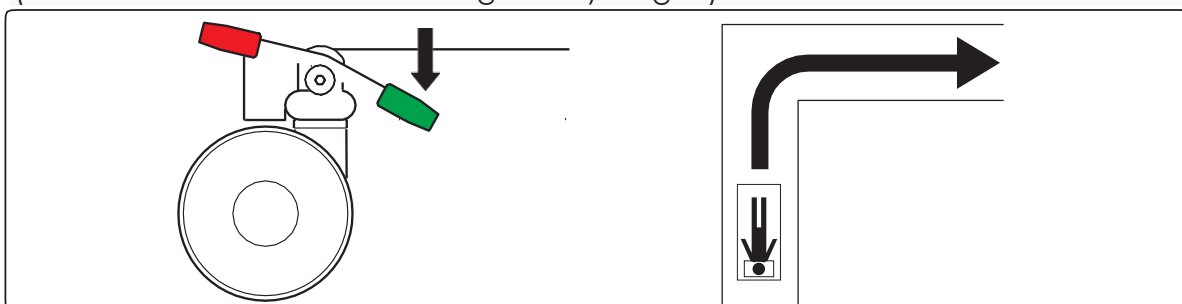

Midtstilling: Brems og retningssperre opphevet.


(benyttes når sengen flyttes i trange områder.)

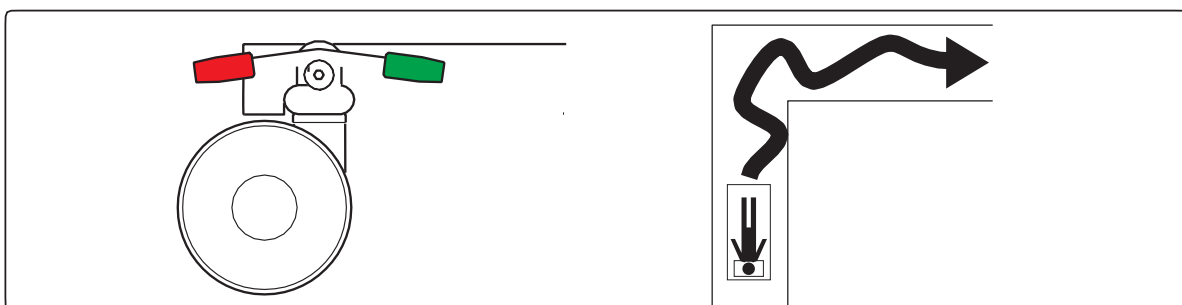



Hjulene skal bare låses opp ved forflytning av sengen.

Portørpedal

Pedalen trykkes ned for låsing og trekkes opp for kjøring (Benyttes for enklere tilgang til brems og styring ved forflytning av sengen.)

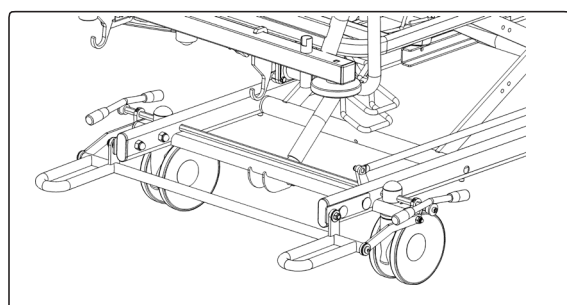

Sidegrindforlenger (tilbehør)

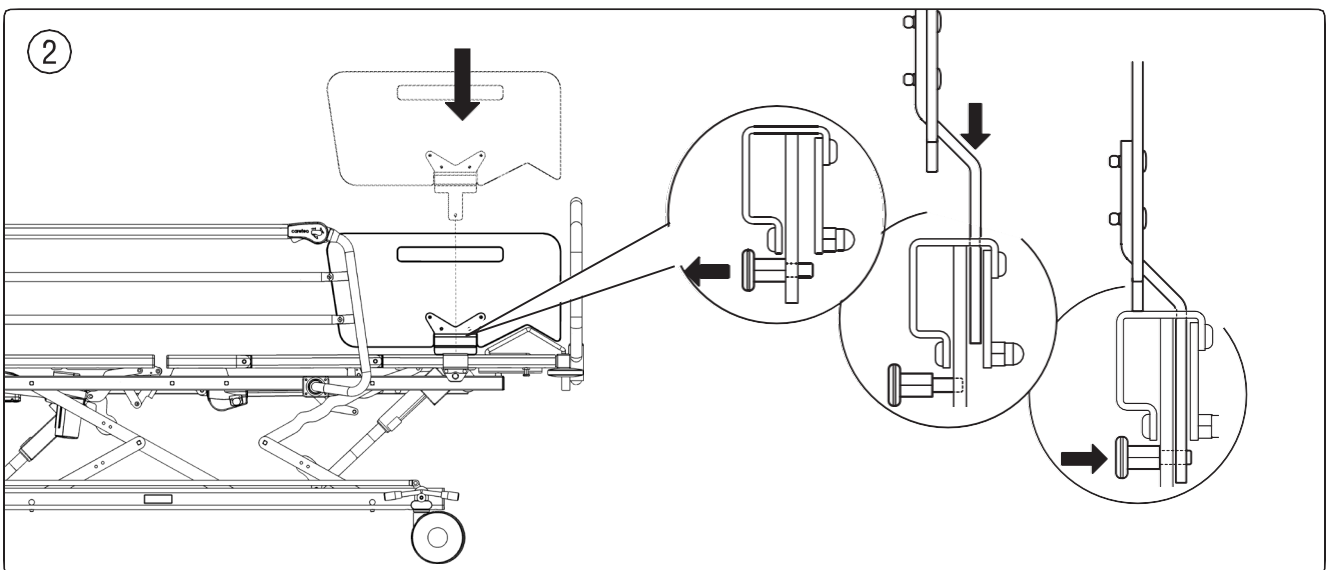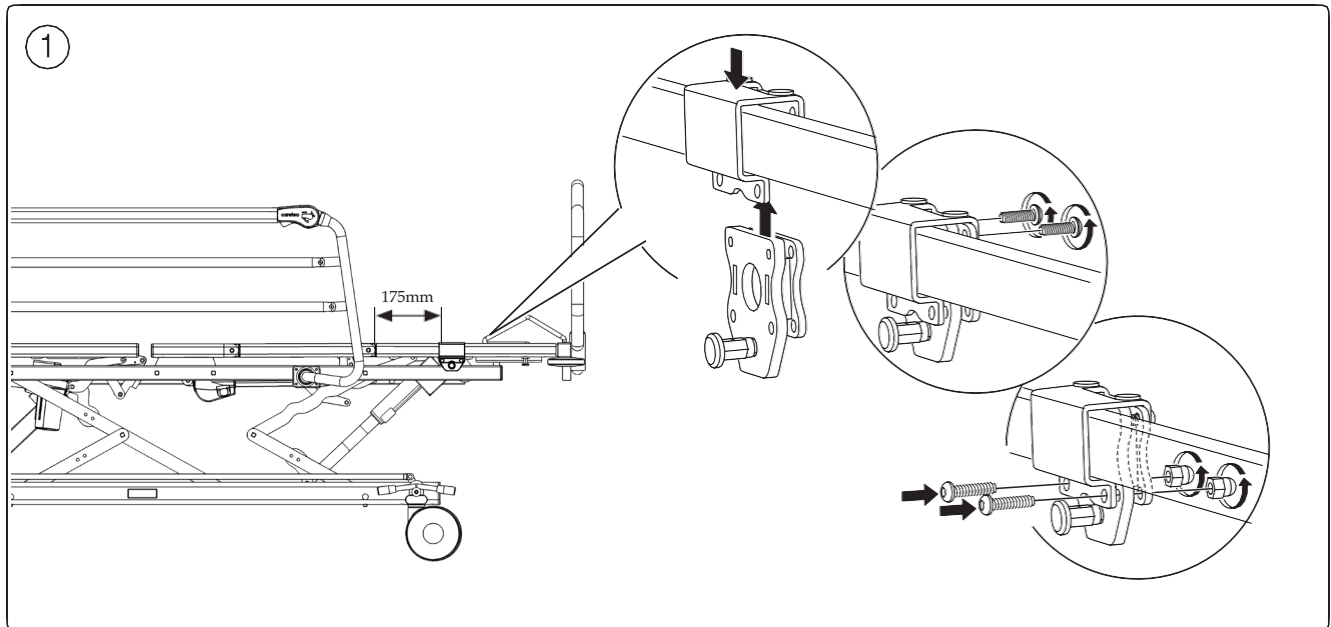


Forsikre deg om at låsepinnen er låst etter montering.




Når du bruker tilbehør til sidegrindforlengelse, må ikke forlengelsesdelen brukes.

Jordingspunkt (plassering)

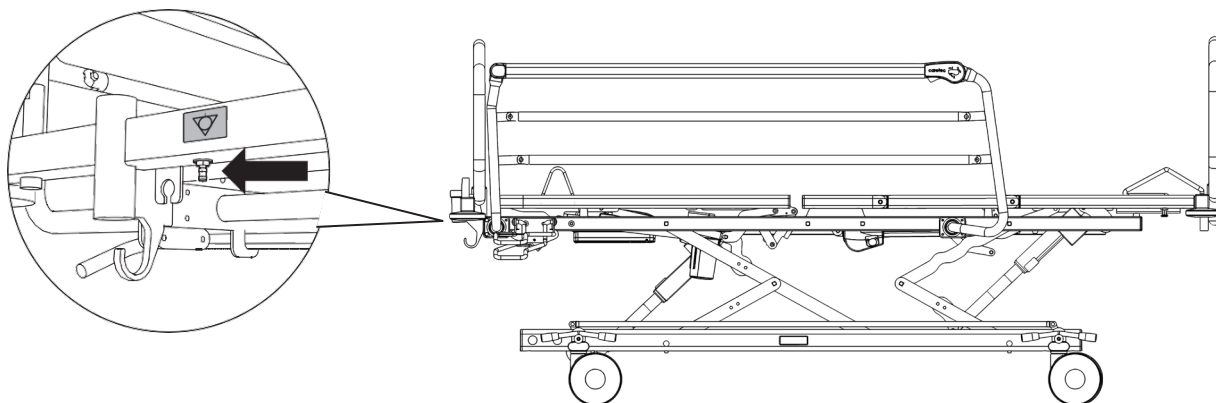

Strømkabeloppheng

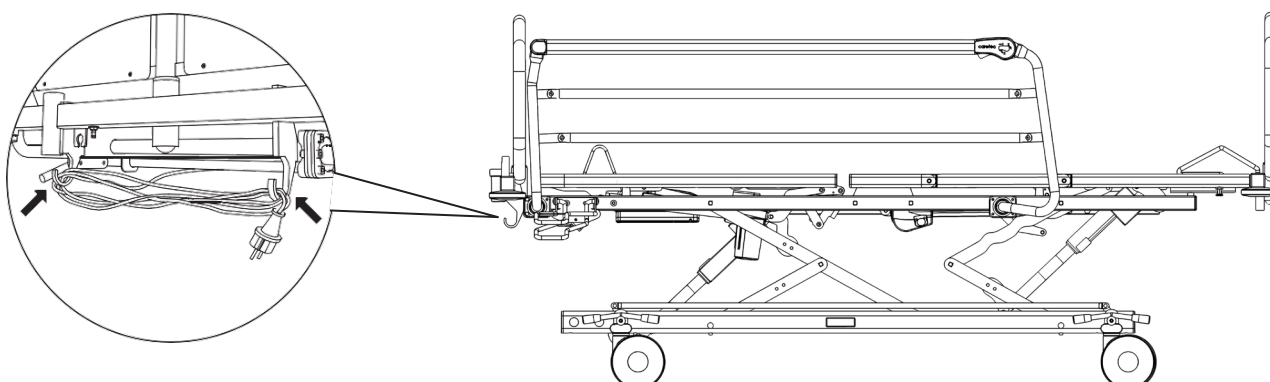

Ved forflytning av sengen skal strømledningen henges på krokene. Dette er for å forhindre skade på ledningen.

Vedlikehold



Det kan være fare for klemming når sengen blir montert opp. Sikre sengen for å minimere risikoen for klemming når du fjerner motorer eller andre deler. Vi anbefaler at du legger sengen på siden før du demonterer.

Hjul/bremser

Hjulfesting og retningslåsfunksjon på hjulene, bremsepedalfesteutstyr, slitebanen og bremsefunksjonen skal kontrolleres og skiftes ut om nødvendig.

Løftesystem/liggeflater

Alle skjøter og liggeflater med stor belastning er utstyrt med selvsmørende gjennomføringer. Imidlertid bør alle ledd smøres på nytt eller smøres med olje om nødvendig. Sjekk at alle foringer og skiver er komplette. Under denne gjennomgangen bør skruer / skjøter også kontrolleres og eventuelt strammes.

Lås/sperremekanismer

Disse skal smøres og funksjonen kontrolleres. Eksempel: endegavler og porter.

El systemer

Disse er vedlikeholdsfrie og må ikke åpnes. Deler med feil må byttes ut med nye enheter.

Garanti gjelder ikke ved feil bruk eller uautorisert åpning av enheter.

Hyppig og vidtrekkende utladning reduserer batteriets levetid betydelig. For optimal levetid bør batteriet lades kontinuerlig, noe som skjer når sengen er koblet til en stikkontakt. Når sengen er ubrukt, må batteriet lades minst hver tredje måned - ellers blir det skadet som følge av selvutladning.

Rengjøring

Maskinvask


Når du vasker i en vasketunnel eller med manuell høytrykksvask, er det nødvendig med et produkt i vaskbar design som har dreneringshull på strategiske punkter for å avlede alt gjenværende vaskevann inne i strukturen, samt tilpasset elektronikk for høy varme og høyt trykk. Rett aldri dysene direkte mot motorer, gasstempler eller håndkontroller, da dette kan ha negativ innvirkning på produktets funksjonalitet.

Vanntemperaturen skal være maks 85°C i ca. 3 minutter.


Skyllemiddel skal benyttes.

Under vask bør sengen plasseres i sin nedre stilling med sidegrinder opp, se bilde nedenfor. Bruk knappen merket CPR på pleierpanelet, se bildet til høyre, for raskt å sette sengen i riktig vaskeposisjon. Ledninger skal ikke forlenges, håndkontroller skal plasseres på sengen. Når det gjelder vaskemiddel og dosering, følg instruksjonene til sengevaskerprodusenten.

Tørk sengen umiddelbart etter vask

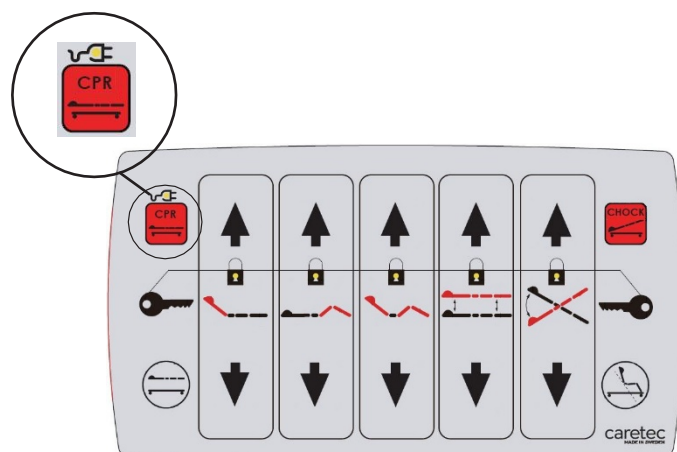

Vask og rengjøring og tørking som ikke følger instruksjonene kan føre til skade på produktet som rust, utførking av plastdeler, kabler, etc. Dette betyr at garantien ikke gjelder.

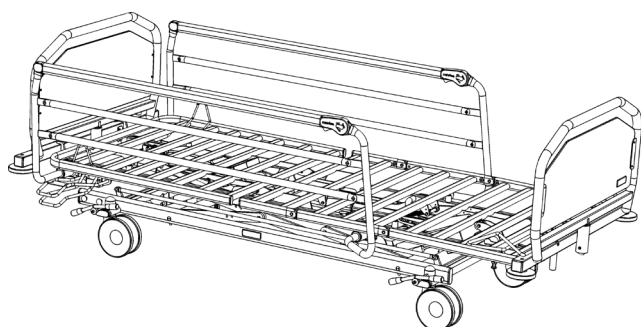

Funksjonskontroll, se Funksjonskontroll side 8, bør gjøres etter hver vask.

Forsikre deg også om at etikettene er intakte.

Manuell vasking og tørking

Skylling, rengjøring og tørking

Rengjøring av seng

Sengen og dens komponenter rengjøres helst med vaskemidler av den typen som løser opp eggehvite, dosering i henhold til emballasje. For en ferdig vaskeoppløsning skal pH være mellom 2,0 - 7,5. Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler som kan skade produktet, som aceton eller tynnere. Beskytt miljøet og ikke rengjør produktet med kjemikalier som påvirker miljøet negativt. Produktet tillater også vask i vaskbar versjon (IP66W)

Max 140 bars trykk ved manuell høytrykksvask og minimum 90 cm arbeidsavstand.

Under vask skal sengen være plassert på nederste nivå med sidegrindene opp, ledninger skal ikke forlenges, håndkontroller plasseres på sengens liggende overflate.

Etter vask bør sengen plasseres i sjokkleie.

Når du vasker i en vasketunnel eller med manuell høytrykksvask, kreves en seng i vaskbar utgave som har tilpasset elektronikk for høyt varme og høyt trykk (IP66W) og dreneringshull på strategiske punkter for å avlede alt gjenværende vaskevann inne i strukturen. Rett aldri dysene direkte mot motorer, gasstempler eller håndkontroller, da dette kan ha negativ innvirkning på produktets funksjonalitet.

Vanntemperaturen skal ikke overstige 85° C i cirka 3 minutter. Skyllmiddel skal brukes. For å minimere vann som er igjen i sengen og uansett om sengen vaskes som beskrevet ovenfor eller rengjøres på tradisjonell måte med en klut, bør den alltid tørkes umiddelbart.

Instruksjoner for rengjøring, pleie, vedlikehold og bruk må følges for at produktets garanti skal gjelde.

Funksjonskontroll, se Funksjonskontroll side 8, bør gjøres etter hver vask.

Forsikre deg også om at etikettene er intakte.

Vask og rengjøring av madrass

Følg produsentens anbefalinger og instruksjoner for rengjøring av madrassen nøye.

Produktinformasjon

Forskrifter

Pasientsengen er CE-merket i henhold til medisinsk teknologidirektiv 93/42 / EØF. Madrassen som brukes skal være 10-15 cm tykk. Madrassen som brukes skal være 80-85 cm bred

Produktets levetid

Produktet har en estimert levetid på 10 år. Imidlertid er levetiden direkte relatert til miljøet produktet brukes i, hvor mye det brukes og vasket, og om retningslinjer for vedlikehold er fulgt.

Tekniske data (ved standardutførelse)	
SWL (Safe Working Load)	290 kg
Av dette: <i>Ifølge dagens IEC 60601-2-52</i>	• 225 kg pasientvekt • 20 kg madrass • 45 kg tilbehør (inkl. vekt på tilbehør)
IP-klasse	IP66 washable (maskinvaskbar)
Spennings	230 V ~/50 Hz
Max strømforbruk	Max 2 A
Isolasjonsklasse	Klasse I type B, dobbeltisolert og tilkoblet jord
Intermittens (motorkapasitet)	10 %, 2 min/18 min
Laveste/Høyeste høyde med dobbelthjul	34-79 cm
Laveste/Høyeste høyde med enkelthjul	37-82 cm
Nettilkobling	Nettkabelen er 2,5 m fra hodets ende
Max lydnivå	38 dB

Detaljer	Vekt	Mål
Mål med sidegrinder og endegavler	125kg	218,5 x 97cm
Madrass	-	10-15 x 80-85 x 200-205 cm
Endegavler	-	53 x 86 cm


Brukermiljø/oppbevaring	
Lufttrykk	700-1060 mbar
Luftfuktighet	30-75 %
Temperatur	+10 til +40 °C

Materiale

Sengestativ av stål. Endepanelene er laget av laminat.

Plastdelene består av polypropylen, polyamid, polyoksymetylen og polyetylen. Metalldele er enten pulverlakkert, galvanisert eller forkrommet.

Max/min vinkler på liggeflate

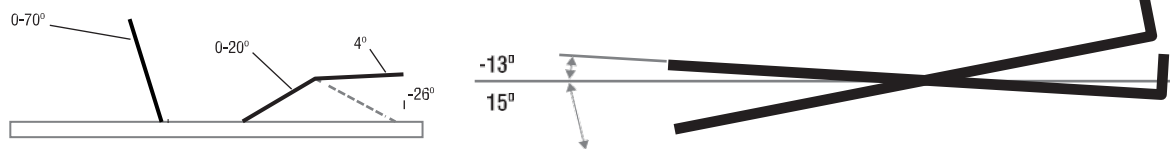

Tilbehør

Tilbehør	Artikkelnummer
PC Søsterhjelp seng med håndtak	PC710415
PC Kateterkrok	PC710527V
PC Infusjonsstativ 4 kroker	PC 710605
PC Styrehjul femte	PC 710420
PC Sidegrindforlenger sett komplett	PC 710715
PC Feste til sidegrindforlenger	PC 710512
PC Sidegrindforhøyer høyre P3	PC 710638
PC Sidegrindforhøyer venstre P3	PC 710640
PC Grindbeskytter	PC 710023
PC Infusjonsstativ til søsterhjelp Krom	PC 10904

Feilsøkningskjema

Feil	Mulig årsak	Løsning
Ingenting skjer når du trykker på håndkontrollknappene.	- Strømledningen er ikke tilkoblet, og batteriet er utladet - Kabling for håndkontroll er ødelagt - Håndkontroll er ødelagt - Transformatoren er ødelagt - Strømnett ute av drift - Sengen kan være overbelastet	- Koble til strømledningen. Flytt sengen til topposisjon for å kalibrere løftemotorene - Bytt håndkontroll - Bytt håndkontroll - Bytt transformator - Kontroller sikringen - Fjern overbelastningen og vent litt, og prøv deretter på nytt
Sengen avgir en signallyd	- Sengen er ikke koblet til en stikkontakt, og batteriet må lades - Sengen er overbelastet - Heismotorene må kalibreres	- Koble sengen til stikkontakten - Fjern overbelastningen - Flytt sengen til topposisjon for å kalibrere løftemotorene
Sengens løftefunksjon fungerer ikke	- Håndkontroll er ødelagt - Løftemotoren er ødelagt - Transformatoren er ødelagt - Ledninger til motor / håndkontroll er ødelagt	- Bytt håndkontroll • Prøv motor i annen stikkontakt på transformator, bytt motor hvis den ikke fungerer - Forsikre deg om at lampen på transformatordekselet er tent, hvis ikke, bytt transformatoren - Bytt ut gjeldende komponent
Sengens ryggfunksjon fungerer ikke	- Håndkontroll er ødelagt - Løftemotoren er ødelagt - Transformatoren er ødelagt - Ledninger til motor / håndkontroll er ødelagt	- Bytt håndkontroll - Prøv motor i annen stikkontakt på transformator, bytt motor hvis den ikke fungerer - Bytt transformator - Bytt ut gjeldende komponent
Sengens benfunksjon fungerer ikke	- Håndkontroll er ødelagt - Løftemotoren er ødelagt - Transformatoren er ødelagt - Ledninger til motor / håndkontroll er ødelagt	- Bytt håndkontroll - Prøv motor i annen stikkontakt på transformator, bytt motor hvis den ikke fungerer - Bytt transformator - Bytt ut gjeldende komponent


Feilsøkningskjema fortsettelse

Knirk når du endrer posisjon for hvilken som helst funksjon	- Trenger smøring - Unormal lyd i motor	- Finn skjøt eller lager og smør med fett eller koagulerende olje - Bytt motor
Sengen står ikke stille til tross for at bremsene er på	Bremsesystemet er slitt eller ødelagt.	Kontroller hjul og bremseledd, skift ut ødelagte deler
Sengen heves ikke når noen av stillingsfunksjonene endres.	- Overbelastning - Transformatoren er ødelagt - Løftmotoren er ødelagt	- Kontroller pasientvekten - Bytt transformator - Bytt løftemotor
Forlengningsdelen låses ikke	Låsemekanismen er ikke ordentlig låst	Kontroller mekanismen
Ryggstøttefunksjonen til sengen piper og vil ikke løfte seg oppover mens lampen på kontrollpanelet blinker.	Sengens ryggdel er overbelastet	Fjern overbelastningen og senk baksiden til flat bunnposisjon, og hold knappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille.
Sengens benhevingsfunksjon piper og ønsker ikke å løfte seg oppover mens lampen på kontrollpanelet blinker.	Sengens bendel er overbelastet	Fjern overbelastningen og senk bendelen til flat bunnposisjon, og hold knappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille.
Sengens løftefunksjon piper og vil ikke løftes opp mens lampen på kontrollpanelet blinker.	Sengens bendel er overbelastet	Fjern overbelastningen og senk bendelen til flat bunnposisjon, og hold knappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille.

Service og vedlikehold må utføres av autorisert personell for å sikre sikkerhet og lang levetid. Sunrise Medical arrangerer opplæringskurs for å muliggjøre riktig service og vedlikehold. Utdanningsstedet er i Vestby eller om ønskelig på lokasjon hos kunden. Kontakt kundeservice hvis du er interessert eller har andre spørsmål.

Tilbakestilling / nullstilling av elektronikk


- Tilbakestillingsprosedyren krever at to knapper aktiveres nøyaktig samtidig på håndkontrollen, se bilde til høyre.
Det er viktig at knappene trykkes nøyaktig samtidig til lyden fra elektronikken er blitt taus.
- Tilbakestillingen er nå fullført.
- En ny igangsetting av heismotorene må nå gjøres ved å løfte løftemotorene til deres ytterste stilling.

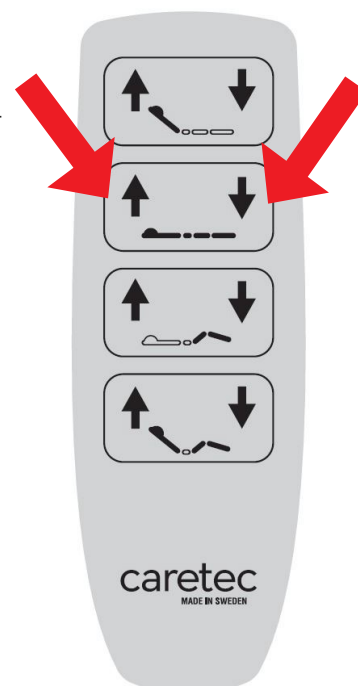

Resirkulering/gjenbruk

Det beste fra både miljømessig og økonomisk synspunkt er at sengen brukes på nytt. Caretec har et samarbeid med Human Bridge, som gjerne hjelper deg med å benytte deg av gamle senger og noen ganger deler av senger for videre overføring til andre trengende land.

Hvis resirkulering er det eneste alternativet, er sengen god, sengen er designet for å være resirkulerbar. Fjern sengen, slik at den kan resirkuleres på din lokale miljøstasjon.

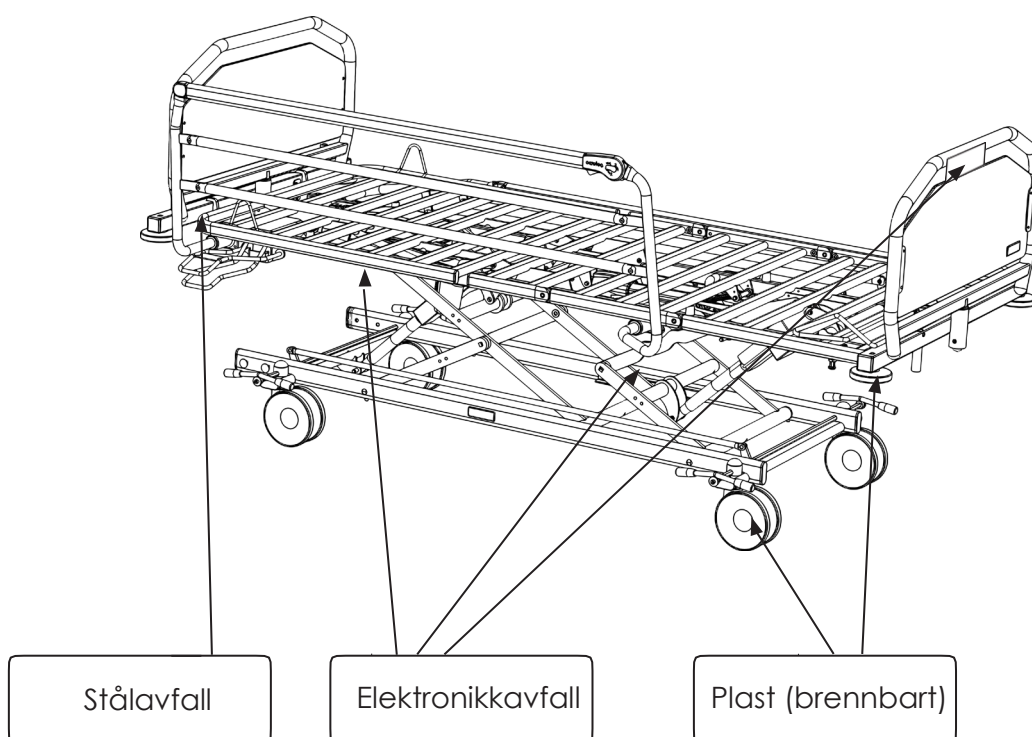

Det kan være fare for klemming når sengen fjernes. Plasser sengen på siden for å minimere risikoen for å klemme når du fjerner motorene.

Miljødeklarasjon

Virksomhet

Caretec AB tilbyr innovative og høykvalitets-pleieprodukter med stilig og funksjonell design. Hovedsakelig utvikler vi senger, samt produkter og tilbehør rundt dette. Produktene er montert i ergonomisk optimaliserte monteringsstrømmer.

Vi stiller høye krav til våre største underleverandører, noe som betyr at de må være ISO 14001-sertifisert.

Miljøpolitikk

Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi:

- Arbeide for kontinuerlig å forbedre vår miljøprestasjon og forhindre forurensning i samsvar med våre miljømål.
- Vurdere miljøeffekten av investeringer.
- Følge og leve opp til miljølovene som finnes.

Våre produkter og tjenester må produseres og distribueres på en miljømessig forsvarlig måte, med hensyn til det som er teknisk og økonomisk mulig. Vi må ta hensyn til og ta hensyn til verdens miljøkrav. Vi vil kreve at leverandører med betydelig miljøpåvirkning samarbeider i miljøarbeidet vårt. Våre kunder skal informeres om hvordan produktene våre håndteres i en lang livssyklus og redusert miljøpåvirkning. Videre vil vi jobbe for et trygt arbeidsmiljø innen vårt selskap og våre kunder.

Produkter

Produktene er laget av solid og slitesterkt materiale, hovedsakelig stål, med krom og / eller lakkfinish.

Produktene er CE-merket og testet av tredjeparter i samsvar med gjeldende standarder og direktiver.

Elektronikk

Under fremstillingen brukes ikke ozonnedbrytende løsningsmidler CFC og HCFC.

Asbest, kvikksølv, PCB og PCT er ikke til stede i produktet. Plastkomponenter er fri for tungmetallene bly og kadmium. Plasten i kretskortet inneholder flammehemmere. Ellers er det ingen plastkomponenter over 25 g som inneholder bromerte flammehemmere PBB, PBDE. Produktet inneholder ingen batterier som er klassifisert som miljøfarlige.

Strømforsyningen inneholder transformator, batteri, kretskort og ledninger.

Miljøprodukterklæring, fortsettelse

Bruk

Service og vedlikehold må utføres av autorisert personell for å sikre sikkerhet og lang levetid

Gjenvinning

Pasientsengen er designet for enkel resirkulering. Sengen består stort sett av stål. All emballasje kan resirkuleres.

Caretec AB er tilknyttet FTI-registeret.

Forsikre deg om at sengen er resirkulert riktig.

Ta kontakt med Human Bridge (www.humanbridge.se) for muligheten for å gjenbruke produktet i andre land.

Miljøpåvirkning

Et produkt påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen. Viktige miljøaspekter for Caretecs produkter er produksjon av materialer, hovedsakelig stål og plast, som produktet består av.

Produktene er optimalisert i styrke og konstruert med så lite materiale som mulig.

Å tenke på for deg som bruker

Vedlikehold produktet regelmessig i henhold til våre råd, det øker levetiden og sparer dermed miljøet. Bruk miljøvennlige midler til rengjøring.

Forsikre deg om at sengen er resirkulert riktig. Ta kontakt med Human Bridge for å se om det er mulig å gjenbruke, se avsnittet "Gjenvinning".

Serviseskjema

Kopier denne siden og bruk en til hver seng.

Sengens serienummer:

Dette skal kontrolleres:	Signatur:							
Dato:								
Stram til skruer og muttere. Bytt ut demontert mutter med en ny.								
Sjekk at fjærene er intakte.								
Kontroller sveisesømmer.								
Kontroller låsepinnene.								
Kontroller motor til løftefunksjon.								
Kontroller motor til ryggfunksjon.								
Kontroller at ryggens hurtigsenking fungerer.								
Kontroller sjokkleiefunksjonen.								
Kontroller bremseser.								
Kontroller motor til bendelfunksjon.								
Kontroller at kabler og kontakter ikke er skadet.								
Kontroller at endegavler enkelt kan monteres/ demonteres på sengen.								
Kontroller sengens sidegrinder.								
Bytt ut detaljer med krom om de er skadet.								
Reparer lakkskader.								
Smør i henhold til anvisninger. Se Vedlikehold.								
Kontroller at ledninger er hele og løper lett.								
Skadede eller slitte deler skal byttes ut.								
Hvis det finnes sikkerhetskopi av batteri: Sjekk om sengen fungerer med batteridrift. Batteriet bør byttes hvert tredje år.								



Sengen skal kontrolleres minst en gang per år, samt etter hver vask.

Distributør Norge



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: +47 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no

caretec

Caretec AB
Stenserygsvägen 3
SE-571 78 Forserum

Växel
E-post
Webb

010-3037300
info@caretec.se
www.caretec.se