

MONTERINGSANVISNING

Hendler oppdateringssett



Beskrivelse


Hendler ryggvinkel og tilt oppdateringssett

Artikkelnummer

3509055

 Breezy®


MONT-324 Hendler

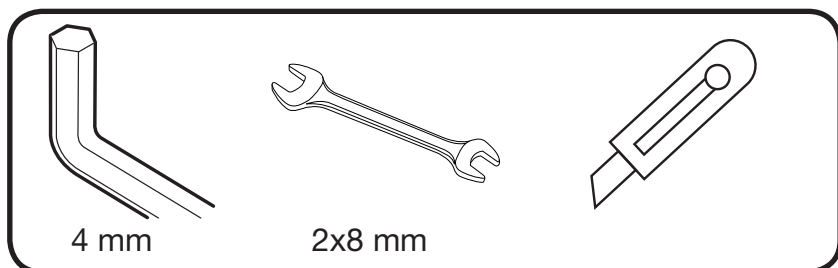


1. Demonter eksisterende klemmer for tilt og ryggvinkel.



2. Monter øvre klemme. Påse at vaieren ligger på utsiden av kjørebøylen som vist på bildet.

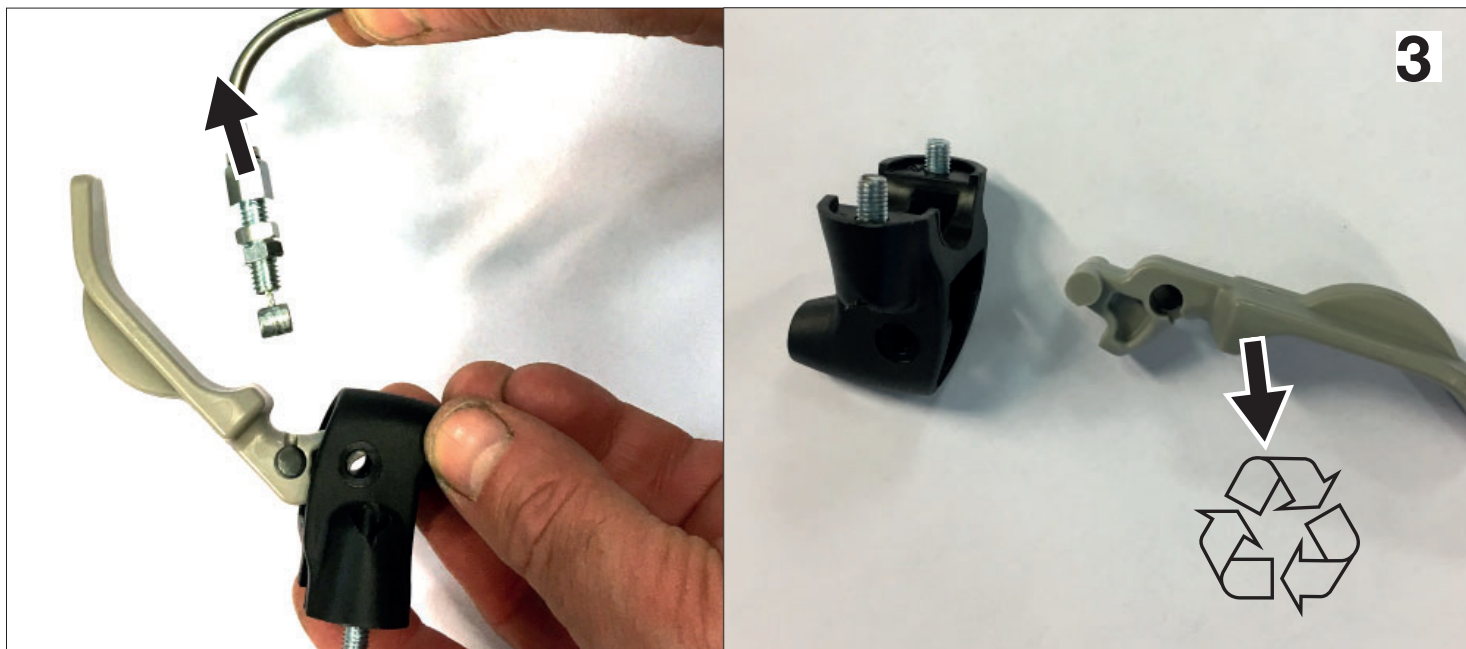


3. Demonter vaieren og den gamle hendelen. OBS! Den gamle hendelen sitter hardt!

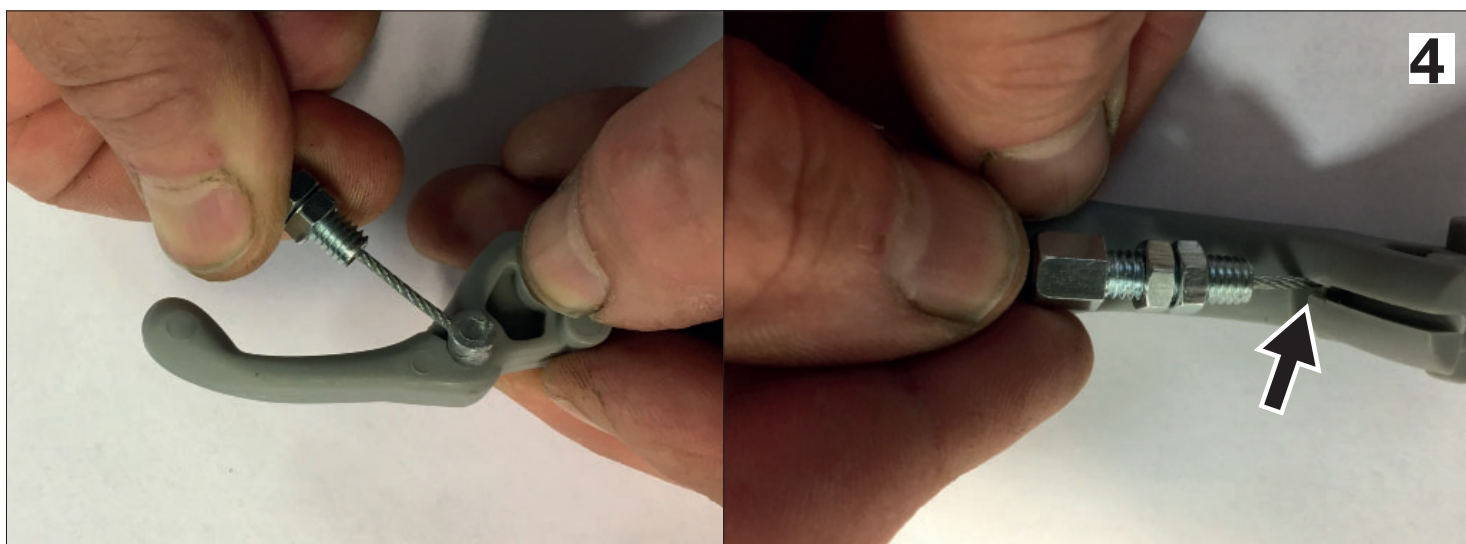

4. Monter vaieren i den nye hendelen. Pass på at vaieren kommer helt inn i sporet som vist på bildet.



5. Før vaierstammeren inn i klemmen.

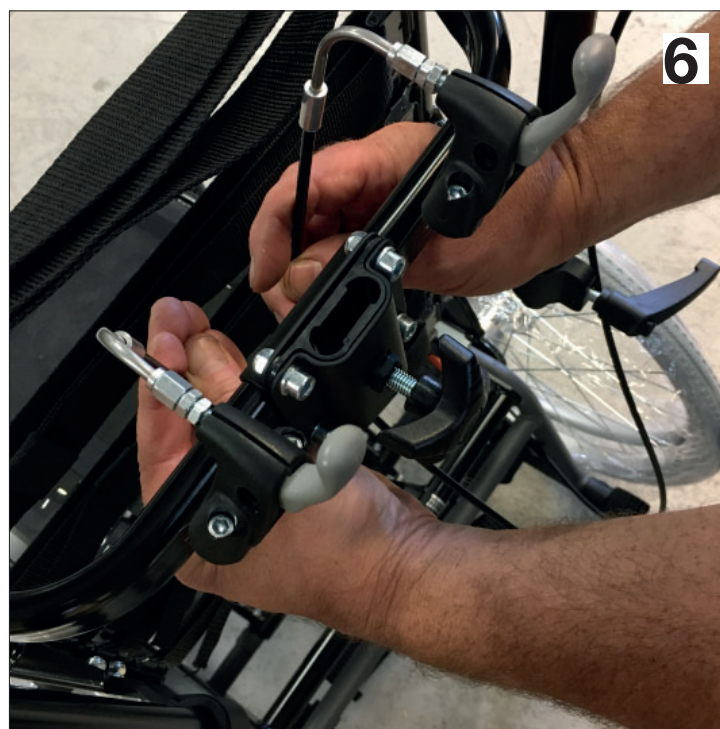

6. Gjenta prosedyren med demontering og montering på motsatt hendel. Påse at vaierne ligger som vist på bildene.



7. Skjær rundt foamen på kjørebøylen ved den nye plasseringen av hendlene, ca. to fingerbredder på utsiden av den innerste buen på kjørebøylen.



8. Trekk foamen til siden og monter hendelen.



9. Skru til kontramutteren på vaieren. Benytt en fastnøkkel til og juster strammingen. Påse at hendelen kan skyves litt inn før den responderer.



10. Gjenta prosedyren for å montere den andre hendelen.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no