

MONTERINGSANVISNING

Bagasjebrett med bag



Beskrivelse	Art. nr.
Bagasjebrett med bag	1017979




1. Bagasjebæreren kan kun monteres på Puma 40 FWD
2. Fjern eventuelle plastpropper **A** i rammen (2 på hver side)
3. Plasser bagesjebæreren inn mellom rammedelene og skru fast med boltene **B** som vist under
4. Trekket kan festes mot bunnen av bagasjebæreren ved behov.
5. Påse at svinghjul og skjermer passerer fritt forbi bagasjebæreren.
6. Max vekt belastning 5 kg



Det er klemfare ved bruk av setetilt og ryggvinkling , og oppbevaring av store og harde gjenstander på bagasjebæreren kan med føre skade på stolen og det som oppbevares på bagasjebæreren.

Bagesjebæreren medfører også klemfare og kan påføre skade på omgivelser og personer ved rygging bakover.

Ved rygging skal man alltid forsikre seg om at det er fri plass slik at skade og farlige situasjoner ikke oppstår.

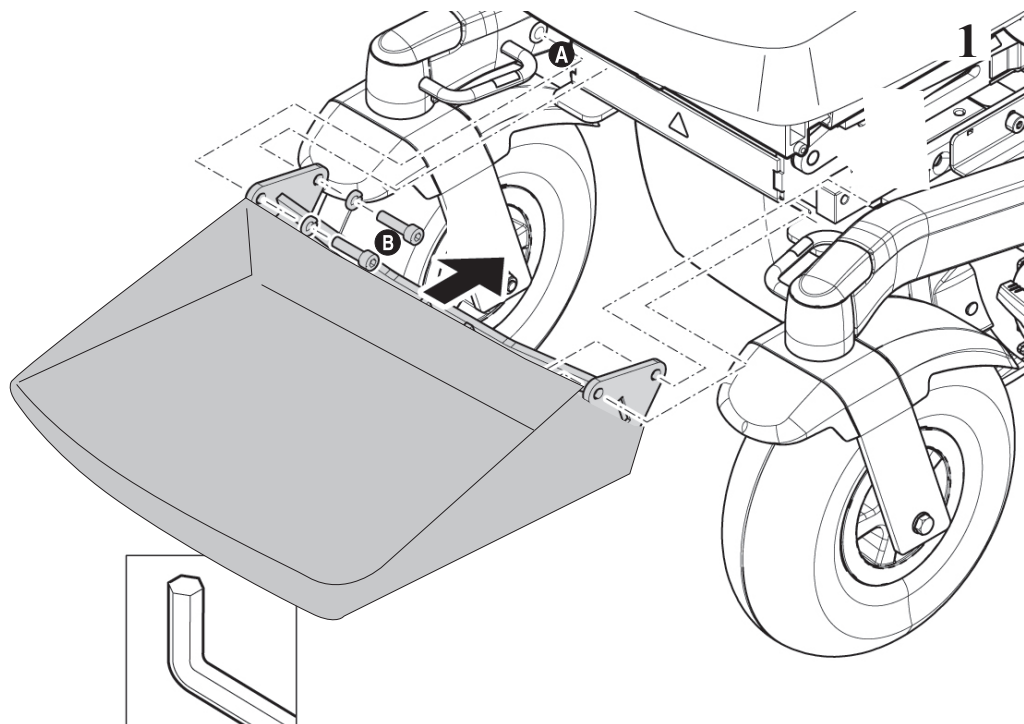

Figur 1: Prinsippskisse - originaldelene kan variere fra illustrasjonen



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no