


SEDEO PRO

SYSTÈME D'ASSISE
HAUTEMENT RÉGLABLE ET
CONFIGURABLE

SEDEO
SEATING & POSITIONING

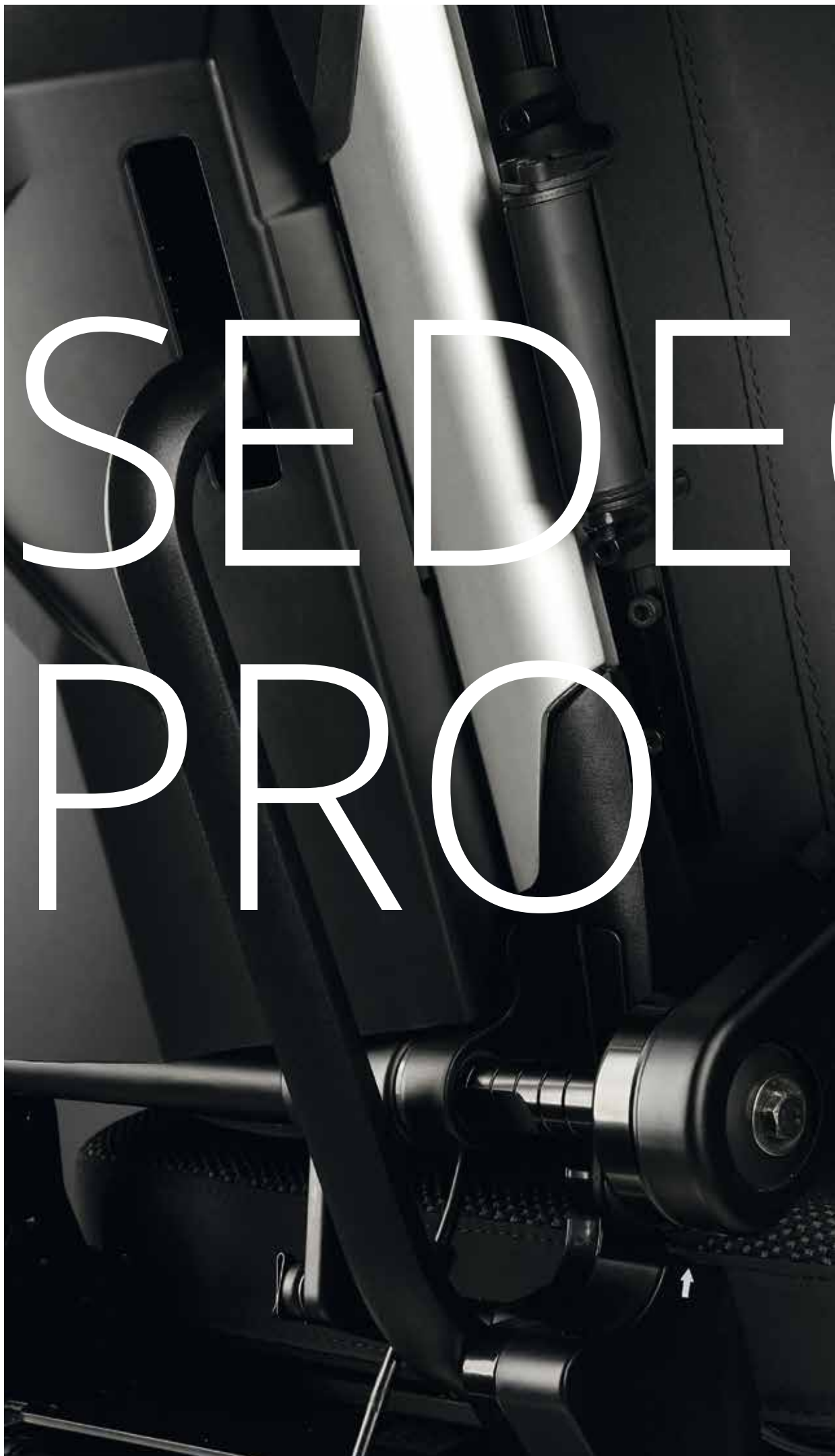



SOMMAIRE

INTRODUCTION

Système d'Assise SEDEO PRO	04
Posture Correcte – facteurs cliniques	06
Stabilité – facteurs cliniques	07

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

Réglage du Cadre d'Assise	08
Configuration du Cadre d'Assise	10

COUSSINS DE DOSSIER ET D'ASSISE SEDEO PRO

Coussins de Dossier SEDEO PRO	16
Coussins d'Assise SEDEO PRO	24

OPTIONS SEDEO PRO

Appuis-Tête	30
Switch-It & Link-It	31
Éléments de Positionnement	32
Accessoires	34

SEDEO PRO

SYSTÈME D'ASSISE

UNE BONNE POSTURE COMMENCE PAR LA CONNAISSANCE DES BESOINS CLINIQUES DU PATIENT. UNE ASSISE ERGONOMIQUE EST LA BASE D'UNE SOLUTION OPTIMALE DE MOBILITÉ.

Il s'agit de créer une posture assise permettant d'atteindre les objectifs individuels liés au support physique ainsi qu'aux défis sociaux et pratiques du quotidien.

Tous ces paramètres ont été pris en compte dans la conception du système d'assise SEDEO PRO. Pour couvrir les besoins cliniques de modérés à élevés, le système d'assise associe un cadre d'assise hautement réglable à un choix complet d'options de positionnement, incluant:

- Coussins d'assise et de dossier
- Accoudoirs, protège-vêtements et cales-tronc
- Repose-pieds, cales genoux et cales cuisses
- Appuis-tête

Pour la première fois JAY™ et WHITMYER™ sont intégrés pour offrir des possibilités de positionnement élevées. De conception véritablement modulaire, SEDEO PRO fournit un nouveau niveau de fonctionnalité, de confort et de design. Il peut s'adapter facilement aux exigences individuelles et à l'évolution des besoins de l'Utilisateur.

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating

 **WHITMYER**[®]





Le système d'assise SEDEO PRO est confortable et favorise l'indépendance dans la vie quotidienne. Le cadre d'assise haut de gamme est entièrement ajustable, configurable à l'extrême et s'adapte à un grand nombre de fauteuils électriques de la Q-Series, indépendamment de la base motrice choisie.




POSTURE CORRECTE


FACTEURS DE PERFORMANCE CLINIQUE

UNE BONNE POSTURE EST UNE POSITION MAINTENUE AVEC PEU D'EFFORTS OÙ LES LIGAMENTS, LES OS ET LES ARTICULATIONS SUBISSENT LE MOINS DE TENSION POSSIBLE ET OÙ LE CENTRE DE GRAVITÉ DU BUSTE EST SOUTENU.

- Identifiez le(s) objectif(s) à atteindre pour la personne en fauteuil roulant.
- Etablissez le bon niveau de soutien dans la bonne position en commençant par le bassin, les cuisses et les pieds en passant par la cage thoracique et la colonne vertébrale, jusqu'à la tête.
- Recherchez la répartition optimale des pressions sur toute la surface de l'assise et du dos et évitez les cisaillements.

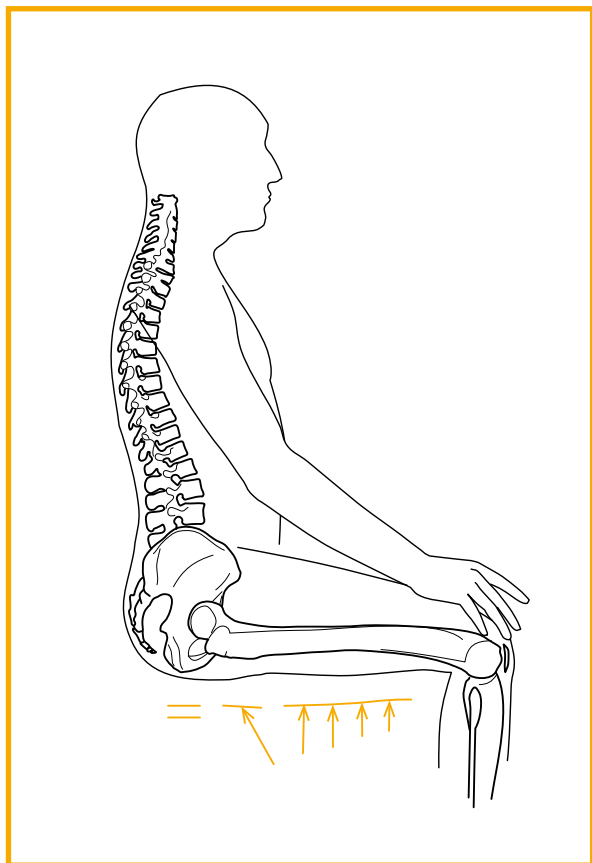

Attention à la répartition optimale des pressions sur toute la surface de l'assise

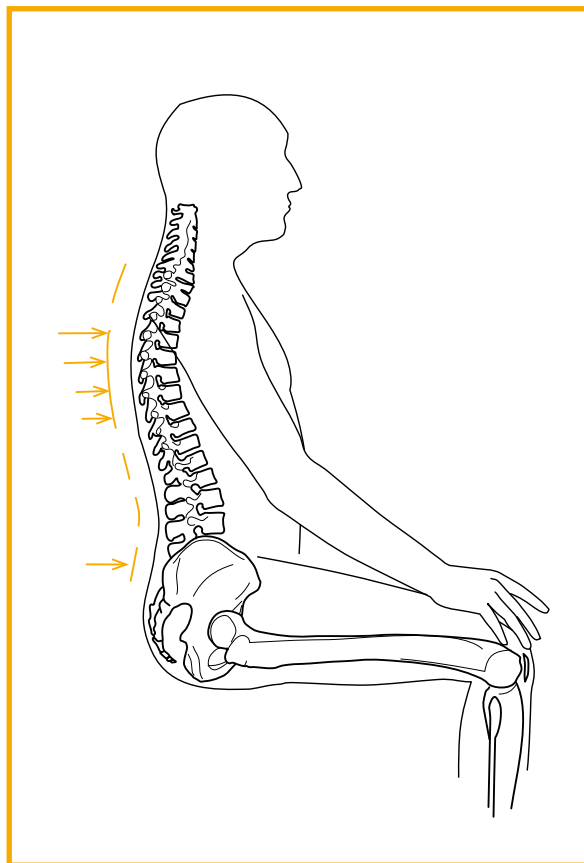

Attention à la répartition optimale des pressions sur le dos

STABILITÉ

FACTEURS DE PERFORMANCE CLINIQUE

EN SE BASANT SUR LE SAVOIR SCIENTIFIQUE ET L'UTILISATION CLINIQUE DES ÉQUIPEMENTS D'ASSISE, ON RECONNAIT PLUSIEURS FACTEURS D'INFLUENCE:

Un coussin d'assise et de dossier ne peuvent être efficaces que si l'Utilisateur peut être 'stable' dans des positions spécifiques pour ses activités et si les points de pression sont efficacement redistribués.

Tous les Utilisateurs n'ont pas besoin du même niveau de stabilité.

Le bassin est une structure tridimensionnelle et peut s'incliner et bouger dans toutes les directions. Sans soutien, nous trouvons notre équilibre sur les tubérosités ischiatiques (IT). Ainsi, le bassin se maintient en position neutre grâce à l'activité musculaire sans support externe. Les fléchisseurs des hanches et les extenseurs de la colonne vertébrale doivent agir en permanence contre la pesanteur.

LA CLÉ: STABILISER LE BASSIN. LA STABILITÉ EST ASSURÉE DANS DEUX DIRECTIONS:

Stabilité antéro-postérieure

La stabilité pelvienne antéro-postérieure peut être améliorée grâce au contour du coussin. Il peut être également combiné à une base préformée pour un meilleur support des fémurs et trochanters. Un dossier adapté est essentiel pour fournir un soutien postérieur au bassin afin de faciliter l'alignement postural et ainsi éviter qu'il ne s'incline vers l'arrière ou vers l'avant.


Stabilité latérale

La stabilité antéro-postérieure seule ne suffit pas. La stabilité latérale est également nécessaire. Celle-ci améliore non seulement l'activité et la posture du patient mais réduit aussi la probabilité que la pression soit trop importante sur l'un des ischions, limitant un risque de talonnement et/ou une obliquité du bassin.


Répartition des pressions

Une assise efficace répartit et diminue les charges et elle réduit les pics de pression dans les zones critiques, limitant ainsi le risque d'escarre. L'intégrité cutanée est optimisée par les surfaces d'assise préformées.


- Répartissez le poids du patient sur la plus grande surface possible
- Redistribuez les pressions loin des proéminences osseuses vers des zones plus sûres pouvant supporter des forces plus élevées
- Prévenez les déformations des tissus mous

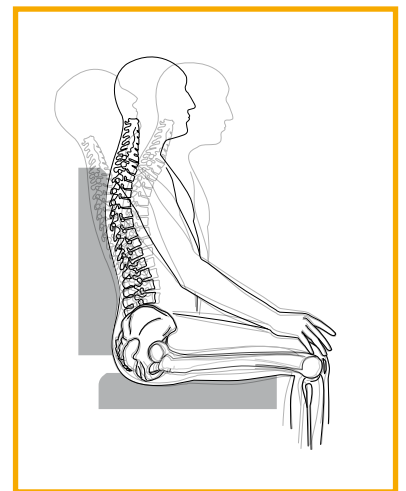

Stabilité du bassin

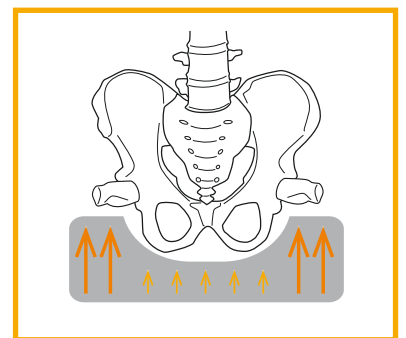

Soutien des trochanters pour une plus grande stabilité

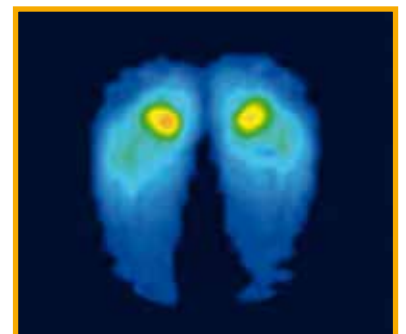

Répartition des pressions

SEDEO PRO

RÉGLAGE SIMPLE ET RAPIDE

ASSISE IDÉALE GRÂCE À UNE MANIPULATION SIMPLE

- Grande flexibilité / entièrement réglable.
- Réglages intuitifs. Un seul outil pour tous les réglages (clé Allen de 5 mm) / une méthode de travail simple / des échelles de mesure explicites / pas de pièces supplémentaires nécessaires.
- Les pièces s'ajustent, se repositionnent, s'élargissent, se tournent pour réaliser le meilleur support.
- Les réglages se réalisent avec l'Utilisateur dans le fauteuil car facilement accessibles par les côtés.



1 = Largeur d'assise: 38 - 56 cm

2 = Largeur additionnelle via les accoudoirs: + 4 cm par côté

3 = Profondeur d'assise: 40 - 56 cm

4 = Hauteur de dossier: 44 - 62 cm

SEDEO PRO

CADRE D'ASSISE

IMPORTANTE AMPLITUDE DE RÉGLAGE POUR LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR D'ASSISE.
IDÉALE POUR RÉPONDRE AUX PATHOLOGIES EVOLUTIVES.

Largeur d'assise réglable en continu par les plaques d'assise 38 – 56 cm, largeur additionnelle via les accoudoirs + 4 cm par côté



Profondeur d'assise réglable en continu 40 – 56 cm, deux différentes plaques selon les profondeurs disponibles (40-52 et 46-56 cm)



Bascule d'assise électrique
0° à 30° // -5° à 25° // 0° à 50° // -5° à 45°



Lift d'assise
30 cm

CADRE D'ASSISE

HAUTEMENT CONFIGURABLE

4

QUATRE OPTIONS DE DOSSIER



Inclinaison de Dossier Manuelle par Platine, 90°-120°

Réglage en continu, simple à régler avec l'utilisateur dans le fauteuil.



Inclinaison de Dossier Manuelle par Vérin à Gaz, 90°-130°

Soulagement des points de pression facilité par le vérin à gaz. L'utilisateur peut s'incliner lui-même, grâce à un levier placé sous l'accoudoir.



Inclinaison de Dossier Electrique, 90°-130°



Inclinaison de Dossier Electrique avec compensation sinusoïdale de 100 mm, 90°-150°

Système unique et breveté. Supprime tout effet de cisaillement, maintient le positionnement de la tête, du tronc, des commandes spéciales sur toute la phase d'inclinaison.



3


TROIS TYPES D'ACCOUDOIRS



Accoudoirs, Escamotables vers l'arrière



Accoudoirs, Relevables à compensation

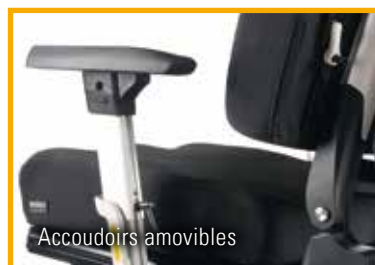

Accoudoirs amovibles

CONFIGUREZ LE SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO
POUR UNE PARFAITE ADÉQUATION AVEC LES
BESOINS DE L'UTILISATEUR EN CHOISSISSANT
PARMI UNE LARGE GAMME D'OPTIONS.

2 DEUX TYPES DE REPOSE-PIEDS CENTRAL



Repose-Jambes Central Electrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, avec palette qui descend au sol pour aider au transfert de face.
Uniquement pour base motrice 6 roues



Potence Centrale, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle.
Uniquement pour base motrice 6 roues

3 TROIS TYPES DE REPOSE-PIEDS LATÉRAUX



Potences 70° SEDEO PRO, escamotables.
Options: appui-mollets,



Repose-jambes manuels à compensation et escamotables SEDEO PRO, inclinaison 90° - 180°



Repose-jambes électriques sans fil à compensation et escamotables SEDEO PRO, inclinaison 90° - 180°

CADRE D'ASSISE

HAUTEMENT CONFIGURABLE

4 QUATRE TYPES DE MANCHETTES



Manchette standard en mousse.
Longueur 300 x 90 mm. Manchette courte facilite l'accès aux tables.
Longueur 400 x 90 mm. Support confortable grâce à la forme en P à l'intérieur.



Manchette standard en mousse. 450 x 130 mm.



Manchette confort Dartex 400 x 80 mm.
Extra confort, matériau souple, renfort latéral



Gouttière Hémiplégique, PU - 435 x 120 mm



APPLICATION CLINIQUE/CONSEIL: Choisir une manchette plus courte si le manipulateur et le boîtier Ctrl+5 Contacts sont montés du même côté.

3 TROIS TYPES DE PROTÈGE-VÊTEMENTS

Protège-vêtement standard



Longueur: 215 mm
Hauteur: 135 mm
Réglage en hauteur: 65 mm

Protège-vêtement confort




Longueur: 270 mm - Hauteur: 140 mm
Réglage en hauteur: 65 mm
Plus 20 mm d'épaisseur. Epaisseur supplémentaire pouvant être compensée par le réglage en largeur via les accoudoirs.

Protège-vêtement cunéiforme confort



Longueur: 450 mm - Epaisseur: 35-70 mm
Hauteur: 120 mm
Réglage en hauteur: 65 mm
Utilisé pour prévenir de l'abduction des genoux.
Peut être monté dans les deux sens (partie épaisse devant ou derrière)

8 HUIT OPTIONS DE REPOSE-PIEDS:

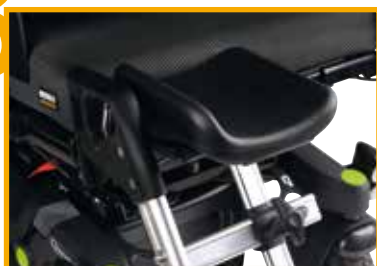

Support amputé confort



Palette réglable en angle



Sangle talonnière




Appui-mollets, standard (mousse)
Réglable en profondeur



Appui-mollet, confort rembourré
Réglable en profondeur



Palettes verrouillables entre-elles

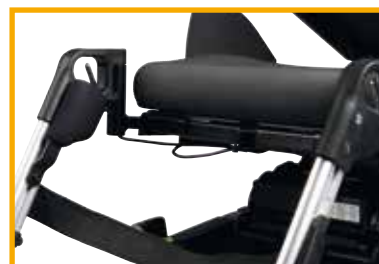

Protection de genoux, confort



Sangle mollets



OFFRE COMPLÈTE DES OPTIONS D'ASSISE

SEDEO, JAY ET WHITMYER.
STABILITÉ, CONFORT ET
HAUT NIVEAU DE
PROTECTION CUTANÉE,
SANS COMPROMIS.

 WHITMYER®

SEDEO


 JAY®
Superior Clinical Seating.





COUSSINS DE DOSSIER

SEDEO PRO



PRESCRIPTIONS DE POSITIONNEMENT				
	APPLICATIONS	Liberté de mouvement	Prévention des mauvaises postures	Stabilité Latérale
PROFILÉ		...	.	.
PROFILÉ RÉGLABLE		..	..	..
DEEP CONTOUR PASSIF		.	.	..
FLEXIBLE DEEP CONTOUR PASSIF		.	...	...
FLEXIBLE DEEP CONTOUR ACTIF		..	...	...
FLEXIBLE EXTRA DEEP CONTOUR ACTIF		.	...	...

SEDEO PRO PROFILÉ	PAGE 17
SEDEO PRO PROFILÉ AVEC SANGLES RÉGLABLES	PAGE 18
SEDEO PRO DEEP CONTOUR PASSIF	PAGE 19
SEDEO PRO FLEXIBLE, DEEP CONTOUR PASSIF AVEC SANGLES RÉGLABLES	PAGE 20
SEDEO PRO FLEXIBLE, DEEP CONTOUR ACTIF AVEC SANGLES RÉGLABLES	PAGE 21
SEDEO PRO FLEXIBLE, EXTRA DEEP CONTOUR ACTIF AVEC SANGLES RÉGLABLES	PAGE 22

DOSSIER PROFILÉ

SEDEO PRO

COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ



Caractéristiques Produit:

- Soutien latéral modéré
- Mousse confort
- Adaptation possible de cale tronc
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Utilisateurs avec posture stable
- Utilisateurs recherchant une liberté de mouvement



TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

DOSSIER PROFILÉ AVEC SANGLES RÉGLABLES



BASE ENVELOPPANTE AVEC SANGLES RÉGLABLES POUR SUIVRE LE PROFIL DE LA COLONNE VERTÉBRALE



Caractéristiques Produit:

- Soutien latéral modéré
- Mousse confort
- Sangles de réglage individuel pour un ajustement optimal au profil de la colonne vertébrale
- Adaptation possible de cale tronc
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Utilisateurs avec posture stable
- Utilisateurs présentant des déformations fixées ou semi-réductibles
- Utilisateurs ayant besoin d'ajuster le maintien de la courbure de leur colonne vertébrale ou d'un soutien du bassin



TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

DOSSIER PROFILÉ DEEP CONTOUR PASSIF

GALBE DEEP CONTOUR




Caractéristiques Produit:

- Galbe profond avec soutien latéral important sur toute la hauteur du dossier
- Mousse confort
- Appuis latéraux intégrés évitant le rajout de cale tronc
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Utilisateurs passifs nécessitant un soutien latéral profond sur toute la hauteur du dossier

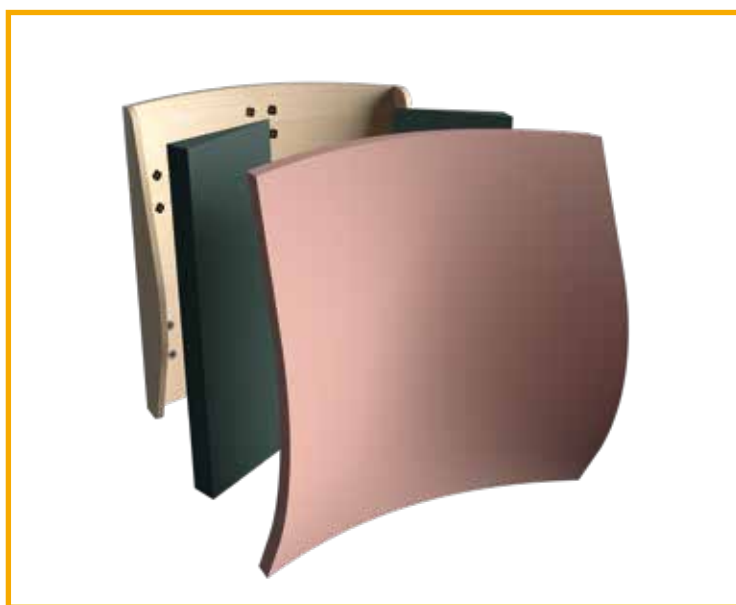

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

FLEXIBLE, DEEP CONTOUR

PASSIF AVEC SANGLES RÉGLABLES



CADRE FLEXIBLE AVEC SANGLES RÉGLABLES, GALBE PROFOND, SUPPORT LATÉRAL COMPLET



Caractéristiques Produit:

- Galbe profond 12 cm, support latéral sur toute la hauteur du dossier
- Cadre flexible avec sangles réglables pour suivre et maintenir la courbure de la colonne vertébrale
- Stabilité du bassin
- Supports latéraux réglables en angle (vers l'intérieur ou l'extérieur)
- Réglage individuel
- Appuis latéraux intégrés évitant le rajout de cale tronc
- Housse Dartex ou confort



Applications Cliniques:

- Les sangles réglables individuellement maintiennent une posture droite et assurent une position d'assise stable et ergonomique.
- Utilisateurs passifs nécessitant un soutien latéral profond sur toute la hauteur du dossier
- Pour optimiser la stabilité posturale et pour corriger/adapter les déformations posturales légères à modérées

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

FLEXIBLE, DEEP CONTOUR

ACTIF AVEC SANGLES RÉGLABLES

CADRE FLEXIBLE AVEC SANGLES RÉGLABLES, GALBE PROFOND, SUPPORT THORACIQUE MOYEN



Caractéristiques Produit:

- Galbe profond 12 cm, haut du dossier libre au niveau des épaules
- Cadre flexible avec sangles réglables pour suivre et maintenir la courbure de la colonne vertébrale
- Stabilité du bassin
- Supports latéraux réglables en angle (vers l'intérieur ou l'extérieur)
- Réglage individuel
- Appui latéraux intégrés évitant le rajout de cale tronc
- Housse Dartex ou confort



Applications Cliniques:

- Les sangles réglables individuellement maintiennent une posture droite et assurent une position d'assise stable et ergonomique.
- Pour Utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien latéral profond mais aussi de liberté de mouvement au niveau des épaules
- Pour optimiser la stabilité posturale et pour corriger/adapter les déformations posturales légères à modérées

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

FLEXIBLE, EXTRA DEEP CONTOUR

ACTIF AVEC SANGLES RÉGLABLES



CADRE FLEXIBLE AVEC SANGLES RÉGLABLES, GALBE TRÈS PROFOND, SUPPORT LATÉRAL MOYEN



Caractéristiques Produit:

- Galbe très profond 18 cm
- Soutien latéral très profond avec espace libre au niveau des épaules.
- Cadre flexible avec sangles réglables pour suivre et maintenir la courbure de la colonne vertébrale
- Stabilité du bassin
- Supports latéraux réglables en angle (vers l'intérieur ou l'extérieur)
- Réglage individuel
- Appuis latéraux intégrés évitant le rajout de cale tronc
- Housse Dartex ou confort



Applications Cliniques:

- Les sangles réglables individuellement maintiennent une posture droite et assurent une position d'assise stable et ergonomique.
- Pour Utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien latéral très profond mais aussi de liberté de mouvement au niveau des épaules
- Pour optimiser la stabilité posturale et pour corriger/adapter les déformations posturales légères à modérées

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RÉGLAGES DU DOSSIER FLEXIBLE AVEC SEDEO PRO



DOSSIERS JAY J3

ADAPTABLES AU SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO



Dossier J3,
Galbe Peu Profond (SC)
50 mm



Dossier J3,
Galbe Moyen (MC)
80 mm



Dossier J3, Support Haut
Galbe Profond (DC)
150 mm et Extra Profond
180 mm



Dossier J3, Support Moyen
Galbe Profond (MDC)
150 mm et Extra Profond
180 mm



COUSSINS D'ASSISE

SEDEO PRO



		PRESCRIPTIONS DE POSITIONNEMENT			PROTECTION ANTI-ESCARRES		
	APPLICATIONS	Liberté de mouvement	Prévention des mauvaises postures	Stabilité Latérale	Répartition des pressions	Limite le risque de cisaillement	Prévention à la déformation des tissus mous
PROFILÉ		..	..	..	.	.	.
ANATOMIQUE		.	...	...	..	...	..
ANATOMIQUE MOUSSE MEMOIRE DE FORME		.	...	...	...	...	..
ERGONOMIQUE		..	..	...	...	..	..

SEDEO PRO PROFILÉ	PAGE 25
SEDEO PRO ANATOMIQUE	PAGE 26
SEDEO PRO ANATOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME	PAGE 27
SEDEO PRO ERGONOMIQUE	PAGE 28

COUSSIN SEDEO PROFILÉ

CONFORT ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

CONTOUR PROFILÉ (PROFILED) SUPPORT LATÉRAL MODÉRÉ




Caractéristiques Produit:

- Galbe confortable avec support latéral modéré
- Base rigide et plate
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Patient présentant un bon équilibre corporel
- Patient nécessitant une liberté de mouvement
- Confort requis avec un soutien latéral modéré
- Risque limité d'escarres et de cisaillement
- Patient pouvant soulager ses appuis de façon autonome et/ou se transférer

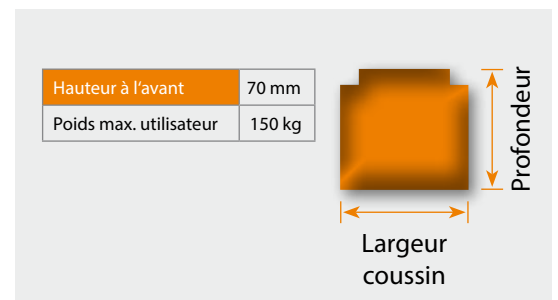

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN SEDEO ANATOMIQUE

STABILITÉ OPTIMISÉE

PROFIL ANATOMIQUE (SUPPORT)
AVEC COUCHE SUPÉRIEURE EN MOUSSE SOUPLE



Caractéristiques Produit:

- Galbe anatomique avec couche supérieure en mousse souple
- Soutien médian des grands trochanters favorisant la stabilité latérale du bassin
- Base rigide.
- Zone pelvienne recouverte d'un revêtement tressé pour éviter le talonnement
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Besoin de stabilité latérale maximale
- Risque d'escarre modéré
- Aide à la prévention des déformations des tissus mous



Hauteur à l'avant	90 mm
Poids max. Utilisateur	100 kg

Largeur coussin

Profondeur

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN SEDEO ANATOMIQUE

MOUSSE A MÉMOIRE DE FORME

PROFIL ANATOMIQUE (SUPPORT MEMORY) AVEC MOUSSE A MÉMOIRE DE FORME A L'ARRIÈRE




Caractéristiques Produit:

- Galbe anatomique avec partie arrière de la couche supérieure en mousse à mémoire de forme.
- Mousse à mémoire de forme favorisant l'immersion des tubérosités ischiatiques pour une meilleure distribution du poids
- Deux types de mousse: à mémoire de forme et mousse confort pour prévenir du glissement
- Soutien médian des grands trochanter favorisant la stabilité latérale du bassin
- Base rigide.
- Zone pelvienne recouverte d'un revêtement tressé pour éviter le talonnement
- Housse Dartex ou confort



Applications Cliniques:

- Besoin de stabilité latérale maximale
- Risque d'escarre modéré
- Aide à la prévention des déformations des tissus mous

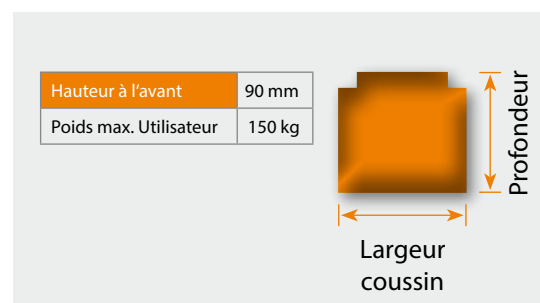

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN SEDEO ERGONOMIQUE

STABILITÉ LATÉRALE OPTIMALE



PROFIL ERGONOMIQUE (STABILIZER) AVEC COUCHE SUPÉRIEURE EN MOUSSE SOUPLE



Caractéristiques Produit:

- Conception spécifique de la zone des fémurs
- Stabilité antéro/postérieure optimale
- Cuvette ischiatique évidée pour permettre l’immersion des tubérosités osseuses pour une répartition uniforme du poids
- Base rigide.
- Zone pelvienne recouverte d’un revêtement tressé pour éviter le talonnement
- Housse Dartex ou confort

Applications Cliniques:

- Utilisateur avec un bon équilibre corporel avec un besoin modéré de liberté de mouvement
- Besoin d’une stabilité antéro/postérieure modérée pour éviter les mauvaises postures
- Risque d’escarres ou cisaillement modéré
- Aide à la prévention des déformations des tissus mous

Hauteur à l'avant	90 mm
Poids max. Utilisateur	150 kg

Recommandation:
commander le coussin une
largeur au-dessus.

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSINS D'ASSISE JAY

POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION

POUR UN POSITIONNEMENT ET UNE PRÉVENTION ENCORE PLUS ÉLEVÉE

(pour plus d'information sur les applications cliniques de ces coussins veuillez-vous référer à la brochure Jay)



JAY Balance



JAY J2



JAY J2 Deep Contour



JAY Xtreme Active



JAY Easy Fluide



JAY Soft Combi P

APPUIS-TÊTE ADAPTATION IDÉALE

FIXATION SEDEO

Robuste et réglable dans différentes positions

Fonction Memory pour revenir rapidement à la position initiale

SEDEO PRO



TÊTIÈRE SEDEO, FLEXIBLE

400 x 110 mm



TÊTIÈRE PU SEDEO, STANDARD

240 x 150 mm (housse optionnelle)

WHITMYER®

LARGE GAMME D'APPUIS-TÊTE WHITMYER DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO POUR RÉPONDRE AUX BESOINS CLINIQUES DE CHAQUE UTILISATEUR ET ASSURER LA MEILLEURE ASSISE POSSIBLE.



LINX



LINX2



AXYS



AXYS Offset



Cobra XTRA
Escamotable vers
l'arrière



PLUSH



AJUSTABLE
PLUSH-A



SWITCH-IT

COMMANDES INNOVANTES

La gamme de commandes spéciales SWITCH-IT assure à l'Utilisateur le contrôle optimal de son fauteuil roulant électrique.

Que ce soit un joystick spécifique, une commande occipitale ou au menton la commande peut être personnalisée et se monter sur le système d'assise SEDEO PRO pour répondre à toutes les exigences.





LINK-IT

MODULES DE MONTAGE

D'infinies combinaisons constituées de modules et de tiges pour couvrir tous vos besoins.

Link-It est non seulement très facile à positionner mais veille aussi à ce que le design minimaliste du fauteuil soit préservé. Si une commande spéciale ou un contacteur sont nécessaires sur le fauteuil, Link-It tout simplement !

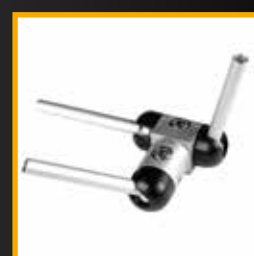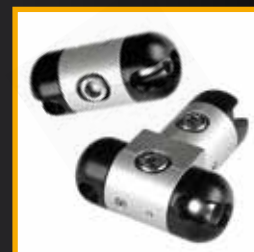

ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT

SEDEO PRO

CALE-TRONC



- Réglable en angle, en hauteur et largeur
- Mécanisme escamotable discret et intégré

Tailles coussinet:

- Court: 120 x 90 mm
- Long: 150 x 130 mm

APPLICATIONS CLINIQUES :

Patients avec stabilité réduite du tronc ou de fortes inclinaisons latérales (suite à un accident vasculaire cérébral par exemple)

Pour adapter ou corriger une scoliose chez des patients atteints d'IMC ou de SEP. A utiliser dans un principe d'appui à 3 points ou avec le dossier flexible.

CALE GENOU & CALE CUISSE



- Réglable en profondeur, largeur et hauteur
- Mécanisme escamotable

Tailles coussinet:

- Petit: 120 x 120 mm
- Large: 180 x 120 mm

ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT

SEDEO PRO

PLOT D'ABDUCTION



- Réglable en profondeur et en hauteur
- Mécanisme escamotable
- **Taille coussinet:**
 - (l x p x h) 70 x 190 x 100 mm

CEINTURE



Tailles :

- Courte: 50 x 1700 mm
- Longue: 50 x 2700 mm

POIGNÉE DE TRANSFERT



ACCESSOIRES

SEDEO PRO



TABLETTES



Tablette escamotable



Demi-tablette escamotable

Dimensions tablette (à gauche):

- Largeur: 650 mm
- Longueur (grand côté): 500 mm

Dimensions demi-tablette (à droite):

- Largeur: 300 mm
- Longueur (grand côté): 470 mm

COUSSINET DE COUDE



COUSSINET DE TABLETTE



POCHETTE SOUS ACCOUDOIR



- Fermeture éclair tout autour de la pochette pour un accès facilité

ACCESSOIRES


SEDEO PRO

PANTOGRAPHE ESCAMOTABLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



- Réglable en profondeur et hauteur

RÉTROVISEUR

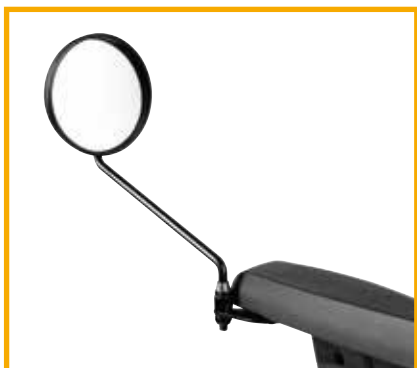

POIGNÉE DE POUSSÉE



PORTE CANNE



FIXATIONS POUR SAC A DOS





Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél: 02 47 55 44 00
Fax: 02 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr