

MONTERINGSANVISNING

RYGGKLÄDSEL EXO EVO

Steg 1:

Tag av alla gamla kardborrband.

Steg 2:

- **Alternativ 1: Höj- och sänkbara körhandtag**

Ta bort fästet till de höj- och sänkbara handtagen.

- **Alternativ 2: Fasta körhandtag**

Ta bort körhandtagen från ryggrören.

- **Alternativ 3: Fällbara körhandtag**

Man behöver inte demontera de fällbara handtagen.

Steg 3:

Trä de nya banden över ryggrören. Om det sitter fällbara körhandtag på rullstolen kan man enkelt föra banden över dessa.



Se till att ryggrören träs igenom öglorna inuti den vadderade änden. Var uppmärksam på kardborrbandens riktning. Remmarna ska positioneras så att kardborrbanden är på högra sidan för justering och de ska kunna öppnas bakifrån.

Trä på så många remmar som möjligt på ryggrören. Om stolen har en fast ryggbåge behöver ryggen monteras av från rullstolen så att band kan träas på underifrån under bågen.

Steg 4:

Dra lätt åt remmarna och sätt fast med hjälp av kardborrbanden. Efter utprovning med brukaren kan remmarna klippas av i lagom längd så att de är ca 20 mm ovanför den vadderade delen av ryggbandet.

OBS! Remmarna är sydda i intervaller med en tvärsöm. Detta hindrar remmen att fransa sig när den blivit avklippt. Värm den klippta kanten efteråt för att ytterligare förhindra fransning.

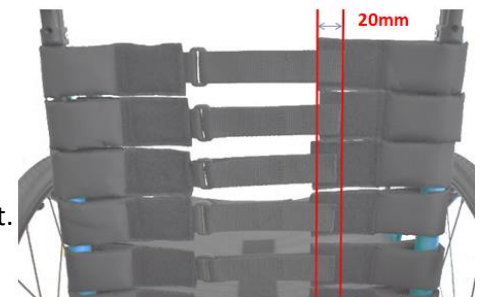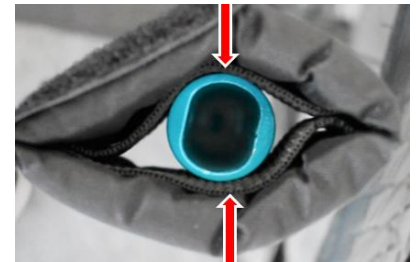

Steg 5:

- **Alternativ 1: Höj- och sänkbara körhandtag/inga körhandtag**

Trä den översta remmen över ryggrören. Den vikta sidan av lädret skall vara framåt. Fäst den övre remmen på båda sidorna med medföljande skruvar.

Dra åt remmen löst och fäst sedan med kardborrbandet. Korta remmen så att den inte sticker ut i sidled.



OBS! Remmarna är sydda i intervaller med en tvärsöm. Detta hindrar remmen att fransa sig när den blivit avklippt. Värm den klippta kanten efteråt för att ytterligare förhindra fransning.

OBS! Plastklämmorna som håller den gamla ryggremmen på plats kan tas bort.

OBS! I undantagsfall finns det inga hål i toppen på ryggrören. Om så är fallen kan du fortsätta att använda plastklämmorna för att hålla remmen på plats.

- **Alternativ 2: Fasta körhandtag**

Tag loss körhandtagen och trä på den översta remmen på körhandtaget. Sätt sedan tillbaka körhandtagen i ryggramen och skruva fast dem. Fäst den övre remmen på båda sidorna av körhandtaget med de medföljande skruvarna.



Observera!

- För att fästa körhandtagen i ryggrören, dra åt skruvarna med det vridmoment som står i bruksanvisningen.
- För att säkra skruvarna använd Loctite 243 (medium styrka).

OBS! Remmarna är sydda i intervaller med en tvärsöm. Detta hindrar remmen att fransa sig när den blivit avklippt. Värm den klippta kanten efteråt för att ytterligare förhindra fransning.

OBS! Plastklämmorna som håller den gamla ryggremmen på plats kan tas bort.

Dra åt remmen löst och fäst sedan med kardborrbandet. Korta remmen så att den inte sticker ut i sidled.

- **Alternativ 3: Fällbara körhandtag**

Montera remmen så att den breda sidan av remmen vetter framåt och ändarna täcker helt körhandtaget. Dra den övre remmen helt genom öglorna i körhandtagen och fast dem med kardborrbandet på baksidan av remmen.



OBS! Remmarna är sydda i intervaller med en tvärsöm. Detta hindrar remmen att fransa sig när den blivit avklippt. Värm den klippta kanten efteråt för att ytterligare förhindra fransning.

Steg 6:

Fäst det medföljande kardborrbandet på framsidan av den nedre remmen och vik det över den andra remmen uppifrån. Fäst det också på remmarnas baksida.

OBS! Kontrollera att avståndet mellan ryggbanden är jämnt.

Klipp sedan av kardborrbandet nedanför den nedersta remmen.



Steg 7:

Lägg ryggmattan över remmarna så att den fäster mot kardborrbandet.

