



Ankle Positioning Velcro Closure

Art.nr. Hms art.nr. Størrelse

8.70001.0	216534	XS
8.70001.1	216535	S
8.70001.2	215256	M
8.70001.3	213224	L

Kinetic Balance

Ankle Positioning Velcro Closure

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Ankelsele velcro # 8.70001

Innhold

4 festebraketter
4 beltespenner
2 ankelseler
1 bruksanvisning

Bruk

Posisjoneringsutstyr for anklene. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel

Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fasett og marker deretter den beste plasseringen for føttene.
5. Fasett den beste plasseringen for metallbrakettene, og fest disse til fotplaten.
6. Fest ankelbåndene.
7. Fest ankelbåndene ved bruk av spennene.
8. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.

Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no