



4-point Hip Belt Pin Release Double Adjustable Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70043.0	216116	XS
6.70043.1	216513	S
6.70043.2	216514	M
6.70043.3	216515	L
6.70043.4	216516	XL

Kinetic Balance

4-point Hip Belt Pin Release Double Adjustable

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB belte hofte, 4 innfestinger, trykknapp,
2 justeringer # 6.70043

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 hoftebelte
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspenne.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspenne.
5. Fest klemspenne ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspenne i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspenne.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukersens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet ved å trykke trykknappen gjennom det elastiske materialet med pekefingeren.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no