



4-point Hip Belt Single Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70042.0	216508	XS
6.70042.1	216509	S
6.70042.2	216510	M
6.70042.3	216511	L
6.70042.4	216512	XL

Kinetic Balance

4-point Hip Belt Single Adjustable

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB belte hofte 4 innfestinger, 1 justering
6.70042

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 hoftebelte
1 bruksanvisning

Bruk

Sele for bekkenposisjonering. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel

Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering

Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.

Monteringsinstruksjoner

1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

Vedlikehold

Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no