

EFTERSYNSRUTINER

GEMINO 20



Gemino 20
Gemino 20 M
Gemino 20 S

Serienummer:

HMI nr:

Borger:

Dato:

Signatur:

1 Eftersyn	Ja	Nej	2 Tiltag hvis Nej
Bremser			
Er bremsene i stykker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skift bremsene.
Er bremsekablerne beskadiget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skift bremsekablerne.
Fungerer bremsene korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsene.
Fungerer bremsene ens på begge sider?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsene.
Står bremsehåndtagene i rigtig position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juster bremsehåndtagene position.
Er bremseklodsene rene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengør bremseklodsene.
Er bremsefjederen rene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengør bremseklodsene.
Hjul/hjulophæng			
Er hjulene intakte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skift de skadede eller slidte hjul.
Kontroller hjulophæng. Er hjulbolte og gafler intakte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Byt defekte hjulbolte/gafler.
Bevægelige dele			
Fungerer alle bevægelige dele?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korriger i henhold til hvad der ikke fungerer. Skift eventuelle defekte dele.
Tilspændinger			
Er alle bolte rigtigt spændt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Efterjuster bolte
Rengøring			
Er rolatoren rengjort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vask eller desinficér rullatoren.
Kommentarer			