



VIKTIGT:
ANVÄND INTE DIN SCOOTER FÖRRÄN DEN FULLSTÄNDIGA BRUKSANVISNINGEN
HAR LÄSTS OCH FÖRSTÅTTS. DETTA ÄR ENBART EN FORTFATTAD INFORMATION.

Elite² Plus

Bruksanvisning Kortinformation
Elite² Plus med XS-panel



INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR AV SCOOTERN

1. För att ge utrymme, fäll upp armstödet och flytta ut kontrollpanelen/styrhandtaget. Vinkla styrhandtaget efter behov. Se fig. 1A och 1B.



2. För att underlätta förflyttningen, skjut sitsrotationshandtaget framåt och rotera sätet tills det pekar mot dig. Likadant för att ta dig tillbaka till ursprungsläget.



3. Finjustering av sätet kan göras framåt/bakåt. Rygg- och armvinkeln kan justeras för optimal sittställning.





4. Sitthöjden justeras enbart av behörig tekniker.




Lufttryck: 2,4 -2,5 bar.

KONTROLLSYSTEM

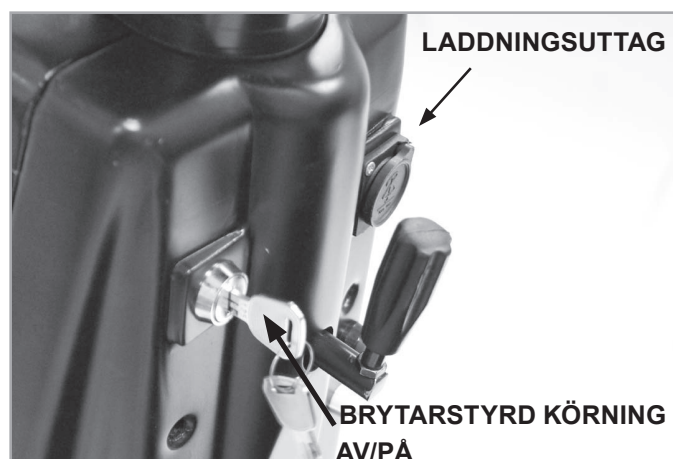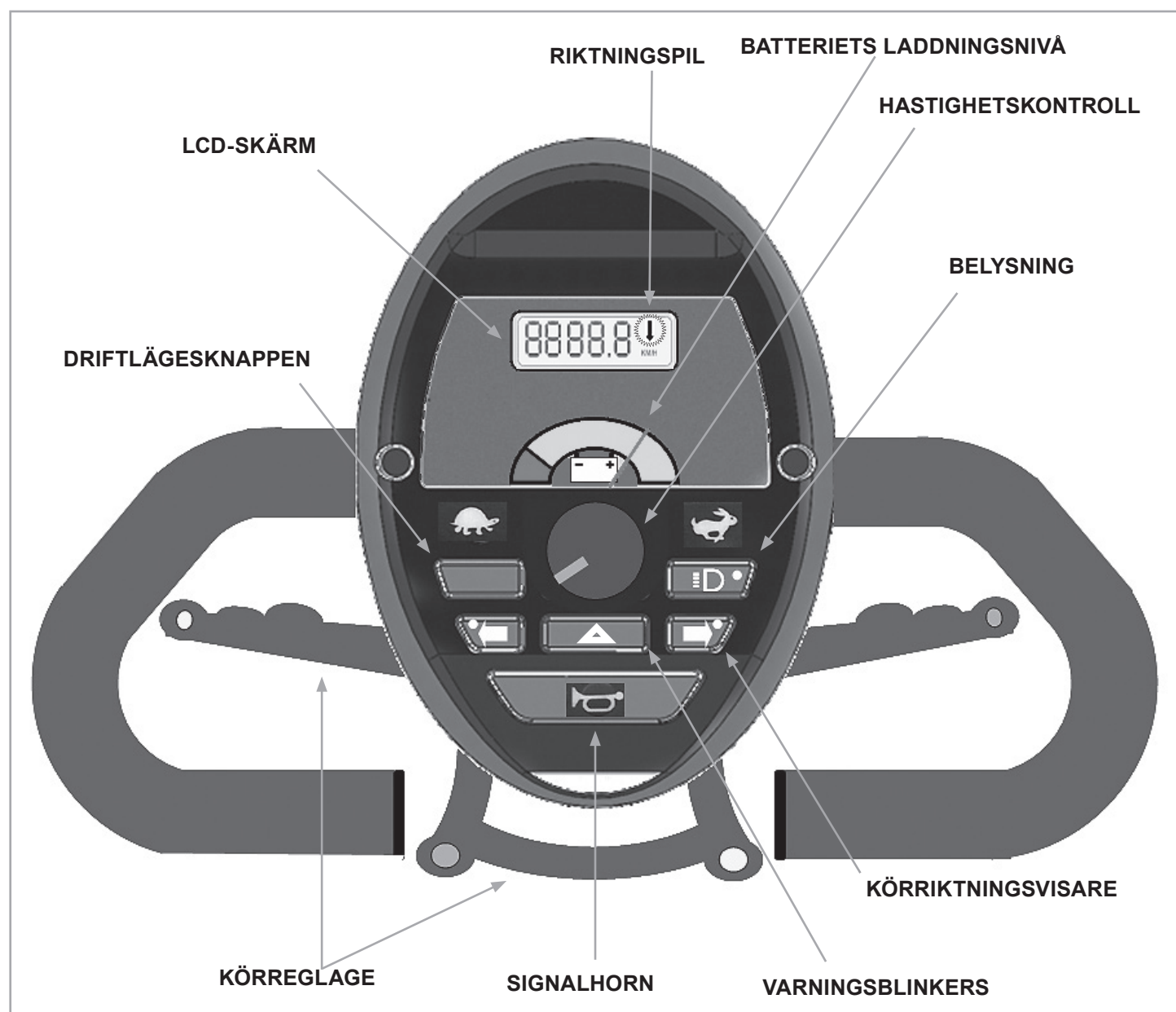

Din scooter kan vara utrustad med ett annat reglage.
Se den kompletta bruksanvisningen för fullständig beskrivning.

VANLIGA FELKODER OCH MÖJLIGA ORSAKER.

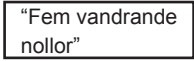-  **Frikopplingsspak/brytare är aktiverad.**
Stäng av scootern, sätt tillbaka scootern i "KÖR" driftläge och slå på scootern igen.
-  **Scootern är förhindrad att köra av kontrollsystemet.**
Kontrollera att laddarens kontakt är urkopplad från laddningsuttaget.
-  **Scootern är förhindrad att köra av kontrollsystemet.**
Kontrollera att handbromsen ej är aktiverad.

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION OM ÖVRIGA FELKODER SE DEN KOMPLETTA BRUKSANVISNINGEN.

ANSLUTA LADDAREN, LADDNING:

Scootern kan laddas via laddningsuttaget på baksidan av styrpanelen. Fig. 5

- Se till att scootern är avslagen.
- Anslut först laddaren till scootern.
- Anslut sedan laddarens stickkontakt till nätuttaget och slå på den.
- GRÖN LYSDIOD lyser för att visa att strömmen är PÅ, (Fig. 6).
- GUL LYSDIOD lyser för att visa att batterierna laddar, (Fig. 6).
- GUL LYSDIOD stängs av när laddningscykeln är komplett, (Fig. 6).

