

Sterling Elite2 Mini/Elite2 Plus

Backspegel




Benämning		Artikelnummer
Backspegel Hö	☐	030945
Backspegel Vå	☐	030944



MONTERINGSANVISNING

Använd en skruvmejsel och bänd försiktigt upp plastlocket (1).
Skruva därefter fast backspegeln (2) i gängorna som blivit synliga på styret.
Ställ in önskad vinkel på backspegeln och drag därefter åt låsmuttern (3).
Avsluta genom att trycka ned gummhättan över låsmuttern.

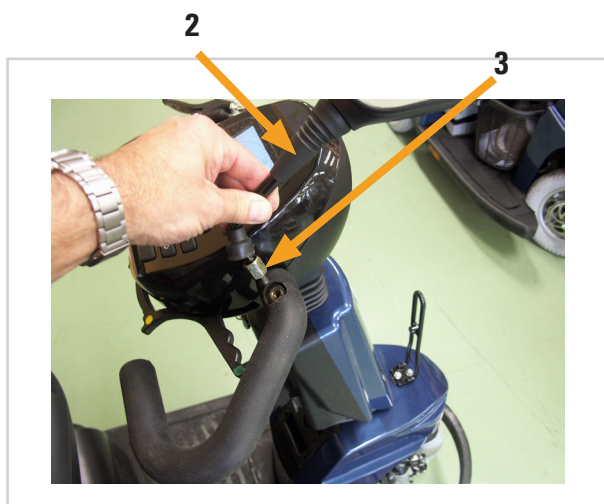



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se