

MONTERINGSANVISNING

Enhåndsbrems



Beskrivelse



Enhåndsbrems Gemino Walker




Art. nr



7108310




GEMINO

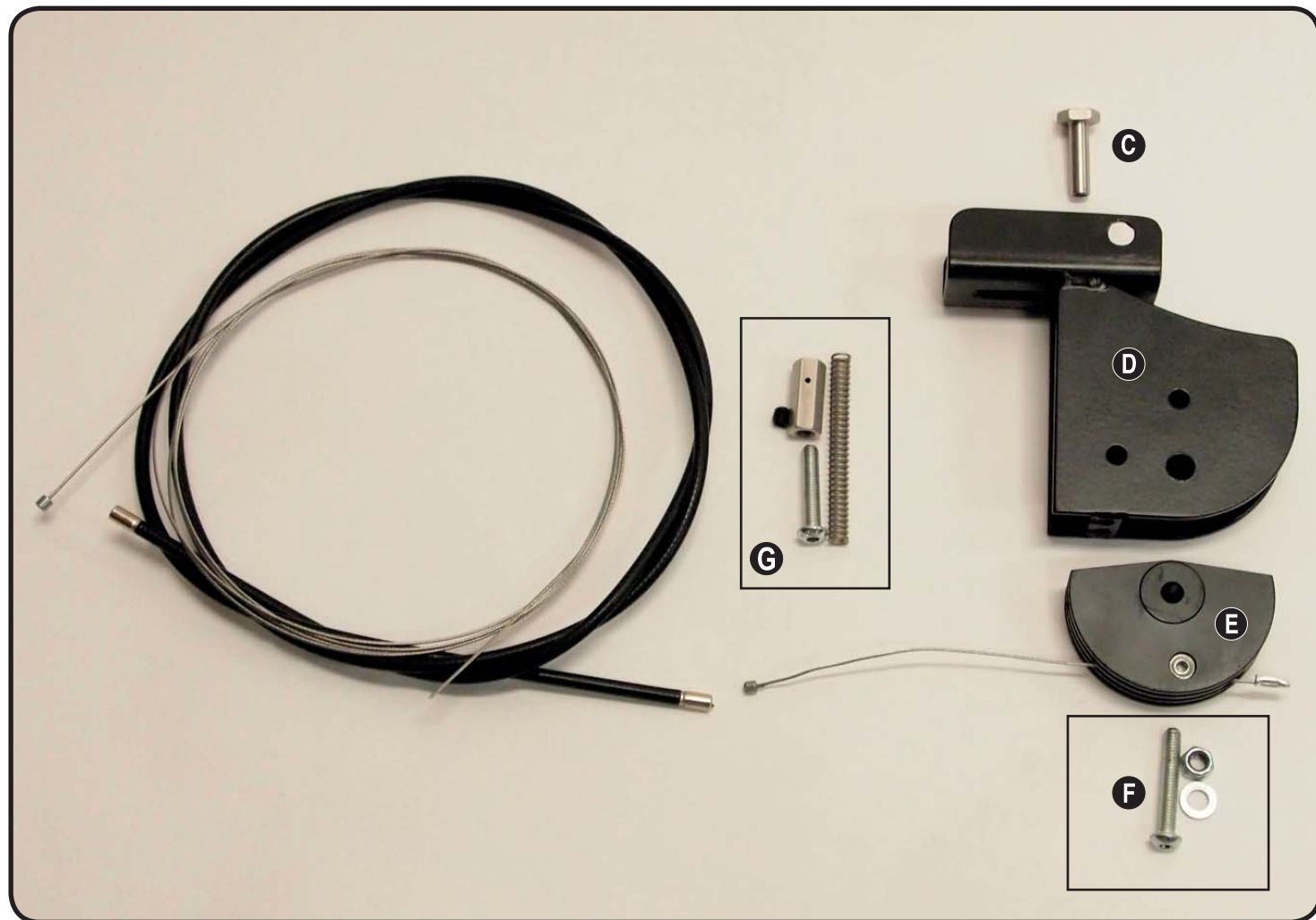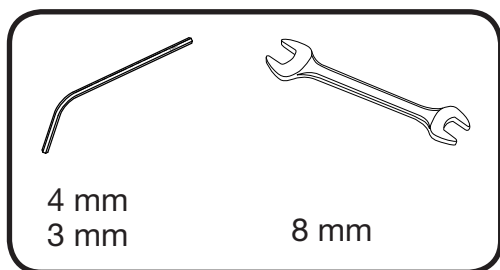

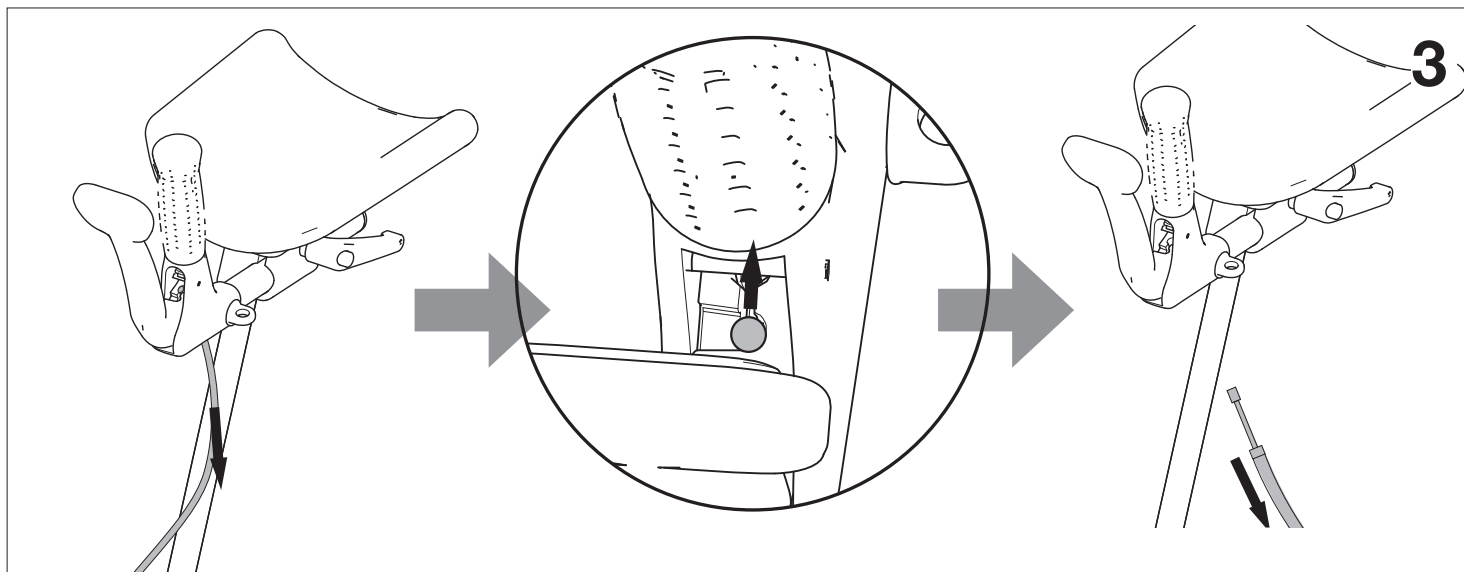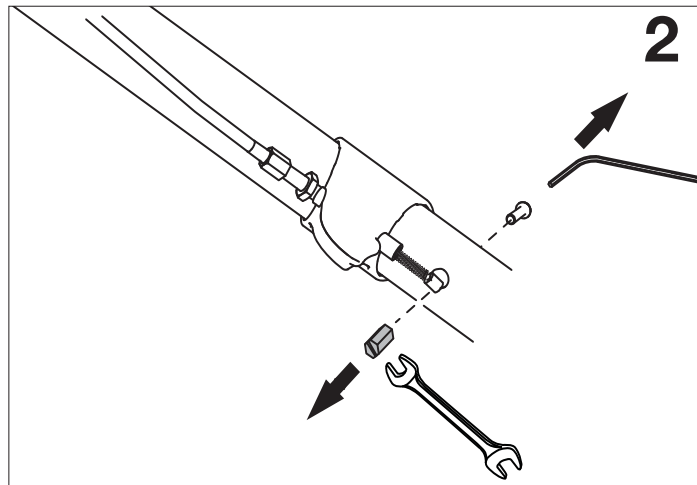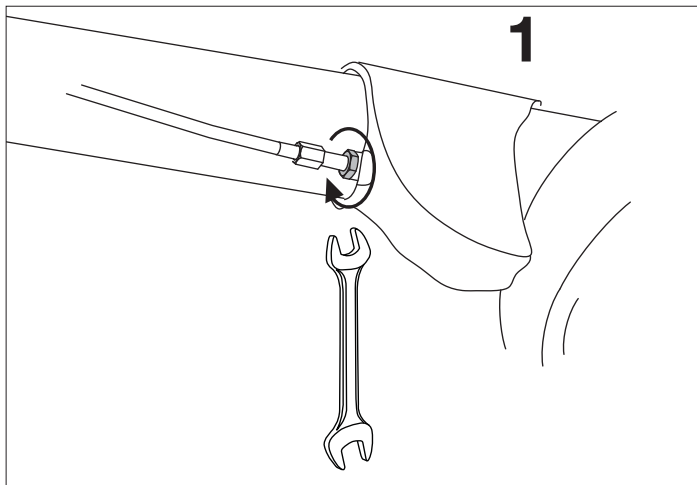


1 - 3 Demonter eksisterende bremsevaier på motsatt side av der enhåndsbremsen skal monteres

1 Løsne vaier fra bremsehåndtak på den siden der enhåndsbremsen skal monteres og slakk bremsen.

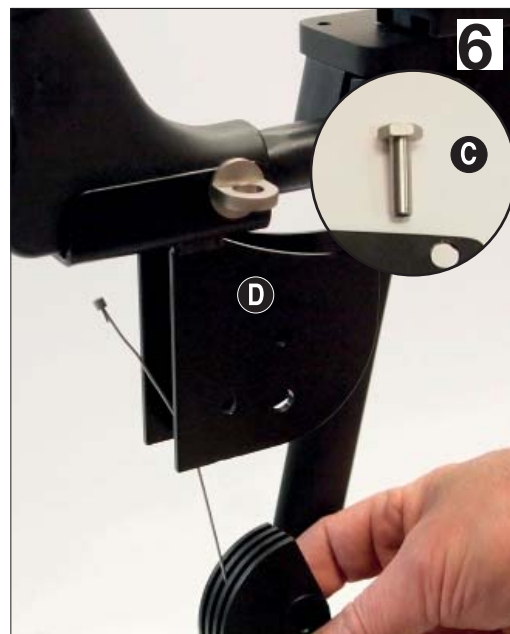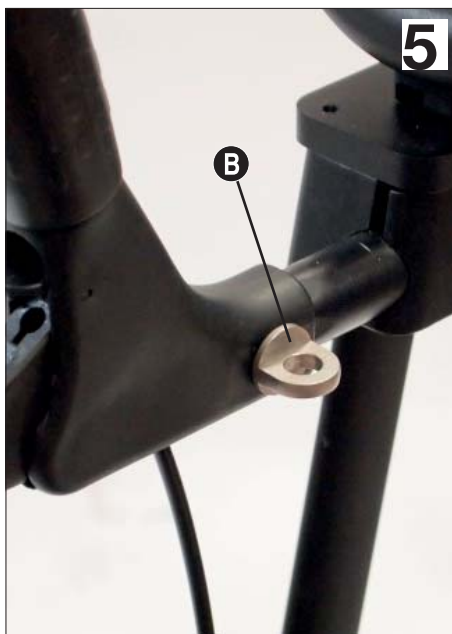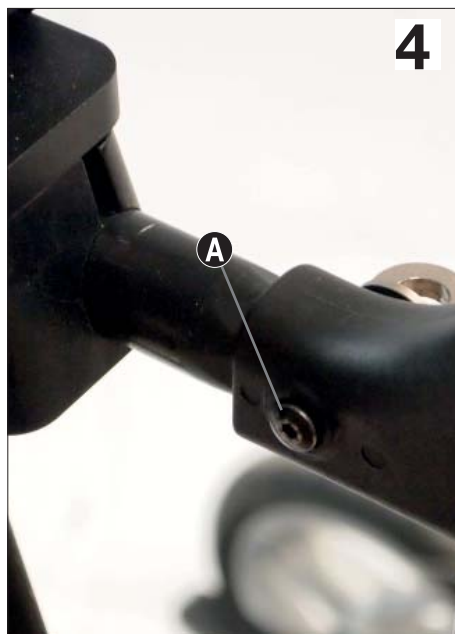


4 - 6 Skru ut **A** og **B**. Erstatt A med **C** når du monterer braketten **D**.

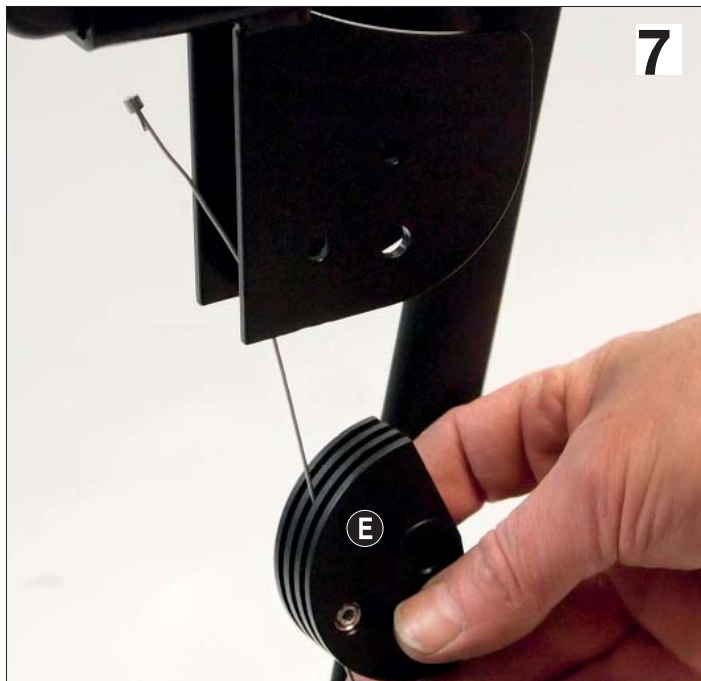

7 Tre vaieren inn i bremsehåndtaket. Monter trinsen **E**. Benytt festemateriell **F**.



8 Trekk til skruene. Påse at trinsen beveger seg lett.

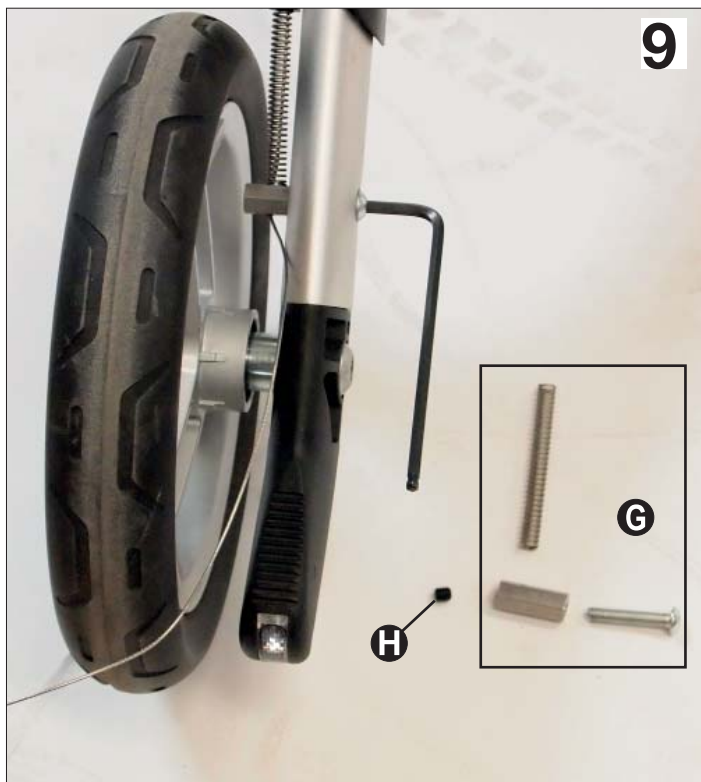

9 Monter delene **G** som vist i figuren.



10 Fest ny og eksisterende vaier inn i trinsen **E** og vaierstrømpene i brakett **D**.



- 11 Tre fjæren inn på vaieren og vaieren gjennom sekskantbolten. Monter Z-skruen ① som angitt ved unbrakonøkkel i figur 11. Legg bremseklossen med samme avstand inntil hjulet som på motsatt side. Trekk deretter til Z-skruen ①.



- 12-13 Klipp av vaieren og monter endehylsen.



Juster bremsene ved å stramme/slakke vaierne på begge sider. Slik at både kjørebremser og parkeringsbremser fungerer.



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu