

Bondo PAS quick guide

Bruk av E-sykkelen

1. Trykk inn PÅ/AV knappen på batteriet for å starte E-systemet.



2. Juster setet og stig opp på sykkelen.



3. Slå på displayet ved å trykke og holde inne (PÅ/AV)-knappen på displayet.



4. Løs ut parkeringsbremsen.



5. Velg ønsket hjelpenivå. (1-4).



6. Start å sykle og systemet vil straks gi hjelp.



For å slå på lysene, trykk på (PÅ/AV)- knappene på front- og baklyset.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no