


Easy 22" quick guide

Bruk av E-sykkelen

1. Trykk inn PÅ/AV knappen på batteriet for å starte E-systemet.
2. Juster setet og styret og stig opp på sykkelen.
3. Slå på displayet ved å trykke og holde inne (PÅ/AV)-knappen på displayet.
4. Ta tak i sykkelen og spark støtten opp og bakover. Stig på sykkelen.
5. Velg ønsket hjelpenivå. (1-9).
6. Start å sykle og systemet vil straks gi hjelp.

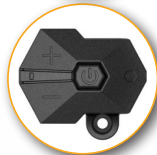

For å slå på lysene, trykk på (PÅ/AV)- knappene på front- og baklyset.



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no