


# firefly GoTo

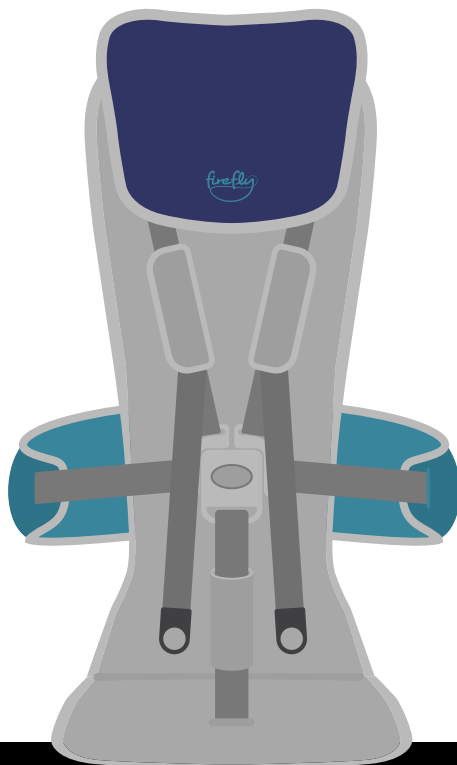

Manuale d'Uso GoTo

Unità di sostegno

GoTo di Firefly è un'unità di sostegno portatile che migliora la vita dei bambini facendoli partecipare alla vita di tutti i giorni. Assicura un sostegno sicuro e multiuso, ideale sia in casa che fuori.

Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzare GoTo. Queste istruzioni possono essere scaricate anche dal nostro sito web **www.SunriseMedical.it** insieme a video, grafici e altri documenti utili.

---

## Indice

01	Usò previsto	p.63
02	Dichiarazione di conformità	p.64
03	Termini di Garanzia	p.64
04	Informazioni sulla sicurezza	p.65
05	Informazioni su pulizia e manutenzione	p.66
06	Servizio di assistenza al prodotto	p.68
07	Importanti linee guida	p.68
08	Controllo del prodotto	p.69
09	Reimmissione dei prodotti Firefly	p.69
10	Come predisporre GoTo	p.70
11	Usò di GoTo su sedia con schienale rigido	p.72
12	Usò di GoTo su un carrello del supermercato	p.76
13	Unire GoTo alla base d'appoggio	p.77
14	Posizioni reclinabili consigliate	p.79
15	Smontaggio di GoTo e rimozione del rivestimento	p.82
16	Riposizionare il rivestimento e riassembleare GoTo	p.86
17	Informazioni sulle taglie	p.89

## SEZIONE 01: Uso previsto

GoTo è stato progettato per fornire un ulteriore sostegno posturale alla parte superiore del corpo dei bambini con disabilità. Il sedile deve essere sempre applicato su una sedia o struttura di supporto simile per assicurare stabilità e sicurezza. GoTo è destinato ad uso occasionale, in quanto garantisce supporto e sollievo della pressione limitati e non deve pertanto essere utilizzato come sistema di seduta primario per bambini con disabilità.

GoTo deve essere saldamente fissato ad un supporto rigido e stabile, mediante utilizzo di tutte le cinghie nere di fissaggio.

Non collocare il bambino sul sedile GoTo se il supporto non è stabile. Accertarsi delle capacità del bambino e non perderlo mai di vista.

GoTo è disponibile in 2 taglie. La taglia 1 è destinata a bambini di età compresa tra 1-3 anni circa, con un peso massimo di 15kg/33lb\* mentre la taglia 2 è adatta a bambini di età compresa tra 3-8 anni circa, con un peso massimo di 30kg/60lb\*. **Per ulteriori informazioni consultare la Guida alle taglie nella sezione 16.**



\*Si noti che tuttavia il peso limite previsto per un bambino seduto in un carrello della spesa standard è di 13kg/28.5lb max.

Non si accetta alcuna responsabilità per qualsiasi uso non previsto del prodotto. Le attività quotidiane testate e approvate da Firefly by Leckey per l'uso del GoTo sono:

1. Fissato allo schienale rigido di una sedia durante il pranzo con la famiglia e gli amici.
2. In un carrello della spesa, in modo da consentire al genitore/assistente di fare acquisti con maggiore facilità.
3. Per utilizzo esclusivo come dondolo/altalena, per permettere al bambino di divertirsi con questa attività. GoTo deve essere inserito perfettamente all'interno dei bordi della base del dondolo/altalena. In caso di sporgenza di GoTo dai bordi della base, non dovrà essere utilizzato per alcuna ragione su un sedile a dondolo. L'uso di GoTo su sedili a dondolo è a discrezione dell'utente, in quanto i loro modelli sono molto diversificati. Prima dell'uso valutare con precisione se il sedile GoTo può essere assicurato saldamente e accertarsi che la struttura sia sicura prima di collocare il bambino nel GoTo.
4. Come seduta da pavimento grazie alla base d'appoggio per il pavimento inclusa.

Accertarsi che durante l'uso della base d'appoggio il bambino possa muoversi sul pavimento, e che sia sempre sotto la supervisione di un adulto. In caso di dubbi contattare il Servizio clienti Sunrise Medical: **info@sunrisemedical.it**

## SEZIONE 02: Dichiarazione di conformità

James Leckey Design Ltd, in qualità di azienda produttrice del marchio Firefly, dichiara che GoTo è conforme ai requisiti delle Linee guida 93/42/ EEC e EN12182 Ausili tecnici per persone disabili, requisiti generali e metodi di prova.

---

## SEZIONE 03: Termini di garanzia

I prodotti posso esserci restituiti in garanzia, per riparazione o sostituzione fino a ventiquattro mesi dalla data d'acquisto indicata sullo scontrino. Contattare il Servizio Clienti al numero +39 0523 573111 o scrivendo a [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it). Sunrise Medical organizzerà a proprie spese la restituzione degli articoli non idonei, che saranno riparati o sostituiti non appena ricevuti e verranno rimandati al cliente. In tutti i casi, è responsabilità del cliente assicurarsi che la merce da restituire venga opportunamente imballata, preferibilmente nella sua confezione originale. Una volta ricevuti, i prodotti verranno riparati o sostituiti e restituiti al mittente.

## SEZIONE 04: Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere sempre attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Gli utilizzatori del prodotto non devono mai essere lasciati incustoditi.
3. Controllare sempre con attenzione l'idoneità e la stabilità della sedia/carrello/dondolo prima di applicare GoTo.
4. Assicurarsi sempre che GoTo sia fissato saldamente e le cinghie siano ben tirate prima dell'uso.
5. GoTo non è stato collaudato mediante crash test e pertanto non può essere utilizzato per trasporto. Tuttavia alcune compagnie aeree ne hanno approvato l'uso sui loro aeromobili. Verificare prima del volo.
6. Non utilizzare mai GoTo su un carrello della spesa con superficie inclinata superiore a 10° per evitare qualsiasi rischio di caduta.
7. Se si utilizza GoTo come sedile in una culla a dondolo/altalena: non far oscillare/spingere con eccessiva forza. Quando il bambino è collocato sul dondolo è sempre necessaria la supervisione di un adulto.
8. Applicare la base d'appoggio prima dell'uso e regolare all'angolazione preferita prima di collocare il bambino nel GoTo.
9. La base d'appoggio deve essere utilizzata su una superficie solida e stabile.
10. GoTo contiene parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento per i bambini più piccoli. Controllare che tutti i componenti siano ben stretti e fissati in modo sicuro prima dell'uso, comprese le manopole e le cinghie.
11. Non effettuare modifiche su GoTo. La mancata osservanza delle istruzioni può mettere a rischio il bambino. Potrebbe inoltre invalidare la garanzia di GoTo.
12. GoTo deve essere conservato con cura e non deve essere usato in caso uno dei componenti sia difettoso. Conservare GoTo in orizzontale per evitare che si danneggi.
13. GoTo deve essere tenuto lontano da ogni fonte diretta di calore tra cui fiamme libere, sigarette, boiler elettrici e a gas.
14. In caso di dubbi sull'uso sicuro di GoTo o se le parti dovessero guastarsi, si prega di interrompere l'utilizzo del prodotto e di contattare il Servizio clienti Sunrise Medical scrivendo a **info@sunriseMedical.it**.

## SEZIONE 05:

# Informazioni su pulizia e manutenzione

### Base in plastica del sedile

1. Per la pulizia della base in plastica del sedile si consiglia di utilizzare solo acqua calda e detersivo non abrasivo, come detersivo per i piatti.
2. Sulla parte in plastica possono essere utilizzati anche alcoli disinfettanti quali etanolo e isopropanolo.
3. Non utilizzare solventi organici o liquidi per la pulitura a secco.

### Rivestimento e tessuti


1. Pulire e aver cura del tessuto in maniera regolare. Utilizzare semplicemente l'aspirapolvere con un accessorio per tappezzeria per rimuovere le particelle di polvere pulendo con un panno umido per la pulizia generale.
2. I panni in microfibra sono estremamente efficaci perchè possono essere utilizzati senza sapone, che può occludere il tessuto.
3. I rivestimenti del sedile possono essere rimossi dalla base in plastica e lavati in lavatrice a 40°C.
4. Consigliata l'asciugatura all'aria aperta. Non asciugare in asciugatrice.
5. Il rivestimento può essere inserito interamente in lavatrice, dopo aver rimosso cinghie, fibbie e chiusure di sicurezza. Conservare in luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

6. Il tessuto può anche essere pulito a mano sul posto. Per fuoriuscite di cibo solido, raccogliere con una spatola. Pulire il tessuto con un prodotto a base acquosa, come la schiuma di un detersivo delicato, e rimuovere con panno assorbente, asciugamani o spugna.
7. Per una pulizia ottimale del rivestimento e per evitare che si bagni eccessivamente o scolorisca, utilizzare prodotti e attrezzature specificamente progettati per la cura della tappezzeria.
8. Pulire subito le fuoriuscite. Più a lungo si lascia una macchia o una fuoriuscita sul tessuto più difficoltoso sarà rimuoverla. Potrebbe anche provocarne lo scolorimento.
9. Per sporco ordinario e perdite minori è efficace il sapone usato abitualmente e le spugnature con acqua calda. Evitare lo sfregamento che può essere abrasivo e danneggiare il tessuto. Fare attenzione a non immergere completamente il tessuto poiché questo farà diffondere la macchia. Per evitare di diffondere ulteriormente la macchia, procedere dall'esterno verso l'interno.
10. Sulle macchie più ostinate è possibile usare detersivi antisettici. Su GoTo inoltre sono adatti i detersivi disinfettanti, come l'alcool isopropilico o l'etanolo. Assicurarsi che i prodotti per la pulizia vengano completamente rimossi. Far asciugare il prodotto all'aria aperta, assicurandosi che la componente alcolica sia evaporata completamente prima dell'uso.

11. Non collocare il rivestimento sulla base in plastica finché è ancora umido. Asciugare accuratamente prima di riposizionarlo.
12. Non stirare il rivestimento o le cinghie.
13. Non usare candeggina su alcuna parte di GoTo.

### Suggerimento:

uno dei migliori detergenti per tappezzeria a base acquosa è molto facile da realizzare in casa. Mettere un bicchiere di acqua tiepida (non calda) in una ciotola e aggiungere 1/4 di bicchiere di sapone per piatti biodegradabile. Agitare con un miscelatore elettrico a velocità media finché il liquido non diventa una schiuma densa. Questa schiuma rimuoverà lo sporco accumulato e la maggior parte delle macchie di cibo o bevande. Non solo pulisce più a fondo, è semplice da fare e poco costoso, ma è anche non tossico e rispetta l'ambiente.

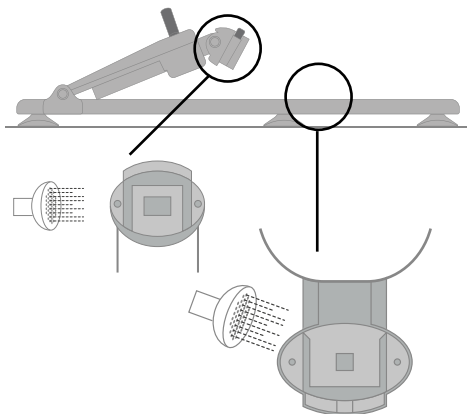

### Unità base Floorsitter

1. Assicurarsi che la parte inferiore del pianale di Floorsitter sia pulita dopo ogni uso.
2. Per la pulizia quotidiana possono essere utilizzati sapone e acqua.
3. Non utilizzare solventi per pulire la base di Floorsitter.
4. Per rimuovere sabbia/terra/erba o altre piccole particelle che possono infiltrarsi nei raccordi del Floorsitter, battere leggermente sull'area per far fuoriuscire ogni residuo. Sciacquare accuratamente per assicurarsi che non si accumulino particelle all'interno dei raccordi. Per blocchi persistenti sul Floorsitter, è possibile azionare la spinta della serratura a scatto per rimuovere eventuali particelle e facilitarne il rilascio.
5. In caso il Floorsitter venga a contatto con acqua salata, lavare accuratamente tutte le parti con acqua dolce.



Se il Floorsitter viene utilizzato in ambienti esterni alla casa (come la spiaggia o il giardino), è importante risciaccarlo dopo ogni uso, in modo che sia privo di particelle/ostacoli che potrebbero comprometterne i meccanismi di funzionamento.

## SEZIONE 06: Servizio di assistenza al prodotto

Per tutto ciò che riguarda i servizi si rimanda si prega di contattare il Servizio clienti: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it).

## SEZIONE 07: Importanti linee guida

### Come collocare il bambino in GoTo Seat

1. GoTo deve essere fissato saldamente sulla sua destinazione d'uso prima di introdurre il bambino.

2. La base d'appoggio deve essere utilizzata su una superficie solida e stabile. Superfici morbide come tappeti e moquette (soprattutto a pelo alto) possono ridurre la stabilità della base d'appoggio e devono essere usati con cautela.

3. Assicurarsi che le cinghie dell'imbracatura non ostacolino il posizionamento del bambino sul GoTo Seat. Le cinghie per le spalle e quelle laterali di supporto devono essere tenute molto lente.

4. Se collocato in un carrello: guidare le gambe del bambino lentamente/dolcemente attraverso gli spazi per le gambe del carrello per lo shopping; non forzare l'inserimento delle gambe.

5. Una volta assicurate le gambe, far passare gentilmente le braccia del bambino attraverso le bretelle, che devono essere tenute molto lente. Assicurarsi che le imbottiture delle bretelle siano posizionate sulle spalle del bambino.

6. Chiudere la fibbia centrale e regolare le cinghie di supporto laterali accertandosi che il bambino sia ben assicurato all'imbracatura. La lunghezza della bretella deve essere regolata in modo da adattarsi in maniera sicura al bambino. Vedere la Sezione 11(b) come riferimento.

7. La lunghezza della cinghia inguinale può essere regolata accedendo al raccordo posto al di sotto del rivestimento imbottito. Nella taglia 2 del GoTo la posizione della cinghia inguinale può essere spostata più all'esterno per fornire al bambino maggior spazio man mano che cresce. Vedere la Sezione 11(b) come riferimento.



## Rimozione del bambino da GoTo Seat

1. Slacciare le cinghie per le spalle e quelle laterali di supporto.
2. Sbloccare la fibbia centrale utilizzando il pulsante di rilascio sull'imbracatura.
3. Far scorrere le cinghie dalle spalle del bambino estraendo delicatamente le braccia dall'imbracatura.
4. Solo per la taglia 1, se collocato in un carrello: sollevare delicatamente il bambino facendo uscire le gambe dagli spazi per le gambe del carrello.

Non provare a sollevare il bambino per estrarlo dal carrello mentre è ancora attaccato al sedile.

## SEZIONE 8: Controllo del prodotto

Si consiglia di effettuare ripetute verifiche dell'attrezzatura prima dell'utilizzo per accertarsi della sua sicurezza.

I controlli consigliati sono riportati di seguito.

1. Controllare che l'imbracatura sia in posizione e in sicurezza.
2. Controllare segni di usura su tutte le parti in tessuto.
3. Controllare tutte le fibbie per accertarsi che le cinghie siano fissate saldamente alla parte in plastica.

4. Verificare eventuali danni o rotture sul supporto in plastica.
5. Assicurarsi che tutti i pulsanti siano chiusi correttamente.
6. Accertarsi che GoTo sia posizionato correttamente sulla base prima di collocare il bambino.
7. Se è in uso la base d'appoggio, assicuratevi che sia saldamente attaccata a GoTo Seat. Vedere la sezione 13 per le linee guida.

In caso di dubbi sulla sicurezza d'uso del vostro prodotto Firefly o di ogni sua parte, interromperne l'utilizzo e contattare il nostro Servizio clienti prima possibile.


## SEZIONE 9: Reimmissione dei prodotti Firefly

Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito a fondo per garantire il controllo di eventuali infezioni in conformità alla sezione 5 del presente manuale.

Accertarsi che copia dello stesso venga fornita unitamente al prodotto. In caso di dubbi sulla sicurezza d'uso continuato del vostro prodotto Firefly By Leckey o di ogni sua parte, interromperne l'utilizzo e contattare il nostro Servizio clienti prima possibile scrivendo a **info@sunrisemedical.it**.

## SEZIONE 10: Come predisporre GoTo Seat

### 10(a) Allineamento del supporto laterale

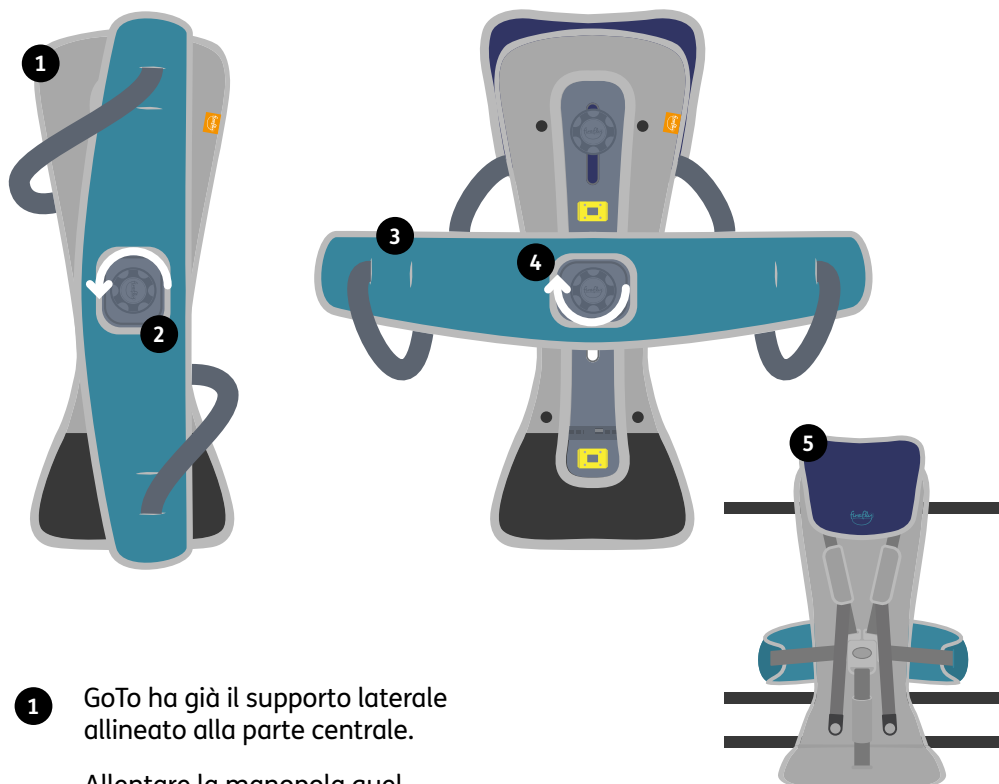

**1** GoTo ha già il supporto laterale allineato alla parte centrale.

**2** Allentare la manopola quel tanto che basta da poter ruotare il supporto laterale.

**3** Ruotare quest'ultimo in direzione antioraria e in posizione.


**4** Verificare che il supporto laterale sia in sede nella parte centrale dello schienale, e serrare la manopola.

**5** Capovolgere GoTo e inserire le cinghie di supporto laterali nella fibbia centrale. **Vedere la Sezione 11(b) come riferimento.**


Controllare che quando le cinghie di supporto laterali sono agganciate insieme, tutte le cinghie siano disposte in modo corretto, come mostrato.

## 10(b) Sistemazione della base d'appoggio (se acquistata insieme a GoTo Seat)

La base d'appoggio deve sempre essere collocata su una superficie ferma, solida e stabile. Quando si colloca la base d'appoggio sulla superficie prescelta, è fondamentale che tutti i piedini in gomma siano ben a contatto con la superficie.

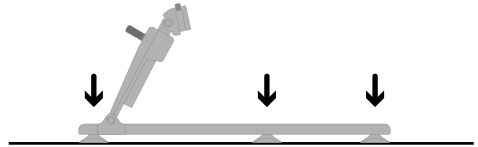


Una volta che la base d'appoggio è sistemata, assicurarsi che il braccio di reclinazione sia impostato sulla posizione più alta.

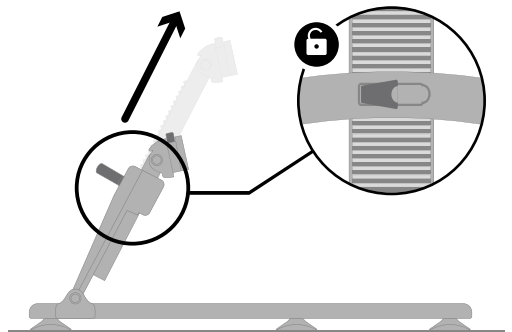


## SEZIONE 11: Utilizzo di GoTo su sedia con schienale rigido


### 11(a) Fissare GoTo ad una sedia con schienale rigido

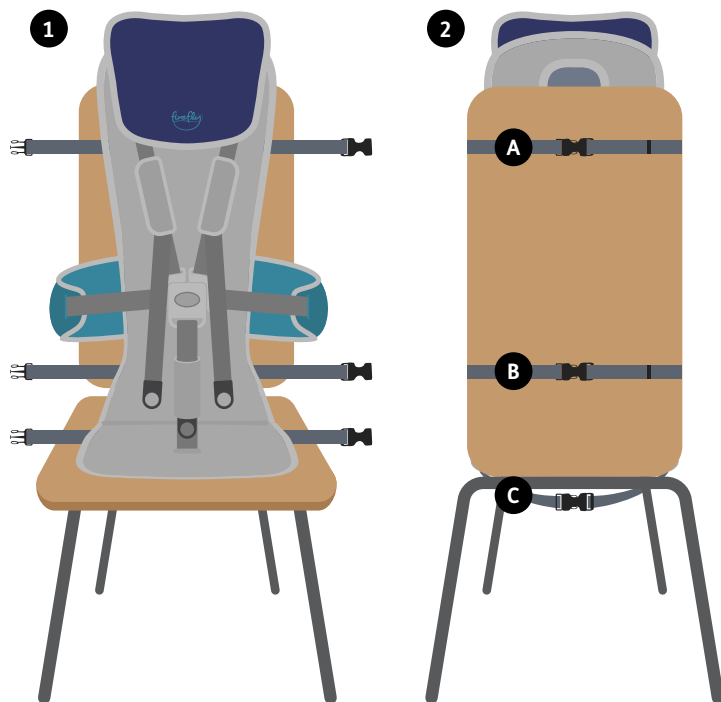


- 1 Assicurarsi che tutte le cinghie siano allentate e non strette l'una con l'altra. Posizionare GoTo su una sedia con schienale rigido.
- 2 Stringere saldamente le cinghie **A** intorno alla parte posteriore della sedia. Ripetere con le cinghie **B**. Fissare le cinghie **C** sotto la sedia.

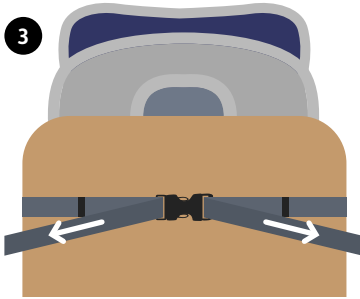

3 Tirare le cinghie verso l'esterno per stringere.

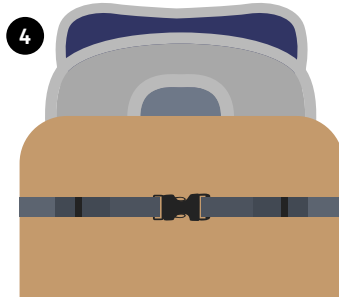

4 Inserire la parte in eccesso delle cinghie negli anelli e fissare nelle clip.

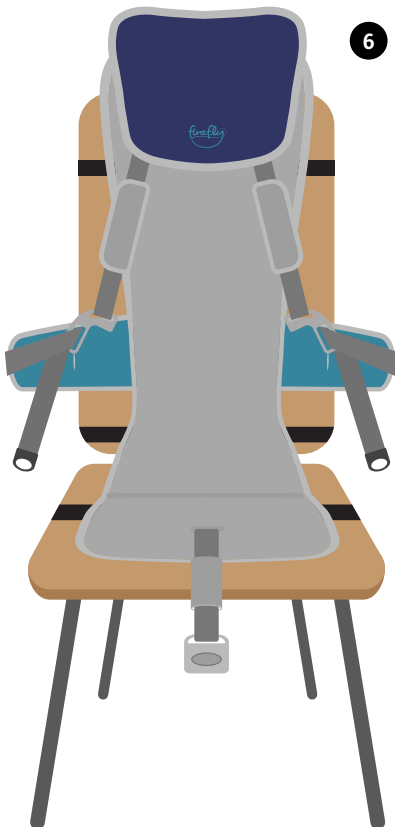



6

Accertarsi che tutte le cinghie nere siano ben fissate allo schienale rigido e che la fibbia a cinque punte della parte anteriore non sia allacciata prima di collocare il bambino su GoTo Seat.

## 11(b) Apertura e chiusura della fibbia a cinque punte

**Prima di iniziare, assicurarsi che le cinghie del supporto laterale, delle spalle e quella inguinale siano tutte sciolte e slacciate.**

- 1 Fissare le due chiusure del supporto laterale ai lati della fibbia centrale.
- 2 Una volta fissate, regolare le cinghie delle spalle, quelle dei supporti laterali e quella inguinale tirando per stringerle.

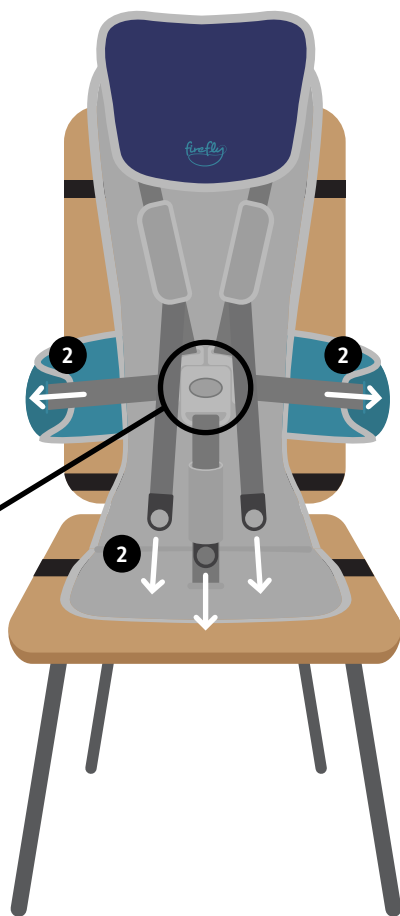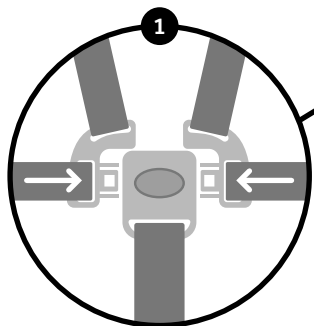


- 3 Nella taglia 2 di GoTo la posizione di montaggio della cinghia inguinale può essere spostata in avanti o indietro in base alle esigenze del bambino. Assicurarsi che sia installata saldamente alla base GoTo in plastica.

Bambini più piccoli

Bambini più grandi




Assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate quando la fibbia è chiusa.

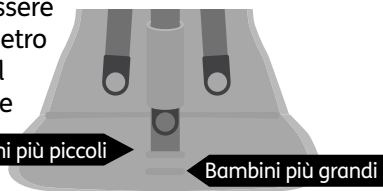

## 11 (c) Regolazione dell'appoggiatesta e del supporto laterale

- 1** Svitare la manopola dell'appoggiatesta in senso antiorario per rimuovere l'appoggiatesta dalla base di GoTo Seat. Spostare l'appoggiatesta verso l'alto o verso il basso per ottenere la posizione desiderata.
- 2** Una volta regolato l'appoggiatesta all'altezza desiderata, avvitare la manopola alla base di GoTo ruotando in senso orario.
- 3** Sganciare il supporto laterale ruotando la manopola in senso antiorario. Spostarlo verso l'alto o verso il basso per ottenere la posizione desiderata. Una volta regolato, assicurarlo nuovamente ruotando la manopola in senso orario.

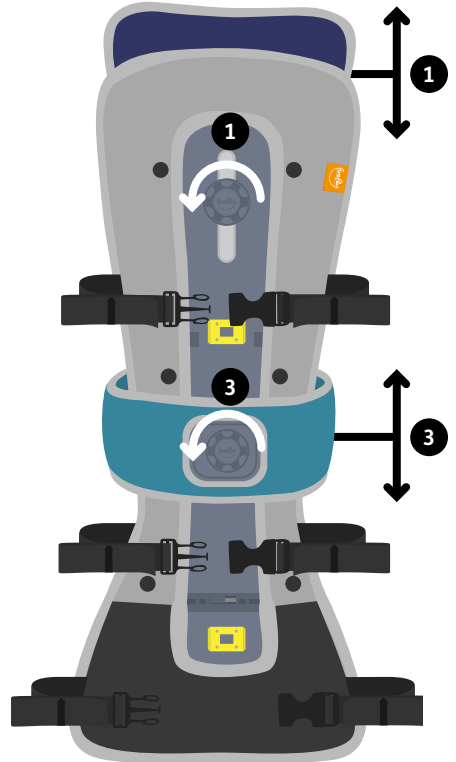


## SEZIONE 12: Uso di GoTo su un carrello del supermercato

- 1 Assicurarsi che tutte le cinghie siano sciolte e slacciate. Posizionare GoTo nel sedile del carrello. Inserire le cinghie **A** attraverso la griglia del sedile del carrello e fissarle. Tirarle per stringerle quanto necessario.
- 2 Inserire le cinghie **B** attraverso l'anello del sedile del carrello, collegarle e stringerle quanto necessario.



In caso il carrello non disponga di anello nella parte superiore, collegare le cinghie B allo stesso telaio delle cinghie A.

- 3 Fissare le cinghie **C** sotto il sedile del carrello e tirare per stringerle. Arrotolarle ad anello e inserirle nelle clip.
- 4 Assicurarsi che il sedile del carrello sia sicuro, con la fibbia a cinque punte aperta nella parte anteriore e le cinghie allentate prima di collocare il bambino sul sedile.

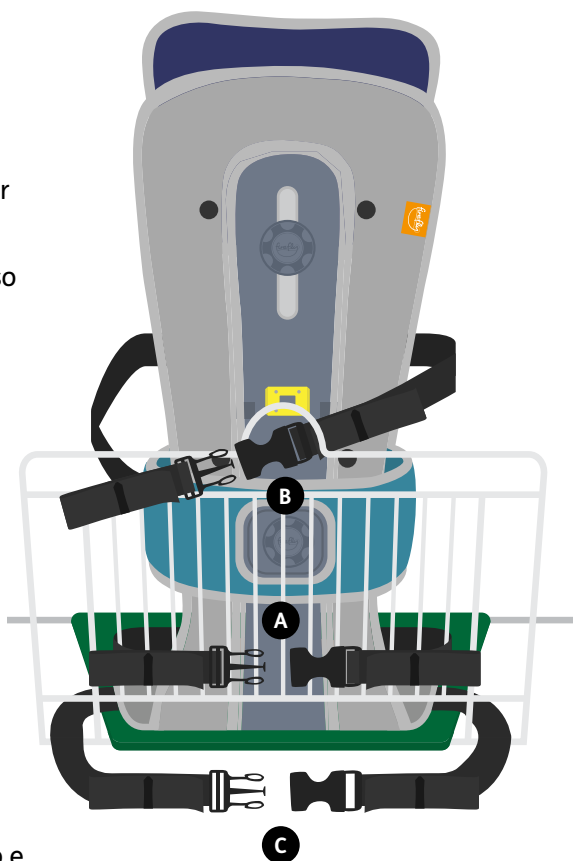




## SEZIONE 13: Fissaggio di GoTo alla base d'appoggio




Prima di fissare il sedile GoTo alla base d'appoggio, seguire i passaggi indicati nella sezione 10(b).

- 1 Abbassare GoTo con la base del sedile piatta sulla base d'appoggio.

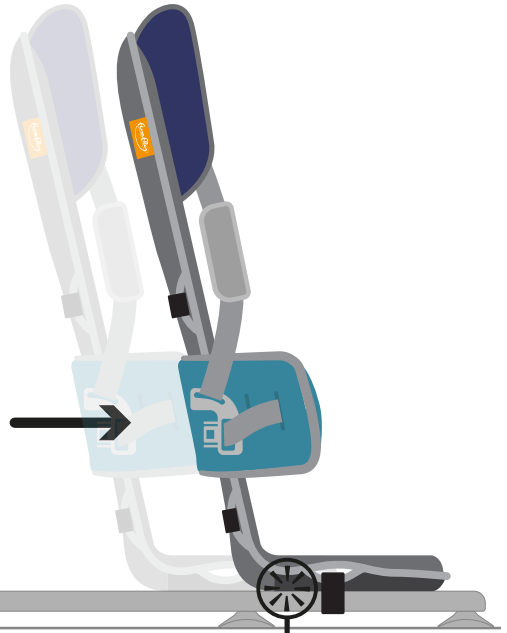


- 2 Assicurandosi che la base del sedile sia allineata al centro con la base d'appoggio, spostare la base del sedile in avanti in modo che scivoli all'interno del canale di blocco.

- 3 Quando la base del sedile si blocca nella base d'appoggio, si sentirà un clic a indicare che il blocco è stato attivato.

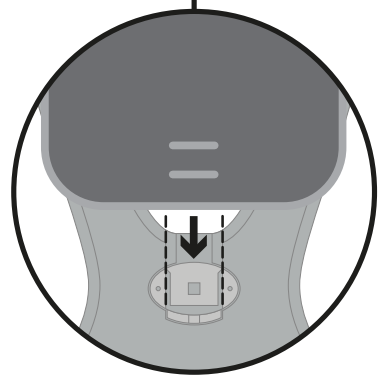

## SEZIONE 13: Fissaggio di GoTo alla base d'appoggio (continua)

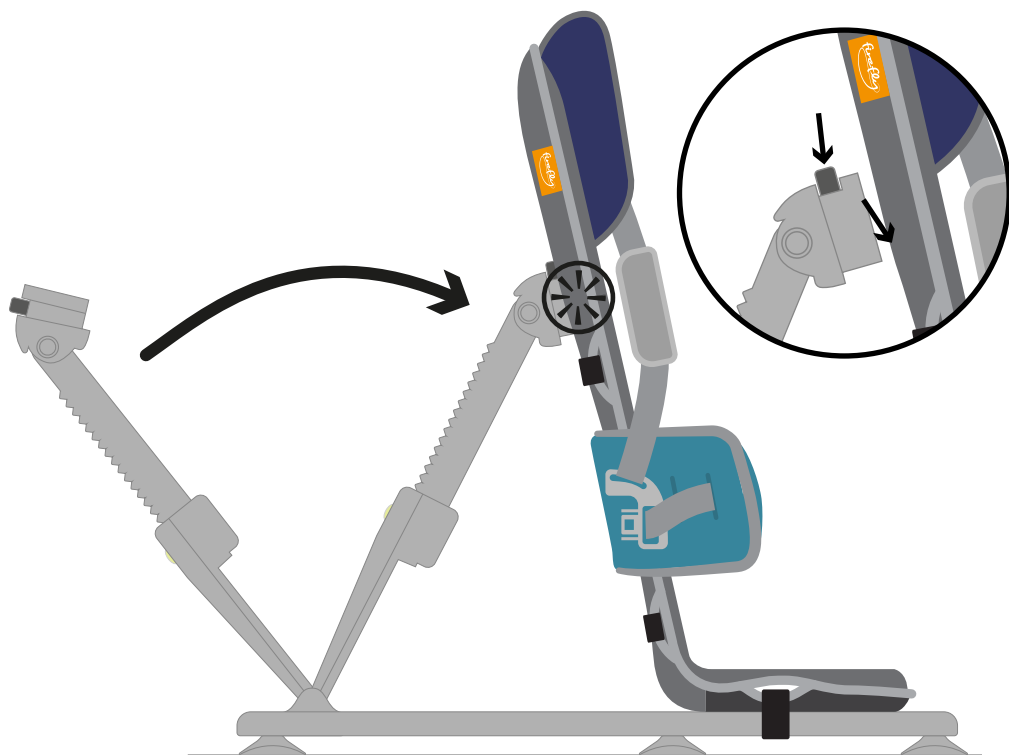

Prima di collegare il braccio di reclinazione allo schienale, assicurarsi che sia impostato sulla posizione più alta.

Tenendo una mano su GoTo, utilizzare l'altra mano per spingere il pulsante evidenziato e inserire l'attacco nello schienale.


Una volta inserito correttamente, si sentirà un clic.




Quando sia la base del sedile che lo schienale saranno agganciati alla base d'appoggio si udirà un clic chiaramente percettibile.

## SEZIONE 14: Posizioni reclinabili consigliate


**Posizione eretta** – Se il vostro bambino dispone di una buona postura di seduta e del controllo del tronco, potrebbe essere in grado di utilizzare una posizione di seduta verticale.

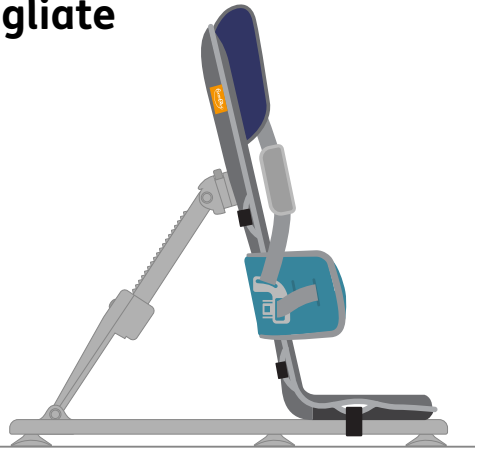

**Posizione intermedia** – Se il bambino viene tenuto sollevato nel sedile, si consiglia di posizionare GoTo in una posizione di reclinazione intermedia.

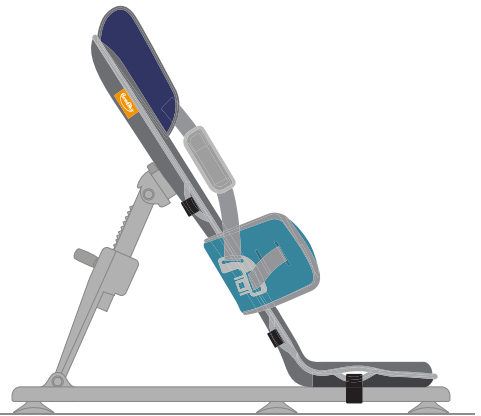

**Posizione completamente reclinata** – Per bambini con controllo minimo della testa si consiglia di collocare GoTo nella posizione completamente reclinata.

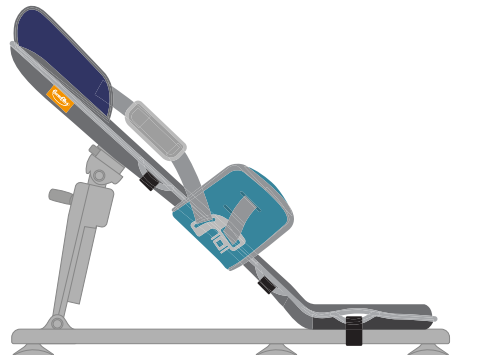


## 14(a) Uso della funzione di reclinazione della base d'appoggio per GoTo

La funzione di reclinazione della base d'appoggio per GoTo può essere utilizzata una volta che il bambino sia completamente assicurato e sostenuto.


Fare attenzione quando si modifica l'angolo di reclinazione. L'obiettivo è di rendere questo movimento il più morbido possibile per ridurre l'ansia che il bambino potrebbe avere.

Per portare GoTo in posizione più verticale, mettere una mano sul GoTo **A** nella parte superiore dello schienale come supporto e l'altra mano sulla clip verde del braccio di reclinazione della base d'appoggio. **B**

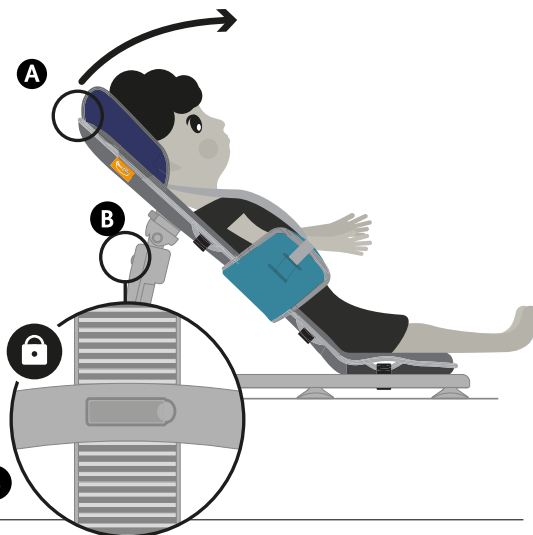


Rilasciare la clip e portare il sedile nella posizione verticale più adatta al bambino. **A**

Fissare la clip sulla base d'appoggio. Una volta inserita correttamente, si sentirà un clic.

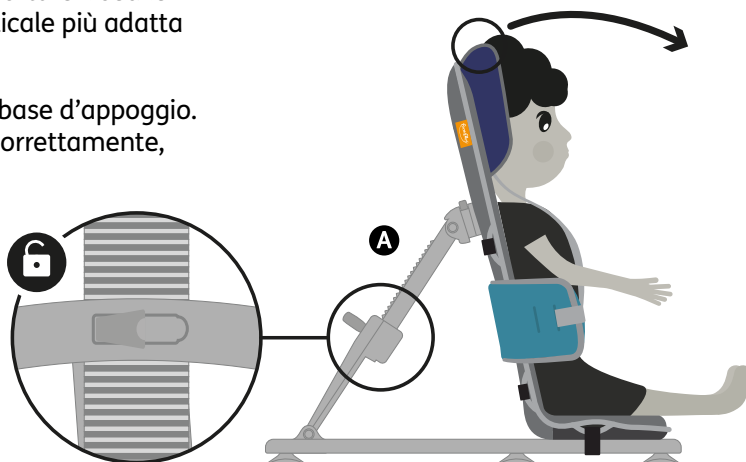

## 14(b) Rimuovere GoTo dalla base d'appoggio


Per rimuovere GoTo dalla base d'appoggio, premere il tasto verde sul braccio di reclinazione e tirare lo schienale in avanti.

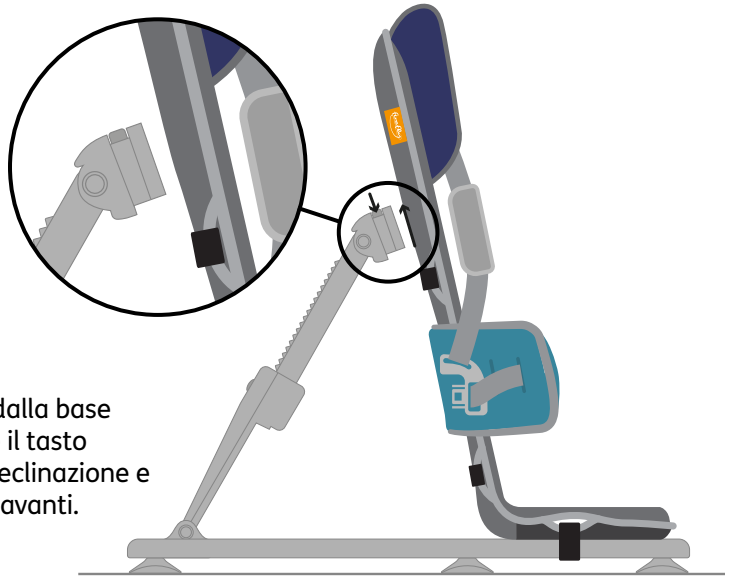

Per sbloccare la base del sedile, tirare la linguetta di plastica verde **A** scorrere all'indietro, quindi sollevare GoTo dalla base d'appoggio. **B**




Per staccare la base d'appoggio da un pavimento in legno o in piastrelle, sollevare delicatamente il telaio per sbloccare i piedini in gomma. Non forzare in caso i piedini in gomma non si staccano subito. Per staccarli fate scivolare la mano sotto i piedini (non usare attrezzi).

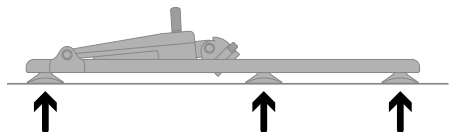

## SEZIONE 15: Conservare GoTo e rimuovere il rivestimento

### 15(a) Appoggiatesta


- 1 Svitare la manopola dell'appoggiatesta in senso antiorario per rimuovere l'appoggiatesta dalla base di GoTo Seat.

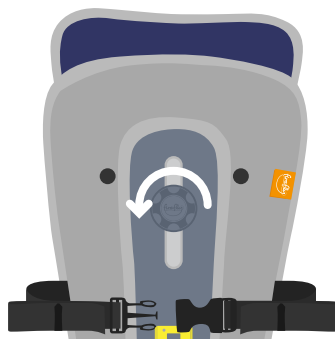


- 2 Avvitarla nella parte posteriore dell'appoggiatesta per conservarla in maniera sicura.

- 3 Sbottonare il rivestimento in tessuto dell'appoggiatesta su entrambi i lati.

- 4 Far scivolare l'appoggiatesta in plastica verso il basso dalla copertura del rivestimento.

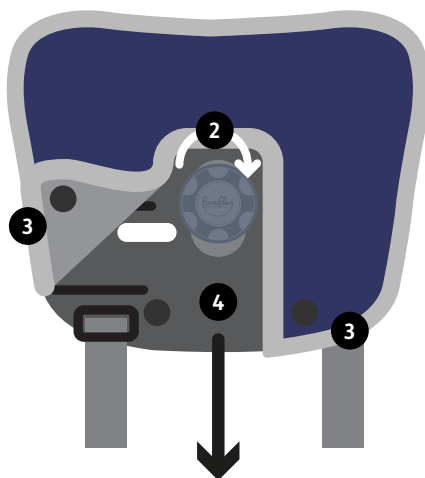


- 5 Sganciare completamente l'appoggiatesta dalla base GoTo rimuovendo le bretelle dall'appoggiatesta.

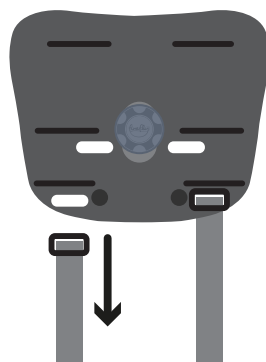


## 15(b) Supporto laterale

Iniziare con tutte le cinghie collegate alla fibbia come mostrato.

- 1 Ruotare GoTo e sganciare il supporto laterale ruotando la manopola in senso antiorario.
- 2 Far scorrere il supporto laterale sopra lo schienale GoTo. Avvitare la manopola al componente di scorrimento per prevenirne la perdita.
- 3 Ruotare GoTo e riporre il supporto laterale sulla parte superiore del GoTo.

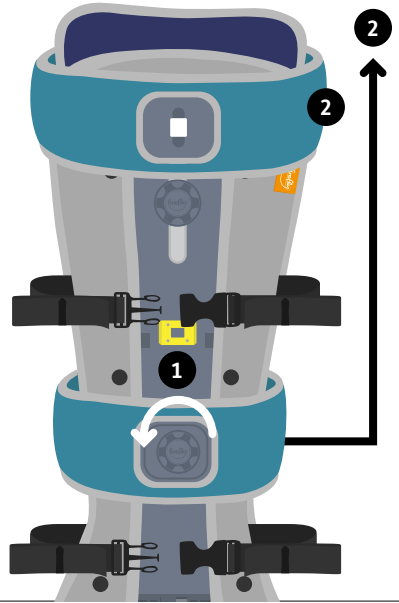

- 4 Allentare quanto più possibile le cinghie laterali di supporto laterali ma tenere la fibbia collegata.
- 5 Estrarre un lato dell'inserto di plastica dal rivestimento. Rimuovere la cinghia facendo passare la fibbia in plastica attraverso i fori e poi attraverso il rivestimento. Ripetere con l'altro lato del supporto laterale. Una volta rimossa dal supporto laterale di plastica, il rivestimento è pronto per il lavaggio.

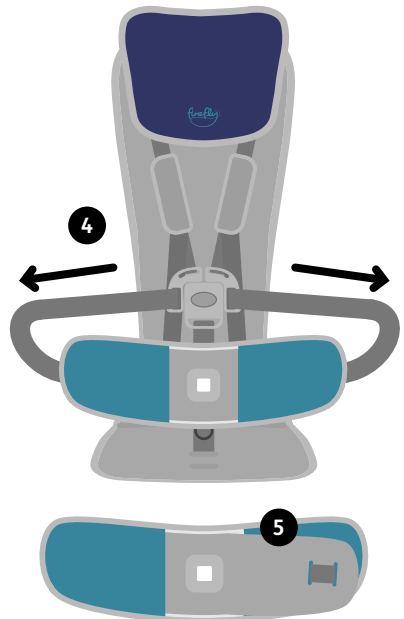


## 15(d) Cinghie

- 1 Adagiare la base del sedile GoTo a faccia in giù e sbottonare il rivestimento. Rimuovere le cinghie dal cuscino GoTo facendo passare le fibbie attraverso i fori del rivestimento e della base in plastica.



Collegare le cinghie a coppie e conservarle in un luogo sicuro. Ricordare che le cinghie **A** sono più lunghe e vanno ricollegate al cuscino. Le cinghie **A** hanno un'etichetta diversa che può essere utilizzata per l'eventuale identificazione.

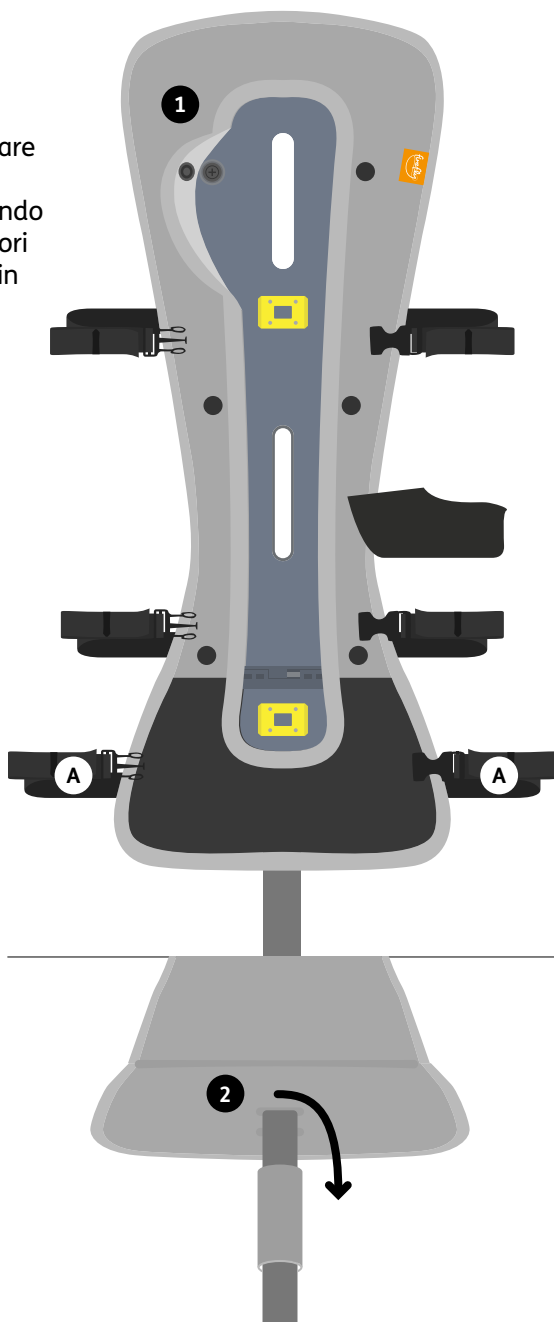


- 2 Come fatto per le altre cinghie, infilare la fibbia della cinghia inguinale attraverso il foro corrispondente nella base di GoTo nella parte inferiore del cuscino, poi dal rivestimento.



## 15(d) Tappezzeria



- 3 Rimuovere l'inserto dal rivestimento. Per la taglia 1 del GoTo, staccare il velcro posto alla base del sedile per rimuovere l'inserto.

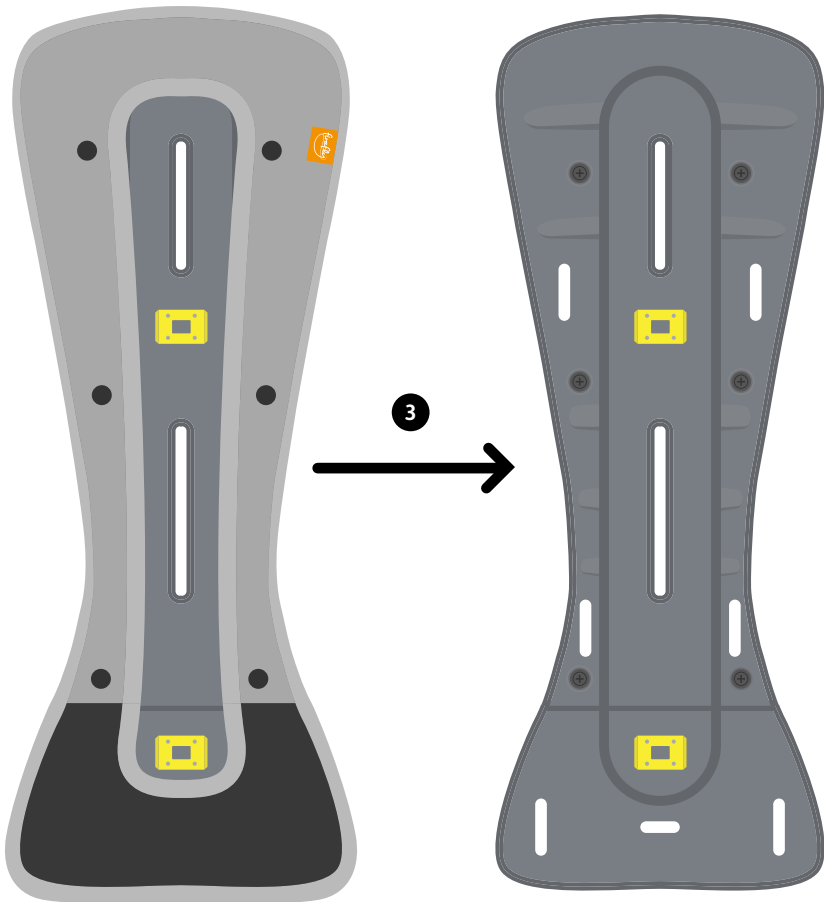

## SEZIONE 16: Riposizionare il rivestimento e assemblare GoTo

### 16(a) Cinghie e rivestimento

- 1 Reinserrire le cinghie nell'inserto di GoTo, quelle **B** e **C** at the sul retro della base e le **A** (le più lunghe) al cuscino.
- 2 Infilare la fibbia di ogni cinghia nera (non l'aggancio) prima attraverso i fori del rivestimento, quindi nel foro dell'inserto.
- 3 Come fatto per le altre cinghie, infilare la fibbia della cinghia inguinale attraverso il foro corrispondente del rivestimento alla parte inferiore del cuscino, quindi nella base in plastica.
- 4 Una volta inserite tutte le cinghie, posizionare l'inserto nel proprio rivestimento.

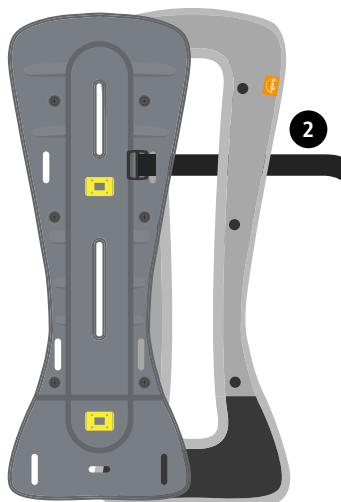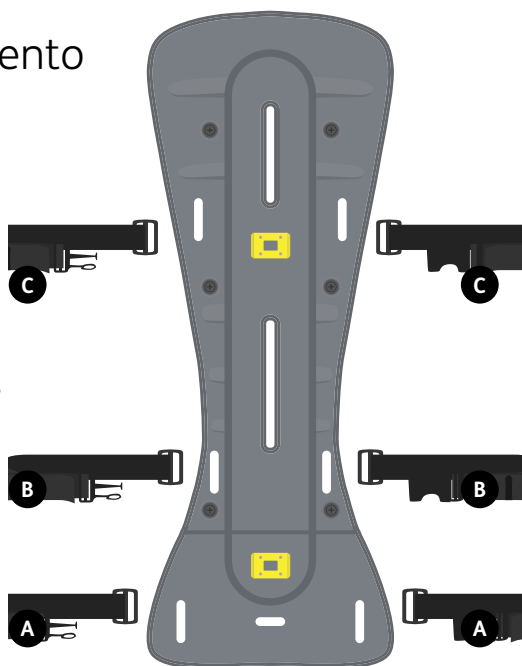

Far scorrere prima nel rivestimento la parte più larga della base di GoTo Seat. Per la taglia 1, prima di questa operazione aprire il velcro della base del sedile.

## 16(b) Supporto laterale








Prima di iniziare, pensare quale cinghia di supporto laterale debba essere collegata a quale lato del rivestimento per poter fissare la fibbia.

- 1 Allentare quanto più possibile le cinghie laterali sulla fibbia centrale. Allineare l'imbottitura del rivestimento, l'inserto del supporto laterale in plastica e le cinghie come indicato sopra.
- 2 Inserire la cinghia del supporto laterale nel suo rivestimento.
- 3 Tirare la cinghia attraverso il rivestimento.
- 4 Far passare la cinghia attraverso l'inserto del supporto laterale (ciò consentirà di evitare che la fibbia sulla parte esterna del supporto laterale provochi irritazione durante l'uso). È possibile utilizzare un modello diverso di filettatura per modificare la larghezza laterale in modo che si adatti meglio al bambino.
- 5 Collocare l'inserto del supporto laterale in plastica nel rivestimento e tirare la cinghia per fissarlo all'interno.






Infilare la fibbia attraverso il foro interno del rivestimento per i bambini più piccoli.

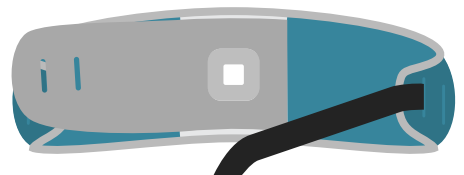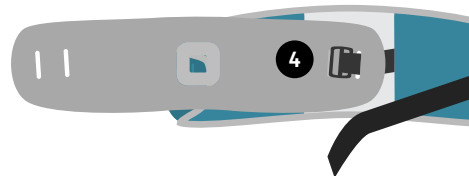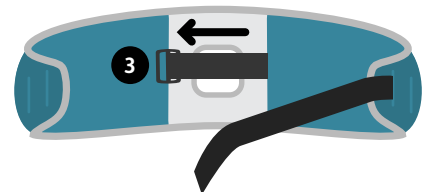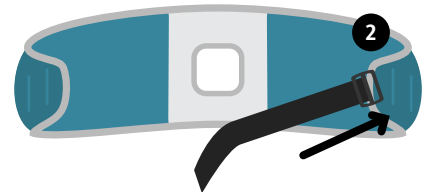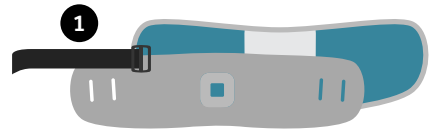

Ripetere dal lato opposto

## 16(c) Appoggiatesta

- 1 Inserire la fibbia delle bretelle in maniera diritta attraverso la parte anteriore dell'inserto dell'appoggiatesta e assicurarla alla parte posteriore.
- 2 Far scorrere l'inserto dell'appoggiatesta nel suo rivestimento e chiudere con i bottoni a pressione.
- 3 Attaccare l'appoggiatesta alla base di GoTo allineando il foro della vite nell'incavo. Fissare in posizione avvitando la manopola in senso orario.

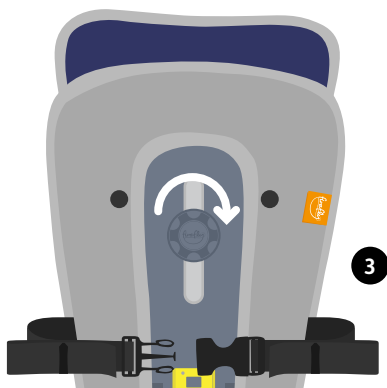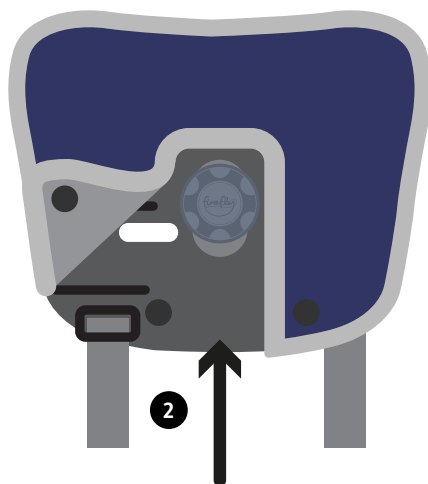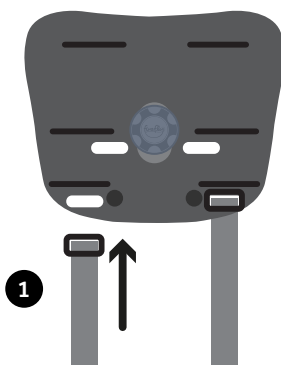

## Sezione 17

### Informazioni sulle taglie

	Taglia 1	Taglia 2
Base del sedile fino alla parte superiore dell'appoggiatesta - Max (mm/pollici)	540/21	680/27
Base del sedile fino alla parte superiore dell'appoggiatesta - Min (mm/pollici)	380/14	510/20
Ampiezza del supporto laterale Max (mm/pollici)	260/10	300/12
Ampiezza del supporto laterale Min (mm/pollici)	190/7.5	210/8
Profondità del sedile (mm/pollici)	157/7	244/9.5
Peso massimo (kg/lb)	15/33*	30/66*
Fascia di età (appross.)	1-3 anni	3-8 anni

\*(se il peso del bambino supera i 13kg/28,5lbs GoTo non può essere utilizzato in un carrello del supermercato)

# GoTo Vinyl

---

## Informazioni per la pulizia e la cura

---

- Pulire regolarmente con un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua fredda. Asciugare con un panno assorbente pulito.
  - Asciugare velocemente eventuali perdite con un panno assorbente e asciutto per evitare macchie. Pulire con un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua fredda.
  - Si noti che i coloranti e i pigmenti di jeans indaco, pennarelli a sfera e pennarelli possono macchiare in modo permanente.
  - Se lo sporco si è accumulato, utilizzare un sapone neutro (non alcalino). Fare attenzione a rimuovere tutti i residui di sapone ed asciugare con un panno assorbente.
  - Rimuovere immediatamente (entro 15 minuti) i fluidi corporei e lo sporco estremo con acqua fredda. Applicare il protocollo di controllo delle infezioni approvato, una soluzione di candeggina al cloruro di sodio 10.000 ppm, Haz-Tabs o Chlor-Clean. Rimuovere i residui di prodotto e poi asciugare con un panno assorbente pulito.
  - Si noti che la pulizia a vapore disinfetta, ma mentre l'applicazione di calore disinfetta, può anche causare la permanenza di eventuali macchie sul vinile.
  - Non applicare detergenti a base di solventi o altri prodotti chimici sul tessuto.
  - Non pulire, asciugare a tamburo o immergere completamente il tessuto in acqua.
-





James Leckey Design  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland  
+44 28 9267 8879  
hello@fireflyfriends.com  
www.fireflyfriends.com



Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 - Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
tel. +39 0523 573111  
fax +39 0523 570060  
info@sunrisemedical.it  
www.SunriseMedical.it

