

firefly WeGo



Manuale d'Uso WeGo
Passeggino chiudibile



PRODOTTO DA
IBELIEVE SPORTS LTD PER
JAMES LECKEY DESIGN LTD

TEL: +44 (0)28 9260 0750
MODELLO: PASSEGGINO WEGO

ATTUAZIONE
DELLE NORME: ISO 7176

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE REGIS-
TRATA ED INDIRIZZO**
JAMES LECKEY DESIGN LIMITED

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN
BT28 2SA, UNITED KINGDOM

TEL: +44 (0)28 9260 0750
MODELLO: PASSEGGINO WEGO

MESE E ANNO
DI PRODUZIONE: 2018/11

ATTUAZIONE
DELLE NORME: ISO 7176



ATTENZIONE:

Per evitare infortuni
derivanti da cadute
o da scivolamento

utilizzare sempre la cintura
della seduta. Non lasciare
mai il bambino incustodito.

Importante: Conservare questo
manuale per consultazioni
future. La sicurezza del
bambino è sotto la vostra
responsabilità. Questo
passeggino è adatto per il
trasporto di un bambino.

Attenzione: La seduta del
passeggino non è adatta a
bambini di età inferiore a
6 mesi.

**NORMA DI PROVA BS 1021-
PARTE 1: 2014 SORGENTE DI
ACCENSIONE SIGARETTA IN
COMBUSTIONE LENTA**



**ATTENZIONE LA
DISATTENZIONE E'
CAUSA DI INCENDI**

- **IMPORTANTE:**
Conservare questo manuale per consultazioni future.
- **ATTENZIONE:**
Non lasciare mai il bambino incustodito
- **ATTENZIONE:**
Controllare che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti prima dell'utilizzo.
- **ATTENZIONE:**
Per evitare infortuni assicurarsi che il bambino si trovi ad una distanza di sicurezza quando il prodotto viene aperto o chiuso.
- **ATTENZIONE:**
Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto
- **ATTENZIONE:**
La seduta del passeggino non è adatta a bambini di età inferiore ai 6 mesi.
- **ATTENZIONE:**
Utilizzare sempre il sistema di ritenuta
- **ATTENZIONE:**
Controllare che i dispositivi di attacco del corpo del passeggino o dell'unità di seduta o del sedile della macchina siano agganciati correttamente prima dell'uso
- **ATTENZIONE:**
Questo prodotto non è adatto per la corsa o per il pattinaggio
- **ATTENZIONE:**
Realizzato per bambini di età superiore a 2 anni con un peso massimo di 30kg
- **ATTENZIONE:**
Questo passeggino è stato concepito come dispositivo medico e non può essere utilizzato in un veicolo.
- **ATTENZIONE:**
Non utilizzare mai il passeggino con più di un bambino
- **ATTENZIONE:**
Mantenere lontano dalle fonti di calore

Questo prodotto è adatto per bambini che non sono in grado di stare seduti da soli, che non possono girarsi e che non possono sollevarsi facendo leva su mani e ginocchia. Peso massimo del bambino consentito: 30kg

WeGo di Firefly è un passeggino leggero totalmente ripieghevole ideale per viaggiare e per le attività quotidiane.

CONTENUTI

01 Destinazione d'Uso	p.71
02 Dichiarazione di Conformità	p.71
03 Termini di Garanzia	p.72
04 Informazioni sulla Sicurezza	p.72
05 Pulizia e Manutenzione	p.74
06 Assistenza del Prodotto	p.74
07 Linee Guida Importanti	p.75
08 Ispezione del Prodotto	p.76
09 Reimmissione dei Prodotti Firefly	p.76
10 Posizionare WeGo	p.77
11 Regolare WeGo	p.83
12 Utilizzare GoTo Seat con WeGo	p.85
13 Regolare L'imbacatura Wego	p.88
14 Dimensioni WeGo	p.89

SEZIONE 01: DESTINAZIONE D'USO

Il passeggino WeGo è stato disegnato per fornire un supporto supplementare alla parte superiore del corpo. L'utilizzo è destinato a bambini con un peso massimo di 30Kg.

WeGo è stato disegnato per un utilizzo occasionale e non come sostituto di sistemi di seduta primari o sedie a rotelle.

WeGo è compatibile con GoTo Seat nella misura 1 e 2. Disponibile in tessuto ed in Vinile.

Per ulteriori informazioni sulle misure di GoTo consultare il sito www.fireflyfriends.com/uk/our-products/goto-seat



Attenzione – il bambino deve essere assicurato tramite l'imbragatura a 5 punti durante tutto il tempo di utilizzo del dispositivo e non deve essere mai lasciato incustodito mentre è alloggiato nel passeggino.

Attenzione – quando WeGo è fermo raccomandiamo di bloccare i freni per prevenire eventuali movimenti.

SEZIONE 02: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il produttore, James Leckey Design Ltd., dichiara, sotto la propria e unica responsabilità per il brand Firefly, che wego è conforme ai requisiti della direttiva medica sui dispositivi medici 93/42/eec. Wego è un prodotto certificato ce contrassegnato come dispositivo medico di Classe 1.

SEZIONE 03: TERMINI DI GARANZIA

La garanzia di WeGo si applica solo se il prodotto viene utilizzato in conformità all'uso previsto e seguendo le indicazioni del produttore. Un anno di garanzia è previsto per questo prodotto James Leckey Design Ltd.

I prodotti posso esserci restituiti in garanzia, per riparazione o sostituzione fino a ventiquattro mesi dalla data d'acquisto indicata sullo scontrino. Contattare il Servizio Clienti al numero +39 0523 573111 o scrivendo a info#sunrisemedical.it. Sunrise Medical organizzerà a proprie spese la restituzione degli articoli non idonei, che saranno riparati o sostituiti non appena ricevuti e verranno rimandati al cliente. In tutti i casi, è responsabilità del cliente assicurarsi che la merce da restituire venga opportunamente imballata, preferibilmente nella sua confezione originale. Una volta ricevuti, i prodotti verranno riparati o sostituiti e restituiti al mittente.

SEZIONE 04: INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Assicurarci sempre che WeGo sia messo in sicurezza prima di posizionare il bambino al suo interno.
3. I bambini non devono mai essere lasciati incustoditi/senza supervisione mentre utilizzano il prodotto.
4. Il peso massimo dell'utente per WeGo è di 30Kg (66lbs). Tale peso non deve mai essere superato.
5. Non modificare WeGo o utilizzare componenti che non siano approvati da Firefly perché ciò potrebbe mettere a rischio la salute del vostro bambino ed invalidare la garanzia.
6. WeGo non è stato sottoposto al crash test e ciò non permette di utilizzarlo per il trasporto su motoveicoli.
7. Questo passeggino è stato disegnato per il trasporto di un bambino. Non trasportare oggetti o più di un bambino come consigliato in questo manuale. La mancata osservanza di quanto riportato in questo manuale potrebbe danneggiare il passeggino o renderlo instabile.

8. Un sovraccarico o una scorretta chiusura potrebbero danneggiare il passeggino.
9. Se si sta utilizzando GoTo Seat con WeGo assicurarsi sempre che sia assicurato al passeggino dalle tre cinghie nere. Consultare la sezione 17 per ulteriori informazioni.
10. Prestare maggiore attenzione nell'utilizzo del passeggino quando il bambino è completamente reclinato perché ciò potrebbe aumentare il rischio di ribaltamento.
11. Sollevare sempre le ruote frontali in prossimità di bordi di marciapiedi o di scalini spingendo verso il basso il maniglione.
12. Tenere WeGo lontano da fonti dirette di calore incluse fiamme libere, sigarette, stufe elettriche e a gas.
13. Questo passeggino non è adatto per la corsa ed il pattinaggio.
14. Non permettere ai bambini di ripiegare, assemblare o smontare questo passeggino.
15. Non permettere che il passeggino venga utilizzato come un giocattolo o che i bambini lo utilizzino per fare a gara con altri.
16. Qualora ci fossero dubbi sulla persistenza dell'uso in sicurezza di questo passeggino, si prega di interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare il Servizio Clienti al numero +39 0523 573111 o scrivere a info@sunrisemedical.it.



Attenzione: La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe mettere a rischio la salute del bambino.

Attenzione: Tenere gli involucri in blastica lontano dalla portata dei bambini per evitare episodi di soffocamento

SEZIONE 05: PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Il passeggino può essere lavato con acqua calda (300) ed un detergente delicato.
2. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice con acqua fredda ed un detergente delicato. Non asciugare con l'asciugatrice.
3. Lasciare asciugare il prodotto completamente prima di riposizionarlo e conservarlo.
4. Pulire la struttura con un panno umido ed un detergente delicato.
5. Non utilizzare detergenti abrasivi sul passeggino.

Suggerimento:

Uno dei migliori detergenti a base di acqua per tappezzeria può essere fatto in casa. Versare una tazza di acqua tiepida (non calda) in una ciotola ed aggiungere $\frac{1}{4}$ di tazza di detersivo per i piatti biodegradabile. Mescolare aiutandosi con uno sbattitore elettrico selezionando la media velocità fino a quando il composto liquido non diventa schiumoso. Con questa schiuma è possibile rimuovere lo sporco e la maggior parte di macchie di cibo o bevande. Si tratta di un detergente semplice da realizzare, economico, non tossico ed eco-compatibile.

SEZIONE 06: ASSISTENZA DEL PRODOTTO

Per eventuali domande visitare il sito www.SunriseMedical.it o contattare il Servizio Clienti al numero +39 0523 573111 o scrivendo a info@sunrisemedical.it

SEZIONE 07: LINEE GUIDA IMPORTANTI

1. Prestare attenzione a non ferirsi le dita quando si apre e si richiude la struttura.
2. Prima di posizionare il bambino nel WeGo assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.
3. Assicurare il bambino nell'imbracatura immediatamente dopo averlo posizionato nel passeggino.
4. La lunghezza della cintura inguinale può essere regolata mediante i raccordi di regolazione situati sotto l'imbottitura. Nel GoTo nella Misura 2 la posizione della cintura inguinale può essere spostata verso l'esterno per creare più spazio man mano che il bambino cresce.

Posizionare il bambino nel GoTo Seat

1. Il GoTo Seat deve essere agganciato in sicurezza per le sue finalità d'uso prima di posizionarvi il bambino.
2. Assicurarsi che le cinghie per l'imbracatura non interferiscano con il posizionamento del bambino nel GoTo Seat. Le cinghie per le spalle e le cinghie del supporto laterale devono essere allentate.
3. Agganciare la fibbia centrale e regolare le cinghie del supporto laterale per assicurarsi che il bambino sia posizionato in sicurezza nell'imbracatura della seduta. La lunghezza delle cinghie delle spalle devono essere regolate per aderire al bambino in sicurezza.
4. Una volta messe in sicurezza le gambe, far passare con delicatezza le braccia del bambino attraverso le cinghie per le spalle – le cinghie per le spalle devono essere ben allentate. Assicurarsi che le imbottiture delle cinghie per le spalle siano posizionate sulle spalle del bambino

Rimuovere il bambino dal GoTo Seat

1. Allentare le cinghie delle spalle e le cinghie dei supporti laterali.
2. Sganciare la fibbia centrale mediante il bottone situato sull'imbracatura.
3. Far scivolare le cinghie delle spalle dalle spalle del bambino e rimuovere gentilmente le braccia dall'imbracatura.
4. Una volta messe in sicurezza le gambe, far passare con delicatezza le braccia del bambino attraverso le cinghie per le spalle – le cinghie per le spalle devono essere ben allentate. Assicurarsi che le imbottiture delle cinghie per le spalle siano posizionate sulle spalle del bambino

SEZIONE 08: ISPEZIONE DEL PRODOTTO

Raccomandiamo di effettuare una serie di controlli su tutta l'attrezzatura prima di ogni utilizzo per assicurarsi che il prodotto sia sicuro.

1. Controllare che le imbottiture non siano usurate o danneggiate.
2. Controllare che tutte le fibbie siano funzionanti.
3. Controllare che tutti gli elementi pieghevoli siano sicuri e che funzionino correttamente prima di ogni utilizzo.
4. Assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti prima dell'uso.
5. Controllare che tutti i freni funzionino correttamente.
6. Non utilizzare il passeggino se alcune sue parti risultano danneggiate o mancanti.


SEZIONE 09: REIMMISSIONE DEI PRODOTTI FIREFLY

Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito secondo quanto riportato nella Sezione 5 di questo manuale per assicurare un controllo delle infezioni.

Assicurarsi che una copia del Manuale d'uso sia fornita insieme al prodotto. In caso di dubbi relativi alla persistenza dell'uso sicuro Del vostro prodotto firefly by leckey o nel caso in cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare il Servizio Clienti al numero +39 0523 573111 o scrivere a info@sunrisemedical.it.


SEZIONE 10: POSIZIONARE WEGO

1. Aprire la struttura del WeGo spingendo il manubrio verso l'alto e posizionando il piede sul tubo dell'asse posteriore come indicato. **A**
2. Sollevare il manubrio **B** fino ad udire un click sonoro, ciò indicherà che la struttura è aperta e bloccata. **C**
3. Controllare che i blocchi di sicurezza siano inseriti.
4. Per comprimere tirare le leve di blocco su entrambi i lati verso l'alto. **D**

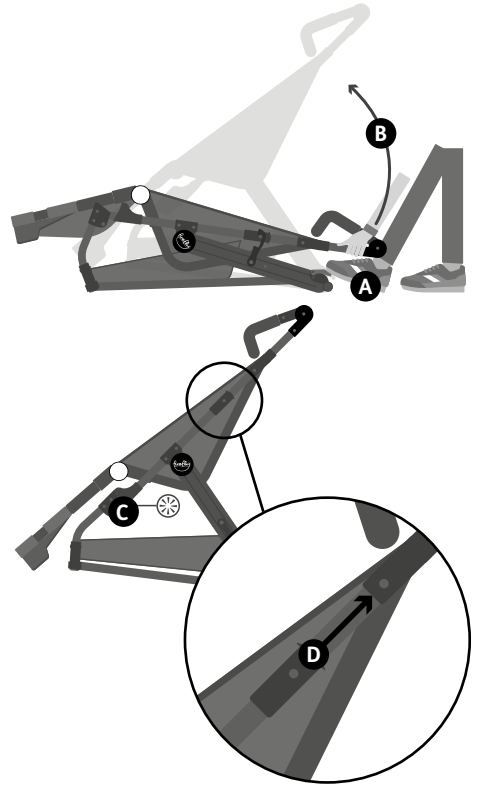

10.1 – ASSEMBLAGGIO RUOTA POSTERIORE

1. Sollevare il tubo dell'asse posteriore ed inserire la ruota nell'asse e fino ad udire un click, ciò indicherà che la ruota è bloccata in posizione. Ripetere l'operazione con la seconda ruota.
2. Assicurarsi che le ruote siano correttamente installate prima di utilizzare WeGo. Per ispezionare, tirare le ruote per assicurarsi che siano correttamente in posizione.

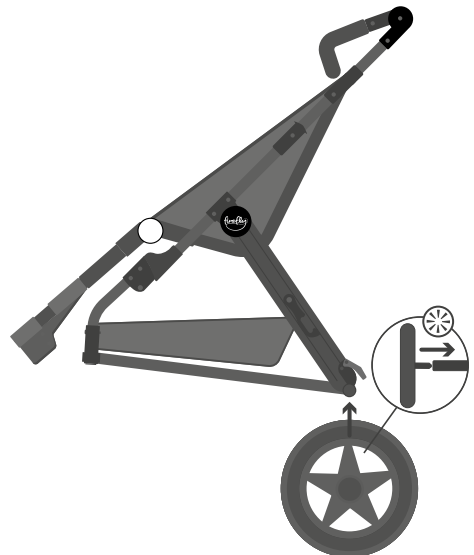


10.2 – ASSEMBLAGGIO RUOTA FRONTALE

1. Sollevare il tubo dell'asse frontale del passeggino ed inserire la ruota frontale nell'asse fino ad udire un click, ciò indicherà che la ruota è bloccata in posizione. Ripetere l'operazione per la seconda ruota. **A**
2. Assicurarsi che le ruote siano correttamente installate prima di utilizzare WeGo. Per ispezionare, tirare le ruote per assicurarsi che siano correttamente in posizione.




3. Per bloccare in posizione le ruote frontali, allinearle in posizione diritta rivolte verso avanti e spingere verso il basso il blocco della ruota frontale. **A**
4. Per sbloccare le ruote frontali spingere il blocco della ruota verso l'alto.

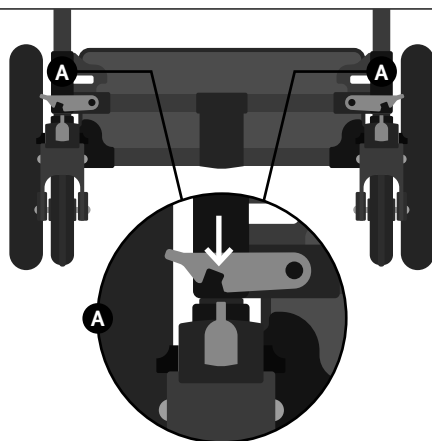

10.3 – UTILIZZARE IL FRENO

1. Per attivare il freno premere il piede verso il basso sulla barra rossa del freno fino a bloccare le ruote.
2. Per rilasciare il freno riportare la barra rossa del freno nella sua posizione originale.

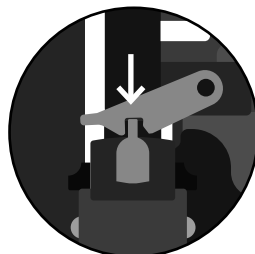

10.4 – REGOLARE IL MANUBRIO

1. Per regolare il manubrio premere i bottoni neri situati all'interno del manubrio e posizionare il manubrio nella posizione desiderata. **A**




SEZIONE 10.5 – POSIZIONARE LA CAPPOTTA DEL PASSEGGINO

1. Attaccare il perno in plastica al passeggino facendolo scivolare nell'attacco mostrato. **A**





2. Inserire le astine in plastica attraverso il materiale della cappotta come mostrato nell'immagine.

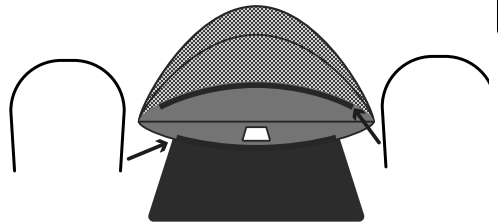

Continua →


3. Inserire le astine nei perni in plastica su entrambi i lati del passeggino e premere verso il basso. **B**
4. Avvolgere l'elastico nero intorno ai ganci sul retro della struttura del passeggino.
5. Collegare il Velcro alla cappotta per metterla in sicurezza. **C**

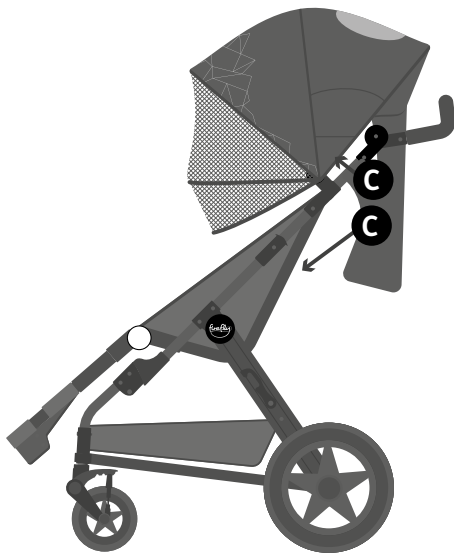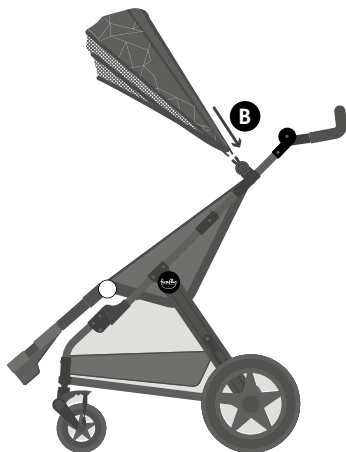

SECTION 10.6 – POSIZIONARE L'IMPERMEABILE

1. Iniziare con il poggiatesta, tirare l'impermeabile sul passeggino verso l'alto fino alla cappotta e poi verso il basso sulla parte posteriore di WeGo.
2. Tirare le alette lateralmente verso il basso ed assicurarle alla struttura. **A**
3. Avvolgere l'elastico nero intorno ai ganci sul retro della struttura del passeggino. **B**

Suggerimento – Spingere in avanti lo schienale per metterlo in posizione verticale e stringere il più possibile prima di posizionare la cappotta

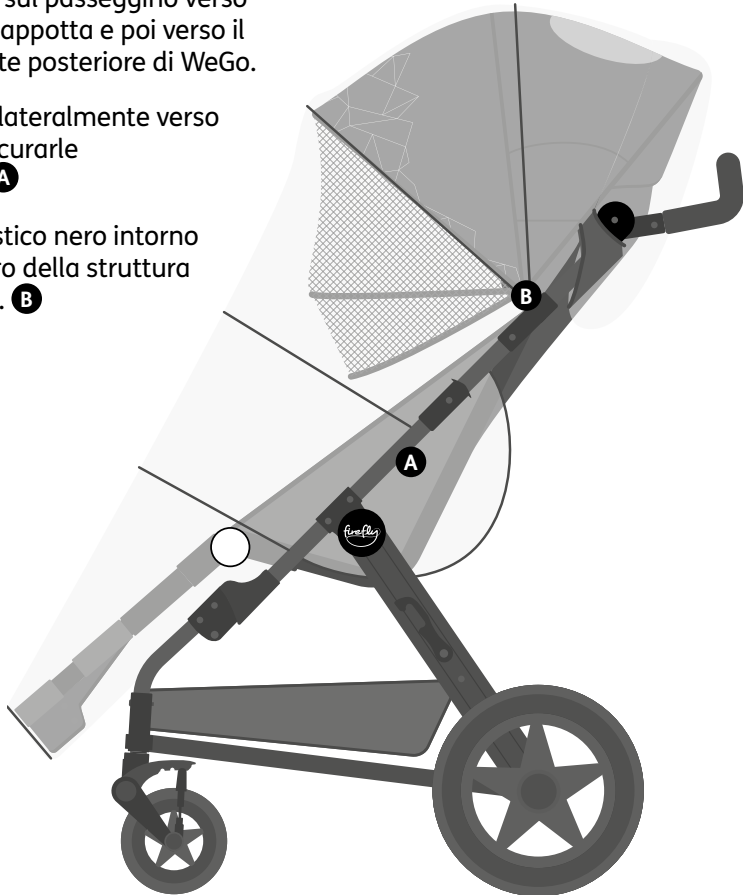


SEZIONE 10.7 – POSIZIONARE IL COPRI GAMBE

1. Tirare il copri gambe sul poggiatesta ed inserire l'olivetta nelle asole situate su entrambi i lati del passeggino. **A**



I bambini non devono mai essere lasciati incustoditi/ senza supervisione mentre utilizzano il prodotto

Tenere tutte le parti del copri gambe lontano dalla portata del bambino.

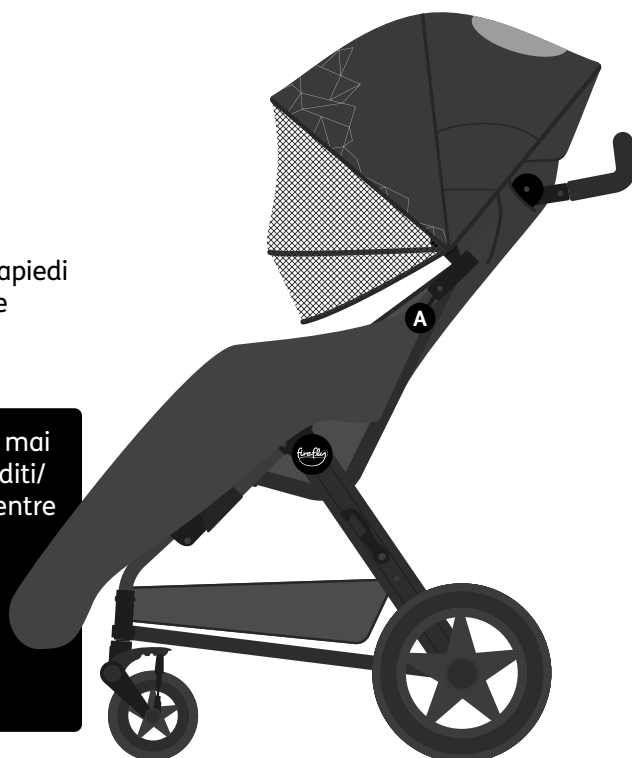

SEZIONE 10.8 POSIZIONARE LA ZANZARIERA


1. Posizionare la zanzariera sul passeggino e fissarla utilizzando le olivette – inserire le olivette nelle asole situate su entrambi i lati del passeggino.



Attenzione: Utilizzare solo bevande fredde nel porta bicchieri

SEZIONE 10.9 – POSIZIONARE IL PORTA BICCHIERI



1. Inserire il porta bicchieri nel perno posizionato sul lato destro della struttura del passeggino.

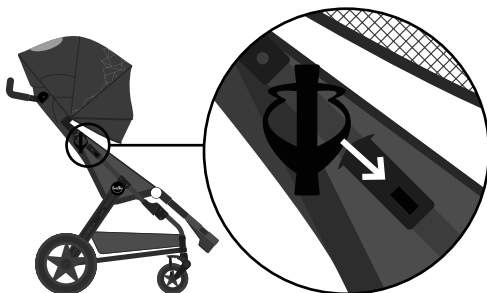

SEZIONE 11: REGOLARE WEGO

11.1 – REGOLARE LO SCHIENALE

1. Per regolare lo schienale all'indietro, tirare la leva in plastica grigia verso di sé per ottenere l'angolazione desiderata. **A**
2. Per regolare lo schienale in posizione verticale tirare i D-ring per ottenere l'angolazione desiderata. **B**
3. Per mettere la seduta in una posizione totalmente verticale spingere lo schienale oltre la struttura e stringere tirando il D-ring in plastica.

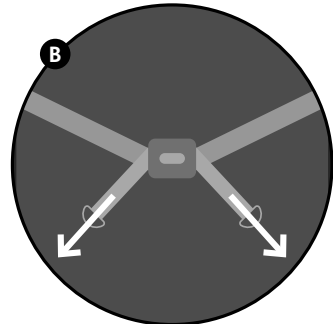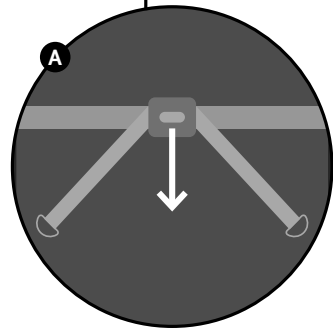

Seduta reclinata **100°** Reclinazione totale **140°**

Angolo seduta **15°**





Attenzione – non regolare mai WeGo se il bambino è alloggiato al suo interno


11.2 – REGOLARE IL POGGIPIEDI

1. Per posizionare il poggiatesta nella posizione più corta premere fino a raggiungere l'altezza desiderata e bloccare i bottoni automatici posizionati in alto su ciascun lato della struttura. Controllare che siano ben bloccati.

posizione più lunga sbloccare i bottoni automatici e tirare verso il basso fin quando il perno di blocco non produce un click sonoro. Bloccare i bottoni automatici posizionati in basso su ciascun lato.

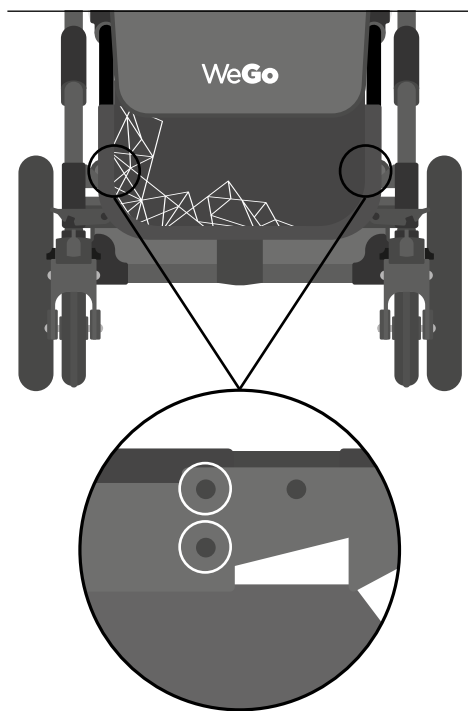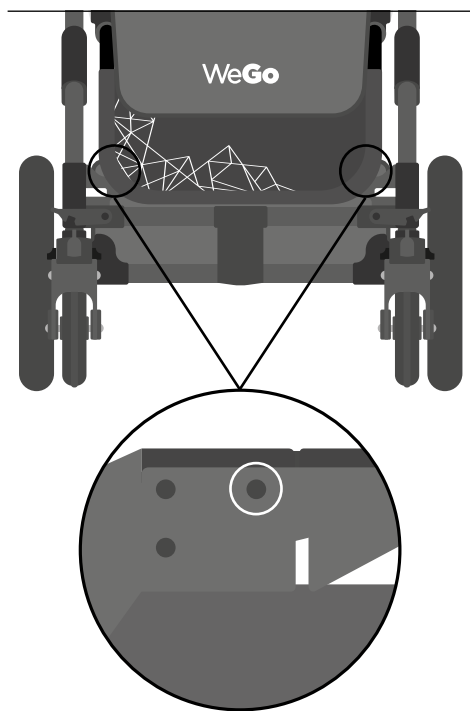


3. Il poggiatesta può essere posizionato in diverse angolazioni premendo il bottone bianco posizionato lateralmente sul perno del poggiatesta.


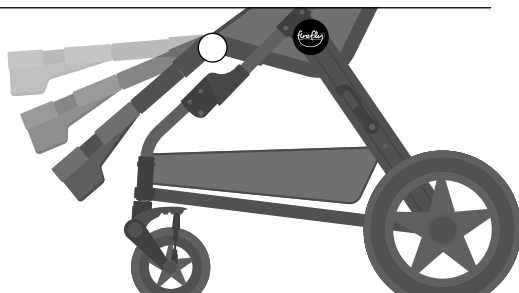


SEZIONE 12: UTILIZZARE GOTO SEAT CON WEGO


1. Assicurarsi che tutte le cinghie del GoTo Seat siano allentate e non agganciate tra loro. Posizionare GoTo Seat nel passeggino.

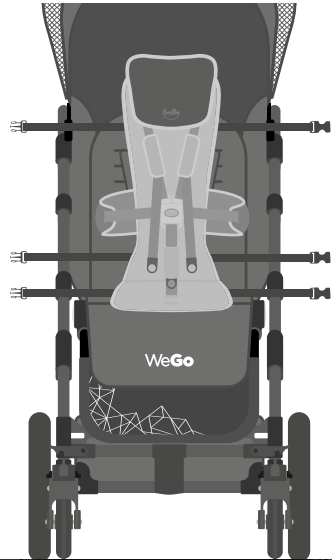

2. Far passare le cinghie attraverso le slot come mostrato dall'immagine ed allacciare su ogni lato.

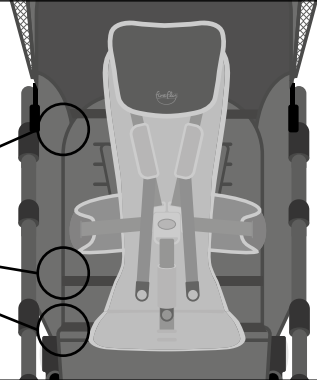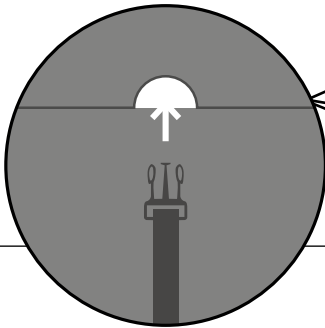

3. Tirare le cinghie verso l'esterno per stringere. **A**
4. Sistemare le cinghie in eccesso nelle asole e bloccarle nei morsetti. **B**
5. Assicurarsi che tutte le cinghie nere siano allacciate in sicurezza intorno al passeggino e che la fibbia a 5 punti situata sulla parte frontale sia sganciata prima di posizionare il bambino nel GoTo Seat.

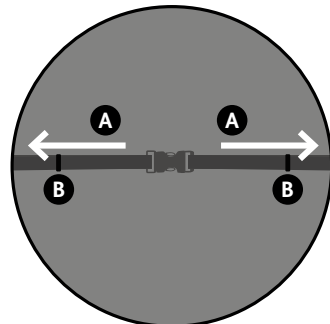


Continua →

SEZIONE 12.1: APRIRE E CHIUDERE LA FIBBIA A 5 PUNTI


Prima di iniziare, assicurarsi che le cinghie delle spalle, dei supporti laterali ed inguinali siano allentate e sganciate.

Attaccare i due supporti laterali ai lati della fibbia. **A**

Una volta allacciati, regolare le cinghie delle spalle, le cinghie dei supporti laterali e le cinghie inguinali tirandole per stringere. **B**

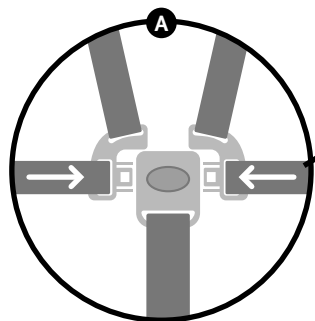

Controllare che le cinghie non siano attorcigliate quando la fibbia è allacciata.

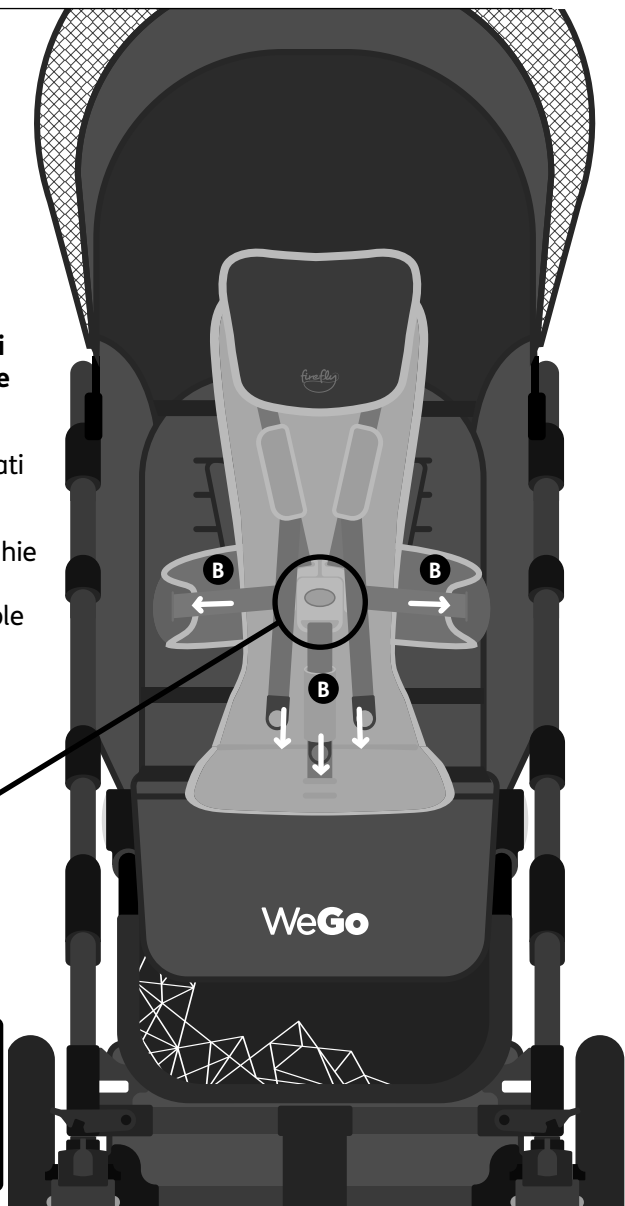

Nella Misura 2 di GoTo la base delle cinghie inguinali può essere spostata in avanti o indietro per soddisfare le esigenze del bambino. Assicurarsi che sia ben salda alla base in plastica di GoTo. **C**

C

Bambino più Piccolo


Bambino più Grande

SEZIONE 12.2: REGOLARE APPOGGIATESTA E SUPPORTI LATERALI

Svitare la manopola posizionata sull'appoggiatesta in senso antiorario per rimuovere l'appoggiatesta dalla base del GoTo Seat. Muovere l'appoggiatesta in alto o in basso per ottenere la posizione desiderata. **A**

Una volta raggiunta l'altezza desiderata, avvitare la manopola in senso orario. **B**

Rimuovere i supporti laterali svitando la manopola in senso antiorario. Muovere il supporti laterali verso l'alto o verso il basso per raggiungere la posizione desiderata. Una volta regolati i laterali all'altezza desiderata riavvitare la manopola in senso orario. **C**



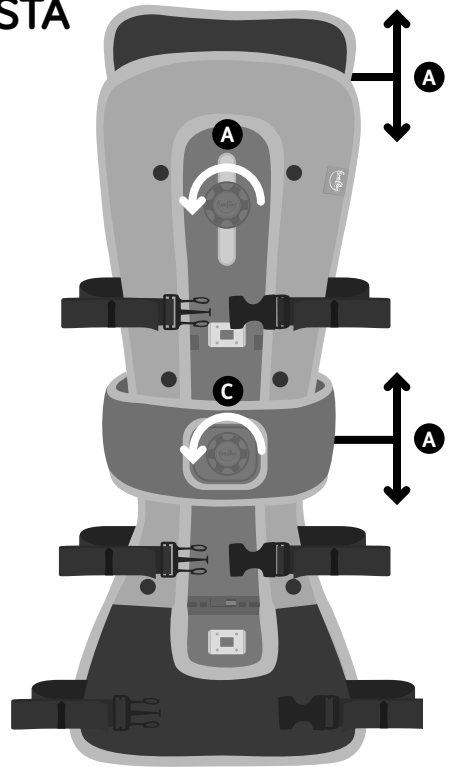


SEZIONE 13: REGOLARE L'IMBACATURA WEGO

Per regolare le cinghie delle spalle del WeGo, estrarre la fibbia dalla slot situata nella parte posteriore dello schienale. **A**

Inserire la fibbia nella slot corrispondente all'altezza desiderata. **B**


È possibile stringere o allentare le cinghie regolando le fibbie sulle cinghie.

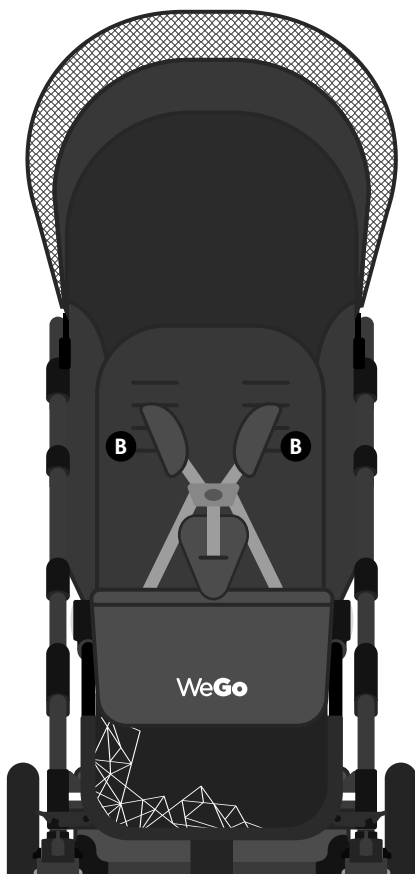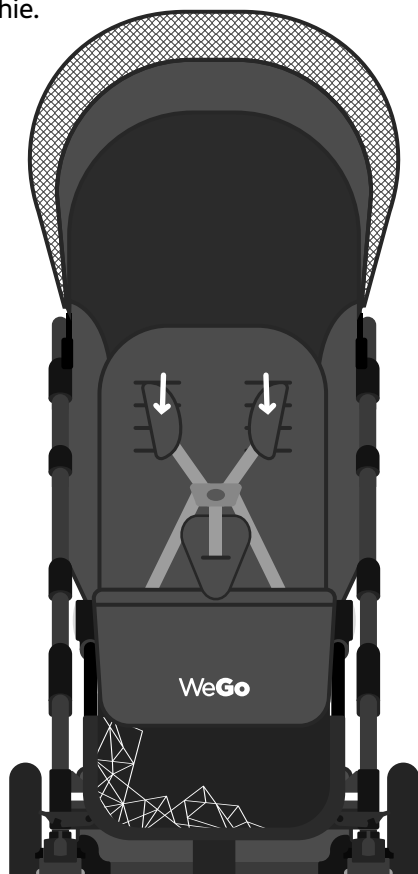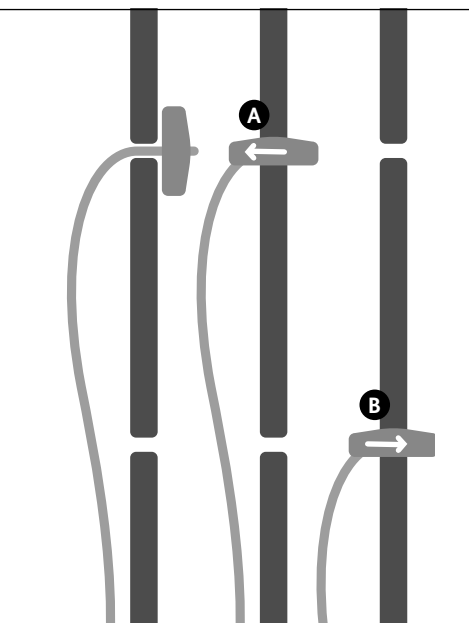

SEZIONE 14: DIMENSIONI WEGO

Lunghezza poggiapiedi (Allungato)	116cm
Altezza poggiapiedi (Allungato)	38cm
Altezza WeGo	122cm
Profondità Seduta	26cm
Altezza Seduta	50cm
Larghezza Seduta	35cm
Poggiapiedi lunghezza più corta	25cm
La lunghezza più lunga del poggiapiedi	33cm
Peso WeGo	11kg
Peso WeGo con GoTo	13kg

Nota Bene - Non tutti i bambini che utilizzano GoTo Seat nella Misura 2 possono utilizzare il passeggino WeGo. Consultare la nostra guida alle misure.

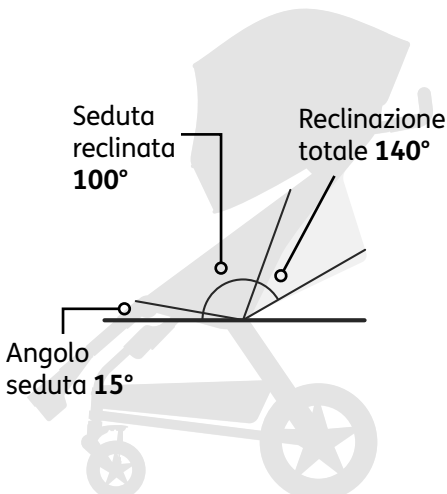



James Leckey Design
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
+44 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com
www.fireflyfriends.com



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Italia
tel. +39 0523 573111
fax +39 0523 570060
info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

