

# Q100<sup>®</sup>/Q200<sup>®</sup>

Kompakt elrullstol för vardagsbruk



Q Series  
Powerchairs

Created individually for whatever your clinical and lifestyle needs are.



Q100 R



Q200 R



**DEN KOMPAKTA  
ELRULLSTOLEN FÖR  
VARDAGSBRUK**

## SAMMANFATTNING

# NYCKELFUNKTIONER

## Q100 R/Q200 R

SMART DESIGN som utmanar andra elrullstolar för inomhus/utomhus bruk, QUICKIE Q100 R® och Q200 R® är ultrakompakta och smidiga för att använda inomhus samtidigt som de har prestanda för utomhus bruk. Smart design och smart utseende blir tillsammans den perfekta vardagsrullstolen.

**Ultrakompakt för vardagsbruk**



### Smart base technology

Den innovativa testmetoden som använts för att förstå och illustrera hur mindre förändringar i chassit påverkar prestandan och tack vare det har vi skapat ett i minsta detalj uppmätt chassi som passar för både inomhus- och utomhusbruk.

### Kompakt och smidig inomhus

Mycket kompakt med en bredd från 540 mm och en vändcirkel från 1600 mm. Enkla, intuitiva kontroller gör elrullstolen lätt att hantera.

### Prestanda utomhus

Noggrant beräknade dimensioner ger det allra bästa väggreppet samt stabilitet för utomhus bruk. Starka batterier på 55 Ah tar dig på utflykter på upp till 31 km.

### Transport

Kompatibel med DAHL dockingsystem kan du använda denna elrullstol som säte i din bil. Den är självklart krocktestad och har en låg vikt på 94/98 kg.

### Snygg & praktisk

En strömlinjeformad, minimalistisk design med snygg, svart kaross. Skapa en personlig stil genom att välja ett av färginläggen.

### Tilt-in-space

Q200 R finns nu med Tilt. Med det smalaste tillgängliga chassit (580 mm), en tyngdpunkt på 70 mm (3") och 22° tilt-in-space, blir Q200 R den minsta bakhjulsdrivna tilt-in-space elrullstolen på marknaden.



# ALLA ELRULLSTOLAR FÖR BÅDE INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK HAR SAMMA UTMANINGAR. VI LÖSTE DET TACK VARE SMART BASE TECHNOLOGY.



Vår vision med Q100/Q200 var att skapa en ultimat elrullstol för inomhus/utomhus bruk som är supersmidig att manövrera inomhus samtidigt som det inte kompromissas med stabilitet och prestanda utomhus. Men hur designar man en sådan välbalanserad elrullstol?

Ett stort chassi innebär svårigheter vid manövrering i trånga miljöer. Är chassit för litet är det risk för tippning och man förlorar väggrepp. För att hitta den perfekta kombinationen måste man prova 100 olika konfigurationer. Så det var precis det vi gjorde - med SMART BASE TECHNOLOGY.

Ett SMART-testchassi möjliggjorde snabba justeringar av bredd, längd, länkhjulets och drivhjulets höjd samt sätets position. Vi utförde noggranna justeringar tills vi kom fram till den ideala kombinationen för en perfekt elrullstol som passar för både inomhus- och utomhus bruk.

Resultatet blev QUICKIE Q100 R och Q200 R. En mycket kompakt startrullstol som ger det allra bästa väggreppet, stabilitet och som till och med har förmågan förmågan att ta sig över kanter på upp till 100 mm.

KOMPAKT FÖR INOMHUSBRUK

# SMIDIG I MINDRE UTRYMMEN

Oavsett om du befinner dig hemma, i ett shoppingcenter eller på ditt lokala café passar din Q100 R/Q200 in. Med sitt slimmade chassi och liten vändradie är den smidig i små utrymmen.



Q100 R: **540 mm**

Q200 R: **580 mm**

Med Q100 R (1010 mm) och Q200 R (1070 mm) kommer du smidigt in i och ut ur hissar och andra små utrymmen utan att behöva kompromissa med elrullstolens stabilitet.

## Lättare att ta sig fram

Har du tröttnat på att skrapa sidan på din rullstol när du försöker ta dig igenom en smal dörröppning? Med det smala chassit som Q100 R/Q200 R har blir det lättare att ta sig fram mellan café-bord och i smala korridorer (särskilt med Q100 R som enbart är 540 mm bred).

Med Q100 R/Q200 R behöver du inte utföra komplicerade manövrar för att ta dig runt i små utrymmen såsom smala korridorer, kök eller andra begränsade utrymmen. Detta tack vare det kompakta vändutrymmet.




Q100 R: 1600 mm  
Q200 R: 1700 mm



## Kompakt, praktisk och enkel att köra

De bakhjulsdrivna Q100 R/Q200 R är mycket intuitiva att köra. Styrsystemet är lättförståeligt och det kommer att bli enkelt att manövrera elrullstolen redan från början och även i trånga utrymmen.

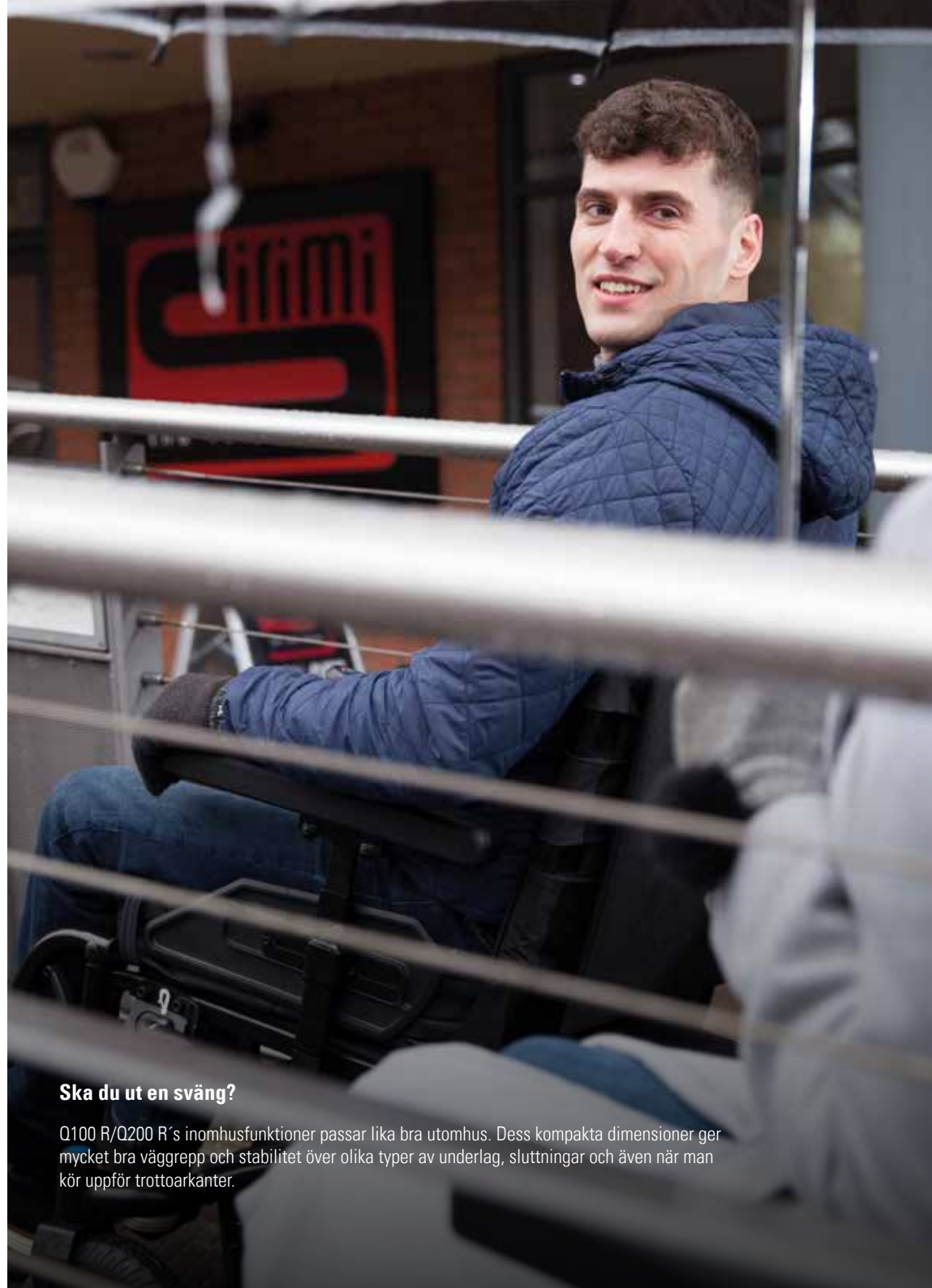

### **Ska du ut en sväng?**

Q100 R/Q200 R's inomhusfunktioner passar lika bra utomhus. Dess kompakta dimensioner ger mycket bra väggrepp och stabilitet över olika typer av underlag, sluttningar och även när man kör uppför trottoarkanter.

UTOMHUSPRESTANDA

# DEN LILLA ELRULLSTOLEN SOM PASSAR BRA UTOMHUS

---

## Enkelt i uppförsbackar

Traditionellt klarar sig elrullstolar för både inomhus- och utomhusbruk inte så bra i brantare lutningar – ett problem vi löste med SMART BASE TECHNOLOGY. Via precisionstestning kom vi fram till att en längd på 1010 mm (Q100 R) och 1070 mm (Q200 R) ger bästa stabilitet för att förhindra tippning och hålla dig säker – även i lutningar på upp till 8° (Q200 R).



## Klarar det mesta

SMART BASE TECHNOLOGIN hjälpte inte bara till att beräkna dimensionerna för chassit, utan även den idealiska sittpositionen för att MAXIMERA VÄGGREPPET mellan drivhjulet och marken. Kombinerat med fjädringen på Q100 R/Q200 R kommer du att njuta av en säker, smidig och lyhörd körning som normalt bara förväntas av en större elrullstol.



# KRAFTEN ATT TA DIG DIT DU VILL

Tack vare kraftiga 55 Ah-batterier är det inga problem att ta en längre runda på stan med din Q100 R/ Q200 R. Med möjligheten att ta dig 31 km på en enda laddning har du gott om tid att shoppa eller göra något annat på vägen.

### Låt inte trottoarkanterna hindra dig

Känner du dig osäker när du ska ta dig över kanter och hinder? Q100 R/ Q200 R' s kantklättrare kan ta itu med kantstenar på upp till 100 mm vid låg hastighet och till och med från en stillastående start (så att din sittposition bibehålls medan du växlar uppför trottoarkanten).

### Diskret placering

Kantklättraren är diskret placerad bakom fotstödet och tar inte upp onödig plats i ditt fotutrymme som det ofta gör på andra modeller, detta är annars ett vanligt problem när du tar dig in i och ut ur din elrullstol.





HOME

TRAIN

CAFE

LIBRARY

RESTAURANT

TRAM

SHOPPING

COFFEE

HOME

# PRAKTISK PÅ RESAN

Tack vare att den intuitiva Q100 R/Q200 R är så kompakt och lättmanövrerad är den smidig i kollektivtrafik. Föredrar du att resa med bil? Q100 R/Q200 R kan förvaras i bagageutrymmet eller användas som säte under resa.



## Smidig att lyfta

Q100 väger endast 94 kg och Q200 R väger 98 kg vilket innebär att de ganska enkelt kan lyftas in och ut ur ett fordon. Är du orolig för att du inte har tillräckligt med utrymme? Med en helt nedfällbar rygg och avtagbara benstöd och armstöd får elrullstolarna plats i de flesta bilar och kan dessutom ställas undan hemma.

## Bilanpassning (DAHL-kompatibel)

Elrullstolarna är förberedda och godkända för Dahl Dockningsstation och du kan tryggt och säkert köra din bil sittande i din bekväma Q100 R/Q200 R. Elrullstolarna är också krockstestade i enlighet med ISO 7176 och du kan dessutom transporteras medan du sitter i din elrullstol som är fastspänd i golvet via de fyra fästpunkterna.



SNYGG OCH PRAKTISK

# LUTA DIG TILLBAKA OCH SLAPPNA AV

Sätet på Q200 R har designats för att passa dig. Med ett flertal inställningsmöjligheter och en justerbar rygg för att möta olika positioneringsbehov kan du känna dig trygg med att om dina behov förändras så kan sätet också göra det.



- (1) Sittdjup 410-510 mm
- (2) Möjlig benstödsbredd: 380-490 mm
- (3) Ryggstödsvinkel 0°, 4°, 8° och 12°
- (4) Sittvinkel 0°, 3° och 6°



- (5) Sittbredd 420-540 mm, minskas till 380 mm med ett tillval
- (6) Sidoskydd 0-50 mm
- (7) Sitthöjd 450-490 mm
- (8) Armstödhöjd 230-305 mm



# VILKET CHASSI



## Q100 R

Ultrakompakt. Svårslagen manövrerbarhet inomhus.

Q100 R kan skryta med ett fotavtryck på endast 540 mm brett och 1010 mm långt, dessutom har den ett vändutrymme på endast 1600 mm. Tack vare detta är det enkelt att manövrera även i trånga utrymmen. Q100 ger en stabil upplevelse ute på vägar och stigar och är därför idealisk för dagsutflykter. Med sin låga vikt på 94 kg är den också hanterbar för att lyfta in och ut ur en bil.

12" Drivhjul  
8" Länkhjul



1010 mm

540 mm

# VÄLJER DU?



## Q200 R

Kompakt. Bättre prestanda för utomhus bruk.

Med en längd på 1070 mm, 580 mm bredd och större 14" drivhjul och 9" länkhjul ger Q200 R mer stabilitet och väggrepp än sin lillebror. De extra musklerna kommer att vara användbara när du åker över ojämn terräng och gör att du också kan ta dig över trottoarkanter på upp till 100 mm. Kombinerat med tilt-funktionen erbjuder Q200 R en av de mest kompakta rullstolarna med tilt-in-space.

14" Drivhjul  
9" Länkhjul



1070 mm

580 mm

DESIGN OCH UTSEENDE

# SMART DESIGN SMART KÄNSLA

Q100 R/Q200 R har ett sofistikerat utseende med mattsvart hölje. Snygg och smart design.

## Välj din personliga stil

Välj mellan 4 härliga färginlägg för en personlig stil.



# UNIK TEKNOLOGI

Vi fortsätter att utveckla vårt utbud av tillbehör och till Q100 R och Q200 R finns det mycket att välja mellan.



## Comfort ryggstöd

Den nya ryggdynan SEDEO LITE Comfort ger bättre posturalt stöd och bättre bekvämlighet.

## Enbart Q200 R



## Tilt-in-space

Q200 R finns nu med Tilt. Med det smalaste tillgängliga chassit (580 mm), en tyngdpunkt på 70 mm (3") och 22° tilt-in-space, blir Q200 R den minsta bakhjulsdrivna tilt-in-space elrullstolen på marknaden.



## 420 mm eller 480 mm frontram

Välj din sits baserat på din storlek med mått från 380 mm upp till 540 mm. Q100 R & Q200 R erbjuder en lösning för många olika behov.



## Centermonterat benstöd

Ny mindre centermonterad fotplatta som alternativ reducerar vändutrymmet med 100 mm, vilket gör den ännu mer intuitiv att använda inomhus utan att kompromissa med utomhusprestandan.



## Eldrivet bakåtlutande ryggstöd

Ett eldrivet bakåtlutande ryggstöd är idealiskt när du vill justera din position för avlastning och avslappning.



## Alternativ för lägre höjd

Alternativet med lägre sitthöjd på 420 mm gör det t.ex lättare att komma in under bord.



## Gyrok kontroll

Håll dig på banan med Gyro-Control. Systemet upptäcker och korrigerar automatiskt minsta avvikelse från din körriktning.



## 10 km/h

Prestanda för utomhus bruk.



## Ljus och blinkers

Nya tillval för ljus och blinkers.



## R-Net

Joysticken från R-net har en stor lättläst HD-skärm och smarta paddelomkopplare som ger en intuitiv drift.



## Ledsagarstyrning

Ledsagarstyrningen gör det enkelt för assistenten att köra och kontrollera stolen.



## Eldrivna eller manuellt höjbara benstöd

Välj från ett utbud av benstöd från 70° eller 80°.



## Sittplatta

Välj mellan vår Sling Seat för komfort eller den solida sittplattan för stabilitet.



## Sittdynor från JAY

Dynor och ryggar från JAY är designade för bäckenstabilitet, tryckavlastning och komfort. De är mycket anpassningsbara och kräver lite underhåll.



## Whitmyer huvudstöd

Huvudstöden från Whitmyer finns i många varianter för att tillgodose varje brukares individuella kliniska behov.

# Tekniska specifikationer / Q100 R - Q200 R

|                            | Q100 R                | Q200 R                |                                   | Q100 R                                                                                                                                                                                                                                                   | Q200 R                              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Max. brukarvikt</b>     | 125 kg                | 136 kg                | <b>Vändcirkel</b>                 | 1600 mm (1500 mm med center-monterat benstöd)                                                                                                                                                                                                            | 1700 mm                             |
| <b>Sittbredd</b>           | 380 - 540 mm          | 380 - 540 mm          | <b>Max. säker lutning</b>         | 6°                                                                                                                                                                                                                                                       | 8°                                  |
| <b>Sittdjup</b>            | 410 - 510 mm          | 410 - 510 mm          | <b>Max. kanklättring</b>          | 75 - 100 mm (med kanklättrare)                                                                                                                                                                                                                           | 75 - 100 mm (med kanklättrare)      |
| <b>Sitthöjd</b>            | från 450 mm           | från 450 mm           | <b>Hjul</b>                       | 12" drivhjul; 8" länkhjul                                                                                                                                                                                                                                | 14" drivhjul; 9" länkhjul           |
| <b>Ryggstödshöjd</b>       | 500 eller 570 mm      | 500 eller 570 mm      | <b>Färger</b>                     | 4 färginlägg: röd, blå, grön, svart                                                                                                                                                                                                                      | 4 färginlägg: röd, blå, grön, svart |
| <b>Ryggstödsinkel</b>      | 0° till 12° (manuell) | 0° till 12° (manuell) | <b>Max. räckvidd (ISO 7176-4)</b> | upp till 31 km                                                                                                                                                                                                                                           | upp till 31 km                      |
| <b>Total bredd</b>         | 540 mm                | 580 mm                | <b>Rullstolens vikt</b>           | från 94 kg (inkl. 55 Ah batterier)                                                                                                                                                                                                                       | från 98 kg (inkl. 55 Ah batterier)  |
| <b>Total längd</b>         | 1010 mm               | 1070 mm               | <b>Krocktestad</b>                | Ja - godkänd för framåtriktad transport i ett fordon (ISO 7176- 19). Fäste: 4 fästpunkter med 2 dubbla bälten bak och 2 enkla bälten fram. Inga förankrade bältesfästen tillåtna. Enkel åtkomst och manövrerbarhet i fordon beror på rullstolsstorleken. |                                     |
| <b>Total höjd hopfälld</b> | 640 mm                | 680 mm                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Fast tiltinkel</b>      | 0° - 6°               | 0° - 6°               | <b>Transport utan brukare</b>     | Fäst rullstolen säkert i fordonet (t. ex bil eller flygplan).                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Max. hastighet</b>      | 6 km/h                | 6 eller 10 km/h       | <b>Avsedd användning och milö</b> | För personer med begränsad rörlighet; som tar sig fram med egen armkraft eller med hjälp av en assistent. Både för inomhus och utomhus bruk. Rullstols-typ klass B.                                                                                      |                                     |
| <b>Batteri</b>             | 55 Ah                 | 55 Ah                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Elektronik</b>          | R-Net, VR2            | R-Net, VR2            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |



**Sunrise Medical AB**  
 Neogatan 5  
 431 53 Mölndal  
 Tel.: 031-748 37 00  
 post@sunrisemedical.se  
 www.SunriseMedical.se

För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.

