

Huvudstödsdyna på sittsystem SEDEO PRO, SEDEO LITE och SEDEO ERGO



Benämning		Artikelnummer
Huvudstödsdyna, liten	☐	22509013-001
Huvudstödsmontering, quick-release	☐	22509012
Stag för Sedeo Pro nackstöd	☐	21809210
Huvudstödsdyna Sedeo justerbar	☐	22509013-002
	☐	
	☐	



MONTERINGSANVISNING

Montering av huvudstödsdyna

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering av huvudstödsdyna.
- Åtdragningsmoment för bultar är 6Nm.

Verktyg som krävs

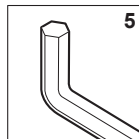


Fig. 1

Montera dynan (A) på det ställbara fästet


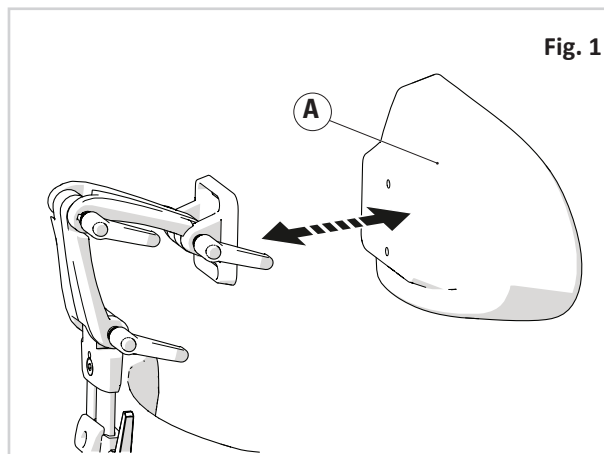


Fig. 2

Dra åt skruvar (B)

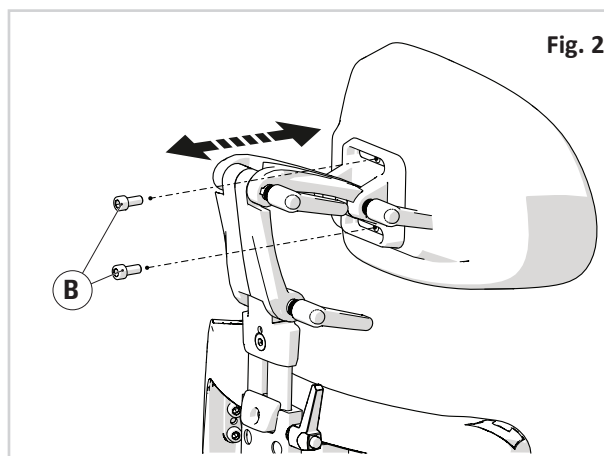

MONTERINGSANVISNING

Montering av huvudstöd i huvudstödsfästet

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Verktyg som krävs

N/A

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering av huvudstöd på ryggstödsramen.

Fig. 3

Montera med låsspak C

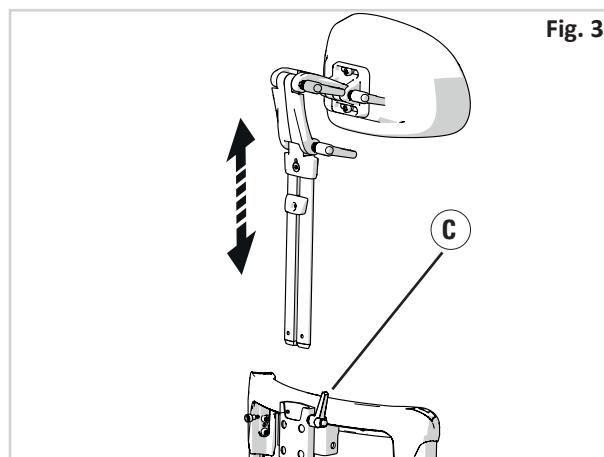


Fig. 3



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
F: +46 (0) 31 748 37 37
E: post@sunrisemedical.se