


Ryggstödsfäste för rygg med elektrisk ryggvinkel på sittsystem SEDEO PRO

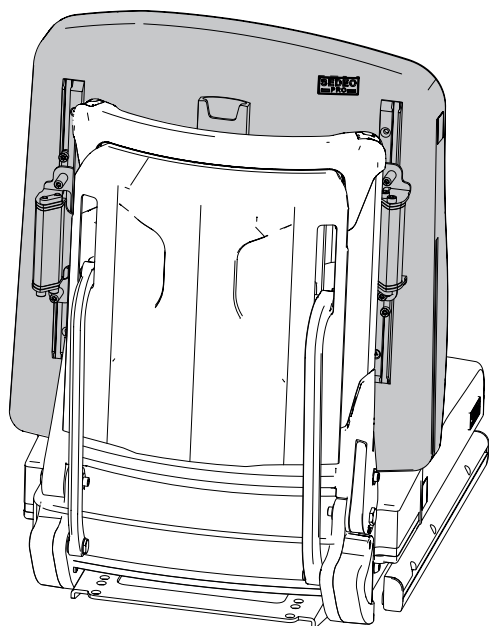

Benämning		Artikelnummer
Fäste för ryggdyna flexibel - el/gasjusterat ryggstöd	☐	22503274-004
Fäste för ryggdyna fast-el/gasjusterat ryggstöd	☐	22503274-003
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

MONTERINGSANVISNING

Montering av ryggstödsfäste

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering av ryggstödsfäste för rygg med elektrisk ryggvinkel
- Åtragningsmoment för bultar är 9Nm

Verktyg som krävs

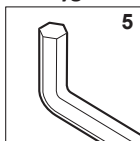


Fig. 1

Sätt fästena (A) mot ryggstödsramen

Fig. 2

Skruva i 2 (B) skruvar på varje sida

Fig. 1


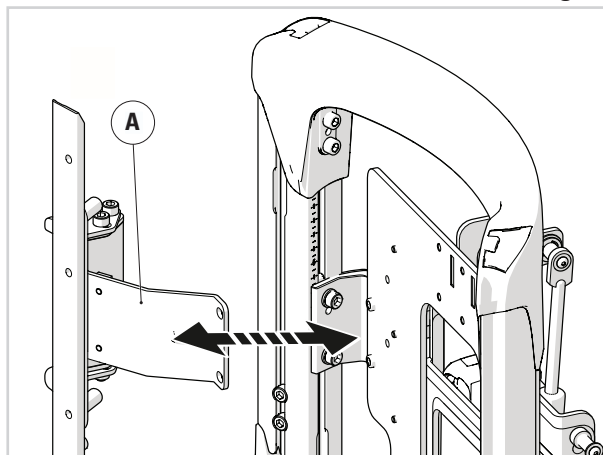


Fig. 2

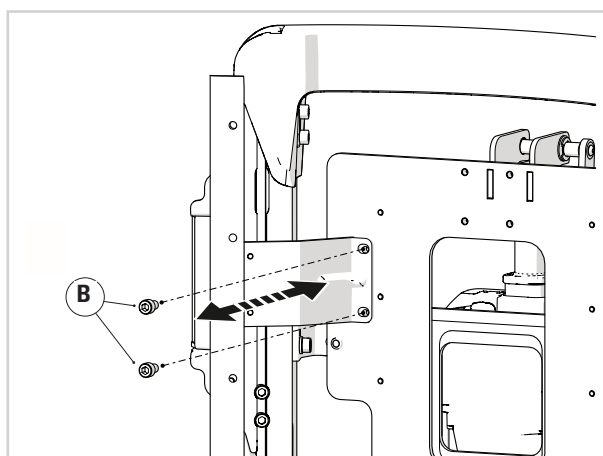

MONTERINGSANVISNING

Montering av dyna för rygg med elektrisk ryggvinkel

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering av dynans fästen till en rygg med elektrisk ryggvinkel
- Koppla loss kablar innan du börjar
- Åtragningsmoment för bultar är 9Nm

Verktyg som krävs

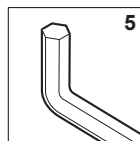


Fig. 3

1. Sätt dynan mot fästena (A)
2. Skruva i 2 (B) skruvar på varje sida

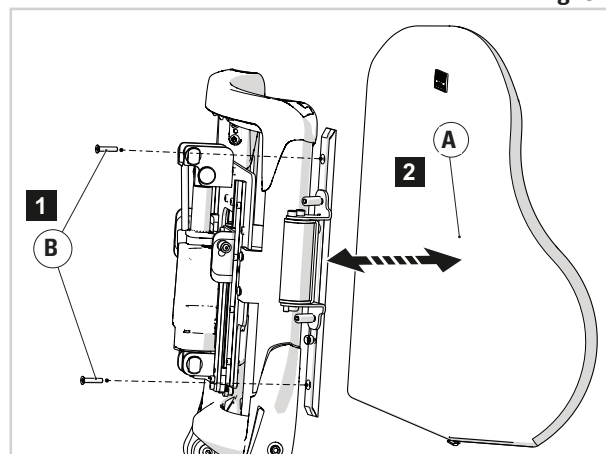


Fig. 3



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se