



Brickbord till sittsystem SEDEO PRO och SEDEO LITE

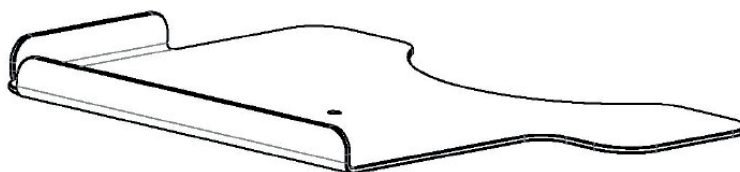

Benämning		Artikelnummer
Brickbord helt sidosvängbart breddjusterbart exkl. fäste fästplatta svängarm	<input type="checkbox"/>	90009005
Brickbord QP Uppvikta kanter vä	<input type="checkbox"/>	9002017-001
Brickbord QP Uppvikta kanter vä	<input type="checkbox"/>	9002019-001

MONTERINGSANVISNING

Montering av brickbord

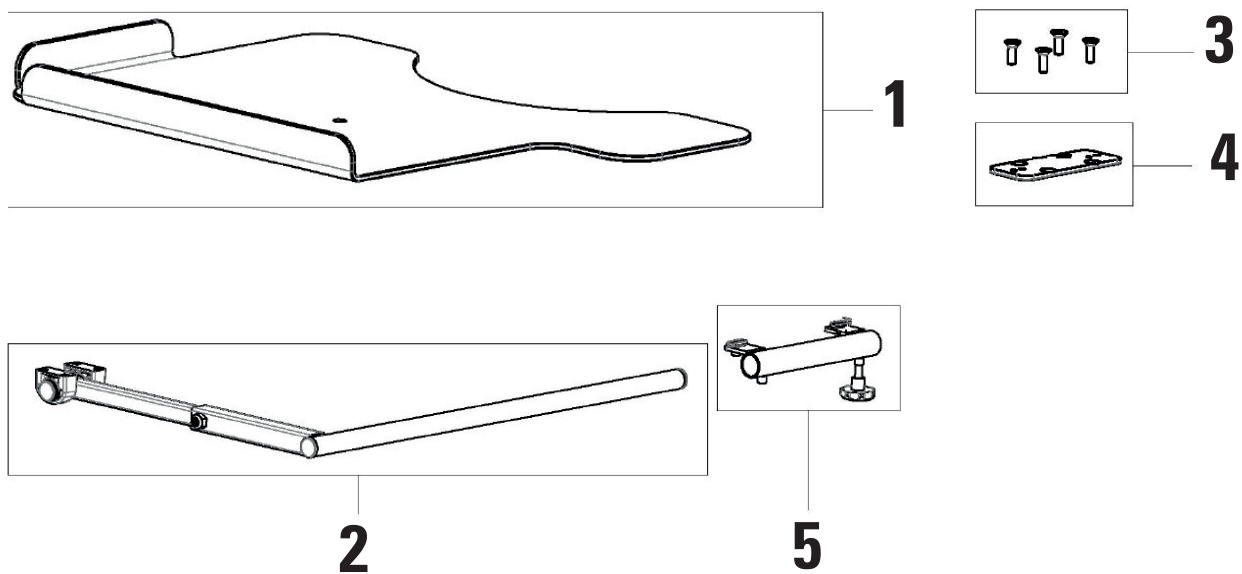

1. Montera bordet (1) på fästramen (2) med skruvsats (3) och fästplatta (4)
2. Montera fästet (5) på armstödet på elrullstolen
3. Montera bordet i fästet på elrullstolen.



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
F: +46 (0) 31 748 37 37
E: post@sunrisemedical.se