



## KOBLINGSANVISNING 24V 1G REAL 9000 PLUS EL



---

### Innhold

Styringsalternativer .....	2
Kontrollboks 24V 1G. ....	3
Monteringsanvisning setilt. ....	4
Monteringsanvisning ryggvinkling .....	5
Monteringsanvisning el-brems .....	6
Monteringsanvisning bryter. ....	7


---

### Funksjoner *Koblingsboks*

1. Styring av seteløft opp/ned
2. Styring av setetilt
3. Styring av ryggvinkel
4. Styring av elektrisk brems
5. Kobling til *styreboks/håndkontroll B*

### Bryter under armen

kobles til *Koblingsboks* (inngang 5)

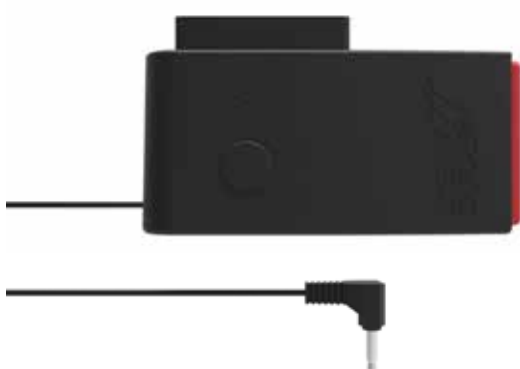

### Koblingsboks



### Håndkontroll

Alternativ til *koblingsboks*  
kobles direkte til *Kontrollboks* (inngang B)



### Funksjoner *Kontrollboks*

1. Aktuator seteløft opp/ned, strømbegrensing 15 A
  2. Aktuator setetilt, strømbegrensing 8 A
  3. Aktuator ryggvinkel, strømbegrensing 8 A
  4. Aktuator brems, strømbegrensing 8 A
- A. Laderinngang  
B. Inngang for håndkontroll


### Fargemerkede *kontakter*

Kontaktene for funksjonene 1-4 har fargede o-ringer som sitter i de siste inngangene, regnet fra kontakten.

Funksjonene er merket med følgende farger:

- ① **Seteløft**, hvit merking
- ② **Setetilt**, gul merking
- ③ **Ryggvinkling**, lilla merking
- ④ **Brems**, rød merking

### Kontrollboks

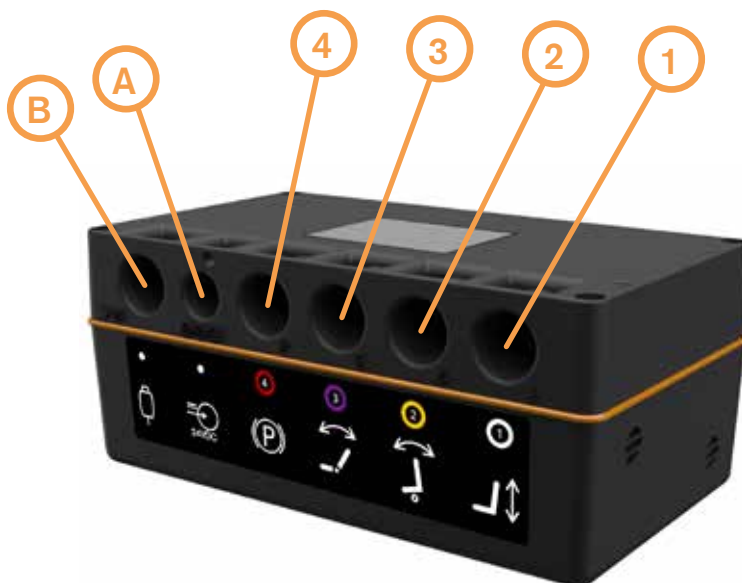

### Kontakt


*Kobles til Kontrollboks*



### Framgangsmåte

1. Demonter den gamle tiltmekanismen ved å trekke ut låsepinnene (A). Trekk deretter ut de sylinderformede låseboltene (B). Løft deretter ut den gamle tiltmekanismen.
2. Plasser den nye setetiltmekanismen der den gamle satt.
3. Monter låseboltene (B) slik at SAR44 sitter på plass. Trykk deretter låsepinnene (A) inn i de respektive hullene i låseboltene (B).
4. Koble kontakten til utgang ② i kontrollboksen.

OBS! Ved montering av elektrisk setetilt skal aktuatoren monteres i det fremre hullet (C) i den bakre innfestingen.

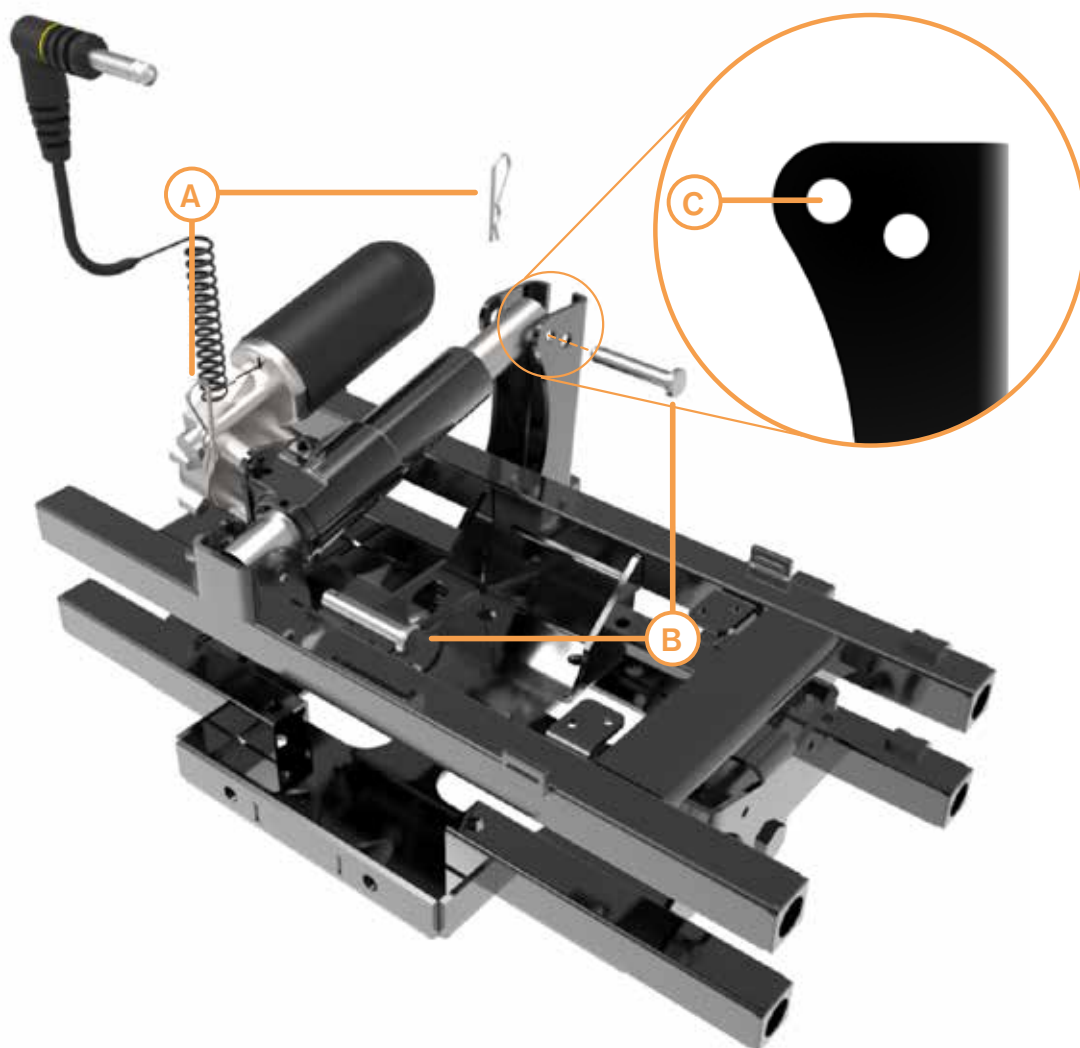


## Nødvendig verktøy

5 mm unbrakonøkkel

## Framgangsmåte

1. Skru inn de fire skruene (A) for å montere ryggmekanismen til seteputen som vist på bildet nedenfor. For senere å montere ryggputen til mekanismen, se monteringsanvisning for ryggpute.
2. Ryggmekanismen kan stilles inn i åtte ulike faste posisjoner. Hver enkelt posisjon har et vinkelutslag på 35°. Ryggvinkelens vinkelutslag justeres med skruen (B). Monter skruen i det fremre hullet for å justere ryggens utslag lengre fram på setet. Det bakre hullet gir utslag lenger bak på setet (større setedybde). Ryggens dybde kan reguleres 45 mm trinnløst med skruen (C). Løsne skruen og skyv festet til ønsket posisjon. Trekk til skruen (C)
3. Koble kontakten til utgang ③ i kontrollboksen.

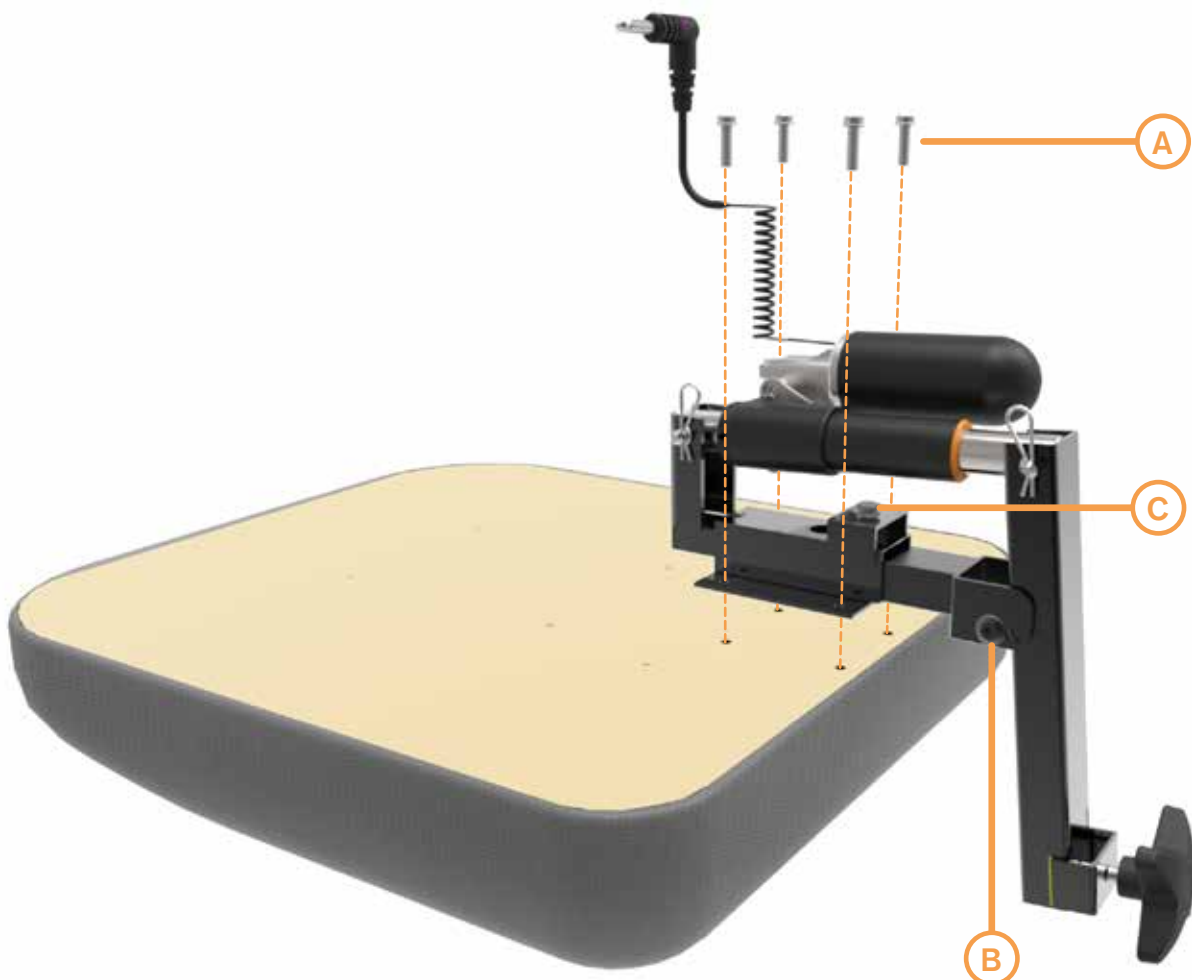


### Nødvendig verktøy

5 mm unbrakonøkkel

6 mm unbrakonøkkel

### Framgangsmåte

1. Demonter braketten (A) fra akslingen ved å løsne de fire M6-skruene.
2. Senterfestet (B) monteres på understellet i høyde med sporet som vist ved den stiplede linjen på bildet. Dra til den bakre M8-skruen (C). Påse at senterfestets to braketter har et spillerom på ca 1 mm til aktuatorfestet. Dra deretter til de fremre M8-skruene (D) med håndkraft.
3. Påse at stolen er bremsset. Monter braketten (A) på aksselfestet (E) slik at det sitter fast rundt bremseakslingen. Plasser M6-skruene i festet (E) uten å trekke dem til. Koble til strøm. Aktiver bremsen slik at aktuatoren har maksimalt utslag.
4. Skru til de fremre M8-skruene (D) i senterfestet, de to platene skal sitte sammen. Skru deretter de fire M6-skruene hardt til aksselfestet (E) med moment 9,6 Nm. Kontroller bremsefunksjonen.

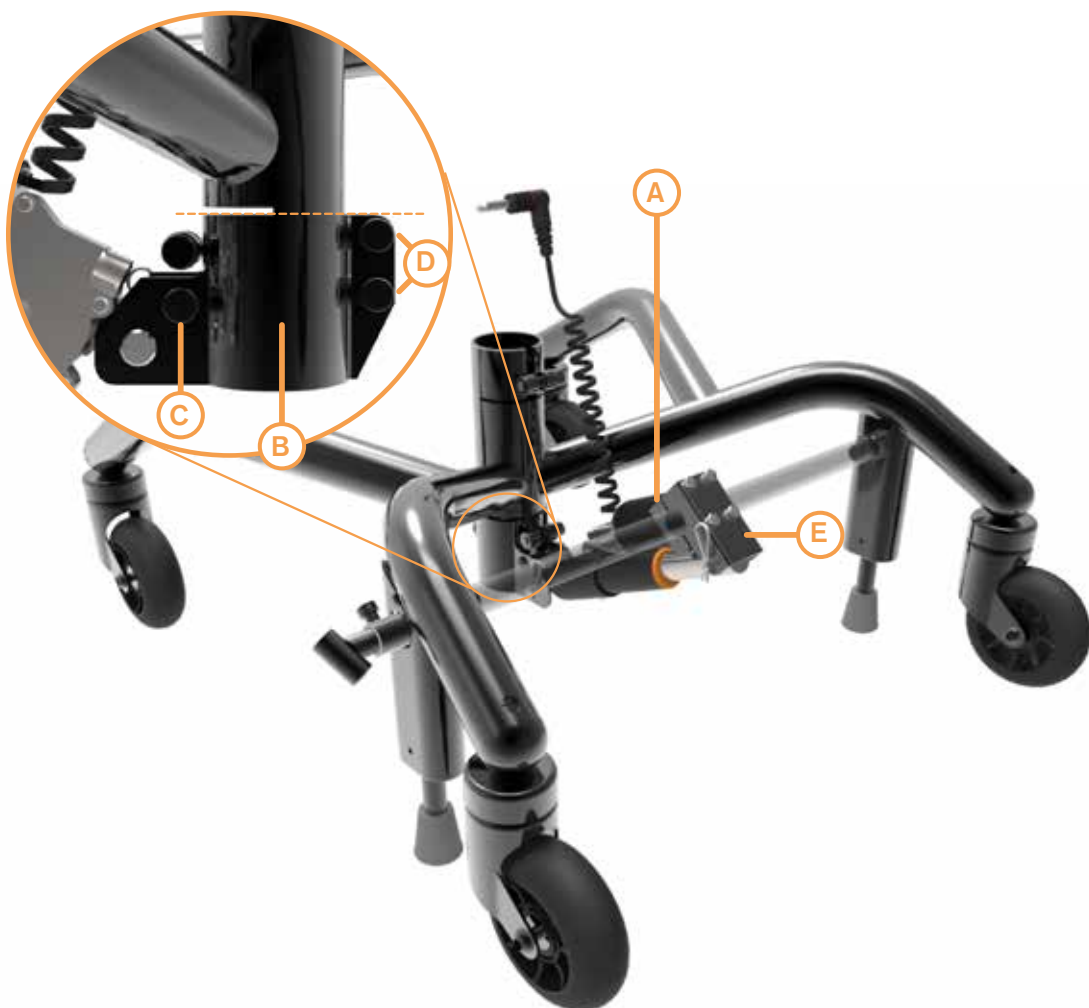


### Nødvendig verktøy

Torx-nøkkel  
eller skrutrekker

### Framgangsmåte

Plasser bryteren (bryter under armlene) eller bryter (håndkontroll) slik at bryteren er plassert rett innenfor armlenets framkant. Fest med de medfølgende M5-skruene.

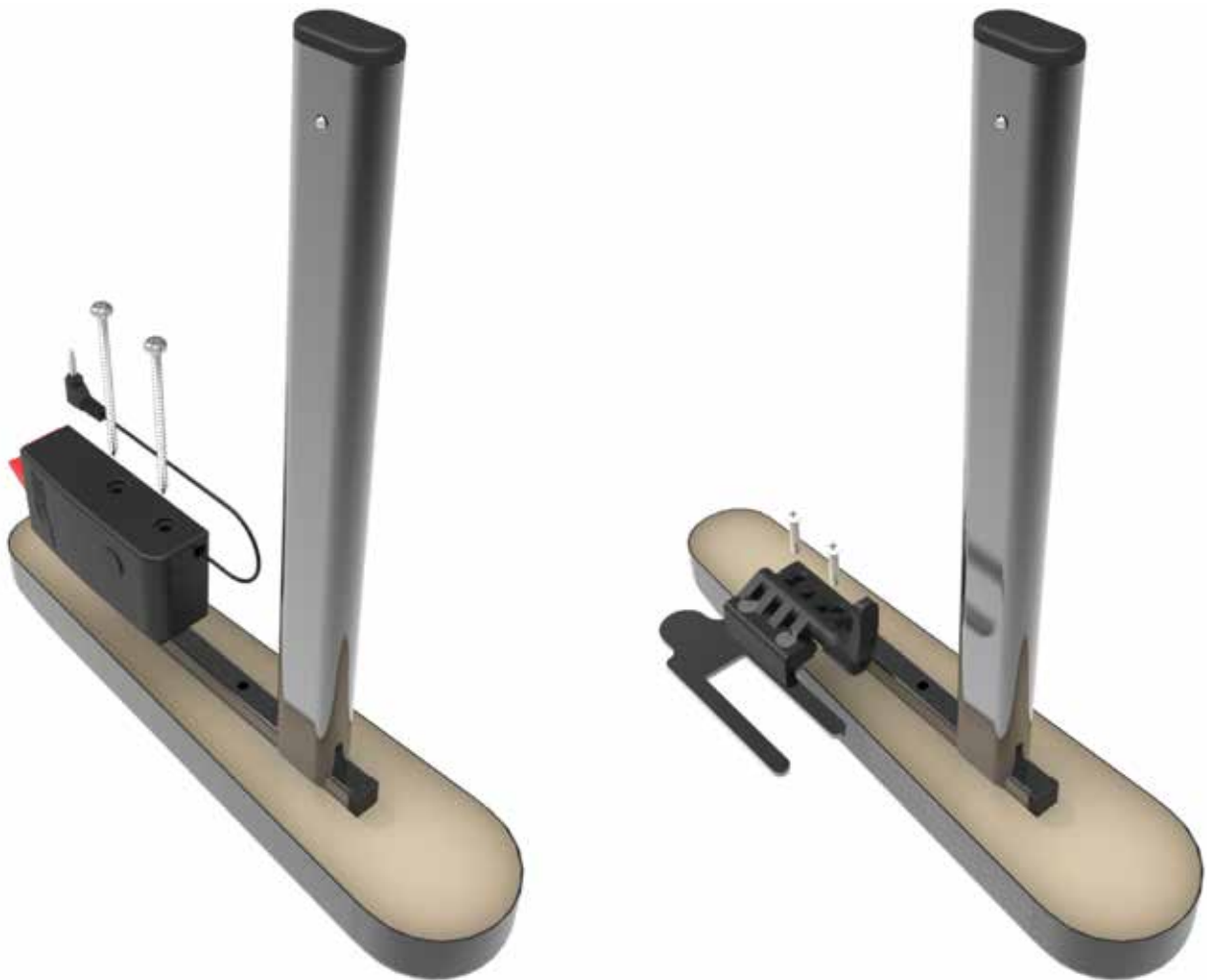

## *Kontakt forhandler i Norge*

---



Sunrise Medical AS

Delitoppen 3

1540 VESTBY

T: 66 96 38 00

E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)

[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)