





Te presentamos JAY Your Way. Un programa de modificaciones y customizaciones JAY, desde adaptaciones clínicas a fundas en distintos colores.

JAY Your Way permite personalizar la gama JAY para adaptarla a las necesidades clínicas y/o preferencias individuales de cada usuario. En este catálogo mostramos algunas de las customizaciones más comunes para las bases de cojín, bolsas de fluido, fundas, respaldos y accesorios de posicionamiento JAY que pueden hacerse a través del programa JAY Your Way. Personaliza tu JAY desde ya, porque cada JAY es ÚNICO.



# Personaliza tu talla

## Modificaciones en la base del cojín

### Modificaciones de MEDIDAS



#### Reducción de la Anchura/Profundidad del Cojín

**En qué consiste:** Recorte de la anchura o profundidad de la base del cojín. Adaptación de la funda a la nueva medida del cojín.

**Aplicación clínica:** Manteniendo el tamaño de la hondonada pélvica, reducimos las medidas del cojín.



#### Incremento de la Anchura/Profundidad del Cojín

**En qué consiste:** Incremento de la anchura o profundidad de la base del cojín. Adaptación de la funda a la nueva medida del cojín.

**Aplicación clínica:** Manteniendo el tamaño de la hondonada pélvica, aumentamos las medidas del cojín.



#### Reducción de la altura del cojín

**En qué consiste:** Recorte de la espuma inferior de la base para reducir la altura del cojín.


**Aplicación clínica:** Adaptación óptima del cojín a la silla de ruedas y a necesidades individuales del paciente como reducir la altura de asiento al suelo para facilitar las transferencias o propulsarse con los pies.



#### Incremento de la altura del cojín

**En qué consiste:** Añadir espuma en la base del cojín para aumentar la altura total del cojín.

**Aplicación clínica:** Adaptación óptima del cojín a la silla de ruedas y a necesidades individuales del paciente como aumentar la altura de asiento al suelo para facilitar las transferencias o propulsarse con los pies.

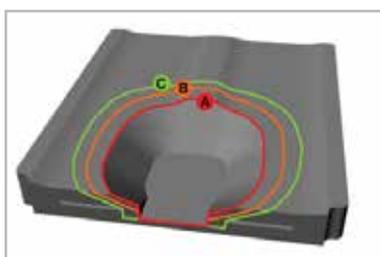

#### Dimensiones de la Hondonada Pélvica (Pelvic Loading Area)

**En qué consiste:** Incremento o reducción del tamaño de la hondonada pélvica.

**Aplicación clínica:** Optimizar el soporte pélvico de forma anatómica para conseguir el nivel de inmersión que garantiza la reducción de presión y estabilidad lateral.

# Personaliza tu posicionamiento

## Modificaciones en la base del cojín

### Modificaciones en la base para posicionamiento y confort



#### Capa adicional de espuma Visco

**En qué consiste:** Se añade una capa adicional de espuma Viscoelástica sobre la base del cojín para mayor confort.

**Aplicación clínica:** Extra protección de la integridad de la piel, extra confort.



#### Corte para Adaptación a los Tubos del Asiento

**En qué consiste:** Corte de la base a nivel inferior y lateral.

**Aplicación clínica:** Posicionamiento del cojín entre los tubos de asiento para alcanzar la altura asiento suelo más baja posible.



#### Reducción de la longitud de pierna (lado derecho/izquierdo)

**En qué consiste:** Reducción de la profundidad de la base y del fluido (si aplica) en lado derecho o izquierdo. Adaptación de la funda a la nueva medida del cojín.

**Aplicación clínica:** Adaptación a disimetrías de fémur del usuario.



#### Corte para Contracturas en Flexo

**En qué consiste:** Corte en ángulo de la parte frontal de la base del cojín.

**Aplicación clínica:** Acomodación de flexo de rodillas, isquiotibiales acortados, pantorrillas voluminosas, facilitar la propulsión con pies, etc.



#### Corte para acomodación Escroto/Vegija

**En qué consiste:** Eliminación de una pequeña parte de espuma en la parte anterior y central de la hondonada pélvica.

**Aplicación clínica:** Acomodación de tejido escrotal y partes blandas, reducción de carga con incremento de confort y aumento de tolerancia a la sedestación.



### Base Sólida Reductora de Altura

**En qué consiste:** Se añade una base firme reductora de altura a la base del cojín.

**Aplicación clínica:** Minimizar la altura de asiento al suelo para facilitar las transferencias o la propulsión con los pies.



### Corte en Cuña de la Base: Posterior

**En qué consiste:** Corte trasero en cuña de la base del cojín. La altura delantera del cojín será más alta que la altura trasera según la medida especificada.

**Aplicación clínica:** Cierre del ángulo asiento-respaldo, para aumento de la estabilidad postural, por ejemplo.



### Corte en Cuña de la Base: Anterior

**En qué consiste:** Corte delantero en cuña de de la base del cojín. La altura trasera del cojín será más alta que la altura delantera según la medida especificada.


**Aplicación clínica:** Acomodación de limitaciones de flexión de caderas, y facilitación de la propulsión con los pies y transferencias.



### Cuña Pegada en base para Pendiente Posterior

**En qué consiste:** Cuña de espuma pegada debajo de la parte delantera de la base del cojín. La altura delantera del cojín será mayor que la altura trasera según la medida especificada.

**Aplicación clínica:** Cierre del ángulo asiento respaldo, para aumento de la estabilidad postural, por ejemplo.

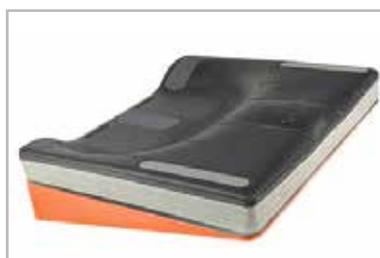

### Cuña Pegada en base para Pendiente Anterior

**En qué consiste:** Cuña de espuma pegada debajo de la parte trasera de la base del cojín. La altura trasera del cojín será mayor que la altura delantera según la medida especificada.

**Aplicación clínica:** Acomodación de limitaciones de flexión de caderas y facilitación de la propulsión con los pies y transferencias.



### Eliminación del precontorno central abductor

**En qué consiste:** Eliminación de la forma precontorneada abductora a nivel central.

**Aplicación clínica:** Adaptación a posturas no alineadas de fémur como caderas en ráfaga o bien para facilitar las transferencias cuando el soporte medial las dificulte.



### Limado Anterior de PLA para Carga Femoral

**En qué consiste:** Limado de la parte anterior de la hondonada pélvica para facilitar la transición de la carga pélvica a la zona femoral.

**Aplicación clínica:** Reducción de presión en la zona anterior de la hondonada pélvica para acomodación de partes blandas en usuarios con hipersensibilidad para incremento de la tolerancia a la sedestación.



### Contorno para soporte Fémur

**En qué consiste:** Contorno de 2,5 cms para soporte de fémur. Se precontornea la base de espuma desde la parte delantera de la hondonada pélvica hasta la parte anterior del cojín para soporte femoral.


**Aplicación clínica:** Mejora del posicionamiento y soporte medial y lateral de ambos fémures. Y al abrir el ángulo de las caderas acomodación de limitaciones de cadera.



### Corte trocantérico

**En qué consiste:** Limado en ambos laterales de la hondonada pélvica para alivio de presión en trocánteres.

**Aplicación clínica:** Reducción de presión en ambos trocánteres redistribuyendo la carga en toda la superficie de contacto en sedestación.

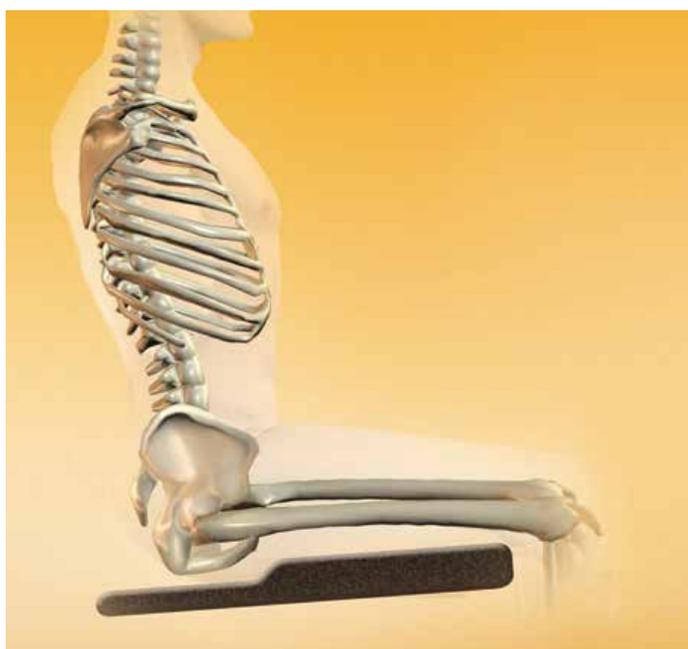

## Accesorios de posicionamiento



### Cuñas Adductoras FIJAS en cojín

**En qué consiste:** Fijación de Cuñas Adductoras en la base del cojín para soporte moldeado.

**Aplicación clínica:** Mejora de la postura en sedestación con alineación de las piernas sobre el cojín.



### Cuña Abductora FIJA

**En qué consiste:** Fijación de Cuña Abductora en la base del cojín para soporte moldeado.

**Aplicación clínica:** Mejora de la postura en sedestación con preservación de la separación de las piernas.



### Guías de Cadera/Soportes Pélvicos Laterales FIJOS

**En qué consiste:** Fijación de Guías de Cadera o Soportes Pélvicos en la base del cojín para soporte moldeado.

**Aplicación clínica:** Mejora de la postura en sedestación y el posicionamiento del área pélvica.

# Personaliza tu protección

## Modificaciones en la bolsa de fluido del cojín



### Bolsa de fluido Underfill (con menos fluido)

**En qué consiste:** Reducción del volumen de fluido standard hasta un 20% (reducción en rangos de 5% solo). El volumen total será el standard menos el porcentaje de reducción indicado.

**Aplicación clínica:** Aumento de la inmersión de la pelvis en el fluido para conseguir una mayor estabilidad lateral. El cierre del ángulo de la cadera facilita también el manejo de los patrones de hiperextensión.



### Bolsa de fluido Overfill (con más fluido)

**En qué consiste:** Aumento del volumen de fluido standard hasta en un 40% (incrementos en rangos de 5% solo). El volumen total será el standard más el porcentaje de incremento indicado.


**Aplicación clínica:** Redistribución del peso y reducción de la presión sobre las prominencias óseas en pacientes para los que la bolsa de fluido standard puede resultar insuficiente (atrofia muscular importante, hipersensibilidad)



### Oblicuidades: Underfill/Overfill Asimétrico

**En qué consiste:** Reducción o aumento del volumen de fluido (Underfill u Overfill) en el lado derecho y/o izquierdo.

**Aplicación clínica:** Optimizar la inmersión (Underfill). Evitar tocar la base del cojín (Overfill) en casos de atrofias/asimetrías por pérdida de hueso o tejido.

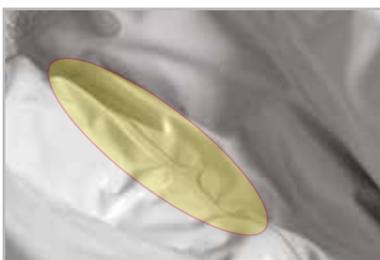

### Sellado del área sacra o escrotal

**En qué consiste:** Añadir sellado térmico en el área de la zona sacra o escrotal de la bolsa de fluido.

**Aplicación clínica:** Contener el fluido para que no se desplace, reduciendo la presión en zonas propensas a la formación de escaras, más delicadas o sensibles.

**NOTA ACLARACIÓN:** En el cojín JAY 2, el JAY 2 Recline viene de serie con el sellado sacro, no es necesario pedirlo por personalización.



# Personaliza tu estilo

## Modificaciones en las fundas

Todas las fundas de cojines y respaldos JAY están fabricadas con materiales y acabados de la más alta calidad para realzar los beneficios clínicos y el confort. JAY Your Way permite además personalizarlas en color y adaptarlas al estilo más personal de cada usuario.

### Funda Interna con cremallera



**En qué consiste:** Se añade al cojín JAY solicitado una funda interna con cremallera para máxima protección del cojín. Esta funda es elástica y totalmente impermeable. Hecha de Dartex Reversed®, material que repele el agua, se complementa con costuras hidro-repelentes debido a su revestimiento especial y su cremallera con diseño cerrado Aquaguard®, para máxima protección y preservación del cojín frente a la incontinencia.

**Aplicación clínica:** Reducción de la tensión en la superficie de sedestación. Máxima protección del cojín frente a la suciedad, la humedad y los malos olores. Óptimo control de factores de riesgo desencadenantes de escaras en sedestación.

### Fundas Externas Personalizadas

Gama de fundas externas disponibles en varios cojines y respaldos JAY



Funda Resistente a la Incontinencia con cremallera



Funda Resistente a la Incontinencia Ajustable



Funda Elástica JAY con cremallera



Funda X-Static con tejido extra-transpirable



Funda Microclimática 3DX



Funda Dartex con cremallera Aquaguard (impermeable)



Funda Dartex Reverse con cremallera Aquaguard (impermeable)



## Bordados Personalizados

Personaliza tu funda JAY con texto bordado. Es posible bordar textos de hasta 32 caracteres, en tipografía Arial, y a un color. Válido para fundas de cojines y respaldos.



## Bolsillo delantero con cremallera

Ofrece la posibilidad de coser un bolsillo con cremallera en la parte delantera inferior de la funda para guardar pequeños objetos como llaves, tarjetas de crédito o móviles.

## Colores en Fundas de Cojines (solo bandas laterales)



### Colores disponibles:



Lima eléctrico  
(Electric Lime)



Gris  
(Grey)



Naranja  
(Hunter orange)



Azul marino  
(Navy Blue)



Rosa suave  
(Pink sorbet)



Rosa intenso  
(Shocking Pink)



Turquesa  
(Turquoise)



Burdeos  
(University Red)



Violeta  
(Wvery violet)



Amarillo fosforito  
(Volt yellow)



Camuflaje digital  
(Digital camo)

Esta guía de colores es orientativa. Los colores aquí mostrados pueden variar ligeramente del acabado final de la pintura o tapicería por limitaciones de la propia impresión del catálogo o su visualización en pantalla.


# Modificaciones en Respaldos

## Colores en Fundas de Respaldos



Funda en color burdeos (University Red)

### Colores disponibles:\*

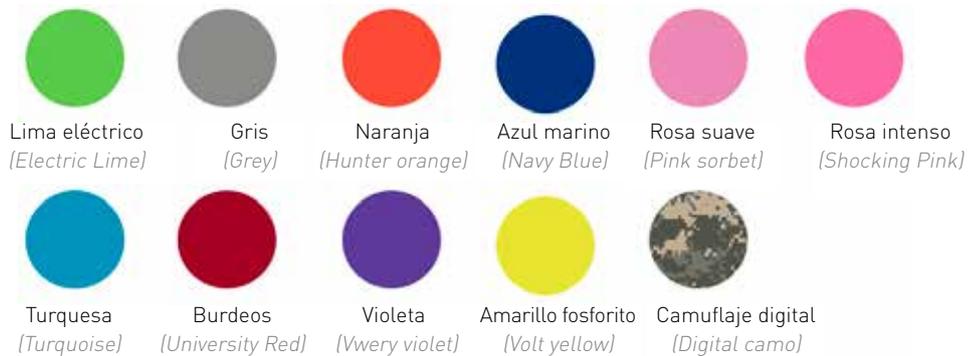

## Parches Militares

Imprime estilo a las fundas de los respaldos cosiendo parches con los emblemas de los servicios militares estadounidenses. Compatibles con todos los colores de funda disponibles.



Funda camuflaje digital con parche militar



## Pad de Fluido Vertebral

**En qué consiste:** Se incorpora pad de fluido longitudinal en la espuma del respaldo donde apoya la columna vertebral.

**Aplicación clínica:** Reducción de la presión que soportan las apófisis espinosas de la columna vertebral para protección de la intergridad de la piel y extra confort; especialmente indicado en posturas cifóticas.



## Relleno de espuma Visco

**En qué consiste:** Se añade una capa adicional de espuma Viscoelástica en la superficie del respaldo. Adaptación de la funda a la nueva espuma.

**Aplicación clínica:** Incremento de la tolerancia a la sedestación del paciente y reducción de la presión en sedestación.



Morado brillante (Candy Purple)

## Carcasas de Respaldos en Colores



### Colores disponibles:\*



Amarillo yema  
(Aztec Gold)



Rosa flúor metalizado  
(Hot Sparkle Pink)



Negro  
(Bead Blast Black)



Negro mate  
(Matte Black)




Burdeos mate  
(Matte Black Cherry)




Azul eléctrico mate  
(Matte Electric Blue)



Burdeos  
(Black Cherry)

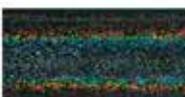

Negro mate c/purpurina  
(Black Opal)

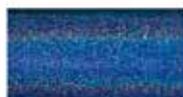

Azul mate c/purpurina  
(Blue Opal)



Verde foresta mate  
(Matte Evergreen)



Morado mate  
(Matte Purple)



Rosa metalizado  
(Mauve Pink)



Azulón brillante  
(Candy Blue)



Morado brillante  
(Candy Purple)



Rojo brillante  
(Candy Red)



Refresco de cola  
(Rootbeer)



Gris plata  
(Sparkle Silver)



Naranja  
(Sunrise Orange)



Azul eléctrico  
(Electric Blue)



Verde foresta  
(Evergreen)



Blanco brillante  
(Glossy White)



Titanio  
(Titanium Color Paint)



Amarillo  
(Yellow)



Blanco fluorescente  
(Glow)



Verde manzana  
(Green Apple)

\* Esta guía de colores es orientativa. Los colores aquí mostrados pueden variar ligeramente del acabado final de la pintura o tapicería por limitaciones de la propia impresión del catálogo o su visualización en pantalla.

# Modificaciones en Soportes de brazo y Cajas Reposapiés



## Soporte Palmar en Almohadillado de Brazo

**En qué consiste:** Se añade soporte palmar para el soporte ergonómico de la mano.

**Aplicación clínica:** Mejora el confort y la distribución de la presión aumentando la tolerancia a la sedestación en el paciente.




## Capa adicional de espuma Visco

**En qué consiste:** Se añade Capa de espuma Visco con memoria para proporcionar mayor confort (disponible en soporte de brazo y cajas reposapiés).




## Cincha Adicional

**En qué consiste:** Se añade una cincha adicional para asegurar la extremidad del paciente (disponible en soporte de brazo y cajas reposapiés).

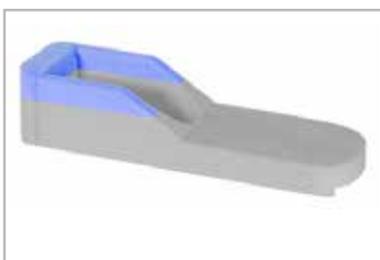

## Reducción de Altura en Paredes Laterales de Soporte de Brazo

**En qué consiste:** Reducir la altura en una pared lateral o ambas paredes laterales del soporte de brazo.

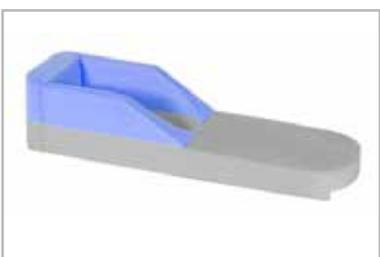

## Eliminación de Paredes Laterales de Soporte de Brazo

**En qué consiste:** Las paredes laterales del soporte de brazo se pueden eliminar para extremidades de mayor tamaño.



## Colores en cajas reposapiés



### Colores disponibles:

					
Lima eléctrico <i>(Electric Lime)</i>	Gris <i>(Grey)</i>	Naranja <i>(Hunter orange)</i>	Azul marino <i>(Navy Blue)</i>	Rosa suave <i>(Pink sorbet)</i>	Rosa intenso <i>(Shocking Pink)</i>
					
Turquesa <i>(Turquoise)</i>	Burdeos <i>(University Red)</i>	Violeta <i>(Wvery violet)</i>	Amarillo fosforito <i>(Volt yellow)</i>	Camuflaje digital <i>(Digital camo)</i>	

Esta guía de colores es orientativa. Los colores aquí mostrados pueden variar ligeramente del acabado final de la pintura o tapicería por limitaciones de la propia impresión del catálogo o su visualización en pantalla.

# Matriz Compatibilidades

## Cojines

### PERSONALIZA TU TALLA

Modificaciones de medidas			JAY Basic	JAY Zip	JAY Lite	JAY Soft Combi P	JAY Care	JAY Easy Fluid / Visco	JAY Xtreme Active	JAY 2	JAY 2 Profundo	JAY 2 Plus	JAY GS	JAY Balance	JAY 3
	cm	pulgadas													
Reducción de la anchura	2,5 cm <i>(1,25 cm menos por lado)</i>	1" <i>(1/2" menos por lado)</i>	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	5 cm <i>(2,5 cm menos por lado)</i>	2" <i>(1" menos por lado)</i>	✓		✓					✓			✓	✓	✓
Incremento de la anchura	2,5 cm <i>(1,25 cm más por lado)</i>	1" <i>(1/2" más por lado)</i>			✓					✓	✓		✓	✓	✓
	5 cm <i>(2,5 cm más por lado)</i>	2" <i>(1" más por lado)</i>			✓					✓	✓		✓	✓	✓
	7,6 cm <i>(3,80 cm más por lado)</i>	3" <i>(1 1/2" más por lado)</i>			✓					✓	✓		✓	✓	✓
	10 cm <i>(5 cm más por lado)</i>	4" <i>(2" más por lado)</i>			✓					✓	✓		✓	✓	✓
Reducción de la profundidad <i>(recorte de espuma en la parte anterior del cojín)</i>	2,5 cm	1"	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	5 cm	2"	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	7,6 cm	3"	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	10 cm	4"	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Incremento de la profundidad <i>(añadido de espuma en la parte anterior del cojín)</i>	2,5 cm	1"			✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓
	5 cm	2"			✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓
	7,6 cm	3"			✓					✓	✓		✓	✓	✓
	10 cm	4"			✓					✓	✓		✓	✓	✓
Reducción de la altura	1,25 cm	1/2"		✓											
	1,6 cm	5/8"												✓	
Incremento de la altura	2,5 cm	1"		✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓
	5 cm	2"		✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓
	7,6 cm	3"		✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓
Tamaño mayor de la PLA <i>(hondonada pélvica)</i>	2,5 cm <i>(1,25 cm más por lado)</i>	1" <i>(1/2" más por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	5 cm <i>(2,5 cm más por lado)</i>	2" <i>(1" más por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	7,6 cm <i>(3,80 cm más por lado)</i>	3" <i>(1 1/2" más por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	10 cm <i>(5 cm más por lado)</i>	4" <i>(2" más por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
Tamaño más pequeño de la PLA <i>(hondonada pélvica)</i>	2,5 cm <i>(1,25 cm menos por lado)</i>	1" <i>(1/2" menos por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	5 cm <i>(2,5 cm menos por lado)</i>	2" <i>(1" menos por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	7,6 cm <i>(3,80 cm menos por lado)</i>	3" <i>(1 1/2" menos por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓
	10 cm <i>(5 cm menos por lado)</i>	4" <i>(2" menos por lado)</i>								✓	✓	✓	✓		✓

NOTA: 1" = 2,54 cm

## PERSONALIZA TU POSICIONAMIENTO

Modificaciones para posicionamiento-confort			JAY Basic	JAY Zip	JAY Lite	JAY Soft Combi P	JAY Care	JAY Easy Fluid / Visco	JAY Xtreme Active	JAY 2	JAY 2 Profundo	JAY 2 Plus	JAY GS	JAY Balance	JAY 3
	cm	pulgadas													
Capa adicional de espuma Visco															
Corte para tubos de asiento	3,1 cm por lado y 3,80 cm desde abajo														
Reducción de la longitud de pierna lado derecho <i>(el lado izquierdo será más largo que el derecho en la medida seleccionada)</i>	2,5 cm	1"													
	5 cm	2"													
	7,6 cm	3"													
	10 cm	4"													
Reducción de la longitud de pierna lado izquierdo <i>(el lado derecho será más largo que el izquierdo en la medida seleccionada)</i>	2,5 cm	1"													
	5 cm	2"													
	7,6 cm	3"													
	10 cm	4"													
Corte para contracturas en flexo	2,5 cm x 45°	1" x 45°													
Corte para escroto/vejiga															
Base sólida reductora altura															
Corte en cuña de la base, posterior <i>(parte delantera del cojín más alta que la trasera)</i>	1,25 cm	1/2"													
	2,5 cm	1"													
Corte en cuña de la base anterior <i>(parte trasera del cojín más alta que la delantera)</i>	1,25 cm	1/2"													
	2,5 cm	1"													
	3,80 cm	1 1/2"													
Cuña pegada	Pendiente posterior														
	Pendiente anterior														
Eliminación precontorno abductor															
Limado anterior PLA															
Contorno para soporte fémur	Derecho														
	Izquierdo														
Corte trocantérico															

Accesorios de posicionamiento			JAY Basic	JAY Zip	JAY Lite	JAY Soft Combi P	JAY Care	JAY Easy Fluid / Visco	JAY Xtreme Active	JAY 2	JAY 2 Profundo	JAY 2 Plus	JAY GS	JAY Balance	JAY 3
Cuñas adductoras fijas en cojín															
Cuña abductora fija en cojín															
Soportes pélvicos laterales fijos en cojín															
Guías de cadera fijas en cojín															
Cuñas de oblicuidad pélvica fijas en cojín															

## PERSONALIZA TU PROTECCIÓN

### Modificaciones en la bolsa de fluido

		JAY Basic	JAY Zip	JAY Lite	JAY Soft Combi P	JAY Care	JAY Easy Fluid / Visco	JAY Xtreme Active	JAY 2	JAY 2 Profundo	JAY 2 Plus	JAY GS	JAY Balance	JAY 3
<b>Bolsa de Fluido Underfill</b> <i>(menos fluido)</i>	Hasta 20% menos (en incrementos de 5%)						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bolsa de Fluido Overfill</b> <i>(más fluido)</i>	Hasta 40% más (en incrementos de 5%)						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oblicuidad Underfill</b> <i>(menos fluido)</i>	Lado derecho o izquierdo, hasta 20% menos						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oblicuidad Overfill</b> <i>(más fluido)</i>	Lado derecho o izquierdo, hasta 40% más						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sellado del área sacra</b>									✓	✓	✓		✓	
<b>Sellado del área escrotal</b>									✓	✓	✓		✓	

## PERSONALIZA TU ESTILO

### Modificaciones en la funda del cojín

		JAY Basic	JAY Zip	JAY Lite	JAY Soft Combi P	JAY Care	JAY Easy Fluid / Visco	JAY Xtreme Active	JAY 2	JAY 2 Profundo	JAY 2 Plus	JAY GS	JAY Balance	JAY 3
<b>Funda interna con cremallera</b>	Dartex Reverse con cremallera Aquaguard			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>Fundas externas personalizadas</b>	Resistente a la incontinencia con cremallera		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
	Resistente a la incontinencia ajustable		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	Funda elástica con cremallera			✓	✓	✓	✓	✓						
	X-static con tejido extra-transpirable			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Microclimática 3DX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dartex con cremallera Aquaguard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dartex Reverse con cremallera Aquaguard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bordados personalizados</b>	Tipografía Arial, 1 color, hasta 32 caracteres	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bolsillo delantero con cremallera</b>		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
<b>Color de la funda (solo bandas laterales)</b>	Lima eléctrico <i>(Electric Lime)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gris <i>(Grey)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Naranja <i>(Hunter Orange)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Azul marino <i>(Navy Blue)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rosa suave <i>(Pink Sorbet)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rosa intenso <i>(Shocking Pink)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turquesa <i>(Turquoise)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Burdeos <i>(University Red)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Violeta <i>(Vwery Violet)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amarillo fosforito <i>(Volt yellow)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camuflaje digital <i>(Digital camo)</i>		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Respaldos

Modificaciones en respaldos		JAY 3	JAY 3 Termorregulador	JAY 3 Carbono	JAY Fit	JAY Zip
<b>Parches militares</b>		✓	✓	✓		
<b>Pad de Fluido vertebral</b>	Altura de 41, 46, 51 ó 58 cm	✓			✓	✓
<b>Relleno de espuma visco</b>		✓		✓		
<b>Funda interna</b>	Funda interna sellada	✓		✓		
<b>Fundas externas</b>	Resistente a la incontinencia con cremallera	✓		✓		
	X-static con tejido extra-transpirable	✓	✓	✓		
	Microclimática 3DX	✓	✓	✓		
	Dartex Reverse con cremallera Aquaguard (impermeable)	✓		✓	✓	
<b>Bordados personalizados</b>	Tipografía Arial, 1 color, hasta 32 caracteres	✓	✓	✓		✓
<b>Colores en fundas de respaldo</b>	Lima eléctrico ( <i>Electric Lime</i> )	✓	✓	✓		✓
	Gris ( <i>Grey</i> )	✓	✓	✓		✓
	Naranja ( <i>Hunter Orange</i> )	✓	✓	✓		✓
	Azul marino ( <i>Navy Blue</i> )	✓	✓	✓		✓
	Rosa suave ( <i>Pink Sorbet</i> )	✓	✓	✓		✓
	Rosa intenso ( <i>Shocking Pink</i> )	✓	✓	✓		✓
	Turquesa ( <i>Turquoise</i> )	✓	✓	✓		✓
	Burdeos ( <i>University Red</i> )	✓	✓	✓		✓
	Violeta ( <i>Vwery Violet</i> )	✓	✓	✓		✓
	Amarillo fosforito ( <i>Volt yellow</i> )	✓	✓	✓		✓
Camuflaje digital ( <i>Digital camo</i> )	✓	✓	✓		✓	
<b>Carcasas de respaldo en colores</b>	Colores en página 13	✓	✓		✓	✓

## Soportes de brazo y cajas reposapiés

Modificaciones				Soportes de brazo	Cajas reposapiés
	cm	pulgadas			
<b>Soporte palmar en almohadillado de brazo</b>				✓	
<b>Capa adicional de espuma visco</b>				✓	✓
<b>Cincha adicional</b>				✓	✓
<b>Reducción de Altura en Paredes Laterales de Soporte de Brazo</b>	1,25 cm	1/2"		✓	
	2,5 cm	1"		✓	
<b>Eliminación de paredes laterales de soporte de brazo</b>				✓	
<b>Colores</b>	Lima eléctrico ( <i>Electric Lime</i> )				✓
	Gris ( <i>Grey</i> )				✓
	Naranja ( <i>Hunter Orange</i> )				✓
	Azul marino ( <i>Navy Blue</i> )				✓
	Rosa suave ( <i>Pink Sorbet</i> )				✓
	Rosa intenso ( <i>Shocking Pink</i> )				✓
	Turquesa ( <i>Turquoise</i> )				✓
	Burdeos ( <i>University Red</i> )				✓
	Violeta ( <i>Vwery Violet</i> )				✓
	Amarillo fosforito ( <i>Volt yellow</i> )				✓
Camuflaje digital ( <i>Digital camo</i> )				✓	



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)