

Empulse R20

Guida alla Compatibilità



Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio	Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio
Sunrise Medical		Sunrise Medical	
Breezy UniX ²	B	Breezy 300	B
Breezy PariX ²	B	Breezy Style	B
Breezy BasiX ²	B	Breezy Style X / X Ultra	B
Breezy RubiX ²	B	Quickie IRIS	Special
Breezy RubiX ² Comfort	B	Quickie SR45	Special
Breezy HeliX ²	B	Quickie Life	A/B
Breezy HeliX ² Comfort	B	Quickie Life i	A/B
Breezy RelaX ²	B	Sopur Life Eco	A/B
Breezy Cirrus G5	B	Quickie Life T	A/B
Breezy Cirrus G5 Base	B	Quickie Life R	A/B
Breezy Ibis	C	Quickie Life RT	A/B
Breezy Emineo	B	Quickie Easy 200	A/B
Breezy Exigo 10 / 20 / 30	B	Quickie Easy 300	A/B
Breezy Premium	B	Quickie Neon ² (a partire da altezza seduta posteriore 390 mm)	B
Breezy 250	B	Quickie QS5 X	B
		Zippie Youngster 3	B
		Lomax Uni	B
		Lomax Heavy Duty	B

Nota: questa lista fornisce un'indicazione sulle marche e i modelli di carrozzina su cui può essere applicato R20. E' importante ricordare che anno di produzione, forma del telaio, accessori dello schienale, tubi di rinforzo del telaio e accessori della carrozzina potrebbero influenzarne la compatibilità. Per questa ragione è essenziale che la carrozzina sia stata testata completa di R20 per essere sicuri al 100%! La guida alla compatibilità riporta unicamente le carrozzine per cui è stato siglato un accordo ufficiale tra le aziende produttrici coinvolte. In queste pagine trovate le informazioni necessarie per il montaggio di R20.

Empulse R20

Guida alla Compatibilità



Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio	Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio
Meyra		DIETZ	
Service 3.600	B	AS 01**	B
Budget	B	Caneo series (incl. XL)	B
Avanti	B	Tomtar BasiK / BasiK+	B
Avanti Pro	B	Serena II**	B
Solero light	B	PRO ACTIV***	
S3 Swing	B	TRAVELER (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	B
Eurochair family	B	BUDDY (D3, D4, D7)	B
Smart F & S	B	SPEEDY (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	B
Invacare*		ALU REHAB	
Rea Clematis	B	Netti 4U (CE, CE Plus, CED, Base)	B
Rea Azalea Family	B	Netti III (HD, XHD & Dynamic functions (SW 350 – 600 mm))	B
Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B	Netti S (SW 350, 400 mm)	B
Action XT	B	Netti Dynamic S (SW 350, 400)	B
Rea Focus	B	BEROLLKA****	
XLT	B	F1 (frame diameter 30 mm)	B
Drive		B2 (frame diameter 30 mm)	B
Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B	RACER (frame diameter 30 mm)	B
Freetec	B	TRAXX / TRAXX TT (frame diameter 23 mm)	B
Ecotec / Ecotec 2G	B	TOURER / CRUISER (frame diameter 25 mm)	B
Rotec / Rotec XL	B	SLADE SLT / AR	B
Vassilli		SPRINT SLT / AR	B
VARIO Plus	B	BASIC	B
Bischoff & Bischoff		FINESS	B
S-Eco 300 / S-Eco 300XL	B	Filou	B
S-Eco 2	B	Junior 2 SLT / AR	B
Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL	B	Findus	B
Pyro Light / Pyro Light XL	B	Little AR / SLT	B
Pyro Start / Pyro Start Plus	B	LUKE AR / SLT	B
BX 11	B		

Nota: questa lista fornisce un'indicazione sulle marche e i modelli di carrozzina su cui può essere applicato R20. E' importante ricordare che anno di produzione, forma del telaio, accessori dello schienale, tubi di rinforzo del telaio e accessori della carrozzina potrebbero influenzarne la compatibilità. Per questa ragione è essenziale che la carrozzina sia stata testata completa di R20 per essere sicuri al 100%! La guida alla compatibilità riporta unicamente le carrozzine per cui è stato siglato un accordo ufficiale tra le aziende produttrici coinvolte. In queste pagine trovate le informazioni necessarie per il montaggio di R20.

*Solo con freni a tamburo **Sistema di aggancio B, con morsetto di 30 mm (codice 07501106) ***Per l'applicazione dell'unità di comando potrebbero essere necessarie maniglie di spinta più lunghe ****Solo con ruote antiribaltamento, senza coperture e senza scatola accessori

Empulse R20

Guida alla Compatibilità



Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio	Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio
Vermeiren*****		Etac	
D100, D100 (30°)	B	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	Special
D200, D200 (30°)	B	M 100	B
V200D	B	Crissy	B
V300D, V300D (30°), V300DL	B	Prio, Prio 3D	B
V500 (30°)	B		
Eclips+, Eclips+ (30°)	B	SORG	
Eclips X4, Eclips X4 (30°)	B	Vector	B
Bobby	B	Vector BSA	B
Inovys II, Inovys II-E	B	Jump alpha	B
		Jump beta Sport	B
		Jump beta BSA	B
REHATEC		Tilty Vario	B
Galileo (Size 1, 2, 3, 4, 5)	B		
Sunny (Size 2)	B		
Mika (Size 1)	B		
HOGGI*			
SHERPA	A		
SWINGBO-VTi, SWINGBO-VTi XL	A		
SWINGBO-2; SWINGBO-2 XL	B		
BINGO-Evo	B		
DURO, DURO CROSS	B		

Nota: questa lista fornisce un'indicazione sulle marche e i modelli di carrozzina su cui può essere applicato R20. E' importante ricordare che anno di produzione, forma del telaio, accessori dello schienale, tubi di rinforzo del telaio e accessori della carrozzina potrebbero influenzarne la compatibilità. Per questa ragione è essenziale che la carrozzina sia stata testata completa di R20 per essere sicuri al 100%! La guida alla compatibilità riporta unicamente le carrozzine per cui è stato siglato un accordo ufficiale tra le aziende produttrici coinvolte. In queste pagine trovate le informazioni necessarie per il montaggio di R20.

*Contattare HOGGI per maggiori informazioni

*****Solo con ruote antiribaltamento

Empulse R20

Sistema di aggancio/sgancio


Il propulsore di spinta pieghevole R20 si applica facilmente a quasi tutte le carrozzine manuali che abbiano le seguenti caratteristiche:

Telaio chiuso con tubi a sezione circolare da 22 a 28 mm. Per tubi di diametro di 30 mm è necessario ordinare un kit speciale aggiuntivo.


Larghezza della seduta 320 - 600 mm

Altezza posteriore della seduta > 380 mm


Maniglie di spinta lunghe o regolabili in altezza per applicare l'unità di comando— spazio minimo libero di 10 mm.

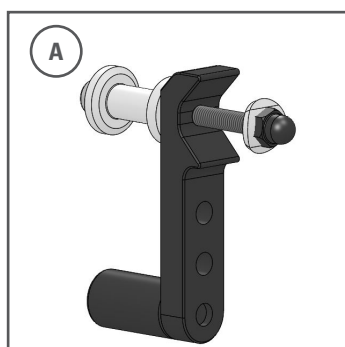

A Versione con vite:
E' necessaria la presenza di un foro nel tubo orizzontale del telaio. Normalmente viene utilizzata per le carrozzine superleggere di Sunrise Medical (Easy 200/300/Life/Life i/Life Eco). Per le carrozzine Breezy della famiglia X-Family come PariX², BasiX², RubiX², HeliX² e HeliX² Comfort, è necessario riposizionare la clip della crociera.

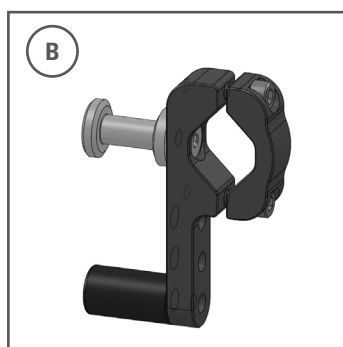


B Versione con morsetto:
Il morsetto deve essere applicato al tubo più basso del telaio. Normalmente viene utilizzata per tutte le carrozzine. E' standard per le carrozzine Breezy ad esclusione della Breezy Ibis.

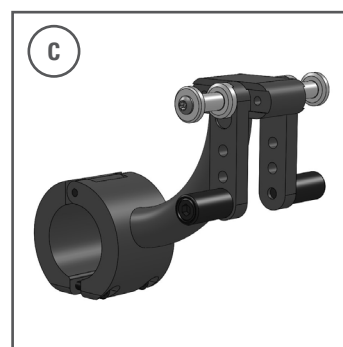

C Versione con morsetto solo per Breezy Ibis:
Il morsetto deve essere applicato al centro del tubo più basso del telaio.


Assemblaggio delle carrozzine manuali Breezy della famiglia X-Family con R20

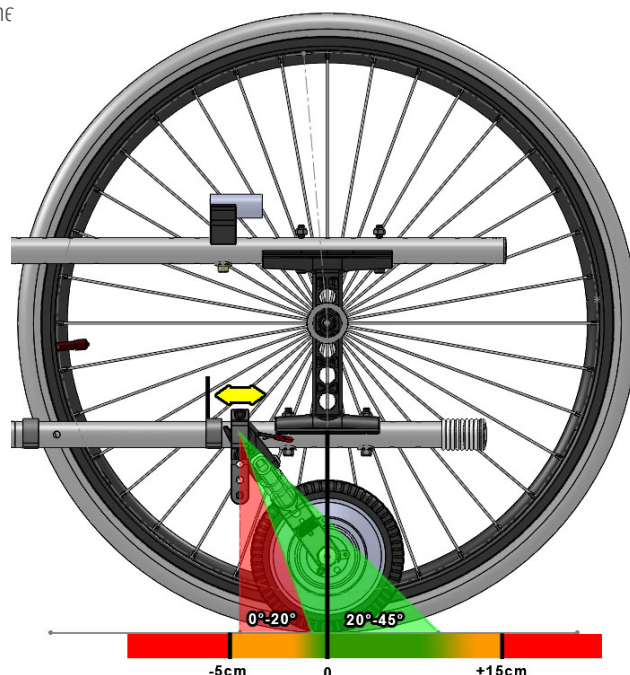

Matrice braccetto d'aggancio R20

A: Altezza posteriore seduta (mm)
B: Distanza tubo telaio – terreno (mm)

A	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	540	560
B	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	275	295
320						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
330						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
340					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
350					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
360				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
370				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
380			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
390			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
410			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
420						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
430						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
440				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
450				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
460			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
470			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
480		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
490		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
500		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
510		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
520		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
530		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
540		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
550		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
560		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
570		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
580		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
590		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
600		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		

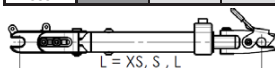

XS = 206 mm
S = 236 mm
L = 276 mm