

MONTERINGSANVISNING

Enhandsbroms



Beskrivning


Enhandsbroms höger/vänster

Art. nr




9012049

GEMINO

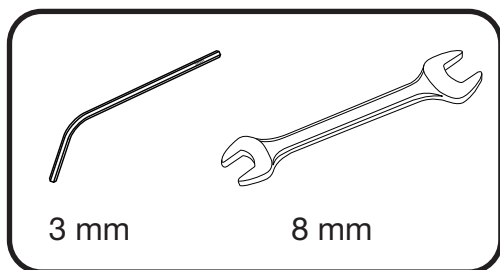



Släpp lite på bromsarnas vajrar på båda sidor.

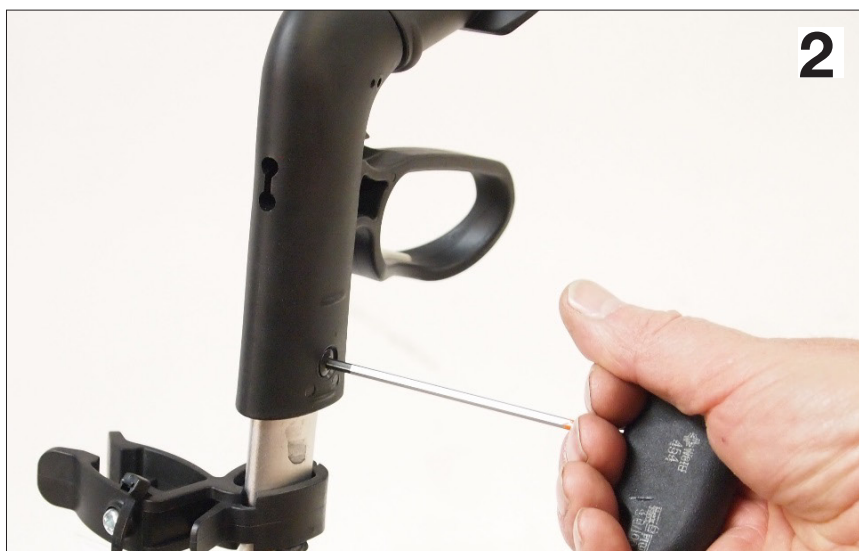


Ta bort de två skruvarna på handtaget.



Skruva fast fästet med medföljande skruvar.

4

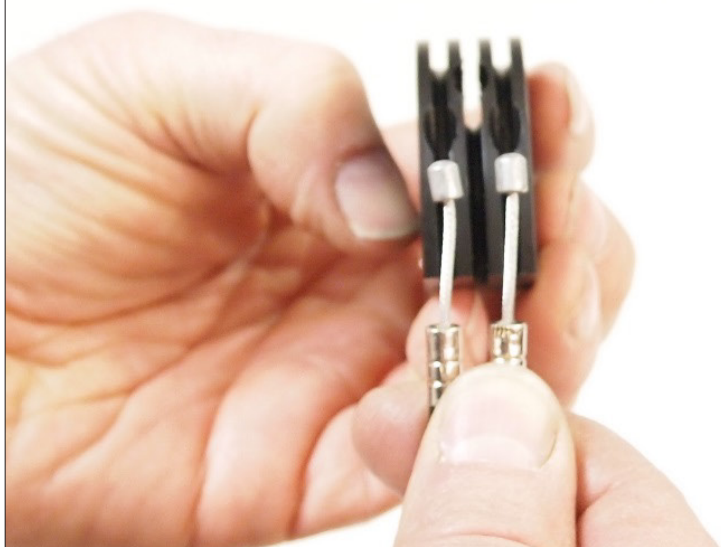


Fäst vajrarna inne i plasthjulet.

5




För in pinnbulten i bromshandtaget.

6

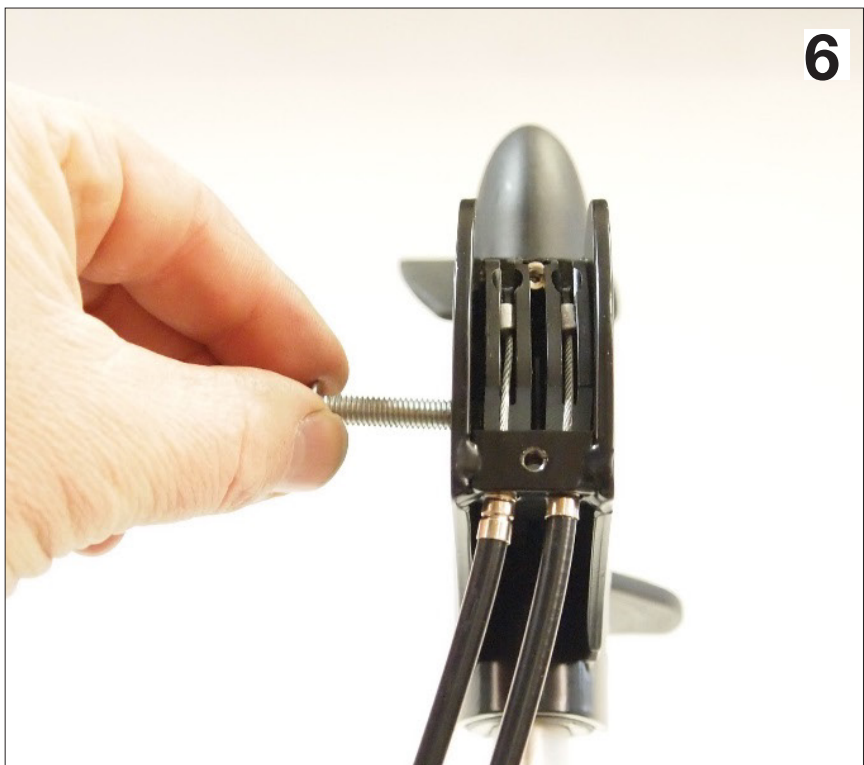

Sätt in plasthjulet i fästet med skruven och dra åt.

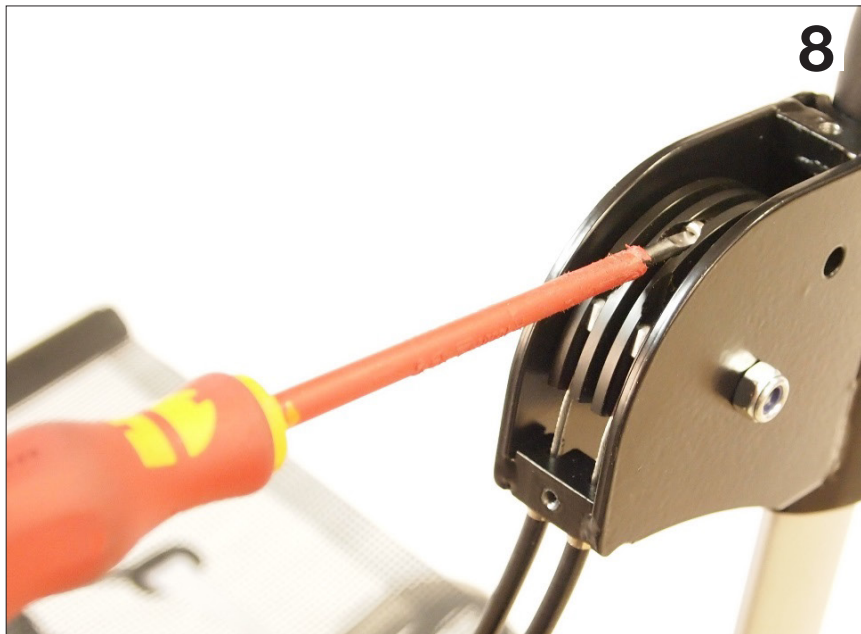

Skruva fast muttern på pinnbulten.
OBS. Fäst med Loctite.



Se till att allt är på plats
och löper smidigt.



Dra åt vajrarna på båda sidor.



Sätt på locket.
Säkerställ att båda bromsarna tar lika
mycket och att parkeringsbromsen
fungerar.



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu