

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS

1. Avertissement

1.1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.

1.2 Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

1.3 Ne chargez pas les batteries non rechargeables.

1.4 Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance. (Utilisez des serviettes sèches pour retirer la poussière de la surface extérieure, Il est impératif de faire appel à un personnel professionnel pour la maintenance)

1.5 Vérifiez régulièrement le chargeur de la batterie pour identifier tout dommage physique, en particulier au niveau des cordons d'alimentation, de la fiche et du boîtier. Si le chargeur est endommagé, il ne doit pas être utilisé tant que les dommages n'ont pas été réparés correctement.

1.6 En raison de la haute tension, si le chargeur est endommagé ou non rechargeable, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté. Ne tentez pas de démonter vous-même le chargeur.

1.7 Ce chargeur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur ou dans des endroits secs. N'utilisez pas le chargeur dans des environnements à haute température, humides, inflammables ou explosifs.

1.8 Débranchez l'alimentation avant d'effectuer ou de couper les connexions de la batterie.

1.9 RISQUE D'ÉLECTROCUTION. Insérez la fiche uniquement dans une prise appropriée. Si elle n'est pas adaptée, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée. Ne changez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

1.10 AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde sur le chargeur de batterie, la batterie et le

N° : A0

produit utilisant la batterie.

1.11 AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures, chargez uniquement les batteries rechargeables de type plomb-acide/Li-ion. D'autres types de batteries peuvent éclater et causer des dommages corporels et matériels.

1.12 AVERTISSEMENT : Réservé à un usage intérieur. N'exposez pas le chargeur à la pluie.

1.13 AVERTISSEMENT : Risque de blessure - Gardez les enfants hors de portée de l'appareil pendant son fonctionnement.

1.14 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS- Ce manuel contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation pour les modèles de chargeurs de batterie **STC-6151LB, STC-6151PB**.

1.15 DANGER : Risque d'électrocution ! Ne touchez pas la partie non isolée du connecteur de sortie ou la borne de la batterie non isolée.

1.16 Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces instructions et celles qui sont indiquées sur la batterie..

1.17 Ne fumez jamais et ne laissez jamais des étincelles ou des flammes nues à proximité de la batterie ou du moteur.

1.18 Ne chargez jamais une batterie gelée.

1.19 S'il est nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la charger, débranchez toujours d'abord la prise secteur de la batterie. Assurez-vous que tous les accessoires du véhicule sont éteints afin d'éviter un arc électrique.

1.20 Étudiez toutes les précautions spécifiques du fabricant de la batterie telles que le retrait ou non des bouchons des cellules pendant la charge et les taux de charge recommandés.

1.21 Pour un chargeur équipé d'un commutateur de tension de sortie, reportez-vous au manuel d'utilisation du fauteuil roulant afin de déterminer la tension de la batterie et de vous assurer que la tension de

sortie est réglée à la tension correcte. Si aucune tension de sortie n'est fournie. N'utilisez pas le chargeur de la batterie à moins que la tension de la batterie ne corresponde à la tension nominale de sortie de la charge.

1.22 Ne placez jamais le chargeur directement au-dessus ou en dessous de la batterie en état de charge : les gaz ou les fluides dégagés par la batterie créeront de la corrosion et endommageront le chargeur. Placez le chargeur aussi loin de la batterie que les câbles le permettent.

1.23 L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont limitées ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions.

1.24 N'utilisez pas le chargeur dans un endroit fermé et ne restreignez en aucun cas la ventilation.

1.25 Connectez et déconnectez les clips de sortie CC uniquement après avoir réglé les interrupteurs du chargeur sur la position Arrêt et retiré le cordon d'alimentation de la prise électrique. Ne laissez jamais les clips se toucher.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2. SPÉCIFICATIONS

MODÈLE : STC-6151PB, STC-6151LB

ENTRÉE : 100-240VAC, 50-60Hz,1,7A

SORTIE CC : +24 V/5 A

Fusible (fusible interne) : T 3,15 A/250 V

3. APPLICATION

Ce chargeur est applicable à une batterie plomb-acide/Li-ion de 24 V (7 cellules, 3,6 V/cellule, 6-30 AH).

4. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

4.1 Ce chargeur présente les caractéristiques suivantes : protection contre le reflux, protection contre l'inversion de batterie, protection contre les surtensions, protection

N° : A0

contre les courts-circuits de sortie, etc. Ces fonctions peuvent protéger le chargeur contre les dommages.

4.2 Application : Il est utilisé pour charger le scooter de mobilité pour personnes âgées ou fauteuil roulant.

5. COMMENT UTILISER CE CHARGEUR

5.1 Branchez correctement la batterie sur le chargeur, puis branchez le chargeur dans la prise de courant.

5.2 Lorsque le chargeur est inutilisé ou lorsque la charge est terminée, veuillez débrancher la prise de courant, puis retirez la batterie.

5.3 Lorsque le chargeur est rangé, assurez-vous qu'il se trouve dans un endroit sec, à l'abri du feu, de températures élevées et de l'humidité.

6. TÉMOINS À LED

6.1 En mode veille, lorsque la fiche d'alimentation est insérée dans la prise de courant sans que la batterie soit connectée au chargeur, le voyant orange du CHARGEUR (LED) est toujours allumé et le voyant vert clignote.

6.2 Lorsque deux voyants lumineux du CHARGEUR (LED) s'allument en orange, le chargeur passe en mode Chargement.

6.3 Lorsque le voyant orange du CHARGEUR (LED) et le voyant vert restent allumés en permanence, la batterie est complètement chargée.

7. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

7.1 Température de fonctionnement : 0°C à +40°C Température de transport et d'entreposage : -40°C à +55°C

7.2 Humidité Lorsque le chargeur fonctionne : 20 % ~ 85 %. Humidité d'entreposage du chargeur : 10 % ~ 95 %.

7.3 Pression atmosphérique : (50 à 100) kPa.

7.4 Niveau de protection : IPX4.

7.5 Durée de vie prévue : 3 ans.

N° : A0

8. MARQUAGE DE PRODUCTION



8.1 Indique une double isolation du produit.



8.2 Cela signifie que le produit ne peut être mis à la poubelle et polluer l'environnement.




8.3 Cette marque est conforme aux lois et réglementations de l'UE et est une marque de certification de sécurité.




8.4 : Cette marque est délivrée par la Rhénanie, en Allemagne, et respecte les lois et règlements de l'Allemagne et de l'Union européenne. Dans l'ensemble du processus de certification de la machine, tous les composants qui obtiennent la marque TUV peuvent être exemptés de l'inspection.



8.5 : Ce signe est conforme aux lois et règlements des États-Unis et du Canada.

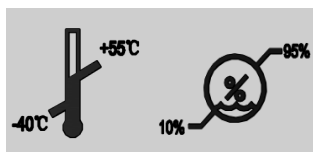

8.6 : Conditions de transport et d'entreposage.

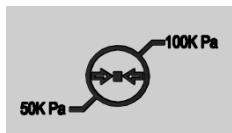

8.7 : Pression atmosphérique : (50 à 100) kPa

8.8 **IPX4** : Évitez toute infiltration d'eau par éclaboussure.

Déclaration : Une fois le connecteur CA branché, le dispositif est conforme à l'indice de protection IPx4.

9. SERVICE APRÈS-VENTE

9.1 TEL : 0512-36697353

N° : A0

9.2 FAX : 0512-57952998