



QUICKIE Life i Sedo



QUICKIE Life i Tilt

MODULAIR

EEN WERELD VOL INDIVIDUELE MOGELIJKHEDEN

De Life i Sedeo moedigt aan om optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Dus zo lang mogelijk actief blijven en zelfstandig zijn.

De Life i Sedeo is een lichtgewicht, licht rijdende, modulaire rolstoel die maximaal comfort geeft en aansluit op de persoonlijke functie-eisen van de cliënt. Het bekende Sedeo Pro positioneringssysteem zorgt ervoor dat er comfortabel gezeten kan worden met de gewenste ondersteuning. Het aluminium frame van de Life i Sedeo staat bekend om zijn lichte rij-eigenschappen en opvouwbaarheid, waardoor deze rolstoel eenvoudig is mee te nemen. Zijn modulariteit maakt het mogelijk om de rolstoel helemaal in te stellen aan de wensen en behoeften van de cliënt. Daarnaast is de Life i Sedeo makkelijk herinzetbaar, waardoor de rolstoel enorm duurzaam is door zijn lange levensloop.



LICHTGEWICHT

DE NOODZAAK VAN LICHT RIJDEN

Uit verschillende onderzoeken^{1,2,3} komt naar voren dat er bij de keuze van een rolstoel er geprobeerd moet worden om de hoepelfrequentie en de benodigde kracht voor het hoepelen zoveel mogelijk te minimaliseren. De Quickie Life i Sedeo is een lichtgewicht actief rolstoel waarvan de rij-eigenschappen zeer licht instelbaar zijn. Doordat het bij de Life i mogelijk is om de kantelfunctie optioneel toe te voegen krijgt de cliënt een zeer licht rijdende kantelrolstoel.

1. Medicine CfSC. Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Healthcare Professionals. Paralyzed Veterans of America 2005.

2. Boninger ML, Koontz AM, Sisto SA, Dyson-Hudson TA, Chang M, Price R et al. Pushrim biomechanics and injury prevention in spinal cord injury: Recommendations based on CULP-SCI investigations. J Rehabil Res Dev 2005;42(3 Suppl 1):9-20.

3. RESNA Position on the Application of Ultralight Manual Wheelchairs, March 2012.



MAKKELIJK OM MEE TE TRIPPELEN

Door de lage zithoogte (380-520 mm) van het neuro-frame en de handige hemi-opties, zoals een éénhandige bedienbare rem, hemi-armleggers en wegzwenkbare collegewerkblad, is de Life i Sedeo heel geschikt om mee te trippelen. Zo kan de cliënt zichzelf makkelijk bewegen in welke richting dan ook!



POSITIONEREN

MOGELIJKHEDEN VOOR DE MEEST OPTIMALE ZITHOUDING EN ZITCOMFORT

Het kiezen van het juiste zitkussen en rugleuning is van essentieel belang om een goede zithouding aan te kunnen nemen. Sedeo Pro biedt een uitgebreid assortiment aan comfortabele polsterdelen. Elk met zijn specifieke eigenschappen die tegemoet komen aan de verschillende positioneringsbehoeften van de cliënt. Het zitkussen optimaliseert de drukverdeling en vermijdt schuifkrachten om het risico op decubitus te beperken. De keuze voor de rugleuning wordt vooral bepaald door de individuele positionerings- en ondersteuningsbehoefte.

Naast Sedeo Pro kan er bij de Life i Sedeo ook gekozen worden voor een zitkussen en/of rugleuning van JAY. Hiermee is er altijd een passende zitoplossing voor vrijwel alle functionele stoornissen en beperkingen bij cliënten.

ZITTINGEN

CATEGORIE I

SEDEO PRO | GEPROFILEERD

Comfortabel basiskussen met een lichte zijwaartse ondersteuning en een stevige vlakke basis. De zitting geeft een basale comfortabele zit voor cliënten die geen tot weinig zitproblemen ervaren.



SEDEO PRO | TRAAGSCHUIM

Zitting met lichte zijwaartse ondersteuning en een toplaag van traagschuim wat resulteert in een drukontlasting ter hoogte van de tubers en een meer gelijkmatige drukverdeling.



JAY BASIC

Lichtgewicht zitkussen met een totale hoogte van 48 mm. Het zitkussen verzorgt comfort en is geschikt voor mensen met een minimale noodzaak aan stabiliteit en ondersteuning.

CATEGORIE II

SEDEO PRO | SUPPORT / SUPPORT LOW

De support zitting is opgebouwd uit een gesingelde plank met daarboven een stevige contour bestaande uit zijwaartse ondersteuning, abductieheuvel en een talud. De contour zorgt voor een redelijk stabilisatie van het bekken in alle richtingen. Speciaal voor gebruikers die willen trippelen met hun rolstoel en totale zithoogte belangrijk is, is het support kussen ook beschikbaar in een extra lage uitvoering.



JAY SOFT COMBI P

Dit zitkussen combineert een behoefte van comfort met een noodzaak voor stabilisering en positionering. De gecoate foambasis heeft een contour in zich wat maakt dat de anatomische bilcontour automatisch wordt gevolgd. Het zitkussen is vrij stevig wat maakt dat hij geschikt is voor cliënten die het kussen gebruiken om op af te steunen bij het maken van een transfer aan stabiliteit en ondersteuning.



CATEGORIE III

SEDEO PRO | SUPPORT TR

De opbouw is bijna gelijk aan de Support met het verschil dat de achterzijde van de contour uit traagschuim bestaat. Dit zorgt ervoor dat de tubers verder weg kunnen zakken in de zitting, waardoor het bekken sterker gestabiliseerd wordt in zowel voor-, achter- als zijwaartse richting. De Support TR zitting is geschikt voor cliënten met een hoge behoefte aan bekkenstabiliteit en met een matige risico op decubitus.



JAY BALANCE

Dit zitkussen bestaat uit een stevige contouren schuimbasis opgevuld met een fluid insert. Dit zorgt voor stabilisatie van het bekken en is uitermate geschikt voor transfers met een glijplank. De beschikbare positioneringselementen voegen extra ondersteuning toe aan de zithouding. Ideaal voor cliënten die niet of slecht hun eigen zithouding kunnen aannemen en/of handhaven, een slecht uithoudingsvermogen hebben of een lage zittolerantie.



POSITIONERINGSELEMENTEN

De extra positioneringselementen op de JAY Balance zorgen voor extra zitondersteuning. Deze positioneringselementen bestaan uit ab- en adductiewiggen, dijbeenondersteuning en bekkenscheefstandcorrectors en kunnen samen of los van elkaar gebruikt worden.

RUGLEUNINGEN

CATEGORIE I

EXO EVO

Deze EXO EVO rugbekleding bestaat uit spanbanden direct om de rugbuizen met daar overheen een zachte polstering. De spanbanden geven de mogelijkheid om de curvatuur van de rug volledig te volgen. Het is mogelijk om ruimte te creëren voor de billen en door middel van ondersteuning op de bekkenrand een bekkenkanteling achterover te voorkomen.

SEDEO PRO | GEPROFILEERD (MET SPANBANDEN)

Een comfortabele rugleuning met een lichte zijwaartse ondersteuning. Optioneel uitgerust met spanbanden zodat de dorsale ondersteuning ingesteld kan worden en het bekken met ondersteuning gepositioneerd kan worden.



EXO EVO RUGBEKLEDING

De EXO Evo is ontworpen voor zowel comfort als ademend vermogen. De geribbelde rondingen zorgen ervoor dat lucht makkelijk kan doorstromen en de gecompriëerde Evazote-stof is licht van gewicht en comfortabel.

CATEGORIE II

SEDEO PRO | SPANBANDEN FLEXIBEL

Deze rugleuning is voorzien van spanbanden en heeft een volledig flexibele basis. De zijwangen van deze rugleuning bevinden zich alleen op de onderste helft van de rugleuning, zo biedt de rugleuning wel veel laterale stabiliteit maar behoudt de cliënt de vrijheid om de armen te bewegen om bijvoorbeeld te hoepelen of te breien. Deze rugleuning is geschikt voor cliënten met een grote behoefte aan ondersteuning. De cliënt heeft over het algemeen een lage zitbalans en een sterk beperkte rompstabiliteit. Deze rugleuning is te bestellen met comfort- of incontinentiebekleding





CATEGORIE III

JAY J3 MID CONTOUR

Deze rugleuning is opgebouwd uit een aluminium rugschaal met daaroverheen een comfortabele schuimlaag met een ademende hoes. De positie kan nauwkeurig in hoogte, hoek en diepte worden ingesteld. Hiermee kan een specifieke steun geboden worden op dat punt van de rug waar steun nodig is. De Mid Contour kenmerkt zich door een lichte contour van 80 mm. Zo wordt er lichte laterale steun geboden, terwijl de rugleuning activiteiten zoals het hoepelen niet hindert.



INDIVIDUELE PASVORM MET DE JAY J3 RUGLEUNINGEN

Voor de juiste ondersteuning en optimale zitcomfort moet een rugschaal de individuele rugvorm kunnen volgen. Op basis van deze behoeften zijn de JAY J3 positioneringcomponenten ontworpen. Dit zijn extra te bestellen onderdelen die eenvoudig toegevoegd, verplaatst en eventueel weer verwijderd kunnen worden.

Met behulp van deze onderdelen kan de ideale pasvorm nog beter worden bereikt.





JAY J3 DEEP CONTOUR

De opmaak van deze rugleuning komt sterk overeen met de JAY J3 rugleuning met Mid Contour rugschaal. De Deep Contour rugschaal kenmerkt zich door een contour van 150 mm. Zo wordt er grotere laterale steun geboden. De opbouw van de laterale ondersteuning is zo slank dat de rugleuning activiteiten zoals hoepelen niet in de weg zit.



MEER BEWEGINGSVRIJHEID

Met een rugleuning van JAY kan je meer bewegingsvrijheid ervaren door de smalle zijwaartse ondersteuning. Deze vrijheid zorgt ervoor dat je makkelijker zelf kan hoepelen.



Scan the QR code om alle zitkussens en rugleuningen van JAY te bekijken.

INSTELMOGELIJKHEDEN

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

De cliënt staat altijd centraal! De Quickie Life i Sedeo is een rolstoel die voorziet in de mobiliteitsbehoefte voor mensen die permanent een rolstoel moeten gebruiken, maar ook de wens hebben om zelfstandig verschillende activiteiten te blijven doen. De grootste factor voor zelfstandigheid is over het algemeen mobiliteit, de mogelijkheid hebben om te gaan waar je maar wilt. De gekozen rolstoelinstellingen, zoals de zithoogte, het zwaartepunt en de ergonomische hoogte van de schouders tot aan de hoepels is daar een belangrijk onderdeel in.



Efficiënt rijden met de rolstoel

De zithoogtes en het zwaartepunt zijn instelbaar. De zithoogte achter van de Life i Sedeo kan worden ingesteld van 370 tot 510 mm. De zithoogte voor heeft een instelbereik van 380 tot 520 mm, om zo makkelijker met de rolstoel te trippelen. Daarnaast is het zwaartepunt in te stellen van -50 tot +50 mm. Hiermee kan de Life i Sedeo ideaal uitgebalanceerd worden en aan de functionele eisen van de cliënt voldoen.





KANTELVERSTELLING (OPTIE)

Naast het zelfstandig hoepelen is het ook belangrijk om andere handelingen en activiteiten zelfstandig uit te voeren vanuit de rolstoel. Wanneer het energieniveau gedurende de dag niet even hoog is, is het mogelijk om de Life i Sedeo te voorzien van een kantelverstelling. Dit geeft de mogelijkheid om het gewenste activiteitsniveau af te wisselen met een aangepaste zithouding. Na een periode van rust kan de cliënt weer allerlei activiteiten uitvoeren.

Met de kantelmodule zal de rolstoelbreedte van de Life i Sedeo met 30 mm verbreden aan beide kanten.



VITALITEIT

VITALITEIT IS VAN GROOT BELANG, ONGEACHT LEEFTIJD OF MOBILITEIT

Het betekent actief blijven op een manier die past bij het leven van de cliënt. Het is belangrijk om elke dag de tijd te nemen om te bewegen, aangepast aan de mogelijkheden en het comfort van de cliënt.



BLIJF IN BEWEGING!

Voor cliënten die in een rolstoel zitten, blijft bewegen essentieel om fysiek en mentaal fit te blijven. Regelmatig bewegen helpt de bloedsomloop te verbeteren, spierkracht te behouden en stijfheid te verminderen. Zelfs eenvoudige oefeningen, zoals het bewegen van armen en bovenlichaam, kunnen een groot verschil maken. Daarnaast stimuleert het actief blijven de mentale gezondheid, vermindert het stress en bevordert het een gevoel van welzijn.

VEILIG VERVOEREN

SUCCESVOL GECRASHTEST



De Life i Sedeo en Life i Tilt zijn beiden succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem. Dit betekent dat de rolstoel veilig gebruikt kan worden als zitplaats in een motorvoertuig. Uiteraard adviseren wij altijd dat de persoon in de rolstoel gebruik maakt van een reguliere autostoel in het voertuig, omdat deze de meeste veiligheid biedt door zijn ontwerp.




TAXI-FIXATIESYSTEEM

De bevestigingspunten op de rolstoel worden aangegeven met het haaksymbool. De rolstoel moet zoveel mogelijk in een rechtop/zittende houding geplaatst worden tijdens het vervoeren.

ELEKTRISCHE ROLSTOELAANDRIJVING

Wanneer het rijden met de Life i Sedeo uiteindelijk toch te zwaar is dan is deze rolstoel goed te combineren met de verschillende rolstoelaandrijvingen van EMPULSE. Zo kan de cliënt altijd zelf gebruik blijven maken van zijn vertrouwde rolstoel. Als het duwen te zwaar gaat worden voor de partner of begeleider, dan is het ook mogelijk om de Life i Sedeo te combineren met de EMPULSE R20 elektrische duwondersteuning.

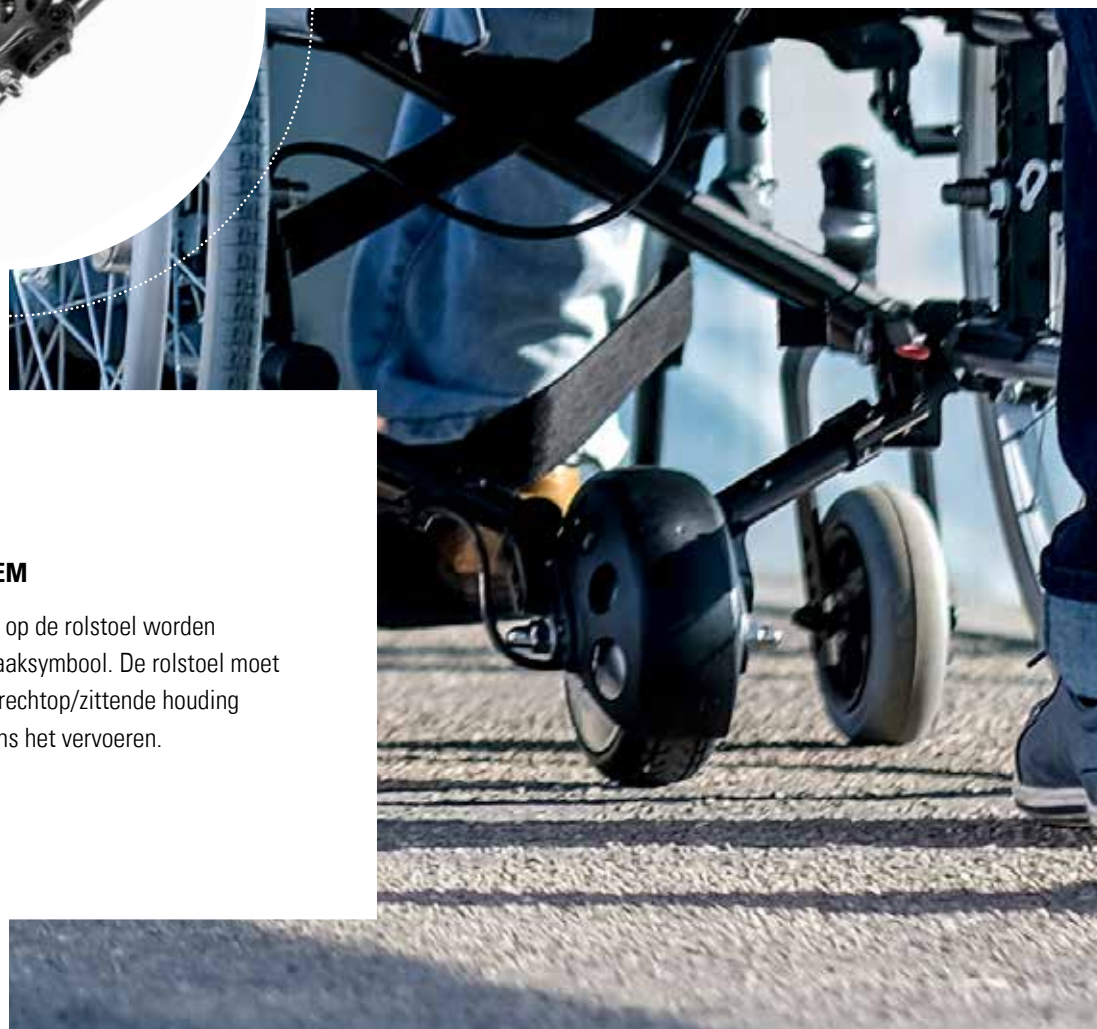

SPECIFICATIES

Zitbreedte	380 - 540 mm
Zitdiepte	360 - 540 mm
Zithoogte - voor	380 - 520 mm
Zithoogte - achter	370 - 510 mm
Rughoogte	500 mm
Rughoekinstelling	-5° - +25°
Kantelverstelling	0° - 20°
Zithoek	0 - 110 mm
Onderbeenlengte	370 - 500 mm
Beensteunen	70°, 80° en Comfort
Zwaartepuntinstelling	-50 - +50 mm
Camber	0°
Voorwielen	5" of 6"
Achterwielen	22" of 24"
Gewicht rolstoel (vanaf)	12,3 kg
Gewicht kantelmodule	4,8 - 5 kg
Transportgewicht (vanaf)	8 kg
Maximale gebruikersgewicht	140 kg
Crashtest (ISO 7176-19)	Ja

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen we je naar de prijslijst.

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

Als je een visuele beperking hebt, kan je dit document in pdf-formaat bekijken op www.sunrisemedical.nl/QUICKIE/LIFE-I-SEDEO.

De QUICKIE LIFE I SEDEO en QUICKIE LIFE I TILT zijn succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

