



Empulse F55

Vekter art. nr: 47611000

TILLEGG TIL
BRUKERVEILEDNING

Empulse

Tillegg til brukermanualen for Empulse F55 ved bruk av vekter (art. nr: 47611000)

NB: Dette dokument er et tillegg til brukermanualen for Empulse F55. Les og forstå innholdet i dette tillegget før vektene tas i bruk. Ved å følge instruksene i dette tillegget vil du minimere risikoen ved bruk av vekter på Empulse F55.

Les monteringsanvisningen som kommer sammen med vektene og monter vektene i henhold til denne. Vær etterrettelig ved montering da det kan medføre fare for bruker/omgivelsene dersom ikke monteringen utføres korrekt.



I forkant av tur:

Påse at festene til vektene er riktig montert (ref. monteringsanvisningen). Ved tegn på at fester ikke sitter ordentlig fast, se monteringsanvisningen og fest dem slik de sitter ordentlig.

Kontroller at vektene sitter fast på riktig måte og at begge slissene i vektene er ført inn i festene. Kontroller at vektene er ført inn helt til bunnen av sporene og at de ikke kan beveges rett oppover.

Etter endt tur:

Kontroller at festene sitter stramt til i gaffelfestene. Det er spesielt viktig å kontrollere det nedre festet da dette i tillegg til å holde vektene, også fester akselen til hjulet på Empulse F55. Dersom disse festene løsner, kan drivhjulet falle av.

Ved sving:

Når vektene er montert kan det oppleves litt tyngre å svinge tilbake styret på Empulse F55 etter en krapp sving. Gjør deg kjent med hvordan Empulse F55 med vekter oppfører seg, i lav hastighet og i trygge omgivelser, før du begynner å kjøre i høyere hastigheter, blant folk eller i trafikken.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no