

MONTERINGSANVISNING

Vekter




Beskrivelse

Vekter Empulse F55 14"

Artikkelnummer

47611000

Empulse

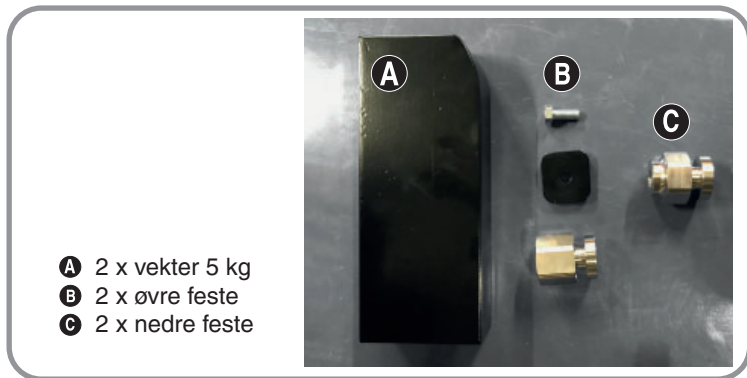

Nedre feste

NB: monter vekten på ene siden av F55 først.


Løsne festeboltene som holder drivhjulet ved hjelp av en 19 mm fastnøkkel.
Ta vekk mutteren.




NB: Viktig å la tannskiven sitte igjen på akselen.



Skrut til det nedre festet med hånden.

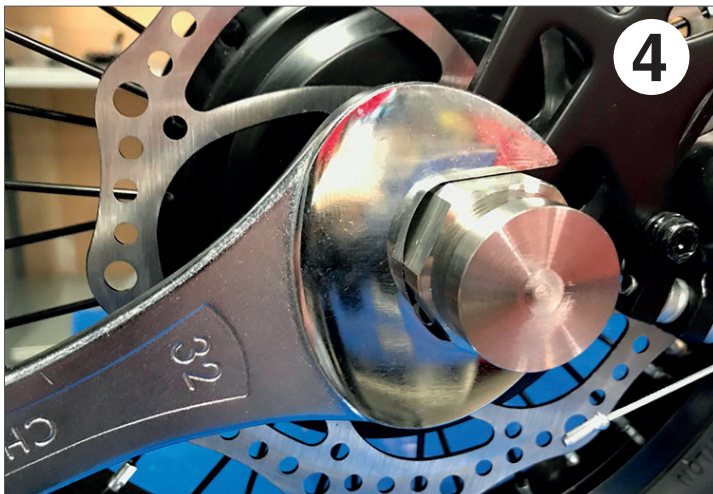


Dra til med en 32 mm fastnøkkel, moment 40 Nm..

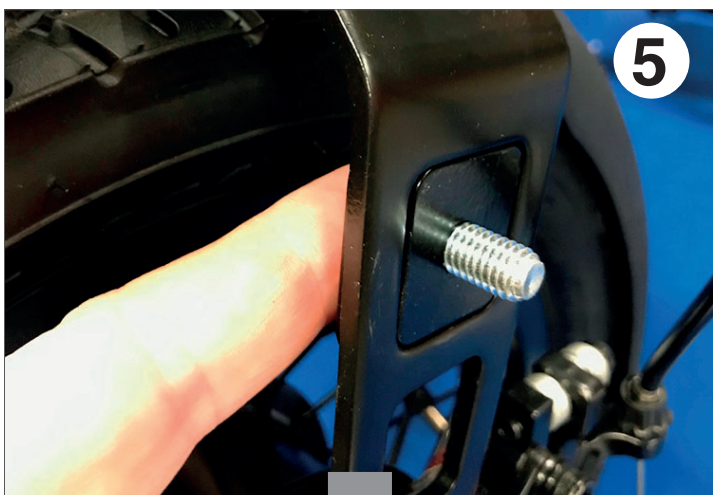


Øvre feste

Sett inn skruen i stoppskiven og sett inn den fra innsiden av det øverste hullet i gaffelen. Se til at skiven ligger riktig slik den passer i hullet i gaffelen. Hold den på plass med et finger.

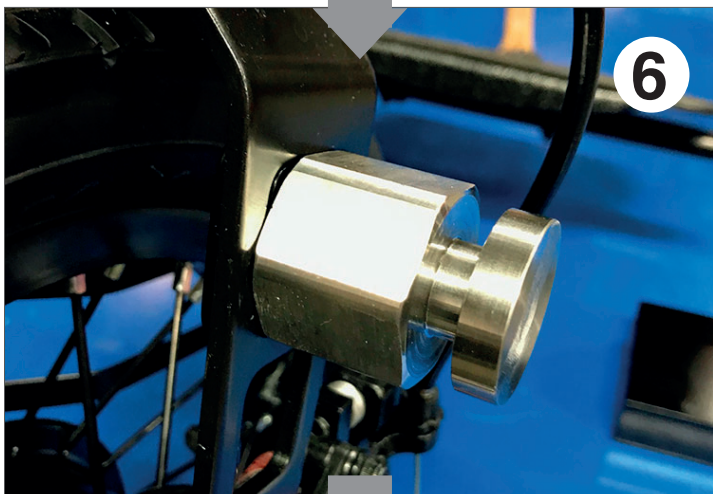

Skru til det øvre festet med hånden samtidig som du holder skruen på plass.

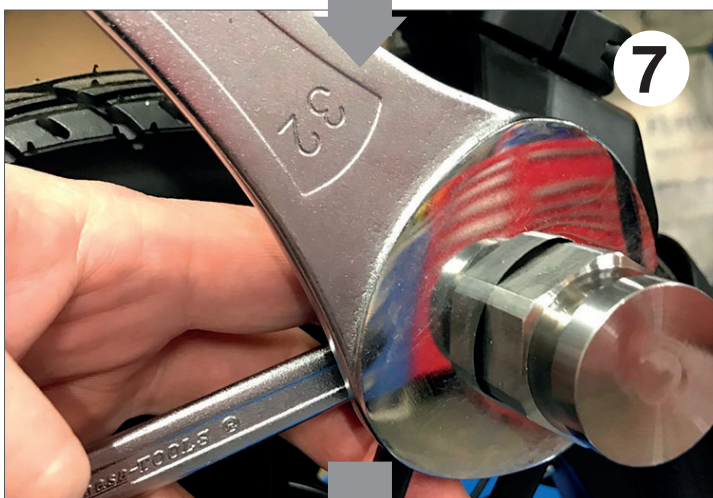

Hold igjen med en 13 mm fastnøkkel på innsiden og dra til med en 32 mm fastnøkkel slik bilde 7 viser, moment, 20 Nm.



Slik ser det ut når festene er montert på den ene siden av gaffelen



Vektene har to spor (se bilde 9). Det buede sporet skal være oppover og festes i det øvre festet.



Pass til sporene i vekten til festene og slipp ned vekten til den stopper.

For å demontere vekten, ved f.eks transport, løft den opp og ut av sporene.

Gjør nå på samme måte på den andre siden av gaffelen.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no