



Kinetic Balance

Raindek Raider

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned til føttene mot regnvær og kaldt klima utendørs. Produktet kompletteres med eget fottøy. Benyttes når tilleggsutstyr til rullestolen skal monteres i front mellom bena.

Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget. Du kan forbli sittende i stolen under hele prosessen.

Benytt de funksjonelle glidelåsene på hvert ben for å åpne posen i fotenden og plasser ben. Lukk glidelås slik at posen omslutter hvert ben. Varmeposen festes rundt livet ved hjelp av spennen. Stram til etter eget ønske. Det er lange reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at festespennen kan plasseres i siden. Fest i knehasen ved hjelp av spennen og stram til etter ønske. Sørg for at sidestykkene dekker hoftene på begge sider. For ytterligere reguleringer kan du benytte snorstrammer i midje og på hver side.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

Daglig renhold:

Tørk over varmeposen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester.

Maskinvask 30°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: GEO TECH ® Storm 3. 100% polyester.

Pustende, vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH₂O.

Fyll: Thermolite® T3/T-Down

Resirkulerte fibre, pustende, svært god isoleringsevne, lav egenvekt, gode egenskaper i forhold til kompresjon. Produsert av 100% resirkulert PET fibre. Utviklet som erstatning for dun.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside	Livvidde
KBRDRAD.BLK.001	XS/S	Svart	91cm	44cm	fra 60-116cm
KBRDRAD.BLK.003	M	Svart	96cm	46cm	fra 60-126cm
KBRDRAD.BLK.005	L/XL	Svart	102cm	50cm	fra 66-136cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

