



Kinetic Balance

Raincape Junior

BRUKERVEILEDNING



KINETIC BALANCE

Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukeres overkropp og framside av ben og føtter mot regnvær utendørs.

Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget.

Regncapen tas over hodet og føres ned over armer og overkropp. Før armene på plass i ermene. Fotenden trekkes rundt føttene. Hette reguleres med velcro.

Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk, glidelås og velcro.

Daglig renhold:

Tørk over regncapen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 40°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



Tekniske spesifikasjoner

Yttermateriale: GEO TECH STORM 3. 92% polyester, 8% elastan
Pustende, vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH₂O.

Forsterket med Cordura® på innsiden av ermene og på delen som går under føttene for økt holdbarhet.

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside
KBRCJO.104	104	Orange	97cm	42cm
KBRCJO.116	116	Orange	100cm	45cm
KBRCJO.128	128	Orange	104cm	48cm
KBRCJO.140	140	Orange	104cm	51cm
KBRCJO.152	152	Orange	109cm	54cm
KBRCJB.104	104	Blå	97cm	42cm
KBRCJB.116	116	Blå	100cm	45cm
KBRCJB.128	128	Blå	104cm	48cm
KBRCJB.140	140	Blå	104cm	51cm
KBRCJB.152	152	Blå	109cm	54cm

Garanti: Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

