



# Kinetic Balance

## Raindek Long Parka

BRUKERVEILEDNING



**KINETIC BALANCE**

## Tiltenkt bruksområde

Produktet er ment brukt til å beskytte rullestolbrukere fra livet og ned til føttene mot regnvær og kaldt klima utendørs. Produktet kompletteres med eget fottøy.

## Bruk

Hvordan vi velger å kle på oss vil variere, blant annet ut fra muligheter og preferanser. I denne bruksanvisningen finner du et forslag, som også forteller om de ulike mulighetene i plagget. Du kan forbli sittende i stolen under hele prosessen.

Benytt de funksjonelle glidelåsene for å åpne posen i fotenden, valgfritt høyre eller venstre side. Varmeposen festes rundt livet ved hjelp av spennen. Stram til etter eget ønske. Det er lange reguleringsbånd, noe som fasiliterer for at festespennen kan plasseres i siden. Fest i knehasen ved hjelp av spennen og stram til etter ønske. Sørg for at sidestykkene dekker hoftene på begge sider. For ytterligere reguleringer kan du benytte snorstrammer i midje og på hver side.

## Vedlikehold

Kontroller produktet jevnlig for slitasje på trekk og glidelås.

### Daglig renhold:

Tørk over varmeposen med en ren klut og mildt såpevann. Tørk over med fuktig fille for å fjerne såperester. Maskinvask 30°. Må ikke tørkes i tørketrommel.



## Tekniske spesifikasjoner

**Yttermateriale:** 50% Nylon, 50% polyester

Vindtett, vanntett, vannsøyle 10.000 mmH<sub>2</sub>O.

**Fyll:** Thermolite® FL-3E 220gr

Minimum 35% resirkulerte fibre. 220gr tilsvarer 650gr dun

Art.nr.	Størrelse	Farge	Lengde fremside	Lengde bakside	Livvidde
KB.RDL.PAR.BLK.001	XS/S	Svart	92cm	33cm	fra 60-116cm
KB.RDL.PAR.BLK.003	M/L	Svart	94cm	34cm	fra 62-120cm
KB.RDL.PAR.BLK.005	L/XL	Svart	99cm	35cm	fra 74-132cm
KB.RDL.PAR.BLU.001	XS/S	Blå	92cm	33cm	fra 60-116cm
KB.RDL.PAR.BLU.003	M/L	Blå	94cm	34cm	fra 62-120cm
KB.RDL.PAR.BLU.005	L/XL	Blå	99cm	35cm	fra 74-132cm

**Garanti:** Alle Kinetic Balance produkter er nøye kontrollert og testet for å garantere best mulig ytelse. Alle Kinetic Balance produkter garanteres mot fabrikkasjons- og materialfeil i en periode på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at produktet har blitt brukt som tiltenkt. Dersom det oppstår en fabrikkasjons- eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere eller erstatte produktet uten omkostninger for kunden. Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på produktet.

