

ERGOTIP CARE

(IPx6W klassifisert)

BRUKERVEILEDNING



Les nøye gjennom brukermanualen før du tar produktet i bruk.
Vær oppmerksom på alle anvisninger og følg disse.

Maks belastning: 130kg

BRUKERVEILEDNING TIL ERGOTIP CARE



Ergotip Care skal benyttes på et horisontalt underlag – stolen må aldri benyttes på skrånende underlag.

Lad opp stolens batteri før stolen tas i bruk.

Dersom stolen benyttes til pasienttransport, gjelder følgende forholdsregler:

- Stolen/setet må IKKE være tippet framover
- Stolen må være i LAVESTE posisjon
- Utvis største forsiktighet ved transport over terskler og lignende
- Les nøye gjennom brukermanualen før du benytter produktet. Vær oppmerksom på alle anvisninger og følg dem. Oppbevar brukermanualen sammen med stolen.

Maks belastning: 130kg

Ergotip Care er CE-merket, testet og godkjent i henhold til ISO/EN12182:2012.

DU KAN LADE BATTERIET MENS DET SITTER PÅ STOLEN



a. Ta ladestøpselet ut av holderen bak på stolen og sett det i en alminnelig stikkontakt. Ved lading vil en lampe på håndkontrollen lyse. Når batteriet er fulladet, vil lampen lyse grønt.

b. Sett tilbake ladestøpselet i holderen etter endt lading.

c. Lad batteriet SENEST når batteriindikatoren skifter til det nederste av de tre nivåene.



Lading må ikke foregå i våtrom, dersom stolen er våt eller dersom bruker sitter i stolen. **STOLEN MÅ IKKE BENYTTES UNDER LADING!**



OBS! Ved rengjøring av stolen skal motorenes stempler være kjørt HELT inn i «huset».



OBS! Ergotip Care er et hjelpemiddel til profesjonell pasienthåndtering og vi anbefaler at produktet utelukkende benyttes av fagutdannet personale.

BRUKERVEILEDNING TIL ERGOTIP CARE

Betjening av stolen




- 1 HVORDAN STILLE INN SETEHØYDEN:**
Trykk på den øverste av tastene i den øverste firkanten på håndkontrollen og hev stolen opp til ønsket høyde. Slipp tasten igjen. **STOLEN STÅR NÅ FAST I STILLINGEN.**



Trykk på den nederste av de to tastene i den øverste firkanten på håndkontrollen for å senke stolen til ønsket høyde. Slipp tasten igjen. **STOLEN STÅR NÅ FAST I STILLINGEN.**

- 2 HVORDAN TILTE STOLEN BAKOVER:**
Trykk på den høyre tasten i den midterste firkanten på håndkontrollen. Tilt stolen til ønsket stilling. Slipp tasten. **STOLEN STÅR NÅ FAST I STILLINGEN.**

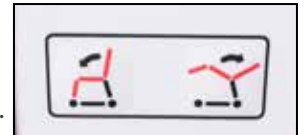

FØR tilt er det viktig å påse at bøtten er skjøvet inn forbi det loddrette rørstykket på opphengsskinnene. Dette sikrer at bøtten ikke sklir ut ved bruk av tilt.

HVORDAN TILTE STOLEN FRAMOVER:
Trykk på den venstre tasten i den midterste firkanten på håndkontrollen. Tilt stolen til ønsket stilling. Slipp tasten. **STOLEN STÅR NÅ FAST I STILLINGEN.**

- 3 HVORDAN LØFTE SETET:**
Trykk på venstre tast i den nederste firkanten på håndkontrollen. Hev setet til ønsket høyde.



HVORDAN LØFTE RYGGSTØTTEN:
Trykk på høyre tast i den nederste firkanten på håndkontrollen. Hev ryggen til ønsket høyde.



Ved forflytning av brukeren til/fra stolen, samt ved bruk av tilt, er det **VIKTIG** at stolens hjul er låst samt at hjulenes bremsepedaler **IKKE** peker inn under stolen!

BRUKERVEILEDNING TIL ERGOTIP CARE



STANS ØYEBLIKkelig DERSOM STOLEN HEVER SEG SKJEVT! Konsulter feilsøkingsskjemaet på www.danrehab.dk eller ring Kundeservice hos Sunrise Medical AS.



Ved forflytning til/fra stolen er det viktig å være spesielt oppmerksom på eventuell tippfare.



STÅ ALDRI PÅ FOTPLATENE!
Dersom brukeren lener seg kraftig framover kan det oppstå tippfare dersom hjulene ikke er låst og bremsespakene ikke peker vekk fra stolen.

Håndtering av armlener



Vær oppmerksom på potensiell klemfare ved nedfelling av armlenet!

Rengjøring og vedlikehold

Ved uvanlige lyder og/eller ujevn motorgang på bruk av tilt **OPPHØRE**. Kontakt en fagmann eller forhandler/producent.

Produktet rengjøres ved hjelp av ikke-etsende rengjøringsmidler. Spyl deretter produktet. Tørk produktet ved hjelp av en myk klut. Kontroller armlener, ryggpute, sete og hjul med jevne mellomrom. Etterstram om nødvendig. Hold hjulene fri for hår etc for å opprettholde optimale kjøreegenskaper.

Bruk av benstøttene



Et par benstøtter består av to høyderegulerbare benstøtter (én til høyre og én til venstre ben).

1. Plasser benstøtten i beslaget som er sveiset på stolens framkant. På hver side av beslaget er det slisser som benstøttens låsepinner glir ned i og dermed låser benstøtten for rotasjon.

2. For å svinge benstøtten ut til siden må du løfte benstøtten ca 1cm loddrett opp – det er lettest om du tar tak i krummingen. Låsepinnene vil da gli ut av slissen og benstøtten kan svinge ut til siden.

3. Benstøtten kan reguleres i lengde ved å fjerne låseklips og deretter trekke eller skyve fotplaterøret til ønsket lengde.

HUSK å sette tilbake benstøttes låseklips etter regulering.

4. Rullenes høyde kan reguleres ved hjelp av fingerskruen på baksiden av rullene.



Ta hensyn til den alltid tilstedeværende klemfaren ved regulering av produktet.



Slissene kan ha skarpe kanter som kan forårsake rifter i huden når benstøttene ikke er montert på stolen.

Nedenfor vises hvordan løft av rygg eller løft av setet vil påvirke hvilke deler av kroppen som frigjøres.
Bilde 1 viser hevet rygg og vil fristille lår delen. Bilde 2 viser løft av seteflaten og dette vil føre til fristilling av nedre del av ryggen.



1



2

Garanti

DENNE GARANTIEN VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE PÅVIRKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

Sunrise Medical gir sine kunder en garanti, slik beskrevet i garantibetingelsene, for rullestolen. Garantien dekker følgende.

Garantibetingelsene:

1. Dersom en del eller deler på produktet må repareres eller skiftes ut på grunn av produksjons- og/eller materialfeil i løpet av 2 år, vil den skadde delen eller delene repareres eller skiftes ut uten omkostninger for kunden. Garantien dekker kun produksjonsfeil.
2. For å bruke garantien, vennligst kontakt oss eller din lokale HMS og gi nøyaktig informasjon om feilen og hvordan den oppstod. Dersom du bruker rullestolen utenfor områdene som er dekket av Sunrise Medicals verksteder, vil reparasjoner og utskifting av deler utføres av et annet verksted som er godkjent av produsenten. Produktet må kun repareres av et godkjent Sunrise Medical-verksted (Servicepartner).
3. Deler som er reparert eller skiftet ut ved bruk av denne garantien vil være dekket av gjenværende garantiperiode i henhold til disse garantibetingelsene slik fastsatt i punkt 1.
4. Reservedeler som kunden har betalt for vil ha en garanti på 12 måneder (fra den/de ble montert) i henhold til disse garantibetingelsene.
5. Denne garantien kan ikke brukes dersom reparasjon eller utskifting av deler er et direkte resultat av følgende årsaker:
 - a. Normal slitasje, inkludert batterier, armlenepads, trekk, dekk, bremses, osv.
 - b. Overbelastning av produktet. Kontroller produktetiketten for informasjon om den maksimale brukervekten.
 - c. Produktet eller en del av den ikke har blitt ivaretatt eller vedlikeholdt i samsvar med produsentens anbefalinger, slik beskrevet i brukerveiledningen og/eller servicemanualen.
 - d. Det er brukt deler som ikke er klassifisert som originaldeler.
 - e. Stolen eller del av den er blitt skadet pga. uforsiktighet, ulykke eller feil bruk.
 - f. Det er utført endringer/modifiseringer på produktet eller deler som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
 - g. Det er utført reparasjoner før Sunrise Medicals kundeservice har blitt informert om dette.
6. Denne garantien er gjenstand for lover og/eller avtaler gjennom f.eks. egne kontrakter i det landet hvor produktet ble kjøpt fra Sunrise Medical.

Produsent:



Danrehab A/S Messingvej 13-15 DK-8940 Randers SV
Tel +45 86 44 73 55 info@danrehab.dk
www.danrehab.dk

Leveres i Norge av:



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no