



LECKEY



**Zapoznaj
się z rodziną
produktów
Leckey**

Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu nasz nowy informator o produktach i powitać Państwa w rodzinie Leckey.

W firmie Leckey, zgodnie z naszym hasłem przewodnim, „**Wspieramy dzieci**”.

Dla każdego z nas oznacza to współpracę z gronem ekspertów: projektantów, terapeutów i rodziców, jak również szerszą społecznością kliniczną, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczaliśmy.

Nasza **misja** to poprawa jakości życia dzieci o specjalnych potrzebach.

Nasza **wizja** to świat, w którym każde dziecko ma możliwość integracji i może w pełni rozwinąć swój potencjał.

Nasz ambitny **cel** to całkowite wyeliminowanie przypadków migracji bioder u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do 2025 r.

W firmie Leckey uważamy, że migracja bioder to najważniejsze wydarzenie w życiu dzieci, które ma ogromny wpływ na jakość życia zarówno ich samych, jak i ich opiekunów.

Dlatego wszystkie nasze działania, które podejmujemy we współpracy z grupą ekspertów, są ukierunkowane na osiągnięcie tych celów.

Stosujemy prostą metodę — skupiamy się na innowacjach i aspektach klinicznych.

Podjmując wczesną interwencję, od dzieciństwa do okresu dorosłości, doświadczony zespół projektantów i lekarzy Leckey, we współpracy z grupą ekspertów, opracowuje atrakcyjne, innowacyjne produkty, które znacznie poprawiają jakość życia dzieci i ich rodzin.

Staramy się, aby oferowane przez nas rozwiązania, produkty i programy były jak najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym i klinicznym, tak aby zapewniały dzieciom większą mobilność, sprawność i integrację.

Wszystkie nasze projekty przechodzą kompleksowe testy kliniczne i użytkowe przy współudziale fizjoterapeutów, specjalistów terapii zajęciowej, użytkowników i ich rodzin.

Jednocześnie prowadzimy szczegółowe badania kliniczne we współpracy z wiodącymi uczelniami i lekarzami z całego świata. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wszystkie produkty firmy Leckey w pełni zaspokajają potrzeby kliniczne pracowników służby zdrowia oraz potrzeby społeczne użytkowników.

Jesteśmy w pełni oddani naszej misji, wizji i ambitnym celom. Pragniemy współpracować z Państwem, aby stworzyć zaprzyjaźnioną społeczność ekspertów, których łączą wspólne cele i wartości.

Dołączcie do naszej rodziny, abyśmy wspólnie mogli zmienić coś na lepsze.



Ben Stocks
Dyrektor generalny



Spis treści

Siedzenie i mobilność 5

Early Activity System	6
Fotelik Pal	8
Fotelik Squiggles	9
Fotelik Mygo+	10
Fotelik Everyday Activity	12
Mygo Max	14
Fotelik Kit	16
Therapy Bench	18

Stanie i chodzenie 20

Squiggles+	22
Squiggles TT	24
Pionizator Squiggles	26
Pionizator Mygo	28
Horizon	30
Pronestander	32
Freestander	34
Totstander	35
MyWay	36
MyWay Pedal	38

Firefly 41

GoTo	42
Upsee	44
Scoot	46
Playpak	48
WeGo	50
Splashy	52
Splashy Big	54

Inne produkty 55

Zaawansowane krzesło kąpielowe	56
Wózek prysznicowy	57
Sleepform	58
Ostona biodrowa Leeway	59



**Siedzenie
i mobilność**

LECKEY Early Activity System

Kolorowy, komfortowy, wspierający aktywność system dla dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy.



Cechy produktu

- Pozwala w łagodny sposób przyzwyczaić dziecko do całodobowej korekcji postawy poprzez zabawę.
- Praktyczny, uniwersalny zestaw zapewniający kompleksowe podparcie. Oferuje niezliczone możliwości ustawienia, a cały zestaw można z łatwością zapakować do torby sportowej dla łatwiejszego transportu.
- Do zestawu dołączony jest popularny Program Rozwoju Aktywności wspierający rodziców w prowadzeniu domowej terapii.
- Miękkie w dotyku, antybakteryjne pokrowce można prać w pralce i suszyć w suszarce.



Główne pozycje

- Leżenie na pleckach (z podparciem z tyłu)
- Leżenie na brzuszku (z podarciem z przodu)
- Leżenie na boku
- Siedzenie na podłodze (z wyprostowanymi nóżkami)
- Na czworakach



LECKEY Fotelik Pal

Kolorowy, komfortowy fotelik do zajęć w klasie, zapewniający łagodne podparcie dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.

Cechy produktu

- Dwupunktowy pas biodrowy i stabilizujące poduszki boczne. Możliwość dodania odpowiednio nachylonej poduszki, jeśli potrzeba dodatkowego podparcia, żeby wyrównać położenie miednicy względem kości udowych.
- Oparcie można w razie potrzeby ustawić nieco pod kątem, a podłokietniki można wyregulować odpowiednio do potrzeb dziecka. Ponadto duża tacka lub stolik zapewniają odpowiednie podparcie.
- Możliwość regulacji wysokości podłokietników, nóg i podnóżka.
- Łatwa w czyszczeniu tkanina dostępna w dwóch jasnych kolorach [więcej szczegółów na stronie internetowej].
- Dostępny szeroki wybór podstaw i podnóżków, w tym kółka samonastawne, bieguny i stabilizatory.
- Dostępne pasujące stoły dla dwóch i czterech osób.



Tapicerka dostępna w 2 kolorach

Dane techniczne				
	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	1 - 3 lata	2 - 5 lat	4 - 8 lat	7 - 12 lat
Wzrost użytkownika	Min. 700 mm Maks 950 mm	Min. 900 mm Maks. 1050 mm	Min. 1000 mm Maks. 1300 mm	Min. 1200 mm Maks. 1600 mm
Maks. waga użytkownika	30 kg	35 kg	40 kg	50 kg
Głębokość siedziska	180 mm - 240 mm	220 mm - 290 mm	250 mm - 330 mm	300 mm - 400 mm
Szerokość siedziska	150 mm - 250 mm	170 mm - 270 mm	230 mm - 330 mm	280 mm - 380 mm
Wysokość siedziska	160 mm - 240 mm	185 mm - 285 mm	250 mm - 350 mm	300 mm - 400 mm

LECKEY Fotelik Squiggles

Odpowiedni do użycia w domu i w szkole, lub montowany do podstawy wózka spacerowego, spełnia wszystkie wymagania dotyczące korekcji postawy i komfortu fotelik dla małych dzieci o specjalnych potrzebach, a przy tym jest przyjazny i kolorowy.

Cechy produktu

- Opracowany specjalnie z myślą o potrzebach rozwojowych młodszych dzieci — jednoczęściowa podstawa siedziska i regulowane podparcie krzyżowe pozwalają dostosować kąt zgięcia i sprzyjają wyprostom.
- Kształt siedziska i oparcie, peloty boczne z końcówkami obitymi tkaniną, które bezpiecznie przytrzymują dziecko, oraz sposób połączenia 4-punktowej uprząży biodrowej z poduszkami biodrowymi zapewniają pełen komfort i nowoczesny wygląd.
- Siedzisko jest umieszczone nisko, co sprzyja integracji z rówieśnikami, a także sprawia, że fotelik Squiggles doskonale

nadaje się do użytku zarówno w domu, jak i w przedszkolu/środowisku szkolnym.

- Regulowany podnóżek można ustawić pod wybranym kątem, zapewniając w ten sposób odpowiednie oparcie dla stóp oraz bezpieczną podstawę i maksymalne możliwości funkcjonowania górnej części ciała. Podnóżek można też odchylić, aby ułatwić wchodzenie na fotelik i schodzenie z niego.
- Mechanizm odchylania pozwala w łatwy sposób zmienić pozycję, cały czas zachowując prawidłową postawę.

Tapicerka dostępna w 4 kolorach



Dane techniczne	
	Jeden rozmiar
Wiek	1 - 5 lat
Wzrost użytkownika	750 mm - 1100 mm
Maks. waga użytkownika	22 kg
Głębokość siedziska	190 mm - 290 mm
Szerokość siedziska	210 mm - 280 mm
Szerokość klatki piersiowej	160 mm - 220 mm
Wysokość oparcia	320 mm - 380 mm
Długość tydki	122 mm - 270 mm
Tray Height	115 mm - 170 mm
Kąt oparcia	od -10° do +25°
Wysokość siedziska [Hi-Low Chassis]	270 mm - 650 mm

LECKEY Fotelik Mygo+

Fotelik Mygo+, odświeżona wersja naszego klasycznego produktu, zapewnia wsparcie postawy przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i mobilności. Jest dostępny w trzech różnych rozmiarach, dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat.



Tapicerka dostępna w 3 kolorach oraz wersja z obiciami winylowymi



Cechy produktu

- Możliwość dołączenia nowej, ulepszonej osłony biodrowej. Ta wyjątkowa osłona zapewnia podparcie dla miednicy, otaczając jej tylną część wraz z pośladkami i ułatwiając w ten sposób zachowanie funkcjonalnej wyprostowanej postawy. Tylna część została dodatkowo usztywniona, tak aby osłona nie odkształcała się, ale jednocześnie była wystarczająco elastyczna, by utrzymywać odchyloną ku tyłowi miednicę w neutralnym położeniu. Ponadto konstrukcja osłony zabezpiecza użytkownika przed ześlizgnięciem się z siedziska. Dodatkowe poduszki przy pasie zwiększają komfort, a sprzączki i paski oznaczone kolorami ułatwiają odpowiednie zamocowanie.
- W foteliku Mygo+ mamy możliwość przesunięcia kończyn dolnych pacjenta w odwiedzenie 30° aby zapobiec szprotowości kolan. Fotelik Mygo+ jest też odpowiedni dla użytkowników z rotacją i pochyleniem miednicy, łagodną skoliozą, skróconymi ścięgnami podkolanowymi, różną długością ud i łydek i trwałym zgięciem podeszwowym, we wszystkich tych przypadkach zapewniając stabilność miednicy i właściwe ułożenie głowy względem tułowia.
- Możliwość szybkiego i łatwego montażu na wielu różnych podstawach do użytku w domu i na dworze, w tym wózkach inwalidzkich z napędem i bez napędu, podstawach Hi-Low i wózkach spacerowych.

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek (w przybliżeniu)	3 - 10 lat	8 - 14 lat	10 - 16 lat
Waga użytkownika	Min. 18 kg Maks. 50 kg	Min. 18 kg Maks. 60 kg	Min. 18 kg Maks. 70 kg
Wzrost użytkownika	Min. 105 cm Maks. 150 cm	Min. 127 cm Maks. 168 cm	Min. 150 cm Maks. 175 cm
Szerokość siedziska	Min. 200 mm Maks. 325 mm	Min. 220 mm Maks. 345 mm	Min. 250 mm Maks. 400 mm
Głębokość siedziska	Min. 270 mm Maks. 420 mm	Min. 350 mm Maks. 470 mm	Min. 350 mm Maks. 470 mm
Szerokość klatki piersiowej	Min. 170 mm Maks. 270 mm	Min. 170 mm Maks. 270 mm	Min. 200 mm Maks. 300 mm
Wysokość oparcia	Min. 360 mm Maks. 470 mm	Min. 460 mm Maks. 570 mm	Min. 460 mm Maks. 570 mm
Kąt oparcia	od -10° do +25°	od -10° do +25°	od -10° do +25°
Długość łydki	Min. 215 mm Maks. 350 mm	Min. 315 mm Maks. 470 mm	Min. 315 mm Maks. 470 mm
Wysokość podłokietnika	Min. 160 mm Maks. 210 mm	Min. 210 mm Maks. 260 mm	Min. 210 mm Maks. 260 mm
Rozmiar stolika	550 x 480 mm	550 x 480 mm	550 x 480 mm
Wysokość siedziska [podstawa z pedałem nożnym]	340 mm - 655 mm	340 mm - 655 mm	340 mm - 655 mm
Wysokość siedziska [podstawa z napędem]	370 mm - 675 mm	370 mm - 675 mm	370 mm - 675 mm

LECKEY Fotelik Everyday Activity

Ten praktyczny, regulowany fotelik o solidnej, wytrzymałej konstrukcji zapewnia umiarkowane podparcie dzieciom i młodym osobom w wieku od 1 roku do 18 lat.



Cechy produktu

- Doskonale sprawdza się w codziennym użyciu, a miękka w dotyku, oddychająca tkanina, odpowiednio wyściełana, nachylona poduszka siedziska, profilowana poduszka oparcia i wyściełane podłokietniki zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort.
- Szeroki wybór opcji i akcesoriów pozwala z łatwością dostosowywać fotelik do zmieniających się potrzeb rosnącego dziecka.
- Odchylany podnóżek, podstawa Hi-Low (obniżana do podłogi), długie podłokietniki i mechanizm odchylania o 10° do przodu, ułatwiają wchodzenie na fotelik i schodzenie z niego.
- 4-punktowa uprząż biodrowa zapewnia bezpieczne i stabilne podparcie.
- Dostępne peloty piersiowe z regulacją wysokości i kąta odchylenia.
- Łatwy w czyszczeniu — zdejmowane pokrowce można prać w pralce.



Tapicerka dostępna w 4 kolorach oraz 2 wersje z obiciami winylowymi

Dane techniczne	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Maks. obciążenie	30 kg	50 kg	100 kg
Waga — siedzisko i podstawa Hi-Low	29,5 kg	34 kg	49 kg
Wysokość siedziska [podstawa Hi-Low]	250 - 600 mm	320 - 600 mm	450 - 600 mm
Szerokość siedziska	160 - 280 mm	260 - 380 mm	340 - 500 mm
Głębokość siedziska [wersja standardowa]	150 - 280 mm	230 - 380 mm	330 - 480 mm
Głębokość siedziska [wersja przedłużona]		300 - 450 mm	
Odległość między pelotami piersiowymi	150 - 220 mm	170 - 240 mm	240 - 370 mm
Wysokość oparcia	300 - 400 mm	400 - 520 mm	450 - 630 mm
Kąt oparcia	od -10 stopni do + 30 stopni	od -10 stopni do + 30 stopni	od -10 stopni do + 30 stopni
Wysokość podłokietnika	150 - 250 mm	200 - 300 mm	180 - 325 mm
Długość łydki	150 - 250 mm	250 - 450 mm	250 - 450 mm
Kąt odchylenia podparcia tydek	od -10° do +50°	od -10° do +50°	od -10° do +50°
Kąt odchylenia podnóżka	od -15° do +10°	od -15° do +10°	od -15° do +10°
Przechylenie	od -10 stopni do +30 stopni	od -10 stopni do +30 stopni	od -10 stopni do +30 stopni

LECKEY Mygo Max

Praktyczny, regulowany fotelik o solidnej, wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat.



Cechy produktu

- Oprócz standardowych funkcji i zalet fotelika Mygo oferuje też kilka dodatkowych, przeznaczonych dla starszych użytkowników.
- Maksymalna waga użytkownika: 85 kg.
- Profilowany fotelik o szerokości 500 mm, dostosowane do większych użytkowników.
- Większe elementy pozycjonujące uda, o 2 cale wyższe niż w wersji standardowej, zapewniają podparcie na całej długości nóg oraz lepszą kontrolę ruchów odwodzenia.
- Dodano wskaźniki regulacji podparcia kręgosłupa, wsporników pelot bocznych i długości podparcia łydek, aby łatwiej zapamiętać pozycję odpowiednią dla użytkownika.
- Do podstawy fotelika dodano regulowane nachylone elementy pozycjonujące uda.
- Identyfikator, uchwyt na odtwarzacz MP3 i wieszak na torbę.



Tapicerka dostępna w 4 kolorach

Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek	12 - 18 lat
Min. wzrost użytkownika	1600 mm
Maks. wzrost użytkownika	1850 mm
Maks. waga użytkownika	85 kg
Głębokość siedziska	410 mm - 560 mm
Szerokość siedziska	345 mm - 500 mm
Odległość od siedziska do sandałów	330 mm - 510 mm

LECKEY Fotelik Kit

Modułowy fotelik dla nastolatków i dorosłych,
oferujący wiele opcji regulacji



Cechy produktu

- 3-częściowe oparcie jest dostosowane do niemal każdego rodzaju asymetrii kręgosłupa. 3 poduszki zamontowane na przegubach kulowych oraz peloty boczne o złożonej konstrukcji można dostosować do każdego rodzaju skrzywienia kręgosłupa, od skomplikowanej skoliozy do kifozy i hiperlordozy.
- Szczególnie odpowiedni dla wysokich i szczupłych użytkowników, którzy wymagają głębszego siedziska i wyższego oparcia, ale jednocześnie mają wąskie biodra i klatkę piersiową. Dostępne peloty boczne.
- Podnóżek 3D można łatwo dostosować do potrzeb użytkowników ze skróconymi ścięgnami podkolanowymi, jak i deformacją stóp/stawów skokowych.
- Ustawienie fotelika może również uwzględniać szpotawość kolan do 20° oraz rzeczywistą bądź pozorną różnicę w długości nóg.
- Osłona biodrowa pozwala uzyskać najlepszą możliwą pozycję przedniej części miednicy.
- Dostępny szeroki wybór podstaw, w tym podstaw jezdnych, które przeszły testy zderzeniowe. Więcej szczegółów na stronie internetowej leckey.com.



Tapicerka dostępna w 3 kolorach oraz wersja z obiciem ułatwiającym dezynfekcję

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek	12 - 18 lat	16 lat - dorosłość
Min. wzrost użytkownika	1400 mm	1600 mm
Maks. wzrost użytkownika	1600 mm	1850 mm
Maks. użytkownika	75 kg	75 kg
Głębokość siedziska	360 mm - 480 mm	410 mm - 560 mm
Szerokość siedziska	215 mm - 370 mm	215 mm - 370 mm
Odległość od siedziska do podnóżka	330 mm - 510 mm	330 mm - 510 mm

LECKEY Therapy Bench

Ten stół terapeutyczny opracowano z myślą o wspieraniu dzieci w zachowaniu neutralnej postawy ciała. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej osłony biodrowej ułatwia aktywną terapię, zapewniają swobodę ruchów rąk.



Cechy produktu

- Innowacyjna usztywniona osłona biodrowa utrzymuje miednicę w neutralnym położeniu. Ułatwia terapię, działając jak dodatkowa para rąk, i pozwala dziecku nabrać większej pewności w poruszaniu się, sięganiu i chwytaniu przedmiotów.
- Podparcie tułowia z regulacją wysokości pomaga dziecku siedzieć prosto i zapewnia odpowiednie ułożenie głowy i kręgosłupa względem miednicy. To najlepszy i najprostszy sposób, żeby nauczyć dziecko prawidłowej postawy siedzącej.
- Podpierająca poduszka terapeutyczna z regulacją wysokości zapewnia terapię dodatkowy punkt oparcia i ułatwia ćwiczenie odwodzenia ramion.
- Ułatwia pochylanie się w bok, w przód i w tył, dzięki czemu dziecko może być bardziej aktywne.
- Dzięki regulacji wysokości i głębokości ławkę można dopasować zarówno do większych, jak i do mniejszych użytkowników.
- Pomaga terapeutom w Segmentalnej Ocenie Kontroli Tułowia [SATCo], ułatwiając odpowiednie dopasowanie podparcia, tak aby zapewnić optymalną korekcję postawy.

Dane techniczne - Therapy Bench

Jeden rozmiar	
Maks. waga użytkownika	80 kg
Wiek	1 - 14 lat
Wymiary stołu	620 mm x 740 mm
Wysokość podstawy siedziska (od podłogi)	Min. 330 mm Maks. 460 mm
Szerokość podstawy siedziska	620 mm
Głębokość podstawy siedziska	360 mm
Wysokość podnóżka (od podłogi)	Min. 20 mm Maks. 110 mm
Odległość od podstawy siedziska do podnóżka	Min. 220 mm Maks. 440 mm

Dane techniczne - Osłona biodrowa do ćwiczeń

Rozmiar osłony	Obwód bioder	Odległość między kolcami biodrowymi
Rozmiar 1	Min. 400 mm Maks. 500 mm	poniżej 120 mm
Rozmiar 2	Min. 440 mm Maks. 575 mm	Min. 130 mm Maks. 160 mm
Rozmiar 3	Min. 520 mm Maks. 650 mm	Min. 160 mm Maks. 180 mm
Rozmiar 4	Min. 600 mm Maks. 740 mm	Min. 190 mm Maks. 200 mm
Rozmiar 5	Min. 660 mm Maks. 855 mm	powyżej 200 mm





**Stanie
i chodzenie**

LECKEY Squiggles+

Model Squiggles+ oferuje wszystko, co najlepsze w pionizatorach Squiggles, a także wiele dodatkowych korzyści, tak aby maluchy mogły dalej cieszyć się z możliwości stania i aktywnego uczestniczenia w zabawie.



Cechy produktu

- Ułatwia anatomicznie prawidłowe odwodzenie i stabilizuje stawy, aby zapewnić optymalne obciążenie we wczesnym okresie rozwoju stawów biodrowych. Pionizator Squiggles+ zapewnia obustronne odwodzenie bioder w zakresie 60° w pozycji ze wsparciem z przodu, w pozycji pionowej oraz w pozycji ze wsparciem z tyłu. Przeguby obrotowe znajdujące się w jednej linii z biodrami ułatwiają prawidłowe ułożenie bioder, kolan i stóp względem siebie.
- Większy komfort i lepsze podparcie dzięki elementom obejmującym kolana. Wygodne peloty przyśrodkowych części

kolan zapewniają lepsze rozłożenie nacisku, zwłaszcza przy ruchach odwodzących w pozycji stojącej. Wyściełane peloty obejmujące kolana pomagają utrzymać je w neutralnym położeniu.

- Łatwiejsze wchodzenie do pionizatora i schodzenie z niego — dzięki większym pelotom biodrowym zarówno dziecko, jak i jego opiekun mogą czuć się pewniej i bezpieczniej. Udoskonalona podstawa obrotowa ułatwia umieszczanie dziecka w pionizatorze w pozycji poziomej.
- Stolik z udoskonaloną regulacją wysokości.
- Składany uchwyt do prowadzenia z regulacją wysokości.

Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek	1 - 5 lat
Maks. waga użytkownika	22 kg
Wzrost użytkownika	Min. 750mm Maks. 1110mm
Podparcie klatki piersiowej	Regulacja kąta nachylenia +/- 30° Regulacja głębokości 50 mm
Wysokość podparcia klatki piersiowej [odległość od podnóżka do pachy]	Min. 550 mm Maks. 820 mm
Szerokość klatki piersiowej [odległość między pelotami]	Min. 160 mm Maks. 230 mm
Podparcie bioder [odległość od podnóżka do połowy pośladków]	Min. 300 mm Maks. 530 mm
Szerokość bioder [odległość między elementami pozycjonującymi biodra]	Min. 160 mm Maks. 230 mm
Odległość między liniami środkowymi kolan	Min. 140 mm Maks. 215 mm
Kąt odchylenia podnóżka	Zgięcie podeszwy 10° Zgięcie grzbietowe 10°



Tapicerka dostępna w 3 kolorach oraz wersja z obiciami winylowymi

LECKEY Squiggles TT

Rewolucyjny pionizator do wczesnej interwencji, który ułatwia trening ukierunkowany dla dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat.



Cechy produktu

- Ułatwia anatomicznie prawidłowe odwodzenie i stabilizuje stawy, aby zapewnić optymalne obciążenie we wczesnym okresie rozwoju stawów biodrowych. Pionizator Squiggles+ zapewnia obustronne odwodzenie bioder w zakresie 60° w pozycji ze wsparciem z przodu, w pozycji pionowej oraz w pozycji ze wsparciem z tyłu. Przeguby obrotowe znajdujące się w jednej linii z biodrami ułatwiają prawidłowe ułożenie bioder, kolan i stóp względem siebie.
- Większy komfort i lepsze podparcie dzięki elementom obejmującym kolana. Wygodne peloty przyśrodkowych części

kolan zapewniają lepsze rozłożenie nacisku, zwłaszcza przy ruchach odwodzących w pozycji stojącej. Wyściełane peloty obejmujące kolana pomagają utrzymać je w neutralnym położeniu.

- Łatwiejsze wchodzenie do pionizatora i schodzenie z niego — dzięki większym poduszkom biodrowym zarówno dziecko, jak i jego opiekun mogą czuć się pewniej i bezpieczniej. Udoskonalona podstawa obrotowa ułatwia umieszczanie dziecka w pionizatorze w pozycji poziomej.
- Stolik z udoskonaloną regulacją wysokości.
- Składany uchwyt do prowadzenia z regulacją wysokości.

Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek (w przybliżeniu)	1 - 5 lat
Maks. waga użytkownika	22 kg
Wzrost użytkownika	Min. 730 mm Maks. 1100 mm
Wysokość podparcia tułowia [odległość od podnóżka do pachy]	Min. 160 mm Maks. 820 mm
Szerokość tułowia / miednicy	Min. 135 mm Maks. 250 mm
Wysokość podparcia miednicy [odległość od podnóżka do połowy pośladków]	Min. 300 mm Maks. 530 mm
Odległość między liniami środkowymi kolan	Min. 140 mm Maks. 215 mm
Szerokość bioder [odległość między elementami pozycjonującymi biodra]	Min. 160 mm Maks. 230 mm
Odległość między liniami środkowymi kolan	Min. 140 mm Maks. 215 mm
Podnóżek	Zgięcie podeszwy 10° Zgięcie grzbietowe 10°
Zakres regulacji kąta nachylenia podstawy obrotowej	90-180°
Wysokość stolika	Min. 480 mm Maks. 825 mm



Tapicerka dostępna w 3 kolorach oraz wersja z obiciami winylowymi

LECKEY Pionizator Squiggles

Kolorowy i komfortowy pionizator zapewniający podparcie dzieciom w wieku od 1 roku do 5 lat.



Cechy produktu

- Pionizator typu „3 w 1”, zapewnia podparcie z przodu, pionowo i z tyłu.
- Dzięki łatwej regulacji doskonale nadaje się do użytku w domu.
- Minimalistyczny design, zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach dziecka, z poduszkami w wesołych, jasnych kolorach, idealnie wpasuje się w wystrój sali lekcyjnej lub przedszkolnej.
- Niewielka odległość ramy od podłogi sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych i interakcji na poziomie wzroku.
- Podparcia klatki piersiowej i miednicy są wyściełane dla większego komfortu i można łatwo regulować ich wysokość, szerokość i kąt nachylenia, odpowiednio do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić komfortową i bezpieczną pozycję.
- Ramę można łatwo rozmontować na czas przechowywania lub transportu.

Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek	1 - 5 lat
Wzrost użytkownika	750 mm - 1100 mm
Maks. waga użytkownika	22 kg
Wysokość podparcia klatki piersiowej (odległość od podnóżka do pachy)	550 mm - 820 mm
Szerokość klatki piersiowej (odległość między pelotami)	160 mm - 230 mm
Regulacja kąta nachylenia podparcia klatki piersiowej	+/- 30° 50 mm - głębokość
Podparcie bioder (odległość od podnóżka do połowy pośladków)	300 mm - 530 mm
Szerokość bioder (odległość między elementami pozycjonującymi biodra)	160 mm - 230 mm
Odległość między liniami środkowymi kolan	140 mm - 215 mm
Kąt odchylenia podnóżka	Zgięcie podeszwowe 10° Zgięcie grzbietowe 10°
Wysokość stolika (odległość od podnóżka do górnej powierzchni stolika)	555 mm - 825 mm - W pozycji z podparciem z przodu 480 mm - 825 mm - W pozycji z podparciem z tyłu
Regulacja kąta nachylenia stolika	30° - W pozycji z podparciem z przodu 40° - W pozycji z podparciem z tyłu



Tapicerka dostępna w 4 kolorach

LECKEY Pionizator Mygo

Praktyczny, regulowany pionizator o solidnej konstrukcji, przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat.



Cechy produktu

- Pionizator typu „3 w 1”, zapewnia podparcie z przodu, pionowo i z tyłu.
- Zaprojektowany z myślą o poprawie funkcjonowania kończyn górnych. Poduszka piersiowa dopasowuje się kształtem do klatki piersiowej, umożliwiając swobodne ruchy obręczy barkowej w pozycji z podparciem z przodu, natomiast w pozycji z podparciem z tyłu ułatwia wysuwanie ramion. Ponadto model Mygo oferuje niższą wysokość stolika niż większość pionizatorów.
- Możliwość uwzględnienia przykurczów zgięciowych bioder i kolan w zakresie do 25 stopni. Podnóżek porusza się razem z podparciami kolan, dzięki czemu użytkownik może stać ze zgiętymi biodrami i kolanami. Pozwala to uzyskać bardziej wyprostowaną postawę, jednocześnie zapewniając podparcie użytkownikom, którzy z powodu przykurczów nie mogli dotąd brać udziału w terapii w pozycji stojącej.

- Biodrowy pas derotacyjny umożliwia ustawienie miednicy użytkownika w położeniu środkowym lub neutralnym przy minimalnym wysiłku.



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek	4 - 10 lat	8 - 14 lat
Wzrost użytkownika	1080 mm - 1450 mm	1350 mm - 1700 mm
Maks. waga użytkownika	50 kg	60 kg
Wysokość podparcia klatki piersiowej (odległość od podnóżka do pachy)	760 mm - 1080 mm	980 mm - 1300 mm
Szerokość klatki piersiowej (odległość między pelotami)	160 mm - 280 mm	200 mm - 320 mm
Wysokość podparcia bioder (odległość od podnóżka do połowy pośladków)	460 mm - 730 mm	620 mm - 875 mm
Szerokość bioder (odległość między elementami pozycjonującymi biodra)	220 mm - 330 mm	280 mm - 390 mm
Kąt odchylenia podnóżka	Zgięcie podeszwy 10° Zgięcie grzbietowe 10°	Zgięcie podeszwy 10° Zgięcie grzbietowe 10°
Maks. uwzględniony kąt przykurczu kolan	25°	25°
Zakres regulacji wysokości stolika (odległość od górnej części poduszki biodrowej)	0 mm - 150 mm	0 mm - 150 mm
Regulacja kąta nachylenia stolika	45° — W pozycji z podparciem z przodu 45° — W pozycji z podparciem z tyłu	45° — W pozycji z podparciem z przodu 45° — W pozycji z podparciem z tyłu

Tapicerka dostępna w 4 kolorach

LECKEY Horizon

Pionizator typu „3 w 1” o solidnej, wytrzymałej konstrukcji, przeznaczony dla użytkowników w wieku od 4 lat do osiągnięcia dorosłości.



Cechy produktu

- Możliwość dopasowania z uwzględnieniem różnicy w długości nóg, skoliozy, kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa, lordozy, przykurczów zgięciowych kolan oraz asymetrycznego ułożenia głowy. Regulacja wysokości ramy oraz szeroki wybór akcesoriów dostosowanych do zmieniających się potrzeb użytkownika, w tym potencjalnej asymetrii ciała u rosnącego dziecka.
- Wielkość dopasowana idealnie do podnoszenia użytkownika i utrzymywania go w pozycji stojącej z podparciem z tyłu. Duża podstawa ułatwia przenoszenie dziecka do pionizatora, a poduszki podpierające idealnie dopasowują się do ciała każdego użytkownika.
- Solidna, wytrzymała i stabilna rama pozwala na ciągłe korzystanie z produktu bez najmniejszych obaw.
- Dzięki indywidualnie regulowanym pelotom piersiowym, biodrowym i kolanowym oraz podnóżkom pionizator można dopasować idealnie do potrzeb użytkownika.

- Peloty boczne i pas biodrowy z regulacją wysokości zapobiegają rotacji bioder i umożliwiają odpowiednie ułożenie miednicy i środka ciężkości ciała nad podstawą podpierającą.

Tapicerka dostępna
w 4 kolorach



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	4 - 10 lat	8 - 14 lat	14 - dorosłość
Wzrost użytkownika	1000 mm - 1400 mm	1400 mm - 1800 mm	1550 mm - 1800 mm
Maks. waga użytkownika	50 kg	80 kg	100 kg
Wysokość ramion (odległość od podnóżka do górnej części poduszki peloty)	820 mm - 1150 mm	1000 mm - 1450 mm	1000 mm - 1450 mm
Wysokość peloty biodrowej (odległość od podnóżka do górnej części poduszki peloty)	450 mm - 750 mm	750 mm - 950 mm	750 mm - 1150 mm
Szerokość peloty biodrowej	175 mm - 270 mm	210 mm - 390 mm	310 mm - 470 mm
Wysokość kolan (odległość od podnóżka do środkowej części poduszki peloty)	250 mm - 450 mm	400 mm - 550 mm	400 mm - 650 mm
Odległość między pelotami piersiowymi	200 mm - 300 mm	240 mm - 380 mm	340 mm - 460 mm
Kąt odchylenia podnóżka Regulacja +/-	10°	10°	10°
Regulacja kąta nachylenia	0° - 90° - W pozycji z podparciem z przodu 0° - 90° - W pozycji z podparciem z tyłu		
Regulacja kąta nachylenia stolika	0° - 40° - W pozycji z podparciem z przodu +/- 20°/30° - W pozycji z podparciem z tyłu		

LECKEY Pronestander

Regulowany pionizator o solidnej konstrukcji, ze wsparciem z przodu, przeznaczony dla użytkowników w wieku od 1 roku do 18 lat.

Cechy produktu

- Odchylane sandały zapewniają podparcie, ułatwiając umieszczanie użytkownika w pionizatorze w pozycji pionowej.
- Długa podstawa zapewnia maksymalną stabilność nawet najbardziej aktywnym użytkownikom, dzięki czemu opiekunowie nie muszą się o nic martwić.
- Pas derotacyjny o unikalnej konstrukcji w połączeniu z pelotą biodrową utrzymuje użytkownika w ramie w położeniu środkowym, zapewniając równomierny rozkład ciężaru ciała na obie stopy.
- Indywidualnie regulowane peloty klatki piersiowej, bioder i kolan oraz sandały podpierające oferują szeroki zakres regulacji odpowiednio do potrzeb klinicznych dziecka.
- Łatwe ustawienie i regulacja poprzez wybór jednej z pięciu bezpiecznych pozycji z podparciem z przodu w zakresie od 85 do 45 stopni odchylenia.



Rozmiar 1 dostępny wyłącznie z tkaniną Meadow
Rozmiary 2 i 3 dostępne wyłącznie z tkaniną Mondeo

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	1 - 5 lat	4 - 10 lat	9 - 18 lat
Wzrost użytkownika	800 mm - 1151 mm	1100 mm - 1448 mm	1400 mm - 1849 mm
Maks. waga użytkownika	60 kg	80 kg	90 kg
Wysokość peloty piersiowej	470 mm - 680 mm	680 mm - 975 mm	975 mm - 1350 mm
Regulacja kąta odchylenia w pozycji z podparciem z przodu	85°, 75°, 65°, 55°, 45°		
Odległość między pelotami piersiowymi	152 mm - 254 mm	203 mm - 305 mm	254 mm - 356 mm
Rozmiar stolika	540 mm x 400 mm	590 mm x 425 mm	644 mm x 470 mm

LECKEY Freestander

Pionizator o solidnej konstrukcji, ze wsparciem w pozycji pionowej, przeznaczony dla użytkowników w wieku od 1 roku do 18 lat.

Cechy produktu

- Szeroki zakres regulacji odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkownika, np. w przypadku użytkowników, którzy nie mają problemów z kontrolą tułowia, podparcie miednicy można zdemontować i odwrotnie — wysokość i kąt nachylenia stolika można zwiększyć, gdy konieczne jest solidniejsze podparcie. W przypadku użytkowników o większej sprawności, np. osób z porażeniem połowicznym lub GMFSC II/III, możliwe jest też proste ustawienie, pozwalające na większą aktywność.
- Prosta, intuicyjna regulacja dzięki umieszczeniu wszystkich elementów podparcia wzdłuż dwóch pionowych wsporników.
- Pas biodrowy o unikalnej konstrukcji zapobiega rotacji bioder i umożliwia odpowiednie ułożenie miednicy i środka ciężkości ciała nad podstawą podpierającą, jak również uwzględnienie lub korekcję zgięcia biodrowego i kolanowego.



Rozmiar 1 dostępny wyłącznie z tkaniną Meadow
Rozmiary 2 i 3 dostępne wyłącznie z tkaniną Mondeo

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Wiek	1 - 5 lat	4 - 10 lat	9 - 18 lat
Wzrost użytkownika	800 mm - 1151 mm	1100 mm - 1448 mm	1400 mm - 1849 mm
Maks. waga użytkownika	60 kg	80 kg	90 kg
Wysokość peloty piersiowej	470 mm - 680 mm	680 mm - 975 mm	975 mm - 1350 mm
Odległość między pelotami piersiowymi	152 mm - 254 mm	203 mm - 305 mm	254 mm - 356 mm
Rozmiar stolika	540 mm x 400 mm	590 mm x 425 mm	644 mm x 470 mm

LECKEY Totstander

Łatwy w użyciu pionizator o prostej konstrukcji, przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat.

Cechy produktu

- Może pełnić funkcję pionizatora lub posłużyć terapeutce do oceny postawy dziecka w pozycji stojącej. Ułatwia aktywność, ruch i przenoszenie ciężaru ciała w pozycji stojącej.
- Kompaktowa konstrukcja ułatwia transport, np. z ośrodka terapii do domu.
- Prosta, przyjazna dzieciom, łatwa w użyciu konstrukcja pozwala w łagodny sposób przyzwyczaić dziecko do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego.



Dostępny 1 wzór tapicerki

Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek	1 - 5 lat
Wysokość opaski piersiowej	470 mm - 640 mm
Głębokość podstawy	450 mm
Szerokość podstawy	450 mm
Maks. waga użytkownika	20 kg

LECKEY MyWay

MyWay to wiodące rozwiązanie, które maksymalnie zwiększa możliwości samodzielnego poruszania się i zapewnienie dzieciom pełną swobodę w eksploracji otaczającego je świata.



Cechy produktu

- Przypominająca gorset uprząż o unikalnej konstrukcji stabilizuje tułów, umożliwiając aktywny ruch i prawidłowe stawianie kroków. Uprząż MyWay zapewnia użytkownikowi podparcie niezbędne dla lepszej kontroli ruchów głowy i kończyn. Uprząż obejmuje dziecko, wzmagając reakcje na bodźce sensoryczne, a jednocześnie ogranicza mimowolne ruchy i zwiększa pewność siebie, tym samym sprzyjając osiągnięciu sukcesów.
- Otwarta przednia część chodzika MyWay zapewnia użytkownikowi swobodę ruchów rąk, zwiększając możliwości eksploracji i integracji. Ponadto otwarta konstrukcja pozwala terapeutce na bliższy kontakt z dzieckiem podczas ćwiczenia kończyn dolnych, ułatwiając kontrolę ruchów, gdy dziecko znajduje się w chodziku.
- Podwieszana uprząż ułatwia umieszczenie dziecka bezpośrednio w chodziku, bez konieczności użycia dodatkowych podnośników, co pozwala zaoszczędzić czas podczas terapii. Takie podwieszenie zapewnia również dziecku maksymalny komfort, ponieważ uprząż nie ześlizguje się pod pachy.

- Wielofunkcyjne kółka samonastawne, lekka rama oraz dokładna regulacja wysokości z podparciem z przodu ułatwiają wykonywanie kroków i kontrolę ruchów.
- Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych do indywidualnych potrzeb, w tym podglówek, elementów pozycjonujących stawy skokowe i siodełek.



Uprząż dostępna
w 6 kolorach

Dane techniczne

	Rama Rozmiar 1	Rama Rozmiar 2	Rama Rozmiar 3
Wiek (w przybliżeniu)	1-5 lat	4-11 lat	10-16 lat
Wysokość ramion użytkownika [od podłogi]	635 - 920 mm	870 - 1190 mm	1070 - 1490 mm
Wysokość siodełka [po wewnętrznej stronie nóg]	220 - 440 mm	400 - 610 mm	550 - 810 mm
Maks. waga użytkownika	25 kg	50 kg	80 kg
Ciężar ramy	12 kg (w przypadku rozmiaru 1 górny element podpierający jest na stałe połączony z ramą)	6,5 kg	9,5 kg
Ciężar górnego elementu podpierającego		10,5 kg	11 kg
Szerokość ramy	570 mm	670 mm	720 mm
Długość ramy	720 mm	850 mm	1100 mm

Uprząż

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5	Rozmiar 6
Wiek (w przybliżeniu)	1 - 4 lata	2 - 6 lat	5 - 9 lat	8 - 12 lat	12 - 15 lat	do 16 lat
Obwód w pasie na wysokości pępka [cm]	46 - 56 cm	50 - 60 cm	55 - 65 cm	60 - 70 cm	70 - 80 cm	80 - 90 cm
Kolor	Fioletowy	Zielony	Niebieski	Czerwony	Pomarańczowy	Szary

LECKEY MyWay Pedal

MyWay Pedal to rewolucyjny trener eliptyczny, który pomaga zwiększyć siłę i rozwinąć zdolności funkcjonalne. Dzięki możliwości połączenia z ramą chodzika MyWay w rozmiarze 2 i 3 MyWay Pedal to idealne rozwiązanie, które umożliwia ruchliwym dzieciom aktywność, zabawę i integrację z rówieśnikami.



Cechy produktu

- Trenuje i wzmacnia mięśnie antygravitacyjne, aby pomóc ograniczyć ryzyko rozwoju przykurczów kolan i bioder, a także poprawia ich funkcjonowanie. Pedałowanie na stojąco w pozycji wyprostowanej ćwiczy i wzmacnia mięśnie antygravitacyjne (tj. mięśnie tydek, mięśnie czworogłowe ud i ścięgna podkolanowe). W odróżnieniu od rowerka trójkółowego, który sprzyja zgiętej pozycji, MyWay Pedal wymaga od użytkownika zachowania pozycji wyprostowanej, dzięki czemu mięśnie czworogłowe są wzmacniane w odpowiednich miejscach, tak aby zwiększyć zakres ich ruchów. Zwiększenie zakresu ruchów mięśni zmniejsza ryzyko przykurczów kolan i bioder i sprzyja prawidłowemu rozwojowi umiejętności stania i chodzenia.
- Ruchy eliptyczne naśladują stawianie kroków, pomagając w osiągnięciu celów terapii chodu. MyWay Pedal dostarcza użytkownikowi wrażeń sensorycznych przypominających chód. W odróżnieniu od ruchu obrotowego podczas jazdy na rowerku, pedałowanie eliptyczne w większym stopniu rozciąga mięśnie kończyn dolnych, ponieważ polega na

wykonywaniu dłuższych ruchów w przód i w tył zamiast ruchów góra-dół. Pomaga to lepiej rozłożyć ciężar ciała wokół bioder, co z kolei sprzyja prawidłowemu rozwojowi stawów.

- Możliwość korzystania w połączeniu z aplikacją Leckey Connect, która przedstawia wyniki na wykresie i motywuje dziecko. Aplikacja umożliwia śledzenie postępów dziecka, w tym rejestrowanie osiągniętej prędkości, pokonanego dystansu i czasu trwania pedałowania eliptycznego. Aplikacja jest dostępna na smartfonach i tabletach z systemem Android oraz na portalu internetowym firmy Leckey.
- Możliwość połączenia z ramą chodzika MyWay w rozmiarze 2 i 3 po lub przed umieszczeniem użytkownika w chodziku.
- Dostępne dwa rozmiary sandałów.
- Zdejmowany uchwyt z regulacją wysokości





Zapoznaj się z rodziną produktów Firefly

Dystrybutor
AKSON Padjasek-Krysowski Sp. j.
41-600 Świętochłowice
ul. Polna 73
tel. +48 505 438 774
firefly@akson.pl
www.akson.pl

Family Freedom

leckey.com/firefly





GoTo

Jeden mały fotel, niezliczone możliwości

Bezpieczny, lekki, przenośny fotelik, opracowany z myślą o zapewnieniu dodatkowego podparcia górnej części ciała w celu wspierania prawidłowej postawy u dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 1 roku do 8 lat.



Cechy produktu

- Możliwość połączenia z większością standardowych krzeseł w domu, w klasie i w restauracji przy użyciu regulowanych pasków mocujących. Fotelik można również przymocować do wózka sklepowego.
- Regulowany podłóg i peloty, które można dostosować odpowiednio do potrzeb rosnącego użytkownika.
- Dostępny podłóg w wersji standardowej i zaawansowanej.
- Dostępna poduszka dekompresyjna.
- Podstawa podłogowa, dostępna jako akcesorium opcjonalne, oferuje 26 ustawień, od pionowego (106°) do maksymalnie odchylonego (140°).



Dostępne 3 kolory tapicerki oraz wersja z winylowym obiciem



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Wiek	1 - 3 lat	3 - 8 lat
Odległość od podstawy siedziska do górnej części zagłówka	380mm - 540mm	510mm - 680mm
Szerokość pelot bocznych	190mm - 260mm	210mm - 300mm
Głębokość siedziska	175mm	244mm
Maks. waga użytkownika	15kg*	30kg**

*Jeśli dziecko waży więcej niż 13 kg/28,5 funta, fotelik GoTo nie może być montowany na wózkach sklepowych.

**Foteliki GoTo w rozmiarze 2 są zbyt duże, aby można je było montować na wózkach sklepowych.

Family Freedom

leckey.com/firefly





Upsee

Jeden mały fotel, niezliczone możliwości

Uprząż wspierająca mobilność w pozycji wyprostowanej, przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową wieku od 1 roku do 8 lat. Umożliwia stanie i chodzenie ze wsparciem osoby dorosłej.



Cechy produktu

- Ułatwia stopniowe utrzymywanie ciężaru ciała, stanie i chodzenie z pomocą osoby dorosłej.
- Sprzyja rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu, umożliwiając użytkownikom kontakt z rówieśnikami na poziomie wzroku.
- Składa się z trzech części: uprząży dla dziecka, pasa dla osoby dorosłej i pary sandałów.
- Wytrzymała, oddychająca tkanina, którą można prać w pralce.
- Dostępne dwa kolory dla każdego rozmiaru - więcej szczegółów na naszej stronie internetowej.



Dostępne 4 kolory tapicerki



Dane techniczne

	Bardzo mały	Mały	Średni	Duży
Wiek	1 - 2 lat	2 - 4 lat	4 - 6 lat	6 - 8 lat
Maks. waga użytkownika	15 kg	15 kg	20 kg	25 kg
Odległość od ramion do bioder	280 mm - 320 mm	310 mm - 360 mm	350 mm - 390 mm	380 mm - 420 mm
Obwód klatki piersiowej	500 mm - 570 mm	520 mm - 600 mm	570 mm - 650 mm	630 mm - 710 mm
Obwód dolnej części bioder	500 mm - 570 mm	520 mm - 600 mm	580 mm - 670 mm	640 mm - 730 mm

Family Freedom

leckey.com/firefly





Scoot

Stylowe dwa kółka dla małych odkrywców

Scoot to fotelik typu „4 w 1”. Umożliwia dzieciom o specjalnych potrzebach zabawę, eksplorację i integrację w sposób odpowiedni do ich możliwości fizycznych i kognitywnych.



Cechy produktu

- Scoot oferuje cztery ustawienia: Scoot, Ride, Pooosh i Crawl. Są to różne konfiguracje, dopasowane do różnych możliwości dziecka i różnych sposobów zabawy.
- W pozycji Scoot, zaawansowana poduszka oparcia zapewnia dodatkowe podparcie tułowia dziecka. Peloty boczne można przesuwac w górę i w dół, zapewniając odpowiednie podparcie. Można również je zdemonstować i pozostawić tylko wygodną poduszkę oparcia. Zawansowana poduszka oparcia, do nabycia osobno, jest łatwa w montażu i można ją prać w pralce.
- Podnóżek można regulować odpowiednio do długości nóg rosnącego dziecka.



Cztery konfiguracje

- Konfiguracja Crawl umożliwia dzieciom poruszanie się i eksplorację na brzuszku, pomagając wzmocnić mięśnie grzbietu i górnej części ciała, gdy unoszą głowę i ramiona.
- Konfiguracja Scoot umożliwia dzieciom siedzenie z wyprostowanymi plecami i przesuwanie fotelika za pomocą stóp. Pas kolanowy i oparcie podpierają tułów i miednicę dziecka, pomagając utrzymać je w stabilnym położeniu. Jednocześnie dziecko ma zapewnioną swobodę ruchów rąk, aby mogło chwycić i podnosić przedmioty, bawić się z rodziną i eksplorować otoczenie.
- Konfiguracja Ride umożliwia dzieciom poruszanie się w foteliku poprzez popychanie kół rękami. Zabawa w takiej pozycji wzmacnia górne partie ciała, a dziecko poprzez eksplorację i integrację rozwija świadomość przestrzenną oraz zdolności kognitywne, sensoryczne i komunikacyjne.
- W przypadku konfiguracji Pooosh to ktoś inny musi się wysilić. Jeśli dziecko nie jest jeszcze w stanie samo się odpychać (lub jest po prostu zmęczone), można zamontować rączkę Pooosh. Dzięki temu maluchy mogą przyzwyczaić się do korzystania z konfiguracji Scoot. Z kolei rodzice i terapeuci mogą towarzyszyć im w zabawie w domu, w szkole lub podczas sesji terapeutycznych.

Dane techniczne

Rozmiar	4 w 1
Wiek	2-6
Maks. waga użytkownika	22 kg
Głębokość siedziska	400 mm
Szerokość siedziska	230 mm
Odległość od biodra do przedniej krawędzi podnóżka	520 mm - 630 mm
Szerokość oparcia	260 mm
Wysokość oparcia	300 mm
Odległość między nadkolanami	230 mm
Drążek do popychania	800 mm - 890 mm



Playpak

Terapia poprzez zabawę dla maluchów poznających świat

Przenośny zestaw do rozwoju aktywności ruchowej, do zastosowania we wczesnej terapii interwencyjnej w domu lub podczas przemieszczania się, przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy.



Cechy produktu

- Lekki i przenośny.
- Zdejmowany pokrowiec można prać w temperaturze 40°C i suszyć w suszarce w niskiej temperaturze.
- Dostępna broszura online na temat terapii, zawierająca instrukcje i porady ekspertów dotyczące rozwoju zdolności fizycznych, kognitywnych, sensorycznych i komunikacyjnych u dzieci.
- Lekka torba zawiera pełny zestaw do aktywności, łącznie z wałkami, klinami i podparciami (zaprojektowanymi przez specjalistów klinicznych), które można łączyć na wiele różnych sposobów, aby ćwiczyć odpowiednie ułożenie ciała u małych dzieci, co da podstawę do dalszego rozwoju ich zdolności.

Główne pozycje

- Leżenie na plecach (z podparciem z tyłu),
- Leżenie na brzuszku (z podparciem z przodu),
- Siedzenie na podłodze (z wyprostowanymi nóżkami)
- Leżenie na boku
- Na czworakach





WeGo

Codzienna aktywność w wielkim stylu

Firefly WeGo to lekki, w pełni składany wózek spacerowy, który ułatwia podróżowanie i codzienną aktywność.



Cechy produktu

- Kompatybilny z fotelikiem Firefly GoTo.*
- Lekki.
- Odchylany w zakresie do 140 stopni.
- Pełen zestaw akcesoriów, w tym daszek i osłona przeciwdeszczowa.
- Maksymalna waga użytkownika: 30 kg.*
- Koła dostosowane do jazdy po nierównym terenie.
- Łatwo się składa.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia transport w większości bagażników samochodowych.

* Dokładne wymiary podano w tabeli rozmiarów.



Dane techniczne

Długość ramy (po złożeniu)	116 cm
Wysokość ramy (po złożeniu)	38 cm
Wysokość WeGo	122 cm
Głębokość siedziska	26 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Szerokość siedziska	35 cm
Minimalna długość podnóżka	25 cm
Maksymalna długość podnóżka	33 cm
Waga WeGo	11 kg
Waga WeGo z fotelikiem GoTo	13 kg

Uwaga: Nie wszystkie dzieci korzystające z fotelika GoTo w rozmiarze 2 mogą korzystać z wózka spacerowego WeGo. Należy porównać z tabelą rozmiarów.

Family Freedom

leckey.com/firefly

FireFly Siedzenie
i mobilność

Part of the
LECKEY
family circle



Splashy

Wodne przygody dla małych urwisów

Firefly Splashy to lekki, przenośny fotelik kąpielowy, którego konstrukcja umożliwia dziecku siedzenie nisko w wannie, tak aby mogło zanurzyć się w wodzie.



Cechy produktu

- Dzięki 5-punktowej uprząży lub 3-punktowemu podparciu miednicy Splashy można z łatwością dostosować odpowiednio do potrzeb dziecka związanych z korekcją postawy. Cztery odłączane ochraniacze zapewniają dodatkowe podparcie w razie potrzeby. Uprząż i piankowe podparcia można łatwo przypiąć do podstawy siedziska przy użyciu zaczepów.
 - Ciepła w dotyku pianka zachowuje miękkość, niezależnie od tego, czy jest mokra, czy sucha.
 - Podstawa fotelika Splashy umożliwia łatwe ustawienie jednej z 26 dostępnych pozycji, od pionowej (106 stopni) do całkowicie odchylonej (140 stopni).
- Lekkie, odłączane elementy ułatwiają czyszczenie.
 - Fotelik, ochraniacze i uprząże dostępne w trzech kolorach, z możliwością dowolnej kombinacji (więcej informacji na naszej internetowej).



Dostępny w 3 kolorach

Dane techniczne

Wiek	1 - 8 lat
Wysokość oparcia	610 mm
Szerokość oparcia	385 mm
Głębokość oparcia	300 mm
Szerokość siedziska	350 mm
Szerokość podstawy podłogowej	420 mm
Długość podstawy podłogowej	630 mm
Maks. waga	30 kg





Splashy Big

Wodne przygody dla dużych urwisów

Zachowując wszystkie funkcje i zalety fotelika Splashy, model Splashy Big oferuje więcej możliwości użytkownikom w wieku od 8 do 16 lat, aby mogli uczestniczyć w zabawie z przyjaciółmi.

Cechy produktu

- Przeznaczony dla użytkowników w wieku od 8 do 16 lat, o wadze maksymalnej 55 kg/122 funty.
- Fotelik Splashy Big jest lekki i niezwykle łatwy w utrzymaniu. Wykonany jest z szybkoschnącego, ciepłego w dotyku materiału, który można wyczyścić w mgnieniu oka.
- Podstawa podłogowa fotelika Splashy Big oferuje 26 opcji odchylenia oraz nową funkcję stabilizacji podczas korzystania poza wanną.



Dostępny w 2 kolorach

Dane techniczne

Wiek	8 - 16 lat
Wysokość oparcia fotelika	720 mm
Szerokość oparcia fotelika	450 mm
Głębokość podstawy fotelika	400 mm
Szerokość podstawy fotelika	450 mm
Szerokość podstawy podłogowej	420 mm
Szerokość podstawy podłogowej ze stabilizatorem	665 mm
Długość podstawy podłogowej	795 mm
Maks. waga	55 kg



LECKEY

Inne produkty

LECKEY Zaawansowane krzesło kąpielowe

Krzesło kąpielowe Advanced Bath Chair firmy Leckey zapewnia wsparcie postawy, jednocześnie gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Cechy produktu

- Zapewnia użytkownikowi odpowiednie wsparcie postawy, jednocześnie gwarantując pełne bezpieczeństwo podczas kąpieli.
- Lekka i wytrzymała rama.
- Prosta i łatwa w użyciu regulacja umożliwia ustawienie produktu w jednej z wielu różnych dostępnych pozycji w zaledwie kilka sekund.
- Szeroki zakres regulacji nóg.
- Zdemontowany pokrowiec z oddychającego materiału można prać w pralce.
- Regulacja kąta nachylenia oparcia w zakresie 0–90 stopni.
- Regulowany pas biodrowy.
- Pas piersiowy połączony z pelotami bocznymi.
- Łatwa w użyciu ręczna regulacja.
- Możliwość złożenia na płasko na czas przechowywania.



Dostępny w 2 kolorach

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	1 - 5	4 - 9	8 - 14	12 - 18
Min. wzrost użytkownika	750 mm	950 mm	1150 mm	1350 mm
Maks. wzrost użytkownika	1050 mm	1250 mm	1450 mm	1650 mm
Maks. waga użytkownika	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg

LECKEY Wózek prysznicowy

Wózek prysznicowy Shower Trolley stanowi uzupełnienie krzesła kąpielowego Advanced Bath Chair, które można w kilka sekund przekształcić w krzesło prysznicowe.

Cechy produktu

- Pozwala przekształcać krzesło kąpielowe Advanced Bath Chair w uniwersalne krzesło prysznicowe w zaledwie kilka sekund.
- Wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej.
- Solidna rama i wysokiej jakości kółka samonastawne z blokadami.
- Łatwe i bezpieczne manewrowanie po mokrych i śliskich powierzchniach.
- Możliwość dopasowania do wszystkich czterech rozmiarów krzesła kąpielowego Advanced Bath Chair firmy Leckey.



Dane techniczne

	Jeden rozmiar
Wiek	1 - 18 lat
Długość	900 mm - 1150 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość siedziska od podłogi	650 mm - 700 mm

LECKEY Sleepform

Praktyczny, wykonany z wytrzymałych materiałów zestaw do spania dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat, z możliwością regulacji.

Cechy produktu

- Pościel idealnie przylega do ciała i otacza dziecko niczym kokon, dając uczucie pewności i bezpieczeństwa. Szybko i łatwo dopasowuje się do zmieniającego się kształtu ciała.
- Kompaktowa i łatwa w transporcie, doskonale sprawdzi się podczas wizyt u rodziny czy wyjazdów wakacyjnych. Można jej używać na różnych powierzchniach.
- Może być używana również w trakcie dnia, aby ułatwić dziecku zmianę pozycji, tym samym zapewniając 24-godzinną korekcję postawy.
- Pasuje do łóżeczek dziecięcych i pojedynczych łóżek. Dopasuje się do każdej pozycji podczas snu.
- Oddychający materac.
- Prześcieradło z nadrukowaną siatką pomiarową ułatwia dobór najlepszej pozycji do spania.
- Dostępne prześcieradło z kontrolą temperatury.



Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Wiek	0 - 1 lat	1 - 5 lat	1 - 5 lat	5 - 18 lat
Pasuje do	łóżeczka dziecięcego	łóżeczka dziecięcego	pojedynczego łóżka	pojedynczego łóżka

LECKEY Ośłona biodrowa Leeway

Ośłona biodrowa Leeway to uprząż biodrowa o ergonomicznym kształcie, która zapewnia użytkownikom wózków inwalidzkich większą stabilność miednicy, jednocześnie usprawniając funkcjonowanie górnych partii ciała i oferując większy komfort.

Cechy produktu

- Elastyczne przednie paski z neoprenowymi elementami po rozpięciu wracają do pierwotnej pozycji, ułatwiając zdejmowanie osłony.
- Boczne kieszenie na wkładki żelowe z paskami zaciskowymi.
- Dzięki wkładce z poliwęglanu (niewidocznej na zdjęciu) osłona biodrowa Leeway nie odkształca się, gdy nie jest używana, co ułatwia jej zakładanie.
- Dostępne 2 klamry: standardowa, z przyciskiem zwalniającym po boku, oraz zabezpieczająca.
- Regulowane rzepy po bokach pozwalają na dopasowanie osłony Leeway do wielu różnych postaw i kształtów ciała.
- 4-punktowe mocowanie do standardowych wózków inwalidzkich. W zestawie znajdują się również wsporniki mocujące pasujące do większości podstaw wózków inwalidzkich. Dostępne dodatkowe wsporniki.



- Wyjątkowy kształt pasków z rzepami, które dopasowują się do poduszek, gwarantuje, że osłona Leeway nie ześlizgnie się do przodu ani do tyłu.

Dane techniczne

	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Min. obwód bioder	600 mm	700 mm	850 mm	950 mm
Maks. obwód bioder	800 mm	950 mm	1100 mm	1300 mm
Min. szerokość bioder	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Maks. szerokość bioder	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm

Wyłączny dystrybutor w Polsce:



Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl