



SUNRISE MEDICAL har tilldelats ISO 13485-certifikatet, som bekräftar kvaliteten på våra produkter i varje steg, från FoU till produktion. Tillval eller tillbehör finns tillgängliga till extra kostnad.



Om du har några frågor kring användning, underhåll eller säkerhet för ditt sittsystem, kontakta din Hjälpmedelscentral eller en auktoriserad återförsäljare. Om du inte känner till någon Hjälpmedelscentral eller en auktoriserad återförsäljare i närheten av där du bor, eller om du har någon övrig fråga, är du välkommen att skriva eller ringa till:

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

Återförsäljarens underskrift och stämpel

Innehåll

1.0	Information till användare	5	6.0	Manuella och eldrivna tillval	30
1.1	Denna bruksanvisning	5	6.1	Manuella sitstillval	30
1.2	För ytterligare information	5	6.2	(El)sitstillval	31
1.3	Symboler som används i denna bruksanvisning	5	7.0	Reducering av sittsystemets storlek för transportsyften	32
2.0	Säkerhet	6	7.1	Sittdyna	32
2.1	Symboler och etiketter använda på denna produkt ...	6	7.2	Ryggstödsdyna	32
2.2	Säkerhet: Temperatur	6	7.3	Swing-away-benstöd	33
2.3	Säkerhet: Rörliga delar	6	8.0	Underhåll och rengöring	34
2.4	Säkerhet: Kvävningrisk	6	8.1	Allmänt underhåll	34
2.5	Säkerhet: Brickor	7	8.2	Rengöring av sittsystemet	34
2.6	Bruksanvisning för användning av installerad fjärrstoppnnyckelenhet	7	8.3	Hygienåtgärder för begagnade rullstolar:	34
3.0	Allmän beskrivning & Avsedd användning	8	8.4	Allmänna rengöringsanvisningar:	35
4.0	Inställning av sittsystemet	9	8.5	Rengöringstillbehör:	35
4.1	Förinställning av sittdjup	9	8.6	Rengöra manöverboxen:	35
4.2	Förinställd sittbredd	9	8.7	Förvaring	35
4.3	Förinställt ryggstöd (denna justering kan endast utföras av en yrkesutbildad)	10	9.0	Avfallshantering	36
4.4	Förinställning av ryggmonterat uppfällbart armstöd med recline-funktion	12	10.0	Tekniska specifikationer:	37
4.5	Teens armstöd	13	10.1	Tillämpliga normer/standarder	37
4.6	Sidoskydd	14	10.2	Tekniska specifikationer: Zippie/Teens sittsystem	37
4.7	Förinställning av centralmonterat benstöd	15	11.0	Garanti	39
4.8	Förinställning av fast centermonterat benstöd	16			
4.9	Förinställda benstöd LIFE	17			
4.10	Förinställda benstöd LIFE- hög montering	18			
4.11	Förinställning av UNI swing away-benstöd	19			
4.12	Förinställning av swing-away benstöd- Zippie Salsa	19			
4.13	Förinställning benstöd	20			
4.14	Vadstöd	20			
4.15	Förinställning av swing away-benstöd ELR/ALR	21			
4.16	Förinställning av nackstöd	22			
4.17	Förinställning av fast/swing away-styrenhetsfäste- Teens	23			
4.18	Förinställning av fast/swing away-styrenhetsfäste- Zippie	23			
4.19	Förinställning av inkapslad swing-away styrenhet ...	24			
4.20	Förinställning av sidostöd	25			
4.21	Höftbälte/positioneringsbälte	26			
5.0	Användning av sittsystemet	27			
5.1	Komma i och ur rullstolen (överflyttning)	27			
5.2	Förbereda sig för överflyttning framåt	27			
5.3	Förbereda sig för sidoöverföring	28			
5.4	Nackstöd	29			
5.5	Swing-away styrenhetsfäste	29			

1.0 Information till användare




Tack för ditt val av en rullstol från Sunrise Medical. Sunrise Medicals mobila kvalitetsprodukter är designade för att förstärka ditt oberoende och göra ditt vardagsliv enklare.

1.1 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda och underhålla ditt sittsystem på ett säkert sätt. Denna bruksanvisning för sitsar är ett komplement till Sunrise Medicals generella bruksanvisning för rullstolar:

- Den allmänna bruksanvisningen för rullstolen
- Bruksanvisning för sittsystem (detta häfte)
- Bruksanvisning för styrenhet.

Vid behov hänvisar denna allmänna bruksanvisning för sittsystem till andra bruksanvisningar enligt nedan:

 Allmänna bruksanvisning:	Hänvisar till allmän bruksanvisning för rullstolar.
 Styrenhet:	Hänvisar till bruksanvisning för styrenhet.
 Batteriladdare:	Hänvisar till bruksanvisning för batteriladdare.

Använd inte din rullstol förrän hela bruksanvisningen (och alla andra häften) har lästs och förstås!



Om någon av bruksanvisningarna inte inkluderades med din rullstol, kontakta din återförsäljare omedelbart. Utöver den här bruksanvisningen finns det också en servicehandbok för kvalificerade specialister.

1.2 För ytterligare information

Kontakta din hjälpmedelscentral om du har frågor gällande användning och underhåll av, eller säkerhet kring, din rullstol. Om du inte fått din rullstol via en hjälpmedelscentral eller om du har några frågor till oss, kontakta Sunrise Medical antingen per brev eller telefon.

För information kring produktsäkerhetsnotiser och återkallade produkter, gå till www.SunriseMedical.se


1.3 Symboler som används i denna bruksanvisning

 FARA/VARNING!	Potentiell risk för personskada eller allvarlig skada eller dödsfall
 VIKTIGT!	Potentiell skada på utrustning


Om du inte följer dessa anvisningar kan det resultera i fysiska skador, skador på produkten eller skador på miljön!

Meddelande till brukaren och/eller patienten: En allvarlig incident som inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brukaren och/eller patienten är etablerad.

Fig. 1.1

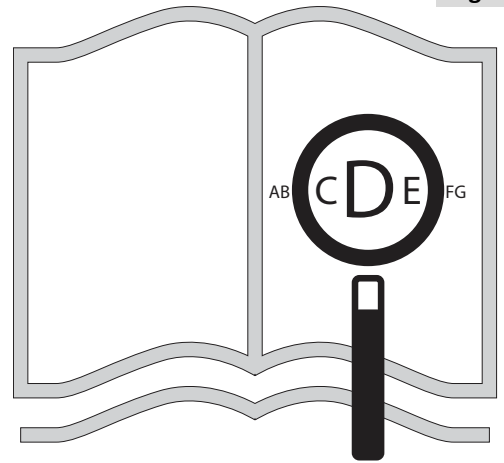

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format på www.SunriseMedical.se

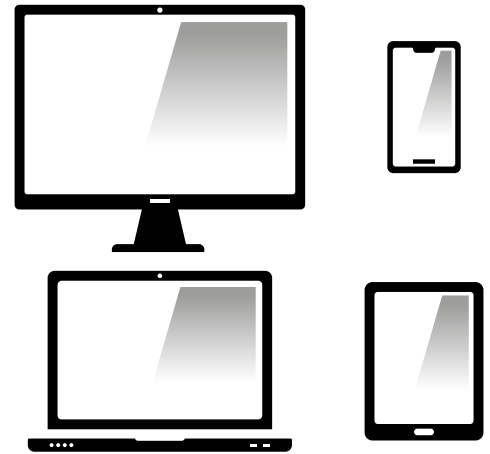

eller också på begäran i stor text.



2.0 Säkerhet

Följ anvisningarna bredvid dessa varningssymboler noggrant! Undlåtenhet att följa dessa anvisningar kan resultera i fysiska skador, skador på rullstolen eller miljön. När möjligt, finns säkerhetsinformation i det relevanta kapitlet.

2.1 Symboler och etiketter använda på denna produkt

Skyltar, symboler och anvisningar som fästs på rullstolen omfattar del av säkerhetsutrustning. De får aldrig täckas över eller tas bort. De måste förbli intakta och vara tydligt läsbara under hela rullstolens livslängd.

Byt ut eller reparera alla oläsliga eller skadade skyltar, symboler och anvisningar omedelbart. Kontakta din hjälpmedelscentral/ återförsäljare för assistans.

Fig. 2.1: Varning – Klämrisk.

Fig. 2.2: Varning – Tillse att sitsinfästningens snabbkoppling är ordentligt åtskruvad innan du använder rullstolen, särskilt på sluttande underlag

Fig. 2.3: Varning – Kör inte rullstolen i en sluttning med ryggstödet tillbakalutat och/eller sitsen i stående läge

2.2 Säkerhet: Temperatur

FARA/VARNING!

- Om du inte använder rullstolen, se till att den inte utsätts för direkt solljus under längre perioder. Vissa delar av rullstolen, såsom sitsen, ryggen och armstöden kan bli varma om de har utsatts för starkt solljus under lång tid. Detta kan orsaka brännskador eller allergiska reaktioner på huden.

2.3 Säkerhet: Rörliga delar

FARA/VARNING!

En rullstol har rörliga och roterande delar. Kontakt med rörliga delar kan orsaka allvarliga personskador eller skador på rullstolen. Kontakt med rörliga delar på rullstolen bör undvikas.

- Elektrisk tilt för justering av utrymme
- Elektrisk sitslift som tillval
- Elektrisk justering för bakåtlutning
- Swing-away konsoll för styrenhet

2.4 Säkerhet: Kvävningsrisk

FARA/VARNING!

Detta förflyttningshjälpmedel använder små delar som under vissa omständigheter kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

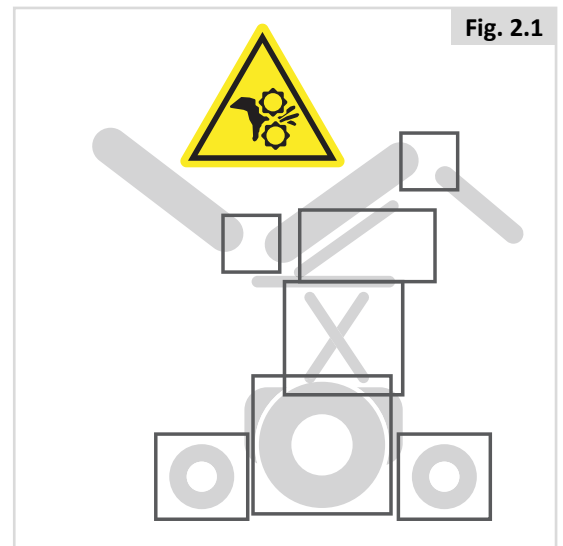


Fig. 2.1



Fig. 2.2

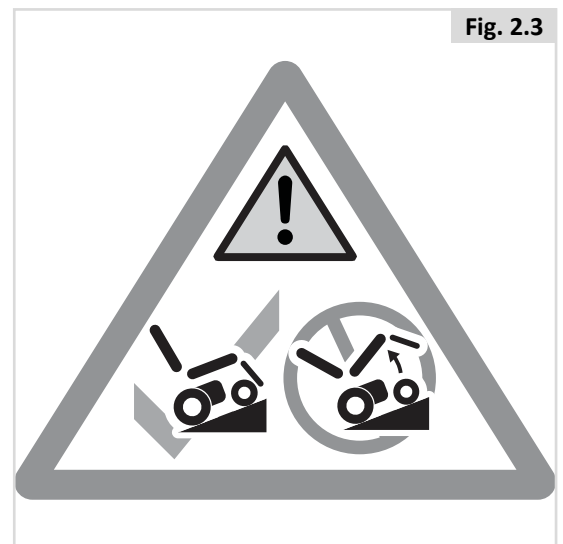


Fig. 2.3

2.5 Säkerhet: Brickor

Säkerhet: Bricka/hållare för ventilator

FARA/VARNING!

Om en ventilator monteras på rullstolen kommer dess stabilitet och totalvikt att påverkas.

- Tillse att ventilatorn och batterierna är ordentligt fastmonterade på brickan/hållaren före färd.
- Innan du kör med ventilator på rullstolen, vänj dig vid att rullstolen nu tar mer plats, så att du undviker kollisioner.
- Ska du vinkla ned ryggstödet, kontrollera först att ventilatorn inte är i vägen.
- Observera att ventilatorn utgör en klämrisk för fingrarna när ryggstödet vinklas bakåt.
- Brickan/hållaren ventilatorn monteras på är avsedd endast för andningshjälpmedel och tillhörande batterier, men inte exempelvis en syrgastub. Placering av främmande föremål på brickan kan leda till att rullstolen blir instabil.
- Ventilatorbrickan måste monteras och underhållas av en Sunrise-återförsäljare.

Säkerhet: Svängbart bord:

FARA/VARNING!

- Högsta tillåtna vikt för bordet är 2,5 kg.
- Överbelamra inte bordet, det kan gå sönder och stolen kan bli instabil.
- Bordet kan skadas av brinnande cigaretter eller andra värmekällor.
- Se till att alla kroppsdelar och kläder är fria vid placering av brickor för användning.

2.6 Bruksanvisning för användning av installerad fjärrstopppnyckelenhet.

VARNING!

Denna bruksanvisning måste läsas av alla ansvariga vuxna som kommer i kontakt med denna elrullstol. Den ska också läsas tillsammans med den användarinformation som medföljer fjärrstopppnyckelenheten och varningarna som ges i relevanta avsnitt i bruksanvisningen.

VARNING!

Eftersom fjärrstopppnyckelsändaren kan låsa rullstolen utan föregående meddelande brukaren får den endast användas av en ansvarig vuxen.

Fjärrstopppnyckeln får inte lämnas obebakad och får inte lämnas inom räckhåll för barn eller obehöriga personer.

VARNING!

Innan och varje gång rullstolen används måste ledsagaren/vårdaren se till att fjärrstopppfunktionen fungerar tillfredsställande innan den används.

Användarvarningar och användningsbegränsningar:

OBS/VIKTIGT!

Det är dock brukaren som styr rullstolen och när knappen på fjärrkontrollen trycks in aktiveras rullstolens elektroniska körspärrfunktion. Detta leder till ett kontrollerat stopp för rullstolen om den rör sig och hindrar brukaren från att köra stolen i någon riktning. Spärrfunktionen avaktiveras när du trycker på fjärrknappen en gång till.

OBS/VIKTIGT!

Var noga med att se till att rullstolen inte är spärrad i en farlig miljö eller på en plats där den används. (t.ex. vid körning på väg eller vid körning vid järnvägs-/spårvagnsövergång)

VARNING!

Även om funktionen för körspärr kommer att föra en rullstol till ett kontrollerat stopp rekommenderar Sunrise Medical starkt att ett midjebälte eller sele monteras på stolen, och att brukaren alltid ska bära den i rullstolen.

OBS/VIKTIGT!

Rullstolen måste stoppas på ett kontrollerat sätt och därför måste man inse att det finns ett begränsat avstånd för att stanna rullstolen på och att det inte är ett nödstopp (tvärstopp).

OBS/VIKTIGT!

Rullstolens fjärrstoppfunktion är helt beroende av integriteten hos radiokommunikationslänken mellan sändaren (fjärrstoppnyckel) och mottagaren (rullstol). Om kommunikationslänkens integritet är bruten eller skadad kan det hända att rullstolen inte kan stoppas. Källor till kommunikationsstörningar kan orsakas av, men inte begränsas till att:

- Batteriströmmen till sändaren eller mottagaren inte är tillräcklig för att upprätthålla kommunikationen.
- Miljön hindrar den överförda signalen, t.ex. rullstolen, måste vara i direkt siktlinje eller absorberar den överförda signalen, t.ex. stora metallföremål i närheten.
- Avståndet mellan sändaren och rullstolen överskrider räckvidden för sändnings-/mottagarenheterna.
- Andra störande radiosändare finns i närheten, t.ex. fjärrstyrda garagedörrar, mobiltelefoner, radiosändare, larmkommunikation, strömfördelningskablar.
- Miljöeffekter; åskväder, regnvatten som tränger in i sändnings-/mottagarenheterna.


3.0 Allmän beskrivning & Avsedd användning

Denna rullstol är utrustad med Sedeo Lite sittsystem. Sedeo Lite sittsystem erbjuder utmärkt stöd för huvud, bål, armar och ben. Optimalt kroppsstöd understödjer maximal självständighet för rullstolsbrukaren.

Rullstolen måste justeras av en kvalificerad specialist. Felaktiga inställningar kan ha negativa konsekvenser för sittställningen.

Huvudkomponenter (Fig. 3.1):

1. Nackstöd
2. Styrspak
3. Armstöd
4. Sittdyna
5. Benstöd
6. Ryggstöd

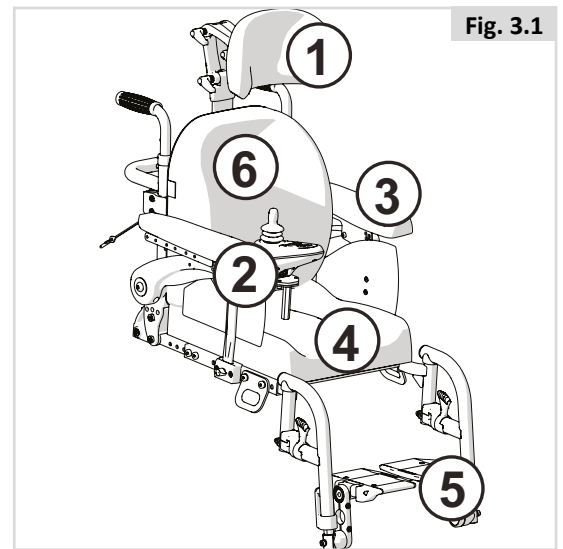

4.0 Inställning av sittsystemet


Den genomsnittliga rullstolsbrukaren finns inte. Det är orsaken till varför Sunrise Medicals rullstolar kan förinställas till brukarens specifika behov.

Förinställningar utförs en gång första gången rullstolen ska användas. Dessa måste utföras av en kvalificerad specialist, såvida inte annat anges uttryckligen.

4.1 Förinställning av sittdjup

Ryggstödet position på ramen (Fig. 4.1):

1. Lossa och ta bort 2 x (A) på båda sidor.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt alla (A) fästelement.

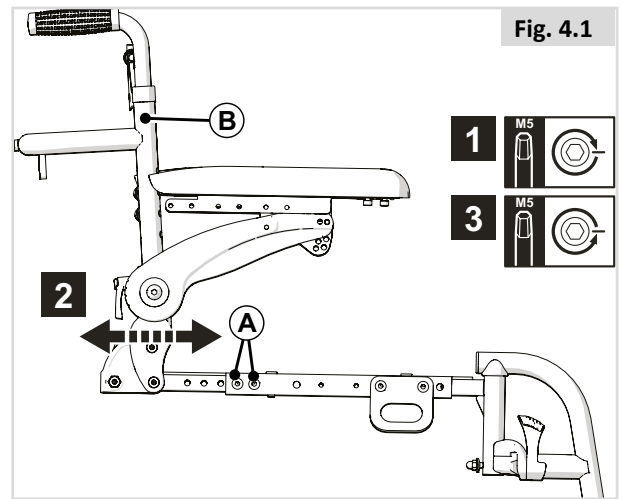


4.2 Förinställd sittbredd

För att justera sittramen behöver sittplattan och ryggramens bredd justeras samtidigt. För en enkel förklaring nämns dessa i fig 4.2 och 4.3 separat.

Sittbreddjustering (Fig. 4.2 & 4.3)


Lyft av sittdynan från kardborrebanden (Velcro®) för åtkomst till sittplattorna.

1. Lossa och ta bort 10 x (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Justera (C) till önskat läge.
4. Sätt tillbaka och dra åt alla (A) fästelement.

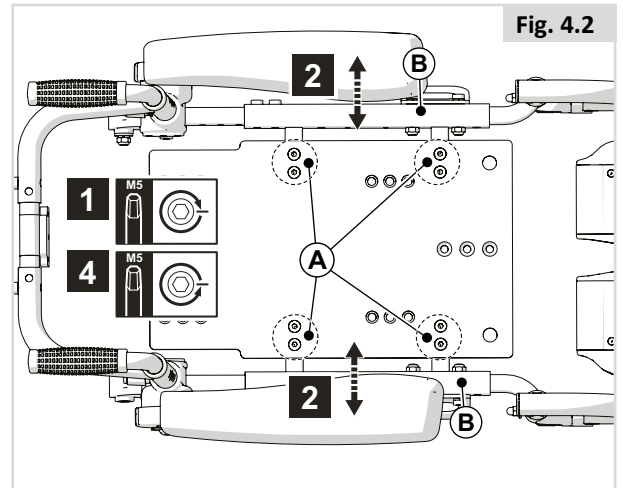

⚠ OBS/VIKTIGT!


Det finns två storleksinställningar för ryggramens breddjustering. En för 30-34 cm och en för 36-40 cm.

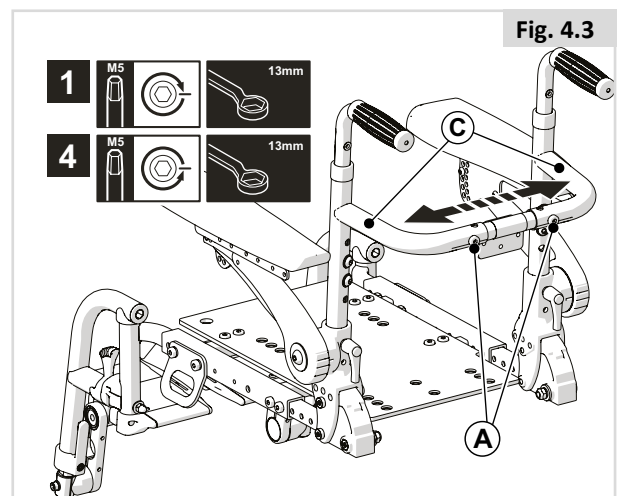

4.3 Förinställt ryggstöd (denna justering kan endast utföras av en yrkesutbildad)

Ryggstödsvinkel (Fig. 4.4)


1. Lossa och ta bort (A) båda sidor.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

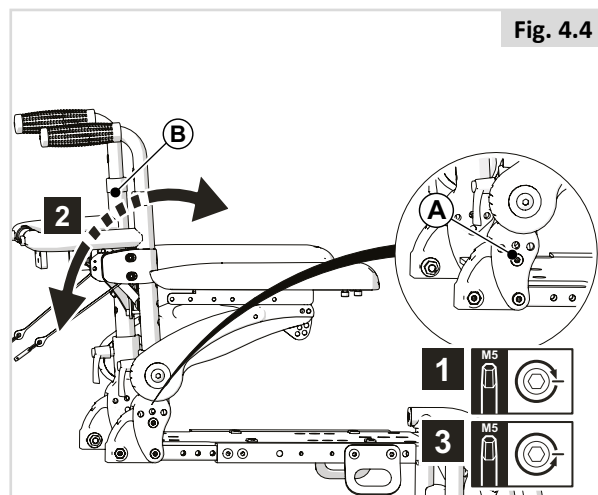

Ryggstöds höjd för hängmatterygg (Fig. 4.5)


(Ta bort sittkläder innan du fortsätter)

1. Lossa och ta bort 4 x (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).
4. Sätt tillbaka sittkläder.

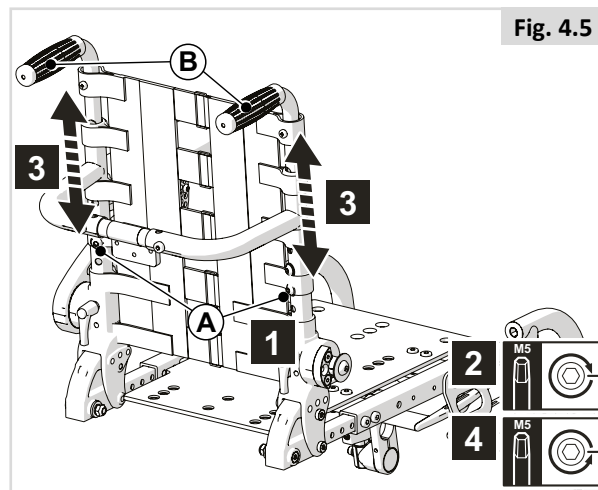

Ryggstöds höjd SEDEO LITE Ryggdyna (Fig. 4.6)


1. Lossa 2 x (A) på båda sidor.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt alla (A) fästelement.

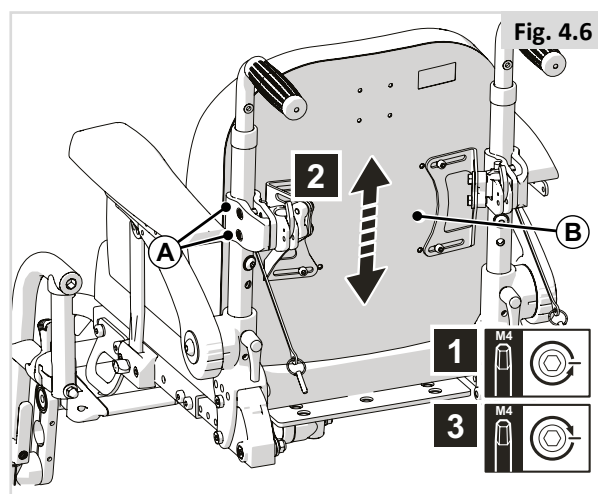


Hängmatterygg med justerbara remmar (Fig. 4.7)


Rullstolen har en hängmatterygg som kan justeras efter ryggens krökning för att uppnå en bekväm sittställning och bra stabilitet. Brukaren kan sitta i stolen när du justerar kurvatur på rygg.

1. Fällbar (A).
2. Lossa eller spänn åt (B) med kardborreband.

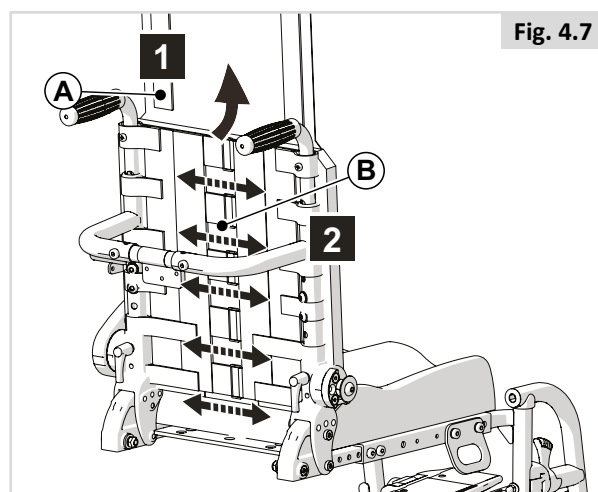

J3 ryggstöd, (Fig. 4.8)

 OBS: Jay 3 ryggstöd kan användas i kombination med Sedeo Lite sittsystem. Se J3 Rygg bruksanvisning för montering och justering.

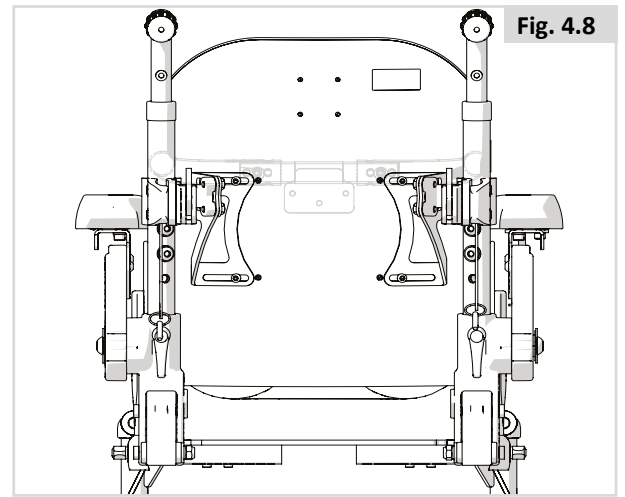

4.4 Förinställning av ryggmonterat uppfällbart armstöd med recline-funktion

Armstödshöjd

Grov- eller finjustering är en tvådelad process:

DEL 1 (Fig. 4.9)

1. Vrid (A) för att justera (B).

DEL 2 (Fig. 4.10)

1. Lossa den bakre skruven (A) ett varv och ta sedan bort (B).
2. Justera (C) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A) & (B).

Armstödsdyna djup (Fig. 4.11)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS

För att nå den bakre skruven för att sänka armstödet höjd, lossa skruvarna (A) i Figur 4.10 och justera vinkeln på dynan först.

FARA/VARNING!

Alla skruvar bör kontrolleras periodvis för åtdragning. Om armdynan är lös kan den glida ner vid tryck.

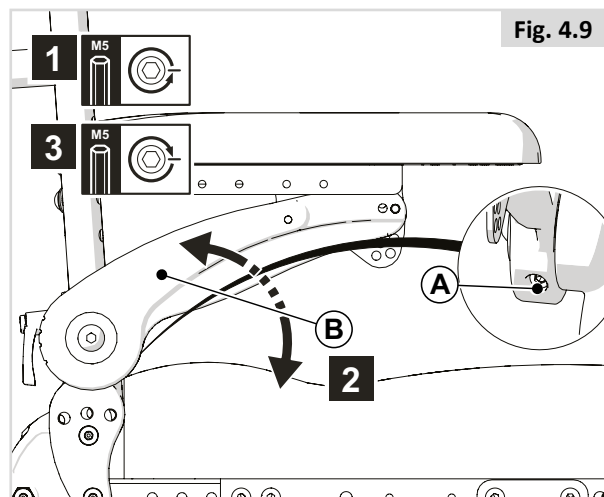


Fig. 4.9

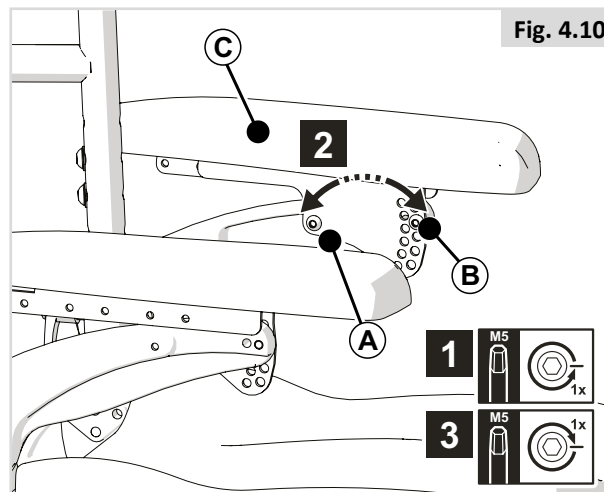


Fig. 4.10

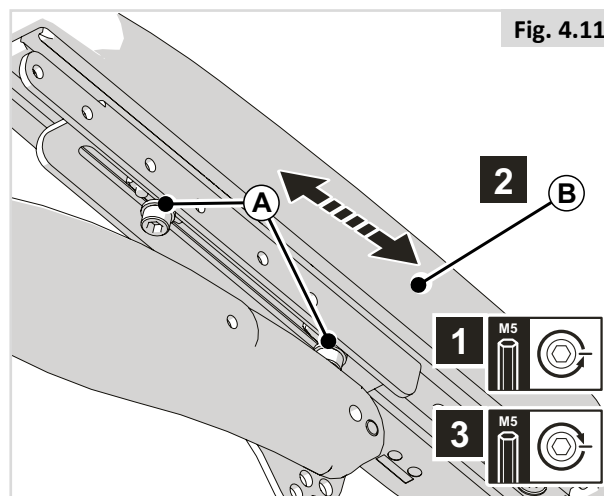


Fig. 4.11

4.5 Teens armstöd

Armstödshöjd

Grov- eller finjustering är en tvådelad process:

DEL 1 (Fig. 4.12)

1. Vrid (A) för att justera (B).

DEL 2 (Fig. 4.13)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Armstödsdyna djup (Fig. 4.14)




1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS

För att nå den bakre skruven för att sänka armstödet höjd, lossa skruvarna (A) i Figur 4.12 och justera vinkeln på dynan först.

FARA/VARNING!

Alla skruvar bör kontrolleras periodvis för åtdragning. Om armdynan är lös kan den glida ner vid tryck.

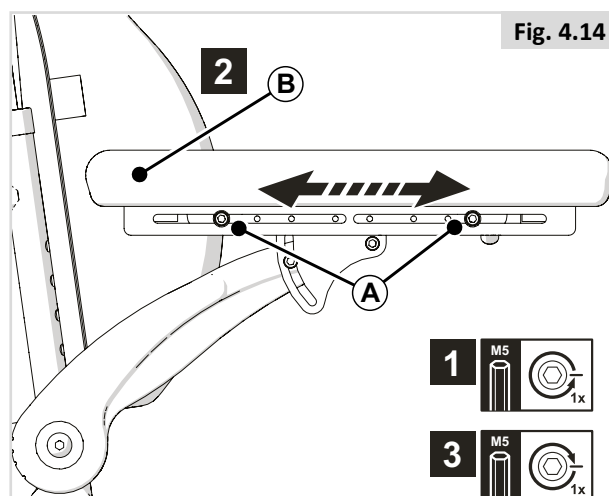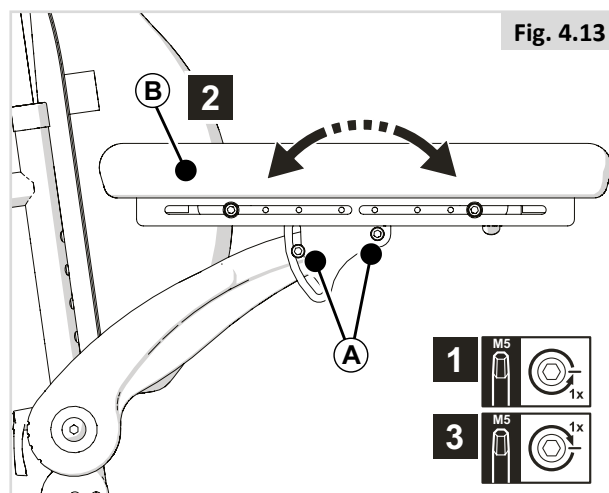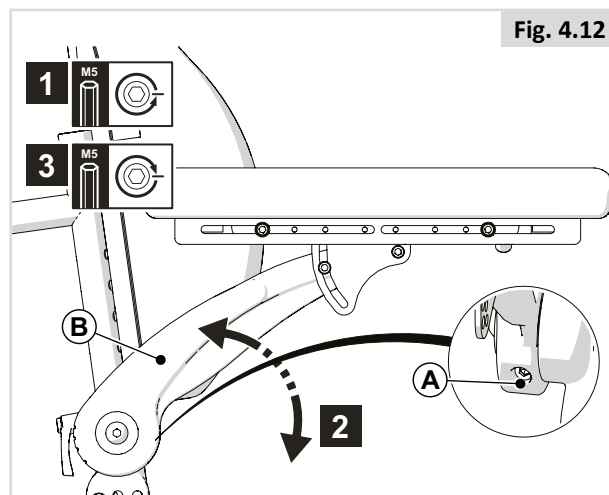



4.6 Sidoskydd

Rakt sidoskydd höjdjustering (Fig. 4.15)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Inbockat sidoskydd höjdjustering (Fig. 4.16)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

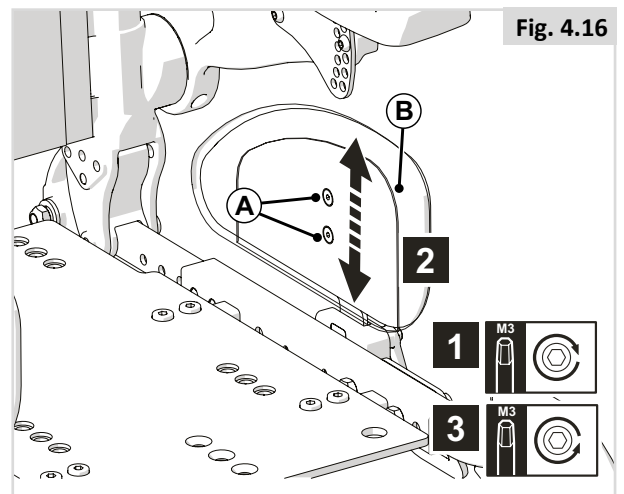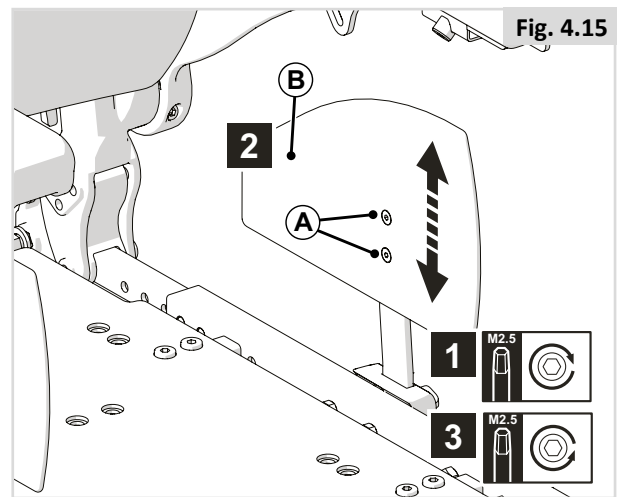

4.7 Förinställning av centralmonterat benstöd

Underbenslängd (Fig. 4.17)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!




Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Vristvinkel (Fig. 4.18)

1. Fäll upp (A).
2. Vrid (B) för att reglera vristvinkeln enligt önskemål.
3. Fäll (A) ner.

Centralt vadvästöd höjd (Fig. 4.19)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

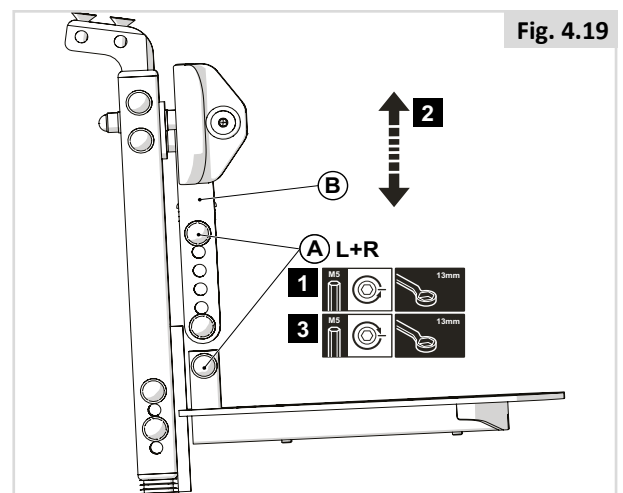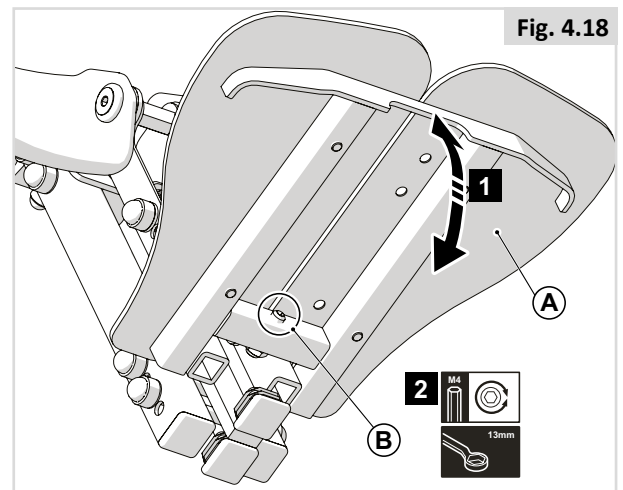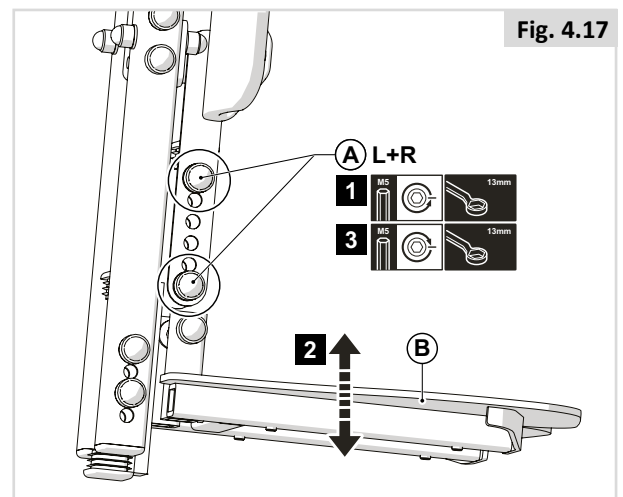

4.8 Förinställning av fast centermonterat benstöd

Underbenslängd (Fig. 4.20)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

Vristvinkel (Fig. 4.21)




1. Fäll upp (A).
2. Vrid (B) för att reglera vristvinkeln enligt önskemål.
3. Fäll (A) ner.

FARA/VARNING!

- Efter justeringen och med sitsen i normal driftposition. Se till att det alltid finns ett fritt utrymme (>25 mm) mellan golvet och fotplattan.
- Utför detta test med brukaren sitter i rullstolen och använder benstöden.
- Användning av rullstolen med benstöden inställda för lågt kan resultera i personlig skada eller skada på rullstolen och dess omgivning.

Vadstödet höjd (Fig. 4.22)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

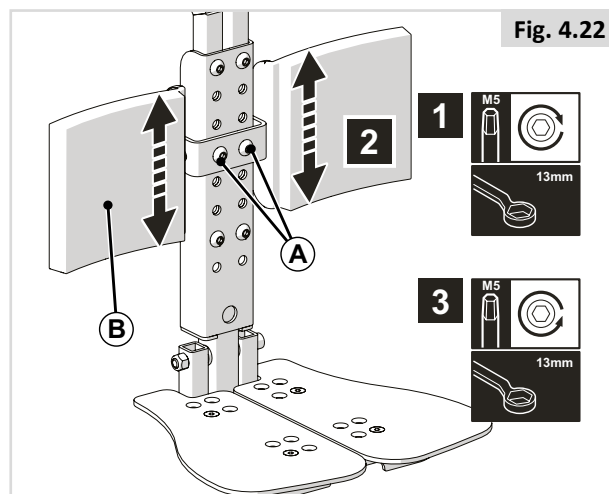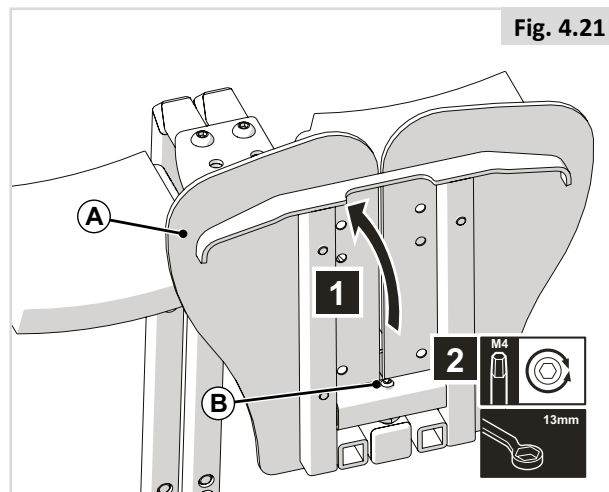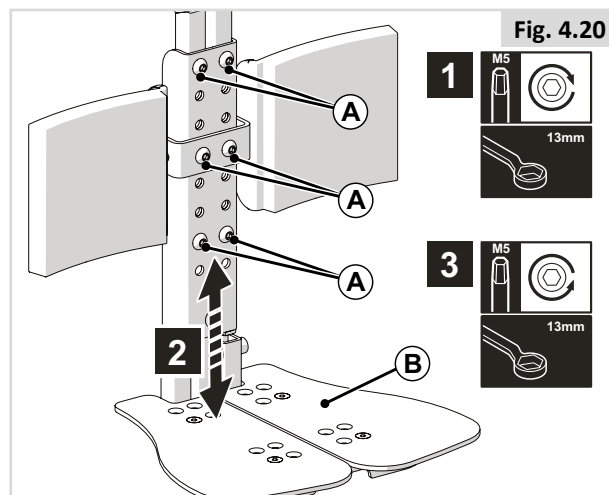

4.9 Förinställda benstöd LIFE

Underbenslängd (Fig. 4.23)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Fotstöds vinkel (Fig. 4.24)




1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Fotstöds djup (Fig. 4.25)

1. Avlägsna (A)
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Ersätt (A).

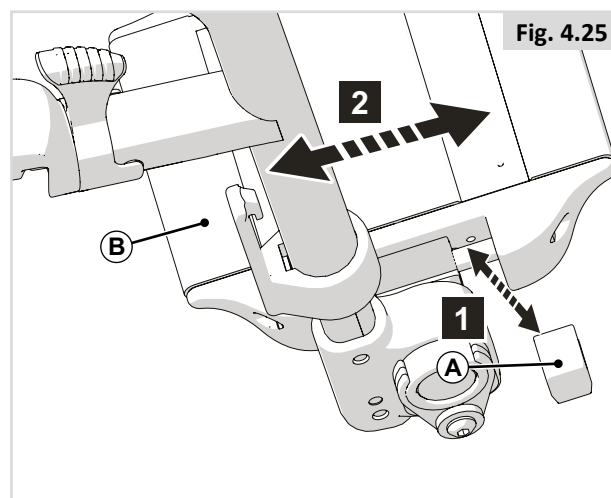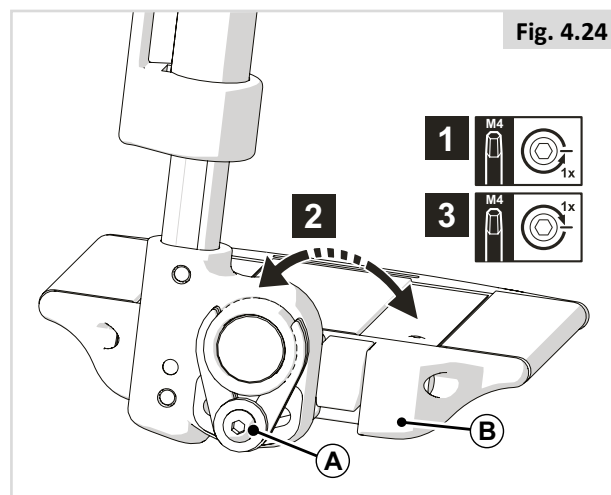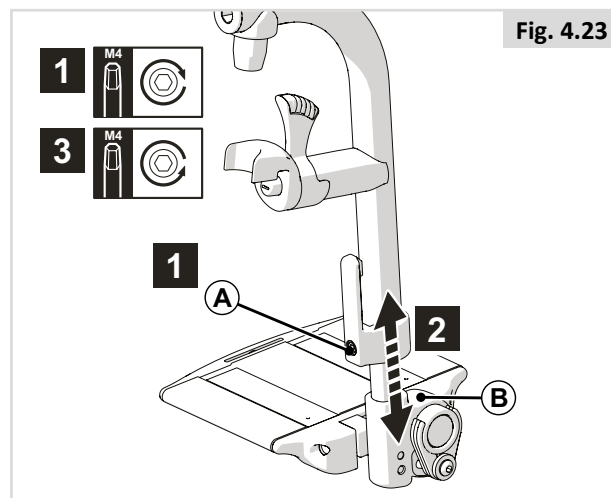

4.10 Förinställda benstöd LIFE - hög montering

Underbenslängd (Fig. 4.26)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

! OBS/VIKTIGT!




- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rollstolen att köra över hinder.

Fotstöds vinkel (Fig. 4.27)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Fotstöds djup (Fig. 4.28)


1. Avlägsna (A)
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Ersätt (A).

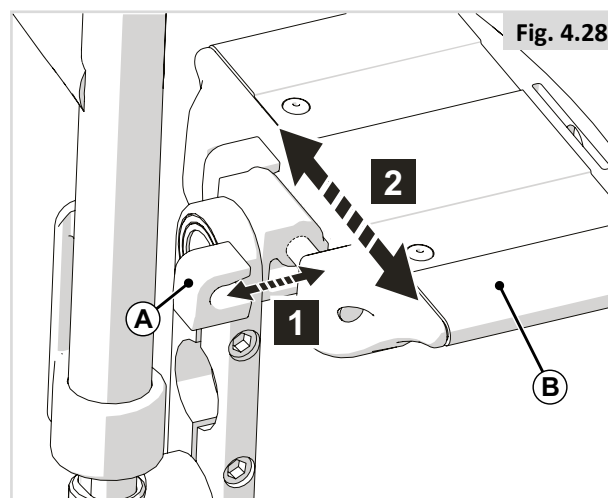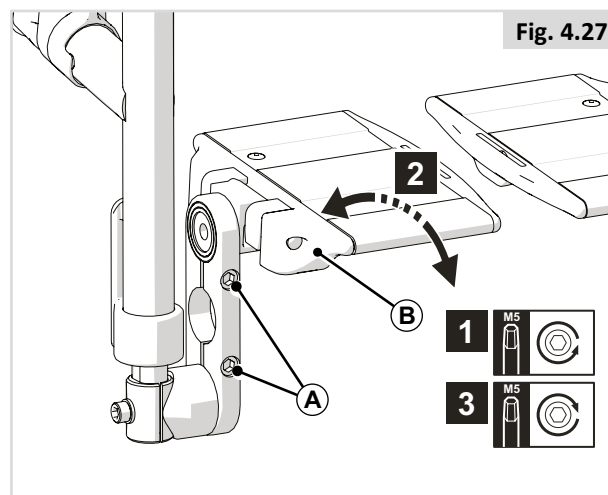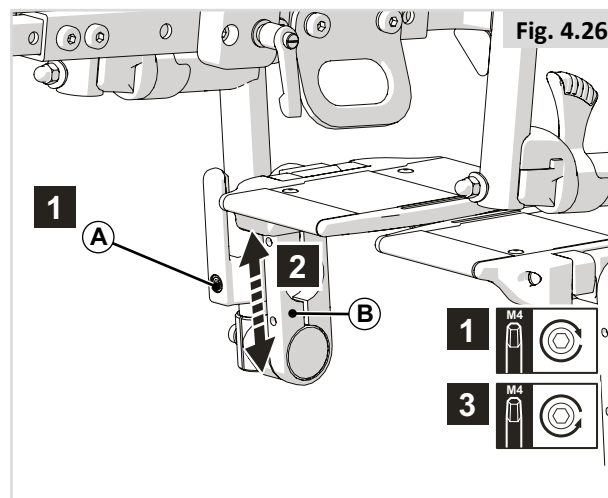

4.11 Förinställning av UNI swing away-benstöd

Underbenslängd (Fig. 4.29)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

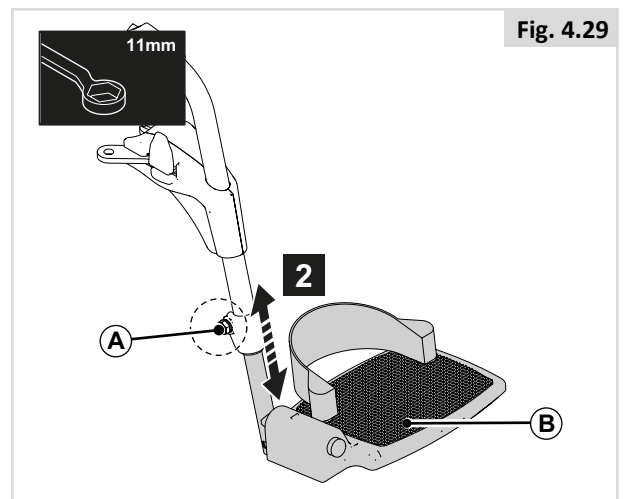

4.12 Förinställning av swing-away benstöd - Zippie Salsa

Underbenslängd (Fig. 4.30)



1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Fotstödetts vinkel (Fig. 4.31)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

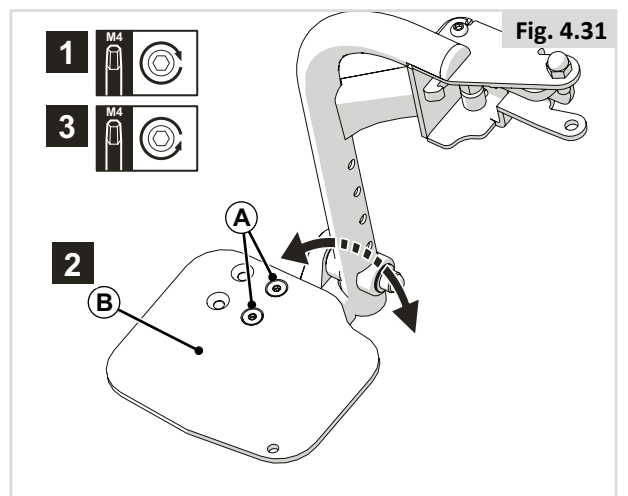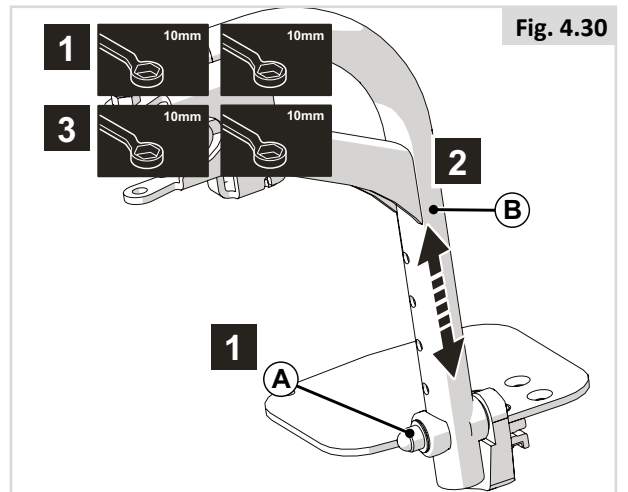

4.13 Förinställning benstöd

Underbenslängd (Fig. 4.32)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

⚠ OBS/VIKTIGT!

- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Fotstöds vinkel (Fig. 4.33)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).





4.14 Vadstöd

Vadstöds höjd (Fig. 4.34)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstöds djup (Fig. 4.35)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

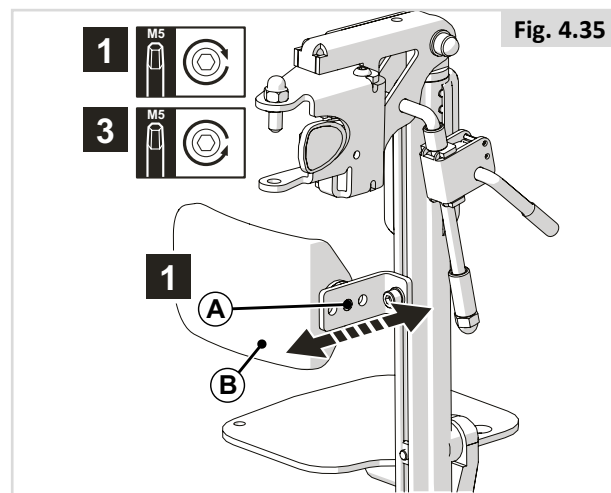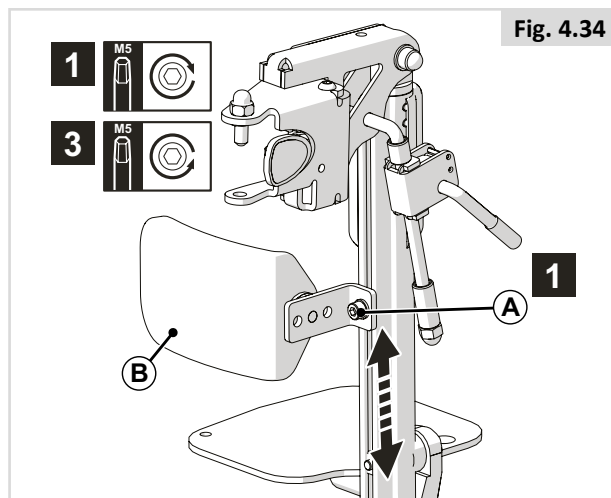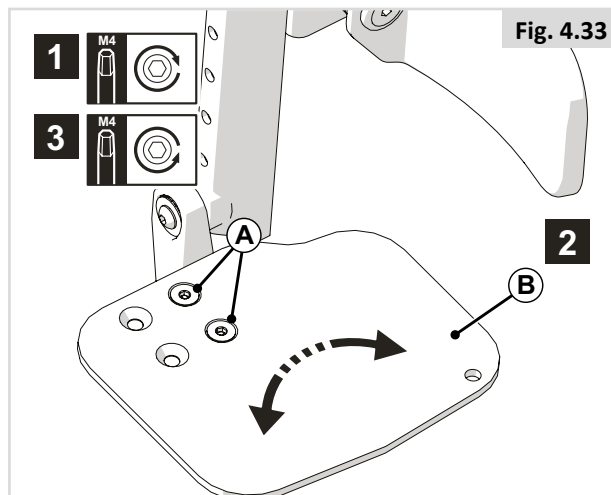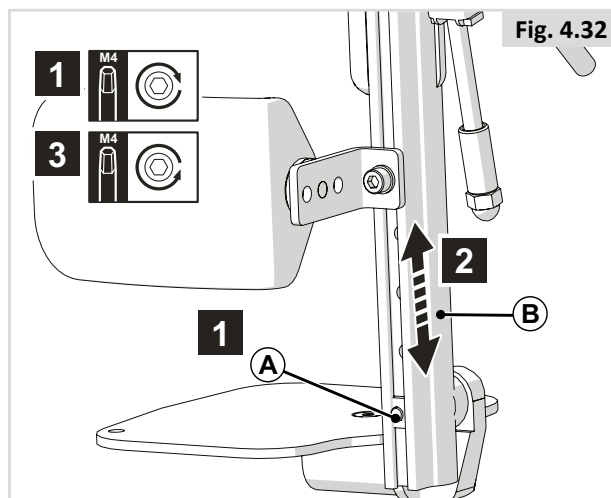

4.15 Förinställning av swing away-benstöd ELR/ALR

Underbenslängd (Fig. 4.36)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

! OBS/VIKTIGT!

Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Vristvinkel (Fig. 4.37)





1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstödets höjd (Fig. 4.38)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstödets höjd (Fig. 4.39)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

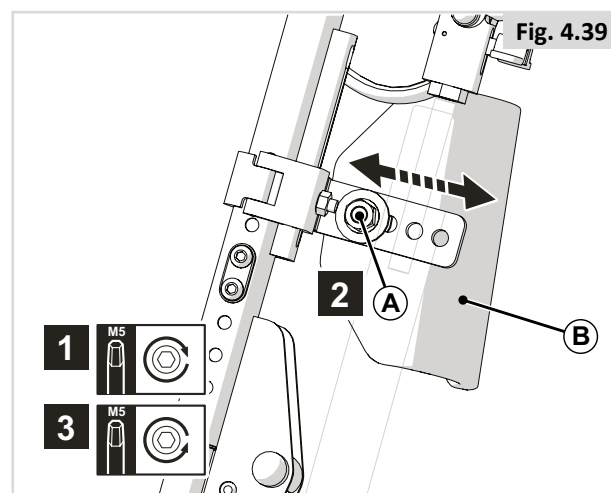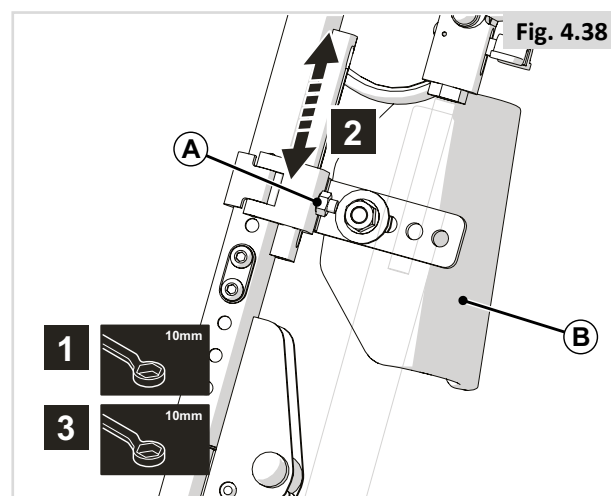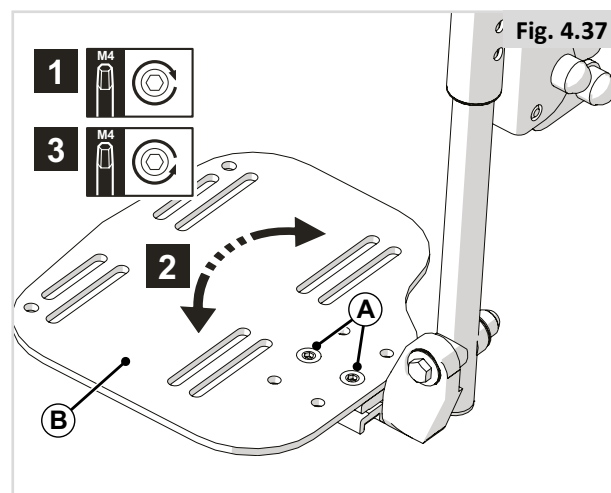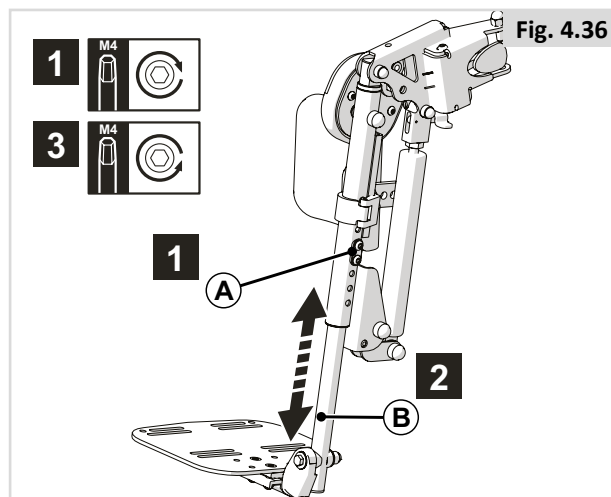


4.16 Förinställning av nackstöd

FARA/VARNING!

- Om ett nackstöd är ett av de tillval som valts för brukare/stol, kör aldrig stolen utan att nackstödet är monterat.
- Använd aldrig en stol utan ett nackstöd om en person transporteras stolen i ett fordon.


Nackstöd höjd (Fig. 4.40)

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

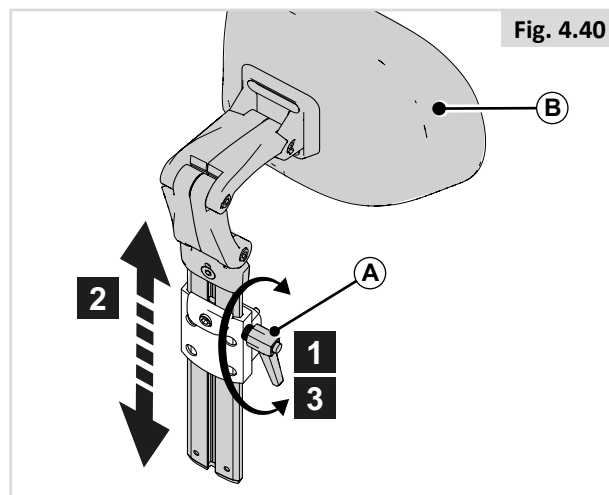

Minnesinställning (Fig. 4.41)

1. Lossa (C) ett varv.
2. Skjut (D) så långt ner som möjligt.
3. Dra åt (C).

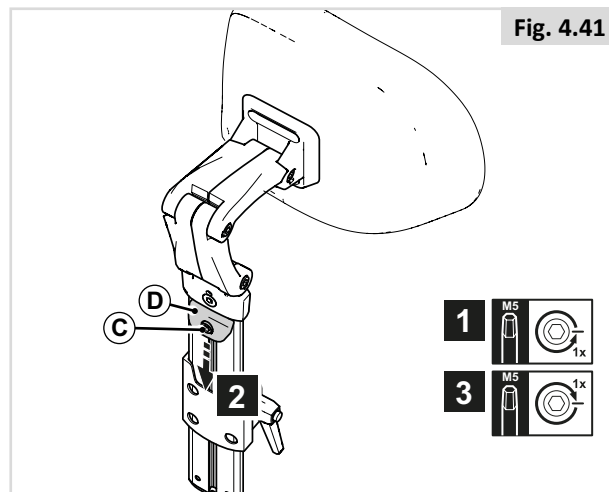

Nackstöd läge (Fig. 4.42)



1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

Korrigerar nackstödet höjd och tilla nackstödet dyna enligt önskemål.

Nackstödsdyna position i bredd (Fig. 4.43)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

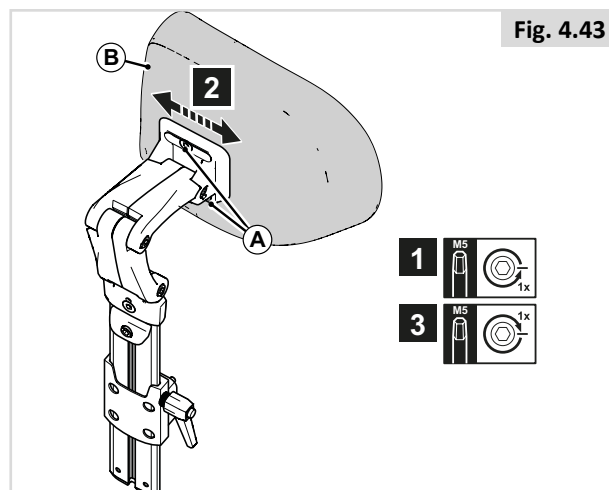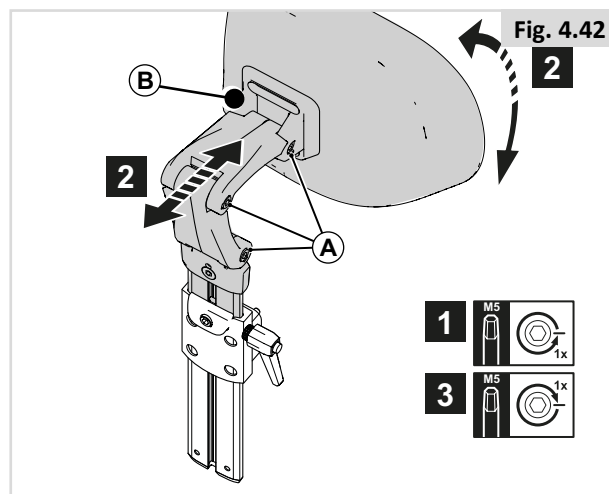


4.17 Förinställning av fast/swing away-styrenhetsfäste - Teens

Djup på styrenhet (Fig. 4.44)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (Fig. 4.45)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

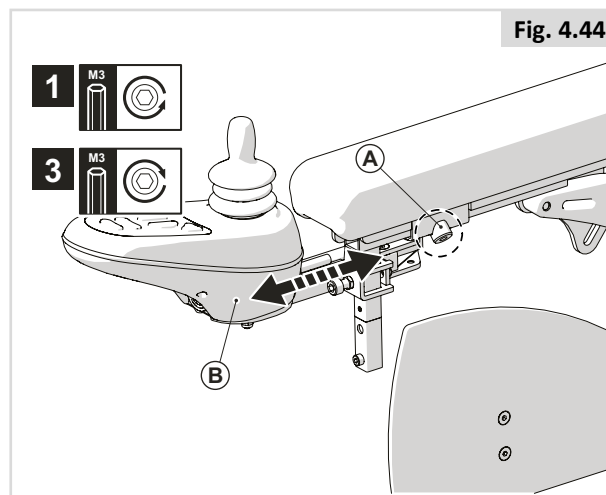




4.18 Förinställning av fast/swing away-styrenhetsfäste - Zippie

Djup på styrenhet (Fig. 4.46)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (Fig. 4.47)

1. Lossa och ta bort (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Sätt tillbaka och dra åt (A).

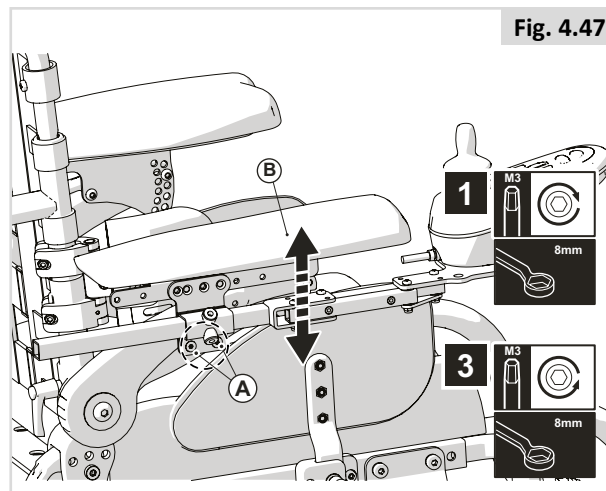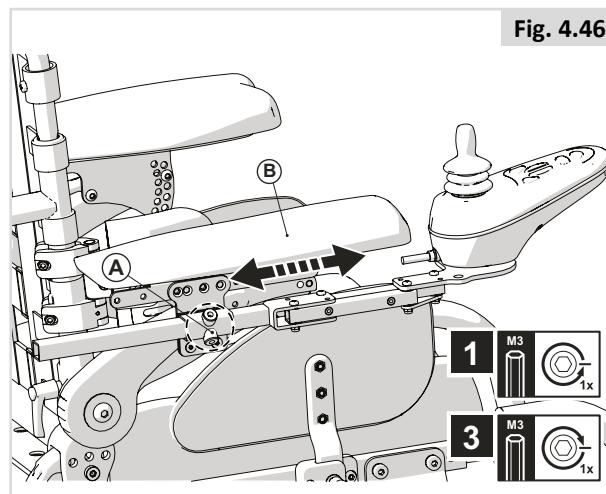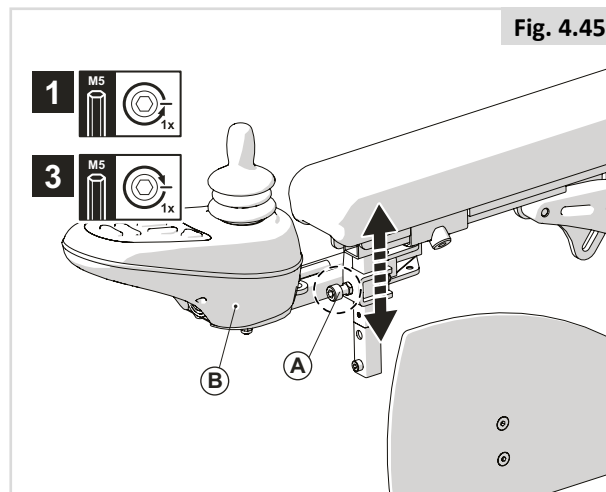

4.19 Förinställning av inkapslad swing-away styrenhet

Djup på styrenhet (Fig. 4.48)




1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (1) (Fig. 4.49)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (2) (Fig. 4.50)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

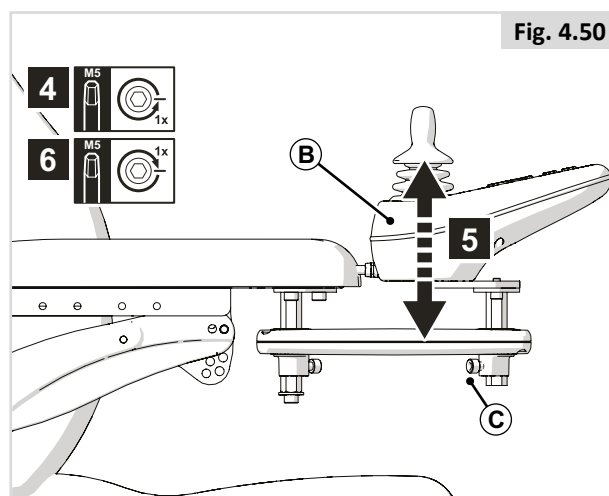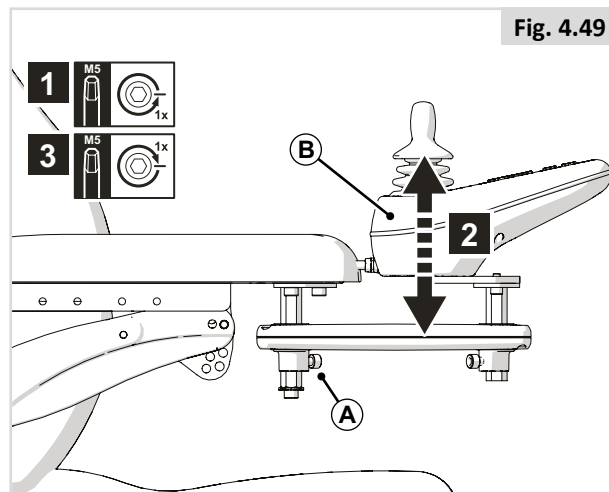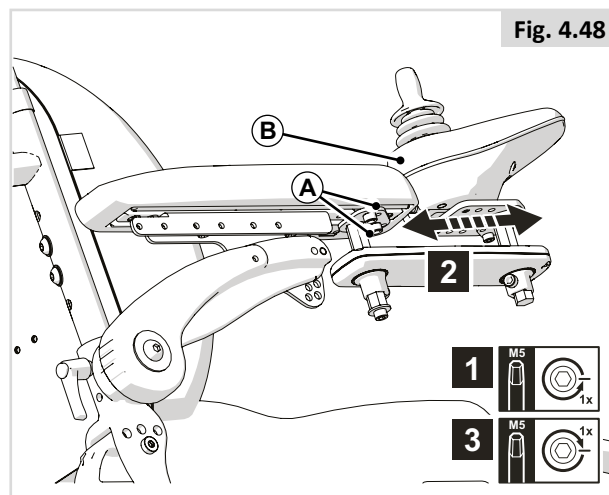

4.20 Förinställning av sidostöd

Sidostöd höjd (Fig. 4.51)




1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Sidostöd djup (Fig. 4.52)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Sidostöd vinkel (Fig. 4.53)

1. Lossa (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

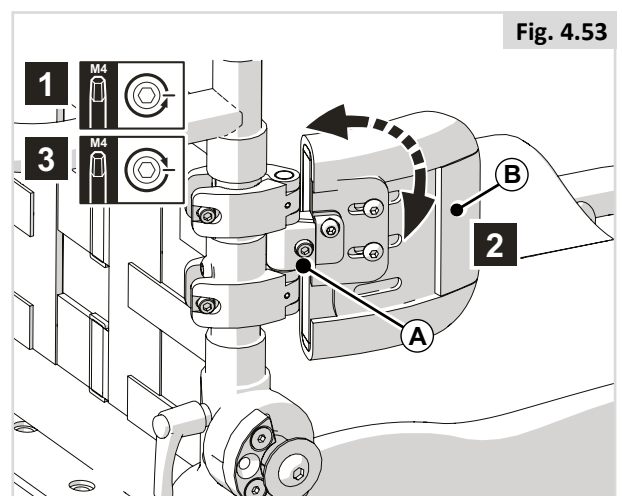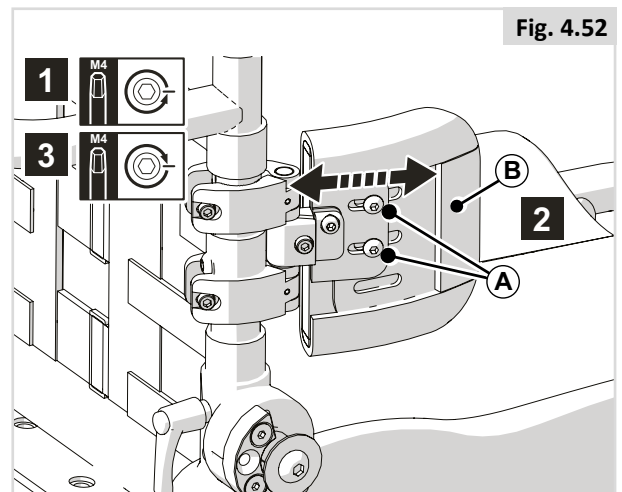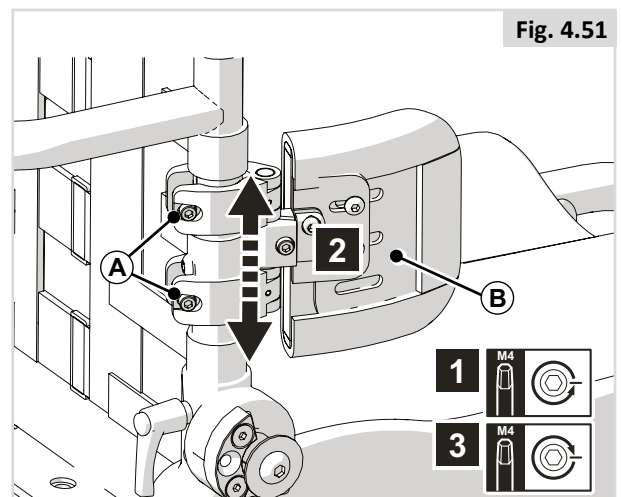

4.21 Höftbälte/positioneringsbälte

FARA/VARNING!

- Denna produkt används endast för att positionera en enskild person i en rullstol.
- Höftbälten är inte lämpliga för transportändamål, godkända fasthållningssystem måste användas.
- Om dessa varningar inte åtföljs kan det resultera i plötslig skada eller dödsfall.
- Se till att ledsagaren är utbildad i korrekt skötsel av bältena.
- Utbildade ledsagare kan leda till förseningar om en nödsituation uppstår.

Montering av höftbälte/positioneringsbälte

1. Anslut (A) till sitsens ram med hjälp av en skruv till vänster och till höger. (Fig. 4.55)

Positionera en person med ett höftbälte

- Justera inte höftbältet hårdare än att du får plats med en hand i mellanrummet (Fig. 4.56).
- Handens spelrum ska vara när höftbältet är normalspänt och inte medge större mellanrum eller öglor.
- Normalt ska höftbältet sitta i en vinkel av ca 45° (Fig. 4.57), och ska, när det sitter rätt, hindra användaren från att glida nedåt i sitsen.
- Lägg bältet löst över sitsen med spännets öppningsdel vänd åt höger för en vänsterhänt person och åt vänster för en högerhänt. För den andra änden av bandet genom öppningen mellan ryggstödet stolpar och ryggstöd.

FARA/VARNING!

- Kontrollera alltid att positioneringsbältet är korrekt säkrat och justerat innan du tar det i bruk.
- Om en rem är för lös kan det leda till att brukaren glider ned och detta kan orsaka allvarliga personskador.
- Kontrollera regelbundet om höftbälte eller fästdelar uppvisar tecken på slitage eller skador. Byt ut eventuella slitna delar.
- Kontrollera vid service att frigöringsspännet har korrekt funktion och om materialet eller plastfästen är slitna.
- Regelbundna kontroller/aktiviteter:
- Som med alla positioneringskomponenter finns det ett behov av korrigerande justeringar allt eftersom personen ändrar sin sittposition över tid.
- Kontrollera bältena regelbundet för korrekt installation för att säkerställa säkerhet och komfort för brukaren.

Fig. 4.54

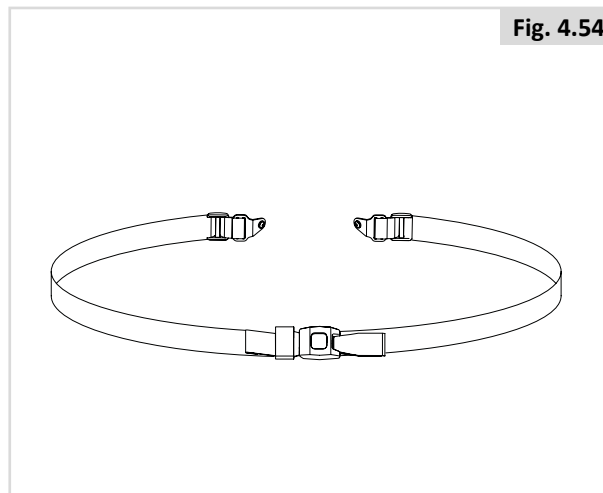


Fig. 4.55

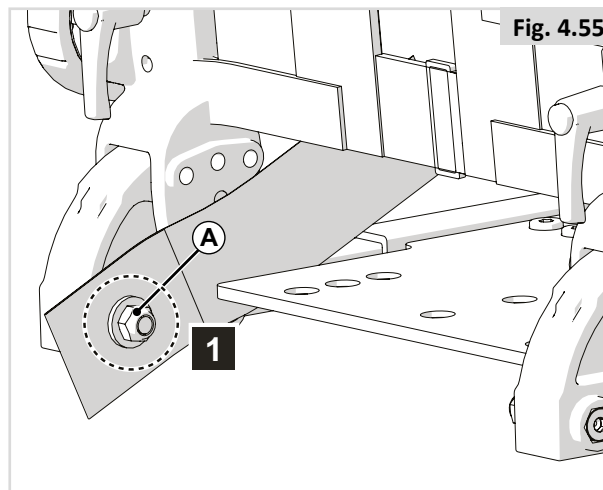


Fig. 4.56


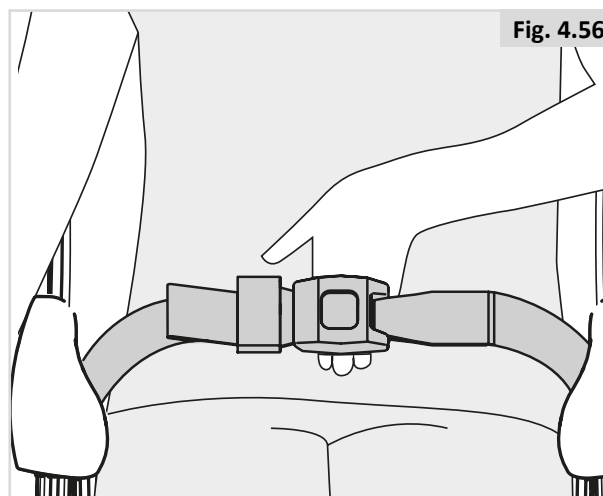


Fig. 4.57

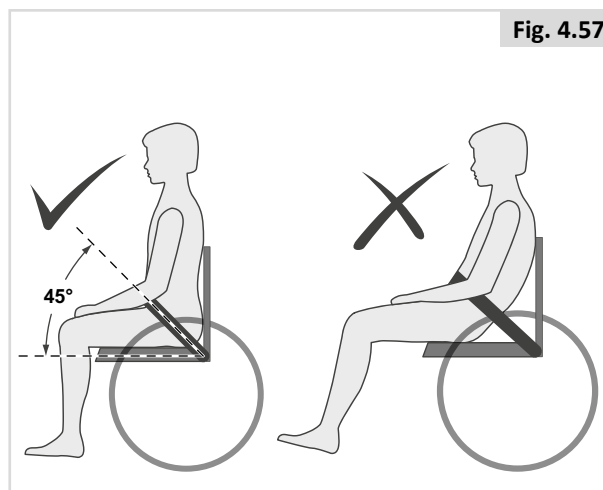


5.0 Användning av sittsystemet

5.1 Komma i och ur rullstolen (överförflyttning)

Sunrise Medical rekommenderar att du rådfrågar din förskrivare om teknik för att ta dig i och ur rullstolen, framifrån eller från sidan, som bäst passar dig och som ger minst risk för skador.

FARA/VARNING!

För att förebygga ett fall:

- Tillse att manöverboxen är avstängd vid överförflyttning till och från stolen, för att undvika att stolen oväntat flyttar sig. Om du inte gör det så kan du råka röra på styrspaken och orsaka systemet att flytta på sig när du inte förväntar dig det.
- Säkerställ att frikopplingsspaken har ställts in på "kör"-läge  Allmän bruksanvisning.
- Vrid främre länkhjul så att de pekar framåt.
- Arbeta med din hälsovårdspersonal för att lära dig alla säkra metoder för överförflyttningar.
- Kontrollera att motorbromsen är aktiverad. Detta gör att systemet inte flyttar sig när du gör en överförflyttning.
- Det är farligt att göra en överförflyttning på egen hand. Det krävs god balans och smidighet. Var medveten om att det finns en punkt vid varje överförflyttning när rullstolens sits inte finns under dig.
- Lär dig hur du positionerar din kropp och hur du kan stödja dig under överförflyttningen.
- Se till att någon hjälper dig tills du är säker på att du kan göra en säker överförflyttning på egen hand.
- Stå inte på fotstödet. Att placera din fulla vikt på fotstödet kan leda till skador på rullstolen och farliga situationer, inklusive att rullstolen tippas över.
- Se till att din fot inte "hänger upp sig" eller fångas i utrymmet mellan fotstöden.

5.2 Förbereda sig för överförflyttning framåt

FARA/VARNING!




Flytta din rullstol så nära som möjligt till stolen du tänker överföra till.

Swing-away benstöd (Fig. 5.1 och 5.2)

1. Fäll upp fotstöd (A)
2. Sväng vadplattorna (B) till sidorna (om tillämpligt)
3. Manövrera spak (C) bakåt
4. Sväng benstöd (D) till sidan

Centermonterat benstöd (Fig. 5.3)

1. Fäll upp (A).

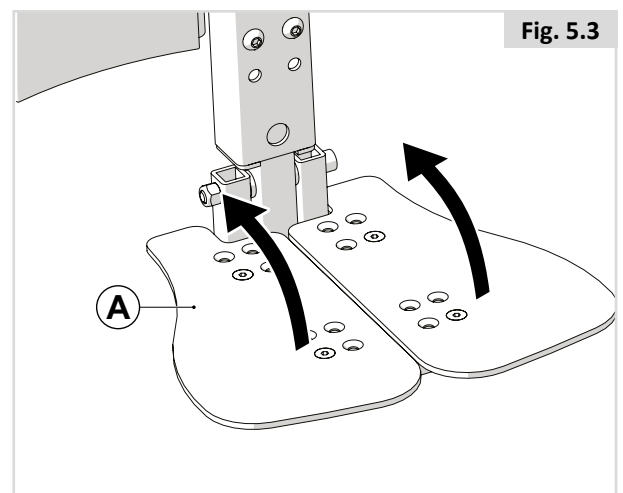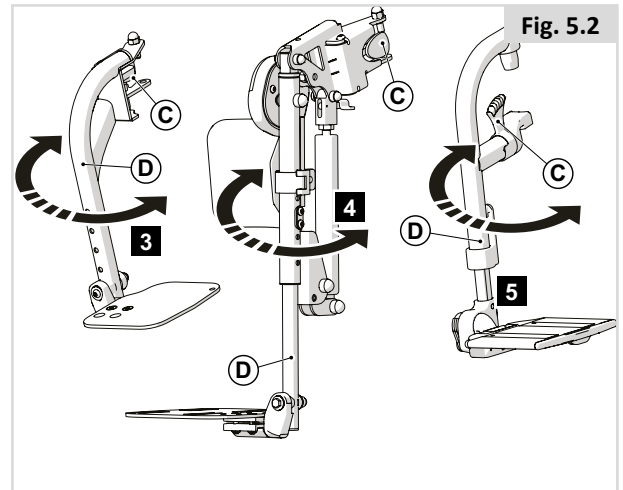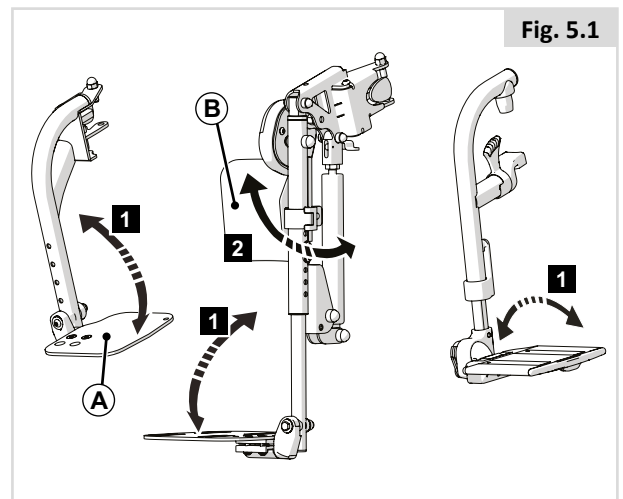

5.3 Förbereda sig för sidoöverföring

FARA/VARNING!


- Flytta dig så nära du kan till sitsen du gör överflyttning till. Om möjligt, ta ytterligare hjälp för överflyttning.
- Överför till så långt bakåt på sittytan som du kan. Detta reducerar risken att du missar sitsen eller faller.

OBS/VIKTIGT!

- Vissa versioner av styrenheten behöver svängas åt sidan.
- Avlägsna brickan innan du fäller tillbaka armstödet.
- Luta dig inte mot armstödet när det viks tillbaka.

Nedfällbart armstöd (Fig. 5.4)


1. Fäll (A) bakåt.

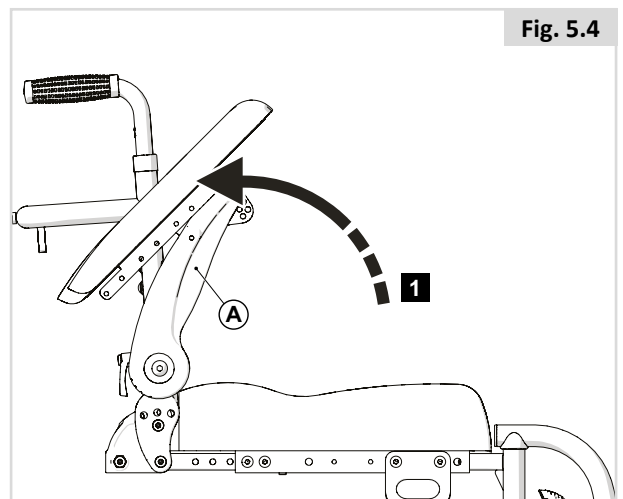

5.4 Nackstöd

Avlägsnande/positionering av nackstödet (Fig. 5.8)

1. Lyft (A).
2. Skjut (B) ut från eller in till (C).
3. Tryck (A) neråt.

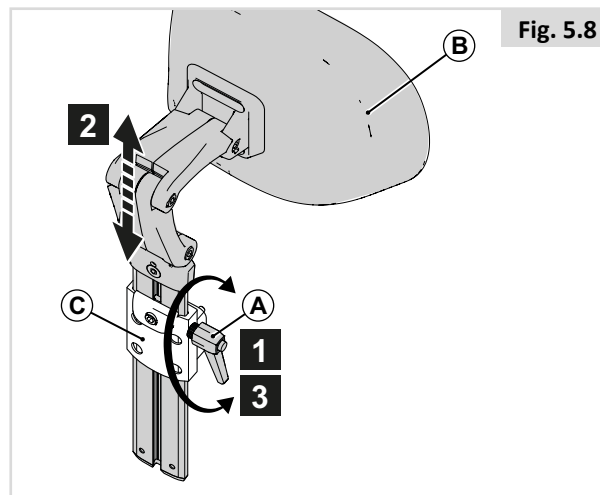


5.5 Swing-away styrenhetsfäste

Swing-Away av inkapslat styrenhetsfäste (Fig. 5.9).

Styrspak installeras med en mekanism som tillåter styrspaken att låsas i två framåtlägen.

1. Tryck (A) utåt eller inåt.
2. För att återgå till framåtläge, tryck baksidan av styrspaken framåt tills den låses på plats.

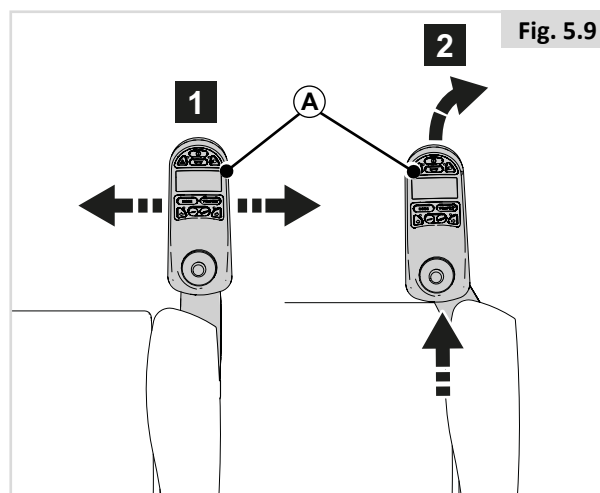


Sväng styrenhetsfästet (Fig. 5.10).

1. Tryck (A) utåt.
2. För att återgå till framåtläge, tryck baksidan av styrspaken framåt tills den låses på plats.

OBS/VIKTIGT!

När du svänger tillbaka styrspaksfästet kan du köra upp nära ett bord.
Full drift för styrenheten fortfarande möjlig

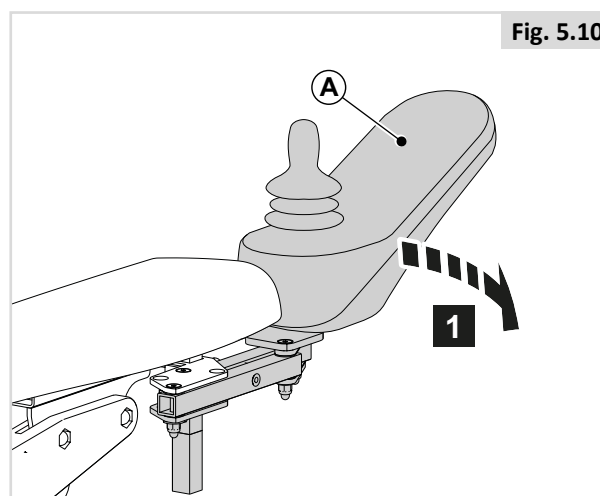

6.0 Manuella och eldrivna tillval

6.1 Manuella sitstillval

Zippie manuell höjning av benstödens knävinkel (Fig. 6.1)

Vinkeln på de bekväma benstöden kan justeras oberoende av varandra.

1. Lyft ben för att lyfta benstöd (A).
2. Manövrera spak (B) till lägre benstöd.

FARA/VARNING!

- Risk för att du fastnar med fingrarna! När du för benstöden upp eller ner, sätt inte in fingrarna i den justerande mekanismen mellan benstödens rörliga delar.



Manuell höjning av benstödens knävinkel (Fig. 6.3)

Vinkeln på de bekväma benstöden kan justeras oberoende av varandra.

1. Lyft ben för att lyfta benstöd (A).
2. Manövrera spak (B) till lägre benstöd.

FARA/VARNING!


- Risk för att du fastnar med fingrarna! När du för benstöden upp eller ner, sätt inte in fingrarna i den justerande mekanismen mellan benstödens rörliga delar.

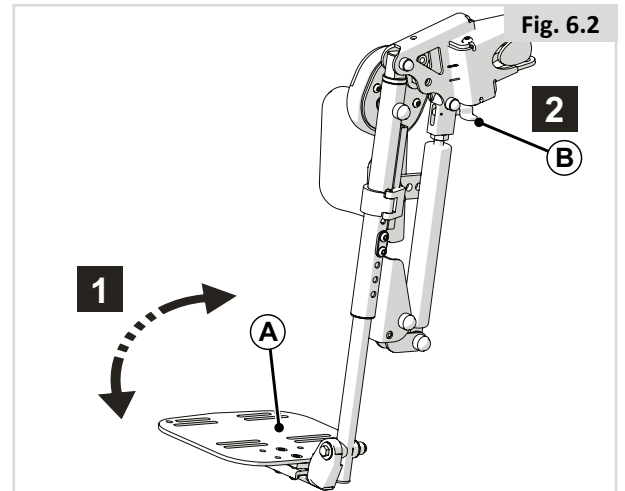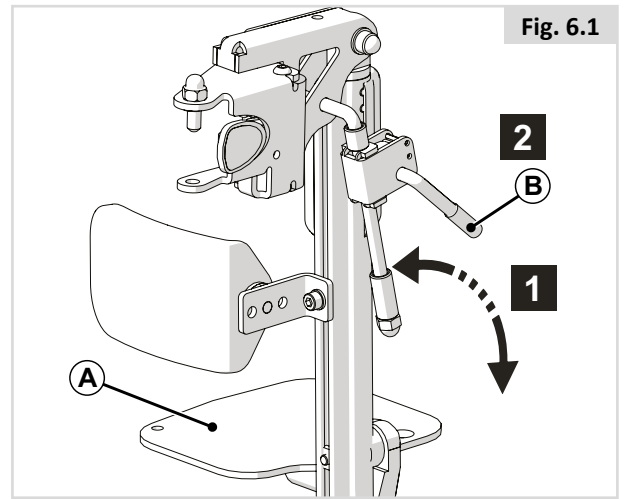

6.2 (El)sitstillval

Rullstolen kan utrustas med följande eldrivna tillval för att justera din sittposition. Dessa tillval kan manövreras av brukaren utan användning av verktyg.

Eljusterbara sitstillval (Fig. 6.4 - Fig. 6.6)

Hur du manövrerar dessa eldrivna sitstillval kan du läsa om i  STYRENHET.

1. Eldriven tiltfunktion
2. Elsitslift
3. Eldrivet bakåtlutande ryggstöd
4. Eldrivet höjbart benstöd

Rullstolen kan vara utrustad med en funktion som gör det möjligt att köra upp till 4,5 km/h när sätet är upphöjt. Denna funktion kallas C-Me. Kontakta din auktoriserade Sunrise Medical-återförsäljare för vägledning kring viktgränser för brukare och rekommenderad stolskonfiguration när du använder C-Me.

FARA!

- Användning av elektriska justerbara sitstillval kan påverka stabiliteten i rullstolen.
- Använd endast eldrivna justerbara sitstillval när rullstolen är på en plan yta! Försök inte att manövrera något elsitstillval vid positionering på en sluttning.
- Var vänlig håll dig borta från elställdon när komponenten är i rörelse. Elrullstolar från Sunrise Medical kan röra sig över stora områden. Brukare bör vara uppmärksamma på sin omgivning medan komponenter är i rörelse.
- Iakttag försiktighet vid körning av detta sittsystem i bakåtlutat, upprest eller i tiltat läge.
- Försök inte att manövrera något elsitstillval medan denna rullstol befinner sig i rörelse.
- Försök inte att manövrera uppresning eller tillval som eltilt när det finns barn i närheten.
- Genom programmering är det möjligt att vända riktning på alla eldrivna sittfunktioner. Se till att du vet i vilken riktning din sits kommer att röra sig före användning.
- Var medveten om att uppresningsmodulerna utgör en klämrisk. För att förhindra skador, se till att alla klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar inte är i vägen för uppresningsmodulen under drift.
- Kör inte över en ramp eller i en sluttning med tiltad/upplyft sits. Du bör återställa sits och ryggstöd till utgångsläge/upprätt läge innan du kör uppför eller nedför en sluttning.
- Detta elsystem är utformat för att automatiskt minska den maximala körhastigheten till ett krypkörningsläge och/eller C-Me-läge när vissa elsitsbegränsningar uppnås. Beroende på stolens konfiguration kan det finnas flera olika kryphastigheter och/eller C-Me-hastigheter.
- Innan du använder stolen i krypkörnings- och/eller C-Me-läge ska du läsa alla varningar och riktlinjer som gäller den här funktionen. De hjälper dig att förstå hur du minskar risken för fall- eller vältolyckor och hur du identifierar miljöförhållanden som kan påverka din säkerhet när du kör med stolen i krypfart och/eller C-Me-hastighet.
 1. Vid körning inomhus eller utomhus, i krypkörningsläge, ska den endast användas på plana och hårda ytor.
 2. Körning i krypkörningsläge ska aldrig göras i ojämn terräng som grus, gräs, ojämna ytor, ojämn beläggning eller i backar.
 3. Hög ALDRIG sitsen när stolen används i närheten av någon av de terrängtyper som anges ovan eller på ojämnt underlag.

Fig. 6.4


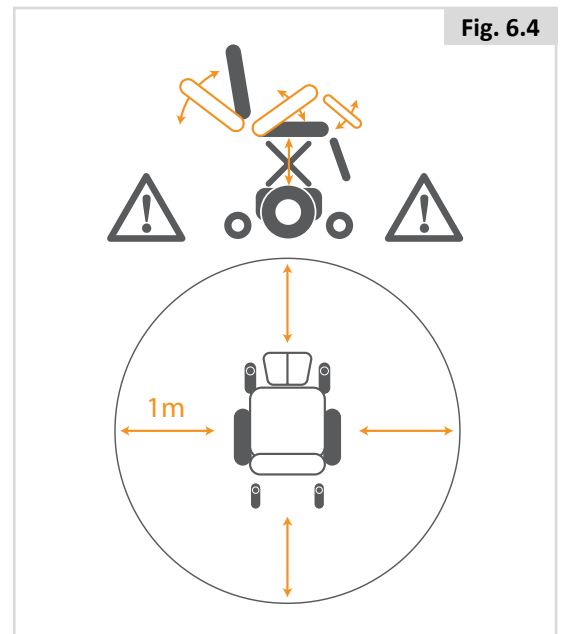


Fig. 6.5



Eljusterbara sitstillval

Fig. 6.6

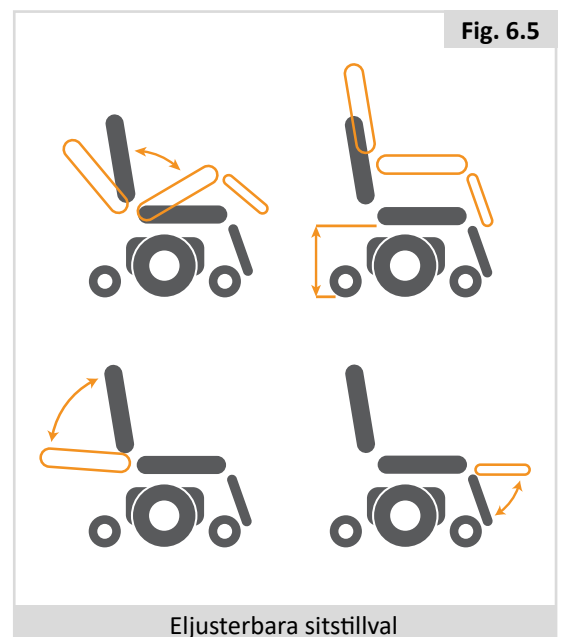

Eljusterbara sitstillval

7.0 Reducering av sittsystemets storlek för transportsyften

FARA/VARNING!

Rullstolen kan reduceras i storlek för transport utan passagerare. Alla komponenter till sittsystemet som kan lossas enkelt bör tas bort. Förvara dessa delar på ett säkert sätt så att de inte kan orsaka personskada eller annan skada eller själva bli skadade.

7.1 Sittdyna

Avlägsna sits (Fig. 7.1)

1. Tryck (A) uppåt.

Byte av sits (Fig. 7.2)

1. Vid byte, rikta in kardborrbanden med varandra.

7.2 Ryggstödsdyna

Avlägsnande av ryggdyna (Fig. 7.3)





1. Tryck (A) framåt för att låsa upp.
2. Lyft dyna (B)

Positionera ryggdyna (Fig. 7.4)

1. Vinkla upp (A).
2. Tryck tillbaka på plats (B).

OBS/VIKTIGT!

Om korrekt isatt "klickar" stiften in i det låsta läget.

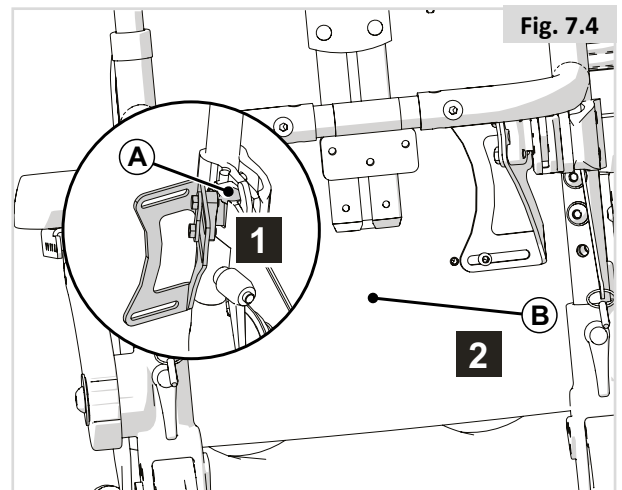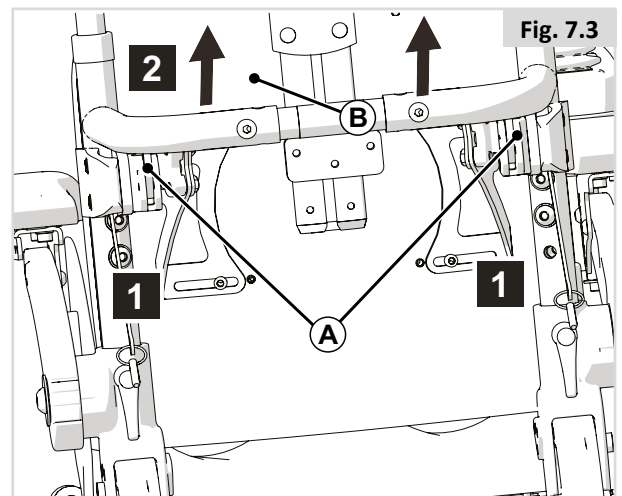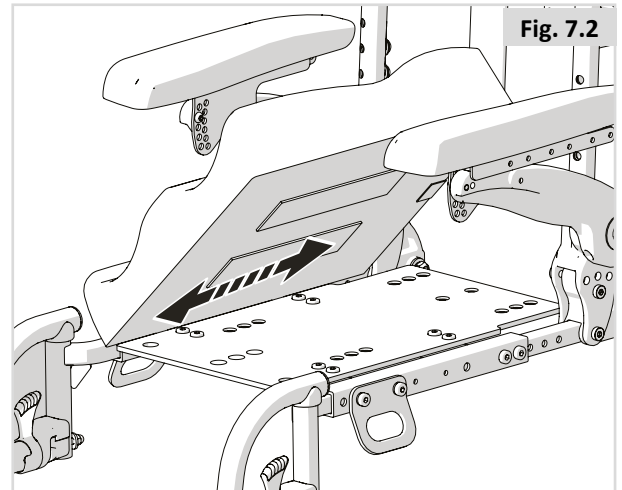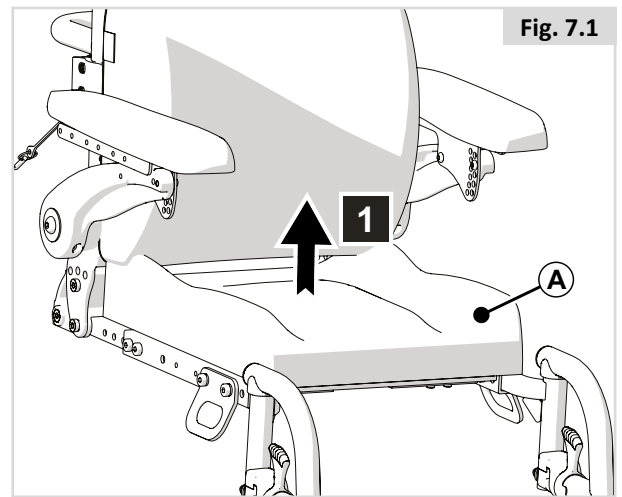

7.3 Swing-away-benstöd (Fig. 7.5)

Avlägsna ett swing-away benstöd

1. Lossa vadbånd.
2. Tryck haken (A) bakåt för att kunna låsa upp benstödet.
3. Sväng benstöden utåt.
4. Avlägsna benstödet (B) från dess fäste genom att lyfta.



Du bör höra ett klick när du sätter tillbaka benstödet. Detta indikerar att benstödet har låsts på plats.

Klämrisk (Fig. 7.6)

⚠ Varning!

När det manuellt höjbara och svängbara benstödet har tagits bort, transportera benstödet i handtaget som är avsett för borttagning/bärande (A).

Om du samtidigt bär vid B och släpper spak C finns det risk för klämning av finger.

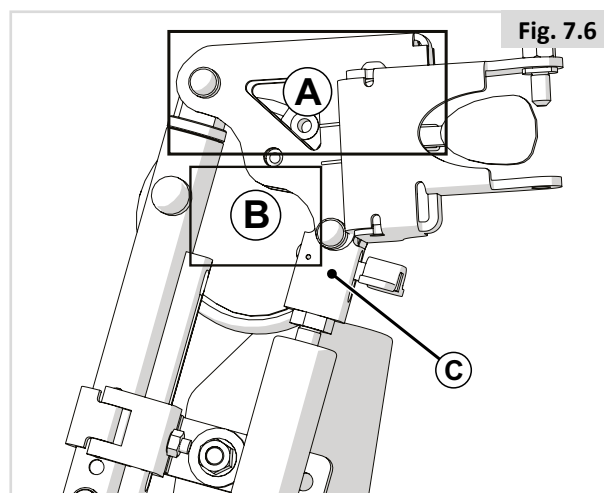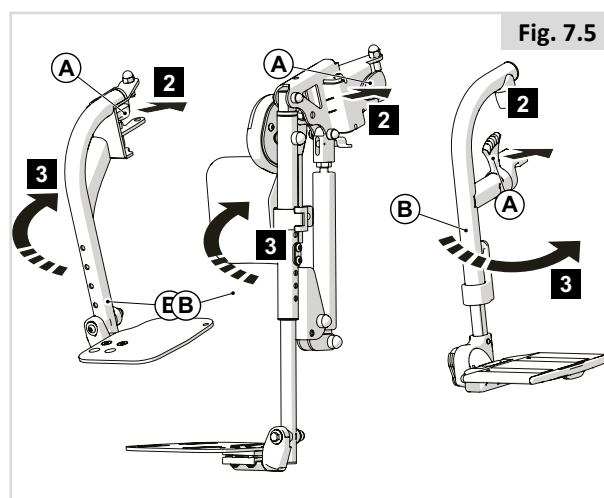

8.0 Underhåll och rengöring

8.1 Allmänt underhåll

- Alla fästen bör kontrolleras månadsvis för slitage, såsom lösa bälten eller brustna komponenter.
- Lösa infästningar ska dras åt enligt installationsanvisningarna.
Se tabellen nedan för nödvändiga vridmoment.
Obs: det kommer att bli nödvändigt att använda en momentnyckel.

GENERELLA ÅTDRAGNINGSMOMENT	
BESKRIVNING	VÄRDE FÖR ÅTDRAGNINGSMOMENT
M3 POZI PAN	2-3 Nm
M4 POZI PAN	3-4 Nm
M5 SKT HD CAP	4-5 Nm
M5 POZI PAN	4-5 Nm
M6 HEX HD	9-10 Nm
M6 BUTT HD	9-10 Nm
M6 SKT HD CAP	9-10 Nm
M8 HEX HD	15-20 Nm
M8 SKT HD CAP	15-20 Nm
M8 SKT BUTT HD	15-20 Nm
M10 HEX HD	20-25 Nm
M10 SKT BTT HD	20-25 Nm

- Kontrollera alla band varje månad för slitna remmar, sömmar eller andra indikationer på slitage. Använd ej produkten om den har en skada.
- Bröstrommar bör bytas ut vid första tecken på skada och/eller onormalt slitage.
- Om en brusten eller lös komponent har påträffats, sluta omedelbart att använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller auktoriserade Sunrise Medical-leverantör för byte.
- Kontrollera alla kardborrband för korrekt vidhäftning när dessa trycks samman.
- Se till att all kontaminering, såsom ludd eller hår avlägsnas från kardborrbanden. Sådan kontaminering kan påverka vidhäftningen.

8.2 Rengöring av sittsystemet

Rullstolen ska torkas ren en gång per vecka med en något fuktig, men inte blöt trasa och allt ludd eller damm som har samlats runt manöverdon bör blåsas eller dammas bort.

OBS/VIKTIGT!

Det är viktigt att du torkar alla delar på rullstolen som är våta eller fuktiga efter rengöring eller användning i regnigt eller fuktigt väder.

FARA/VARNING!

Om rullstolen ska användas av fler än en person är det ur hygiensynpunkt viktigt att den rengörs noggrant.

8.2.2 Rengöring och inspektion av sitsen

FARA/VARNING!

Revor, hål, nötning och förslakning av klädseln, speciellt nära metalldelar, kan leda till dålig kroppshållning samt försämrad komfort och trycklindring.

Rengöringsanvisningar för sits:

Om det finns en tvättetikett på insidan av dynans överdrag kan du tvätta överdraget. Följ anvisningarna på tvättetiketten. Ta ut skuminläggen före tvätt, och stäng kardborrlåsen!

VARNING!

Använd inte organiska lösningsmedel som thinner, bensin eller lacknåta.

Kemtvätta inte klädseln. Stryk eller torktumla inte klädseln.

I de fall överdrag inte kan tas av bör dessa rengöras regelbundet. Rengör med en fuktig trasa med mildt diskmedel. Utspädda desinfektionsmedel kan användas enligt tillverkarens instruktioner. Skölj noga alla ytor med rent vatten. Torka noga.

8.3 Hygienåtgärder för begagnade rullstolar:

Ska rullstolen användas som begagnad måste den först förberedas noga. Alla ytor som brukaren kommer i kontakt med måste behandlas med desinficeringspray.

För att göra detta ska du använda ett lämpligt desinfektionsmedel för snabb alkoholbaserad desinfektion för medicinska produkter och medicinska enheter.

Var uppmärksam på tillverkarens instruktioner avseende det desinficeringsmedel du använder.

OBS/VIKTIGT!

- Använd ej lösningsmedel, blekmedel, polermedel, syntetiska tvättmedel, golvvax eller spray.
- Utspädda desinfektionsmedel kan användas enligt tillverkarens instruktioner.
- Skölj noga alla ytor med rent vatten. Torka noga.

8.4 Allmänna rengöringsanvisningar:

OBS/VIKTIGT!

- Du bör avlägsna fläckar från sitsen så fort du kan.
- Efter en längre tids användning bör du rengöra sittöverdraget med vanligt skumrengöringsmedel.
- Du bör alltid rengöra hela ytan och inte bara enskilda fläckar, för då kan det uppstå fula märken. Ju längre du dröjer med att ta bort fläckar desto svårare blir de att avlägsna.
- Undvik att skrubba kraftigt med vatten. Då kan tyget ruggas upp.
- Smutsfläckar (t.ex. öl, blod, cola, rödvin etc) avlägsnas bäst med ett torrt skumrengöringsmedel eller med ett mildt rengöringsmedel.
- Vänligen följ respektive användningsinstruktion vid behandling av överdraget.
- Överdraget bör få torka i åtminstone 48 timmar efter rengöring med skumrengöringsmedel.
- Fettfläckar (t.ex. kulspeppennor, läppstift, tuggummi etc). Använd fläckborttagare av ett välkänt och respekterat märke. Gnugga försiktigt den nedsmutsade ytan med en ren trasa som du impregnerar med fläckborttagningsmedel.
- Var restriktiv med fläckborttagningsmedlet – det behövs inte mycket.
- Testa först på ett litet och obemärkt ställe.
- Stoppningen får inte vara för blöt, eftersom det då finns risk att fläckborttagningsmedlet förstör stoppningen.
- Kraftfull gnuggning bör undvikas på de tryckta skalorna, t.ex. pilarna på sittplattan och måttpunkter på sittbreddjusteringen
- Använd ej en vattenslang eller högtrycksspruta på rullstolen.

FARA/VARNING!

- Läs alltid etiketten på alla rengöringsmedel.
- Följ alltid anvisningarna noga.

8.5 Rengöringstillbehör:

- Alla delar/tillbehör såsom svängbara bord rengörs med en fuktig trasa.
- Alla sidostöd, nackstöd, armstöd, sidoskydd, vaddynor, höftbälten och knädynor bör rengöras med en fuktig trasa.

8.6 Rengöra manöverboxen:

Om det har kommit smuts på manöverboxen kan du torka rent den med en fuktig trasa med lite desinfektionsmedel på.

FARA/VARNING!

- Följande instruktioner är särskilt viktiga ur hygiensynpunkt om stolen ska användas av fler än en person.
- Se till att paneler, styrspakar (alla varianter), huvudstyrningar och kontakter (alla varianter) av hygienskäl rengörs med ett mildt desinfektionsmedel. Efter att du tagit bort sug- och blåsmunstycket från stolen tvättar du av det för att det ska vara rent och funktionsmässigt.
- Se till att manöverboxen är avstängd innan du rengör.

8.7 Förvaring

Att hålla klädsel och andra delar av rullstol i gott skick, förvara i en torr miljö så nära rumstemperatur som möjligt.

FARA/VARNING!


- Låt aldrig stolen stå i direkt solljus, inte heller utomhus eller i fuktig miljö.
- Direkt solljus kan bleka klädsel/plastdelar och orsaka att metalldelar blir varma.

9.0 Avfallshantering

SVENSKA

Symbolen nedan betyder att produkten ska kastas i enlighet med lokala lagar och förordningar samt skilt från hushållsavfall. När produkten är förbrukad ska den lämnas på en av lokala myndigheter anvisad avfallsstation. Tack vare att produktens delar då kan sorteras och återvinnas hjälper du till att bevara våra naturresurser, och du kan vara säker på att återvinningen sker på ett miljövänligt sätt.

Försäkra dig om att du är den juridiske ägaren av produkten innan du kasserar den enligt ovan nämnda rekommendationer och nationella bestämmelser.

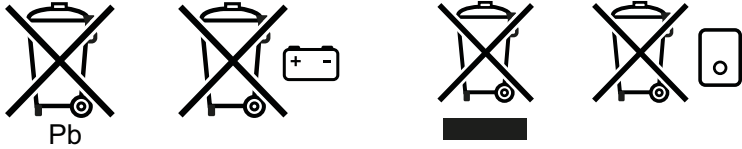

I följande avsnitt finns det en beskrivning av använda material som används på produkten, med tanke på bortskaffande eller återvinning av produkten och dess förpackning.

Det kan också finnas speciella lokala regelverk i kraft med hänsyn till omhändertagande eller återvinning som måste beaktas vid omhändertagande av din produkt. (detta kan inkludera rengöring eller dekontaminering av produkt före bortskaffande).

Aluminium: Länkhjulsgafflar, hjul, sidoskydd för chassin.

Stål: Förankringspunkter, Quick-release axlar

Plast: Handtag, rörpluggar, länkhjul och hjul/däck

Förpackningsmaterial: Plastpåsar av mjuk polyeten, kartong

Avfallshantering eller återvinning bör göras genom en licensierad agent eller auktoriserad plats för avfallshantering. Alternativt kan din produkt returneras till din återförsäljare för omhändertagande.



10.0 Tekniska specifikationer:

10.1 Tillämpliga normer/standarder

EN-ISO10993-5: 2009	Biologisk utvärdering av medicinsk utrustning.
EN 1021 1&2	Utvärdering av antändlighet för stoppade möbler. Tändkälla: Glödande cigarett/brinnande tändsticka

10.2 Tekniska specifikationer: Zippie/Teens sittsystem

	Metrisk systemvärden		Brittiska systemvärden och alternativ	
	Minst	Högst	Minst	Högst
Sittvinkeljusteringar				
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	0° - 30°		-5° - 25°	
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	-5° - 25°		0° - 30°	
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	0° - 50°		0° - 50°	
Effektivt sittdjup	260 mm	500 mm	10,2"	19,7"
Effektiv sittbredd	280 mm	400 mm	11"	15,7"
Sits till golvhöjd				
Fyllnadsmodul (Ingen eltilt i utrymme, ingen sitslift)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	410 mm		16,1"	
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	430 mm		16,9"	
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	450 mm		17,7"	
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	470 mm		18,5"	
Eltilt och sitsliftar (300 mm)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	450 mm	750 mm	17,7"	29,5"
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sitsvinkel	470 mm	770 mm	18,5"	30,3"
Ryggstödsvinkel				
Verktygsvinkel justerbar bakåt	86°,90°,94°,98°,102°,106°		86°,90°,94°,98°,102°,106°	
Eldrivet bakåtlutat ryggstöd	85° - 120°		85° - 120°	
Ryggstöds höjd (sittplatta till överst på ryggdyna)	380 mm	530 mm	15,0"	20,9"
Uppfällbart armstöd				
Armstödsdyna höjd (sittplatta till överst på armdyna)	190 mm	350 mm	7,5"	13,8"
Armstödsdyna längd justering	90 mm		3,5"	
Armstödsdyna vinkel (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Centralt installerat benstöd Zippie				
Underbenslängd (från sittplatta)	180 mm	280 mm	7,1"	11,0"
Knävinkel	80°		80°	
Vristvinkel	+7° - -10°		+7° - -10°	
Centralt installerat benstöd Teens				
Underbenslängd (från sittplatta)	290 mm	470 mm	11,4"	18,5"
Knävinkel	90°		90°	
Vristvinkel	+7° - -10°		+7° - -10°	
Swing away LIFE benstöd				
Underbenslängd (från sittplatta)	320 mm	430 mm	12,6"	16,9"
Knävinkel	70/80°		70/80°	
Vristvinkel	+20° - -20°		+20° - -20°	

	Metrisk systemvärden		Brittiska systemvärden och alternativ	
	Minst	Högst	Minst	Högst
Swing away LIFE högt monterade benstöd				
Underbenslängd (från sittplatta)	160 mm	480 mm	6,3"	18,9"
Knävinkel	60° - 90°		60° - 90°	
Vristvinkel	+50° - -50°		+50° - -50°	
Swing away UNI benstöd				
Underbenslängd (från sittplatta)	350 mm	480 mm	13,8"	18,9"
Knävinkel	75°		75°	
Vristvinkel	+30° - -30°		+30° - -30°	
Swing away Zippie benstöd				
Underbenslängd (från sittplatta)	160 mm	270 mm	6,3"	10,6"
Knävinkel	90°		90°	
Vristvinkel	+50° - -50°		+50° - -50°	
Swing away Zippie benstöd, manuellt höjbar				
Underbenslängd (från sittplatta)	170 mm	270 mm	6,7"	10,6"
Knävinkel	25° - 87°		25° - 87°	
Vristvinkel	+50° - -50°		+50° - -50°	
Swing away Salsa benstöd, manuellt höjbar				
Underbenslängd (från sittplatta)	410 mm	510 mm	16,1"	20,1"
Knävinkel	18° - 75°		18° - 75°	
Vristvinkel	+50° - -50°		+50° - -50°	
SEDEO Multi-Position nackstöd				
Nackstöd höjd justeringsintervall	170 mm		6,7"	
Nackstöd djup justeringsintervall	200 mm		7,9"	
Nackstöd vinkel (vertikal)	-45° - +45°		-45° - +45°	
Nackstöd bredd	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Sidostöd				
Sidostöd bredd justeringsintervall	90 mm		3,5"	
Sidostöd höjd justeringsintervall	170 mm		6,7"	
Sidostöd djup justeringsintervall	45 mm		1,8"	

11.0 Garanti

DENNA GARANTI PÅVERKAR INTE DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER I NÅGOT AVSEENDE.

Sunrise Medical* erbjuder en garanti, enligt garantivillkoren för rullstolar till sina kunder som täcker följande.

Garantivillkor:

1. Skulle någon eller några av rullstolens delar behöva repareras eller bytas ut som resultat av ett tillverknings- och/eller materialfel inom 24 månader (5 år för ram och tvärstag) efter leverans till kunden, kan defekta delar repareras eller bytas ut utan kostnad. Garantitiden täcker endast tillverkningsfel.
2. För att använda garantin, kontakta din Hjälpmedelscentral eller återförsäljare som godkänts av Sunrise Medical med exakt beskrivning av problemet.
Om stolen, då ett problem uppstår, skulle befinna sig alltför långt bort från din Hjälpmedelscentral eller det anvisade Sunrise Medical-serviceombudet, kan reparationer eller utbyte servas av en annan serviceverkstad som är utsedd av tillverkaren. Rullstolen måste repareras av ett godkänt Sunrise Medical-serviceombud, (återförsäljare).
3. För delar som har reparerats eller bytts ut inom ramen för denna garanti, erbjuder vi en garanti i enlighet med dessa garantivillkor för den återstående garantiperioden för rullstolen enligt med punkt 1).
4. Originala reservdelar som har monterats genom kundens försorg, kommer att ha en 12 månaders garanti, (efter montering), enligt dessa garantivillkor.
5. Vi ansvarar inte för reparationer eller utbyte av en rullstol eller del i följande fall:
 - a. Normalt slitage, vilket inkluderar batterier, armstödsdynor, sittklädsel, däck, bromsbackar osv.
 - b. Eventuell överbelastning av produkten, var vänlig kontrollera EU-märkning för max brukarvikt.
 - c. Produkten eller delen har inte underhållits eller servats enligt tillverkarens rekommendationer i användar- och/eller servicehandboken.
 - d. Tillbehör som inte kan anses vara originaldelar har använts.
 - e. Rullstolen eller del därav har skadats på grund av slarv, olycka eller olämpligt användningssätt.
 - f. Ändringar/modifikationer av rullstolen eller dess delar som ej utförts enligt tillverkarens anvisningar.
 - g. Reparationer har utförts innan serviceombudet konsulterats.
6. Denna garanti gäller enligt lagen i det land där denna produkt inköptes från Sunrise Medical.*

* Innebär Sunrise Medical-firman där produkten inhandlades.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningehaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

