

SÉRIE Q

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

SYSTEME D'ASSISE AVEC UN GRAND CHOIX
D'OPTIONS DE CONFIGURATION ET DE RÉGLAGE



Q500
SEDEO PRO



Q700
SEDEO PRO



Q700
SEDEO ERGO



Q700
UP SEDEO ERGO

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ À PROPOS DE LA

Q Serie

“SI VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC L'UN DES MODÈLES, VOUS LES CONNAÎTREZ TOUS !”



SÉRIE Q

TOUJOURS UNE SOLUTION

LA SÉRIE Q EST UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE DE FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES, AUSSI VARIÉE QUE LES PERSONNES QUI S'EN SERVENT. LA SÉRIE Q C'EST LA FLEXIBILITÉ TOTALE AVEC UN CHOIX DE MODÈLES ET DE BASES MOTRICES, UNE GAMME D'OPTIONS DE COMMANDE ET PÉRIPHÉRIQUES ET TROIS SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT : SEDEO ERGO, UP SEDEO ERGO ET SEDEO PRO.

DÉCOUVREZ ICI LES SOLUTIONS D'ASSISE SEDEO PRO LES PLUS RÉCENTES, COMPLÈTEMENT ALIGNÉES SUR LA SÉRIE Q, ÉLÉGANTES, EFFICIENTES ET EFFECTIVES.



SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

INTRODUCTION

SEDEO PRO – Répond à des besoins individuels

4

De la science à la pratique – Posture assise

6

De la science à la pratique – Stabilité assise

7

COMBINER SEDEO PRO AVEC DES ACCESSOIRES JAY & WHITMYER

Appuis-tête WHITMYER

41

Coussins d'assise et de dossier JAY

42

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO

Réglages simples et rapides

8

Nombreuses possibilités de configuration

12

PLUS SUR LA SÉRIE Q & SEDEO PRO

Switch-It & Link-It

44

Sedeo Pro reste compatible avec Ibis et Puma 20/40

45

Autres solutions d'assise de la série Q – SEDEO ERGO

46

Autres solutions d'assise de la série Q – UP SEDEO ERGO

47

Built-4-Me

48

Déclaration de conformité CE

49

Comment nous mesurons

50

Caractéristiques

51

COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER

Aperçu coussins de dossier SEDEO PRO

18

Aperçu coussins d'assise SEDEO PRO

28

ACCESSOIRES SEDEO PRO

Appuis-tête

34

Positionnement et support

35

Autres accessoires

37

Habillage et nettoyage

39

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO RÉPOND À DES BESOINS INDIVIDUELS

LE SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO AMÉLIORE L'AUTONOMIE ET LE CONFORT AU QUOTIDIEN. LE CHÂSSIS D'ASSISE DE TECHNOLOGIE AVANCÉE EST COMPLÈTEMENT RÉGLABLE ET PERSONNALISABLE.


La conception d'un système d'assise consiste essentiellement à créer un large éventail de solutions individuelles. Car plus la gamme de possibilités techniques s'étend, mieux on pourra répondre aux besoins cliniques les plus divers et complexes avec des solutions d'assise et de positionnement sur mesure.

Une grande flexibilité d'emploi et de personnalisation permet de satisfaire également des besoins d'ordre social et pratique et le désir de vivre sa vie au quotidien avec un maximum d'autonomie.

La conception du système d'assise SEDEO PRO repose sur ce besoin de solutions personnalisables et réglables. SEDEO PRO propose une large gamme d'options et accessoires avec de multiples possibilités de positionnement et réglage :

- Assises et dossiers
- Repose-pieds et des cales pour le genou et la cuisse
- Accoudoirs, protège-vêtements et cales tronc
- Appuis-tête
- Accessoires



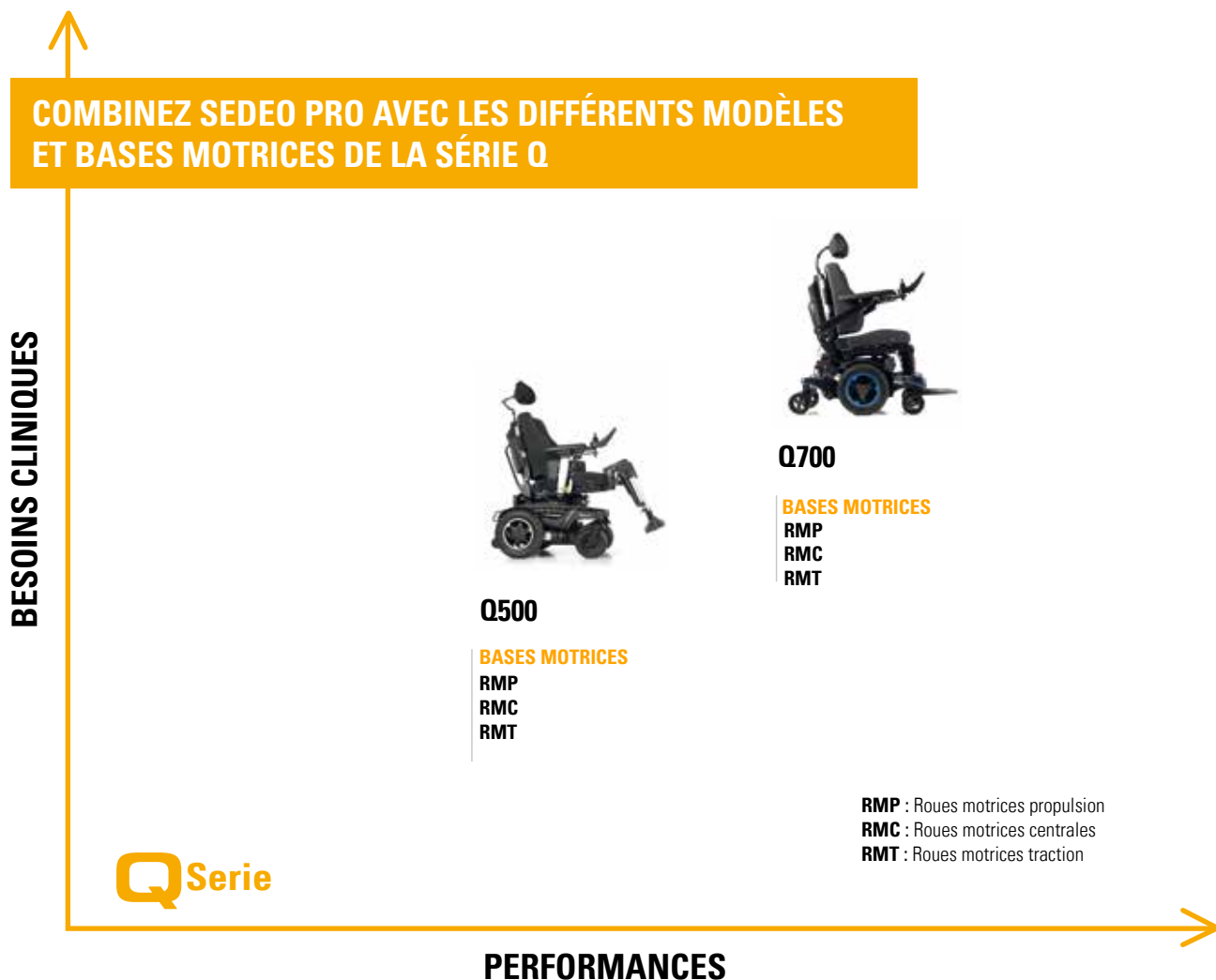

SEDEO PRO se développe en permanence et les solutions se multiplient. Vous pouvez combiner un grand nombre de configurations avec la série Q, avec Puma 20/40 ou avec un fauteuil roulant manuel Ibis (voir page 45).

A cela viennent s'intégrer également les fonctions avancées des éléments d'assise et des dossiers JAY™ plus toutes les options des appuis-tête WHITMYER™.

La modularité, la fonctionnalité, le confort et le design SEDEO PRO ne cessent d'évoluer pour répondre toujours mieux aux besoins et désirs individuels, et pour une adaptation rapide et efficace en cas d'évolution de ces besoins.

JAY®
Superior Clinical Seating.

WHITMYER®




DE LA SCIENCE À LA PRATIQUE

POSTURE ASSISE


UNE BONNE POSTURE DEMANDE UN EFFORT MINIMAL, REPARTIT BIEN LE POIDS DU CORPS SUR LES POINTS D'APPUI (FESSES, DOS, BRAS ET PIEDS) ET RÉDUIT LES PRESSIONS SUR LES TENDONS, LES OS ET LES ARTICULATIONS.

UNE BONNE POSTURE EN QUATRE ÉTAPES SIMPLES :

- Commencez par faire l'inventaire des besoins et activités de l'utilisateur.
- Quelle(s) posture(s) correspondent à ces besoins et activités ? Quelles sont les exigences en terme d'alignement postural, de stabilisation et d'équilibre dynamique du corps ?
- Choisissez les supports les mieux adaptés pour maintenir ces postures (fournissant la juste mesure de support aux bons endroits) puis réglez les supports. Commencez par positionner le bassin, les cuisses et pieds, puis la colonne vertébrale, le thorax, etc. et enfin la tête.
- Pour favoriser une répartition de pression uniforme, agrandissez le plus possible la surface de contact entre le corps et les coussins et évitez les pics de compression et de cisaillement.

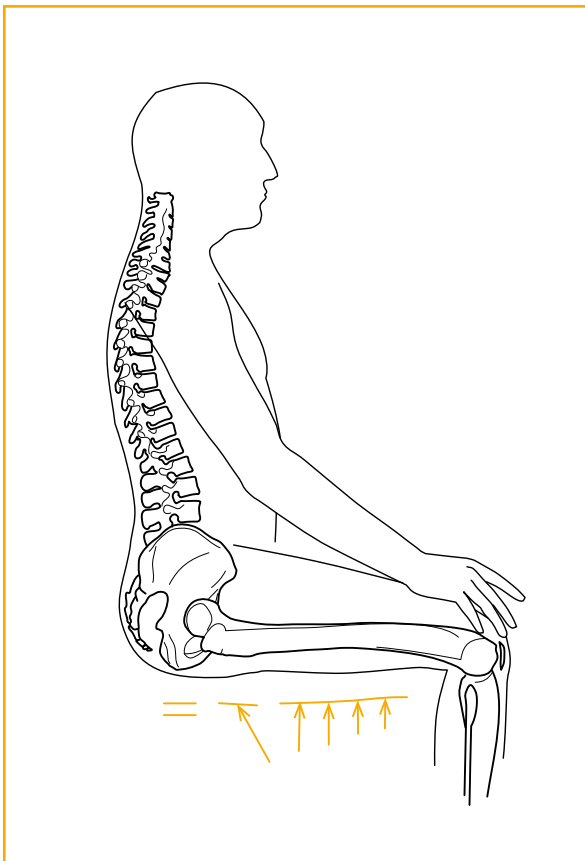

Optimiser la répartition des pressions sous les jambes

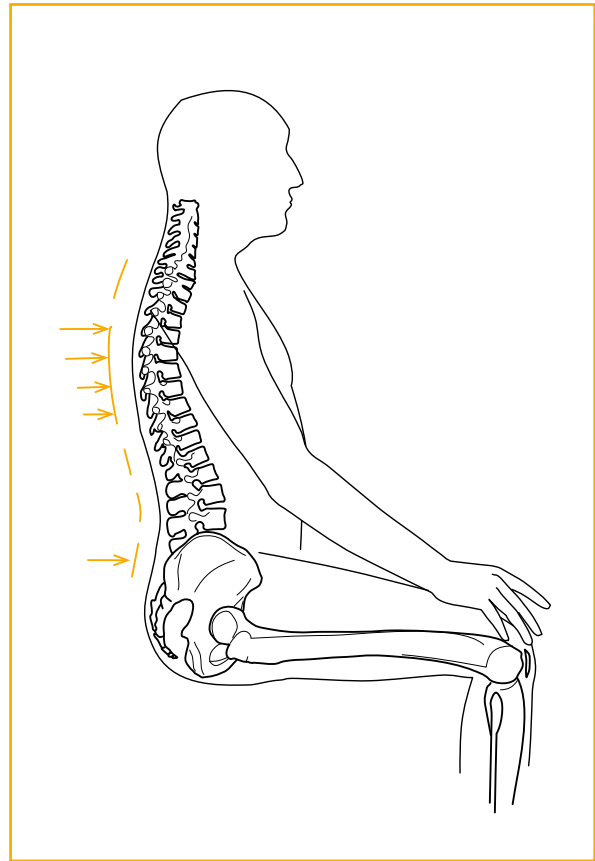

Optimiser la répartition des pressions sur le dos

DE LA SCIENCE À LA PRATIQUE

STABILITÉ ASSISE

RÉPARTITION UNIFORME DE LA PRESSION ET STABILISATION EN DEUX DIRECTIONS : APPLICATION CLINIQUE DE PRINCIPES SCIENTIFIQUES (ERGONOMIQUES).

A chaque activité qu'un utilisateur de fauteuil roulant désire faire correspond une posture assise qu'il faudra maintenir le temps nécessaire. La fonction de l'assise et du dossier est de faciliter les activités avec une stabilisation adéquate. Une bonne répartition de la pression est de grande importance pour la continuité des activités.

Le besoin de stabilisation varie d'un utilisateur à l'autre

Le bassin est une structure osseuse complexe capable de faire des mouvements et basculements tridimensionnels. Etre assis sans aucune forme de stabilisation signifie balancer en permanence sur les tubérosités ischiatiques avec des contractions musculaires pour ajuster en continu la position du centre de gravité et du bassin, sollicitant notamment les fléchisseurs et extenseurs de la hanche et du rachis.

STABILISATION DU BASSIN EN DEUX DIRECTIONS :

Stabilité antéropostérieure (dans le sens de la conduite)

Les coussins d'assise sont conçus pour stabiliser le bassin et empêcher l'utilisateur de glisser vers l'avant. Les coussins disposent à cet effet d'une forme anatomique, d'une butée stabilisatrice, ou par exemple d'une découpe à sangles ou d'un support plus prononcé des os iliaques et fémurs. Les coussins de support dorsal à leur tour soutiennent la colonne vertébrale et évitent un basculement du bassin en arrière.

Stabilité latérale (perpendiculaire au sens de la conduite)


Il faut également prendre soin d'une stabilisation latérale suffisante, pour améliorer la posture (éviter un effondrement latéral) et le niveau d'activité de l'utilisateur. Un support des trochanters contribue à la stabilité latérale et à une réduction de pression au niveau des ischions et du risque d'escarre.

DISTRIBUTION UNIFORME DES PRESSIONS :


Répartition de la pression

Le poids du corps de l'utilisateur provoque une pression sur les os, la peau et les tissus mous sous-cutanés. Le système d'assise est conçu pour répartir la pression, soulager les zones les plus critiques, éviter les pics de pression et de cisaillement et réduire le risque d'ulcères de pression (décubitus). Le contour anatomique, la structure et le choix des matériaux des coussins contribuent grandement à une protection effective de la peau :


- Répartition du poids de l'utilisateur sur une surface maximale
- Réduction des pics de pression sur les parties osseuses saillantes telles que les ischions, par déplacement de la pression vers des zones moins critiques.
- Réduction des déformations dans les tissus cutanés et sous-jacents.

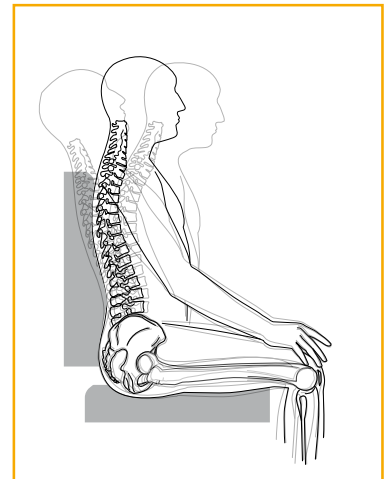

Stabilisation antéropostérieure du bassin

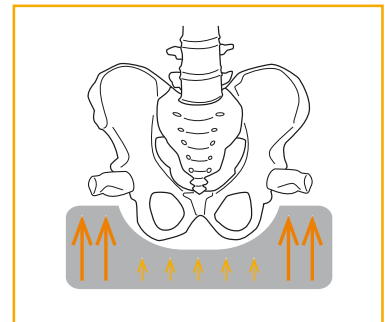

Support au niveau des trochanters améliore la stabilité latérale

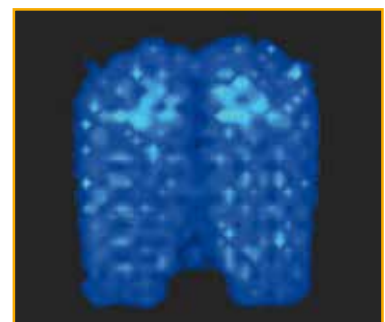

Soulager les zones critiques par répartition des pressions vers d'autres zones

SEDEO PRO

RÉGLAGES SIMPLES ET RAPIDES

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ : CRÉER AISÉMENT UNE BONNE POSTURE POUR CHAQUE L'UTILISATEUR

- Grande flexibilité d'emploi / complètement ajustable et réglable
- Ajustements intuitifs. Tous les ajustements avec une seule clé (clé Allen 5 mm) / une méthode de travail simple et uniforme / des marquages et échelles intuitifs / pas besoin de pièces additionnelles
- Régler (en continu), positionner et tourner tous les composants / ajuster leurs dimensions pour créer le support et les appuis précisément là où et comme vous le jugez bon.
- Astucieux : les pièces et vis sont conçues de sorte qu'on ne puisse pas les détacher ou dévisser complètement et risquer de les faire tomber (drop-out protection).
- Faites les réglages nécessaires pendant que votre client reste tranquillement assis dans le fauteuil roulant, les points de réglage sont sur le côté et donc facilement accessibles.



SEDEO PRO RÉPOND AUX EXIGENCES DES SYSTÈMES DE RÉUTILISATION : CONVIENT TOUJOURS, QUELLES QUE SOIENT LES DIMENSIONS REQUISES, GRÂCE À DES PLAGES DE RÉGLAGE ÉTENDUES

Largeur d'assise Ajustement en continu 380 – 560 mm.
Il suffit d'écarter les plaques de l'assise.



NOTEZ Vous avez une option de réglage fin complémentaire sur l'accoudoir que l'on peut déplacer de + 20 mm à - 20 mm pour augmenter ou réduire la largeur d'assise.

Profondeur d'assise Ajustement en continu 400 – 600 mm.



NOTEZ Nous vous proposons une option additionnelle de réglage : vous pouvez agrandir la profondeur d'assise de + 20 mm en vous servant des trous de montage alternatifs dans les coussins d'assise.

Hauteur d'assise 415 à 490 mm



PASSER SOUS UNE TABLE AISÉMENT

Avec SEDEO PRO on peut évidemment ajuster aussi la hauteur d'assise. La hauteur d'assise minimale importe pour pouvoir passer sous une table ou un plan de travail aisément.

SEDEO PRO

RÉGLAGES SIMPLES ET FACILES

AMÉLIORER L'AUTONOMIE ET LE CONFORT

Un combiné lift et bascule d'assise électrique accroît l'autonomie de façon considérable. Faire des transferts aisément, attraper des objets dans une armoire, communiquer à hauteur de regard avec d'autres personnes : ce sont des choses qui importent pour les personnes se servant d'un fauteuil roulant électrique.


Plage de réglage du lift

300 mm (combiné lift et bascule d'assise électrique 0° à 30°)



Plage de réglage des bascules

0° à 30° | -5° à 25° | 0° à 50° | -5° à 45°

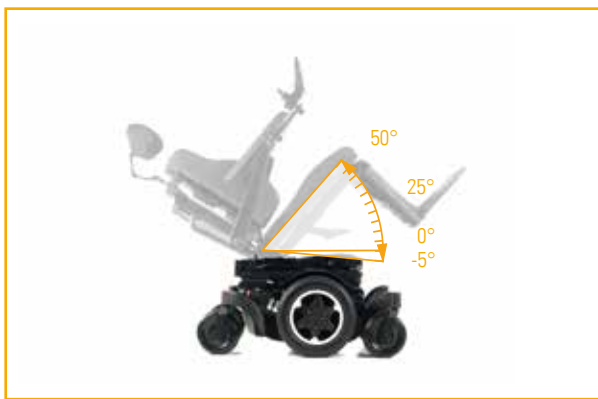

Choisissez un combiné lift et bascule d'assise électrique 0° à 30° ou un type de bascule spécifique en fonction des besoins cliniques et des préférences personnelles.

POUR DES PERSONNES DE GRANDE OU PETITE TAILLE

Parmi les utilisateurs de Sedeo Pro il y a des personnes de toutes tailles avec toutes sortes de besoins cliniques. D'où l'importance d'un réglage simple et précis du dossier. Le système de rails sur la face arrière des coussins de dossier permet un réglage en hauteur rapide avec une large plage de réglage (non disponible sur un dossier à réglage mécanique).

Hauteur du dossier 440 à 620 mm



Réglage en hauteur facile en continu grâce à un système de rails




Coussins de dossier en trois hauteurs: 440, 500 et 560 mm

CHANGER DE POSITION ASSISE POUR SOULAGER LE DOS

L'inclinaison de dossier idéale n'existe pas : elle dépend non seulement de la personne mais également du moment. En outre il est souvent nécessaire de pouvoir varier l'inclinaison et l'adapter en fonction des activités.

Inclinaison du dossier 90 à 120° (dossier à réglage mécanique)
90 à 130° (réglage à vérin ou électrique) ou 90 à 150° (dossier biomécanique)

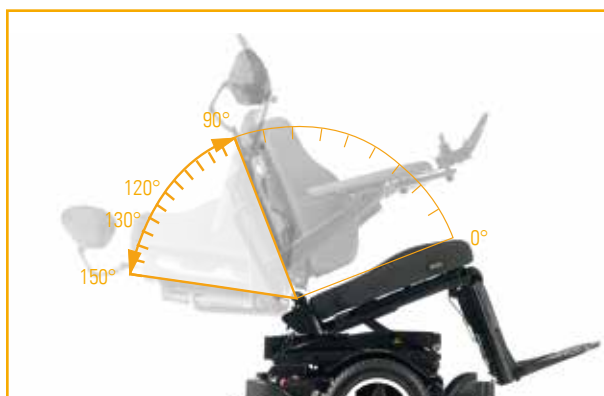

NOTEZ Disponible en option : un dossier rabattable sur l'assise à déverrouillage rapide

DANS LES PAGES QUI SUIVENT VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT DES INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE ET PLACES DE RÉGLAGE DES ACCOUDOIRS, REPOSE-JAMBES, ETC.



Pièces conçues et éprouvées avec des praticiens experts



Ajustement mécanique de l'inclinaison du dossier : marques pratiques, ajustement d'un seul mouvement de clé.



Ajustement de la profondeur d'assise facile grâce aux marques de mesure.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

UNE VASTE GAMME D'OPTIONS PERMET DE CRÉER UNE SOLUTION D'ASSISE PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHAQUE UTILISATEUR – SANS COMPROMIS !

- Pour faciliter les transferts et activités beaucoup d'éléments sont escamotables ou amovibles.
- Les commandes et réglages sont faciles à repérer et faciles à employer.


4 INCLINAISON DU DOSSIER EN QUATRE VERSIONS



Dossier réglable mécanique, 90°-120°
Ajustement de l'inclinaison en continu.
L'utilisateur peut simplement rester assis dans le fauteuil pendant le réglage.



Dossier réglable avec vérin, commande par l'utilisateur, 90°-130°
Pour les utilisateurs avec assez d'autonomie pour changer l'inclinaison eux-mêmes avec une légère pression du corps. La commande se trouve sous l'accoudoir.

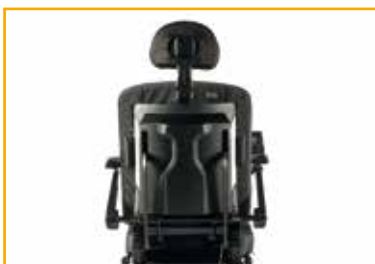

Dossier à réglage électrique, 90°-130°
Régler l'inclinaison du dossier de façon confortable en appuyant simplement le bouton.



Dossier inclinable avec dossier biomécanique anti-cisaillement de 100 mm, 90°-150° Le mécanisme unique patenté protège encore mieux contre les déformations des tissus cutanés. Tous les supports (y compris une commande au menton) conservent une position correcte indépendamment de l'inclinaison du dossier.



6

TYPES DE BASCULE D'ASSISE



- **Combiné lift et bascule d'assise électrique**

0° à 30°, lift 0-300 mm



- **Module d'inclinaison d'assise manuelle** Ajustable à 0° | 3° | 6° | 9°

- **Bascule électrique** 0° à 30°

- **Bascule électrique** -5° à 25°

- **Bascule électrique** 0° à 50°

- **Bascule électrique** -5° à 45°



2

DEUX INTERFACES D'ASSISE



Rails de fixation pour profondeurs d'assise 400 - 520 mm



Rails de fixation pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

SEDEO PRO VOUS OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION, VOYEZ
DONC TOUTES LES OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR POSITIONNER LES JAMBES ET PIEDS

3 TROIS TYPES DE REPOSE-JAMBES CENTRAL



Repose-jambes central électrique , compensation sur 180 mm, inclinaison de 90° - 180°.
Longueur du segment jambier 360 - 540 mm.
Angle repose-jambes 90 - 180°. Angle cheville +35 à -15°. Longueur maximale de compensation 180 mm.



Repose-jambes central électrique, compensation sur 180 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol.
Longueur du segment jambier 360 - 540 mm. Angle repose-jambes 90 - 180°. Angle cheville +35 à -15°. Longueur maximale de compensation 180 mm.



Repose-jambes central, réglable avec outils de 70 à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle.
Longueur du segment jambier 305 - 460 mm. Angle repose-jambes 70 - 120°. Angle cheville +20 à -40°.

NOTEZ L'avantage de la compensation de longueur c'est que un changement d'angle n'a pas d'effets secondaires comme les genoux qui se déplacent vers le haut ou la pression sur les pieds qui augmente.

2 DEUX APPUI-MOLLETS POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL



Appui-molleTS simple
Largeur : 300 mm
Longueur : 215 mm



Appui-molleTS double
Largeur : 130 mm
Longueur : 180 mm

3

TROIS TYPES DE REPOSE-PIEDS (AVEC DIVERS ACCESSOIRES)



Repose-pieds 70°.

Escamotables. Longueur du segment jambier 350 - 510 mm. Angle du genou fixe 70°.



Repose-pieds manuels.

A compensation, escamotables. Longueur du segment jambier 350 - 510 mm. Angle du genou 0 - 70°.



Repose-pieds électriques sans fil, à compensation.

Escamotables. Longueur du segment jambier 350 - 510 mm. Angle du genou 0 - 70°.


Pour des transferts faciles:

Presser un bouton pour retourner aisément à une posture de transfert préprogrammée (longueur et angle)

Le moteur s'arrête automatiquement dès que la palette touche le sol.

8

HUIT ACCESSOIRES POUR REPOSE-PIEDS

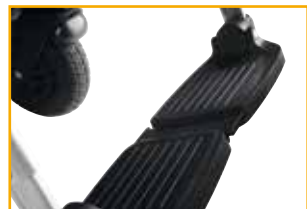

Repose-pieds, reliés par dessous

Angle de la cheville illimité



Palettes séparées

Angle de la cheville illimité

NOTEZ Choisissez les palettes correctes:

Largeur d'assise 380 - 400 mm
Largeur d'assise 420 - 460 mm
Largeur d'assise 480 - 520 mm
Largeur d'assise 540 - 560 mm



Appui-mollets, standard, réglables en profondeur

Largeur : 180 mm
Longueur : 230 mm
Profondeur : 35 mm



Appui-mollets, confort, réglables en profondeur

Largeur : 180 mm
Longueur : 230 mm
Profondeur : 35 mm

NOTEZ En standard les appuis-mollets sont réglables en continu, en profondeur et en largeur.



Support amputé, confort

Largeur : 180 mm
Longueur : 230 mm
Profondeur : 35 mm



Protection de genou, confort

Largeur : 100 mm
Longueur : 100 mm
Profondeur : 15 mm



Talonnières



Ceinture aux mollets

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

3

UN CHOIX DE TROIS ACCOUDOIRS ET TROIS TYPES DE PROTÈGE-VÊTEMENTS



Accoudoirs escamotables, vers l'arrière. Parfaits pour faire des transferts latéraux.



Accoudoirs amovibles



Accoudoirs SEDEO LITE

Ajustables uniquement avec une clé (non réglables par l'utilisateur)



Protège-vêtements, standard. Pour un maximum d'espace lors d'un transfert latéral.

Longueur : 215 mm

Épaisseur : 5-10 mm

Longueur : 135 mm

Plage de réglage en hauteur : 65 mm



Protège-vêtements, confort. Plus épais que la version standard (+20 mm), pour compenser ajustez les accoudoirs en largeur.

Longueur : 270 mm

Épaisseur : 20 mm

Longueur : 140 mm

Plage de réglage en hauteur : 65 mm



Protège-vêtements, cunéiforme confort.

S'emploie notamment lors d'une abduction des genoux. Réversible (partie épaisse vers l'avant ou l'arrière).

Longueur : 450 mm

Épaisseur : 35-70 mm

Longueur : 120 mm

Plage de réglage en hauteur : 65 mm




OU OPTEZ POUR LES ACCOUDOIRS RELEVABLES À COMPENSATION



Accoudoirs relevables à compensation

Restent à l'horizontale. Parfaits pour faire des transferts latéraux. Réglage en hauteur en deux étapes : régler la hauteur de l'accoudoir, régler l'angle la manchette.

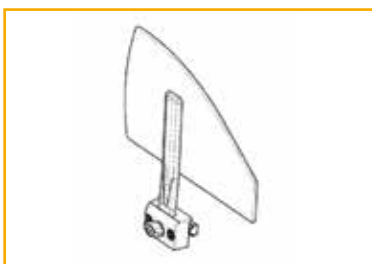

Protège-vêtements standard. Montés sur les rails de fixation de l'assise.

Largeur : 235 mm

Longueur : 145 mm

Plage de réglage en hauteur :

190-215 mm (de la plaque d'assise au point le plus haut)

NOTEZ Les accoudoirs relevables (et les protège-vêtements optionnels correspondants) offrent un maximum d'espace pour faire un transfert latéral.

4 QUATRE MANCHETTES D'ACCOUDOIRS



Manchette standard PU 300 mm. Manchette courte, pratique pour passer sous une table ou un bureau.

Manchette standard PU 400 mm. Forme en P confortable élargie vers l'intérieur. Plus d'espace pour poser le bras.



Manchette standard PU 450 mm. Extra large



Manchette confort 400 mm.
Revêtement Dartex pour plus de confort



Gouttières hémipélégiques PU en forme de cuvette



Réglage en profondeur manchette
100 mm (accoudoir standard)
140 mm (accoudoir relevable à compensation)



Réglage en profondeur accoudoir
250 mm (sur rail de fixation court)



Réglage en largeur manchette
- 20 mm (sur l'accoudoir)



Réglage en largeur accoudoir
- 20 mm | + 20 mm
(accoudoir standard sur le rail de fixation)



Réglage en hauteur manchette
(plaque d'assise au haut de la manchette)
260 - 380 mm (accoudoir standard)
250 - 400 mm (accoudoir relevable à compensation)



Réglage en angle manchette
0 - 15° (sur l'accoudoir)

NOTEZ Pour un montage du boîtier Ctrl+5-contacts à l'arrière du manipulateur, choisissez une manchette courte.

NOTEZ Déplacez les accoudoirs vers l'arrière pour avoir plus d'espace lors d'un transfert latéral. Déplacez les accoudoirs vers l'avant pour pouvoir mieux s'appuyer dessus lors d'un transfert en avant.

NOTEZ Une manchette en forme de P offre plus d'espace pour poser le bras. Et ne vous inquiétez pas : elle ne va pas toucher le dossier lorsque vous relevez l'accoudoir escamotable (c'est conçu exprès).

NOTEZ Utilisez l'un des deux rails pour fixer la manchette sur l'accoudoir. Vous pouvez même la poser en biais. Choisissez l'option qui convient le mieux pour poser le bras.

SEDEO PRO

APERÇU DES COUSSINS DE DOSSIER

	BESOINS DE POSITIONNEMENT			
	DOMAINE D'APPLICATION	Liberté de mouvement	Prévention d'affaissement	Soutien et stabilité latérale
PROFILÉ		● ● ●	●	●
PROFILÉ SANGLES RÉGLABLES		● ●	● ●	● ●
PROFILÉ DEEP CONTOUR PASSIF		●	●	● ●
FLEXIBLE DEEP CONTOUR PASSIF SANGLES RÉGLABLES		●	● ● ●	● ● ●
FLEXIBLE DEEP CONTOUR ACTIF SANGLES RÉGLABLES		● ●	● ● ●	● ● ●
FLEXIBLE EXTRA DEEP CONTOUR ACTIF SANGLES RÉGLABLES		●	● ● ●	● ● ●

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ

P. 19

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ, SANGLES RÉGLABLES

P. 20

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ, DEEP CONTOUR, PASSIF

P. 21

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE, DEEP CONTOUR, PASSIF, SANGLES RÉGLABLES

P. 22

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE, DEEP CONTOUR, ACTIF, SANGLES RÉGLABLES

P. 23

SEDEO PRO COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE, EXTRA DEEP CONTOUR, ACTIF, SANGLES RÉGLABLES

P. 24

COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ

DOSSIER CAPITONNÉ CONFORTABLE

BASE GALBÉE



Caractéristiques :

- La base galbée capitonnée de mousse confort offre un léger soutien latéral
- Peut être combiné optionnellement avec une cale tronc escamotable
- Housse Confort ou housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur capable d'un maintien en position assise stable et autonome
- Utilisateur bénéficiant d'une certaine liberté de mouvement



TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ

SANGLES RÉGLABLES

BASE GALBÉE À SANGLES RÉGLABLES QUI SUIVENT LE CONTOUR DU DOS



Caractéristiques :

- La base galbée capitonnée donne un léger soutien latéral, les sangles réglables suivent le contour du dos
- Réglable en fonction des besoins individuels
- Capitonage avec une mousse confort
- Peut être combiné optionnellement avec une cale tronc escamotable
- Housse Confort ou housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur capable d'un maintien en position assise stable et autonome
- Utilisateur ayant besoin d'un soutien réglable du contour du dos ou du bassin



TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

COUSSIN DE DOSSIER PROFILÉ

DEEP CONTOUR, PASSIF

BASE GALBÉE AVEC DES JOUES LATÉRALES PROFONDES




Caractéristiques :

- La base galbée avec ses profondes joues latérales procure un soutien latéral sur toute la hauteur du dossier
- Capitonage avec une mousse confort
- Soutien latéral intégré au lieu de cales tronc / supports thoraciques détachés
- Housse Confort ou housse Dartex

Applications cliniques :

- Pour l'utilisateur passif avec une stabilité d'assise réduite, ayant un besoin accru de maintien latéral au niveau du thorax et du bassin

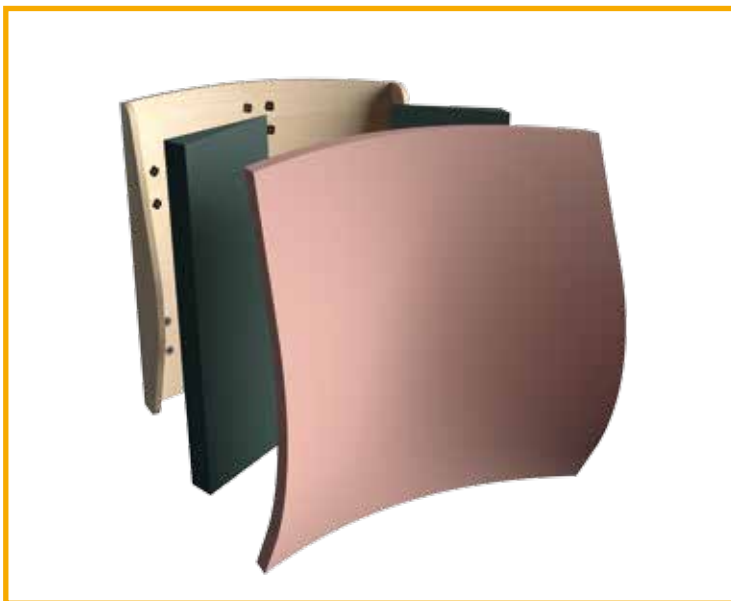

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

DEEP CONTOUR, PASSIF, SANGLES RÉGLABLES

BASE FLEXIBLE AVEC DES SANGLES RÉGLABLES, ADAPTABLES À L'ANATOMIE DU DOS ET AUX NÉCESSITÉS POSTURALES INDIVIDUELLES



Caractéristiques :

- Cette base flexible avec des sangles réglables permet de créer des solutions adaptées au contour du dos et aux besoins fonctionnels et posturaux individuels
- Permet de stabiliser le bassin
- Tourner les joues latérales à angle réglable vers l'intérieur ou l'extérieur pour un enveloppement plus ou moins profond
- Galbe profond sur toute la hauteur du dossier
- Ajustable aux besoins individuels
- Soutien latéral intégré au lieu de cales tronc / supports thoraciques détachés
- Housse Confort ou housse Dartex



Applications cliniques :

- Pour l'utilisateur qui nécessite un support du dos réglable en angle et en profondeur afin de pouvoir réaliser une posture assise stable et ergonomique
- Pour l'utilisateur passif avec une stabilité d'assise réduite ayant un besoin accru de maintien latéral au niveau du thorax et du bassin
- Sangles réglables en fonction des besoins individuels pour une stabilité assise optimale et une correction de / adaptation à des défauts posturaux légers ou modérés

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

DEEP CONTOUR, ACTIF, SANGLES RÉGLABLES

BASE FLEXIBLE AVEC DES SANGLES RÉGLABLES, ADAPTABLES À L'ANATOMIE DU DOS ET AUX NÉCESSITÉS POSTURALES INDIVIDUELLES



Caractéristiques :

- Cette base flexible avec des sangles réglables permet de créer des solutions adaptées au contour du dos et aux besoins fonctionnels et posturaux individuels
- Permet de stabiliser le bassin
- Tourner les joues latérales à angle réglable vers l'intérieur ou l'extérieur pour un enveloppement plus ou moins profond
- Galbe profond limité à mi-hauteur procure une liberté de mouvement au niveau des omoplates
- Ajustable aux besoins individuels
- Soutien latéral intégré au lieu de cales tronc / supports thoraciques détachés
- Housse Confort ou housse Dartex



Applications cliniques :

- Pour l'utilisateur qui nécessite un support du dos réglable en angle et en profondeur afin de pouvoir réaliser une posture assise stable et ergonomique
- Pour l'utilisateur actif ayant un besoin d'un maintien du bassin important mais en même temps une liberté de mouvement au niveau des omoplates
- Sangles réglables en fonction des besoins individuels pour une stabilité assise optimale et une correction de / adaptation à des défauts posturaux légers ou modérés

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

EXTRA DEEP CONTOUR, ACTIF, SANGLES RÉGLABLES

BASE FLEXIBLE AVEC DES SANGLES RÉGLABLES, ADAPTABLE À L'ANATOMIE DU DOS ET AUX NÉCESSITÉS POSTURALES INDIVIDUELLES



Caractéristiques :

- Cette base flexible avec des sangles réglables permet de créer des solutions adaptées au contour du dos et aux besoins fonctionnels et posturaux individuels
- Permet de stabiliser le bassin
- Tourner les joues latérales à angle réglable vers l'intérieur ou l'extérieur
- Galbe extra profond limité à mi-hauteur procure une liberté de mouvement au niveau des omoplates
- Ajustable aux besoins individuels
- Soutien latéral intégré au lieu de cales tronc / supports thoraciques détachés
- Housse Confort ou housse Dartex



Applications cliniques :


- Pour l'utilisateur qui nécessite un support du dos réglable en angle et en profondeur afin de pouvoir réaliser une posture assise stable et ergonomique
- Pour l'utilisateur actif ayant un besoin d'un maintien du bassin important mais en même temps une liberté de mouvement au niveau des omoplates
- Sangles réglables en fonction des besoins individuels pour une stabilité assise optimale et une correction de / adaptation à des défauts posturaux légers ou modérés

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

AJUSTER UN COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

SEDEO PRO

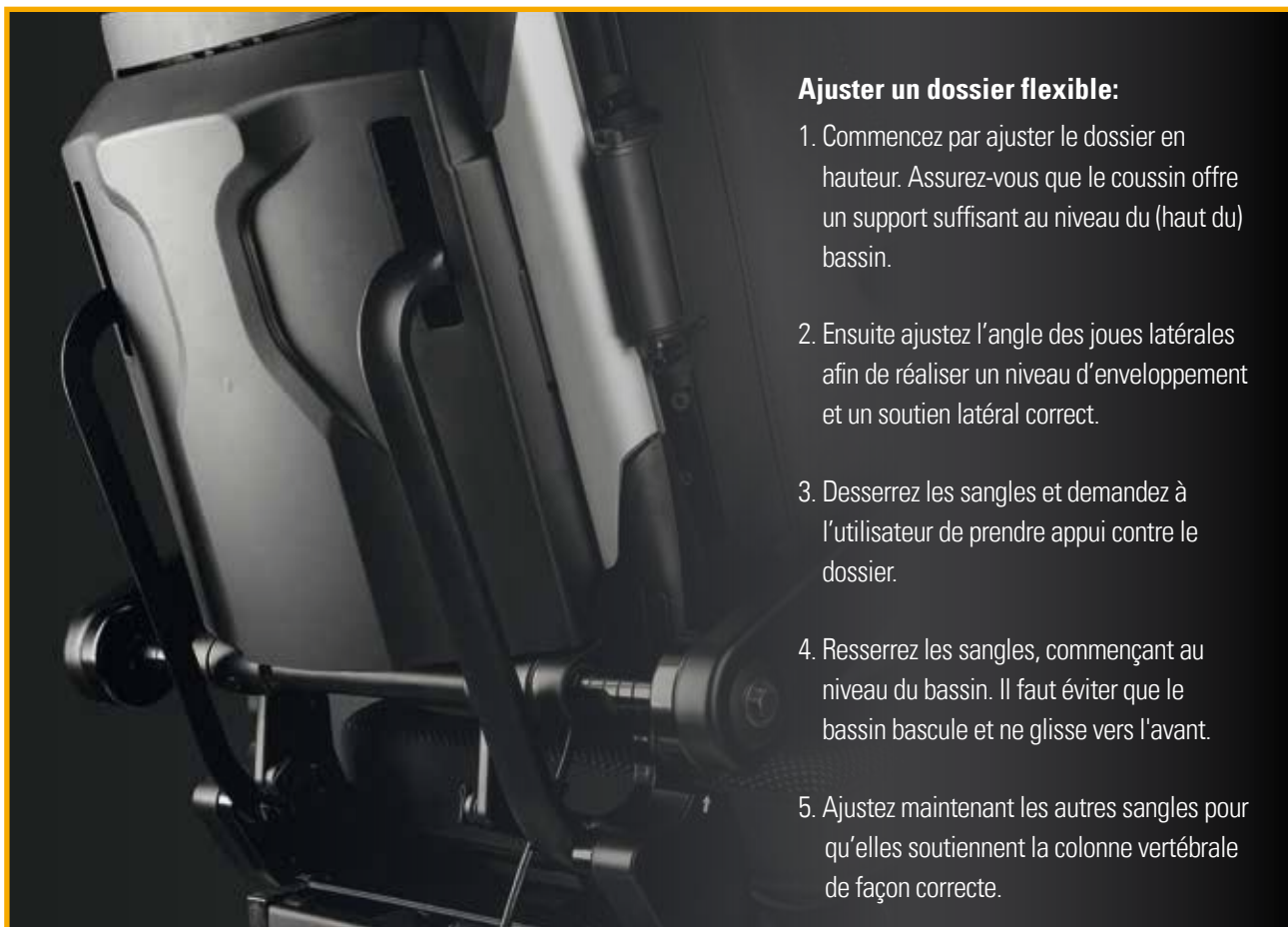

Ajuster un dossier flexible:

1. Commencez par ajuster le dossier en hauteur. Assurez-vous que le coussin offre un support suffisant au niveau du (haut du) bassin.
2. Ensuite ajustez l'angle des joues latérales afin de réaliser un niveau d'enveloppement et un soutien latéral correct.
3. Desserrez les sangles et demandez à l'utilisateur de prendre appui contre le dossier.
4. Resserrez les sangles, commençant au niveau du bassin. Il faut éviter que le bassin bascule et ne glisse vers l'avant.
5. Ajustez maintenant les autres sangles pour qu'elles soutiennent la colonne vertébrale de façon correcte.

BIEN ENTENDU VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR DES COUSSINS
DE L'ASSORTIMENT JAY, VOIR P. 44-45

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

SEDEO PRO

APERÇU DES COUSSINS D'ASSISE



	BESOINS DE POSITIONNEMENT				BESOINS ANTI-ESCARRES		
	DOMAINE D'APPLICATION	Liberté de mouvement	Prévention d'affaissement	Soutien et stabilité latérale	Distribution des pressions	Réduction des forces de cisaillement	Prévention des escarres
PROFILÉ		● ●	● ●	● ●	●	●	●
ASSISE GEL-MOUSSE		●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
ANATOMIQUE		●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
ANATOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME		●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
FORMSEAT		●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
ERGONOMIQUE		● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE PROFILÉ

P. 27

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE GEL-MOUSSE

P. 28

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE ANATOMIQUE

P. 29

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE ANATOMIQUE, MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

P. 30

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE FORMSEAT

P. 31

SEDEO PRO COUSSIN D'ASSISE ERGONOMIQUE (STABILIZER)

P. 32



Les coussins et housses sont pourvus d'étiquettes indiquant les dimensions et le type de produit

COUSSIN D'ASSISE PROFILÉ

ASSISE CAPITONNÉE CONFORTABLE

LÉGER MAINTIEN LATÉRAL




Caractéristiques :

- Ce coussin d'assise confortable combine une base plane ferme avec un léger profil et support latéral
- Housse Confort ou housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur ayant un maintien stable en position assise
- Le confort de l'utilisateur est au premier plan, combiné à un léger support latéral
- Faible risque d'escarre ou cisaillement
- Utilisateur ayant besoin d'une grande liberté de mouvement pour pouvoir changer de position ou faire des transferts de façon autonome

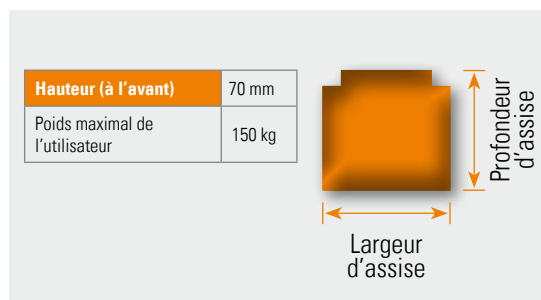

NOTEZ Le coussin d'assise est attaché au châssis avec du Velcro. Un coussin à Velcro tient mieux en place sans pour cela empêcher de pouvoir l'enlever aisément si besoin.

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN D'ASSISE GEL-MOUSSE

RÉPARTITION DES POINTS D'APPUI

LA COUCHE SUPÉRIEURE DE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME RÉPARTIT LA PRESSION UNIFORMÉMENT ET RÉDUIT LA PRESSION SUR LES ISCHIONS




Caractéristiques :

- Ce coussin d'assise confortable est légèrement profilé pour offrir un support latéral modeste
- La couche supérieure de mousse à mémoire de forme se caractérise par une immersion considérable et une répartition de pression uniforme, réduisant la pression sur les tubérosités ischiatiques
- La couche de mousse confort prévient un enfoncement excessif (bottoming-out)
- Base plane ferme
- Housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur ayant besoin surtout de confort et d'un léger soutien latéral
- Risque d'escarre faible
- Réduction des risques de déformations dans les tissus mous biologiques

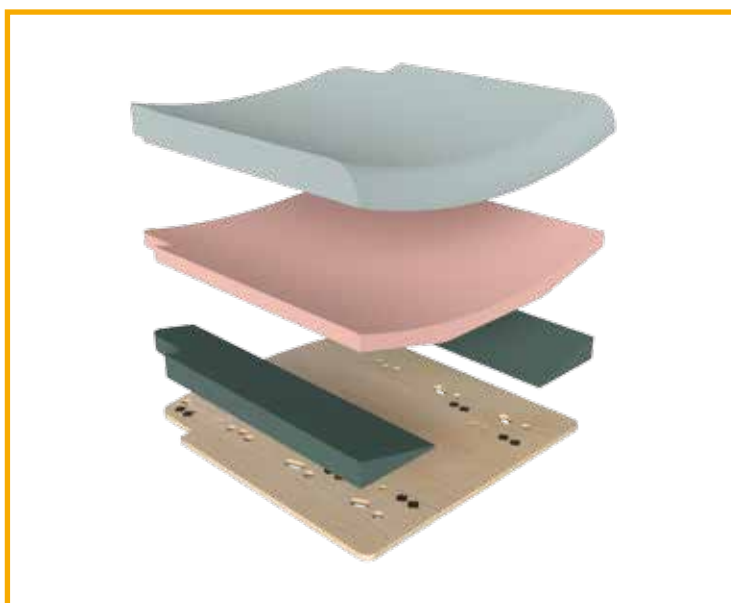

Hauteur (à l'avant)	70 mm
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg


TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN D'ASSISE ANATOMIQUE

CUVETTE ISCHIATIQUE ET SUPPORT DES FÉMURS

COUSSIN PRÉFORMÉ COMPOSÉ D'UNE COUCHE SUPÉRIEURE DE MOUSSE MOLLE ET DES COUCHES INFÉRIEURES PLUS FERMES

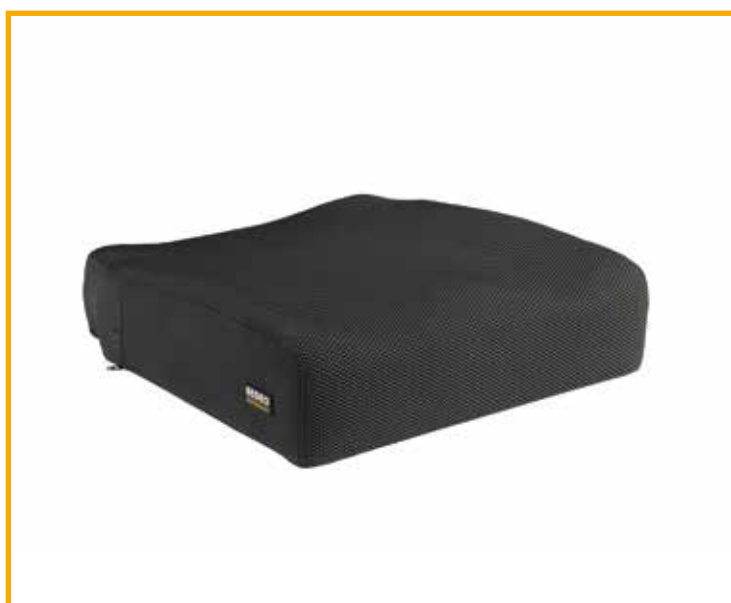


Caractéristiques :

- Coussin à forme anatomique dont la couche supérieure se compose de mousse molle
- Support des fémurs dans les deux sens (antéropostérieur et latéral) pour une posture optimale
- Une base ferme avec un vide à sangles pour les ischions évite un enfoncement excessif (bottoming-out)
- Housse Confort ou housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur nécessitant une stabilisation antéropostérieure modérée pour l'empêcher de glisser vers l'avant
- Risque d'escarre modéré
- Réduction des risques de déformations dans les tissus mous biologiques

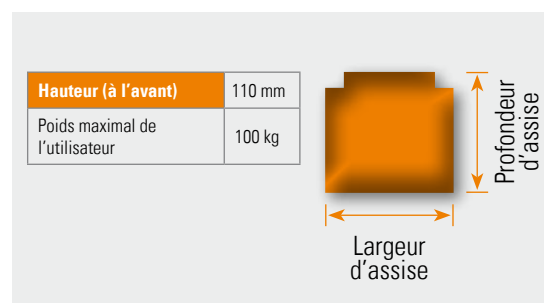

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN D'ASSISE ANATOMIQUE

AVEC ZONE DE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

FORME ANATOMIQUE ET UNE ZONE DE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME SOUS LES TUBÉROSITÉS ISCHIATIKES




Caractéristiques :

- Coussin à forme anatomique avec une zone de mousse à mémoire de forme sous les tubérosités ischiatiques
- La mousse à mémoire de forme se caractérise par une immersion considérable et une répartition de pression uniforme
- La mousse à mémoire de forme est combinée à une mousse confort qui servira de butée empêchant l'utilisateur de glisser vers l'avant
- Support de fémurs dans les deux sens (latéral et antéropostérieur) pour une bonne stabilité
- Base ferme et solide
- Housse Dartex



Applications cliniques :

- Utilisateur avec un besoin en positionnement élevé
- Besoin élevé de stabilisation antéropostérieure pour l'empêcher de glisser vers l'avant
- Besoin élevé de stabilisation latérale
- Risque d'escarre modéré
- Réduction des risques de déformations dans les tissus mous biologiques

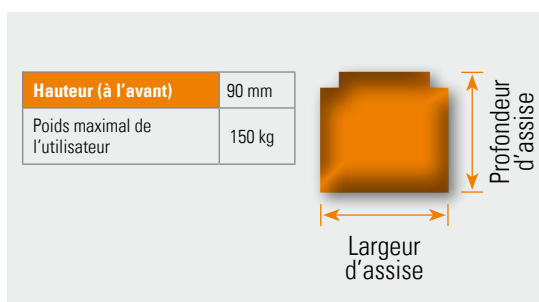

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN D'ASSISE FORMSEAT

FORME ANATOMIQUE PRONONCÉE

FORME ANATOMIQUE PRONONCÉE ET UNE COUCHE DE FINITION EN MOUSSE CONFORT





Caractéristiques :

- Immersion importante et cuvette ischiatique optimisant la stabilité latérale et antéropostérieure
- Une base ferme avec un vide à sangles pour les tubérosités ischiatiques évite un enfoncement excessif (bottoming-out)
- Housse Dartex

Applications cliniques :

- Utilisateur avec un besoin élevé de stabilisation antéropostérieure pour l'empêcher de glisser vers l'avant
- Besoin élevé de stabilisation latérale
- Risque d'escarre modéré
- Réduction des risques de déformations dans les tissus mous biologiques

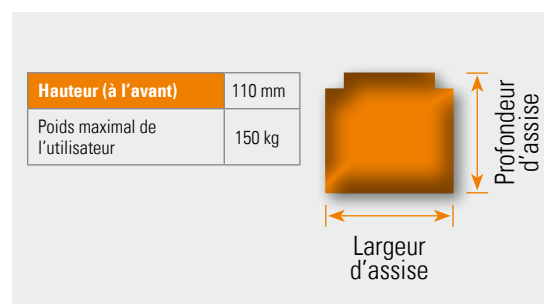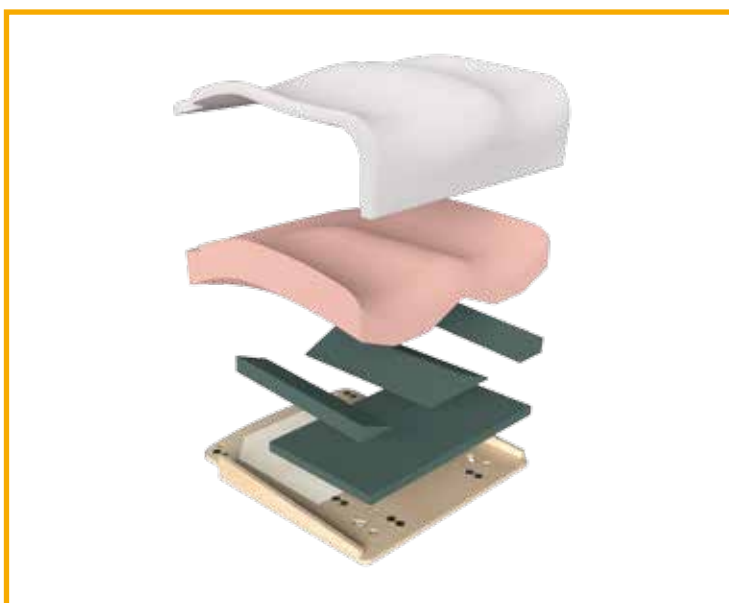

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

COUSSIN D'ASSISE ERGONOMIQUE

EXCELLENTE STABILISATION LATÉRALE

IMPORTANTE STABILISATION LATÉRALE

UN DÉPLACEMENT DE PRESSION VERS LES TROCHANTERS AIDE À RÉDUIRE LE RISQUE D'ESCARRE



Caractéristiques :

- Une base à rebords donne un support latéral supplémentaire aux fémurs et trochanters
- Mousse avec découpe sacrale centrale assurant une importante immersion et répartition des pressions au niveau des ischions
- Une base ferme avec un vide à sangles pour les tubérosités ischiatiques évite un enfoncement excessif (bottoming-out)
- Housse Confort ou housse Dartex


Applications cliniques :

- Utilisateur avec un besoin en positionnement faible à modéré
- Besoin d'une grande liberté de mouvement pour pouvoir se repositionner ou faire des transferts de façon autonome
- Léger besoin de stabilisation antéropostérieure pour l'empêcher de glisser vers l'avant
- Grand besoin de support latéral
- Risque modéré d'escarre ou cisaillement
- Réduction des risques de déformations dans les tissus mous biologiques



Hauteur (à l'avant)	90 mm
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg

Pour le coussin Ergonomique nous conseillons de commander une taille au-dessus de la normale.

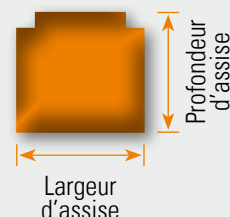

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

SOLUTIONS UNIVERSELLES

PLAQUES D'ASSISE ET PLUS

LA GAMME SEDEO PRO COMPREND ÉGALEMENT DES PLAQUES D'ASSISE AVEC BUTÉE PERMETTANT DE PLACER DES COUSSINS ANTI-ESCARRES. D'AUTRE PART SEDEO PRO PEUT ACCUEILLIR UN GRAND NOMBRE D'ORTHÈSES ET SIÈGES-COQUILLE COMME NUAGE ET DYNA.




Caractéristiques :

- Plaque d'assise avec butée arrière réglable
- Hauteur de butée 50 mm ou 75 mm

Applications cliniques :

- Une plaque d'assise sert à tenir en place efficacement des coussins d'autres marques.

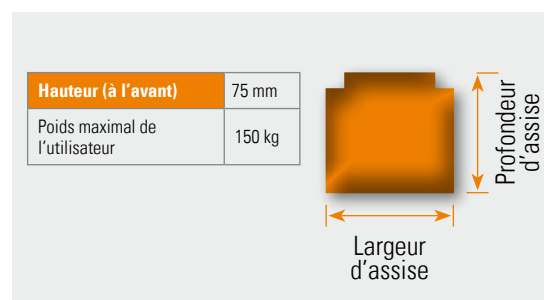

TAILLES DISPONIBLES

PROFONDEUR	LARGEUR									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

BIEN ENTENDU VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR DES COUSSINS DE L'ASSORTIMENT JAY, VOIR P. 44-45

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

SEDEO PRO APPUIS-TÊTE

OU OPTEZ POUR UN APPUI-TÊTE
WHITMYER, VOIR P. 40

 **WHITMYER®**

APPUIS-TÊTE AJUSTABLES EN HAUTEUR, LARGEUR ET PROFONDEUR. FACILES À MONTER
GRÂCE AU SYSTÈME À LAMELLES SEDEO PRO.

SEDEO TÊTIÈRE PU



- 240 x 150 mm
- Également disponible avec housse stretch confort

SEDEO TÊTIÈRE FLEXIBLE



- **400 X 110 MM**

SEDEO SUPPORT MULTI-POSITIONS



- Extrêmement robuste et facile à fixer dans de nombreuses positions
- Ajustement 20 mm vers la gauche ou 30 mm vers la droite
- Montage standard sur l'armature du dossier



Retour rapide aux réglages de base grâce à une position mémorisée ajustable




Avec des lamelles supplémentaires (90 mm) l'appui-tête peut être placé vers l'avant, le bas ou le haut

SEDEO SUPPORT MULTI-POSITIONS, RÉGLABLE SANS OUTIL



- Verrouillage rapide avec boulon à oreilles

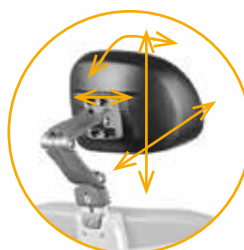


Plages d'ajustements :
Profondeur: 200 mm
Hauteur: 170 mm
Largeur : -20 mm | +20 mm
Angle: -45° | +45°

SEDEO PRO

POSITIONNEMENT ET SUPPORT

CALE TRONC ESCAMOTABLE

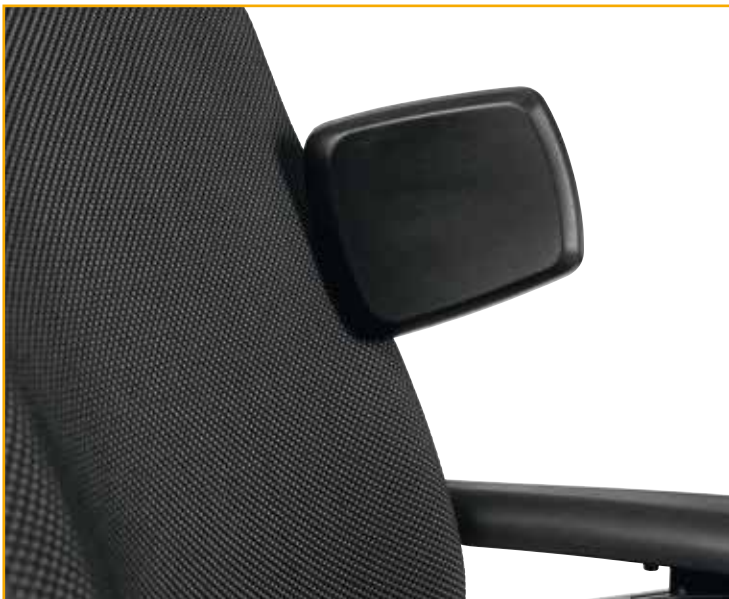

- Réglable en profondeur, largeur en hauteur (B 90 mm | H 170 mm | D 45 mm)
- Mécanisme intégré avec bouton de déverrouillage pour faire pivoter le cale aisément au moment des soins ou d'un transfert



APPLICATIONS CLINIQUES :

Pour l'utilisateur avec une stabilité limitée du tronc et/ou une posture asymétrique due par exemple à un AVC.

Le réglage en hauteur permet de créer des solutions adaptées pour le support ou la correction de déformations orthopédiques tels que la scoliose. En guise d'alternative, voyez aussi les dossiers flexibles avec joues latérales à angle réglable.

Dimensions :

- Petit coussinet : 90 x 120 mm
- Grand coussinet : 150 x 130 mm

CALE GENOU OU CUISSE ESCAMOTABLE



- Réglable en profondeur, largeur en hauteur
- Escamotable

Dimensions :

- Court : 120 x 120 mm
- Long : 180 x 120 mm

SEDEO PRO

POSITIONNEMENT ET SUPPORTS

PLOT D'ABDUCTION



- Réglable en profondeur et en hauteur
- Réglage en profondeur 65 mm
- Plage de réglage en hauteur 170 - 250 mm (de la plaque d'assise à la face supérieure du plot d'abduction)
- Escamotable

Dimensions :

- Coussinet: 70 x 190 x 100 mm

CEINTURE DE BASSIN



- Ceinture, boucle type automobile

Dimensions :

- Version courte: 50 x 1700 mm
- Version longue: 50 x 2700 mm

VOIR ÉGALEMENT LES ÉLÉMENTS
DE POSITIONNEMENT JAY



POIGNÉE DE TRANSFERT



- Cette poignée sert de point d'appui lors de transferts.

SEDEO PRO

AUTRES ACCESSOIRES


TABLETTE



- Escamotable
- Tablettes légères dotées d'une grande résistance

Largeur : 650 mm Longueur : 500 mm

DEMI-TABLETTE

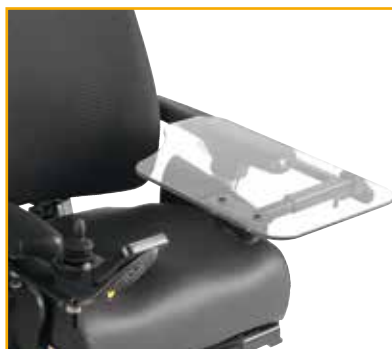

- Escamotable
- Tablettes légères dotées d'une grande résistance

Largeur : 300 mm Longueur : 470 mm



Évidements dans les tablettes, pour tous les types de commande

COUSSINET DE COUDE




COUSSINET PARTIEL



NOTEZ Livrable en option : des tablettes avec une protection acrylique avec rebords.

SUPPORT DE COMMANDE FIXE

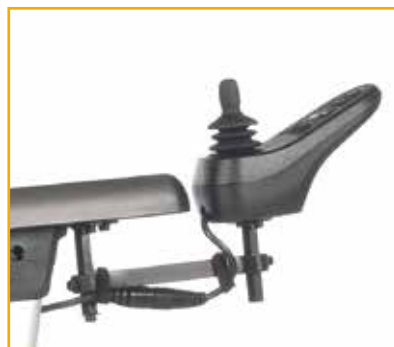

SUPPORT DE COMMANDE ESCAMOTABLE



- Réglable en profondeur et en hauteur




Grâce au support escamotable le poignet est moins mis à contribution en faisant pivoter le manipulateur vers l'intérieur

SEDEO PRO

AUTRES ACCESSOIRES

RÉTROVISEUR

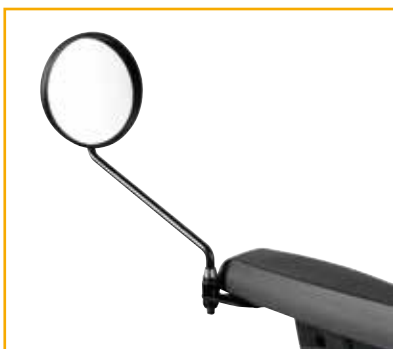

POIGNÉES DE POUSSÉE



- Réglables en hauteur (140 mm)

CROCHETS POUR SAC À DOS SUR LE CADRE ARRIÈRE



- Pour accrocher un sac à dos

POCHETTE SOUS ACCOUDOIR



- Pochette facilement accessible avec fermeture éclair tout autour

PORTE-BÉQUILLE



SEDEO PRO

HABILLAGE ET NETTOYAGE

HOUSSES DES COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER



- **Housse Dartex** : housse confortable, robuste, hydrofuge en caoutchouc extensible.
- **Housse Confort** : housse robuste, extensible, ultra-respirante pour un maximum de confort (housse mono-couche).



Voir les étiquettes attachées aux housses et coussins pour les dimensions et le type de produit

NETTOYAGE

Inspectez et nettoyez régulièrement les coussins et autres revêtements. Une housse déchirée, usée ou détendue peut affecter la posture de l'utilisateur et nuire au confort et à la bonne répartition des pressions.

Avant de laisser une autre personne utiliser un fauteuil, toutes les surfaces entrant en contact avec le nouvel utilisateur doivent être désinfectées avec un désinfectant à séchage rapide.

Si une housse n'est pas amovible, nettoyez-la avec un chiffon humide et du savon ou avec un désinfectant (conformément aux instructions du fabricant). Assurez-vous que les surfaces sont rincées avec de l'eau propre et entièrement séchées.

Si la housse de coussin possède une étiquette avec des instructions de lavage, vous pouvez la laver. Suivez les instructions indiquées sur l'étiquette. N'oubliez pas de retirer la mousse à l'intérieur des coussins et de fermer les fermetures éclair avant de laver.

NOTEZ Suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien. N'utilisez pas de solvants organiques. Ne pas laver avec des produits chimiques. Ne pas repasser ni essorer en machine.



INTÉGRATION COMPLÈTE DE SEDEO PRO, JAY ET WHITMYER

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS CLINIQUES LES PLUS DIVERS ET RÉALISER UNE POSTURE OPTIMALE POUR CHAQUE UTILISATEUR, NOUS AVONS INTÉGRÉ DES SOLUTIONS JAY ET WHITMYER. COMMANDEZ AISÉMENT DES COUSSINS D'ASSISE ET DE DOSSIER JAY ET DES APPUIS-TÊTE WHITMYER AVEC LE SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO. POUR UN MAXIMUM DE CONFORT, STABILITÉ ET PROTECTION DE LA PEAU, SANS COMPROMIS.

SEDEO
PRO

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

WHITMYER[®]



APPUIS-TÊTE WHITMYER

TELEMENT DE CHOIX

CHOISISSEZ SIMPLEMENT L'UNE DES OPTIONS WHITMYER COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES D'ASSISE SEDEO PRO.



AXYS



AXYS Offset



LINX2



Cobra XTRA Flip Back



PLUSH PADS

- Un choix d'options et accessoires pour créer une solution parfaitement adaptée
- Un choix de coussinets avec des largeurs allant de 150 à 480 mm



GRANDS A-PLUSH PADS AVEC SUPPORTS LATÉRAUX ARTICULÉS RÉGLABLES

- Un choix d'options et accessoires et des supports latéraux articulés réglables
- Des coussinets extra larges de 300 à 480 mm de largeur



A part Plush et Speciale Plush il existe d'autres solutions Whitmyer que vous pouvez monter facilement et rapidement sur Sedeo Pro.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR LA BROCHURE **APPUIS-TÊTE WHITMYER** QUE VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE WEB

 **WHITMYER®**

OPTIONS DE DOSSIER JAY J3 SUR SEDEO PRO


COMMANDEZ LES DOSSIERS JAY J3 AISÉMENT AVEC UN SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES APPLICATIONS CLINIQUES DE CES DOSSIERS, VOYEZ LA BROCHURE JAY.

Les dossiers J3 confortables multiplient le nombre de solutions que vous pouvez offrir à vos clients. Les options de support très spécifiques de J3 permettent de répondre aux défis thérapeutiques les plus exigeants.

Disponibles dans une variété de dimensions et quatre niveaux d'enveloppement pour un support latéral léger (SC), moyen (MC) ou élevé (DC ou MDC).

- Dossier J3 de série sur un cadre Sedeo Pro, avec ajustements en hauteur, profondeur et angle
- Une ample plage de réglage de la profondeur sans perte de profondeur d'assise
- Fixation intégrée pour des éléments de soutien latéral
- Solution élégante avec un cache arrière
- Des nouvelles fixations (conçues expressément pour Sedeo Pro) permettent d'intégrer les dossiers J3 existants avec Sedeo Pro

4 QUATRE NIVEAUX D'ENVELOPEMENT

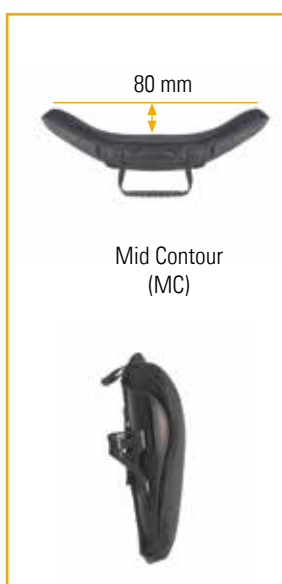

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS JAY
VOYEZ NOTRE SITE WEB

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

COUSSINS JAY

FACILES À COMMANDER

COMMANDEZ CES COUSSINS D'ASSISE JAY AISÉMENT EN MÊME TEMPS QU'UN SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES APPLICATIONS CLINIQUES DE CES COUSSINS, VOYEZ LA BROCHURE JAY.

6

CHOIX DE SIX TYPES DE COUSSINS JAY



JAY Easy



JAY Balance



JAY Xtreme Active



JAY J2 Deep Contour



JAY J2



JAY Soft Combi P

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES COUSSINS D'ASSISE JAY
VOYEZ LES BROCHURES JAY ET NOTRE SITE WEB

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

COMMANDES DE CONDUITE INNOVANTES SWITCH-IT

UNE VARIÉTÉ D'OPTIONS DE COMMANDE SPÉCIALES SWITCH-IT OFFRE UN CONTRÔLE OPTIMAL DU FAUTEUIL ROULANT, QUELS QUE SOIENT LES BESOINS DE SON UTILISATEUR.

Des unités de commande spéciales, des contacteurs spécifiques, des commandes au menton ou avec la tête... le système de commande est complètement adaptable en fonction des besoins et préférences de l'utilisateur.



SYSTÈME DE MONTAGE LINK-IT

LES MODULES ET TIGES DISPONIBLES PERMETTENT DE METTRE EN PLACE DES COMBINAISONS INFINIES ET CRÉER LES SOLUTIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Link-IT est solide et facile à positionner dans toutes les directions et tous les angles. Mais en plus le design épuré et minimaliste du fauteuil roulant reste préservé. Voulez-vous ajouter une unité de commande sur l'accoudoir ? Ou un contacteur sur la tête ? C'est simple. Just Link-IT !



POUR PLUS D'INFORMATIONS VOYEZ LA BROCHURE
ÉLECTRONIQUE SÉRIE Q

COMPATIBILITÉ SEDEO PRO

SÉRIE Q, IBIS ET PUMA 20/40

LES MODÈLES LES PLUS RÉCENTS DE COUSSINS ET HOUSSES D'ASSISE ET DE DOSSIER SEDEO PRO SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX FAUTEUILS ROULANTS DE LA SÉRIE Q. ILS SONT ÉGALEMENT COMPATIBLES AVEC LES FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES PUMA 20/40 ET LES FAUTEUILS ROULANTS MANUELS IBIS. POUR LES PROFESSIONNELS IL EST TRÈS AGRÉABLE D'AVOIR À FAIRE AVEC UN SEUL SYSTÈME (QUI LEUR EST DÉJÀ FAMILIER) ET UN MINIMUM DE STOCKS.



Les nouveaux coussins Sedeo Pro sont rétrocompatibles avec les versions antérieures de Sedeo Pro et même avec Sedeo Original. Un simple stock de ces coussins suffit donc pour tous les besoins d'entretien et de rechange de produits Sedeo. Chaque livraison de coussin inclut en standard les éléments de montage nécessaires pour fauteuils Ibis et Puma 20/40 avec Sedeo Pro.

UTILISATION SUR UN FAUTEUIL IBIS OU PUMA 20/40 AVEC SEDEO PRO



AUTRES SOLUTIONS D'ASSISE DE LA SÉRIE Q

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO ERGO

SEDEO ERGO PERMET DE FAIRE DES REPOSITIONNEMENTS FRÉQUENTS, AUTONOMES ET ERGONOMIQUES GRÂCE À UN RÉGLAGE BIOMÉCANIQUE BREVETÉ. SEDEO ERGO PERMET AUSSI DE PROGRAMMER ET MÉMORISER UNE VARIÉTÉ DE POSTURES. ET DE RÉPONDRE AUX BESOINS CLINIQUES LES PLUS PERTINENTS.



Q700 RMP



Q700 RMC



Q700 RMT

SEDEO ERGO aide à conserver toujours une bonne posture quelle que soit la position et contribue de façon effective au soulagement des points de pression. La fonction de repositionnement biométrique avec mémorisation permet de revenir d'une position inclinée à sa position initiale sans risquer de glisser vers le bas.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
VOYEZ NOTRE SITE WEB
(SOUS Q700)

SEDEO ERGO

Besoins cliniques utilisateur	Moyens à élevés
Options JAY et WHITMYER	Oui
Mémorisation de positions d'assise	Oui
Verticalisation	-
Position couchée	Oui
Remote Seating App	Oui
Rappels automatiques pour changer de position et soulager les points de pression	Oui
Hauteur d'assise	430 - 480 mm
Largeur de l'assise	400 - 560 mm
Profondeur de l'assise	400 - 560 mm
Hauteur du dossier	560 - 700 mm
Réglage électrique d l'inclinaison du dossier	175°
Bascule d'assise	30° à 50°
Lift C-Me	300 mm
Poids max. utilisateur	0 - 160 kg

Q Serie

AUTRES SOLUTIONS D'ASSISE DE LA SÉRIE Q

SYSTÈME D'ASSISE UP SEDEO ERGO

UP SEDEO ERGO COMBINE TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME D'ASSISE SEDEO ERGO AVEC UNE FONCTION DE VERTICALISATION ROBUSTE PERMETTANT UN ANGLE DE VERTICALISATION JUSQU'À 85°. LA VERTICALISATION RÉDUIT LES RISQUES D'ESCARRE, AMÉLIORE LA CAPACITÉ ET L'AMPLITUDE DE MOUVEMENTS ET PRÉSENTE DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LA SANTÉ ET SUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES.



Q700 UP RMC



Q700 UP RMT

Bénéfices de la verticalisation :

- Réduit les risques d'escarres.
- Augmente le niveau de participation au sein du cercle social.
- Améliore la capacité et l'amplitude de mouvement et réduit le risque de contractures.
- Favorise les fonctions des organes vitaux.
- Améliore la santé des os et retarde les déformations squelettiques.
- Réduit le tonus musculaire anormal et la spasticité excessive.

UP SEDEO ERGO

Besoins cliniques utilisateur	Moyens à élevés
Options JAY et WHITMYER	Oui
Mémorisation de positions d'assise	Oui
Verticalisation	Oui
Position couchée	Oui
Remote Seating App	Oui
Rappels automatiques pour changer de position et soulager les points de pression	Oui
Hauteur d'assise	450 - 480 mm
Largeur de l'assise	400 - 500 mm
Profondeur de l'assise	400 - 540 mm
Hauteur du dossier	560 - 610 mm
Réglage électrique d l'inclinaison du dossier	175°
Bascule d'assise	22°
Lift C-Me	200 mm
Poids max. utilisateur	0 - 120 kg

BUILT-4-ME

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

LES EXPERTS DU SERVICE BUILT-4-ME SE DÉDIENT À LA FABRICATION DE PRODUITS PERSONNALISÉS, AU-DELÀ DE TOUTES LES SOLUTIONS PROPOSÉES EN STANDARD. CE SERVICE SPÉCIFIQUE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE AU SEIN DE SUNRISE MEDICAL.

Le groupe, composé d'experts en ingénierie, achats et production, analyse la demande, conçoit et fabrique la solution personnalisée qui répondra exactement aux besoins de l'utilisateur, tout en lui garantissant un résultat efficace et sûr. Il peut s'agir de personnalisations de tout genre :

- Un look personnalisé (pour donner par exemple une touche de couleur personnelle à un châssis ou des coussins),
- Des accessoires supplémentaires (un support pour des périphériques mobiles, une tablette sur mesure, etc.),
- Des adaptations fonctionnelles (des contacteurs particuliers, commandes ou autres options personnelles).

Le traitement des commandes Built-4-Me est totalement intégré et complémentaire aux opérations de production habituelles. Les avantages pour l'utilisateur et le revendeur du fauteuil roulant sont multiples. Votre demande est traitée dans les plus brefs délais. Nous vous proposons des solutions élégantes intégrées et une procédure simple et claire (du formulaire de demande au devis ou à la livraison). Cette procédure inclura toujours une analyse de risque car notre objectif est de fournir des solutions efficaces sans danger.



built4me



SEDEO PRO

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

SEDEO PRO PORTE LE SYMBOLE CE ET EST CONFORME AUX
RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES RELATIVES AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX.



Le produit satisfait les exigences et normes suivantes. La conformité est vérifiée par des organismes indépendants :

Directive européenne 93/42 EEC Applicable tel que mentionné dans le manuel d'utilisation.

EN 12182 (2014) Classe B Les exigences de la norme EN 12182 (2014) tel que mentionné dans EN 12184 (2014) : Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Exigences générales et les méthodes d'essai

EN 12184 (2014) Classe B Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs - Exigences et méthodes d'essai

ISO 7176-8: 2014 Exigences de résistance statique, de résistance au choc et de résistance à la fatigue

ISO 7176-9 Essais climatiques pour fauteuils roulants électriques

ISO 7176-14 Exigences et méthodes d'essai relatives aux systèmes de commande des fauteuils roulants électriques 1997

ISO 7176-16: 2012 Exigences de résistance à l'inflammation des parties rembourrées

ISO 7176-19 (2008) Fauteuils roulants - Partie 19 : Dispositifs de mobilité montés sur roues et destinés à être utilisés comme sièges dans des véhicules à moteur : SEDEO PRO répond aux exigences d'essai de collision, tel que décrit dans ISO 7176-19

Testé également avec système d'arrimage Dahl

EN-ISO 10993-5 (2009) Évaluation biologique des dispositifs médicaux

EN 1021 1&2 Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés. Source d'allumage : cigarette en combustion / flamme équivalente à celle d'une allumette.

SEDEO PRO

COMMENT NOUS MESURONS

VOICI LES DÉFINITIONS DES DIMENSIONS ET RÉGLAGES TELS QUE VOUS POUVEZ LES RENCONTRER DANS CETTE BROCHURE OU SUR NOTRE SITE WEB. S'IL VOUS RESTE DES QUESTIONS N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER SUNRISE MEDICAL.



Hauteur d'assise

Distance du sol à la face supérieure de la plaque d'assise (sans coussin) mesurée à vide.



Largeur d'assise

Distance entre les manchettes des accoudoirs.



Profondeur d'assise

Distance entre le devant de la plaque d'assise et le devant du coussin de dossier standard, mesurée au milieu.



Hauteur du dossier

Distance entre la face supérieure de la plaque d'assise et le haut du coussin de dossier.



Longueur du segment jambier

Distance entre la face supérieure des palettes et la face supérieure de la plaque d'assise.



Hauteur des manchettes sur les accoudoirs

Distance entre la face supérieure de la plaque d'assise et le haut d'une manchette.




Hauteur des protège-vêtements

Distance entre la face supérieure de la plaque d'assise et le point le plus haut du protège-vêtements.



Hauteur du plot d'abduction

Distance entre la face supérieure de la plaque d'assise et le haut du plot d'abduction.

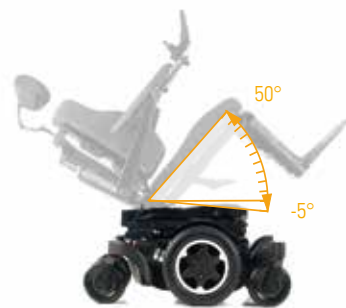


Inclinaison de la bascule d'assise



Inclinaison du dossier



Angle du repose-jambes central

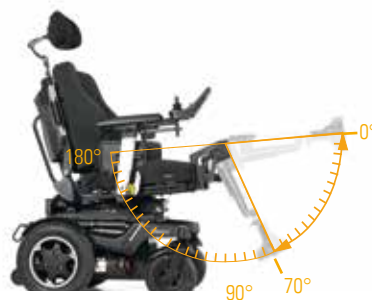

Angle du genou (repose-pieds escamotables)



Angle de la cheville

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU UNE DÉMONSTRATION DU SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO CONTACTEZ UN DE NOS SPÉCIALISTES.

SEDEO PRO

CARACTÉRISTIQUES

UN APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE SEDEO PRO.
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS N'HÉSITER PAS A CONTACTER SUNRISE MEDICAL.

SEDEO PRO	
Configurations et positionnement	● ● ● ●
Intégration de commandes spéciales	● ● ● ●
Charge maximale	0 - 160 kg
Hauteur d'assise	415 - 490 mm
Largeur d'assise	380 - 560 mm
Profondeur d'assise	400 - 600 mm
Hauteur du dossier	440 - 620 mm
Longueur de la jambe inférieure	360 - 540 mm
Hauteur de l'accoudoir	Accoudoirs escamotables, amovibles 260 - 380 mm Accoudoirs relevables à compensation 260 - 400 mm
Plage de réglage du lift (combiné à une bascule électrique 0° à 30°)	300 mm
Angle de basculement de l'assise	Module d'inclinaison d'assise manuelle 0°, 3°, 6°, 9° Bascule électrique 0° à 30° Bascule électrique -5° à 25° Bascule électrique 0° à 50° Bascule électrique 5° à 45°
Inclinaison du dossier	Réglage mécanique 90 à 120° Réglage avec vérin 90 à 130° Réglage électrique 90 à 130° Réglage biomécanique 90 à 150°
Angle du repose-jambe central	0 - 70°
Angle des repose-pieds escamotables	70 - 180°

Q Serie

○ modèles ○ électronique ● systèmes d'assise

